


№	Перв. примен.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «КОММЕТ ХОЛДИНГ»

И. В. Тетюхин
29 февраля 2016 г.

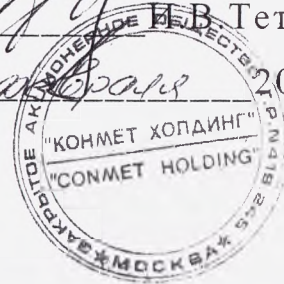

Вертикализатор-Стойка СН 38.02

Руководство по эксплуатации

СН 38.02РЭ

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И

г. Москва

1. Вертикализатор – стойка (далее по тексту - стойка) СН 38.02 позволяет вертикализировать не ходячих детей и проводить с ними различные занятия как групповые, так и индивидуальные.

2 Технические параметры

	СН 38.02.01	СН 38.02.02
Ширина, мм, не более	500	610
Длина, мм, не более	650	860
Высота, мм, не более	1100	1490
Масса, кг, не более.	18	20

3 Комплектность

№	Наименование	Количество
1	Вертикализатор	1
2	Пояс для крепления грудного отдела	1
3	Упор спинной	1
4	Упор боковой	2
4	Упор для коленей	1
5	Упоры для стоп	5
6	Руководство по эксплуатации СН 38.02 РЭ	1

Примечание: По согласованию с заказчиком комплектность может быть изменена.

СН 38.02.РЭ

**Вертикализатор-стойка
СН-38.02
Руководство по
эксплуатации**

Лит. Масса Масштаб

Лист 2 Листов 5

КОНМЕТ ХОЛДИНГ

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гераскина	<i>Г. Гераскина</i>	29.12.2015
Пров.		Верходанов	<i>В. Верходанов</i>	
Т. контр.				
Нач. гр.				
Н. контр		Новиков	<i>Н. Новиков</i>	
Утв.				

4 Описание конструкции

Стойка (рис.1) состоит из основания (1) на колесах, на котором крепятся вертикальные стойки (2), На стойках крепятся регулируемые по высоте пояс для крепления грудного отдела (3), упор для спины (4), упора для колен (6) и регулируемые по ширине боковыми упорами (5), на основании имеются регулируемые упоры для стоп (7,8)

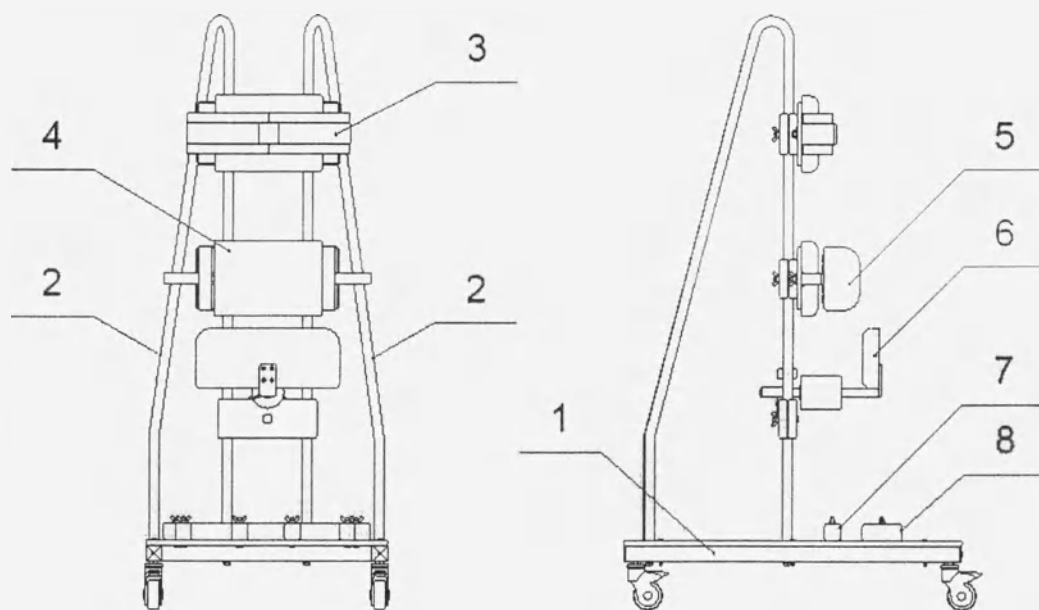


Рисунок 1

СН 38.02.РЭ

Лист

3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № 34.

Взам. инв. №2

В. И. Яковлев

1001.	
-------	--

ETHIOPIA

ЦИР

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9 Свидетельство о приемке

Вертикализатор-стойка СН 38.02_____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации.

М.П.

ПОДПИСЬ

дата

10 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу вертикализатора в течение 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Изделия с дефектами, возникшими в результате небрежного обращения, к гарантийному обслуживанию не принимаются.

Гарантийный ремонт и замена производится изготовителем по адресу:

125413, г. Москва, ул. Онежская, д.24/1,

ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

тел.: (495) 456-97-50

www.conmetholding.ru

М.П.

ПОДПИСЬ

дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

CH 38.02.PЭ

Лист

5

Верно

Генеральный директор ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

И.В.Тетюхин

К-во листов

5

дата

23.03.16

