



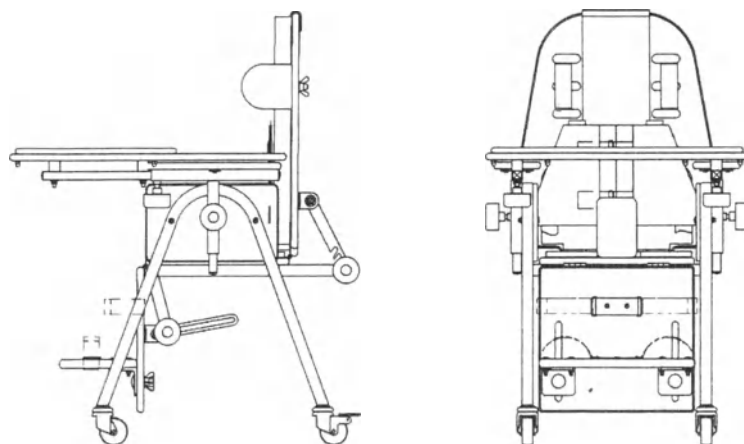


CH 37.01.01, CH 37.01.02

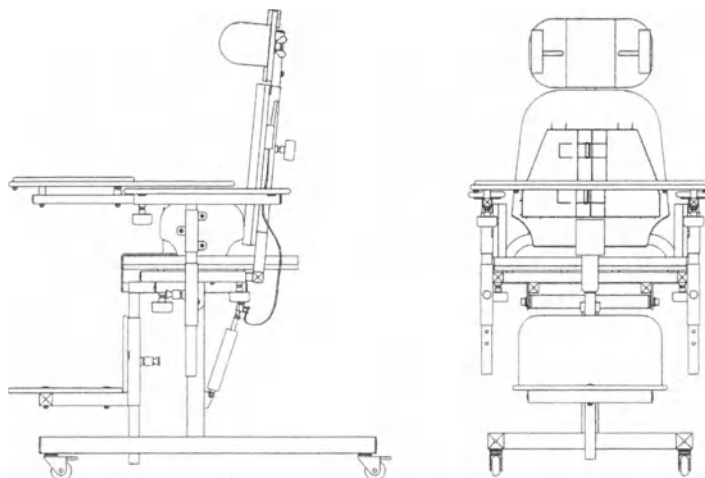


CH 37.01.03


Рисунок 1

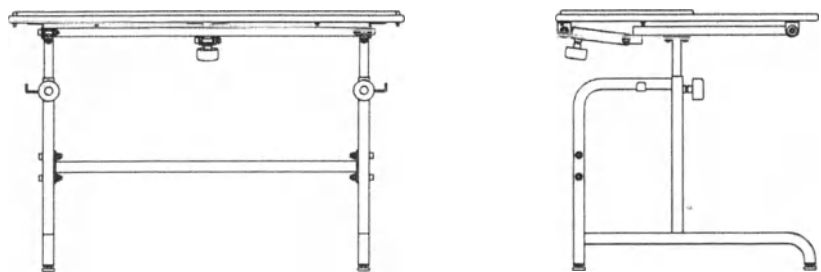


CH37.02.01

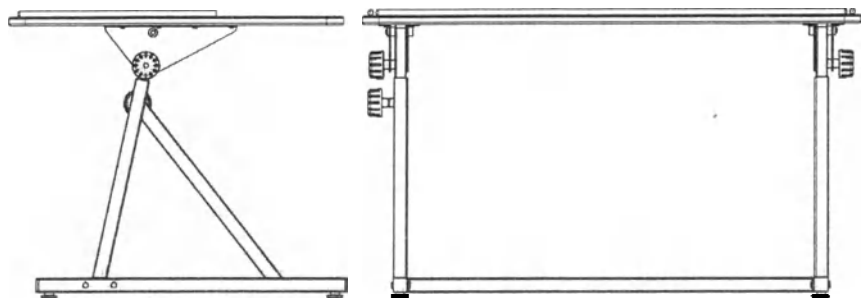

CH37.02.11

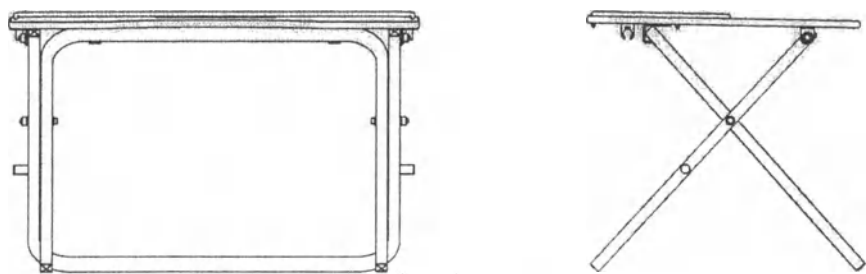

CH37.02.51

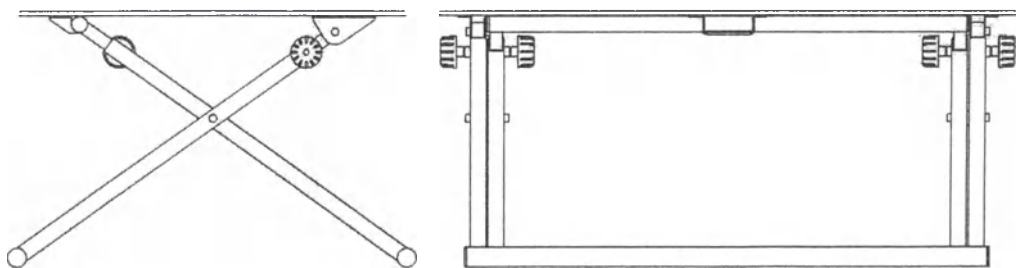


CH37.02.61

Рисунок 2

3	Зам.	40259145-003-2012		11.2012
2	Зам.	40259145-002-2010		05.02.10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4 Описание конструкции

Стул (рис.1) состоит из: 2-х боковин (1), спинки (2), сидения (3), направляющей для ног (4) с подножкой, двух подлокотников (6), абдуктора (7), 2-х упоров для шеи (8). Спинка и сидение покрыты матрасиками (9, 10). Спинка и направляющая для ног могут поворачиваться на рычагах, подлокотники регулируются по высоте, столешница регулируется по вылету. Элементы фиксируются в необходимом положении фиксаторами (11). Абдуктор крепится в нужном положении фиксатором (12). Подножка регулируется по высоте. Упоры для шеи регулируются по высоте через пазы спинки фиксаторами (13). Имеются ремни для фиксации ног (14) и лифчик (15) для фиксации тела.

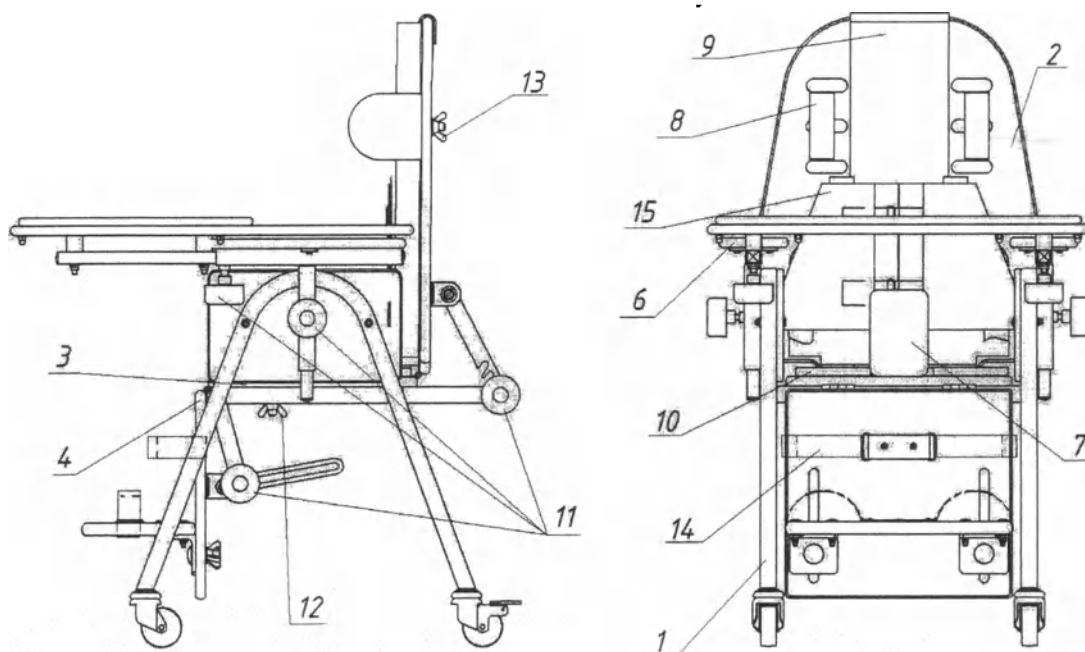

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Перед подготовкой стула к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом.

5.2 Распакуйте изделие, проверьте его визуальным осмотром и проверьте комплектность.

5.3 Проверьте работоспособность изделия:

5.3.1 Наклоните спинку, закрепите ее в нужном положении;

5.3.2 Наклоните подножку, закрепите ее в нужном положении;

5.3.3 Установите стол, зафиксируйте.

6 Меры безопасности

6.1 Перед началом использования проверьте исправность стула.

6.2 Перед началом процедуры установите спинку и подножку в нужное положение.

4 Описание конструкции

Стул (рис.1) состоит из: основания (1), сидения (2), спинки (3), подголовника (4), направляющей для ног (5), подножки (6), двух подлокотников с боковыми упорами (7), абдуктора (8), двух упоров для шеи (9). Спинка, сидение и боковины обтянуты. Спинке, сидению и направляющей для ног можно придать наклон с помощью газовой пружины (13), нажав на ручку (14). Подголовник, подножка, боковины регулируются по высоте фиксаторами и барашком (16, 18). Спинка регулируется по глубине барашком (18). Конечное положение выдвинутой спинки фиксируется кнопочным фиксатором (17). Абдуктор и упоры для шеи крепятся в нужном положении соответственно барашком (18) и фиксаторами (12). Стул комплектуется столом (10) и лифчиком для фиксации тела (19).

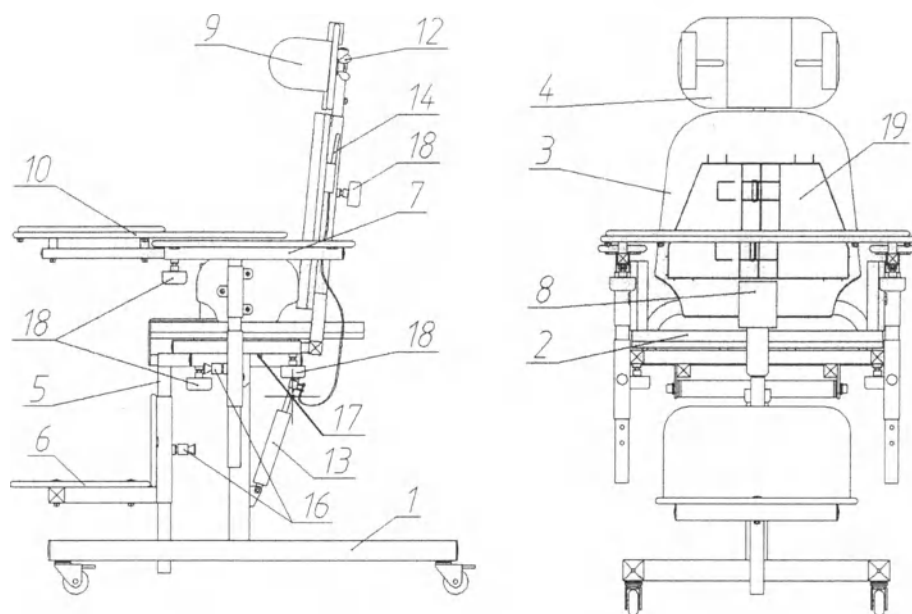


Рисунок 1

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Перед подготовкой стула к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом.

5.2 Распакуйте изделие, проверьте его визуальным осмотром и проверьте комплектность.

5.3 Проверьте работоспособность изделия:

5.3.1 Наклоните спинку, закрепите ее в нужном положении;

5.3.2 Наклоните подножку, закрепите ее в нужном положении;

5.3.3 Установите стол, зафиксируйте.

4 Описание конструкции

Парта (рис.1) состоит из основания (1), столешницы (2), Угол наклона столешницы регулируется перемещением трубки и фиксируется с помощью фиксатора (3). Столешница может регулироваться по высоте (поднимаясь или опускаясь) и фиксироваться в нужном положении с помощью фиксаторов (4).

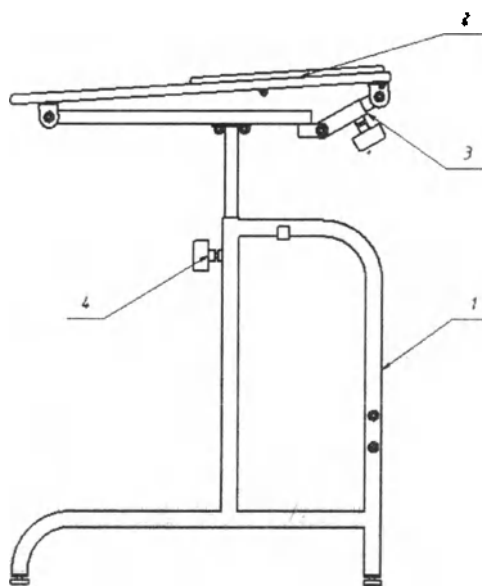


Рисунок 1

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Перед подготовкой парты к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом.

5.2 Распакуйте изделие, проверьте его визуальным осмотром и проверьте комплектность.

5.3 Проверьте работоспособность изделия:

5.3.1 Наклоните столешницу, закрепите ее в нужном положении;

5.3.2 Поднимите, опустите столешницу, закрепите ее в нужном положении.

6 Меры безопасности

6.1 Перед началом использования проверьте исправность парты.

6.2 Перед началом использования установите столешницу в нужное положение.

4 Описание конструкции

Парта (рис.1) состоит из основания (1), столешницы (2). Угол наклона столешницы регулируется перемещением пластины и фиксируется с помощью фиксаторов (3). Столешница может регулироваться по высоте (поднимаясь или опускаясь) и фиксироваться в нужном положении с помощью фиксаторов (4).

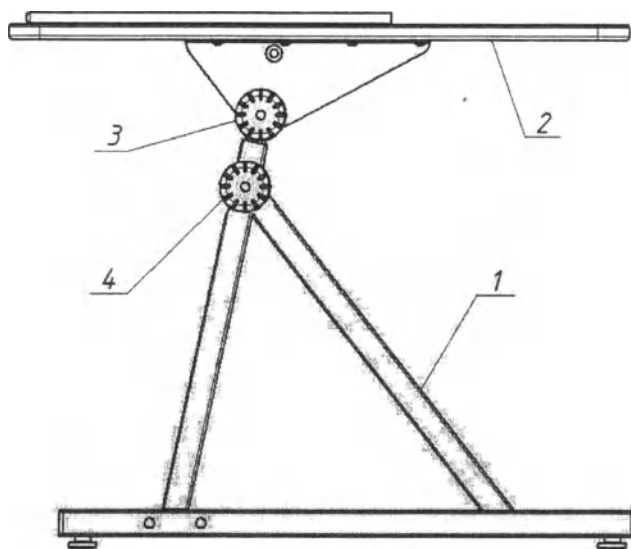


Рисунок 1

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Перед подготовкой парты к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом.

5.2 Распакуйте изделие, проверьте комплектность и его внешний вид визуальным осмотром.

5.3 Проверьте работоспособность изделия:

5.3.1 Наклоните столешницу, закрепите ее в нужном положении;

5.3.2 Поднимите, опустите столешницу, закрепите ее в нужном положении.

6 Меры безопасности

6.1 Перед началом использования проверьте исправность парты.

6.2 Перед началом использования установите столешницу в нужное положение.

4 Описание конструкции

Парта (рис.1) состоит из основания, состоящего из двух дуг (1) и (2), и столешницы (3). На дуге (1) имеется фиксатор (4). Столешница может регулироваться по высоте перестановкой скоб (5) в нужное положение. С помощью клипсы (6) парта фиксируется на фиксаторе (4) сложенном состоянии.

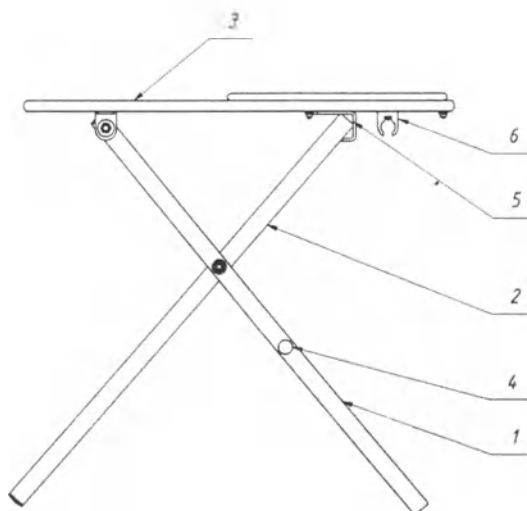


Рисунок 1

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Перед подготовкой парты к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом.

5.2 Распакуйте изделие, проверьте его визуальным осмотром и проверьте комплектность.

5.3 Подготовьте парту к использованию. Установите скобы в нужное положение.

6 Меры безопасности

6.1 Перед началом использования проверьте исправность парты.

6.2 Перед началом использования установите столешницу в нужное положение.

4 Описание конструкции

Парта (рис.1) состоит из основания, состоящего из двух дуг (1) и (2), столешницы (3) и фиксатора парты в сложенном состоянии (5). Столешница может регулироваться по высоте выдвижением труб и закреплением с помощью фиксаторов (4) в необходимом положении. Столешницу можно установить под углом с помощью выдвижения труб с поворотными кронштейнами и фиксации их в нужном положении фиксатором (4).

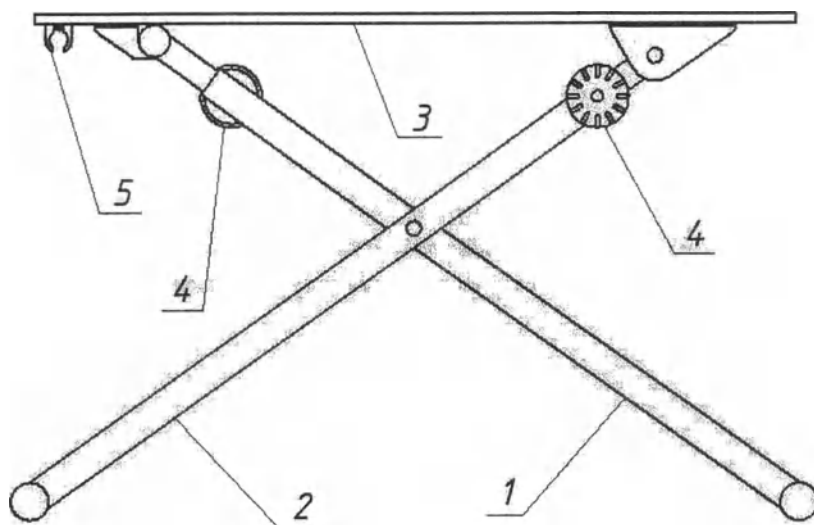


Рисунок 1

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Перед подготовкой парты к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом.

5.2 Распакуйте изделие, проверьте его визуальным осмотром и проверьте комплектность.

5.3 Проверьте работоспособность изделия:

5.3.1 Наклоните столешницу, закрепите ее в нужном положении;

5.3.2 Поднимите, опустите столешницу, закрепите ее в нужном положении.

6 Меры безопасности

6.1 Перед началом использования проверьте исправность парты.

6.2 Перед началом использования установите столешницу в нужное положение.

CH 37.02.61

