

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Кировское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(ФГУП "Кировское ПрОП" Минздравсоцразвития России)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ФГУП "Кировское ПрОП"
Минздравсоцразвития России

  А. И. Лобин
« 15 » 2011 г.

РЕКЛИНАТОР ЭЛАСТИЧНЫЙ КР1-35
(памятка по пользованию КР1-35.00.00.ПП)

Реклинатор эластичный КР1-35 (далее – реклинатор) назначается пациентам при нефиксированных формах нарушений осанки, остеохондрозе грудного отдела позвоночника, для профилактики развития деформаций и остеохондроза грудного отдела позвоночника при длительных статических нагрузках на грудной отдел позвоночника при сидении.

1. Описание конструкции.

- 1.1. Реклинатор изготовлен из эластичной резины, на которую нашиты карманы из ленты веретеной и вставлены планшеты.
- 1.2. В нижней части пришта эластичная лента, фиксирующая изделие на талии с креплением лентой «контакт».
- 1.3. В верхней части эластичная лента способствует развороту плеч назад, перекрещивается на спине и фиксируется на талии.
- 1.4. Конструкция реклинатора обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации и не препятствует ношению верхней одежды. Реклинатор не ограничивает дыхательные движения грудной клетки, плотно прилегает к телу, не оказывая болезненного давления.
- 1.5. Размер реклинатора определяется величиной высоты спины и окружности талии:

Обозначение, типоразмер	Высота спины (h), см	Окружность талии, см
КР1-35-01	30.0 – 32.0	56 - 64
КР1-35-02	34.0 – 36.0	56 – 64
КР1-35-03	34.0 – 36.0	64 – 72
КР1-35-04	36.0 – 38.0	64 – 72
КР1-35-05	36.0 – 38.0	72 – 80
КР1-35-06	40.0 – 42.0	72 – 80
КР1-35-07	40.0 – 42.0	80 – 90
КР1-35-08	42.0 – 44.0	80 - 90

2. Надевание и пользование реклинатором.

- 2.1. Реклинатор надевают на пациента в положении стоя на трикотажную майку или футболку.

- 2.2. Конструкция реклинатора должна обеспечивать удобство пользования, надевания и снятия.
- 2.3. Реклинатор должен плотно прилегать к телу, не оказывая при этом болезненного давления.

3. Уход за реклинатором.

- 3.1. При пользовании реклинатором следует оберегать его от механических повреждений. Не допускается контакта реклинатора с растворителями, щелочами, красящими веществами и горячими предметами.
- 3.2. Реклинатор устойчив к санитарно-гигиенической обработке нейтральными растворами моющих средств.

4. Уход за телом.

- 4.1. Не реже одного раза в сутки следует проводить гигиеническую обработку кожных покровов тела мыльным раствором.

5. Ремонт реклинатора.

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество реклинатора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации реклинатора – 40 дней со дня выдачи изделия потребителю. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие изготовитель производит замену реклинатора бесплатно.
- 5.3. реклинатор обеспечивает срок службы на протяжении времени его медицинского назначения. Срок сохраняемости не менее шести месяцев.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 3 листов.

Директор

