

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(ФГУП "Кировское ПРОП" Минздравсоцразвития России)**

**Памятка по пользованию
Бандаж послеродовой БП-«Грация»-«КПРОП»**

Киров, 2010

Бандаж послеродовой предназначен для профилактических целей. Бандаж используется для восстановления нормального тонуса мышц передней брюшной стенки родильниц в послеродовом периоде, оказывает благоприятное влияние на самочувствие женщины и функциональное состояние разных органов и систем. Изделие является специальным приспособлением, предназначенным для поднятия и поддержания органов брюшной полости в послеродовой период. Способствует более быстрому сокращению мышц брюшного пресса и тазового дна. Предотвращает опущение органов брюшной полости и малого таза.

I. Описание конструкции.

Бандаж послеродовой БП-«Грация»-«КПрОП» изготовлен из хлопчатобумажной ткани «Грация» на подкладке из бязи с двумя планшетами сзади, застежкой на пуговицах или контактной ленте, шнуровкой сзади для регулирования при изменении объема. В верхней передней части бандажа посередине втачена эластичная бандажная лента шириной 8 см и длиной 15 см.. Материал по токсикологическим и санитарно-техническим показателям, отсутствию раздражающего и сенсibilизирующего действия отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к медицинским изделиям, длительно контактирующим с кожным покровом.

II. Пользование бандажом.

Бандаж послеродовой БП-«Грация» удобен в эксплуатации. Послеродовой бандаж одевается утром в положении лежа на спине со слегка втянутым животом, что обеспечивает наиболее благоприятное положение мышц передней брюшной стенки и кишечника, используется в течение дня, снимается также в положении лежа. Бандаж надевается на сорочку. Застегивается бандаж, начиная с нижней пуговицы. Регулировка шнуровки рекомендуется только по мере изменения объемов. Изделие показано к применению всем женщинам в послеродовом периоде.

III. Уход за бандажом.

При загрязнении бандаж можно постирать в теплой воде до 40° с щеткой с мылом или с добавлением моющих средств типа «лotos». Сушить в расправленном виде.

Бандаж следует оберегать от влаги и не хранить вблизи источника тепла.

IV. Транспортировка и хранение.

Бандажи транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000, при условии хранения 5 ГОСТ 15150.

Бандажи в упаковке предприятий-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150 при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 70% при 25°C.

V. Указания по эксплуатации.

После транспортировки в условиях отрицательных температур бандажи в транспортной упаковке должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

Правила эксплуатации бандажей отражены в этикетке.

VI. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи при условии проведения не более 5 стирок.

610020, г. Киров, ул. Карла Маркса, д.28

телефон: (8332) 64-49-28