

Фотографическое изображение

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови человека «Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-357-41390295-2022

Общий вид
Серия 220620


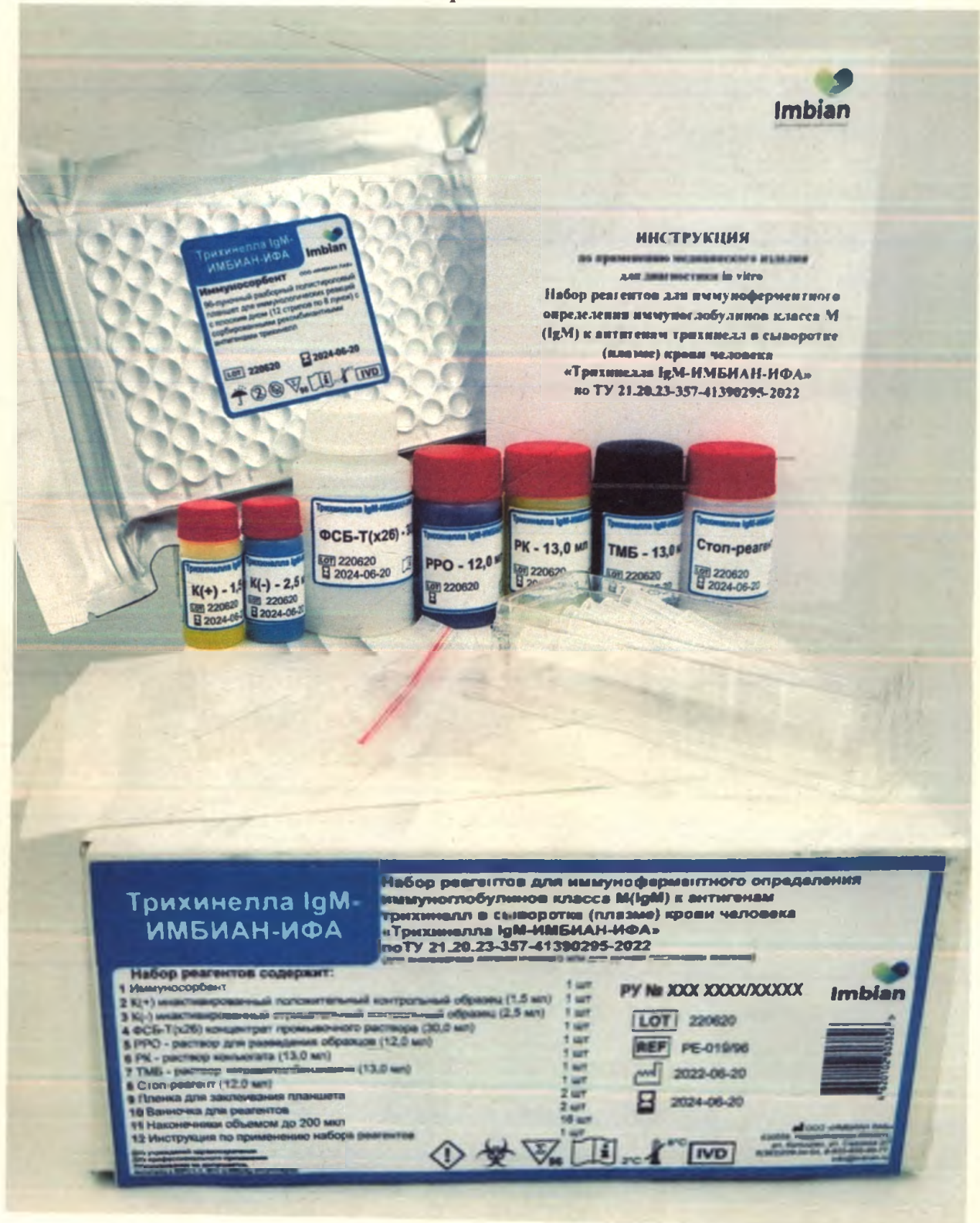


Фото упаковки





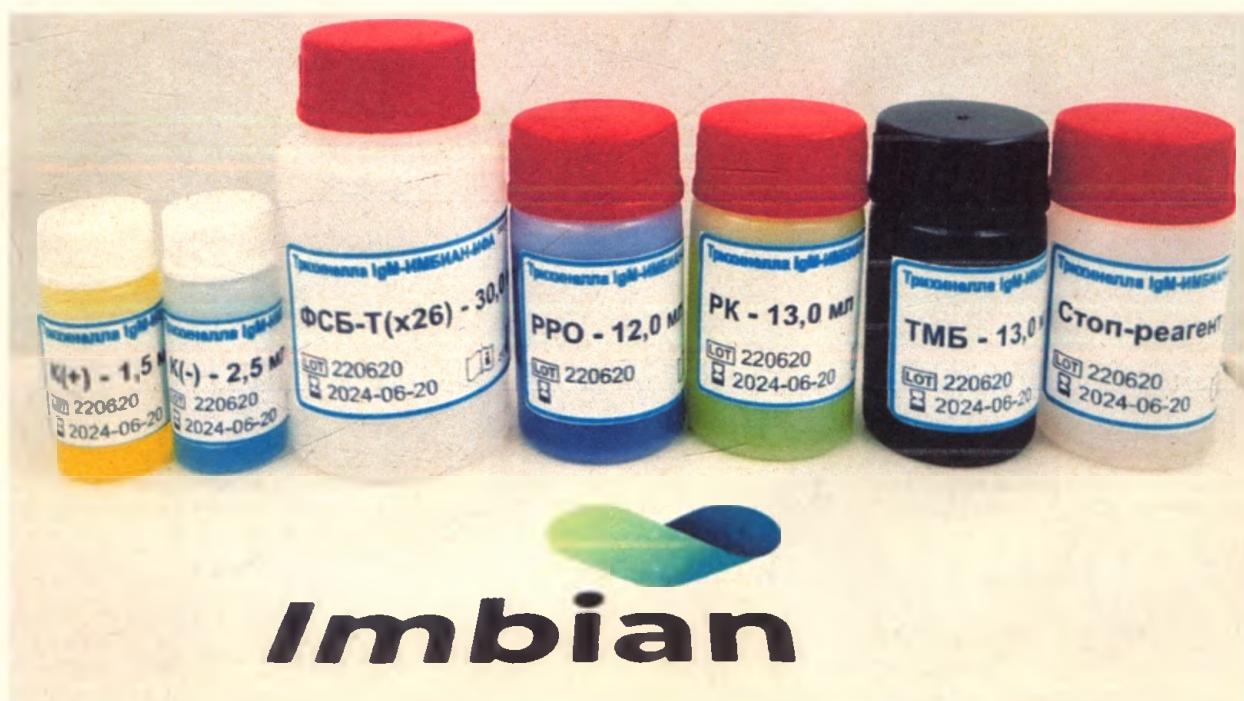

Серия 220621

Общий вид



ИНСТРУКЦИЯ

на применение иммуноферментного анализа для диагностики in vitro

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к антигенам трихинеллы в сыворотке (плазме) крови человека
«Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-357-41390295-2022

Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к антигенам трихинеллы в сыворотке (плазме) крови человека
«Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-357-41390295-2022
(для автоматизированного или для ручного постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 K(+)-инaktivированный положительный контрольный образец (1,5 мл)
- 3 K(-)-инaktivированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл)
- 4 ФСБ-Т(x26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 5 PPO - раствор для разведения образцов (12,0 мл)
- 6 PK - раствор конъюгата (13,0 мл)
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 8 Стоп-реагент (12,0 мл)
- 9 Пленка для закрывания планшета
- 10 Вилочка для реагентов
- 11 Инструкции по применению набора реагентов
- 12 Инструкция по применению набора реагентов

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
2 шт
1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 220621

REF PE-019/96

2022-06-21

2024-06-21




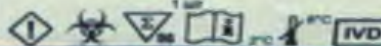


Фото упаковки

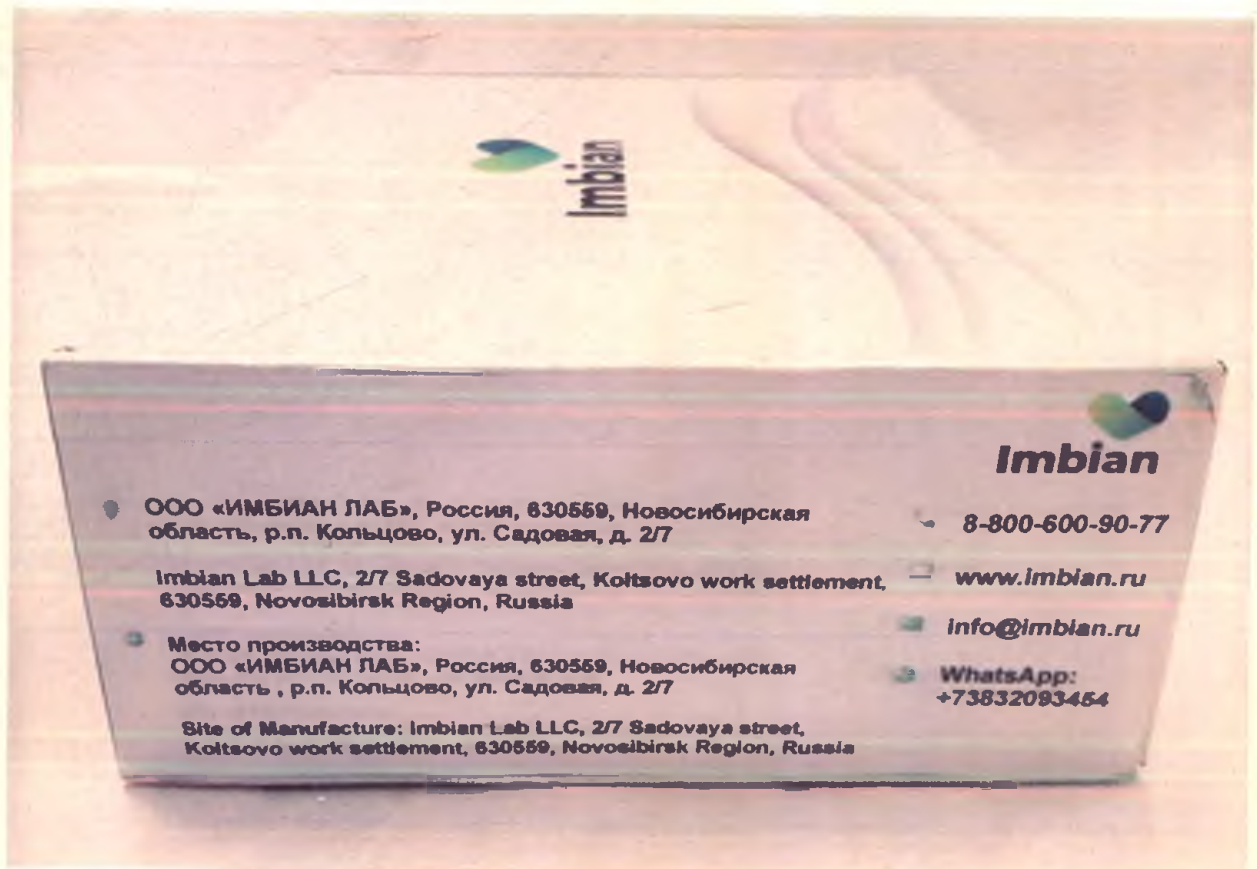

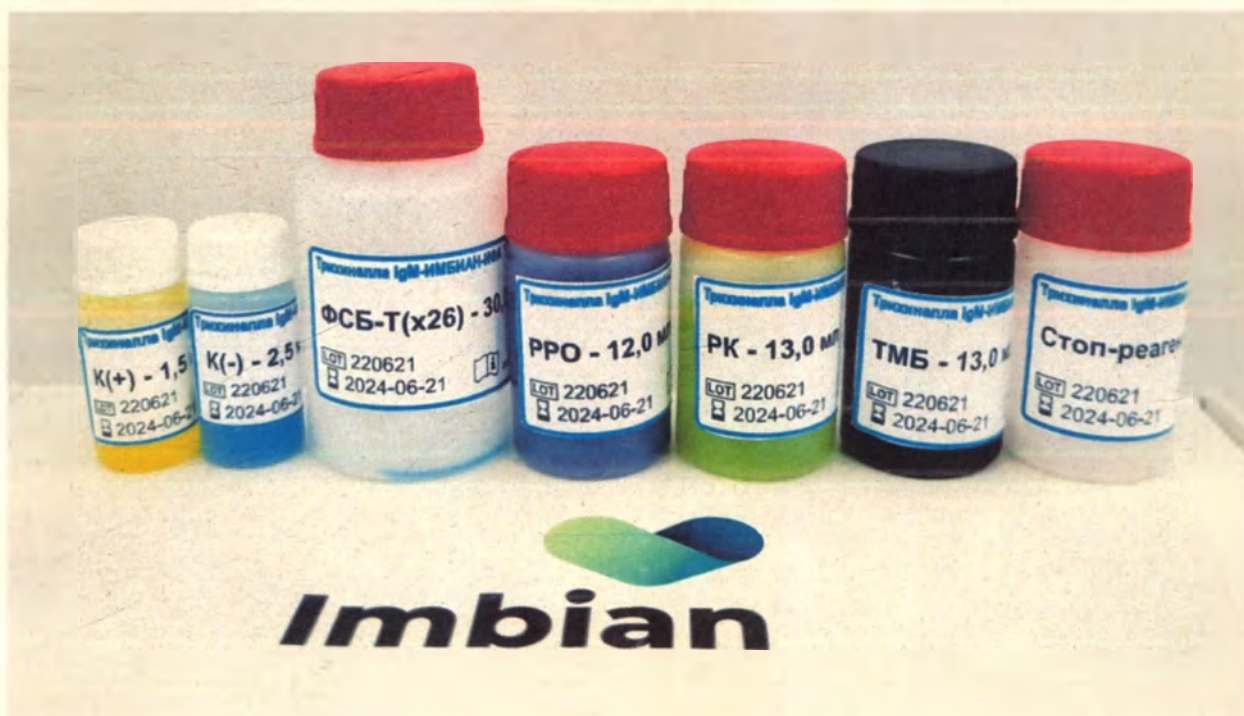

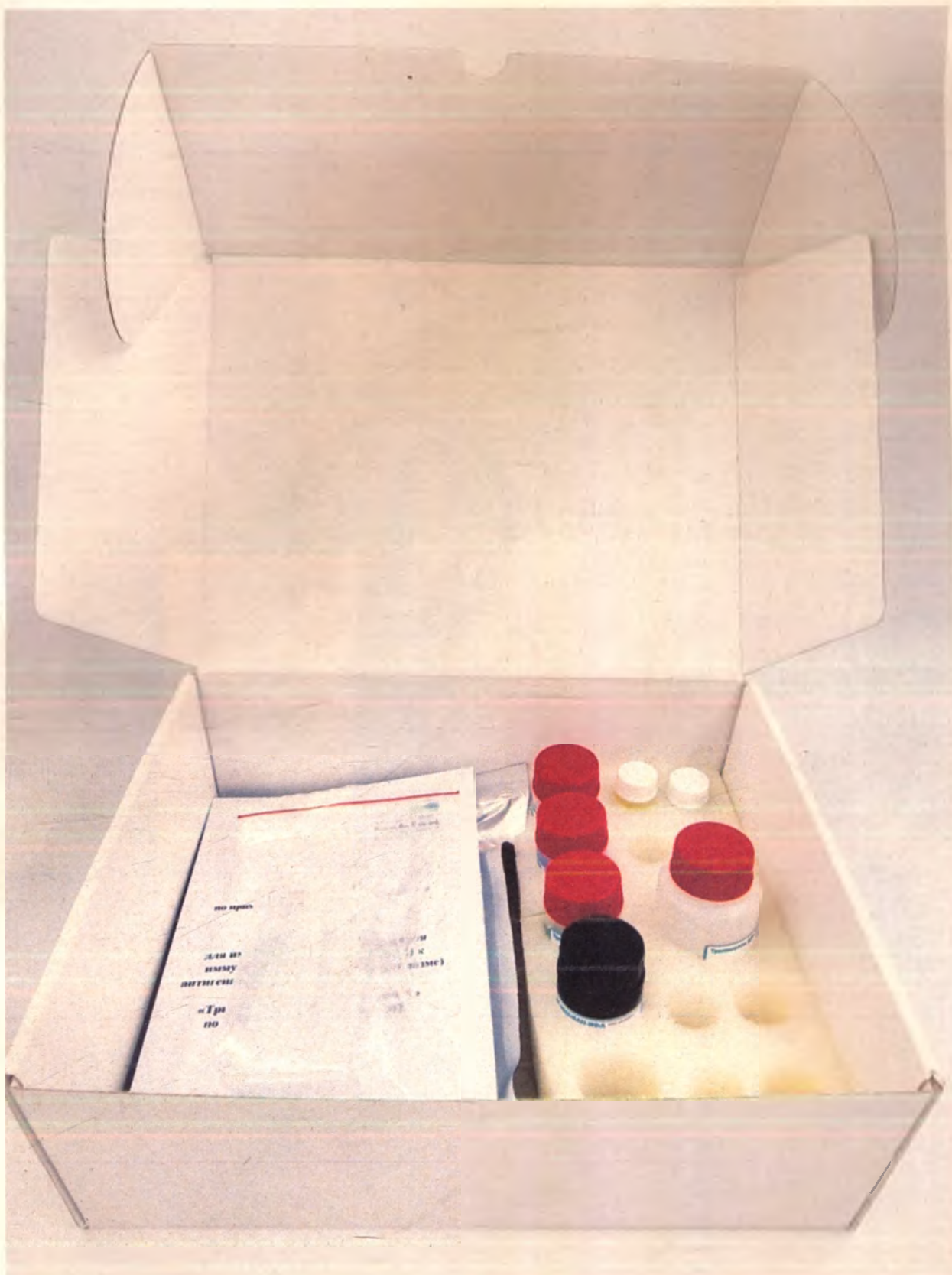

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«24» 10 2022 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист 02

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова
2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

2022 г.

Образцы маркировки

**Набор реагентов для иммуноферментного определения
иммуноглобулинов класса М (IgM) к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови
человека «Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-357-41390295-2022**

1. Образцы этикеток компонентов набора «Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА»

Наименование компонента	Этикетка
Иммуносорбент	
К(+) – инактивированный положительный контрольный образец	
К(-) – инактивированный отрицательный контрольный образец	
ФСБ-Т(х26) – концентрат промывочного раствора	
РРО – раствор для разведения образцов	

РК – раствор конъюгата	Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА РК - 13,0 мл LOT XXXXXX ППТ-ММ-ДД 2-8°C
ТМБ – раствор тетраметилбензидина	Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА РРО - 12,0 мл LOT XXXXXX ППТ-ММ-ДД 2-8°C
Стоп-реагент	Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА Стоп-реагент - 12,0 мл LOT XXXXXX ППТ-ММ-ДД 2-8°C

2. Образцы этикеток шоу-бокса набора «Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА»

2.1. Образец боковой этикетки



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2



Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7



Imbian

8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp: +73832093454

2.2. Образец основной этикетки

Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови человека «Трихинелла IgM-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-357-41390295-2022 (для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	1 шт
2 К(+) инактивированный положительный контрольный образец (1,5 мл)	1 шт
3 К(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл)	1 шт
4 ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл)	1 шт
5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл)	1 шт
6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)	1 шт
7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)	1 шт
8 Стоп-реагент (12,0 мл)	1 шт
9 Пленка для заклеивания планшета	1 шт
10 Ванночка для реагентов	2 шт
11 Наконечники объемом до 200 мкл	2 шт
12 Инструкция по применению набора реагентов	16 шт
	1 шт

ПУ № XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF PE-019/96


ГТГГ-ММ-ДД

ГТГГ-ММ-ДД



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559 Новосибирская область
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru

Для определения в сыворотке (плазме) крови человека
Допускается использование только оригинальных реагентов
Замораживание не допускается.
Анализ проводить в соответствии с инструкцией

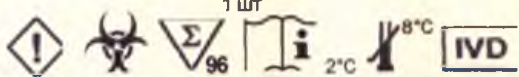

Прошнуровано, про
и скреплено печат

3 лист 9

Генеральный дирек

ООО ИМБИАН ЛАБ

В.В.

" 10 202

