


75x20x170



ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Забор образцов 1.1 Насальный мазок (для самотестирования)

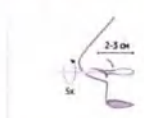

- Введите горизонтально туфель для взятия мазков в ноздрю на 2-3 см.
- Повращайте туфель 5 раз, а затем оставьте его там на 5-10 секунд, чтобы образец впитался.



- Вытащите туфель из носовой полости.

1.2. Назофарингеальный мазок (для профессионального исследования) см. раздел 17 инструкции по применению

2. Процедура тестирования



- Вставьте туфель с назальным/назофарингеальным мазком в пробирку с реагентом.



- Энергично поворачивайте по меньшей мере 10 раз и отожмите туфель о стенки пробирки. Сожмите стенки пробирки, чтобы получить максимально возможное количество жидкости.
- Дальнейшим образом утилизируйте туфель.



- Закрыйте пробирку с образцом насадкой и, держа пробирку вертикально, добавьте 3 капли (примерно 100 мкл) образца без пузырьков воздуха в лунку для образца тестовой кассеты.



- Считайте результаты через 10-15 минут. (Высокая влажность образца может препятствовать развитию. В связи с этим не следует использовать после достаточного растворения).

⚠ Не считайте результат по истечении 15 минут

3. Интерпретация результатов



Отрицательный результат Положительный результат Недействительный результат

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН XXXX/XXX



Биозентек Ко., Линггай, 1805, 53, Касан Диджитал 2-ро.
Кванчун, Гу, Сунг, 08588, Республика Корея
+82-2-855-5194 +82-2-866-5194 biozentech@gmail.com http://biozentech.co.kr

COVID-19 Antigen Rapid Test
Nanobio CARE



1 Тест

ДЛЯ САМОТЕСТИРОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Набор реагентов «Экспресс-тест»
для качественного иммунохроматографического
выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2
в назальных и назофарингеальных мазках
«Nanobio CARE COVID-19 Antigen Rapid Test»


Nanobio CARE COVID-19 Antigen Rapid Test

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 1, В СОСТАВЕ:

- Тестовая кассета с осушителем - 1 шт
- Пробирка с реагентом (0,3 мл) - 1 шт
- Насадка-капельница - 1 шт
- Тупфер для взятия мазков стерильный
(Disposable Sterile Swab (Viral sampling swab))
производства "Жетинг Гонддонг Медикал
Технопаджи Ко. Лтд.", Китай
- Инструкция по применению - 1 шт
- Не замораживать
- Набор использовать только в одноразовых перчатках
(не входит в состав набора)

LOT NBRCOV222A08

OCT. 2024

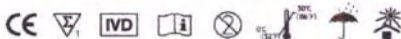

BioZentech

Nanobio CARE
COVID-19 Antigen Rapid Test

МЕСТО
ДЛЯ
штрих-кода

СДЕЛАНО В КОРее

REF NBRCOV-2201

BC REF

АТЛАС БИОТИ
оп.30.09/П
Сыктывинская
33/206
80-479, Понань,
Польша
+48-605-474-754

25 тестов в наборе

BioZentech


Nanobio CARE COVID-19 Antigen Rapid Test

ДЛЯ САМОТЕСТИРОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Nanobio CARE COVID-19 Antigen Rapid Test

Набор реагентов «Экспресс-тест
для качественного иммунохроматографического
выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2
в назальных и назофарингеальных мазках
«Nanobio CARE COVID-19 Antigen Rapid Test»

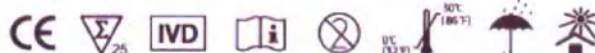

25 тестов в наборе

BioZentech

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 2, В СОСТАВЕ:

Тестовая кассета с осушителем - 25 шт

Пробирка с реагентом (0,3 мл) - 25 шт

Насадка-капельница - 25 шт

Тупфер для взятия мазков стерильный (Disposable Sterile Swab (Viral sampling swab))
производства "Жетианг Гонгдонг Медикал Технолоджи Ко. Лтд.", Китай - 25 шт

Инструкция по применению - 1 шт

Не замораживать

Набор использовать только в одноразовых перчатках
(не входят в состав набора)



Биозентек Ко., Лимитед. 1805, 53, Касан Диджитал 2-ро,
Кымчхонгу, Сеул, 08588, Республика Корея

+82-2-855-5194 +82-2-866-5194

biozentech@gmail.com

<http://biozentech.co.kr>

Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX

1. Забор образцов

1.1 Назальный мазок (для самотестирования)



- Введите горизонтально туффер для ватки в носовую полость на 2-3 см.
- Повращайте туффер 5 раз, а затем оставьте его там на 5-10 секунд, чтобы образцы были взяты.



- Вытащите туффер из носовой полости.


1.2. Назофарингеальный мазок (для профессионального исследования)

см. раздел 17 инструкции по применению.


2. Процедура тестирования



- Откройте пробирку с реагентом.
- Вставьте туффер с назальным/назофарингеальным мазком в пробирку с реагентом.

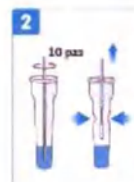


- Энергично поворачивайте по меньшей мере 10 раз и отожмите туффер о стенки пробирки.
- Сожмите стенки пробирки, чтобы получить максимально возможное количество жидкости.
- Должным образом уплотните туффер.

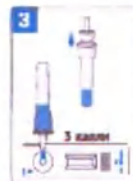

- Закройте пробирку с образцом насадкой и, держа пробирку вертикально, добавьте 3 капли (примерно 100 мкл) образца без пузырьков воздуха в лунку для образца тестовой кассеты.

- Считайте результаты через 10-15 минут. Высокая вязкость образца может препятствовать растворению. В таком случае следует использовать после достаточного растворения.
- Не считывайте результат по истечении 15 минут.

3. Интерпретация результатов

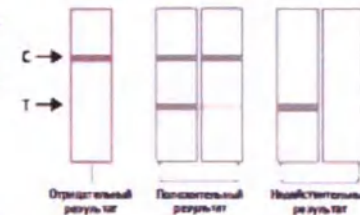

Отрицательный результат

Положительный результат

Недействительный результат

REF NBRCOV-2225

СДЕЛАНО В КОРее


EC REP АТЛАС БЬЮТИ сп.з.о.ул, Стшешинска 33/206,
60-479, Познань, Польша
+48-605-474-754

LOT NBRCOV222A08



ОСТ. 2024


место
для
штрих-кода

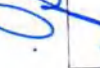


Макет маркировки

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в назальных и назофарингеальных мазках «Nanobio CARE COVID-19 Antigen Rapid Test», лот NBRCOV222A08, в вариантах исполнения»

Этикетка на групповую упаковку с пробиркой с реагентом и насадкой-капельницей (для варианта исполнения 1)

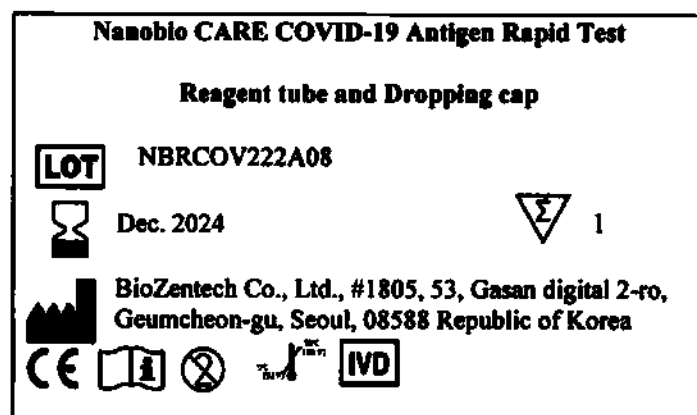

Этикетка на групповую упаковку с пробирками с реагентом (для варианта исполнения 2)

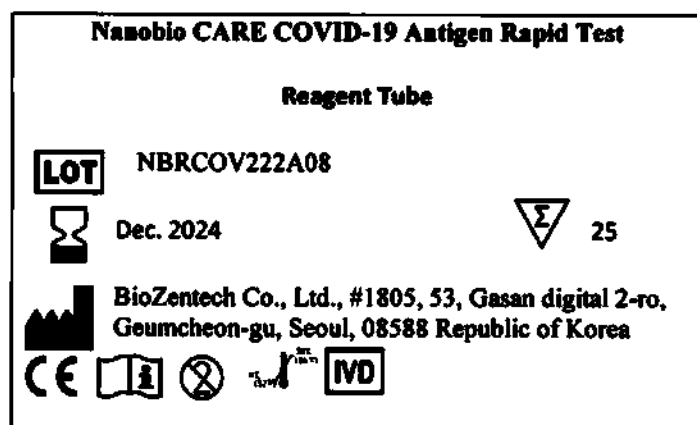

Этикетка на групповую упаковку с тупферами для взятия мазков стерильными (для варианта исполнения 2)



Этикетка на групповую упаковку с насадками-капельницей (для варианта исполнения 2)



Прошито 2 листов
Генеральный директор
ЗАО ФармФирма «Сотекс»
_____ В.Р.Яцук

[Handwritten signature]




КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
КОРОЛЕВА Е.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ № Ш 17-03/390
ОТ 02.12.2021.

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в назальных и назофарингеальных мазках «Nanobio CARE COVID-19 Antigen Rapid Test», лот NBRCOV222A08, в вариантах исполнения»

производства компании BioZentech Co., Ltd. / БиоЗентек Ко., Лтд., Республика Корея


Общий вид набора реагентов (вариант исполнения 1 (1 тест в упаковке)):

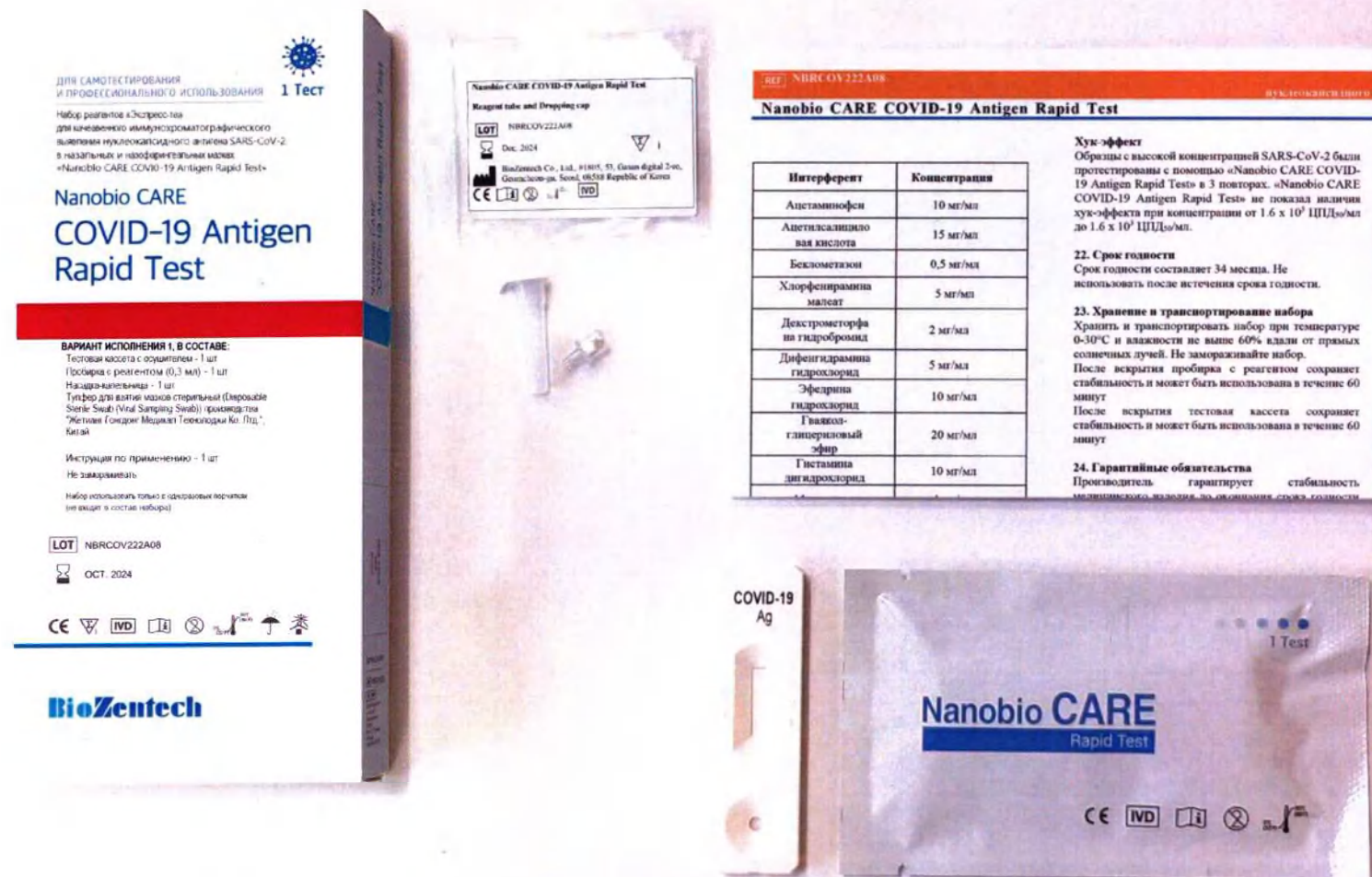


Общий вид набора реагентов (вариант исполнения 2 (25 тестов в упаковке)):




Тестовая кассета с осушителем:

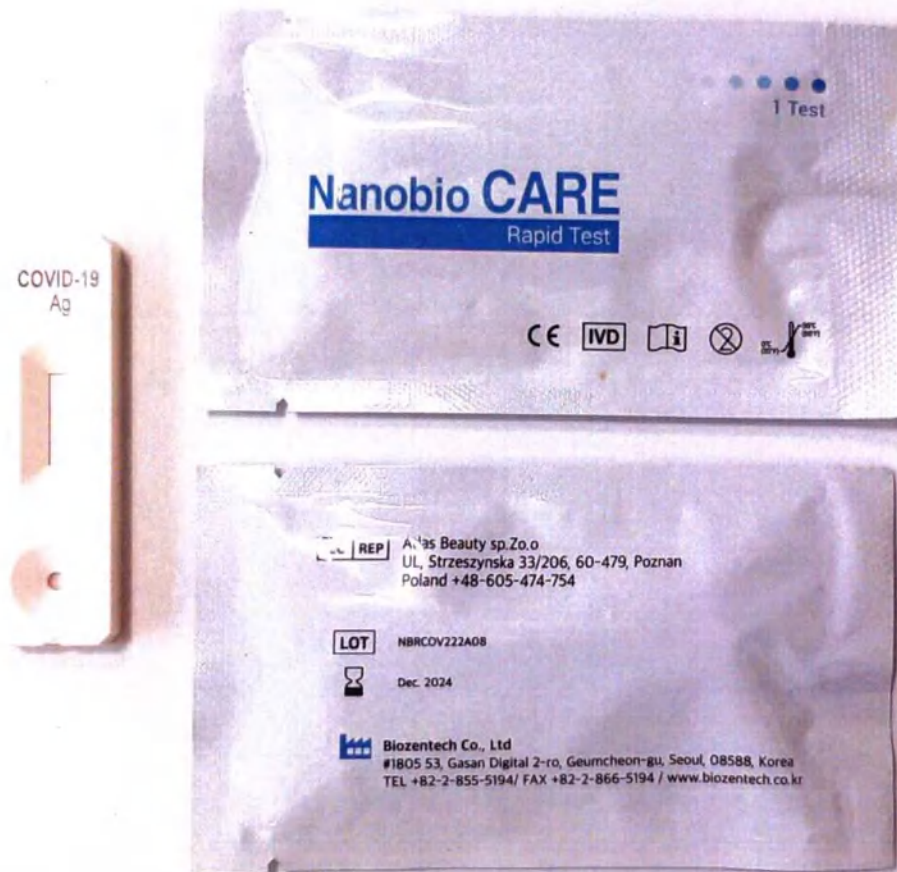

Пробирка с реагентом (0,3 мл/пробирка) и насадка-капельница (для варианта исполнения 1 (1 тест в упаковке)):

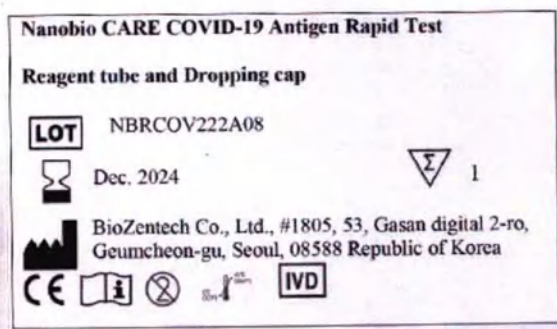

Пробирка с реагентом (0,3 мл/пробирка) – 25 шт. (для варианта исполнения 2 (25 тестов в упаковке)):

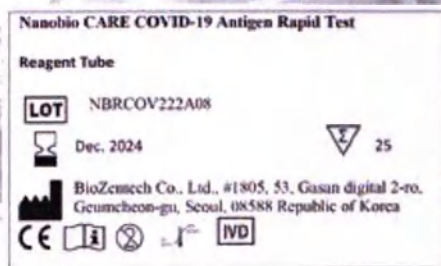

Насадка-капельница – 25 шт. (для варианта исполнения 2 (25 тестов в упаковке)):



Стерильный тампон для взятия мазка (тупфер производства "Жетианг Гонгдонг Медикал Технолоджи Ко. Лтд.", Китай) – 25 шт. (для варианта исполнения 2 (25 тестов в упаковке)):



Прошито 8 листов
Генеральный директор
ЗАО ФармФирма «Сотекс»
_____ В.Р.Яцук

[Handwritten signature]



КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
КОРОЛЕВА Е.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ № Ш 17-03/390
ОТ 02.12.2021.