




Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных
по ТУ 32.50.50-001-40407668-2020

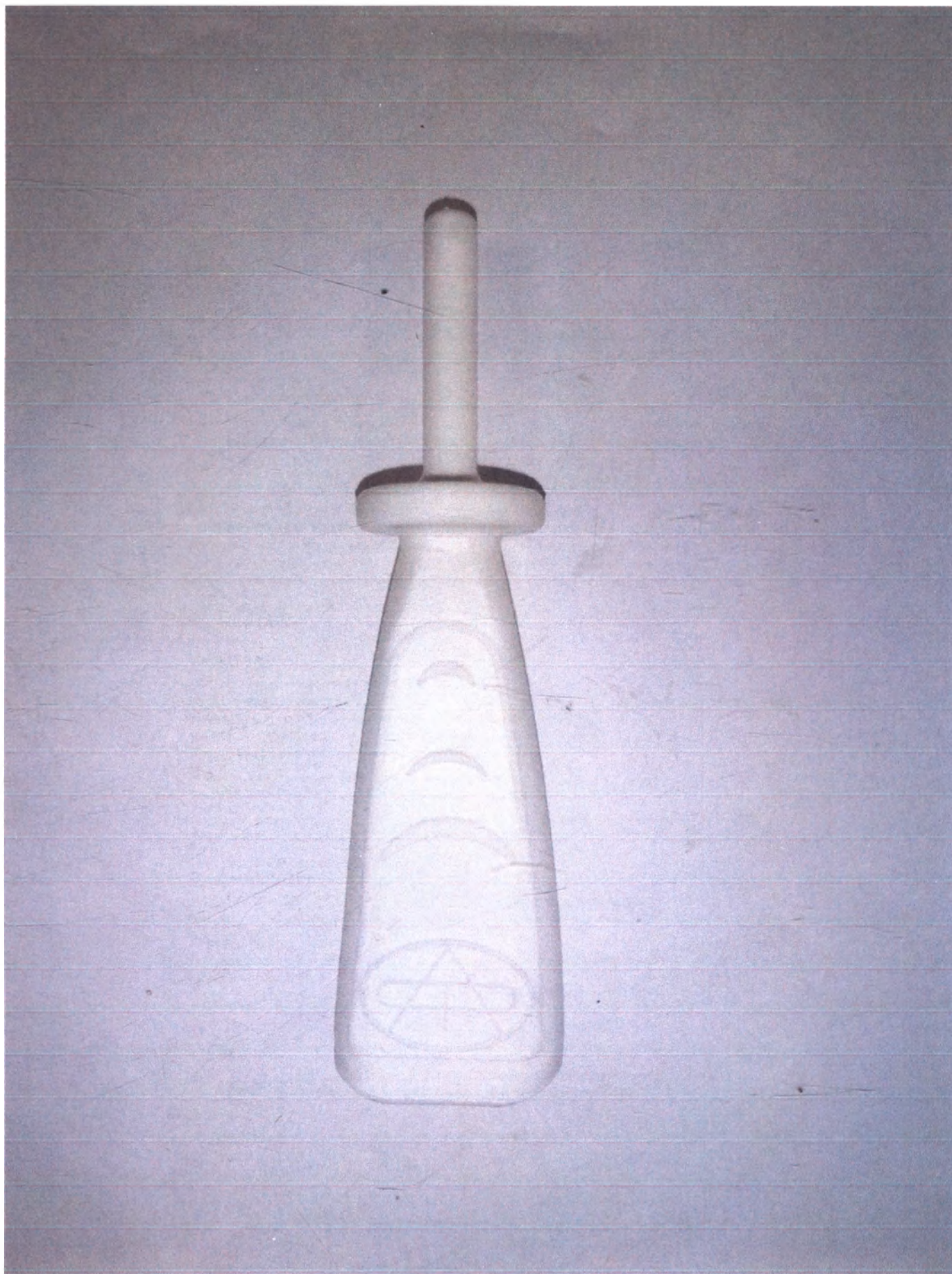

ООО «Объединение Альфапластик»
Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных

ТУ 32.50.50-001-40407668-2020

РУ №

Инструкция по применению

Назначение и область применения.

Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных (далее по тексту – трубка или изделие), предназначена для новорожденных при повышенном газообразовании, запоре и коликах.

Трубка представляет собой трубочку с отверстиями с обеих сторон. На одном конце трубки есть зажим, что позволяет ввести трубку на необходимую глубину.

Конеч, вводимый в анальное отверстие, закруглен, что исключает риск травматических повреждений.

Трубка изготовлена из термопластичного эластомера, который при соприкосновении с телом нагревается и становится более мягким, что также снижает риск повреждения слизистой.

Трубка выпускается нестерильной для индивидуального многократного использования, но не для повторного.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения и в домашних условиях.

Показания для применения.

- при частом газообразовании;
- при запоре;
- при коликах.

Противопоказания для применения.

- опухоль прямой кишки;
- любые воспалительные заболевания в области анального отверстия;
- кишечное кровотечение;
- врожденная непроходимость кишечника.

Возможные побочные действия при использовании.

Индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данной инструкции отсутствуют.

Меры предосторожности

Перед применением проконсультироваться с врачом.

ВНИМАНИЕ. Не пользуйтесь трубкой более 3-х раз в день, так как частое использование может вызвать привыкание к естественным рефлексам кишечника ребенка.

Порядок работы.

1. Распакуйте трубку, проверьте ее поверхность на предмет отсутствия сколов, острых краев, предусмотренных конструкцией.
2. Перед применением трубку промойте водопроводной водой, затем проведите дезинфекцию трубки в 3% -ный раствор перекиси водорода на 80 минут. По окончании дезинфекции промойте проточной питьевой водой.
3. Положите трубку на чистую поверхность.
4. Вымойте руки.
5. На чистую пеленку положите малыша на спину, помассируйте живот, аккуратно проведите по центру живота, затем сверху вниз, чтобы направить газы к анальному отверстию. Аналогично проведите на левой стороне.

Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных

по ТУ 32.50.50-001-40407668-2020

потребительская упаковка – пакет из полимерной пленки по ГОСТ 12302



Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных
по ТУ 32.50.50-001-40407668-2020

потребительская упаковка – пакет из полимерной пленки по ГОСТ 12302



ООО «Объединение Альфапластик»
Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных

ТУ 32.50.50-001-40407668-2020
РУ №

Инструкция по применению

Назначение и область применения.

Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных (далее по тексту – трубка или изделие), предназначена для новорожденных при повышенном газообразовании, запоре и коликах.

Трубка представляет собой трубочку с отверстиями с обеих сторон. На одном конце трубки имеется зажим, позволяющий вводить трубку на необходимую глубину.

Концы, вводимый в анальное отверстие, закруглен, что исключает риск травматических повреждений.

Трубка изготовлена из термопластичного эластомера, который при соприкосновении с телом ребенка размягчается и становится более мягким, что также снижает риск повреждения слизистой.

Трубка выпускается нестерильной для индивидуального многократного использования, но не предназначена для повторного использования.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения и в домашних условиях.

Показания для применения.

- при частом газообразовании;
- при запоре;
- при коликах.

Противопоказания для применения.

- опухоль прямой кишки;
- любые воспалительные заболевания в области анального отверстия;
- кишечное кровотечение;
- врожденная непроходимость кишечника.

Возможные побочные действия при использовании.

Индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данной инструкции отсутствуют.

Меры предосторожности

Перед применением проконсультироваться с врачом.

ВНИМАНИЕ. Не пользуйтесь трубкой более 3-х раз в день, так как частое использование может вызвать привыкание к рефлексу кишечника ребенка.

Порядок работы.


1. Распакуйте трубку, проверьте ее поверхность на предмет отсутствия сколов, острых краев, повреждений, предусмотренных конструкцией.
2. Перед применением трубку промойте водопроводной водой, затем проведите дезинфекцию трубки в 3%-ный раствор перекиси водорода на 80 минут. По окончании дезинфекции трубку промойте проточной питьевой водой.
3. Положите трубку на чистую поверхность.
4. Вывойте руки.
5. На чистую пеленку положите малыша на спину, помассируйте живот, аккуратно проводя по центру живота, затем сверху вниз, чтобы направить газы к анальному отверстию. Если ребенок плачет, успокойте его, поглаживая левую сторону.

Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных

по ТУ 32.50.50-001-40407668-2020

потребительская упаковка – пленка полипропиленовая

по ТУ 2245-003-70378591-2015

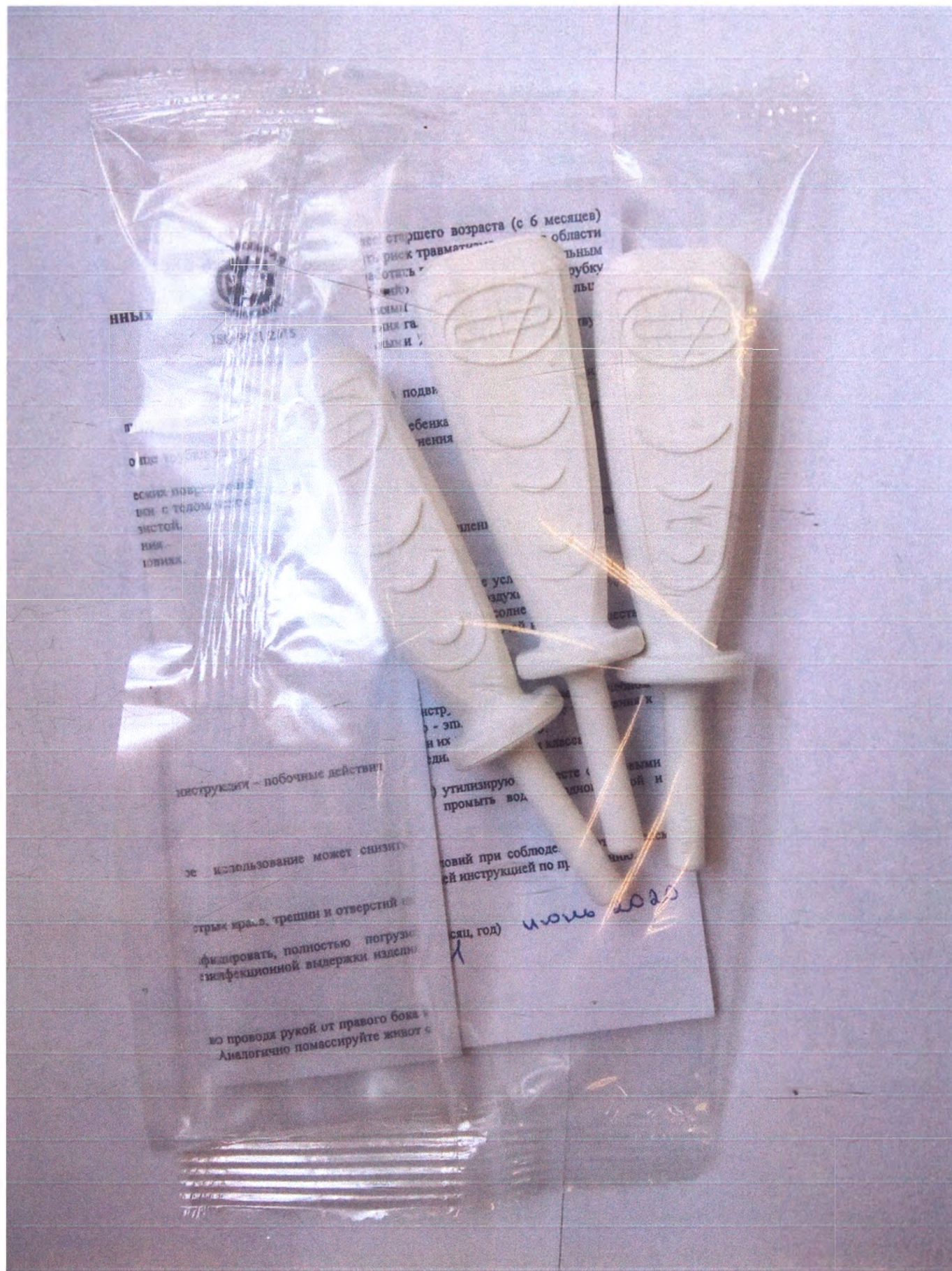


Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных
по ТУ 32.50.50-001-40407668-2020
потребительская упаковка – пленка полипропиленовая
по ТУ 2245-003-70378591-2015



**ОБЪЕДИНЕНИЕ
АЛЬФАПЛАСТИК**

**Трубка ПВХ газоотводная
для новорожденных**

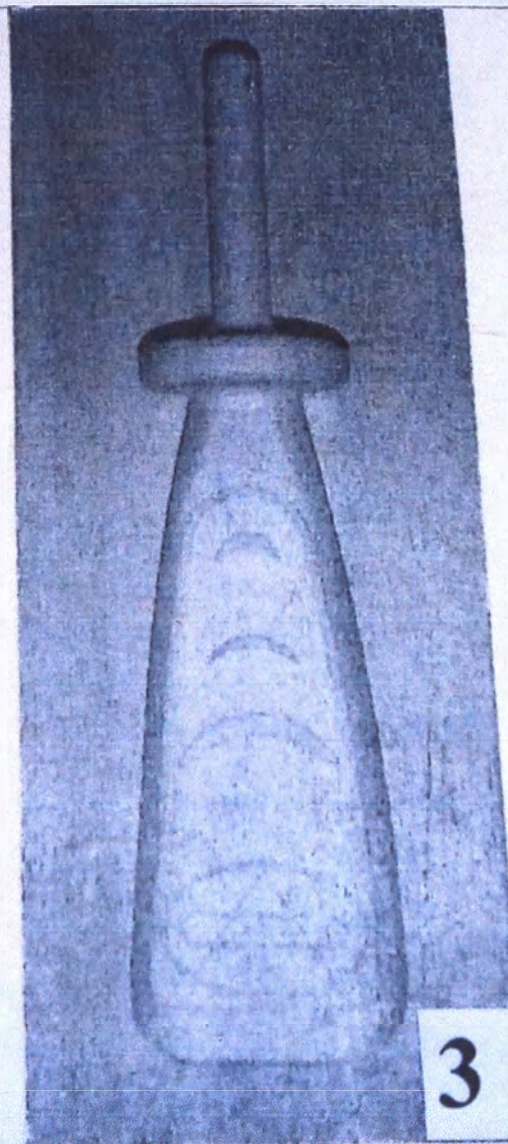

Сделано в России

3 шт.

Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных
по ТУ 32.50.50-001-40407668-2020

потребительская упаковка – коробка из картона по ГОСТ 7933

Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных
ТУ 32.50.50-001-40407668-2020
РУ №



Назначение и область применения.

ISO 9001 2015

Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных (далее по тексту – трубка или изделие), предназначена для новорожденных при повышенном газообразовании, запоре и коликах.

Трубка представляет собой трубочку с отверстиями с обеих сторон. На одном конце трубки имеется ограничитель, что позволяет ввести трубку на необходимую глубину. Конец, вводимый в анальное отверстие, закруглен, что исключает риск травматических повреждений.

Трубка изготовлена из термопластичного эластомера, который при соприкосновении с телом человека, быстро нагревается и становится более мягким, что также снижает риск повреждения слизистой.

Трубка выпускается нестерильной для индивидуального многоразового использования, но не более 5 раз.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения и в домашних условиях.

Гарантии.

Изготовитель гарантирует соответствие трубки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящей инструкцией по применению.

Гарантийный срок хранения - 3 года с даты изготовления.

Эксплуатационную документацию смотрите внутри упаковки

Дата выпуска (месяц, год) июнь 2020г.

Номер партии 1

Упаковщик Новорождзева Л.А.

ООО «Объединение Альфапластик». Россия.
107150, г. Москва, 4-ый проезд Подбельского, д.3
Место производства медицинского изделия: 302011,
г. Орел. Новосильское шоссе, д. 14,
тел. +7(4862) 59-84-16, 59-84-10

Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных
по ТУ 32.50.50-001-40407668-2020

потребительская упаковка – коробка из картона по ГОСТ 7933

Хрупкое. Осторожно.



ООО «Объединение Альфапластик»
Трубка ПВХ газоотводная для
новорожденных

ТУ 32.50.50-001-40407668-2020
РУ №



ISO 9001:2015

Количество: 90 шт.
Номер партии
ФИО упаковщика
Штамп ОТК

Новгородцева

Дата выпуска (месяц, год) *июль 2020*
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты
изготовления.

Трубки следует хранить в упакованном виде в
закрытом складском помещении по группам
условий хранения 1 по ГОСТ 15150 при
температуре от плюс 5 до плюс 40°C при
относительной влажности воздуха не выше 80 % на
расстоянии не менее 1 м от нагревательных
приборов, защищенными от воздействия прямых
солнечных лучей



Производитель:

ООО «Объединение Альфапластик», Россия,
107150, г. Москва, 4-ый проезд Подбельского, д.3
Место производства медицинского изделия:
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14,
тел. +7(4862) 59-84-10

Трубка ПВХ газоотводная для новорожденных

по ТУ 32.50.50-001-40407668-2020

транспортная упаковка – ящик из гофрированного картона по ГОСТ 13511

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

8 (восемь)

— листов

Директор ОЗРИ ООО
«Объединение Альфапластик»
С.Н. Мусатов

«20» 09 2022г.

