

ИНСТРУКЦИЯ

по применению комплекта для пломбирования зубов
на основе стеклянного иономерного цемента «Стомафил»

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект "Стомафил" предназначен для пломбирования кариозных полостей III и V классов. Допустимо использование "Стомафила" в качестве подкладочного материала.

СВОЙСТВА

"Стомафил" относится к классу стеклянных иономерных цементов и состоит из порошка - тонкодисперсного алюмофторсиликатного стекла и жидкости затворения - водного раствора полиакриловой кислоты. Обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание "Стомафила" производят на гладкой стороне сухой стекляннной пластины пластмассовым или стальным шпателем при температуре воздуха (18...23)° С. При температуре в помещении выше +25° С пластину следует охладить. Для получения цементного теста нормальной консистенции рекомендуется соотношение: на 2 мерника порошка - 1 капля жидкости. В зависимости от области применения «Стомафила» допускается изменение соотношения порошка и жидкости для получения цементного теста требуемой консистенции. Сначала с жидкостью смешивают половину порошка, оставшуюся вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Время смешивания 30...60 сек. Время использования смеси 1,5...2 мин.

Подготовленную кариозную полость предварительно обрабатывают кондиционером, который наносится кисточкой или ватным шариком. Обработка проводится в течение 10 сек, затем полость промывается и высушивается. При использовании «Стомафила» в качестве изолирующей подкладки обработка полости кондиционером не требуется. При глубоком кариесе необходима прокладка на основе гидроокиси кальция. Допускается заполнение полости "Стомафилом" в 2...3 приема. Время твердения пломбы в полости рта 5...7 минут. После полного отверждения материала проводится окончательное моделирование и полировка пломбы. После завершения работы желательно покрыть поверхность пломбы защитным лаком, предохраняющим пломбу от воздействия влаги в процессе твердения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект "Стомафил" содержит:

Порошок цвет № А2	- 10 г (1 банка)
цвет № В3	- 10 г (1 банка)
цвет № С2	- 10 г (1 банка)
Жидкость затворения	- 13 г (1 флакон)
Кондиционер	- 4 г (1 флакон)
Мерная ложка для порошка	- 1 шт.
Кисточка	- 20 шт.
Держатель кисточки	- 1 шт.
Блокнот для замешивания	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Комплект "Стомафил" хранить в сухом месте при температуре от +5 до 25°С. Флаконы с жидкостью и банки с порошком должны храниться плотно закрытыми.

Гарантийный срок годности комплекта "Стомафил" - 1 год с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. директор *И.В. Николаев*
ЗАО "Стомафил"

ИНСТРУКЦИЯ

по применению цемента стеклоиномерного -
герметика для закрытия углублений и фиссур зубов "Стомасил-СПб"

НАЗНАЧЕНИЕ

Цемент "Стомасил-СПб" предназначен для изолирования углублений и фиссур жевательных зубов с целью профилактики кариеса в детской стоматологии и изолирования поверхности зубов при наличии сильно обнаженной шейки зуба. Допустимо использование в качестве подкладочного материала.

СВОЙСТВА

"Стомасил-СПб" относится к классу стеклянных иономерных цемента и состоит из порошка - тонкодисперсного алюмофторсиликатного стекла и жидкости затворения - водного раствора полиакриловой кислоты. Обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание "Стомасила-СПб" производят на гладкой стороне сухой стеклянной пластины пластмассовым или стальным шпателем при температуре воздуха (18 - 23)°С. При температуре в помещении выше +25°С пластину следует охладить. Для получения цементного теста нормальной консистенции следует соблюдать соотношение: на 1 мерник порошка - 1 капля жидкости.

Сначала с жидкостью смешивают половину порошка, оставшуюся вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Время смешивания - 30-60 с. Фиссуру очищают, высушивают и закрывают свежеприготовленной смесью. Время использования смеси 1,5 - 2 мин. Время твердения материала в полости рта 5 - 7 минут.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект "Стомасил-СПб" содержит:

Порошок	- 20 г (1 банка);
Жидкость затворения	- 13 г (1 флакон);
Мерная ложка для порошка	- 1 шт.
Блокнот для замешивания	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

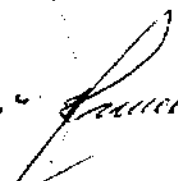
ХРАНЕНИЕ

"Стомасил-СПб" хранить в сухом месте при температуре от +5 до +25°С. Флакон с жидкостью и банка с порошком должны храниться плотно закрытыми.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности "Стомасила-СПб" - 1 год с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. директор
ЗАО "Стомасил"  Н.В. Николаев

ИНСТРУКЦИЯ

по применению цемента стоматологического
стеклоиономерного подкладочного «Стомалайн»

НАЗНАЧЕНИЕ

«Стомалайн» предназначен для подкладок под постоянные пломбы всех видов. При глубоком кариесе применяется с прокладкой на основе гидроокиси кальция.

СВОЙСТВА

«Стомалайн» относится к классу стекланных иономерных цемента и состоит из порошка - тонкодисперсного алюмофторсиликатного стекла и жидкости - водного раствора полиакриловой кислоты. Обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание «Стомалайна» производят на гладкой стороне сухой стеклянной пластины пластмассовым или стальным шпателем при температуре воздуха (18...23)⁰ С. При температуре в помещении выше +25⁰ С пластину следует охладить. Для получения цементного теста нормальной консистенции рекомендуется соотношение:

- для изолирующих (лайнерных) подкладок: 1 мерник порошка - 1 капля жидкости,
- для базовых подкладок: 2 мерника порошка - 1 капля жидкости.

Допускается изменение консистенции цементного теста варьированием соотношения порошка и жидкости. Сначала с жидкостью смешивают половину порошка, оставшуюся вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Время смешивания 30...60 с. Время использования смеси 1,5...2 мин.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

«Стомалайн» содержит:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ■ Порошок | - 20 г (1 банка) |
| ■ Жидкость | - 13 г (1 флакон) |
| ■ Мерная ложка для порошка | - 1 шт. |
| ■ Блокнот для замешивания | - 1 шт. |
| ■ Инструкция по применению | - 1 шт. |

ХРАНЕНИЕ

«Стомалайн» хранить в сухом месте при температуре от +5 до +25⁰С. Флакон с жидкостью и банка с порошком должны храниться плотно закрытыми.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности «Стомалайна» - 1 год с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. директор
ЗАО «Стомалин» *Ю. В. Николаев*



ИНСТРУКЦИЯ

по применению цемента стоматологического стеклоиономерного для фиксации коронок, мостовидных протезов, ортодонтических конструкций «Стомакрон»

НАЗНАЧЕНИЕ

Цемент стеклоиономерный «Стомакрон» предназначен для фиксации коронок, мостовидных протезов, вкладок, штифтов, накладок и ортодонтических конструкций. Может быть использован в качестве подкладочного материала.

СВОЙСТВА

«Стомакрон» относится к классу стекланных иономерных цемента и состоит из порошка - тонкодисперсного алюмофторсиликатного стекла и жидкости - водного раствора полиакриловой кислоты. Обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание «Стомакрона» производят на гладкой стороне сухой стеклянной пластины пластмассовым или стальным шпателем при температуре воздуха (18...23)⁰ С. При температуре в помещении выше +25⁰ С пластину следует охладить. Для получения цементного теста нормальной консистенции рекомендуется соотношение: на 1 мерник порошка – 1 капля жидкости. В зависимости от области применения материала допускается изменение соотношения порошка и жидкости для достижения требуемой консистенции. Сначала с жидкостью смешивают половину порошка, оставшуюся вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Время смешивания 30...60 с. Время использования смеси 2,0...2,5 мин. Использование «Стомакрона» предполагает обработку зуба по традиционной технологии. Не следует удалять «смазанный» слой и пересушивать зуб. При применении в качестве подкладочного материала в случае глубокого кариеса необходима прокладка на основе гидроокиси кальция. Время твердения материала в полости рта 5...7 мин. Избыток материала удалить сразу после затвердевания.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

«Стомакрон» содержит:

- Порошок - 20 г (1 банка)
- Жидкость - 13 г (1 флакон)
- Мерная ложка для порошка - 1 шт.
- Блокнот для замешивания - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

«Стомакрон» хранить в сухом месте при температуре от +5 до +25⁰С. Флакон с жидкостью и банка с порошком должны храниться плотно закрытыми.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности «Стомакрона» - 1 год с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. директор
ЗАО «Стомакрон»

Ю. В. Николаев

ИНСТРУКЦИЯ

по применению цемента стеклоиономерного
для детской стоматологии «Стомалит»

НАЗНАЧЕНИЕ

"Стомалит" предназначен для пломбирования кариозных полостей всех классов временных зубов, кариозных полостей III и V классов постоянных зубов, некариозных поражений тканей зуба. Может быть использован в качестве подкладочного материала под все виды пломб.

СВОЙСТВА

"Стомалит" относится к классу стеклянных иономерных цемента и состоит из порошка - тонкодисперсного алломофторсиликатного стекла и жидкости - водного раствора полиакриловой кислоты. Обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание "Стомалита" производят на гладкой стороне сухой стеклянной пластины пластмассовым или стальным шпателем при температуре воздуха (18...23)⁰ С. При температуре в помещении выше +25⁰ С пластину следует охладить. Для получения цементного теста нормальной консистенции рекомендуется соотношение: на 2 мерника порошка - 1 капля жидкости. В зависимости от области применения «Стомалита» допускается изменение соотношения порошка и жидкости для получения цементного теста требуемой консистенции.

Сначала с жидкостью смешивают половину порошка, оставшуюся вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Время смешивания 30...60 сек. Время использования смеси 1,5...2 мин.

При глубоком кариесе необходима прокладка на основе гидроокиси кальция. Допускается заполнение полости "Стомалитом" в 2...3 приема. Время твердения пломбы в полости рта 4...6 минут. После полного отверждения материала проводится окончательное моделирование и полировка пломбы. После завершения работы желательно покрыть поверхность пломбы защитным лаком, предохраняющим пломбу от воздействия влаги в процессе твердения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект "Стомалит" содержит:

Порошок	Цвет А2	- 15 г (1 банка)
	Цвет А3	- 15 г (1 банка)
	Жидкость	- 13 г (1 флакон)
	Мерная ложка для порошка	- 1 шт.
	Блокнот для замешивания	- 1 шт.
	Инструкция по применению	- 1 шт.

ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Комплект "Стомалит" хранить в сухом месте при температуре от +5 до +25⁰С. Флакон с жидкостью и банки с порошком должны храниться плотно закрытыми.

Гарантийный срок годности комплекта "Стомалит" - 1 год с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. директор
ЗАО «Стомалит» *Ю. В. Нинопоев*