

ЗАО «КОМЕТ ХОЛДИНГ»

ОКП 94 4440

Группа Р28

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ЗАО «КОМЕТ ХОЛДИНГ»
И.В. Тетюхин
25.05 2010

Комплект приспособлений реабилитационных
для занятий в ЛФК

Паспорт

СН-70 ПС



г. Москва

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и у

Инов. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение	3
2	Технические характеристики	3
3	Комплект поставки	5
4	Устройство приспособлений и применение	5
5	Меры безопасности	7
6	Свидетельство о приемке	8
7	Гарантийные обязательства	8



1 Назначение

Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК (далее по тексту - приспособления) предназначен для обучения шаговым движениям, выработке и закреплению правильного рисунка ходьбы, проведения упражнений, устраняющих эквинус стопы и укрепляющих мышцы верхних и нижних конечностей, спины, ягодиц, живота, тренировки вестибулярного аппарата, выработки равновесия в сидячем положении, улучшения аддукции бедер.

Приспособления применяется для оснащения реабилитационных центров, клиник, школ-интернатов, лечебно-физкультурных кабинетов, а также могут быть использованы в домашних условиях.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 50444


2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры должны быть не более указанных в таблице № 1

Таблица №1

Таблица 1

№ пп	Наименование приспособления	Параметр /мм./		
		длина	ширина	высота
1	Качели СН-70.01	2000	2100	2100
2	Горка для ходьбы СН-70.02	2040	1960	360 без поручней
3	Багут СН-70.03	Диам.1600	Диам.1600	400
4	Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе СН-70.04.00	2890	810	1210
	Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе СН-70.04.01	3000	1100	1190
5	Шведская стенка СН-70.05	140	700	2500
6	Стул СН-70.06.00	700	625	725
7	Стул СН-70.06.01	800	725	1360
8	Скамейка СН-70.07	1500	250	360
9	Скамейки вкладыши (набор – 3 шт.) СН-70.08	300 400 500	220 320 380	140 220 320
10	Скамейка-притч СН-70.09	1400	750	520
11	Платформа качающаяся СН-70.10	1300	700	230
12	Зеркало поворотное СН-70.11	560	1230	1620
13	Препятствие СН-70.15	1500	600	250
14	Набор для мелкой моторики СН-70.16	335	105	215

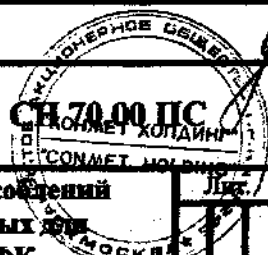								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК СН 70.00 Паспорт	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Гераскина						
Пров.		Верходанов						
Т. контр.								
Нач. гр.								
Н. контр.		Вайно						
Утв.								
						Лист 3	Листов 9	

2.2. Основные виды приспособлений указаны на рис.1

2.3. Масса приспособлений должна быть не более указанной в таблице 2

Таблица 2

№ п/п	Наименование приспособления	Масса (кг.)
1.	Качели СН-70.01	70
2.	Горка для ходьбы СН-70.02	80
4.	Батут СН-70.03	35
5.	Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе СН-70.04	70
6.	Шведская стенка СН-70.05	35
7.	Стул СН-70.06.01	23
8.	Стул СН-70.06.02	
8.	Скамейка СН-70.07	11
9.	Скамейки вкладыши (набор – 3 шт.) СН-70.08	10
10.	Скамейка-притч СН-70.09	
11.	Платформа качающаяся СН-70.10	14
12.	Зеркало поворотное СН-70.11	25
13.	Препятствие СН-70.15	20
14.	Набор для мелкой моторики СН-70.16	6.0

2.4 Размер свободного пространства между опорной частью приспособления СН-70.05 и стеной помещения или ближайшим элементом оборудования должно быть не менее 40 мм.


2.5 Приспособление СН-70.05 крепится к стене анкерными болтами 12х70 в количестве 6 шт.

2.6 Приспособления должны сохранять прочность, не должны поворачиваться или смещаться относительно крепежной арматуры (если это не требуется) при воздействии на них нагрузки 1000 Н (100 кгс) (кроме СН-70.11, СН-70.15, СН-70.16)

Гибкие элементы (ремни, тросы, шнуры, цепи) качелей СН-70.01, в том числе соединительные и крепежные детали, используемые для подъема и опускания должны сохранять прочность при воздействии на них усилия 3000Н (300 кгс).

2.7 Наружные поверхности приспособлений должны быть устойчивы к дезинфекции по ГОСТ 50444 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

2.8 Средний срок службы до списания должен быть не менее 7 лет. За предельное состояние принимают такое состояние приспособления, при котором годовая стоимость ремонтов для восстановления их работоспособности достигает 60% стоимости нового изделия.

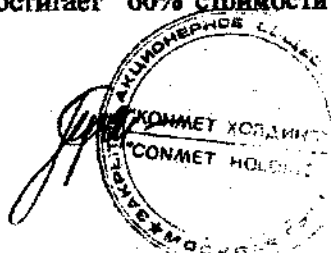

СН 70.00 ПС

Лист

4

3 Комплект поставки

3.1 Комплект поставки должен соответствовать таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование	Кол-во	Обозначение КД
1	Качели	1	СН-70.01.00.000
2	Горка для ходьбы	1	СН-70.02.00.000
3	Батут	1	СН-70.03.00.000
4	Приспособление двухъярусное обучения ходьбе	1	СН-70.04.00.000
5	Шведская стенка	1	СН-70.05.00.000
6	Стул	1	СН-70.06.00.000
7	Скамейка	1	СН-70.07.00.000
8	Скамейки-вкладыши (набор 3шт.)	1	СН-70.08.00.000
9	Скамейка-притч	1	СН-70.09.00.000
10	Платформа качающаяся	1	СН-70.10.00.000
11	Зеркало поворотное	1	СН-70.11.00.000
12	Препятствие	1	СН-70.15.00.000
13	Набор для мелкой моторики	1	СН-70.16.00.000
14	Паспорт	1	СН.70 ПС

Примечание: по согласованию с заказчиком комплектность может быть изменена

4 Устройство приспособлений и применение

4.1 Качели – представляют собой сборную раму с вращающейся перекладиной. На перекладине крепятся необходимые приспособления: ортопедические качели, валик, платформа. Под качели стелят маты. Перекладина может быть зафиксирована от вращения.

Применяются для развития вестибулярного аппарата, лечения аддукторного спазма бедер.

4.2 Горка для ходьбы – представляет собой приспособление, у которого с двух сторон имеются ступени, а с одной стороны – скат. Поручни регулируются по высоте.

Применяется для обучения ходьбе по лестнице и наклонной поверхности.



СН 70.00 ПС

Лист

5

4.3 Батут представляет собой – обруч на ножках, внутри которого натянуто специальное полотно. Края батута обтянуты мягким полотном.

Применяется для развития вестибулярного аппарата, коррекции координации движений, наращивания мышц в ногах.

4.4 Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе – представляет собой сборную двух полосную конструкцию, у которой с боковых сторон имеются перекладины, на которых на нужной высоте устанавливаются поручни и фиксируются на требуемой ширине.

Применяется для обучения ходьбе больных, не умеющих самостоятельно ходить, с упором на подмышки и захватом руками.

4.5 Шведская стенка – представляет собой сварную конструкцию - две стойки с перекладинами.

Применяется для обучения больных лазать по вертикальной лестнице, тренировке мышц рук и ног.

4.6 Стул – представляет сварную конструкцию, спинка типа лесенки. Сидение деревянное.

Применяется для выполнения гимнастических упражнений на стуле по методике Пето, присесть – встать, перебирая перекладины спинки-лесенки.

4.7 Скамейка – сборная конструкция. Сидение деревянное.

Применяется при выполнении упражнений на разведение в тазобедренных суставах, укрепление мышц живота и спины.

4.8 Скамейка вкладыши (набор 3 шт.). скамейки имеют размеры, позволяющие вкладывать их одна в другую.

Применяется при обучении ходьбе по лестнице вверх и вниз.

4.9 Скамейка – притч – сборная конструкция. Платформа деревянная с вырезанными пазами.

Применяется для обучения ползанию и развитию ручной моторики.

4.10 Платформа качающаяся – деревянная платформа, установленная на двух дугах, имеющих упоры, которые ограничивают угол качания.

Применяется для развития вестибулярного аппарата, тренировки координации движений, тренировки силы мышц в руках и ногах.

4.11 Зеркало поворотное – зеркало установлено на подвижной опоре. Может поворачиваться на нужный угол.

Применяется для визуальной коррекции собственных движений.

4.12 Препятствие – представляет собой набор барьеров разной высоты.

Применяется для тренировки шаговых движений.



СИ 70.00 ПС

Лист

6

4.13 Набор для мелкой моторики - Игрушки предназначены для развития мелкой моторики рук, развивает логическое мышление, фантазию и координацию, вырабатывает навыки необходимые в жизни ребенка. Эта серия игрушек рекомендована, как отличное средство реабилитации для детей с отставанием в интеллектуальном развитии.

Приспособления, входящие в состав комплекта могут использоваться как в отдельности в определенной последовательности, так и совместно друг с другом. Например, приспособление двухъярусное для обучения ходьбе может использоваться в комплекте с препятствие или скамейкой-вкладышем.

5 Меры безопасности

5.1 Перед началом использования приспособлений убедитесь в их исправности:

- проверьте надежность креплений;
- проверьте целостность полотна на батуте;
- проверьте надежность крепления шведской стенки к опоре;
- проверьте целостность шнуров на навесных приспособлениях к качелям, надежность крепления перекладины.



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д.	Изм. № докум.	Подп.	Дата	СН 70.00 ПС	Лист
									7

6 Свидетельство о приемке

Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации.

М.П.

подпись

дата

7 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу приспособлений в течение 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Изделия с дефектами, возникшими в результате небрежного обращения, к гарантийному обслуживанию не принимаются.

Гарантийный ремонт и замена производится изготовителем по адресу:

125413, г. Москва, ул. Онежская, д.24, ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

тел.: (495) 456-97-50

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие характеристики конструкции.

М.П.

подпись

дата



СИ 70.00 ПС

Лист

8












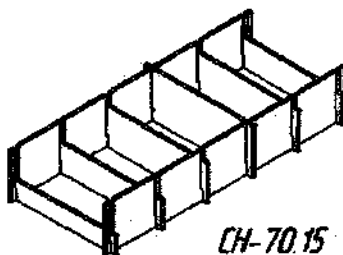


Рисунок 1

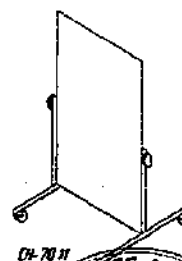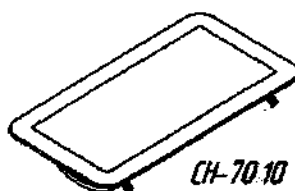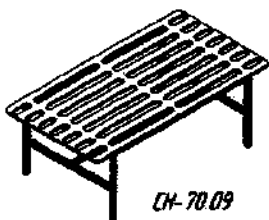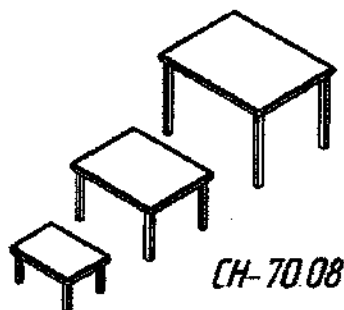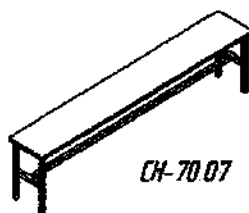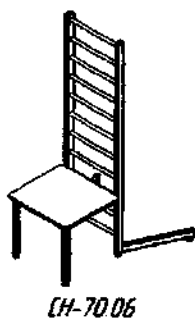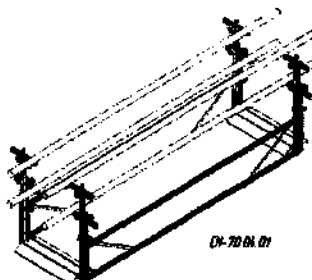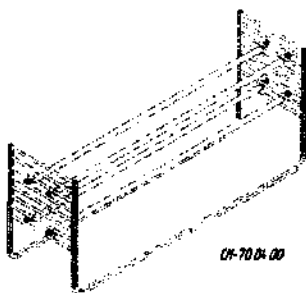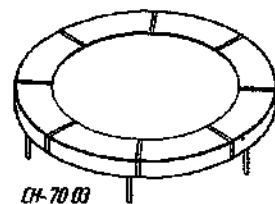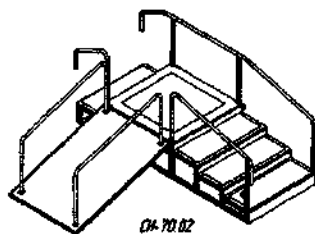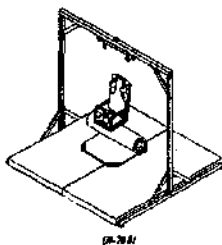

CH-70.16

CH 70.00 ПС

Лист

9