

« Утверждаю »

Генеральный директор

ООО «Ортоника»



Терасимов С.В.

2012 г.

М.П.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами **Ortonica**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами Ortonica предназначены для санитарного обслуживания инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, повреждениями нижних конечностей и больных с ЦП.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 1



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, облегчает санитарную обработку кресла-стула. Съёмная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика. Поручни оснащены пластиковыми подлокотниками. Высота сиденья регулируется выдвижающимися опорами ножек кресла-стула. Ножки оснащены противоскользящими насадками из резины. Конструкция кресла-стула позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае ведро с крышкой убираются).

Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 2



Рама изготовлена из стали с порошковым покрытием, не складная, сварной конструкции. Сидение и спинка изготовлены из кожзаменителя, при необходимости сиденье снимается. Санитарное устройство съемное, с крышкой, изготовлены из прочного пластика. Высота изделия не регулируется.

Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 3



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие. Оснащена съемным судном из пластика. Откидывающиеся поручни обеспечивают дополнительное удобство при пересадке на сиденье. Поручни оснащены пластиковыми подлокотниками. Телескопические втулки на ножках позволяют регулировать высоту кресла до оптимальной для пациента. Противоскользящие насадки из резины придают креслу устойчивость и защищают напольное покрытие от царапин. Высота изделия регулируется за счет выдвижных ножек. Конструкция складная, легкая, переносная.

Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 5



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие. Укрепленная рама выдерживает вес до 180 кг, расстояние между поручнями и площадь сидения расширены. Высота сиденья регулируется выдвижающимися опорами ножек кресла-стула. Противоскользящие насадки из резины обеспечивают дополнительную устойчивость. Поручни оснащены пластиковыми подлокотниками. Пластмассовое судно с крышкой съемное. Конструкция не складная, легкая, переносная.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)

Ortonica TU 8



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие. Кресло-стул с санитарным оснащением может использоваться в двух вариантах: с колесами, без колес. На ножки необходимо надеть резиновые насадки, или прикрутить колеса. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла-стула. Конструкция кресло - стула позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае ведро с крышкой убираются). Пластмассовое судно с крышкой съемное. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика. Откидные поручни оснащены пластиковыми подлокотниками. Конструкция не складная, легкая, переносная.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)

Ortonica TU 13



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие. Кресло-стул с санитарным оснащением может использоваться в двух вариантах: с колесами, без колес. На ножки необходимо надеть резиновые насадки, или прикрутить колеса. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла-стула. Конструкция кресла - стула позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае ведро с крышкой убираются). Пластмассовое судно с крышкой съемное. Поручни фиксированные, оснащены пластиковыми подлокотниками. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика. Конструкция не складная, легкая, переносная.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)

Ortonica TU 21



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие. Кресло-стул собирается без использования инструмента. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла-коляски. Кресло-стул с санитарным оснащением может использоваться в двух вариантах: с колесами, без колес. На ножки необходимо надеть резиновые насадки, или прикрутить колеса. Пластмассовое судно с крышкой съемное. Поручни фиксированные, оснащены пластиковыми

подлокотниками. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика. Конструкция не складная, легкая, переносная.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)
Ortonica TU 34



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет порошковое покрытие, не складная. Кресло-стул оборудован подножками съемными, откидными, регулируемые по длине голени. Съемные ремни-упоры для икроножных мышц. Подлокотники откидные, фиксируемые. Колеса с цельнолитыми шинами, диаметр 125 мм. Имеется блок задних колес, для дополнительной устойчивости. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Съемные спинка и сиденье изготовлены из кожзаменителя.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)
Ortonica TU 55



Рама изготовлена из коррозионно-стойких материалов (хромированная сталь). Отдельные детали имеют защитно-декоративные лакокрасочные покрытия. Кресло-стул складывается и раскладывается без инструмента. Сиденье выполнено из двух частей: основной и съемной (центральной). Наполнитель – полиуретан. Материал изготовления спинки, сиденья и подлокотников кожзаменитель. Санитарное устройство съемное. Кресло-стул комплектуется съемными, поворотными опорами. Подножки регулируются по длине. Кресло-стул снабжен слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-стула до полного блокирования. Кресло-стул комплектуется колесами, имеющими полиуретановые задние и литые передние шины диаметром 150/590 мм. Подлокотники прямые, съемные.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)
Ortonica TU 89



Рама изготовлена из коррозионно-стойких материалов (хромированная сталь). Отдельные детали имеют защитно-декоративные лакокрасочные покрытия. Санитарная емкость расположена под сиденьем, изготовлена из пластика. Складывается и раскладывается без инструмента. Сиденье и судно съемные. Сиденье выполнено из двух частей: основной и съемной. Наполнитель – полиуретан. Комплектуется съемными и поворотными ортопедическими опорами с упором для голени. Подножки регулируются по высоте, съемные, поворотные, регулируемые с углом подъема до 90°. Снабжен слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-стула до полного блокирования. Задние колеса из вспененного пенополиуретана, передние колеса литые, диаметром 200/580 мм. Подлокотники прямые съемные. Съемный подголовник оснащен мягкой подушкой. Кресло-коляска комплектуется регулируемой спинкой с изменением угла наклона до состояния «лежа». Материал изготовления подголовника, спинки, сиденья, подлокотников- искусственная кожа.

Насадка на унитаз для инвалидов Ortonica TU 144



Насадка на унитаз предназначена для увеличения высоты унитаза, для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Насадка выполнена из белого, прочного и легко моющегося пластика. Она подходит на унитаз любой формы, и не требует специального инструмента для установки. Крепится на унитаз с помощью пластмассовых креплений. Комплектуется съемной крышкой.

Насадка на унитаз для инвалидов Ortonica TU 233



Насадка выполнена из гигиенического пластика. Она подходит на унитаз любой формы и не требует специального инструмента для установки. Откидные подлокотники изготовлены из алюминия, комплектуется съемной крышкой.

Размер: 47.4x54.9x18.2/3 см

Алюминиевые подлокотники: 25.4x1.3 см

Грузоподъемность: 136 кг

Вес нетто: 3.173 кг

3. УПАКОВКА

Необходимо сохранить упаковку для возможной транспортировки кресла-стула производителю в сервисный центр для ремонта или технического обслуживания. Остальные бумажные отходы направляются на переработку. Для утилизации заменяемых элементов или всего кресла необходимо провести их сортировку по видам материала: пластмасса, резина, сталь, алюминий и т.п.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При посадке в кресло-стул и высадке из него, колеса должны быть зафиксированы тормозами. Запрещается:

- становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении;
- использовать тормоза для торможения при движении.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо очищать поверхность кресла-стула от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.

Сидение и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах колес.

Один раз в 6 месяцев необходимо произвести:

- смазку подшипников.

6. ОЧИСТКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Необходимо производить дезинфекцию всех элементов кресла-стула, находящихся в контакте с пользователем или лицом, осуществляющим уход за ним.

Дезинфекция должна проводиться на регулярной основе. Раму нужно содержать в сухости, а все подвижные элементы рамы должны смазываться нетоксичными и гипоаллергическими веществами. После продолжительного хранения туалета, необходимо произвести техническое обслуживание, очистку и смазывание туалета.

Очистка рамы:

Рама должна содержаться в сухости и смазываться нетоксичными и гипоаллергическими веществами. Для облегчения складывания и регулировки необходимо производить смазывание подвижных элементов кресла.

Избегайте попадания солёной воды на кресло-стул. В солёной среде возможно образование ржавчины. В случае попадания солёной воды на кресло-стул необходимо немедленно протереть его влажным полотенцем. Достаточным будет использования воды и сухой тряпки; после все подвижные элементы туалета должны быть повторно смазаны. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.

7. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения кресла-стула в упаковке предприятия – изготовителя на складах поставщика и у потребителя в части воздействия климатических факторов соответствуют группе 2 (С) ГОСТ 15150. Не допускается хранение кресла-стула в одном помещении с химически активными и пылящими веществами.

8. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед повторным использованием кресло-стул должно пройти полную дезинфекцию. Для дезинфекции поверхностей рекомендуем использовать нетоксичные, гипоаллергические растворы.

9. РЕМОНТ

Пользователь: Пользователь может самостоятельно демонтировать съёмные элементы и аксессуары кресла-стула, такие как подножки или системы подножек, ремни для стоп, веломатерчатые элементы, рукоятки и т.п.

Производитель/Сервисный центр: Ремонт или замена несъёмных, изношенных или сломанных элементов должны производиться только в специализированном центре сервисного обслуживания. Любой элемент кресла-стула может быть заменён. После получения разрешения на возврат изделие должно быть упаковано в оригинальную или

подходящую для перевозки упаковку для возврата производителю/сервисный центр. Доставка осуществляется бандеролью или частной службой доставки грузов.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Срок службы – не менее 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня приобретения потребителем, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в паспорте изделия;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия высотой более 4 см без подъема передних колес;
- прокол камеры в шинах колес;
- езда на спущенных колесах и т.п.

Принято и
определено печать
7 (семь) листов

