





рама - стальная хромированная, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье выполнено из нейлона.
локотники - съемные, откидные.
ручные опоры - съемные, откидные, регулируемые по высоте.
подножки - съемные, поворотные в сторону.
задние колеса с пневматическими шинами.
Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.
Оснащена стояночным тормозом.
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1080/(610/660/700)/890
Ширина сиденья, мм 400/460/480
глубина сиденья, мм 450
высота спинки, мм 450
вес нетто, кг 19
грузоподъемность, кг 110

Ortonica Base 110

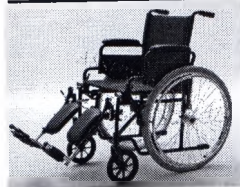

рама - стальная имеет порошковое лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнены из винилискожа,
локотники - съемные, ступенчатые, откидные.
подножки - съемные, поворотные, с регулируемым углом подъема, оборудованы мягкими опорами под лодыжки.
задние колеса с цельнолитыми шинами.
Передние колеса оснащены цельнолитыми шинами.
Оснащена стояночным тормозом.
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1155/710/935
Ширина сиденья, мм 510
вес нетто, кг 23,2
грузоподъемность, кг 150

Ortonica Base 115

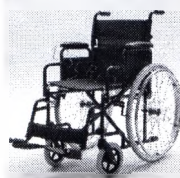

рама - стальная имеет порошковое покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
спинка складная.
локотники - ступенчатые, съемные.
подножки - съемные.
задние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные
Передние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные
Оснащена стояночным тормозом.
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1040/630/914
Ширина сиденья, мм 460
вес нетто, кг 18,5
грузоподъемность, кг 110

Ortonica Base 120



рама - стальная имеет порошковое лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.

Сиденье выполнено из нейлона.

Подлокотники - съемные, откидные.

Боковые опоры - съемные.

Подножки - съемные, поворотные в сторону.

Задние колеса с цельнолитыми шинами.

Передние колеса с цельнолитыми шинами.

Оснащена стояночным тормозом.

Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1040/560/900

Ширина сиденья, мм 460

Вес нетто, кг 17,9

Грузоподъемность, кг 110

Ortonica Base 125



Рама - стальная, двойная (усиленная) имеет порошковое покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.

Сиденье и спинка выполнено из нейлон .

Подлокотники ступенчатые.

Подножки фиксированные

Задние колеса цельнолитые

Передние колеса цельнолитые

Оснащена стояночным тормозом.

Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1230/935/990

Ширина сиденья, мм 600/660/700/760

Вес нетто, кг 40

Грузоподъемность, кг 150

Ortonica Base 130



рама – стальная, двойная (усиленная) имеет порошковое покрытие, складывается по ширине, складывается
 складывается без инструмента.
 сиденье и спинка выполнено из нейлона.
 подлокотники съемные.
 подножки съемные, с держателем для голени, регулируемые по высоте
 передние колеса цельнолитые, пенополиуретановые
 задние колеса цельнолитые, пенополиуретановые
 оснащена стояночным тормозом.
 стандартные размеры: Д*Ш*В, мм 1230/935/990
 ширина сиденья, мм 600/660/700/760
 вес нетто, кг 40
 грузоподъемность, кг 110

Ortonica Base 135



рама – алюминиевая, имеет порошковое лакокрасочное покрытие, складывается по ширине, складывается
 складывается без инструмента.
 сиденье и спинка выполнено из нейлона.
 подлокотники - съемные, откидные, регулируемые по высоте.
 съемные опоры - съемные.
 передние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные, с возможностью регулировки оси колеса
 задние колеса с цельнолитыми шинами.
 оснащена стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
 противопролежневая подушка
 противопрокидывающее устройство
 стандартные размеры: Д*Ш*В, мм 1030/570/950
 ширина сиденья, мм 460
 вес нетто, кг 15
 грузоподъемность, кг 110

Ortonica Base 140



рама – стальная, имеет хромированное покрытие, двойная (усиленная) складывается по ширине,
 складывается и раскладывается без инструмента.
 сиденье и спинка выполнено из нейлона.
 подлокотники - съемные.


железные опоры - съемные.
 задние колеса с цельнолитыми шинами,
 передние колеса с цельнолитыми шинами.
 оснащена стояночным тормозом
 Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1200/750/920
 Ширина сиденья, мм 550
 Вес нетто, кг 22
 Грузоподъемность, кг 150

Ortonica Base 145



Рама - стальная, имеет лакокрасочное покрытие, двойная (усиленная), складывается по ширине,
 складывается и раскладывается без инструмента.
 Сиденье и спинка выполнено из нейлона.
 Подлокотники - съемные, откидные, регулируемые по высоте.
 Железные опоры - съемные
 задние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные, с возможностью регулировки оси колеса
 передние колеса с цельнолитыми шинами.
 оснащена стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
 Противопролежневая подушка
 Противоопрокидывающие опоры
 Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1100/710/920
 Ширина сиденья, мм 550
 Вес нетто, кг 22
 Грузоподъемность, кг 150

Ortonica Base 150

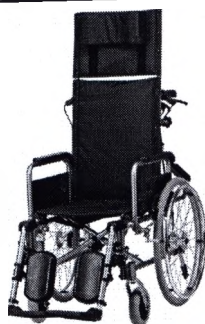

Рама - алюминиевая, имеет лакокрасочное покрытие, складывается по ширине, складывается и
 раскладывается без инструмента.
 Сиденье и спинка выполнено из нейлона.
 Высокая спинка, подголовник регулируемый по высоте
 Подлокотники - съемные.
 Железные опоры - съемные, регулируемые по высоте, оборудованы держателем для голени
 задние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные, с возможностью регулировки оси колеса
 передние колеса с цельнолитыми шинами.
 оснащена стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
 Противоопрокидывающие опоры
 Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1300/600/890
 Ширина сиденья, мм 450
 Вес нетто, кг 12


подъемность, кг 110

Ortonica Base 155



рама – стальная, имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
спинка высокая, откидная, подголовник регулируемый по высоте
локотники – съемные, ступенчатые
боковые опоры – съемные, регулируемые по высоте, оборудованы держателем для голени
задние колеса с пневматическими шинами
передние колеса с цельнолитыми шинами.
оснащена стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
активноопрокидывающие опоры
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1270/670/1100
ширина сиденья, мм 460
вес нетто, кг 24
подъемность, кг 110

Ortonica Base 160

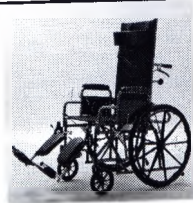

рама – стальная, имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
спинка высокая, откидная, подголовник регулируемый по высоте
локотники – съемные, ступенчатые
боковые опоры – съемные, регулируемые по высоте, оборудованы держателем для голени
задние колеса с цельнолитыми шинами
передние колеса с цельнолитыми шинами.
оснащена стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
активноопрокидывающие опоры
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1270/670/1100
ширина сиденья, мм 460
вес нетто, кг 24
подъемность, кг 110

Ortonica Base 170



рама – стальная, имеет хромированное и лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
локотники – съемные, ступенчатые
боковые опоры – съемные
задние колеса с цельнолитыми шинами, оборудованы тормозными устройствами
передние колеса с цельнолитыми шинами.
ручки для толкания

7
187
ные размеры: Д*Ш*В, мм 880/610/890
на сиденья, мм 450
етто, кг 14
подъемность, кг 110

Ortonica Base 175




— стальная, имеет порошковое покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
е и спинка выполнено из нейлона.
а складная
локотники — съемные
ые опоры — съемные
е колеса с цельнолитыми шинами, оборудованы тормозными устройствами
ние колеса с цельнолитыми шинами.
и для толкания
итные размеры: Д*Ш*В, мм 1060/630/910
на сиденья, мм 460
етто, кг 14
подъемность, кг 110

Ortonica Base 180



а — стальная, имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
е и спинка выполнено из нейлона.
локотники — регулируемые
ые опоры — откидные
ние колеса с цельнолитыми шинами, оборудованы тормозными устройствами
редние колеса с цельнолитыми шинами.
ки для толкания
аритные размеры: Д*Ш*В, мм 1100/680/910
рина сиденья, мм 430
етто, кг 19
подъемность, кг 110

Ortonica Base 185

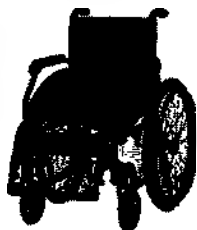

8
188

рама – алюминиевая, имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
локотники – съемные, откидные
ножные опоры – съемные
задние колеса с цельнолитыми шинами, оборудованы тормозными устройствами
передние колеса с цельнолитыми шинами.
ручки для толкания
противоопрокидывающие устройства
противопролежневая подушка
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 930/520/820
ширина сиденья, мм 460
вес нетто, кг 14
грузоподъемность, кг 110

Ortonica Base 190



рама – алюминиевая, имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
локотники – регулируемые по высоте, откидные
ножные опоры – съемные
задние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные, оборудованы тормозными устройствами
передние колеса с цельнолитыми шинами.
ручки для толкания
противоопрокидывающие устройства
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1030/710/920
ширина сиденья, мм 460
вес нетто, кг 16
грузоподъемность, кг 110

Ortonica Base 195



рама – стальная, имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
локотники – съемные, откидные
ножные опоры – съемные
задние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные, оборудованы тормозными устройствами
передние колеса с цельнолитыми шинами.
противопролежневая подушка
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1070/640/920
ширина сиденья, мм 450
вес нетто, кг 18
грузоподъемность, кг 110

9
189 13

Ortonica Delux 500



— изготовлена из композитных материалов, покрыта порошковой эмалью, складная
сиденье выполнено из нейлона,
локотники — съемные, регулируемые по высоте
спинка- регулируемая по углу наклона
ножки — съемные, откидные регулируемые по длине и углу наклона,
задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметр 600 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 150 мм.
оснащена стояночным тормозом.
габаритные размеры Д*Ш*В 1120-1480*640*860-1020
ширина сиденья, мм 390,440,490
глубина сиденья, мм 420-480
высота сиденья , мм 450
высота спинки, мм 630
вес нетто, кг 38
грузоподъемность, кг 125

Ortonica Delux 510



— изготовлена из алюминия, покрыта порошковой эмалью, складная
сиденье выполнено из нейлона,
локотники — съемные, регулируемые по высоте
спинка- регулируемая по углу наклона
ножки — съемные, откидные регулируемые по длине и углу наклона, с опорами для икр.
задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметр 600 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.
оснащена стояночным тормозом и тормозом для сопровождающего лица, устройством
для откидывания
габаритные размеры Д*Ш*В 1150*730*1020
ширина сиденья, мм 500
высота сиденья , мм 515
высота спинки, мм 495
вес нетто, кг 38
грузоподъемность, кг 120

Ortonica Delux 520



— изготовлена из алюминия, покрыта порошковой эмалью, складная
сиденье выполнено из нейлона,
локотники — съемные, регулируемые по высоте
спинка- регулируемая по углу наклона
ножки — съемные, откидные регулируемые по длине и углу наклона, с опорами для икр.
задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметр 600 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.

190 13
шчена стояночным тормозом, устройством противопрокидывания, регулируемым подголовником,

ском

ритные размеры Д*Ш*В, мм 1140*715*1008

ина сиденья, мм 400,425,450,475,500

бина сиденья, мм 450-510

ота сиденья, мм 485

ота спинки, мм 460

нетто, кг 38

рузоподъемность, кг 125

Ortonica Delux 530



ма – изготовлена из стали, покрыта порошковой эмалью, нескладная

сиденье выполнено из нейлона,

локотники – съемные, регулируемые по высоте

спинка- фиксированная

ножки – съемные, откидные регулируемые по длине и углу наклона, с опорами для икр.

задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметр 600 мм

передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.

оснащена стояночным тормозом, устройством противопрокидывания, регулируемым подголовником,

габаритные размеры Д*Ш*В, мм 1080*545/646*420/480

шина сиденья, мм 360-430/450-500

лубина сиденья, мм 510

сота сиденья, мм 485

сота спинки, мм 460

с нетто, кг 38

рузоподъемность, кг 125

Ortonica Delux 540



ма – изготовлена из стали, покрыта порошковой эмалью, нескладная

сиденье выполнено из нейлона,

локотники – съемные, регулируемые по высоте

спинка- регулируемая по углу наклона до горизонтального положения, оборудована боковыми

ручками

ножки – съемные, откидные регулируемые по длине и углу наклона, с опорами для икр.

задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 300 мм

передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.

оснащена тормозом для сопровождающего лица, устройством противопрокидывания, регулируемым

подголовником,

габаритные размеры Д*Ш*В, мм 1080*780*860

рина сиденья, мм 450-500

лубина сиденья, мм 480

сота сиденья, мм 460

сота спинки, мм 520

11
191

нетто, кг 38
грузоподъемность, кг 125

Ortonica Delux 550



рама – изготовлена из композиционных материалов, покрыта порошковой эмалью, нескладная
сиденье выполнено из нейлона, регулируемое по глубине
локотники – съемные, регулируемые по высоте
спинка- регулируемая по углу наклона до горизонтального положения, оборудована боковыми
ручками
подножки – съемные, откидные регулируемые по длине и углу наклона, с опорами для икр.
задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 300 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.
оснащена тормозом для сопровождающего лица, стояночным тормозом устройством
противопротаскивания, регулируемым подголовником
габаритные размеры Д*Ш*В, мм 1080*690*860
ширина сиденья, мм 450-510
глубина сиденья, мм 480
высота сиденья, мм 460
высота спинки, мм 520
вес нетто, кг 38
грузоподъемность, кг 125

Ortonica Delux 560



рама – изготовлена из композиционных материалов, хромированная, складная
сиденье выполнено из ткани с нейлона
локотники – фиксированные
спинка- складная, оборудована мягким подголовником
подножки – несъемные, выполнены из пластика
задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 300 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 150 мм.
оснащена стояночным тормозом
габаритные размеры Д*Ш*В, мм 1190*645*950
ширина сиденья, мм 460
глубина сиденья, мм 440
высота сиденья, мм 550
высота спинки, мм 450
вес нетто, кг 37
грузоподъемность, кг 120

Ortonica Delux 570



12
192

рама — изготовлена из алюминия, хромированная, складная
сиденье выполнено из нейлона
подлокотники — откидные, съемные
спинка- складная, оборудована мягким. съемным подголовником
подножки — съемные, откидные
задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 550 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.
оснащена стояночным тормозом, антипрокидывающим устройством
габаритные размеры Д*Ш*В, мм 1190*645*950
ширина сиденья, мм 450
глубина сиденья, мм 425
высота сиденья , мм 450
высота спинки, мм 500
вес нетто, кг 20,8
грузоподъемность, кг 125

Ortonica Delux 580



рама — изготовлена из стали, хромированная, складная
сиденье выполнено из винилискожа
подлокотники — фиксированные, с мягкими опорами
спинка- складная, оборудована мягким, съемным подголовником
подножки — съемные, откидные, оборудованы мягкими опорами для икр
задние колеса быстросъемными цельнолитыми шинами диаметр 600 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.
оснащена тормозом для сопровождающего лица, стояночным тормозом, антипрокидывающим устройством, ремнем безопасности
габаритные размеры Д*Ш*В, мм 1080*695*1280
ширина сиденья, мм 400
глубина сиденья, мм 400
высота сиденья , мм 500
высота спинки, мм 500
вес нетто, кг 26,5
грузоподъемность, кг 110


Ortonica Delux 590



13
193

рама — изготовлена из алюминия, лакокрасочное покрытие, складная
сиденье выполнено из нейлона,
подлокотники — съемные, с мягкими опорами
спинка- складная, оборудована мягким, съемным подголовником, регулируется по углу наклона
подножки — съемные, откидные, регулируемые по высоте и углу наклона оборудованы мягкими опорами
задние колеса быстросъемными цельнолитыми шинами диаметр 600 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.
оснащена тормозом для сопровождающего лица, стояночным тормозом, антипрокидывающим устройством,
габаритные размеры Д*Ш*В, мм 1230*600*1200
Ширина сиденья, мм 460
Глубина сиденья, мм 400
Высота сиденья, мм 500
Высота спинки, мм 740
Вес нетто, кг 26
Грузоподъемность, кг 110

Ortonica Trend 10

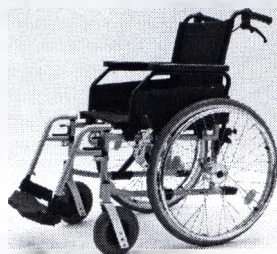

Рама - стальная имеет порошковое покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
Сиденье и спинка выполнено из нейлона.
Спинка регулируемая по высоте
Подлокотники - скошенные, съемные, регулируемые по длине
Ножные опоры - съемные
Подножки - поворотные.
Задние колеса оснащены цельнолитыми шинами, быстросъемные, с возможностью регулировки
Передние колеса оснащены цельнолитыми шинами, с возможностью регулировки
Ручки для толкания регулируемые по высоте
Оснащена стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1060/680 /960-1030
Ширина сиденья, мм 450
Вес нетто, кг 18
Грузоподъемность, кг 120

Ortonica Trend 15



194 13

алюминиевая имеет порошковое покрытие, складывается по ширине, складывается и
ается без инструмента.
спинка выполнено из нейлона.
ладная
ники - скошенные, съемные, регулируемые по длине
поры - съемные
и - поворотные.
деса оснащены цельнолитыми шинами, быстросъемные
е колеса оснащены пневматическими шинами, с возможностью регулировки
я толкания регулируемые по высоте
а стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
ые размеры: Д*Ш*В, мм 1060/680 /960-1030
сиденья, мм 450
о, кг 13,5
ъемность, кг 120

Ortonica Trend 20



алюминиевая имеет порошковое покрытие, складывается по ширине, складывается и
ывается без инструмента.
е и спинка выполнено из нейлона.
окотники – ступенчатые, съемные
жки - съемные
е колеса оснащены цельнолитыми шинами
ние колеса оснащены цельнолитыми шинами
ена стояночным тормозом
итные размеры: Д*Ш*В, мм 1060/650,740 /400,400
ина сиденья, мм 400,500
етто, кг 18,6
подъемность, кг 120

Ortonica Trend 25



алюминиевая имеет порошковое покрытие, складывается по ширине, складывается и
ывается без инструмента.

15
195
Сиденье и спинка выполнено из нейлона.

Локотники – съемные, откидные, регулируемые по высоте

Полноценные – съемные

Передние колеса оснащены пневматическими и цельнолитыми шинами, быстросъемные

Задние колеса оснащены пневматическими шинами, с возможностью регулировки

Оснащена стояночным тормозом

Активаторы складывающиеся устройства

Базовые размеры: Д*Ш*В, мм 1005/615 /895

Ширина сиденья, мм 400

Вес нетто, кг 16,6

Максимальная нагрузка, кг 120

Ortonica Trend 30



Каркас – алюминиевый имеет порошковое покрытие, складывается по ширине, складывается и

Складывается без инструмента.

Сиденье и спинка выполнено из нейлона.

Сиденье регулируемое по ширине

Локотники – съемные, регулируемые по высоте

Полноценные – съемные

Передние колеса оснащены пневматическими шинами, быстросъемные, с возможностью регулировки

Задние колеса оснащены цельнолитыми шинами

Оснащена стояночным тормозом

Активаторы складывающиеся подушка

Базовые размеры: Д*Ш*В, мм 960/725 /460

Ширина сиденья, мм 400,430,460,480,500

Вес нетто, кг 18,6

Максимальная нагрузка, кг 120

Ortonica Trend 35



Каркас – алюминиевый имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.

Сиденье и спинка выполнено из нейлона.

Спинка складная

Локотники – регулируемые по высоте

Полноценные – съемные

Передние опоры – регулируемые по углу наклона

Передние колеса оснащены цельнолитыми шинами

Задние колеса оснащены цельнолитыми шинами

Оснащена стояночным тормозом

Активаторы складывающиеся подушка

Активаторы складывающиеся опоры

Базовые размеры: Д*Ш*В, мм 970/705 /910

Ширина сиденья, мм 460

нетто, кг 14,8
поподъемность, кг 120

16
196

Ortonica Trend 40




рама – алюминиевая имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона
сиденье регулируется по глубине
локотники – съемные, регулируемые по высоте
ножки – съемные
опоры – регулируемые по углу наклона
задние колеса оснащены цельнолитыми шинами, быстросъемные с возможностью регулировки
передние колеса оснащены цельнолитыми шинами, с возможностью регулировки
оснащена стояночным тормозом
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1130/615 /865
ширина сиденья, мм 410
нетто, кг 15
поподъемность, кг 120

Ortonica Trend 45



рама – алюминиевая имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
сиденья регулируемая по высоте
сиденье регулируется по глубине
локотники – съемные, откидные, регулируемые по высоте и длине
ножки – съемные
опоры – регулируемые по углу наклона
задние колеса оснащены пневматическими шинами, быстросъемные, возможность регулировки
передние колеса оснащены цельнолитыми шинами, возможность регулировки
оснащена стояночным тормозом
с откидывающимися опорами
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1000-1050/640 /425-525
ширина сиденья, мм 460
нетто, кг 15
поподъемность, кг 120

Ortonica Trend 50

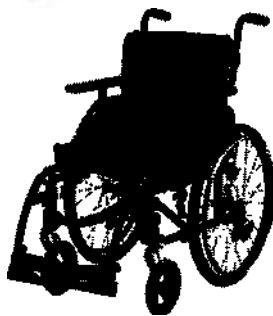

рама – алюминиевая имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
спинка регулируемая по высоте
наклон сиденья регулируется по глубине
подлокотники – съемные, откидные, регулируемые по высоте и длине
подножки – съемные
ручные опоры – регулируемые по углу наклона
задние колеса оснащены цельнолитыми шинами, быстроразъемные, возможность регулировки
передние колеса оснащены цельнолитыми шинами, возможность регулировки
оснащена стояночным тормозом
противопролежневая подушка
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 1190/630 /400-500
ширина сиденья, мм 430
вес нетто, кг 15
грузоподъемность, кг 120

Ortonica Trend 55




рама – алюминиевая имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
сиденье и спинка выполнено из нейлона.
подлокотники – фиксированные
подножки – фиксированные
задние колеса оснащены цельнолитыми шинами
передние колеса оснащены цельнолитыми шинами
оснащена стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
противопролежневая подушка
габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 980/565 /420
ширина сиденья, мм 35,5
вес нетто, кг 12,5
грузоподъемность, кг 120

Ortonica Trend 60



рама – алюминиевая имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
 Сиденье и спинка выполнено из нейлона, есть ремень безопасности
 Подлокотники – фиксированные
 Ножки – фиксированные
 Задние колеса оснащены пневматическими шинами
 Передние колеса оснащены цельнолитыми шинами
 Оснащена стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
 Стандартные размеры: Д*Ш*В, мм 950/610 /875
 Ширина сиденья, мм 400
 Вес нетто, кг 11,5
 Грузоподъемность, кг 120

Ortonica Trend 65

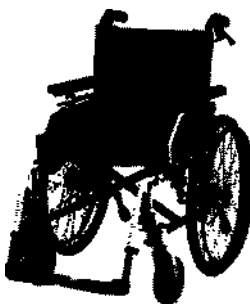

рама – алюминиевая имеет порошковое покрытие, складывается по ширине, складывается и раскладывается без инструмента.
 Сиденье и спинка выполнено из нейлона.
 Подлокотники – съемные, откидные, регулируемые по высоте
 Ножные опоры – съемные
 Задние колеса оснащены цельнолитыми шинами, быстросъемные
 Передние колеса оснащены пневматическими шинами, с возможностью регулировки
 Оснащена стояночным тормозом и ручным тормозом для сопровождающего лица
 Противопролежневая подушка
 Противопокидывающие устройства
 Стандартные размеры: Д*Ш*В, мм 1120/680 /920
 Ширина сиденья, мм 460
 Вес нетто, кг 16
 Грузоподъемность, кг 120

Ortonica Trend 70



рама – алюминиевая имеет лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.
 Сиденье и спинка выполнено из нейлона.
 Подлокотники – съемные
 Ножные опоры – съемные
 Задние колеса оснащены пневматическими шинами, быстросъемные
 Передние колеса оснащены цельнолитыми шинами
 Оснащена стояночным тормозом
 Противопокидывающие устройства
 Стандартные размеры: Д*Ш*В, мм 1040/655 /975
 Ширина сиденья, мм 450
 Вес нетто, кг 20
 Грузоподъемность, кг 120

Ortonica S 1000




Рама – облегченная алюминиевая имеет эмалевое лакокрасочное покрытие, складывается по ширине, складывается и раскладывается без инструмента.
Сиденье выполнено из нейлона.
Подлокотники - фиксированные.
Подножки - съемные, регулируемые по ширине.
Задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 600 мм.
Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 150 мм.
Оснащена стояночным тормозом.
Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 920*640*740
Ширина сиденья, мм 380
Высота спинки, мм 400
Вес нетто, кг 10
Грузоподъемность, кг 110

Ortonica S 2000



Рама – изготовлена из высокопрочных сплавов, складывается по ширине, складывается и раскладывается без инструмента.
Сиденье выполнено из нейлона.
Подлокотники - фиксированные.
Подножки – несъемные, оборудованы держателем голени
Задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 600 мм.
Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
Оснащена стояночным тормозом.
Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 840*646*750
Ширина сиденья, мм 400
Высота спинки, мм 210
Вес нетто, кг 13,77
Грузоподъемность, кг 110

Ortonica S 3000

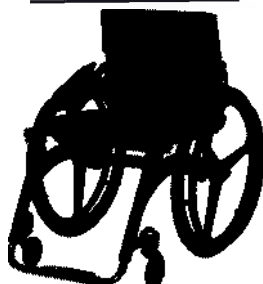

Рама – изготовлена из композитных материалов
Сиденье выполнено из нейлона.
Подлокотники – фиксированные, алюминиевые
Подножки – регулируемые

дножки – несъемная, сплошная
дние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 600 мм, с переустановкой оси.
редние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
нащена стояночным тормозом.
баритные размеры: Д*Ш*В, мм 870*600*780- 840
ирина сиденья, мм 400
сота спинки, мм 465
с нетто, кг 12
узоподъемность, кг 100

Ortonica S 4000



ма – изготовлена из композитных материалов, складывается по вертикальной оси
иденье выполнено из нейлона, регулируемое.
одлокотники – фиксированные, алюминиевые
пинка- регулируемая по углу наклона
одножки – откидные, регулируемые по высоте и углу наклона
дние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 600 мм, с переустановкой оси.
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
снащена стояночным тормозом.
снащена опорой против опрокидывания
баритные размеры: Д*Ш*В, мм 780*570*800/850/900
ирина сиденья, мм 340,360,380,400,430,460,480,500
лубина сиденья, мм 360,380,400,420,440,460
ысота спинки, мм 300-490
ес нетто, кг 7,5
рузоподъемность, кг 120

Ortonica S 5000



ама – изготовлена из композитных материалов, складывается по вертикальной оси, покрыта
синтетической порошковой эмалью с термической полимеризацией, усилена двойной крестовиной
Сиденье изготовлены из нейлона .
Подлокотники – фиксированные
Спинка- регулируемая по степени натяжения по углу наклона
Подножки – откидные, регулируемые по высоте и углу наклона
Задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 600 мм, с переустановкой оси.
Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
Оснащена стояночным тормозом.
Оснащена опорой против опрокидывания
Габаритные размеры: Д*Ш*В, мм 990*570*950
Ширина сиденья, мм 320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 480, 500
Глубина сиденья, мм 320,340,360,380,400,420,440,460
Высота спинки, мм 300-490
Вес нетто, кг 7,5
Грузоподъемность, кг 120

Ortonica S 6000



21
201 3

— изготовлена из композитных материалов, складывается по вертикальной оси, покрыта
синтетической порошковой эмалью с термической полимеризацией, усилена двойной крестовиной
сиденья изготовлены из нейлона .
локотники — фиксированные
спинка- регулируемая по степени натяжения по углу наклона
рукоятки — откидные, регулируемые по высоте и углу наклона
задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 600 мм, с переустановкой оси.
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
оснащена стояночным тормозом.
нормативные размеры: Д*Ш*В, мм 990*570*950
ширина сиденья, мм 320, 340, 360, 380, 400, 430 , 460 ,480, 500
глубина сиденья, мм 320,340,360,380,400,420,440,460
высота спинки, мм 300,350,400,450
вес нетто, кг 10,5
грузоподъемность, кг 120

Ortonica S 7000



— изготовлена из композитных материалов, покрыта синтетической порошковой эмалью с
термической полимеризацией, не складывается
сиденья изготовлены из нейлона .
локотники — откидные
спинка- регулируемая по степени натяжения по углу наклона
рукоятки — съемные, регулируемые по длине и углу наклона,
задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 600 мм, с переустановкой оси.
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
оснащена стояночным тормозом.
нормативные размеры Д*Ш*В 780/860*540*640/900
ширина сиденья, мм 320, 340, 360, 380, 400,
глубина сиденья, мм 340-480
высота сиденья спереди/сзади, мм 47 - 55 / 37 - 51
вес нетто, кг 9
грузоподъемность, кг 120

Ortonica S 8000



22
2023

ра — изготовлена из композитных материалов, покрыта синтетической порошковой эмалью с химической полимеризацией, не складывается
сиденье изготовлены из нейлона .
локотники — складные боковины
ручка- регулируемая по высоте
подножки — несъемные, регулируемые по длине и углу наклона,
задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметр 600 мм, с переустановкой оси.
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
оснащена стояночным тормозом.
габаритные размеры Д*Ш*В 780/860*540*640/900
ширина сиденья, мм 360-460
глубина сиденья, мм 380-460
высота сиденья спереди/сзади, мм 450 - 530 / 400 - 480
масса нетто, кг 10
грузоподъемность, кг 120


Ortonica S 9000



ра — изготовлена из композитных материалов, покрыта синтетической порошковой эмалью с химической полимеризацией, складная
сиденье изготовлены из нейлона .
локотники — откидные, регулируемые по высоте
ручка- регулируемая по высоте, регулируемая степень натяжения
подножки — съемные, откидные регулируемые по длине и углу наклона,
задние колеса с цельнолитыми шинами диаметр 600 мм, с переустановкой оси.
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
оснащена стояночным тормозом.
габаритные размеры Д*Ш*В 520-700*640/970
ширина сиденья, мм 320-500
глубина сиденья, мм 340,360,380,400,420,440,460,480,500
высота сиденья спереди/сзади, мм 500
масса нетто, кг 17,5
грузоподъемность, кг 120

22
203

Ortonica Puma

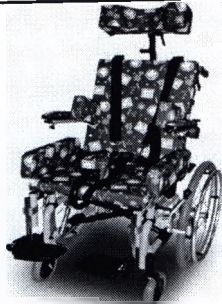

рама — изготовлена из алюминия, имеет высококачественное порошковое лакокрасочное покрытие.
складывается и раскладывается по вертикальной оси без применения инструмента

сиденье выполнено из нейлона, оборудовано съемным, регулируемым абдуктором.

локотники — съемные, регулируемые по высоте

спинка- оборудована мягким, съемным подголовником, регулируется по углу наклона

подножки — съемные, откидные, регулируемые по высоте и углу наклона

задние колеса быстросъемными цельнолитыми шинами диаметр 600 мм

передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.

оснащена тормозом для сопровождающего лица, стояночным тормозом, антипрокидывающим

устройством, оборудована съемными, боковыми ограничителями и ремнями для фиксации туловища

габаритные размеры Д*Ш*В, мм 1050*595*380

ширина сиденья, мм 460

глубина сиденья, мм 420


высота сиденья, мм 420

высота спинки, мм 500

вес нетто, кг 18

грузоподъемность, кг 110

Ortonica Leo

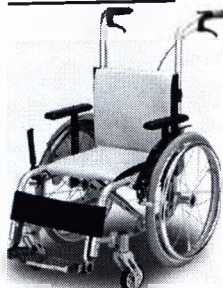

рама — изготовлена из алюминия, имеет высококачественное порошковое лакокрасочное покрытие.
складывается и раскладывается по вертикальной оси без применения инструмента

сиденье выполнено из нейлона

локотники — съемные, регулируемые по высоте

спинка- фиксированная

подножки — сплошная, съемная, регулируемая по длине, оборудована держателем голени

задние колеса быстросъемными цельнолитыми шинами диаметр 500мм

передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.

оснащена тормозом для сопровождающего лица, стояночным тормозом,

габаритные размеры Д*Ш*В, мм 900*550*810

ширина сиденья, мм 275-350


глубина сиденья, мм 320

высота сиденья, мм 300

высота спинки, мм 370

вес нетто, кг 14,5

грузоподъемность, кг 80

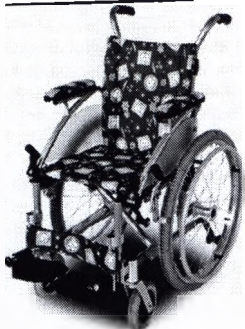Ortonica Tiger


— изготовлена из алюминия, имеет высококачественное хромированное покрытие. Складывается и складывается по вертикальной оси без применения инструмента
 сенье выполнено из нейлона
 локотники — откидные
 инка- фиксированная
 ножки — съемные, регулируемая по длине, оборудована держателем голени
 ние колеса быстросъемными пневматическими шинами диаметр 500мм
 редние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 150 мм.
 нащена стояночным тормозом, съемными антипрокидывающими устройствами
 баритные размеры Д*Ш*В, мм 800*450*960
 ирина сиденья, мм 310
 убина сиденья, мм 320
 сота сиденья , мм 460
 сота спинки, мм 430
 нетто, кг 12,8
 зоподъемность, кг 80

Ortonica Lynx

— изготовлена из композиционных материалов, имеет высококачественное хромированное покрытие.
 складывается и складывается по вертикальной оси без применения инструмента
 сенье выполнено из нейлона
 локотники — съемные, регулируемые по высоте
 инка- фиксированная
 ножки — съемные, откидные, оборудованы держателем голени
 ние колеса быстросъемными пневматическими шинами диаметр 550мм
 редние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200 мм.
 нащена стояночным тормозом, съемными антипрокидывающими устройствами
 баритные размеры Д*Ш*В, мм 965*615*825
 ирина сиденья, мм 250,300,350
 убина сиденья, мм 320
 сота сиденья , мм 460
 сота спинки, мм 430
 нетто, кг 14,7
 зоподъемность, кг 75

25
205

Ortonica Lion

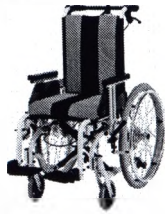

изготовлена из алюминия, имеет высококачественное лакокрасочное покрытие. Складывается и
ывается по вертикальной оси без применения инструмента
е выполнено из нейлона, регулируемое по углу наклона и по глубине
отники – съемные, регулируемые по высоте
- фиксированная
ки – съемные, откидные, регулируемые по длине
колена быстросъемные цельнолитые шины диаметр 500мм
ие колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 150 мм.
ена тормозом для сопровождающего лица, стояночным тормозом, съемными
прокидывающими устройствами
тные размеры Д*Ш*В, мм 1000*575*895
на сиденья, мм 410
на сиденья, мм 400
а сиденья, мм 460
а спинки, мм 460
етто, кг 17,5
подъемность, кг 110

Ortonica Panter



изготовлена из алюминия, имеет высококачественное лакокрасочное покрытие. Складывается и
ывается по вертикальной оси без применения инструмента
е выполнено из нейлона
отники – съемные, регулируемые по высоте
ка- фиксированная
ожки – съемные
ие колеса быстросъемные цельнолитые шины диаметр 500мм, регулируются по вертикальной и
онтальной оси
едние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 150 мм.
ащена тормозом для сопровождающего лица, стояночным тормозом, съемными
прокидывающими устройствами
аритные размеры Д*Ш*В, мм 900*550*810
ина сиденья, мм 400
убина сиденья, мм 370
сота сиденья, мм 460
сота спинки, мм 400
етто, кг 16
подъемность, кг 110

Ortonica Kitty



рама – изготовлена из стали, имеет высококачественное лакокрасочное покрытие. Складывается и складывается по вертикальной оси без применения инструмента
сиденье выполнено из нейлона
локотники – съемные, откидные
спинка- складная, оборудована мягким подголовником
ножки – съемные, оснащены держателем голени
задние колеса быстросъемные цельнолитые шины диаметр 550мм,
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 175 мм.
оснащена стояночным тормозом, антипрокидывающими устройствами, ремнями для фиксации туловища
нормативные размеры Д*Ш*В, мм 925*480*845
ширина сиденья, мм 300,350
глубина сиденья, мм 300
высота сиденья , мм 500
высота спинки, мм 430
вес нетто, кг 14
грузоподъемность, кг 120

Ortonica Olvia 10



рама – изготовлена из стали, с антикоррозийным покрытием
сиденье выполнено из нейлона
локотники – регулируемые по высоте
спинка- оборудована мягким, съемным подголовником, регулируется по углу наклона
ножки – съемные, регулируемые углу наклона оборудованы мягкой опорой для икр
задние колеса цельнолитыми шинами диаметр 100 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
оснащена столиком, стояночными тормозами на четырех колесах
нормативные размеры Д*Ш*В, мм 710*655*975/1210
ширина сиденья, мм 513
глубина сиденья, мм 405
высота сиденья , мм 500
высота спинки, мм 570
вес нетто, кг 31,3
грузоподъемность, кг 200

Ortonica Olvia 20



рама – изготовлена из стали, с антикоррозийным покрытием

рама выполнена из нейлона
локотники – регулируемые по высоте
спинка- оборудована мягким, съёмным подголовником, регулируется по углу наклона
рукоятки – сплошная, регулируемая углу наклона
задние колеса цельнолитыми шинами диаметр 100 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
сиденье столиком, стояночными тормозами на четырех колесах
габаритные размеры Д*Ш*В, мм 710*655*975/1210
глубина сиденья, мм 513
ширина сиденья, мм 405
высота сиденья , мм 500
высота спинки, мм 570
вес нетто, кг 31,3
подъемность, кг 200

Ortonica Olvia 30



рама – изготовлена из стали, с антикоррозийным покрытием
сиденье выполнено из нейлона
локотники – регулируемые по высоте
спинка- оборудована мягким, съёмным подголовником, регулируется по углу наклона
рукоятки – сплошная, регулируемая углу наклона
задние колеса цельнолитыми шинами диаметр 100 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 100 мм.
сиденье столиком, стояночными тормозами на четырех колесах
габаритные размеры Д*Ш*В, мм 710*655*975/1210
глубина сиденья, мм 513
ширина сиденья, мм 405
высота сиденья , мм 500
высота спинки, мм 570
вес нетто, кг 31,3
подъемность, кг 200

Ortonica Olvia 40



рама – изготовлена из стали, с антикоррозийным покрытием
сиденье выполнено из винилискожи, регулируемое
локотники – регулируемые по высоте
спинка- оборудована мягким, съёмным подголовником, регулируется по углу наклона
рукоятки – съёмные, регулируемые по углу наклона
задние колеса цельнолитыми шинами диаметр 300 мм
передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами диаметр 200мм.
сиденье столиком, стояночными тормозами на четырех колесах
габаритные размеры Д*Ш*В, мм 710*630*1180
глубина сиденья, мм 460
ширина сиденья, мм 430

сота сиденья, мм 530
сота спинки, мм 570
с нетто, кг 35,5
усподемность, кг 150

3. ПОДГОТОВКА, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.


1. **Удаление отходов**
необходимо сохранить упаковку для возможной транспортировки коляски производителю/в сервисный центр для ремонта или технического обслуживания. Остальные бумажные отходы направляются на переработку. Для утилизации заменяемых элементов или всего кресла необходимо провести их сортировку по видам материала: пластмасса, резина, сталь, алюминий и т.п.

2. **Целевое использование**
Кресло предназначена для лиц с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения. Пользователь кресла должен находиться под постоянным присмотром.

3. **Места использования**
Кресло подходит для использования как в помещении, так и на улице. При попадании кресла под дождь, необходимо удалить остатки влаги сухой тряпкой. Если на кресло попала грязь или коррозионное вещество, солёная вода или дорожный реагент, то его необходимо промыть водой и произвести гипоаллергическую обработку, а также заново смазать все подвижные элементы. Избегайте попадания кресла в морскую воду, потому что его некоторые части не подлежат полной очистке. После прогулки рекомендуется произвести очистку колёс кресла от грязи.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Никогда не оставляйте пользователя кресла одного!

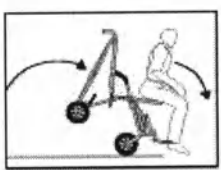


Не рекомендуется садиться на передний край кресла при посадке или высадке. Существует опасность опрокидывания. Не рекомендуется использовать подножки в качестве опоры.

Ремни безопасности должны использоваться постоянно. Запрещается оставлять пользователя коляски без присмотра. Запрещается затягивать ремни на пользователе слишком туго. Ремни не должны мешать дыханию и кровообращению;




Всегда ставьте кресло на тормоз, если вам необходимо отойти;

Следуйте инструкциям по складыванию/раскладыванию кресла. Будьте осторожны при работе со складным механизмом;

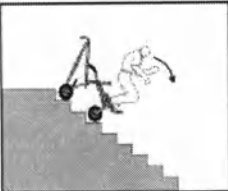

Не пытайтесь перемещать кресло по лестнице, эскалаторам, крутым уклонам или по ледяным и скользким поверхностям.

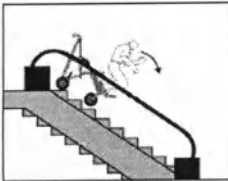

Во избежание опрокидывания не перегружайте кресло и не навешивайте на него тяжёлые сумки.

28
209

Периодически проверяйте состояние элементов регулировки рамы и состояние аксессуаров кресла. Обращайте внимание на малейшие неисправности в работе кресла и поддерживайте надлежащее техническое состояние кресла. Контролируйте состояние тормозов кресла.

Запрещается использовать кресло, не соответствующее размерам пользователя.



Для преодоления ступеней необходимо передвигать кресло лицевой стороной, немного отклонив его назад. Убедитесь, что передние колёса преодолели преграду.



При спуске со ступени необходимо перемещать кресло задом наперёд. Для спуска со ступени придерживайте задние колёса, спуская их осторожно на поверхность.



Необходимо контролировать движение кресла при перемещении по скату. Будьте осторожны при перемещении пользователей больших весов по крутым склонам. Если не уверены, то не совершайте спуск без посторонней помощи.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться регулярно: необходимо производить осмотр кресла на предмет признаков износа или повреждений. Для облегчения складывания и регулировки необходимо производить смазывание рамы и подвижных элементов кресла.

Давление в шинах: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО проверяйте давление в шинах во избежание возникновения проблем с торможением.

Оси и подвижные элементы: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО протирайте оси и подвижные элементы кресла влажной тряпкой. После каждой очистки необходимо провести смазывание кресла.

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	Еженедельно	Раз в 3 месяца	Раз в 6 месяцев	По мере необходимости
Бода, шины и давление в шинах	•			
Тормоза и ручные фиксаторы	•			
Аксессуары	•			
Оси передних и задних колёс		•		
Чистка и смазывание всех подвижных элементов		•		
Ремень, застёжки и липучки Velcro		•		
Обшивка сиденья/спинки /степень натяжения		•		
Подлокотники и мягкие подкладки.			•	
Рама			•	
Пневмоцилиндры		•		
Техническое обслуживание или ремонт у представителя Конвэйд				•

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт или замена несъёмных, изношенных или сломанных элементов должны производиться только в специализированном центре сервисного обслуживания.

6. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

30
210

необходимо производить дезинфекцию всех элементов кресла, находящихся в контакте с пользователем или лицом, осуществляющим уход за ним.

Дезинфекция должна проводиться на регулярной основе. Раму нужно содержать в сухости, а все подвижные элементы рамы должны смазываться нетоксичными и гипоаллергическими веществами. После продолжительного хранения кресла, необходимо произвести техническое обслуживание, очистку и смазывание кресла.

Избегайте попадания солёной воды на кресло. В солёной среде возможно образование ржавчины. В случае попадания солёной воды на кресло необходимо немедленно протереть его влажной ветошью. Достаточным будет использование воды и сухой тряпки; после все подвижные элементы кресла должны быть повторно смазаны.

Очистка колёс и тормозов:

Колёса должны очищаться от грязи во избежание проблем при передвижении кресла. Тормоза должны быть очищены от грязи, которая может мешать при их включении. Колёса и тормоза необходимо протирать влажной тряпкой, и при необходимости, производить регулировку тормозов.

Очистка обшивки:

Обшивка спинки и сиденья легко снимается на всех моделях для чистки и сушки. Для чистки рекомендуем использовать обычное моющее средство.

Съёмные элементы протираются влажной тряпкой. После чистки кресло необходимо тщательно просушить.

7. РЕМОНТ

Пользователь: Пользователь может самостоятельно демонтировать съёмные элементы и аксессуары кресла, такие как, подножки или системы подножек, ремни для стоп, все матерчатые элементы, рукоятки и т.д.

Производитель/Сервисный центр: Ремонт или замена несъёмных, изношенных или сломанных элементов должны производиться только в специализированном центре сервисного обслуживания. Любой элемент кресла может быть заменён. После получения разрешения на возврат кресло должно быть упаковано в оригинальную или подходящую для перевозки упаковку для возврата в сервисный центр. Доставка осуществляется бандеролью или частной службой доставки грузов.

8. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Пользователь:

Ключи 3/8", 7/16", 3/4" или 2 разводных ключа и крестообразная отвёртка;

Шестигранный ключ (5/32") (в комплекте);

Сервисный центр / Уполномоченный сервисный дилер

Набор гаечных ключей, или два разводных ключа;

Крестообразная и винтовая отвёртки;

Устройство для установки заклёпок различного размера;

Электродрель с набором насадок различных размеров;

Шестигранный ключ (5/32") (в комплекте);

9. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КРЕСЛА

Поставьте кресло на четыре колеса. Пустое кресло прокатите по ровной поверхности (2 метра). Оно не должно отклоняться при движении в сторону более чем на 15 см. Колёса должны свободно вращаться, а тормоза надёжно блокировать колёса. Следуйте инструкциям по складыванию/раскладыванию кресла; кресло должно свободно складываться и раскладываться без излишних усилий. Все застёжки должны быть закрыты. Застёжки на подвижных элементах не должны быть перетянуты. Обшивка не должна быть перетянута или провисать. Аксессуары должны быть надёжно и правильно установлены на кресле.

10. ГАРАНТИЯ

31
211

ия хранения кресел-колясок в упаковке предприятия – изготовителя на складах поставщика и
бителя в части воздействия климатических факторов соответствуют группе 2 (С) ГОСТ 15150. Не
кается хранение кресел-колясок в одном помещении с химически активными и пылящими
твами.

тийный срок службы – 12 месяцев со дня приобретения кресел-колясок потребителем, при
дении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Всего прошито, пропунеровано и скреплено
печатью, 31 (тридцать один) лист.

