

ПОЛИМАГ-01М

бражается ранее установленное время воздействия, для оповещения обслуживающего персонала об окончании режима воздействия появится звуковой сигнал. На ЖК-индикаторе при этом остается информация о наличии/отсутствии воздействия для каждого из пациентов (рис. 20).

- Освободите пациента, воздействие для которого завершено, от излучателей и поместите излучатели на фиксатор стойки в обратном порядке, удерживая двумя руками устройство формирования импульсов.

Для удобства фиксации гибких излучающих линеек излучателей, можно воспользоваться комплектом принадлежностей для излучателей. Использование данных принадлежностей показано на рисунке 2, 3 и 4

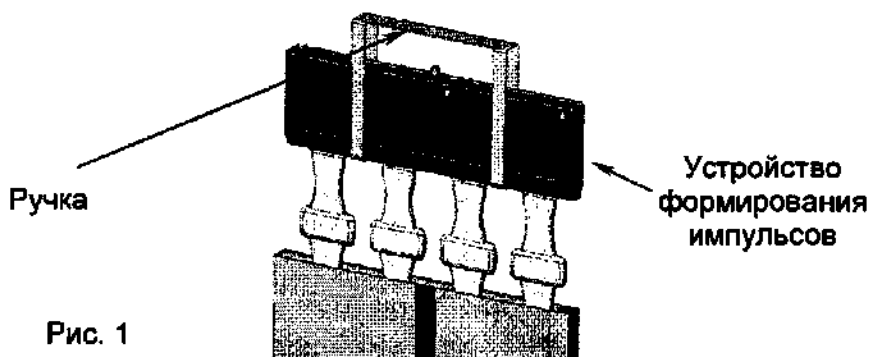


Рис. 1



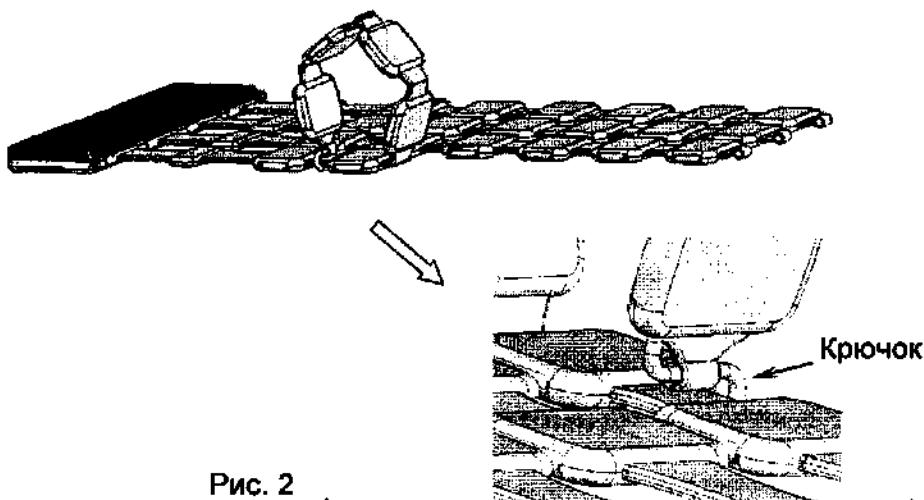


Рис. 2

Схема укладки излучателя в чехол

Излучатель уложить на чехол поверхностью «N» вниз и вставить концы гибких линеек в петли чехла. Накрыть излучатель верхней половиной чехла (рис. 3), обращая внимание на совпадение петельных частей с крючковыми соответствующих «липучек». Для надежной фиксации излучателя прижать верхнюю половину чехла к нижней в местах расположения «липучек». Перевернуть излучатель с чехлом поверхностью «N» вверх (рис. 4).

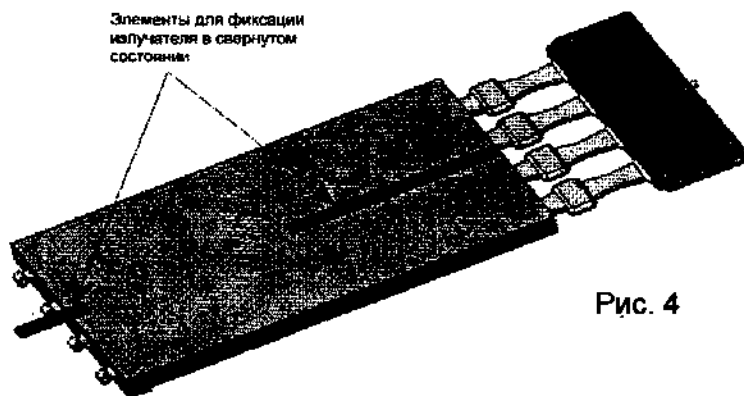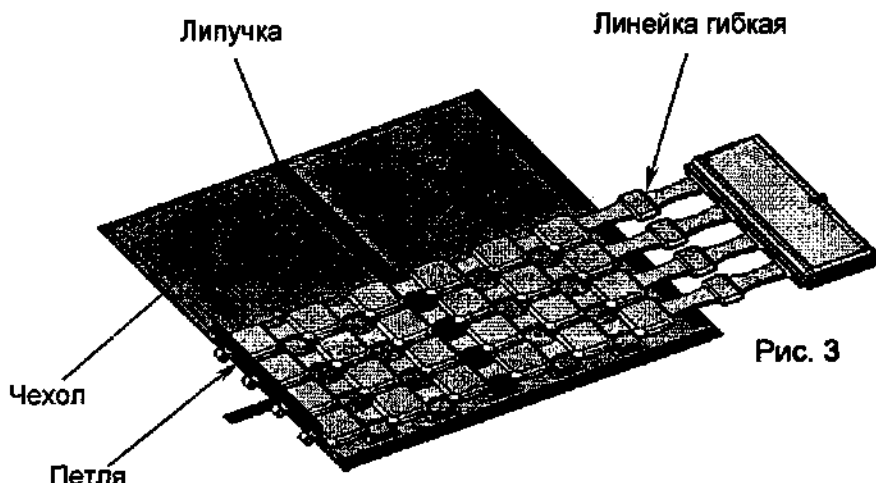

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-01М", в том числе:

1	Блок управления	1 шт.
2	Основной излучатель	4 шт.
3	Линейка излучающая гибкая	2 шт.
4	Индикатор магнитного поля	1 шт.
5	Руководство по эксплуатации	1 шт.
6	Инструкция по применению	1 шт.
7	Краткая инструкция по запуску воздействия	1 шт.
8	Стойка	1 шт.
9	Комплект принадлежностей для излучателей	
	- крючок	18 шт.
	- чехол	4 шт.
	- ручка для переноса	4 шт.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Внешний вид аппарата приведен на рис. 5

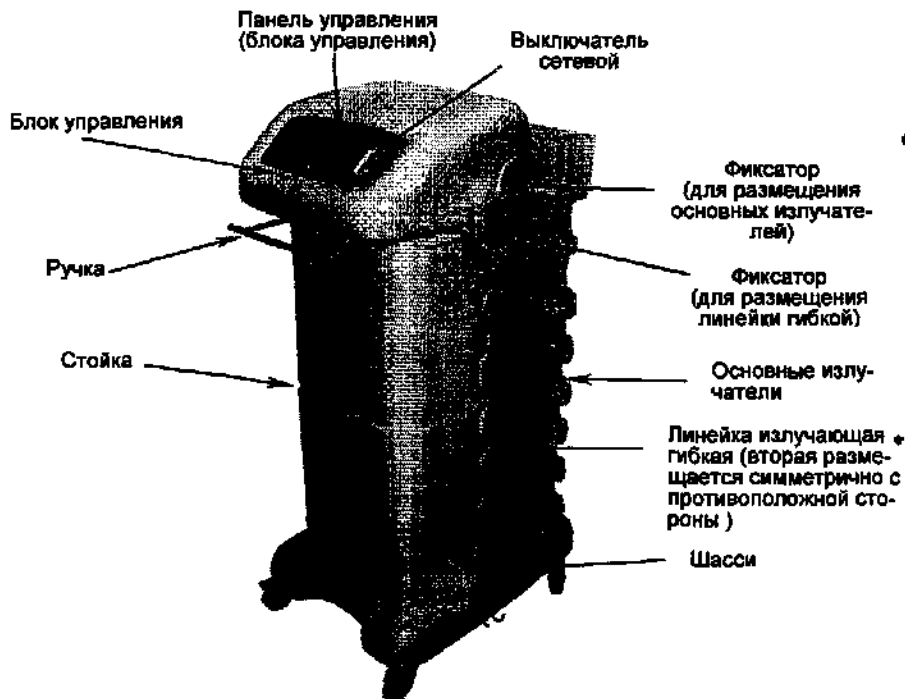


Рис. 5

ПОЛИМАГ-01М

Выходной радиочастотный излучатель для электромагнитного излучения в диапазоне частот от 10 до 100 МГц, работающий в режиме импульсного излучения.

Внешний вид основного излучателя приведен на рис. 6

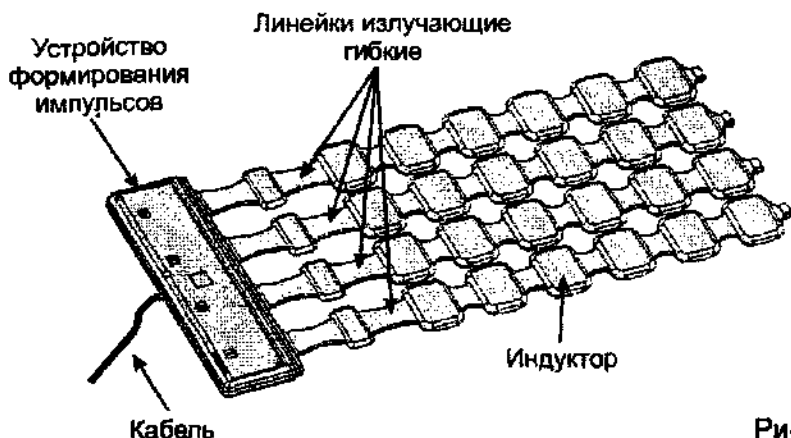


Рис. 6

Внешний вид линейки излучающей гибкой приведен на рис. 7

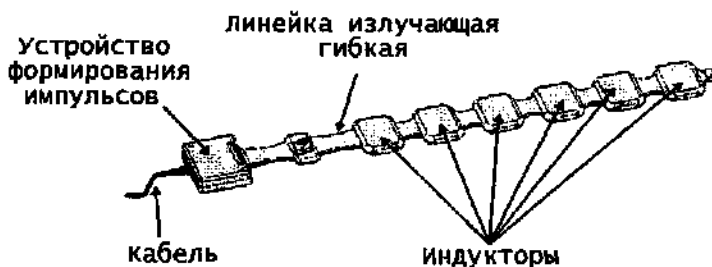


Рис. 7

Маркировка

На аппарате нанесены следующие обозначения:



Знак, указывающий согласно ГОСТ Р 50267.0-92 на необходимость обратиться к эксплуатационным документам, согласно МЭК 60601-1:2005 на то, что он применяется в эксплуатационных документах для предупреждений, связанных с безопасностью и эффективностью эксплуатации изделия;

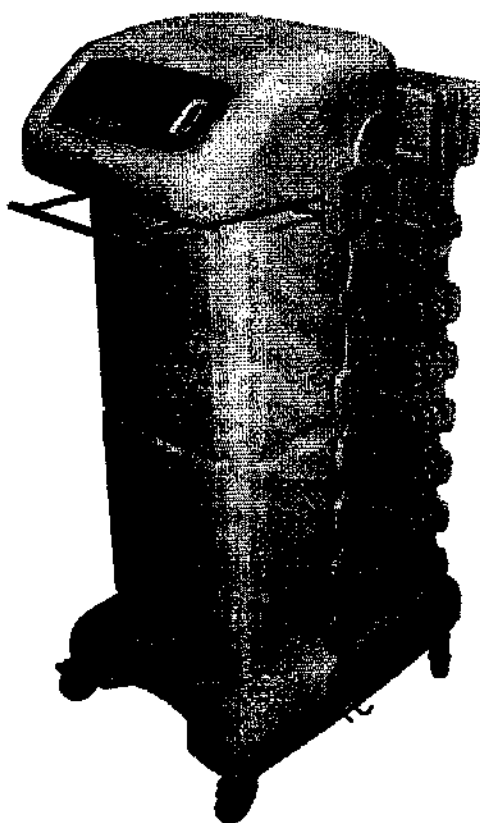


Рис. 35