

«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор ООО «ХЕМА»

Е.С. Кострикина
« 02 » МОСКВА февраля 2023 г.

Фотографические изображения общего вида

медицинского изделия и его компонентов


«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления
галактоманнанового антигена *Aspergillus* в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ)
и сыворотке крови человека «ХЕМАТест GalMAg»»



Instruction for use



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ГАЛАКТОМАННАНОВОГО АНТИГЕНА *Aspergillus*
В БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОМ ЛАВАЖЕ (БАЛ)
И СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
«ХЕМАТест GalMag»**

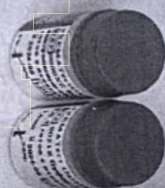


НОМЕР ПО КАТАЛОГУ **REF X021**
ТУ 21.20.23-0211-18619450-2022
РУ № _____

 For 6 determinations/На 6 определений
 Для ин витро диагностики



XEMA Co., Ltd.
The 9th Parkovaya str., 48
105264 Moscow, Russia
Tel./fax: +7(495) 510-57-07
e-mail: redkin@xema-medica.com
internet: www.xema-medica.com

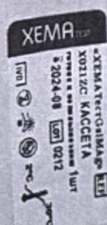

XEMA TEST

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления галактоманнанового антигена *Aspergillus* в бронхиальном лаваже (БАЛ) и сыворотке крови человека «ХЕМАТест GalMag»

REF X021 LOT 0212 2021-08 2024-08

Состав набора

Наименование	Единица измерения	Срок годности
Бифид для обработки	6 шт.	0212C 0212
Бифид для нейтрализации	1 шт.	0212C 0212
Образцы	1 шт.	0212C 0212

Инструкция по применению
ТУ 21.20.23-0211-18619450-2022, РУ № _____
Для профессионального применения
ООО «ЦРММ» 125119, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 3, к. 1, пом. 2

30°C

X0210212252456

Общий вид Набора

XEMA^{TEST}

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления галактоманнанового антигена *Aspergillus* в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) и сыворотке крови человека «XEMA Test GalMAg»

REF X021 LOT 0212 2021-08 2024-08

Состав набора

Символ REF LOT

Кассета	6 шт.		0212C	0212
Буфер для образца	1шт.(3,0 мл)	DIL1	S021Z	0212
Буфер для нейтрализации образца	1шт.(0,5 мл)	DIL2	S000XZ	0212
Инструкция по применению	1 шт.		X021IR	

ТУ № 21.20.23-0211-18619450-2022, РУ №

Для профессионального применения

ООО «ХЕМА» 125319, г. Москва, ул. 4-я 8 Марта, д.3, к.3, пом. 2



(495) 737-3936, 737-0040, 510-5707

6

IVD


i

2°C

30°C

Состав Набора.

Кассета

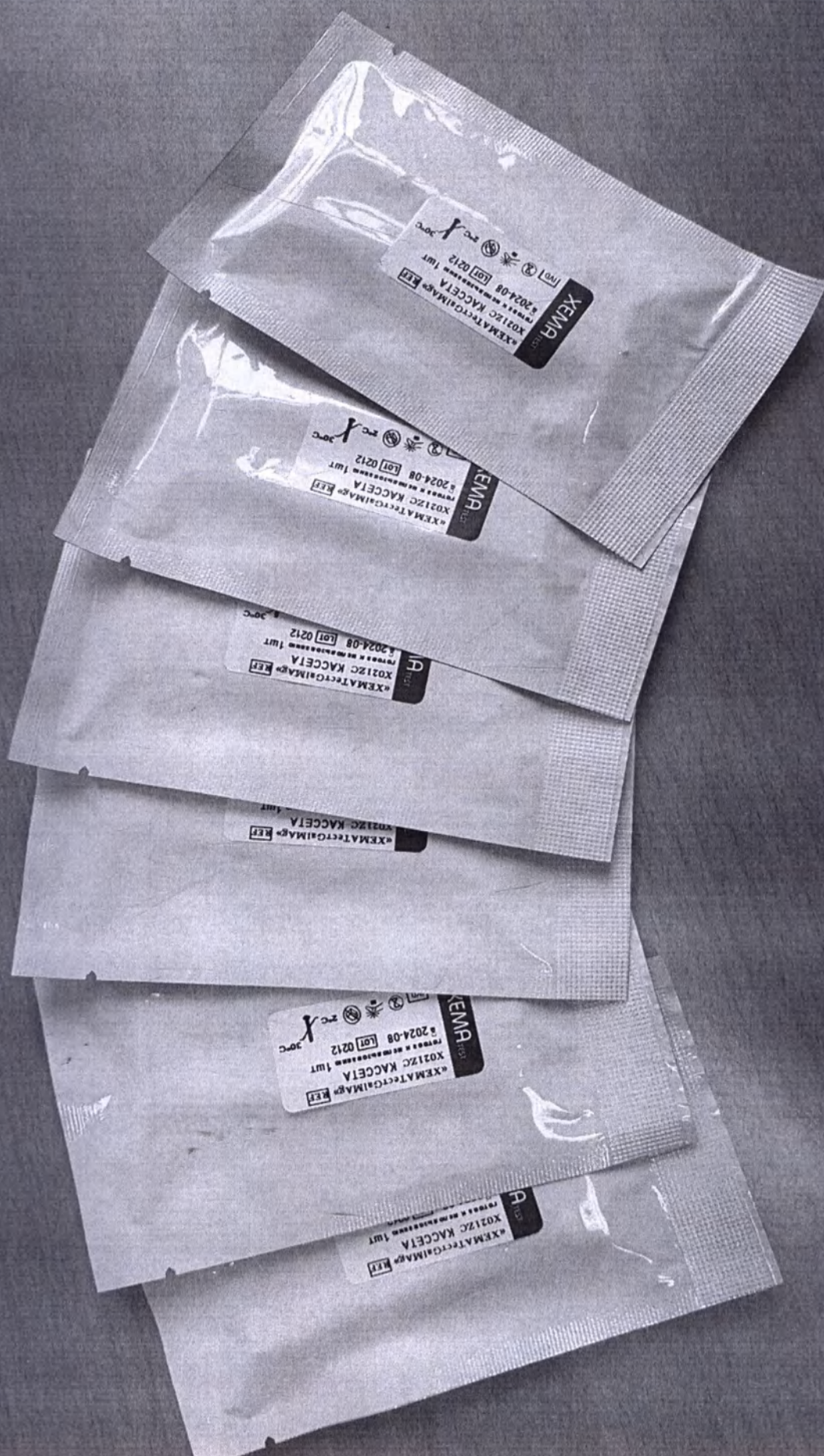



XEMA_{TEST} «ХЕМАТестGalMAg» **REF**
X021ZC КАСЦЕТА
ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1 ШТ
2024-08 **LOT** 0212
30°C

IVD


⊗ ⚡ ⚡ ⚡ 2°C

XEMAF TEST
www.xematest.com

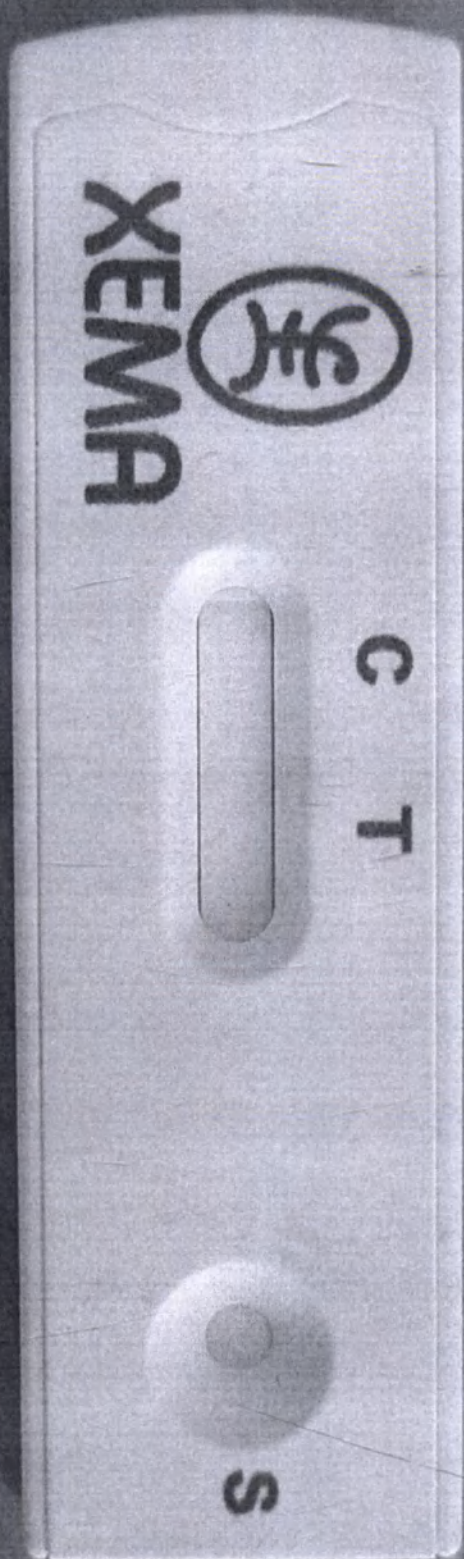

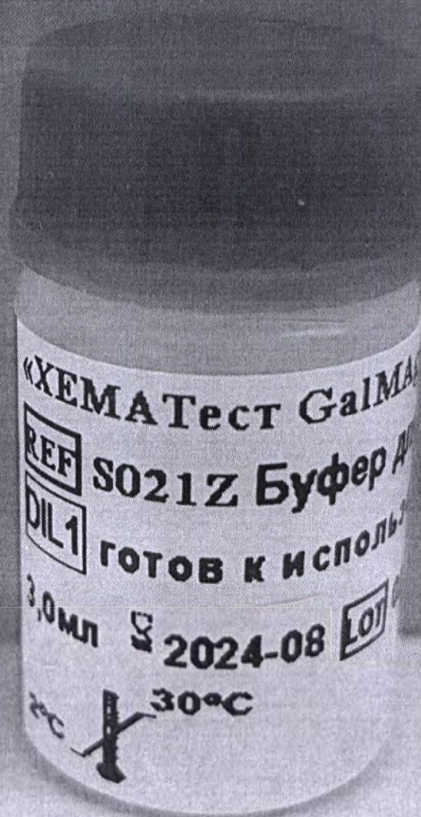

Буфер для нейтрализации образца

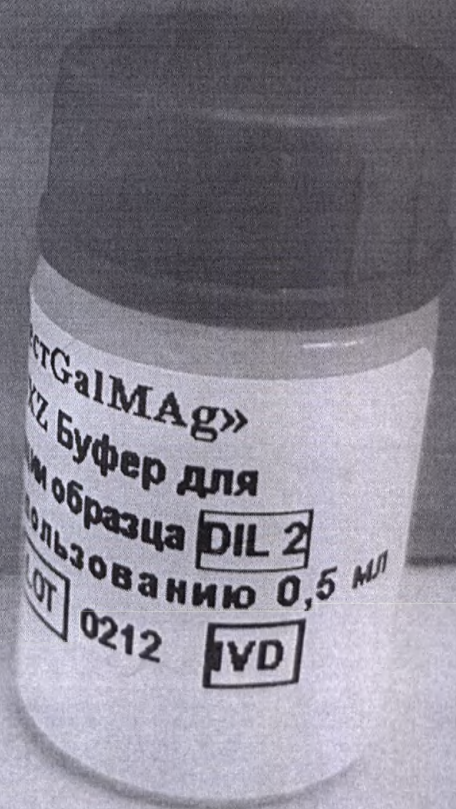



ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

9 листов

Исполнительный директор

ООО «ХЕМА»

Е.С. Кострикина

E. Kostrikina

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор ООО «ХЕМА»



Кострикина Е.С.

« 02 » февраля 2023 г.

М.П.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления галактоманнанового антигена *Aspergillus*

в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) и сыворотке крови человека

«ХЕМАТест GalMAg»



Набор реагентов для иммунохроматографического выявления галактоманнанового
антигена *Aspergillus* в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) и сыворотке крови человека
«ХЕМАТест GalMAg»

REF XXXX LOT Серия: XXX



Количество _____

Изготовлен



ГГГГ/ММ

Годен до




ГГГГ/ММ

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

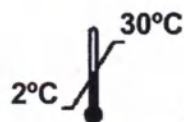

ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

2 листов

Исполнительный директор

ООО «ХЕМА»

Е.С. Кострикина

E. S. Kostrikina



«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор ООО «ХЕМА»



Кострикина Е.С.

« 02 » февраля 2023 г.

М.П.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для иммунохроматографического выявления галактоманнанового антигена
Aspergillus в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) и сыворотке крови человека**

«ХЕМАТест GalMAg»

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления галактоманнанового антигена *Aspergillus* в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) и сыворотке крови человека «XEMATest GalMAg»

REF X021 LOT XXXX  XXXX-XX  XXXX-XX

Состав набора		Символ	REF	LOT
Кассета	6 шт.		X021ZC	XXXX
Буфер для образца	1 шт. (3,0 мл)	DIL 1	S021Z	XXXX
Буфер для нейтрализации образца	1 шт. (0,5 мл)	DIL 2	S000XZ	XXXX
Инструкция по применению	1 шт.		X021IR	

ТУ 21.20.23-0211-18619450-2022 РУ _____ от _____

Для профессионального применения.

 ООО «ХЕМА» 125319, г. Москва, ул. 4-я 8 Марта, д.3, к. 3, пом. 2

© (495) 737-3936, 737-0040, 510-5707




XEMA^{TEST}

«XEMATест GalMAg»

Кассета REF X021ZC

ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1 шт.

XXXX-XX LOT XXXX

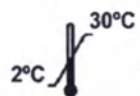

IVD



XEMA_{TEST}

«ХЕМАТест GalMAg» **REF** S021Z

БУФЕР ДЛЯ ОБРАЗЦА **DIL 1**

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 3,0 мл

 XXXX-XX **LOT** XXXX

2°C  30°C
IVD

ХЕМА_{TEST}

«ХЕМАТест GalMAg» **REF** S000XZ

БУФЕР ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОБРАЗЦА **DIL 2**

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 0,5 мл

 XXXX-XX **LOT** XXXX

 30°C
2°C **IVD**

ПРОШТО В КОЛИЧЕСТВЕ

5 листов

Исполнительный директор

ООО «ХЕМА»

Е.С. Кострикина

