

ИНСТРУКЦИЯ
по применению дентального винтового имплантата в комплекте
«ЛИКО-М»

ТУ 9398-001 - 84884228 -2009

Регистрационный номер:

Сертификат: №

Производитель: ООО «НПК ЛИКОСТОМ»

Состав. Дентальный винтовой двухэтапный имплантат, заглушка для имплантата, абатмент и винт для крепления изготовлены из титана марки Grade-4 ASTM F -67-00 .

Свойства.

Имплантат имеет внутренний двенадцатигранный и поверхность с заданным рельефом с крупной переменной резьбой, что улучшает самонарезание.

Показания к применению.

Имплантаты предназначены для внедрения в костную ткань челюсти пациента в качестве искусственных опор зубных протезов при частичных или полных дефектах зубных рядов.

Способ применения.

При проведении адекватной анестезии произведите разрез по гребню альвеолярного отростка в зоне предполагаемого вмешательства. Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую глубину последовательно пилотными фрезами.

Вскройте упаковку и достаньте контейнер с имплантатом.

Извлеките имплантат из капсулы, возьмите имплантовод в левую руку, правой извлеките имплантат. Введите имплантат в ложе и вручную затяните его почасовой стрелке до упора. Извлеките имплантовод, потянув его вертикально вверх с незначительным усилием. Установите в имплантат ключ 2,4 и затяните имплантат при помощи ратчера. Убедитесь в отсутствии фрагментов кости и мягких тканей на ортопедической платформе имплантата. Установите заглушку. Ушейте рану узловыми швами.

Побочные реакции. Не выявлены.

Форма выпуска. Дентальный имплантат и заглушка упакованы в пластиковый или стеклянный флакон, абатмент и винт для крепления в упаковку из steriking , весь комплект упакован в двойную упаковку из steriking

Стерильность. Изделие стерильно. Стерилизация облучением дозой 1,8 – 3,0 кГр.

Условия хранения. Хранение в сухом защищенном от света месте.

Срок хранения. 2 года.