


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
«ООО «Группа компаний Альтекс»


И.В. Щербаков

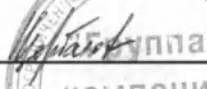

2012 г.

**Руководство по эксплуатации
Пакетов перевязочных индивидуальных
с лекарственными средствами АКТИВТЕКС.**

1. Назначение

Пакеты предназначены для оказания первичной медицинской помощи при ранениях, в том числе сквозных, ожогах, для фиксации конечностей, наложении давящей повязки, защиты травмированных тканей, остановки кровотечений, профилактики развития инфекции, а также для самопомощи.

2. Технические характеристики

В комплект ППИ входят:

- пакеты по 1 штuke в индивидуальной упаковке одного размера;
- этикетка с инструкцией по применению, нанесенная на наружную сторону индивидуальной упаковки.


Комплекты ППИ выпускаются в следующих исполнениях:

Наименование комплекта	Обозначение комплекта	Состав комплекта
Пакет перевязочный индивидуальный с одной фиксированной лечебной подушечкой	ППИ 1 – 1	Активтекс АКФ, фиксирующий бинт, крепление
	ППИ 1 – 2	Гемотекс ГКЖ-Д, фиксирующий бинт, крепление
	ППИ 1 - 3	Активтекс ХФЛ, фиксирующий бинт, крепление
Пакет перевязочный индивидуальный с двумя лечебными подушечками, одна из которых	ППИ 2 -1	Активтекс АКФ, 2 шт. фиксирующий бинт, крепление Гемотекс ГКЖ-Д, 2 шт.

фиксируется, а вторая подвижна.	ППИ 2 -2	фиксирующий бинт, крепление
	ППИ 2 - 3	Активтекс ХФЛ, 2 шт. фиксирующий бинт, крепление


Размеры комплектов ППИ соответствуют указанным на чертежах (см. чертежи 1 и 2).

Чертеж 1.

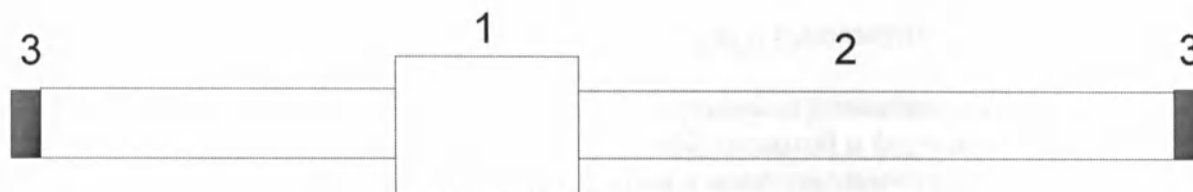

1. Неподвижная лечебная подушечка 15х20 см $\pm 20\%$.
2. Фиксирующий бинт 6х50см $\pm 20\%$.
3. Фиксатор «велькро» 6х2 см $\pm 20\%$.

Чертеж 2.

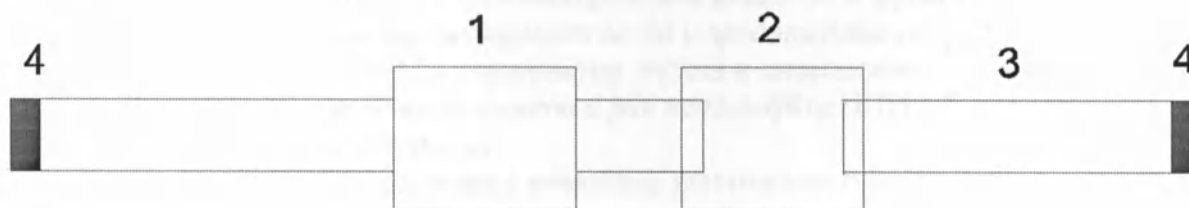

1. Неподвижная лечебная подушечка 15х20 см $\pm 20\%$.
2. Подвижная лечебная подушечка 15х20 см $\pm 20\%$.
3. Фиксирующий бинт 6х85 см $\pm 20\%$.
4. Фиксатор «Велькро» 6х2 см $\pm 20\%$.

Пакеты выпускаются стерильными в герметичной упаковке.

3. Порядок применения

а) Порядок вскрытия пакета при наложении повязки:

1. Вскрыть упаковку пакета
2. Развернуть перевязочный материал, не касаясь руками внутренней поверхности подушечек, которая будет приложена к ране.

б) Порядок применения пакета перевязочного индивидуального для оказания первой помощи:

1. Если повязку накладывают на две раны (сквозную рану), используйте пакет с двумя подушечками: подвижную подушечку отодвигают от неподвижной на такое расстояние, чтобы можно было закрыть обе раны (см. рисунок 1); если необходимо закрыть обширную рану, также используйте пакет с двумя подушечками, в этом случае подвижную подушечку пододвигают к неподвижной для закрытия максимально большой площади.
 - а. Для остановки кровотечения и предотвращения развития инфицирования используйте ППИ 2-1 с аминокaproновой кислотой и фурагином.
 - б. Для остановки обильных кровотечений и предотвращения развития инфицирования используйте ППИ 2-2 с глюконатом железа и диоксидином.
 - с. Для закрытия и лечения ожогов и ран используйте ППИ 2-3 с хлоргексидином, фурагином и лидокаином.
2. Если повязку накладывают на одну небольшую рану, используйте пакет с одной подушечкой (см. рисунок 2):
 - а. Для остановки кровотечения и предотвращения развития инфицирования используйте ППИ 1-1 с аминокaproновой кислотой и фурагином.
 - б. Для остановки обильных кровотечений и предотвращения развития инфицирования используйте ППИ 1-2 с глюконатом железа и диоксидином.
 - с. Для закрытия и лечения ожогов и ран используйте ППИ 1-3 с хлоргексидином, фурагином и лидокаином.
3. Если повязку накладывают на две раны (сквозную рану), используйте пакет с двумя подушечками: подвижную подушечку отодвигают от неподвижной на такое расстояние, чтобы можно было закрыть обе раны; если необходимо закрыть обширную рану, также используйте пакет с двумя подушечками, в этом случае подвижную подушечку пододвигают к неподвижной для закрытия максимально большой площади.
 - а. Для остановки кровотечения и предотвращения развития инфицирования используйте ППИ 2-1 с аминокaproновой кислотой и фурагином.
 - б. Для остановки обильных кровотечений и предотвращения развития инфицирования используйте ППИ 2-2 с глюконатом железа и диоксидином.
 - с. Для закрытия и лечения ожогов и ран используйте ППИ 2-3 с хлоргексидином, фурагином и лидокаином.
4. Подушечки удерживают на ранах с помощью эластичного бинта; конец бинта закрепляют с помощью фиксатора «велькро».
5. При необходимости остановить артериальное кровотечение, используйте эластичный бинт в качестве жгута, перекрутив его.

Рис. 1

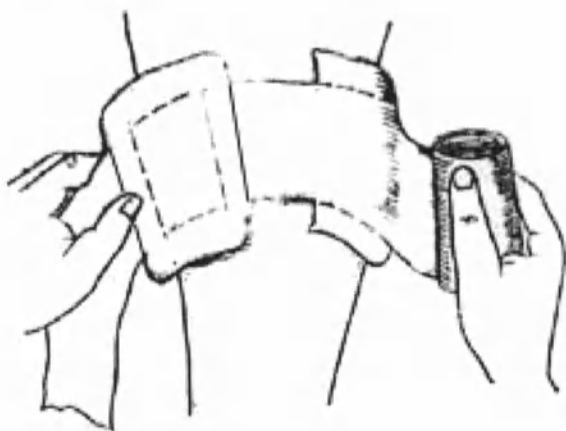


Рис. 2



4. Противопоказания к применению

Аллергическая реакция на лекарственные компоненты

5. Транспортировка и хранение

Транспортирование пакетов производят всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия хранения – неотапливаемые сухие складские помещения.