

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ДОКТОР МЕБЕЛЬ»

Якимов Ю.В.

2023 г.



## СТОЛ ДЛЯ ОСМОТРА/ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

по ТУ 32.50.30-016-69573749-2021

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДМ.69573749.016.РЭ

Дата последнего пересмотра: 27.01.2023 г.

2023 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                    | 5  |
| 2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ                                                  | 12 |
| 3 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                      | 13 |
| 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                      | 15 |
| 5 УТИЛИЗАЦИЯ                                                                    | 16 |
| 6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ<br>СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ | 17 |
| 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ                                                         | 18 |
| 8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ                                                      | 19 |
| 9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ                          | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А                                                                    | 21 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В                                                                    | 23 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г                                                                    | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д                                                                    | 25 |

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Стол для осмотра/терапевтических процедур по ТУ 32.50.30-016-69573749-2021» (далее – кушетка). Кушетка предназначена для размещения пациентов при проведении врачебного осмотра, лечебных и диагностических исследований, манипуляций и различных процедур в различных специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например: процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии, малая операционная, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, кабинет физиотерапии), в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

**Область применения:** Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20.

Кушетка предназначена для использования квалифицированным медицинским и лабораторным персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

**Показания к применению кушетки:** Размещение пациентов при проведении врачебного осмотра, лечебных и диагностических исследований, манипуляций и различных процедур.

**Противопоказания к применению кушетки:** Не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

**Возможные побочные эффекты:** Не выявлены.

**Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением кушетки по назначению:** Не выявлены.

**Риски применения:** Анализ рисков применения был произведен ООО «Доктор мебель» в полном объеме и представлен в Файле менеджмента риска. Меры по снижению рисков применения приведены в мерах предосторожности.

Кушетка выпускается в вариантах исполнения ДМ-5-101-01, ДМ-5-101-02, ДМ-5-101-03, ДМ-5-101-04.



Кушетка ДМ-5-101-01 представляет собой каркасную конструкцию, состоящую из сварной рамы из металлического профиля, покрытого порошковой краской, и стоек из круглой трубы покрытой порошковой краской. На раму закреплен ложемент и подголовник, который имеет возможность регулировки наклона в 6 фиксированных положениях.

Каркас ДМ-5-101-02 представляет собой каркасную конструкцию из гнутой круглой трубы, покрытой порошковой краской. На каркас закреплен ложемент и подголовник, который имеет возможность регулировки наклона в 6 фиксированных положениях.

Кушетка ДМ-5-101-03 представляет собой каркас из массива дерева бук с закрепленным на нем ложементом и подголовником, который имеет возможность фиксирования в горизонтальном положении и наклоненном положении под углом 25°.

Кушетка ДМ-5-101-04 представляет собой каркасную конструкцию, состоящую из сварной рамы из металлического профиля, покрытого порошковой краской, и стоек из круглой трубы покрытой порошковой краской. На раму закреплен ложемент и подголовник, который имеет возможность регулировки наклона в 6 фиксированных положениях. Кушетка оснащается держателем для бумажных полотенец и держателем для одноразовых простыней.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508 и Приказу Минздрава РФ от 6 июня 2012 г. № 4н.

Перечень документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Принцип формирования артикулов для конкретизированного заказа кушетки приведен в Приложении Б.

Внешний вид кушетки приведен в Приложении В.

Список вариантов исполнения мойки приведен в Приложении Г.

Расшифровка символов, применяемых в маркировке, приведена в Приложении Д.

# 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Внешний вид кушетки приведен в Приложении В. Каркас кушетки может быть серого цвета или цвета дерева. Ложемент может быть белого, серого, бежевого, оранжевого, желтого, зеленого или синего цвета.

1.1.2 Функциональные размеры кушетки приведены ниже.  
Допустимое отклонение линейных размеров  $\pm 4$  мм.

### Кушетка артикул ДМ-5-101-01:

Размер ложемента по ширине и глубине 1420 мм x 650 мм;

Размер подголовника по ширине и глубине 565 мм x 650 мм;

Угол подъема головной части ложемента фиксируется в положениях 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°;

Высота горизонтальной части ложемента от пола 670 мм.

### Кушетка артикул ДМ-5-101-02:

Размер ложемента по ширине и глубине 1420 мм x 650 мм;

Размер подголовника по ширине и глубине 565 мм x 650 мм;

Угол подъема головной части ложемента фиксируется в положениях 0°, 5°, 10°, 20°, 25°, 35°, 40°;

Высота горизонтальной части ложемента от пола 650 мм.

### Кушетка артикул ДМ-5-101-03:

Размер ложемента по ширине и глубине 1420 мм x 650 мм;

Размер подголовника по ширине и глубине 565 мм x 650 мм;

Угол подъема головной части ложемента фиксируется в положениях 0°, 25°;

Высота горизонтальной части ложемента от пола 660 мм.

### Кушетка артикул ДМ-5-101-04:

Размер ложемента по ширине и глубине 1420 мм x 650 мм;

Размер подголовника по ширине и глубине 565 мм x 650 мм;



Угол подъема головной части ложемент фиксируется в положениях 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25 °, 30°;

Высота горизонтальной части ложемент от пола 670 мм;

Размер держателя бумажных полотенец по длине 297 мм;

Размер держателя одноразовых простыней по длине 700 мм.

Допустимое отклонение линейных размеров  $\pm 4$  мм.

Допустимое отклонение угла подъема головной части ложемент  $\pm 2^\circ$ .

1.1.3 Габаритные размеры и масса кушетки в сборе с головной секцией в горизонтальном положении приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

| Артикул     | Габаритные размеры кушетки, мм, (Ш*Г*В), $\pm 4$ мм | Масса кушетки, кг, $\pm 10\%$ |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| ДМ-5-101-01 | 2000 x 650 x 670                                    | 30                            |
| ДМ-5-101-02 | 2000 x 650 x 660                                    | 26,5                          |
| ДМ-5-101-03 | 2000 x 650 x 660                                    | 29                            |
| ДМ-5-101-04 | 2000 x 650 x 670                                    | 30                            |

1.1.4 Опоры, поднимающие подголовник, выдерживают рабочую нагрузку 100 кг.

1.1.5 Держатель бумажных полотенец выдерживает предельную равномерно-распределенную нагрузку не более 1 кг.

1.1.6 Держатель одноразовых простыней выдерживает предельную равномерно-распределенную нагрузку не более 5 кг.

1.1.7 Кушетка выдерживает совокупную предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку, включая нагрузку на ложемент, подголовник, держатель бумажных полотенец и держатель одноразовых простыней:

**Таблица 2**

| Артикул основы кушетки | Предельная нагрузка, кг, не более |
|------------------------|-----------------------------------|
|------------------------|-----------------------------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| ДМ-5-101-01 | 180 |
| ДМ-5-101-02 | 120 |
| ДМ-5-101-03 | 120 |
| ДМ-5-101-04 | 180 |

1.1.8 Усилие подъема подголовника составляет не больше ДМ-5-101-01, ДМ-5-101-04 – 33,8 Н (3,38 кгс), ДМ-5-101-02 – 37,8 Н (3,78 кгс), ДМ-5-101-03 – 25,2 Н (2,52 кгс).

1.1.9 Кушетка ДМ-5-101-01, ДМ-5-101-04 снабжена регулируемыми опорами, обеспечивающие устойчивость на ровной поверхности.

1.1.10 Ножки кушетки выдерживают нагрузку не менее 40 даН в продольном и поперечном направлении.

1.1.11 Цвет лакокрасочных покрытий кушетки, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда.

1.1.12 Наружные поверхности кушетки устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

1.1.13 Средний срок службы кушетки до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы кушетки.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

## 1.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

### 1.2.1 Кушетка изготовлена из следующих материалов:

Каркас кушетки артикулов ДМ-5-101-01, ДМ-5-101-02, ДМ-5-101-04 изготовлен из стали марки 3 из металлического профиля профильным сечением 25x25, 40x20, трубы диаметром 32 мм и покрыт порошковой полиэфирной краской.

Каркас кушетки артикула ДМ-5-101-03 изготовлен из массива дерева Бук.

Ложемент и подголовник изготовлены кожзаменителя с поролоном толщиной 40 мм, низ ложемента и подголовника изготовлены из шлифованного ДСП толщиной 16 мм.

1.2.2 Кушетка артикулов ДМ-5-101-01, ДМ-5-101-04 оснащена покупными опорами регулируемыми с диапазоном регулировки не менее 10 мм. Опоры регулируемые изготовлены из полиэтилена высокого давления (ПЭВД, ПВД) или низкой плотности (ПЭНП, LDPE).



### 1.3 Комплектность

1.3.1 В комплект поставки кушетки входят:

- |                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 1 Кушетка одного артикула в соответствии с Приложением Б | 1 шт.; |
| 2 Руководство по эксплуатации ДМ.69573749.016.РЭ         | 1 шт.  |

1.3.2 Кушетка по желанию заказчика может поставляться в собранном и разобранном виде. Сборка кушетки должна осуществляться только представителями предприятия-изготовителя.

## 1.4 Упаковка

1.4.1 Перед упаковкой металлические части кушетки подвергаются обезжириванию и консервированию по группе II-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

1.4.2 Потребительская упаковка представляет собой ящик из гофрированного картона, оклеенный клейкой лентой. Ложемент укрывается воздушно-пузырчатой плёнкой из полиэтилена, кушетка оборачивается стрейч-плёнкой из полиэтилена, затем кушетка укладывается в ящик. Изнутри ящик выложен упаковочной бумагой или гофрированным картоном для предотвращения самопроизвольного перемещения кушетки внутри упаковки при транспортировании.

1.4.3 Не установленные на кушетку детали (крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация упакованы в пакет из полиэтилена и помещены в потребительскую упаковку вместе с кушеткой.

1.4.4 Для транспортирования кушетку в потребительской упаковке помещают в деревянный ящик, выложенный внутри упаковочной бумагой или древесно-волокнутой плитой. Для фиксации может быть использован шпагат и уголки.

1.4.5 Кушетка может транспортироваться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

1.4.6 В транспортную упаковку вложен упаковочный лист, на котором указано:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование кушетки;
- количество мест;
- условные номера упаковщика и контролера;
- дата упаковывания.

### Массогабаритные характеристики упаковки

| Артикул изделия | Габаритные размеры потребительской упаковки, мм, $\pm 10\%$ | Вес изделия в потребительской упаковке, кг, $\pm 10\%$ | Габаритные размеры транспортной упаковки, мм, $\pm 10\%$ | Вес изделия в транспортной упаковке, кг, $\pm 10\%$ | Количество упаковочных мест, $\pm 10\%$ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ДМ-5-101-01     | 2040 x690x140                                               | 36,7                                                   | 2100x790x240                                             | 93,1                                                | 1                                       |
| ДМ-5-101-02     | 2040x690x120                                                | 33,2                                                   | 2100x790x220                                             | 89,6                                                | 1                                       |
| ДМ-5-101-03     | 2040x690x700                                                | 37,6                                                   | 2100x790x800                                             | 132,9                                               | 1                                       |
| ДМ-5-101-04     | 2040x690x140                                                | 36,7                                                   | 2100x790x240                                             | 93,1                                                | 1                                       |



## **2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

2.1 Транспортирование кушетки должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

2.1.1 Размещение и крепление упаковок с кушетками в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

2.1.2 Транспортирование кушетки крытыми транспортными средствами должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от минус 50 до плюс 50 °С;

Относительная влажность до 100 % при температуре плюс 25 °С;

Атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.2 Кушетка должна храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

2.2.1 Хранение кушетки должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 5 до плюс 40 °С;

Относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25°С.

Атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.2.2 Хранение кушетки в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

### 3 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Кушетка предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях специализированных медицинских помещений с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например: процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии, малая операционная, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, кабинет физиотерапии) в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Поверхности кушетки не предназначены для контакта с телом человека для достижения заявленной эффективности в рамках установленного производителем специфичного медицинского назначения.

Кушетка является неинвазивным медицинским изделием, не имеет прямого контакта с телом человека при предусмотренном изготовителем применении.

3.2 Эксплуатация кушетки должна осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С;

Относительная влажность до 80 % при плюс 25°С.

3.3 Меры предосторожности при применении кушетки:

- Кушетка предназначена для применения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20, при обращении с кушеткой необходимо пользоваться защитными медицинскими перчатками, простынями.

- Кушетка должна быть использована только по прямому назначению.

- Кушетка артикулов ДМ-5-101-02, ДМ-5-101-03 должна быть установлена на ровной горизонтальной поверхности.

- Кушетка артикулов ДМ-5-101-01, ДМ-5-101-04 должна быть установлена на ровной горизонтальной поверхности с перепадом высот не более 10 мм.

- Запрещается использовать кушетку, если имеются механические повреждения опор регулируемых, каркаса кушетки, опор подголовника, покрытия из кожзаменителя.

- Перед размещением пациента поверхность кушетки должна быть накрыта пленкой, зарегистрированной в установленном порядке. Не допускается размещение пациента на непокрытой поверхности кушетки.

### 3.4 Меры предосторожности при обнаружении неисправностей

При обнаружении в ходе назначенного применения неисправностей (например, при возникновении потрескивания кушетки) и/или механических повреждений частей кушетки, способных снизить устойчивость кушетки к нагрузке, способных вызвать нарушение устойчивости кушетки, падение или опрокидывание, а также способных снизить устойчивость поверхностей к дезинфекционной обработке, необходимо обратиться к предприятию-изготовителю.

При возникновении вопросов, связанных с безопасным применением кушетки, необходимо обращаться к предприятию-изготовителю.



## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 4.1 Очистка кушетки

Перед применением кушетки она должна быть подвергнута предварительной дезинфекции и высушена.

Уход за кушеткой заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5 % раствор моющего средства по ГОСТ 25644.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки кушетку следует насухо протереть.

### 4.2 Дезинфекция кушетки

Дезинфекцию наружных поверхностей кушетки проводят путем однократного протирания поверхностей кушетки 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Дезинфекцию кушетки следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей кушетки биологическими жидкостями и потенциально контаминированными веществами.

Кушетка является нестерильной и не предназначена для стерилизации.

### 4.3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кушетки осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

Периодичность технического обслуживания проводится 1 раз в год со дня ввода в эксплуатацию.

## 5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Кушетка подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

5.2 Кушетка, не имевшая контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически безопасным медицинским отходам и должна утилизироваться совместно с твердыми коммунальными отходами.

5.3 Кушетка, имевшая контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически опасным медицинским отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684-21 и перед утилизацией должна быть подвергнута обеззараживанию. После соответствующего обеззараживания кушетка может быть утилизирована совместно с твердыми коммунальными отходами.

**6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ                      СТАНДАРТЫ                      РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ**

ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские.  
Общие технические условия»;  
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;  
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические  
условия».



## **7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям 69573749ТУ 32.50.30-016-69573749-2021 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и соблюдении мер предосторожности.

7.2 При нарушении мер предосторожности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.4 Гарантийный срок хранения кушетки составляет 5 лет.

7.5 Средний срок службы кушетки до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы кушетки.

## 8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

### Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»  
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),  
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

### Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

[www.doctormebel.ru](http://www.doctormebel.ru)

Электронная почта:

[info@doctormebel.ru](mailto:info@doctormebel.ru)

### Адрес производства:

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-  
складская зона, строение № 82.

Рекламации, касающиеся качества кушетки, отправлять по адресу:  
[info@doctormebel.ru](mailto:info@doctormebel.ru)

## **9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Сервисное обслуживание и ремонт кушетки осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»  
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),  
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

### **Контактные данные:**

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

[www.doctormebel.ru](http://www.doctormebel.ru)

Электронная почта:

[info@doctormebel.ru](mailto:info@doctormebel.ru)



## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации

| Обозначение                                | Наименование                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 9.014-78                              | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования                                                                                                                                |
| ГОСТ 177-88                                | Водорода перекись. Технические условия                                                                                                                                                                                                      |
| ГОСТ 15150-69                              | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды                        |
| ГОСТ 16371-2014                            | Мебель. Общие технические условия                                                                                                                                                                                                           |
| ГОСТ 19917-2014                            | Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия                                                                                                                                                                                     |
| ГОСТ 25644-96                              | Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования                                                                                                                                                                 |
| ГОСТ 31508-2012                            | Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования                                                                                                                                       |
| ГОСТ Р 50444-2020                          | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования                                                                                                                                                                  |
| МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года         | Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения                                                                                                                           |
| СП 2.1.3678-20                             | Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг |
| Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н | Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий                                                                                                                                                                             |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принцип формирования артикула для конкретизированного заказа

Артикул варианта исполнения кушетки формируется в виде:

ДМ-5-101-XX.Лх

где:

XX – признак конструктивного решения кушетки по внешнему виду в соответствии с Приложением Г и функциональными размерами в соответствии с требованиями п.1.1.3 настоящих технических условий.

Лх – признак цвета ложементов:

Номер обозначения цвета ложементов в соответствии с Таблицей Д.1;

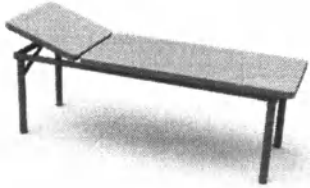
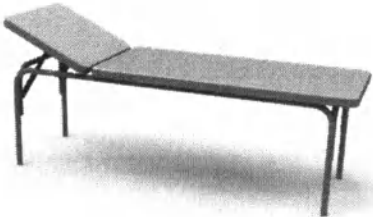
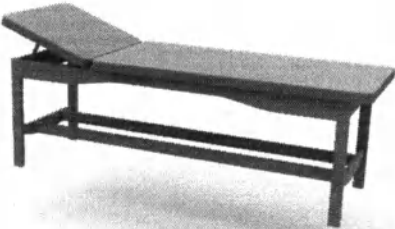
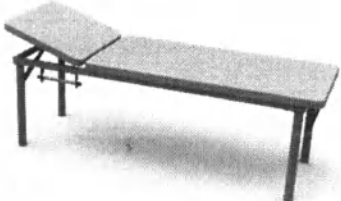
Таблица Д.1 – Таблица идентификации сокращений обозначений цвета ложементов

| Признак            | Значение признака | Аббревиатура обозначения в артикуле |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Цвет<br>ложементов | Серый             | Л2                                  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Внешний вид кушетки

|                                                                                                                |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Артикул: ДМ-5-101-01</p>   | <p>Артикул: ДМ-5-101-02</p>    |
| <p>Артикул: ДМ-5-101-03</p>  | <p>Артикул: ДМ-5-101-04</p>  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

· (обязательное)

### Перечень вариантов исполнения кушетки

| № п/п | Вариант исполнения                                                       | Обозначение конструкторского документа |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.    | Стол для осмотра по 69573749ТУ 32.50.30-016-69573749-2021 ДМ-5-101-01.Л2 | ДМ5.КУШ.69573749.016.1                 |
| 2.    | Стол для осмотра по 69573749ТУ 32.50.30-016-69573749-2021 ДМ-5-101-02.Л2 | ДМ5.КУШ.69573749.016.2                 |
| 3.    | Стол для осмотра по 69573749ТУ 32.50.30-016-69573749-2021 ДМ-5-101-03.Л2 | ДМ5.КУШ.69573749.016.3                 |
| 4.    | Стол для осмотра по 69573749ТУ 32.50.30-016-69573749-2021 ДМ-5-101-04.Л2 | ДМ5.КУШ.69573749.016.4                 |



## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

### Символы, применяемые в маркировке

| Символ                                                                            | Обозначение                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Хрупкое. Осторожно                              |
|  | Беречь от влаги                                 |
|  | Верх                                            |
|  | Знак соответствия при добровольной сертификации |

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

*125/4442217* листа(ов)

Генеральный директор

ООО «Доктор Мебель»

Якимов Ю. В.