

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА, варианты исполнения:

- 1. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА**
- 2. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС**

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА (3мл)
Макет потребительской (картонной) упаковки



XXXXXXX XXXXX



XXXXXXXXXXXXX



STERILE A Стерилизация с применением методов жестической обработки./Асептикалық әуеде астерин қолданумен стерилизациялау

RU Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА может быть использовано для смазывания и увлажнения силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз дневного и пролонгированного режимов ношения. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА увлажняет контактные линзы, уменьшая дискомфорт при ношении контактных линз, и помогает удалить отложения с их поверхности, которые могут стать причиной раздражения и/или дискомфорта.

KU Күнделікті пайдалануға арналған. АЕЗДІК ЖАЙЫЛЫҚ
• Ылғалдандырып және аездік жайылдықты қамтамасыз етеді
• Линзаларды тамызуда болады СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралды ашыту және тітіркену секілді «көздегі құрғауы» синдромның симптомдарын уақытша жеңілдетуді қамтамасыз етеді СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралын күндіз және ұзарғыла тағылатын режиміндегі силиконды-гидрогельді және жұмсақ (гидрофильді) жаңбырамы линзаларды майлау және ылғалдандыру үшін қолайлы болады. СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралын жанаспапы линзаларды ылғалдандырып, таққан кезде жақсыдықты азайтады және тітіркенуді және/немесе жақсыдықты тудыру мүмкін шегінде берді көтеріп келетіндейсіз


TU Тщательно встряхнуть перед использованием. Только для закапывания в глаза.
СОСТАВ: Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА - стерильный раствор, содержащий полиметиленаминок 400, пропиленгликоль, гидроксипропилагуар, кислоту борную, калия хлорид, натрия хлорид, сорбитол, аминоксиметилпропанол, поликвад (хлорид полидрония) 0,001%, кислоту хлористоводородную и/или натрий гидроксид (для доведения pH), воду очищенную (до объема 100%).
KU Қолданар алдында жақсылап сілкіңіз. Тек көзге тамызуда арнаған.
ҚҰРАМЫ: СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құрамы - полиметиленаминок 400, пропиленгликоль, гидроксипропилагуар, сорбитол, аминоксиметилпропанол, бор қышқылы, калий хлориді, натрий хлориді, ПОЛИКВАД (полидроний хлориді) 0,001%, хлорсутекті қышқылы және/немесе натрий гидроксиді (рН жеткізу үшін), тазартылған су (100% мөлме деңіні) бар стерильді ерітінді.

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Средство Офтальмологическое Систейн УЛЬТРА

МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ

- Увлажняет и обеспечивает мгновенный комфорт
- Можно напать на линзы

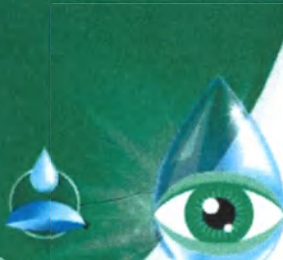

Alcon

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2004/05172
Примечание! № ФСЗ 2009/05372

Уполномоченным представителем производителя на территории Российской Федерации / импортёр / организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь / России Федерациями лиц, имеющих право на подачу жалоб, является ООО "Алькон Фармасьютикалс" Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3. Тел.: +7 (495) 960-0333 / «Алькон Фармасьютикалс» ЖШС Ресей, Мәскеу, Ленинград. алыны, 72-ші, корпус 3. Тел.: +7 (495) 960-0333


Производитель/Импортер:
«Алькон Лабора́торис Инк.» США/АЛСД,
Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway,
Fort Worth, TX, 76116-2099, USA

Промокод/Өндірістік атау:
Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd.,
19 Teas South Avenue 14, Teas Biomedical Park II,
Singapore 637513. Өңірталыр

Уполномоченным представителем производителя на территории РК/ КР, имеющим право на подачу жалоб является TOO «Алькон Казахстан», г. Алматы, ул. Курмангазы 95/ «Алькон Қазақстан» ЖШС, Алматы қ., Курмангазы к-сі, 95

www.moi-glaza.ru



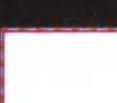

XXXXXXX XXXXX



XXXXXXXXXXXXX



Дата изготовления:
Дойнидорган күні:
Код партии/
Партия коды:
LOT
Исп. д/и:
Дейін пайд.




STERILE A Стерилизация с применением методов жептической обработки. /Асептикалық өңдеу әдістерін қолданумен стерилизациялау

RU Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА может быть использовано для смазывания и увлажнения силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз дневного и пролонгированного режимов ношения. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА увлажняет контактные линзы, уменьшая дискомфорт при ношении контактных линз, и помогает удалить отложения с их поверхности, которые могут стать причиной раздражения и/или дискомфорта.

11 КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАҢУҒА АРНАЛҒАН! ЛЕЗДІК ЖАЙЛЫЛЫҚ

- Ығалдандырады және лездік жайлылықты қамтамасыз етеді
- Линзаларға тамызуда болады

СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралы ашыту және тітіркену секілді «көздің құрғауы» синдромының симптомдарын уақытша жеңілдетуді қамтамасыз етеді СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралын күндіз және ұзартыла тағылатын режиміндегі силиконды-гидрогельді және жұмсақ (гидрофильді) жанаспалы линзаларды майлау және ығалдандыру үшін қолдануға болады. СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралын жанаспалы линзаларды ығалдандырып, таққан кезде жайсыздықты азайтады және тітіркенуді және/немесе жайсыздықты тудыруы мүмкін шөгінділерді кетіруге көмектеседі

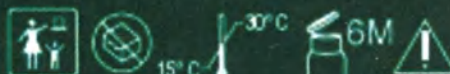

RU Тщательно встряхнуть перед использованием. Только для закапывания в глаза.

СОСТАВ: Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА - стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 400, пропиленгликоль, гидроксипропилгуар, кислоту борную, калия хлорид, натрия хлорид, сорбитол, аминотетилпропанол, ПОЛИКВАД (хлорид полидрония) 0,001%, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную (до объема 100%).

11 Қолданар алдында жақсылап сілкіңіз. Тек көзге тамыуға арналған.

ҚҰРАМЫ: СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралы - полиэтиленгликоль 400, пропиленгликоль, гидроксипропилгуар, сорбитол, аминотетилпропанол, бор қышқылы, калий хлориді, натрий хлориді, ПОЛИКВАД (полидроний хлориді) 0,001%, хлорсутекті қышқыл және/немесе натрий гидроксиді (pH жеткізу үшін), тазартылған су (100% көлемге дейін) бар стерильді ерітінді.

XXXXXXXXXXXX-XXXXX

Alcon

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ

Систейн УЛЬТРА

МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ

- Увлажняет и обеспечивает мгновенный комфорт
- Можно капать на линзы



3 мл

STERILE A



Alcon

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05172
Примечание № ФСЗ 2009/05172

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации / импортер / организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь / Ресей Федерациясының аумағындағы өндірушінің уәкілетті өкілі / импорттаушы / Беларусь Республикасының аумағында наразылықтарды қабылдайтын ұйым: ООО "Алкон Фармацевтика" Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3. Тел.: +7 (495) 961-1333 / «Алкон Фармацевтика» ЖШҚ Ресей, Мәскеу, Ленинград даңғылы, 72-үй, корп. 3. Тел.: +7 (495) 961-1333

Производитель/Өндіруші:
«Алкон Лабора́ториз Инк.», США/АҚШ,
Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway,
Fort Worth, TX, 76134-2099, USA


Производственная
площадка/Өндірістік алаң:
Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd.,
19 Tuas South Avenue 14, Tuas Biomedical Park II,
Singapore 637313, Сингапур

Уполномоченный представитель производителя на территории РК / ҚР аумағындағы өндірушінің уәкілетті өкілі: ТОО "Алкон Казахстан", г. Алматы, ұл. Құрманғазы, 95 / «Алкон Казахстан» ЖШС, Алматы қ., Құрманғазы к-сі, 95

www.moi-glaza.ru



Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА (3мл) Макет первичной упаковки (этикетка флакона)

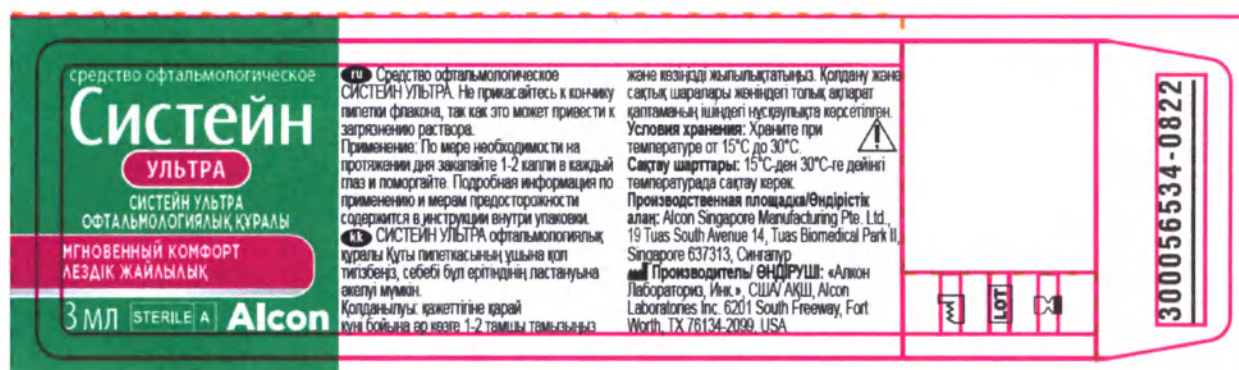



STERILE A

Стерилизация с применением методов асептической обработки / Асептикалық өңдеу әдістерін қолданумен стерилизациялау


RU Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА может быть использовано для смазывания и увлажнения силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз дневного и пролонгированного режимов ношения. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА увлажняет контактные линзы, уменьшая дискомфорт при ношении контактных линз, и помогает удалить отложения с их поверхности, которые могут стать причиной раздражения и/или дискомфорта.

KK КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН!

ЛЕЗДІК ЖАЙЫЛЫҚ

- Ылғалдандырады және лездік жайылықты қамтамасыз етеді
- Линзаларға тамызуга болады

СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралы ашыту және тітіркену секілді «көздің құрғауы» синдромының симптомдарын уақытша жеңілдетуді қамтамасыз етеді СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралын күндіз және ұзартыла тағылатын режиміндегі силиконды-гидрогельді және жұмсақ (гидрофильді) жанаспалы линзаларды майлау және ылғалдандыру үшін қолдануға болады. СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралын жанаспалы линзаларды ылғалдандырып, таққан кезде жайсыздықты азайтады және тітіркенуді және/немесе жайсыздықты тудыруы мүмкін шөгінділерді кетіруге көмектеседі

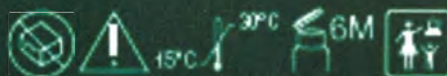

RU Тщательно встряхнуть перед использованием. Только для закапывания в глаза.

СОСТАВ: Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА – стерильный раствор, содержащий полиметилметакрилат 400, пропиленгликоль, гидроксипропилгуар, кислоту борную, калий хлорид, натрия хлорид, сорбитол, аминметилпропанол, поликвАд (хлорид полидрония) 0,001%, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную (до объема 100%).

KK Қолданар алдында жақсылап сілкіңіз. Тек көзге тамызуга арналған.

ҚҰРАМЫ: СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралы – полиметилметакрилат 400, пропиленгликоль, гидроксипропилгуар, сорбитол, аминметилпропанол, бор қышқылы, калий хлориді, натрий хлориді, поликвАд (полидроний хлориді) 0,001%, хлорсутекті қышқы және/немесе натрий гидроксиді (pH жетізу үшін), тазартылған су (100% көлемге дейін) бар стерильді ерітінді.

XXXXXXXXXX-XXXX

Alcon

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ

Систейн

УЛЬТРА

МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ

- Увлажняет и обеспечивает мгновенный комфорт
- Можно капать на линзы



15 мл

STERILE A



Alcon

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2009/05172

Тіркеу куәлігі № ФСЗ 2009/05172

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации / импортер / организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь / Ресей Федерациясының аумағындағы өндірушінің уәкілетті өкілі / импорттаушы / Беларусь Республикасының аумағында наразылықтарды қабылдайтын ұйым:

ООО "Алкон Фармацевтика" Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д.72, корп.3. Тел.: +7 (495) 961-1333 / «Алкон Фармацевтика» ЖШҚ Ресей, Мәскеу, Ленинград даңғылы, 72-үй, корп.3. Тел.: +7 (495) 961-1333

Производитель/Өндіруші:

«Алкон Лабораториз Инк.», США/АҚШ,
Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway,
Fort Worth, TX, 76134-2099, USA

Производственная площадка/Өндірістік алаң:
Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd., 19 Tuas South
Avenue 14, Tuas Biomedical Park II, Singapore 637313,
Сингапур

Уполномоченный представитель производителя на территории РК/ ҚР аумағындағы өндірушінің уәкілетті өкілі: ТОО "Алкон Казахстан", г.Алматы, ул. Құрманғазы, 95/ «Алкон Казахстан» ЖШС, Алматы қ., Құрманғазы к-сі, 95

www.moiglaza.ru



Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА (15мл)
Макет первичной упаковки (этикетка флакона)

средство офтальмологическое Систейн УЛЬТРА СИСТЕЙН УЛЬТРА ОФТАЛЬМОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРАЛЫ МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ ЛЕЗДІК ЖАЙЛЫЛЫҚ 15 мл STERILE A Alcon	⚠ Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА. Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора. Применение: По мере необходимости на протяжении дня закапывайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте. Подробная информация по применению и мерам предосторожности содержится в инструкции внутри упаковки. Условия хранения: Храните при температуре от 15°C до 30°C. ⓘ СИСТЕЙН УЛЬТРА офтальмологиялық құралы. Құты пипеткасының ұшына қол тигізбеңіз, себебі бұл ерітіндінің ластануына әкелуі мүмкін. Қолданылуы: қажеттігіне қарай күні бойына әр кезге 1-2 тамшы тамызыңыз және көзіңізді жыпылықтатыңыз. Қолдану және сақтық шаралары жөніндегі толық ақпарат қаптаманың ішіндегі нұсқаулықта көрсетілген. Сақтау шарттары: 15°C-ден 30°C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Производственная площадка/Өндірістік алаң: Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd., 19 Tuas South Avenue 14, Tuas Biomedical Park II, Singapore 637313, Сингапур Производитель/ ӨНДІРУШІ: «Алкон Лаботориз, Инк.», США/ АҚШ, Alcon Laboratories Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA	⚠ LOT
---	--	----------------------------

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС
Макет потребительской (картонной) упаковки

[illegible]

STERILE A Стерилизация с применением методов асептической обработки / Асептикалық өңдеу әдістерін қолданумен стерилизациялау

П Тщательно встряхнуть перед использованием. Только для закапывания в глаза.


СОСТАВ: Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС - стерильный раствор, содержащий натрия гиалуронат, полиэтиленгликоль 400, пропиленгликоль, гидроксипропилгуар, сорбитол, аминотетилпропанол, кислоту борную, натрия борат, динатрия ЭДТА, натрия цитрат, калия хлорид, натрия хлорид и консервант ПОЛИКВАД (хлорид полидрония) 0,001 % кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную.

Кк КУНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН!

ЭКСТРА ЫЛҒАЛДАНДЫРУ

- Құрамында гиалурон қышқылы бар
- Линзаларға тамызуга болады

ҚҰРАМЫ: СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС офтальмологиялық құралы - құрамында натрий гиалуронаты, полиэтиленгликоль 400, пропиленгликоль, гидроксипропилгуар, сорбитол, аминотетилпропанол, бор қышқылы, натрий бораты, ЭДТА динатрий, натрий цитраты, калий хлориді, натрий хлориді, ПОЛИКВАД консерванты, хлорсутекті қышқылы және/немесе натрий гидроксиді (pH жеткізу үшін) мен тазартылған су бар (100% көлемге дейін) стерильді ерітінді.

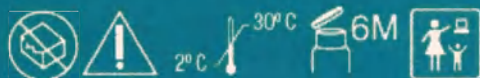

П Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС удерживает влагу, чтобы обеспечить эффективное увлажнение, смазывание и длительное облегчение симптомов. СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС также обеспечивает восстановление поврежденных клеток поверхности глаза.

Для временного облегчения чувства жжения и раздражения, связанных с «сухостью» глаза. Может быть использован для увлажнения силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз при незначительном раздражении, дискомфорте и помутнении зрения.

Кк СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС офтальмологиялық құралы тиімді ылғалдандыру, майлау және симптомдарды ұзақ уақыт жеңілдетуді қамтамасыз ету үшін ылғалды сақтайды. СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС сонымен қатар көздің зақымдалған жасушаларын қалпына келтіруді қамтамасыз етеді.

Көздің «құрғап кетуіне» байланысты ашыту және тітіркену сезімдерін уақытша жеңілдетуге арналған. Аздап тітіркену, жайсыздық және бұлыңғыр көру кезінде силикон-гидрогельді және жұмсақ (гидрофильді) жанаспалы линзаларды ылғалдандыру үшін қолданыла алады.

www.moiglaza.ru



Alcon

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ

Систейн

УЛЬТРА ПЛЮС

ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ

- Содержит гиалуроновую кислоту
- Можно капать на линзы



10 мл

STERILE A



Alcon



Производитель/Өндіруші:
«Алкон Лабораториз Инк.», США/АҚШ,
Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway,
Fort Worth, Texas, 76134-2099, USA

Производственная
площадка/Өндірістік алаң:
Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd.
19 Tuas South Avenue 14
Tuas Biomedical Park II
Singapore 637313, Сингапур

Регистрационное удостоверение
в России №ФСЗ 2009/05172
Ресейдегі тіркеу куәлігі № ФСЗ 2009/05172

Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации / импортер /
организация, принимающая претензии на территории
Республики Беларусь / Ресей Федерациясының
аумағындағы өндірушінің уәкілетті өкілі /
импорттаушы / Беларусь Республикасының
аумағында наразылықтарды қабылдайтын ұйым:

ООО "Алкон Фармацевтика" Россия, Москва,
Ленинградский пр-т, д.72, корп.3. +7 (495) 961-1333 /
«Алкон Фармацевтика» ЖШҚ Ресей, Мәскеу,
Ленинград даңғылы, 72-үй, корп.3. Тел.: +7 (495)
961-1333

Уполномоченный представитель производителя
на территории РК/ ҚР аумағындағы өндірушінің
уәкілетті өкілі: ТОО "Алкон Казахстан", г.Алматы,
ул.Курмангазы,95/ «Алкон Казахстан» ЖШС,
Алматы қ., Курмангазы к-сі, 95

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС Макет первичной упаковки (этикетка флакона)

средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС офтальмологиялық құралы 10 мл STERILE A Alcon	     Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС Тщательно встряхнуть перед использованием. Не прикасайтесь к кончику носика флакона, так как это может привести к загрязнению раствора. Между применениями храните флакон плотно закрытым. СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС офтальмологиялық құралы Пайдаланар алдында жақсылап сілкіу керек. Құтының ұшына қол	тигізбеңіз, себебі бұл ертіңдің ластануына әкелуі мүмкін. Қолданулар арасында құтыны мықтап жауып қойыңыз. Производственная площадка/ Өндірістік алаң: Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd., 19 Tuas South Avenue 14, Tuas Biomedical Park II, Singapore 637313, Сингапур Производитель/ ӨНДІРУШІ: «Алкон Лабораториз, Инк.», США/ АҚШ, Alcon Laboratories, Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA	  
--	--	---	--

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
13 ЛИСТА(ОВ)

Д.О. Волкова





ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по регистрации медицинских изделий

ООО «Алкон Фармацевтика»

Волкова Д.О.



«16» декабря 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА, варианты исполнения:

1. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА
2. Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

Общий вид медицинского изделия



Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА, 3 мл

Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001



Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА, 15 мл

The Alcon logo consists of a solid blue circle with the word "Alcon" written in white, bold, sans-serif capital letters.

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001



Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС, 10 мл



Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

Упаковка медицинского изделия



Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА, 3 мл



Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001



Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА, 15 мл



Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КГП 774301001



Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС, 10 мл



Юридический адрес:
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3
Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720
ОГРН 1027739129857
ИНН 7709354370
КПП 774301001

Пример макета маркировки картонной упаковки





Юридический адрес:

T T +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ИНН 7709354370

КПП 774301001

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА (15мл)



XXXXXX

Nov. 2017
 April 2018



Юридический адрес:

T T +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ИНН 7709354370

КПП 774301001

[illegible]

Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

Пример макета маркировки (флакон)

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА (3мл)

средство офтальмологическое Систейн УЛЬТРА МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ ЛЕЗДІК КОМФОРТ 3 мл STERILE A Alcon	Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА. Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора. Применение: По мере необходимости на протяжении дня закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте. Подробная информация по применению и мерам предосторожности содержится в инструкции внутри упаковки. Офтальмологическая куралы СИСТЕЙН УЛЬТРА. Тамшұыр ұшына қол тигізбеніз флакон, себебі бұл әкелуі мүмкін ерітіндінің пастануы. Қолданылуы: Қажеттілік бойынша әр көзіңізге 1-2 тамшы тамызып, көздеріңізді ашып-жұмыңыз. Қолдану және шаралар туралы миллиметр сақтық шараларын қаптаманың ішіндегі нұсқаулардан қараңыз. Условия хранения: Храните при температуре от 15°C до 30°C. Сактау шарттары: 15° С -тан 30° С -ға дейін температурада сақтау керек. Уполномоченный представитель производителя в России: ООО "Алкон Фармацевтика" 125315, Россия, Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3. Тел. +7 495 961-13-33 Производственная площадка/Өндірістік алаң: Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd., 19 Tuas South Avenue 14, Tuas Biomedical Park II, Singapore 637313, Сингапур Производители/Өндіруші: «Алкон Лабораториз, Инк.», США/АҚШ, Alcon Laboratories Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA	  
--	--	---

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА (15мл)

средство офтальмологическое Систейн УЛЬТРА МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ ЛЕЗДІК КОМФОРТ 15 мл STERILE A Alcon	Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА. Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора. Применение: По мере необходимости на протяжении дня закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте. Подробная информация по применению и мерам предосторожности содержится в инструкции внутри упаковки. Условия хранения: Храните при температуре от 15°C до 30°C. Офтальмологическая куралы СИСТЕЙН УЛЬТРА. Тамшұыр ұшына қол тигізбеніз флакон, себебі бұл әкелуі мүмкін ерітіндінің пастануы. Қолданылуы: Қажеттілік бойынша әр көзіңізге 1-2 тамшы тамызып, көздеріңізді ашып-жұмыңыз. Қолдану және шаралар туралы миллиметр сақтық шараларын қаптаманың ішіндегі нұсқаулардан қараңыз. Сактау шарттары: 15° С -тан 30° С -ға дейін температурада сақтау керек. Уполномоченный представитель производителя в России: ООО "Алкон Фармацевтика" 125315, Россия, Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3. Тел. +7 495 961-13-33 Производственная площадка/Өндірістік алаң: Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd., 19 Tuas South Avenue 14, Tuas Biomedical Park II, Singapore 637313, Сингапур Производители/Өндіруші: «Алкон Лабораториз, Инк.», США/АҚШ, Alcon Laboratories Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA	  
---	--	--

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС

средство офтальмологическое Систейн УЛЬТРА ПЛЮС 10 мл STERILE A Alcon	Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС. Тщательно встряхнуть перед использованием. Не прикасайтесь к кончику носика флакона, так как это может привести к загрязнению раствора. Между применениями храните флакон плотно закрытым. СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС офтальмологическая куралы қолданар алдында сілту керек. Тамшұыр ұшына қол тигізбеніз флакон, себебі бұл әкелуі мүмкін ерітіндінің пастануы. Қолдану арасында флакон тығыз жауып қойыңыз.	Уполномоченный представитель производителя в России: ООО "Алкон Фармацевтика" 125315, Россия, Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3. Тел. +7 495 961-13-33 Производственная площадка/Өндірістік алаң: Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd., 19 Tuas South Avenue 14, Tuas Biomedical Park II, Singapore 637313, Сингапур Alcon Laboratories, Inc., США/АҚШ, 6201 South Freeway, Fort Worth, Texas, 76134-2099, USA	  
---	--	--	---

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

11 ЛИСТА(ОВ)

Менеджер по регистрации

ООО «Алкон Фармацевтика»

Филиппова Н.А.

