

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

АО «НПП «ИНТЕРОКО»

В.П. Морозов



(подпись)

М.П.

«01» июля 2021 г.

Инструкция по применению

Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021



Оглавление

1	Наименование медицинского изделия	3
2	Сведения о производителе	3
3	Назначение медицинского изделия, установленное производителем	3
4	Условия применения медицинского изделия	3
5	Принцип действия	4
6	Показания к применению	4
7	Противопоказания к применению	4
8	Возможные побочные действия	4
9	Меры предосторожности / Требования безопасности.	4
10	Описание, параметры и характеристики медицинского изделия	4
11	Методы и условия стерилизации и дезинфекции	5
12	Установка и способ применения	5
13	Требования безопасности / меры предосторожности	6
14	Возможные риски при использовании	6
15	Обслуживание и ремонт	6
16	Комплектность	6
17	Упаковка	9
18	Маркировка	9
19	Условия эксплуатации	11
20	Хранение	11
21	Транспортирование	11
22	Срок годности	11
23	Гарантийные обязательства	11
24	Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	12
25	Контактная информация	12
	Приложение А: Внешний вид изделия	13
	Приложение Б: Манипуляционные символы указанные на упаковке	20

1. Наименование медицинского изделия – Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, (далее по тексту Маска).

Варианты исполнения:

Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой:

Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 0, неонатальная

Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 1, детская

Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 2, детская

Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 3 (S), для взрослых

Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 4 (M), для взрослых

Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 5 (L), для взрослых

Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой:

Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 1, детская

Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 2, детская

Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 3, для взрослых

Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 4, для взрослых

Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой:

Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 0, неонатальная

Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 1, детская

Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 2, детская

Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 3 (S), для взрослых

Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 4 (M), для взрослых

Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 5 (L), для взрослых

Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой:

Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 1, детская

Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 2, детская

Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 3, для взрослых

Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 4, для взрослых

2. Сведения о производителе медицинского изделия

АО «НПП «ИНТЕРОКО»

140080, Россия, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, строение 8, здание 121,

тел.: (495) 552 47 66, 555 45 88, email: info@interoko.ru

3. Назначение медицинского изделия, установленное производителем.

Маска предназначена для размещения поверх носа и рта пациента с самостоятельным дыханием, недостаточным или полностью отсутствующим самостоятельным дыханием для направления в верхние дыхательные пути анестезирующих газов при проведении ингаляционной анестезии или воздушно-кислородной смеси при проведении искусственной вентиляции легких. С помощью коннектора маска может быть подключена к дыхательному контуру или к аппарату ручной вентиляции легких. Маска является нестерильным медицинским изделием.

4. Условия применения медицинского изделия.

Область применения – искусственная вентиляция легких, ингаляционная анестезия.

Условия применения – операционные отделения, реанимационное отделение, палаты интенсивной терапии, в транспортных средствах скорой медицинской помощи.

Изделие предназначено для использования квалифицированным (обученным) медицинским персоналом.

Потенциальные потребители: пациенты, нуждающиеся в подаче анестезирующих газов при проведении ингаляционной анестезии или воздушно-кислородной смеси при проведении искусственной вентиляции легких.

5. Принцип действия медицинского изделия.

Маску подключают к дыхательному контуру анестезиологической «рабочей станции», аппарата искусственной вентиляции легких или к аппарату ручной вентиляции легких. Изделие размещают поверх носа и рта пациента с самостоятельным дыханием, недостаточным или полностью отсутствующим самостоятельным дыханием (тем самым создается воздухо непроницаемое уплотнение на лице пациента) для подачи в верхние дыхательные пути анестезирующих газов или воздушно-кислородной смеси при проведении ингаляционной анестезии или искусственной вентиляции легких. Некоторые модели содержат клапан, который помогает регулировать давление в манжете.

6. Показания к применению медицинского изделия.

Необходимость в подаче в верхние дыхательные пути пациента анестезирующих газов при проведении ингаляционной анестезии или воздушно-кислородной смеси при проведении искусственной вентиляции легких пациентам с самостоятельным дыханием, недостаточным или полностью отсутствующим самостоятельным дыханием.

7. Противопоказания к применению медицинского изделия.

Аллергия или непереносимость химических веществ, входящих в состав медицинского изделия.

8. Побочные действия.

- Аллергическая реакция на химические вещества, входящие в состав медицинского изделия.
- Обтурация коннектора маски и развитие асфиксии.
- Другие побочные действия при применении медицинского изделия связаны не напрямую с его применением, а с нарушением мер предосторожности и требований безопасности.

9. Меры предосторожности к применению медицинского изделия.

- Маска является одноразовым медицинским изделием.
- Изделие должно применяться только квалифицированным (обученным) медицинским персоналом.
- При использовании маски для замещения функции легких всегда иметь резервный экземпляр изделия.
- Соединять изделие с соответствующими коническими коннекторами притирая их надежно.
- Не прижимайте жесткие части маски к лицу пациента.
- Чрезмерное давление на маску может привести к травматизации лица пациента.

10. Описание, параметры и характеристики медицинского изделия.

Чашка маски.

Основная формирующая часть маски. Выполнена из прозрачных материалов для улучшения визуализации состояния пациента, имеет различные размеры в соответствии с модельным рядом маски.

Манжета.

Гибкая часть маски, которая прилежит к чашке маски, может содержать воздух для создания герметичности и воздухо непроницаемого уплотнения на лице пациента и для атравматичной фиксации маски на лице пациента и клапан. Также манжета может быть безвоздушной и выполнена из термоэластомерных материалов с нанесением на нее цветовой маркировки в соответствии с размером маски.

Клапан манжеты.

Некоторые варианты исполнения маски с манжетами содержат клапан с соединением Луер. Клапан используется для регулирования давления внутри манжеты, тем самым улучшая анатомические свойства маски и герметичность прилегания изделия.

Коннектор.

Встроенный прямой коннектор необходим для подключения маски к дыхательному контуру анестезиологической «рабочей станции», аппарата искусственной вентиляции легких или к аппарату ручной вентиляции легких, имеет размер в зависимости от размера маски: 22мм охватывающий или 15мм охватываемый диаметр.

Кольцо-маскодержателя.

Некоторые варианты исполнения маски имеют специальное фиксирующее кольцо на коннекторе, обладающее цветовой маркировкой в соответствии с размером маски, которое помогает закрепить изделие на голове пациента.

11. Методы и условия стерилизации и дезинфекции

Маска является нестерильным медицинским изделием, предназначены для однократного применения.

12. Установка и способ применения.

Способ применения.

- Выберите маску соответствующего размера,
- Осмотрите упаковку, убедитесь в отсутствии её повреждений или инородных тел, загрязнений.
- Проверьте наличие индивидуальной маркировки и убедитесь в том, что срок годности изделия не истек.
- Произведите антисептику кожи рук или наденьте перчатки.
- Вскройте упаковку, осмотрите и проведите визуальную проверку целостности и на отсутствие посторонних предметов.
- Извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь в проходимости коннектора.
- Присоедините коннектор к дыхательному контуру (или к соединителю дыхательного контуру при его наличии) или к аппарату ручной вентиляции легких.
- При наличии клапана путем присоединения шприца к клапану манжеты отрегулируйте давление в манжете.
- Разместите изделие на лице пациента поверх рта и носа, удерживайте изделие большим и указательным пальцем на лице пациента.
- Начните подачу анестезирующей или воздушно-кислородной смеси пациенту.
- При правильно выбранном размере маски и отрегулированном давлении в манжете изделия достигается герметичное прилегание маски к лицу пациента, и подача газовой смеси в маску проходит без значимого сопротивления.

Выбор размера.

Выбор размера маски осуществляется квалифицированным (обученным) персоналом исходя из антропометрических данных пациента: возраст, масса тела, особенности размеров лицевого черепа, так чтобы маска прикрывала нос и рот пациента, прилегание было герметичным, а прохождение газовой смеси через нее не имело значимого сопротивления. Выбор размера маски упрощается цветовой маркировкой кольца-маскодержателя (в вариантах исполнения с регулируемой манжетой) или цветом термоэластопласта манжеты.

13. Требования безопасности к применению медицинского изделия.

- Маска является одноразовым медицинским изделием.
- Перед применением маски убедиться в целостности индивидуальной упаковки.
- Не применять медицинское изделие при нарушении целостности упаковки. Качество изделия гарантируется только при отсутствии следов повреждения упаковки.
- Не применять медицинское изделие при наличии визуальных дефектов.
- Не применять медицинское изделие после истечения срока годности.
- Не применять медицинское изделие у пациентов с аллергией или непереносимостью химических веществ, входящих в состав маски.
- Не используйте изделие у пациентов с выраженной деформацией лицевого черепа (ожоги, травматическое размоложение и переломы костей, деструкция костей, вызванная другими заболеваниями) при возможности использования другого способа искусственной вентиляции легких.
- Медицинское изделие не подлежит повторной стерилизации и дезинфекции для повторного применения.
- Использовать при применении изделия исправную следящую аппаратуру, в соответствии с принятыми стандартами и рекомендациями.
- При обнаружении повышения сопротивления вследствие возможной обтурации коннектора маски срочно замените изделие.
- Соблюдать рекомендации, инструкции и требования безопасности по использованию медицинского оборудования (анестезиологические аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты ручной вентиляции легких и прочее) и других медицинских изделий (дыхательные контуры и фильтры, соединители дыхательного контура и прочее), с которым используются маска.
- Не использовать медицинское изделие повторно или у других пациентов во избежание развития перекрестного инфицирования.

14. Возможные риски при использовании.

- Аллергическая реакция на химические вещества, входящие в состав медицинского изделия.
- Обтурация коннектора маски и развитие асфиксии.
- Другие побочные действия при применении медицинского изделия связаны не напрямую с их применением, а с нарушением требований безопасности.

15. Обслуживание и ремонт

Изделие техническому обслуживанию и ремонту не подлежат.

16. Комплектность.

Наименование	Комплектация
1. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах	Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 0, неонатальная – 1 шт.

исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 0, неонатальная	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
2. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 1, детская	Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 1, детская – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
3. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 2, детская	Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 2, детская – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
4. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 3 (S), для взрослых	Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 3 (S), для взрослых – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
5. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 4 (M), для взрослых	Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 4 (M), для взрослых – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
6. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 5 (L), для взрослых	Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 5 (L), для взрослых – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
7. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 1, детская	Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 1, детская (вид 275780) – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
8. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах	Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 2, детская – 1 шт.

исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 2, детская	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
9. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 3, для взрослых	Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 3, для взрослых – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
10. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 4, для взрослых	Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 4, для взрослых – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
11. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 0, неонатальная	Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 0, неонатальная (вид 271390) – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
12. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 1, детская	Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 1, детская – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
13. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 2, детская	Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 2, детская – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
14. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 3 (S), для взрослых	Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 3 (S), для взрослых – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
15. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения.	Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 4 (M), для взрослых – 1 шт.

Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 4 (М), для взрослых	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
16. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 5 (L), для взрослых	Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 5 (L), для взрослых – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
17. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 1, детская	Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 1, детская – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
18. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 2, детская	Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 2, детская – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
19. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 3, для взрослых	Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 3, для взрослых – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
20. Маска лицевая одноразового использования по ТУ 32.50.21-015-73064893-2021, в вариантах исполнения. Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 4, для взрослых	Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 4, для взрослых – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.

17. Упаковка.

Медицинское изделие должно поставляться в индивидуальной упаковке производителя.

18. Маркировка.

Маркировка медицинского изделия должна соответствовать требованиям данного раздела ТУ, быть четкой и разборчивой при нормальном или скорректированном до нормального зрения. Маркировка на индивидуальной упаковке должна быть постоянной и несмываемой. В маркировке изделия могут быть применены символы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1.

На индивидуальную упаковку должна быть нанесена следующая маркировка:

- изготовитель (символ и/или текст, наименование, адрес, телефон);
- сведения о месте изготовления медицинского изделия (символ и/или текст);
- наименование изделия и его вариант исполнения;

- запрет на повторное применение (символ);
- логотип предприятия-изготовителя (символ);
- штрих-код (символ);
- код партии (символ и/или текст);
- номер по каталогу (символ и/или текст);
- дата изготовления (символ и/или текст);
- использовать до (символ и/или текст);
- не использовать при повреждении упаковки (символ);
- обратитесь к инструкции по применению (символ);
- предел температуры (символ);
- диапазон влажности (символ);
- ограничение атмосферного давления (символ);
- «Нетоксично» (надпись);
- «Нестерильно» (надпись);
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- QR-код (символ);
- номер и дата регистрационного удостоверения (надпись).

Транспортная маркировка изделия, должна содержать:

- изготовитель (наименование, адрес, телефон) (символ и/или текст);
- сведения о месте изготовления медицинского изделия (символ и/или текст);
- наименование изделия и его вариант исполнения;
- код партии (символ и/или текст);
- номер по каталогу (символ и/или текст);
- количество изделий;
- дата изготовления (символ и/или текст);
- использовать до (символ и/или текст)
- предел температуры (символ);
- диапазон влажности (символ);
- штрих-код (символ);
- масса брутто, кг;
- «Нестерильно»;
- «Нетоксично» (надпись);
- «Штамп ОТК» (надпись);
- «Сделано в России» (надпись);
- «После транспортирования в условиях отрицательных температур маска в транспортной упаковке должна быть выдержана при нормальных климатических условиях не менее 24 часов» (надпись);
- номер и дата регистрационного удостоверения.

Дополнительные надписи могут быть нанесены на тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.

На транспортную упаковку могут быть нанесены манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Предел по количеству ярусов в штабеле» (не более 8 ярусов), «Беречь от солнечных лучей», «Верх», «Хрупкое. Осторожно» по ГОСТ 14192. Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на упаковку или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.

По требованию заказчика возможно нанесение дополнительной маркировки на индивидуальную упаковку, например, наименование заказчика, адрес заказчика и т.п. Дополнительная маркировка не должна вводить в заблуждение потребителя.

19. Условия эксплуатации

Изделие применяется в помещениях и на улице в следующих климатических условиях:

- температура тела пациента: от + 32 °С до + 42 °С;
- температура воздуха: от + 10 °С до + 35 °С;
- относительная влажность воздуха: 35-80%;
- атмосферное давление: 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

20. Хранение

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте. Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от + 5 °С до + 40 °С;
- относительная влажность воздуха: 35-80%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

21. Транспортирование

Упакованное изделие транспортируют всеми видами закрытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортируются в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от – 5 °С до + 50 °С;
- относительная влажность воздуха: 25-95%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

22. Срок годности с даты изготовления – 3 года.

23. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным в документации показателям качества и характеристикам при соблюдении правил транспортирования и хранения в течение всего срока годности. Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия; не несет ответственности в отношении изделий, подвергаемых повторной обработке или стерилизации, используемых повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных в документации производителя, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких изделий.

24. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

7.1. Маска, не использованная по назначению, с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса А.

7.2. Маска, использованная по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса Б.

7.3. Маска, использованная по назначению во фтизиатрии, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса В.


25. Контактная информация

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу: АО «НПП «ИНТЕРОКО», 140080, Россия, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, строение. 8, здание 121, тел.: (495) 552 47 66, 555 45 88, email: info@interoko.ru


В случае утери данной инструкции и/или возникновении необходимости ознакомления с инструкцией по применению (для специалистов) потребитель может обратиться по e-mail: info@interoko.ru

Приложение А. Внешний вид изделия.


Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 0, неонатальная

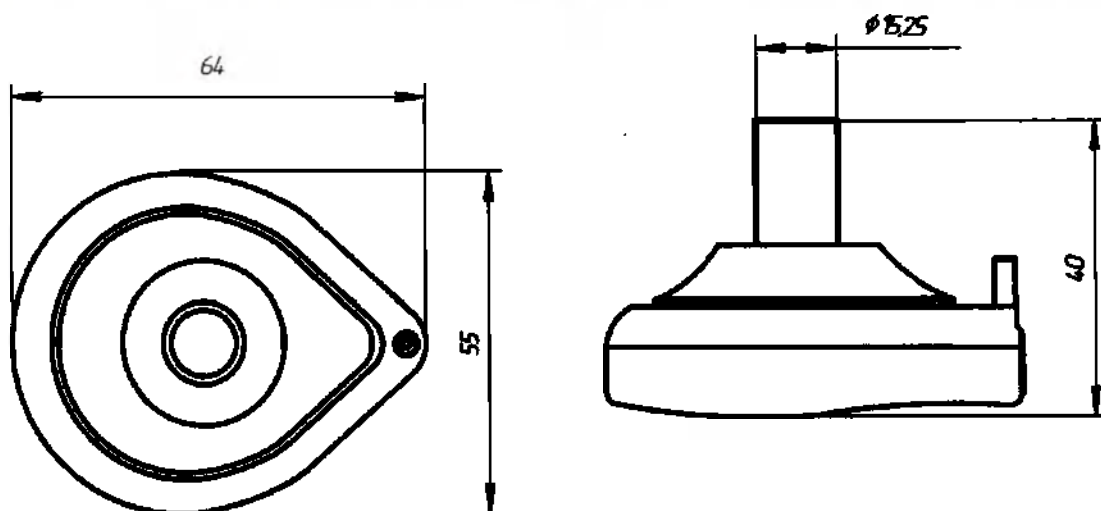


Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 1, детская

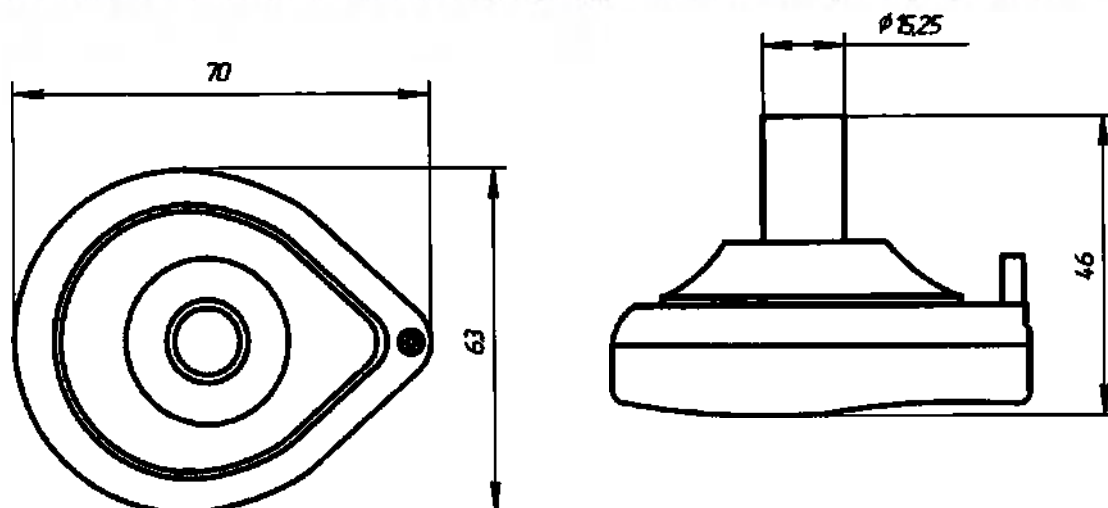


Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 2, детская

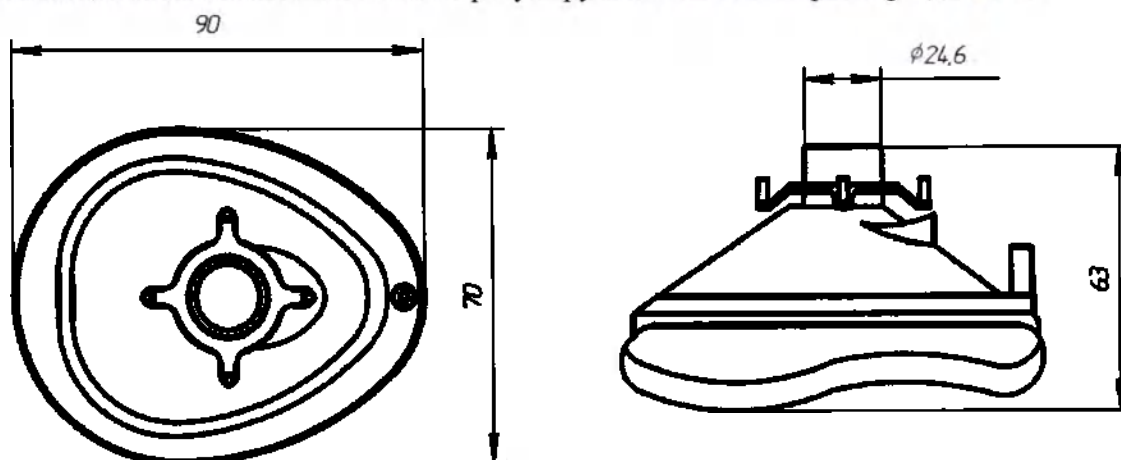


Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 3 (S), для взрослых

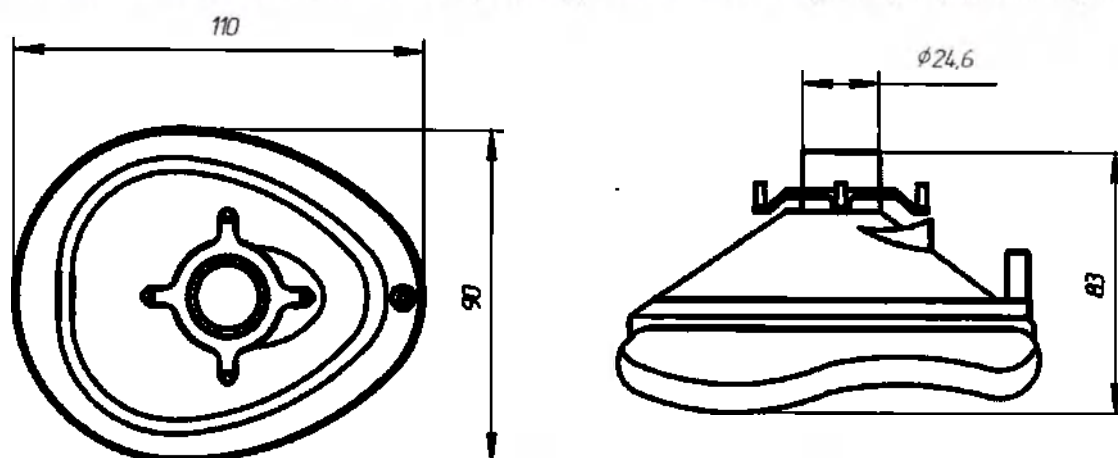


Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 4 (M), для взрослых

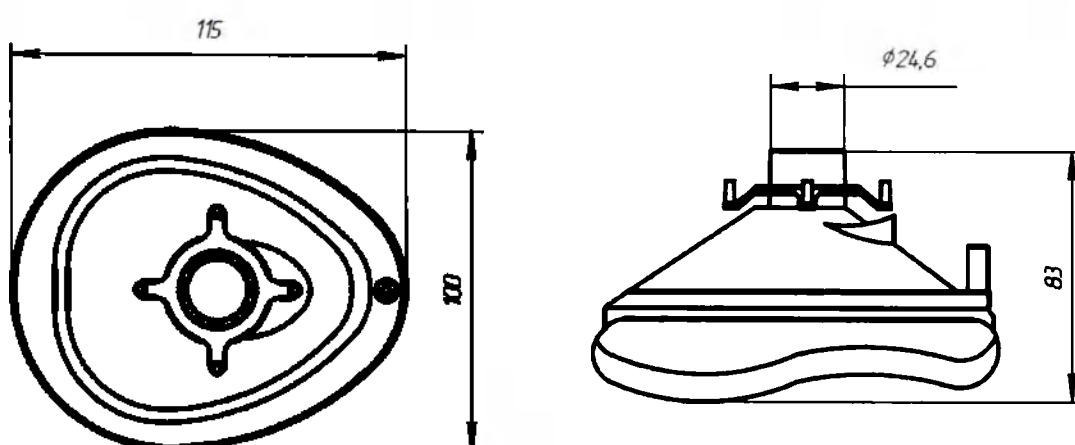


Маска лицевая анестезиологическая с регулируемой манжетой размер 5 (L), для взрослых

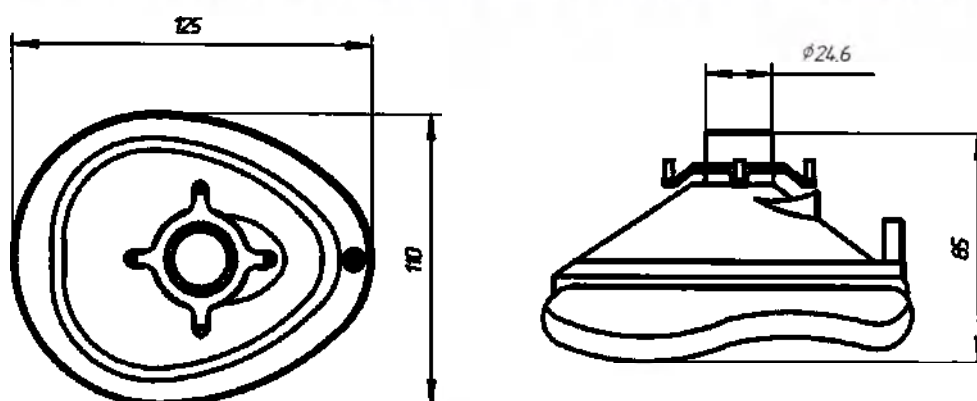


Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 1, детская

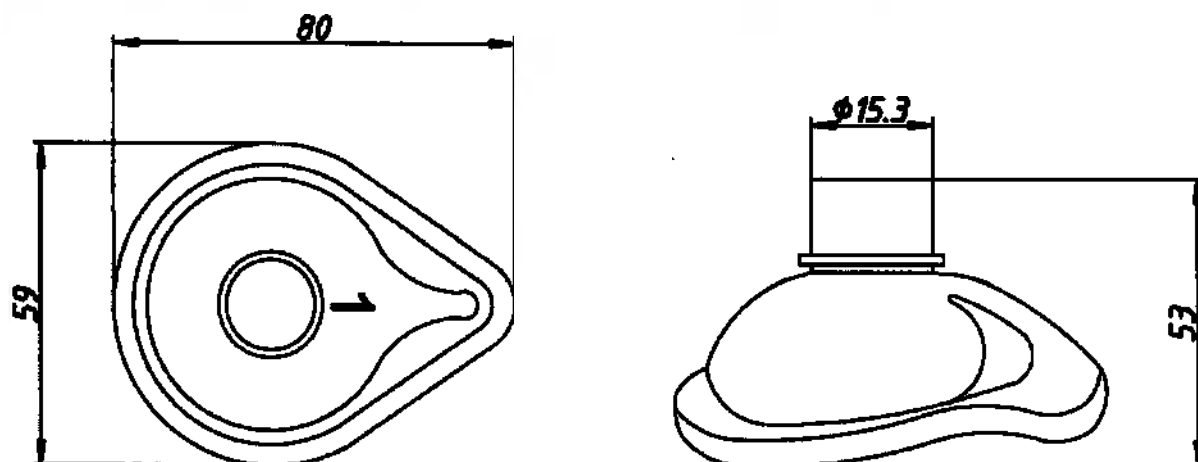


Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 2, детская

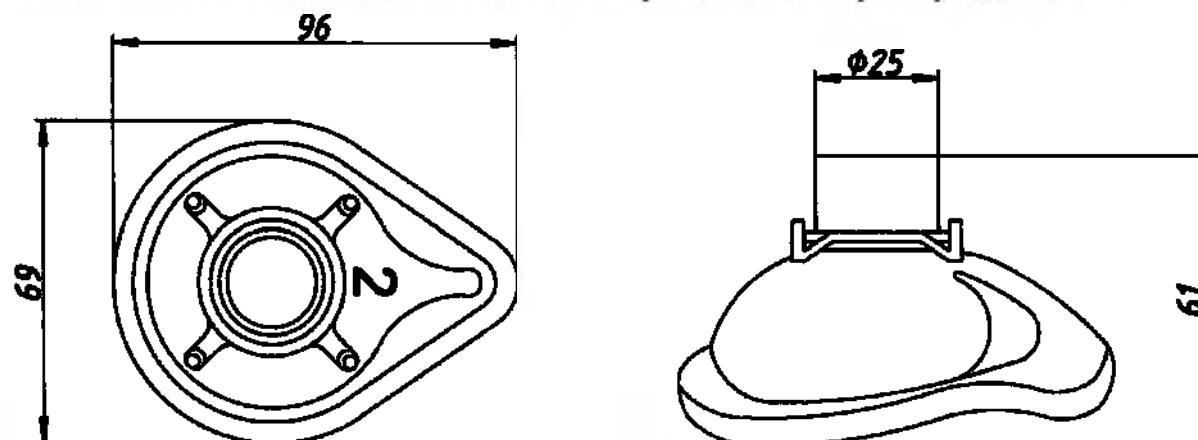


Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 3, для взрослых

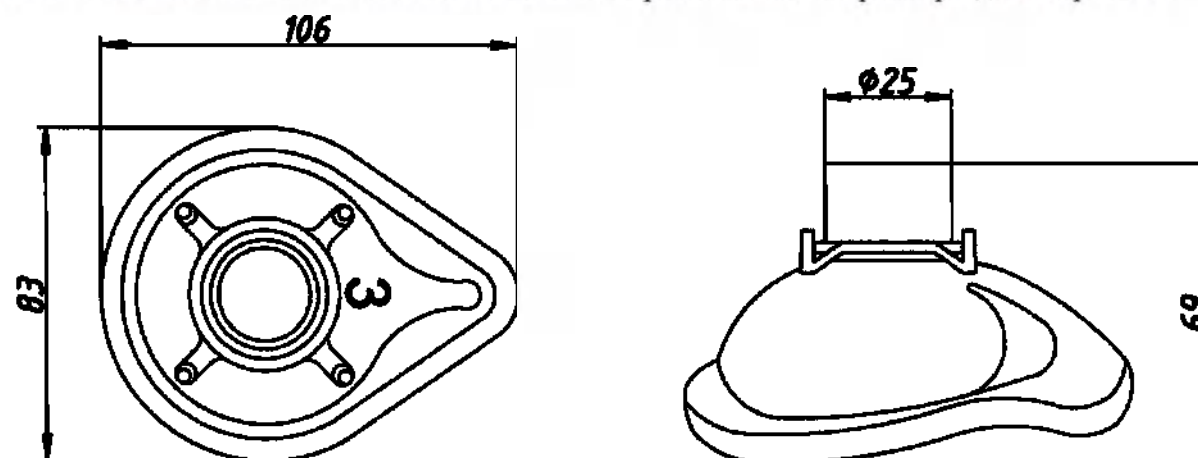


Маска лицевая анестезиологическая с эластомерной манжетой размер 4, для взрослых

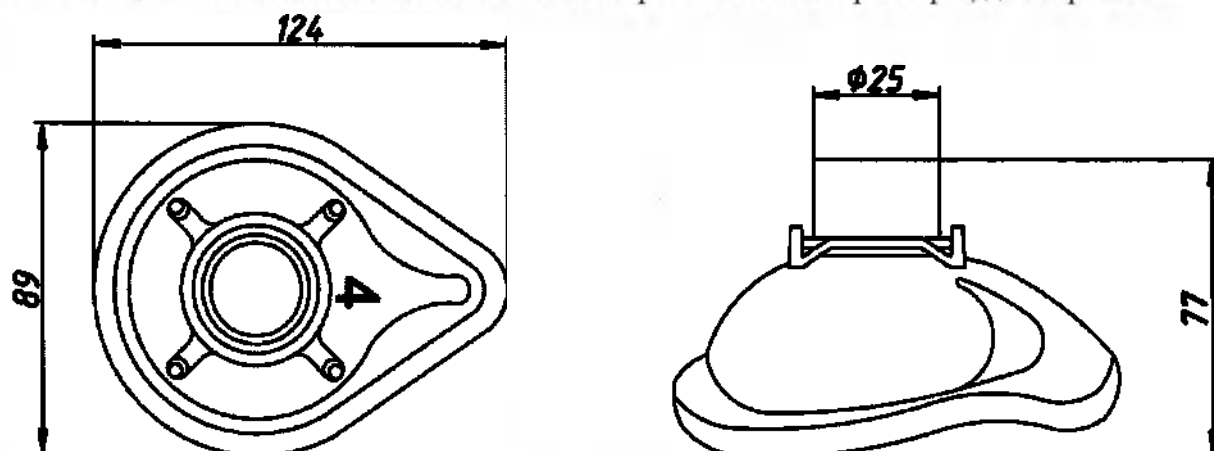


Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 0, неонатальная

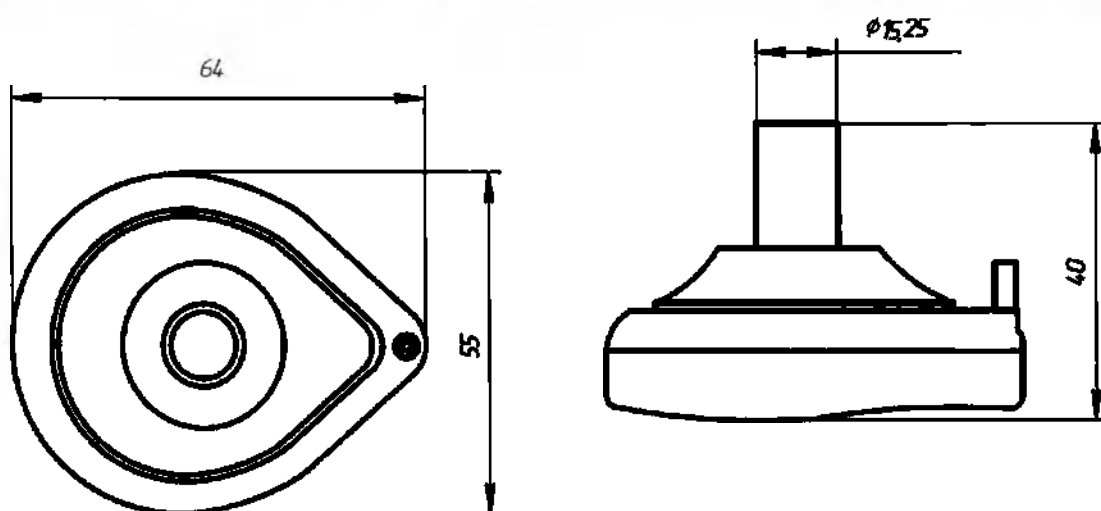


Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 1, детская

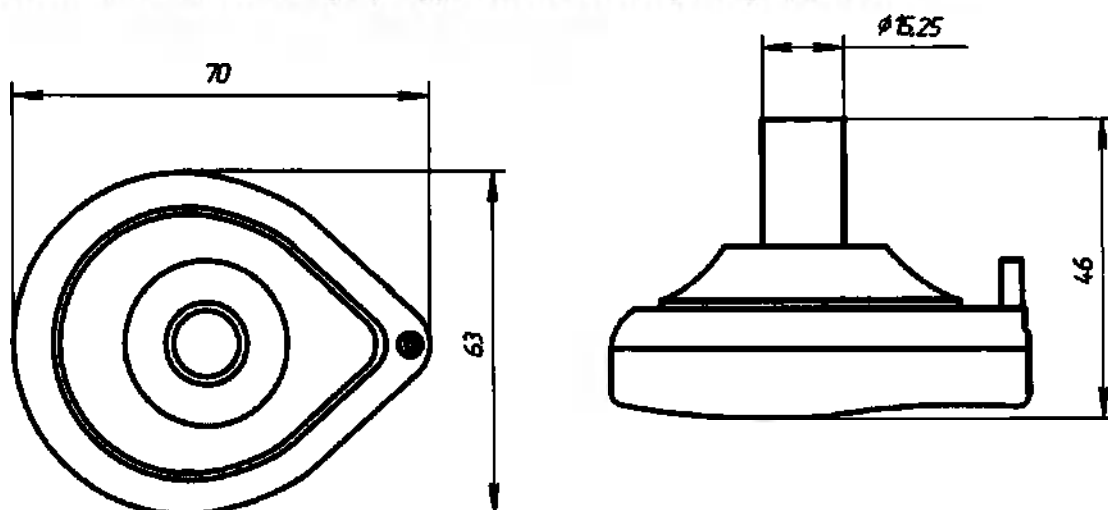


Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 2, детская

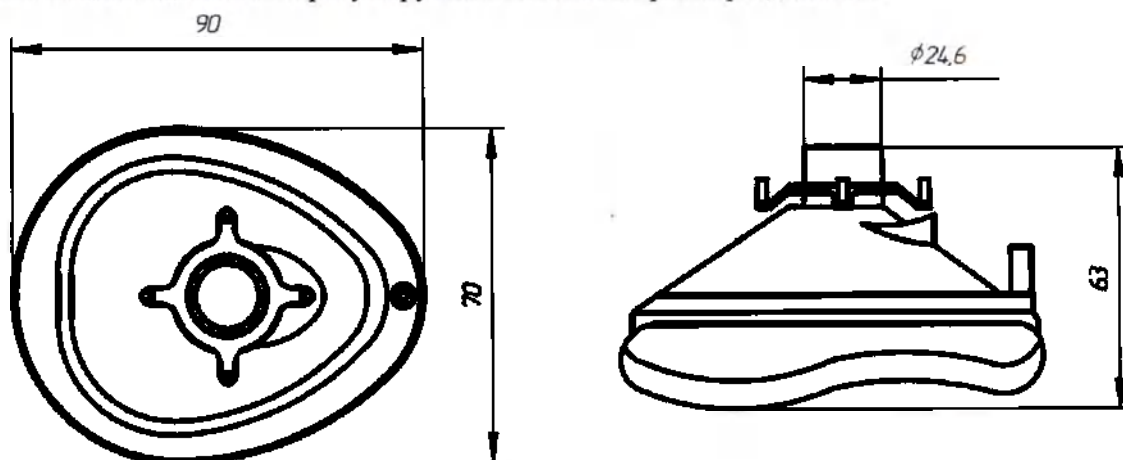


Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 3 (S), для взрослых

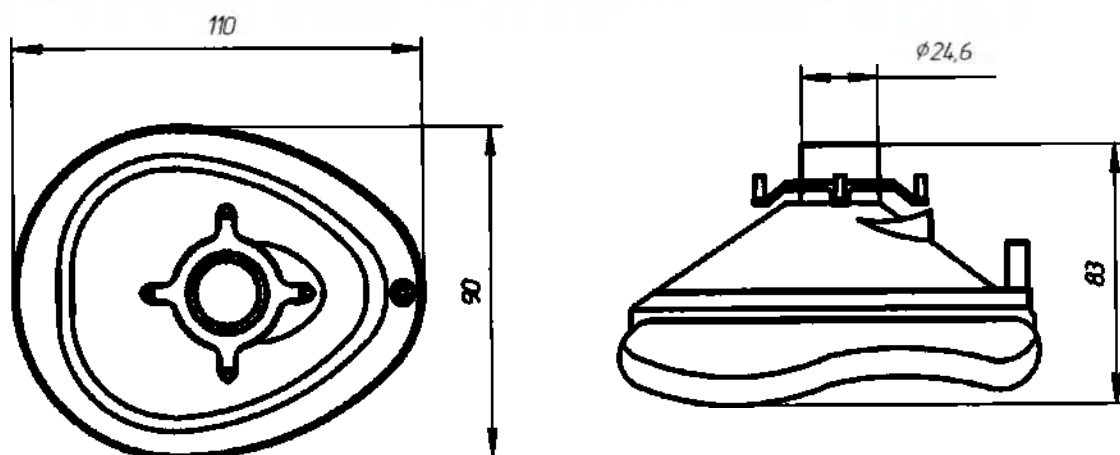


Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 4 (M), для взрослых

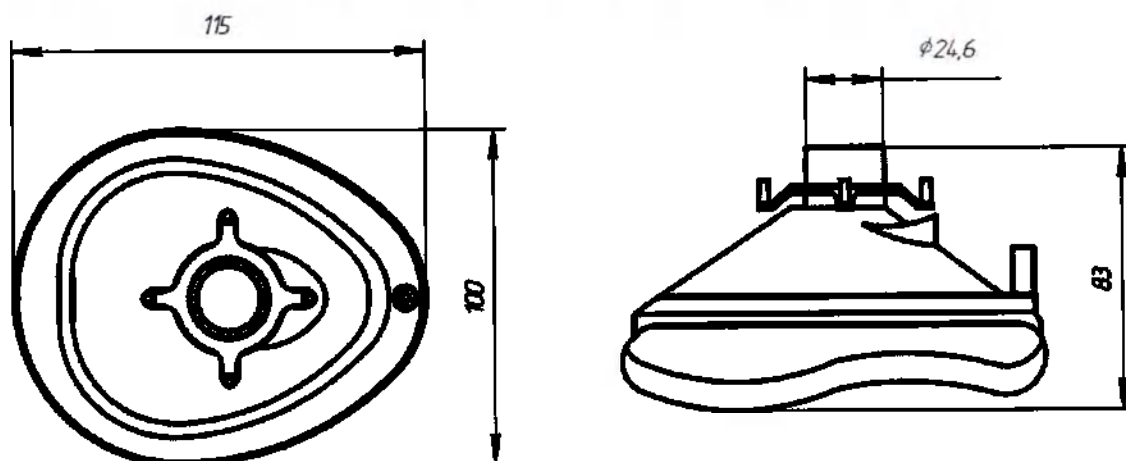


Маска лицевая для ИВЛ с регулируемой манжетой размер 5 (L), для взрослых

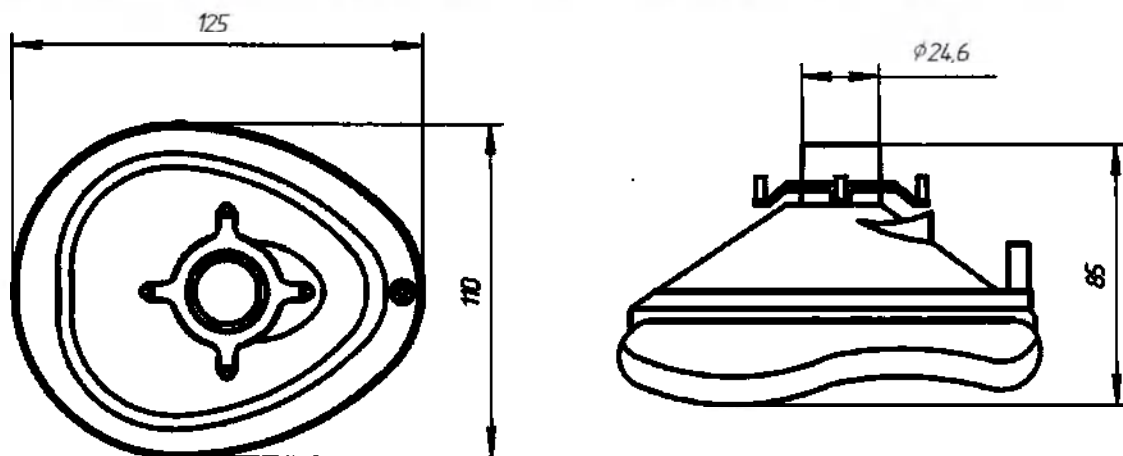



Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 1, детская

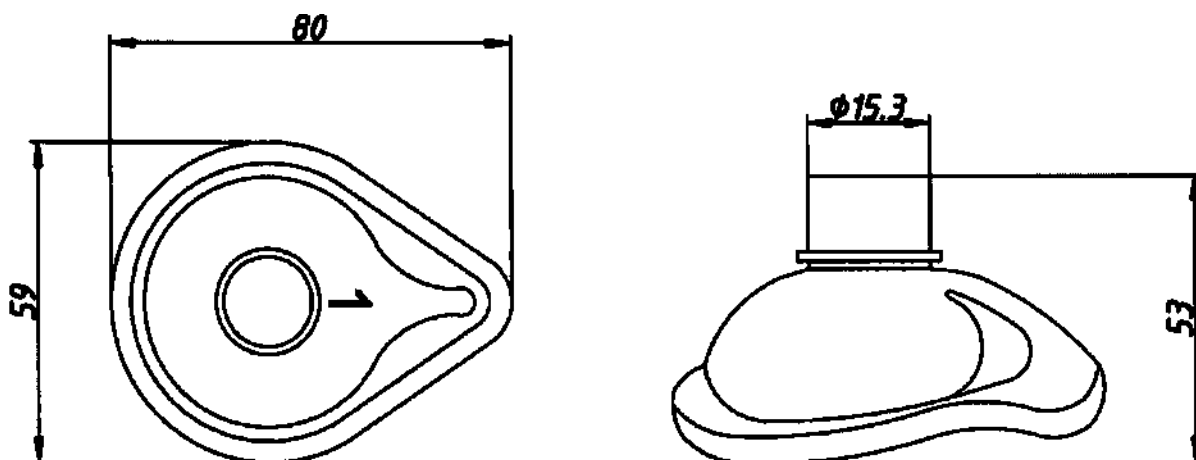



Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 2, детская

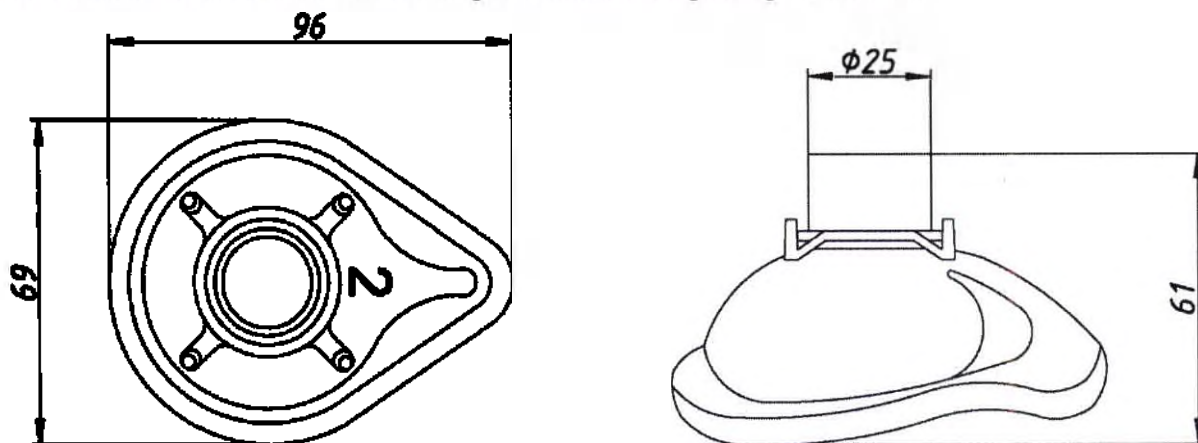


Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 3, для взрослых

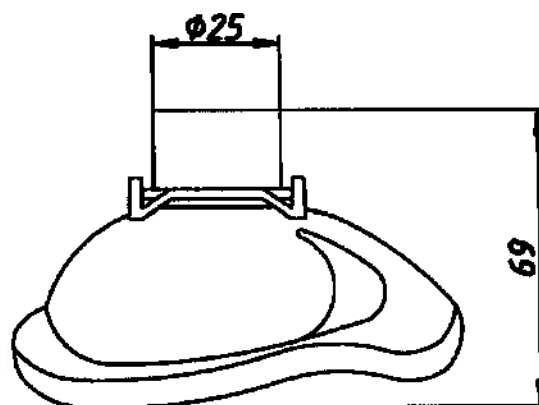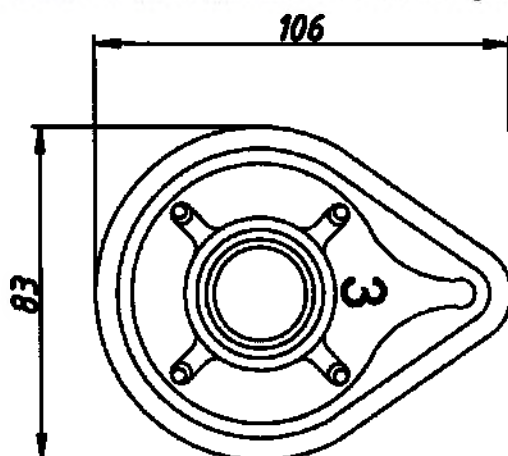

Маска лицевая для ИВЛ с эластомерной манжетой размер 4, для взрослых

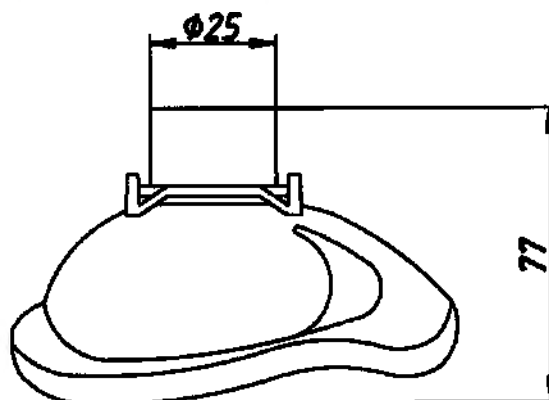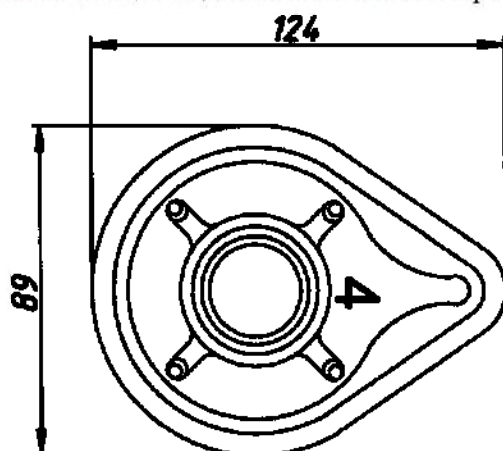

Приложение Б: Манипуляционные символы указанные на упаковке:

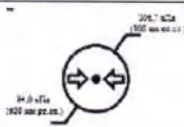Символ	Обозначение
	Использовать до ...
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Сведения о производителе
	Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон
	Беречь от солнечных лучей
	Беречь от влаги
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Диапазон влажности
	Ограничение атмосферного давления

	Верх
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 29 лист(ов)

Директор АО «НПП «ИНТЕРЕКО»

Морозов В.П. "21" 08 2021 г.

