

Трость белая тактильная цельная
по ТУ 32.50.22-004-03151679-2016



Назначение

Трость белая тактильная цельная - помогает людям с нарушенным зрением в самоориентировке, ощущении ориентиров и препятствий на пути.

Показания

Трости тактильные должны назначаться медицинским работником при стойких нарушениях зрительных функций единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения: острота зрения 0,05 – 0,1 или/и концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 – 0,04 или/и концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов).

Противопоказания

Медицинскими противопоказаниями к трости тактильной являются выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей.

Сведения о продукции

Изделия изготавливаются из легкого, прочного и устойчивого к коррозии материала сталь 20 по ГОСТ 1050-2013, покрытого белой порошковой эпоксидно-полиэфирной краской «Медлак» по ТУ 2329-002-45318751-2008. Рукоятка выполнена из прочного нескользящего износостойкого материала ТТЭ-С 20/10 по ТУ 16-503.250-84 красного цвета.

Технические характеристики

Высота трости тактильной должна составлять (900 ± 10) мм.

Масса трости тактильной составляет $(0,31 \pm 0,05)$ кг

Максимальная допустимая масса пользователя:

- трости тактильной – без ограничений;

Трость тактильная белого цвета.

Комплектация

В комплект поставки входит:

- трость тактильная – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Освободить изделие от упаковки

В процессе эксплуатации либо после длительного хранения необходимо производить осмотр изделия на предмет наличия дефектов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Уход за изделием

Для чистки трости используйте тёплую воду с нейтральным моющим средством. После чистки вытрите изделие насухо тряпочкой.

! Не применяйте растворители (спирт, ацетон и др.), а также сильнодействующие моющие средства.

Трости устойчивы к санитарно-гигиенической обработке 3 %-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644 и к химической дезинфекции 1 %-ным раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 в соответствии с ОСТ 42-21-2.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте изделие на предмет повреждений. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Ремонт

Трости ремонту не подлежат.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

трости соответствуют требованиям:

- токсикологической и санитарно-химической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-5, ГОСТ ISO 10993-10.

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

Утилизация изделия

Утилизация тростей и элементов их упаковки в медицинских организациях должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Утилизация тростей и элементов их упаковки в домашних условиях – совместно с твёрдыми бытовыми отходами.

Маркировка изделия

На каждую трость нанесена четкая и несмываемая маркировка, содержащая следующую информацию:

- минимальный и максимальный рост пользователя;
- наименование организации-изготовителя или торговая марка и адрес;
- запись трости (полное наименование, обозначение технических условий);
- месяц и год изготовления.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей и манипуляционных знаков "Беречь от солнечных лучей", "Беречь от влаги".

Транспортирование и хранение

трости транспортируются и хранятся упакованными в транспортную тару.

Транспортирование тростей производится всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолетов и т. д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования и хранения тростей – в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С, относительная влажность – до 100 % при 25 °С).

Транспортирование тростей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с требованиями настоящих технических условий и ГОСТ 15846.

После транспортирования в условиях отрицательных температур трости, упакованные в транспортную тару восстанавливают потребительские свойства через 2 часа нахождения в помещении с температурой окружающего воздуха (20 ± 5) °С.

трости, упакованные в транспортную тару, устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, и обладают вибропрочностью и ударопрочностью в следующих режимах:

- вибрационные нагрузки;
- диапазон частот от 10 до 55 Гц;

- амплитуда перемещения 0,35 мм;
- ударные нагрузки:
- пиковое ударное ускорение $100 \text{ м} \times \text{с}^{-2}$ (10 g);
- длительность действия ударного ускорения 16 мс.

Назначенный срок службы

Срок сохраняемости тростей в упаковке изготовителя с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения, – 3 года.

Назначенный срок службы тростей устанавливается заводом изготовителем и составляет 2 года с момента ввода изделия в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства

Организация-изготовитель гарантирует соответствие трости требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения трости – 3 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации трости – 2 года со дня отгрузки (передачи) пользователю.

При отсутствии отметки об отгрузке (передаче) пользователю гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты отгрузки трости организацией-изготовителем.

Организация-изготовитель не несёт ответственности за выход из строя трости в результате их неправильной эксплуатации пользователем, а также в результате нарушения условий их транспортирования и/или хранения после отгрузки трости организацией-изготовителем.

Производитель:

ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, юр. адрес: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д.17А

Место производства:

«Нижегородский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России по адресу 603058, г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д.2-Б.

Адрес и наименование производителя, принимающего претензии потребителей:

«Нижегородский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

603058, г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д.2-Б

Телефон: 8 (831) 258-56-80, e-mail: ortoped@sinn.ru.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК производителя

Дата продажи _____

Печать организации, продавшей изделие

Претензий к внешнему виду не имею.

С условиями действия гарантии ознакомлен _____ Подпись покупателя

вано, пронумеровано и скреплено

Московское ПрОП» Минтруда России
филиалом «Нижегородский» филиал
Московское ПрОП» Минтруда России

Н.В. Маркова

