

«Утверждаю»
Директор
ООО «Тривес»
Ольшангер В.Т.



Руководство по эксплуатации Кресло-туалет «TRIVES»

Кресло-туалет предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление.

Комплект поставки:

1. Кресло-туалет - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Подготовка кресло-туалет к эксплуатации.

Кресло-туалет собирается без использования инструмента.

Сиденье, затем крышка прикрепляются к задней части рамы.

Ведро с крышкой ставятся на дугообразные опоры рамы под сиденьем.

Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресло-туалета.

Конструкция кресло-туалета позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае ведро с крышкой убираются).

Меры безопасности:

Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.

Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

Не допускайте контакта кресло-туалета с электрическими приборами и проводами.

При пересадке из инвалидного кресло-коляски убедитесь, что колеса стоят на ручном тормозе.

Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации кресло-туалет требует определенного технического ухода.

Рама кресло-туалета не подвергается коррозии при контакте с водой, это облегчает санитарную обработку кресло-туалета.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители (ацетон, спирт и т.д.) и абразивные средства. После санитарной обработки вытрите кресло насухо.

Следует предохранять кресло-туалет от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте кресло-туалет длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

При повреждении резиновых наконечников на ножках стула необходимо провести их замену.

Директор ООО



Ольшангер В.Т.