



Министерство здравоохранению и социальному развитию
ФГУП «Свердловское ПрОП» Минздравсоцразвития России,




Аппарат ортопедический на коленный сустав АН4-16

Памятка по пользованию
АН4-16.00.00.ПП

Версия 1

2010

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

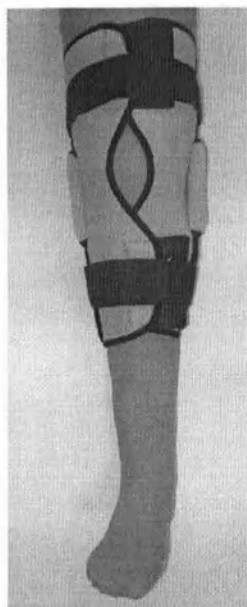

Аппарат ортопедический на коленный сустав предназначен для фиксации коленного сустава при травмах капсульно-связочного аппарата, артрозе, артрите, бурсите и других заболеваниях, которые требуют частичного ограничения подвижности в коленном суставе.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.

Аппарат состоит из гильзы изготовленной из «Неопрена», или других эластичных материалов и шин с коленным шарниром. Шины вставляются в карманы, изготовленные из застежки ворсовой «Контакт» и нашитые на гильзу аппарата. Коленные шарниры закрыты клапанами из основного материала. Фиксация аппарата на ноге осуществляется с помощью крепления из застежки ворсовой «Контакт» и дополнительным манжеточным креплением со шлевкой, выполненным из застежки ворсовой «Контакт». Аппарат по контуру окантован эластичной лентой.

ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ

Аппарат надевают на ногу и фиксируют на ней, последовательно застегивая крепления на бедре и голени. Аппарат не должен оказывать болезненного давления на мягкие ткани конечности и не должен затруднять кровообращение.

Режим пользования аппаратом определяет лечащий врач.

УХОД ЗА АППАРАТОМ

Стирать изделие в теплой воде, предварительно вынув шины, при помощи щетки с применением нейтральных моющих средств. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 40 дней со дня выдачи потребителю.

В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие производит замену или ремонт бандажа бесплатно.

Аппарат ортопедический на коленный сустав АН4-16

Размер	00	01	02	03	04
Обхват колена, см	33-35	36-38	39-41	42-45	46-48

АН4-16.00.00.ПП

					АН4-16.00.00.ПП					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Аппарат ортопедический на коленный сустав АН4-16 Памятка по пользованию			Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Зинченко		12.04.10				A	2	3
Проверил		Климова		12.04.10				ФГУП «Свердловское ПрОП»		
Согласовано		Поспелова		12.04.10						
 INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSTOBRANADTOR.RU										