

«Утверждаю»
Директор
ООО «Тривес»
Ольшангер В.Т.

Руководство по эксплуатации

Костыли, трости «TRIVES»

1. Костыли, трости «TRIVES» моделей:

CA833L1, CA 833L2, CA 833L3, CA 833L4, CA 833L5, CA 833L6, CA 835L2, CA 835, CA 832L1, CA 832L2, CA 832L3, CA 832L4, CA 832L5, CA 832L6, CA 832L7, CA 832L8, CA 851L1, CA 851L2, CA 851L3, CA 851L5, CA 852L2, CA 852L1, CA 834L1, CA 834L2, CA 834L3, CA 834L4, CA 843, CA 8431, CA 8432, CA836, CA 8421, CA 8422, CA 8423, CA 8424, CA 842, CA 8412, CA 8411, CA 853L, CA 801LL, CA 801LM, CA 801LS, CA 802LL, CA 802LM, CA 802LS, CA 802LXS, CA 803L, CA 803M, CA 805L с принадлежностями предназначены для дополнительной опорной функции туловищу человека во время стояния или ходьбы.

2. Комплект поставки:

- 1) Костыль, трость «TRIVES» - 1 шт.
- 2) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. Подготовка к эксплуатации:

Трость, костыль собирается и разбирается без использования инструмента.
Освободите изделие от упаковки перед использованием.
Отрегулируйте изделие по необходимой высоте.


4. Указание мер безопасности:

Убедитесь в надежности закрепления всех соединений.
Вовремя заменяйте изношенные наконечники.
Не допускайте контакта изделия с электрическими приборами и проводами.

5. Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации изделие требует определенного технического ухода.
Изделие изготовлено из алюминия, не подвержено коррозии при контакте с водой, что облегчает санитарную обработку.

Директор ООО «Тривес»

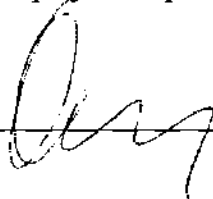

/Ольшангер В.Т.