

«Утверждено»
Директор
ООО «Тривес»
Ольдандер В.Т.

Руководство по эксплуатации

Опоры-ходунки «TRIVES»

1) Опоры –ходунки «TRIVES» моделей:

- CA 862L	- CA 892B	- CA 821L-5	- CA 811L-4
- CA 861L	- CA 892G	- CA 822L-5	- CA 812LG
- CA 881L	- CA 891L	- CA 828L	- CA 812L-G
- CA 882L	- CA 893	- CA 823L	- CA 812L
- CA 883L	- CA 826L-5	- CA 813L	- CA 827
- CA 884L	- CA 823L-5	- CA 811L	- CA 669
- CA 885L	- CA 821L	- CA 811LG	- CA 824L
- CA 880	- CA 821LS	- CA 811LG-5	- CA 824L-4

обеспечивают стопроцентную устойчивость людей с ограниченной
возможность к передвижению за счет широкой базы. Служат для оказания
помощи при ходьбе людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2) Комплект поставки.

Опора –ходунок, опора-ходунок прогулочный (роллатор) «TRIVES» - 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.

3) Подготовка изделия к эксплуатации:

Изделие собирается и разбирается без использования специального
инструмента.

Отрегулируйте изделие по необходимой высоте.

4) Указание мер безопасности:

Убедитесь в надежности закрепления всех соединений.

Вовремя заменяйте изношенные наконечники.

Не допускайте контакта изделия с электрическими приборами и проводами.

5) Обслуживание и уход при эксплуатации:

Рама изделия изготовлена из алюминия, не подвержено коррозии при контакте
с водой, что облегчает санитарную обработку.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте
растворители (ацетон, спирт и т.п.) и абразивные вещества. После санитарной
обработки вытрите изделие насухо.

Следует предохранять изделие от ударов твердыми и острыми предметами.

При повреждении резиновых наконечников необходимо провести их замену.