

«Утверждаю»

Директор

ООО «Тривес»

Ольшангер В.Т.



Руководство по эксплуатации Кресло-коляска «TRIVES»

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на открытых площадках с твердым покрытием.

Комплект поставки

1. Кресло-коляска - 1 шт.
2. Узел подножек - 2 шт.
3. Ключ шестигранный - 2 шт.
4. Ключ комбинированный - 1 шт.
5. Опора для голеней с застежками - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Меры безопасности:

При посадке больного в кресло и высадке из него ведущие колеса должны быть заблокированы тормозом, а опоры для стоп подножек должны находиться в вертикальном положении. Вставить на опоры для стоп при высадке и посадке в кресло не разрешается.

Подготовка кресла-коляски к эксплуатации.

Кресло-коляска раскладывается и складывается без применения специальных средств.

Сложенную коляску положите на пол, и, потянув подлокотник и раму вверх, раздвиньте кресло на ширину сиденья.

Допускается раздвинуть коляску, находящуюся в вертикальном положении, держа подлокотники и немного ее приподняв.

Раздвигать коляску с помощью рукояток недопустимо.

Для складывания коляски потяните вверх мягкие рукоятки на сидении коляски, затем сдвиньте вместе подлокотники.

Кресло-коляска оборудована стояночными тормозами обоих ведущих колес.

Для торможения передвиньте рычаг тормоза назад до полной блокировки колес.

Обслуживание и уход при эксплуатации.

Очистку поверхности сиденья и спинки кресла-коляски производите теплой водой со стиральным порошком.

Механизм складывания периодически смазывайте машинным маслом.

Не допускайте повреждения декоративных покрытий кресла-коляски твердыми и острыми предметами.

Во время движения не сдвигайтесь на сидении вперед и не допускайте ударов передних колес о препятствия и неровности на дороге (камни, выбоины, дорожный бордюр).

В случае ослабления фиксации опоры для стоп или смещения её по высоте необходимо снять подножку со штифтов, уложить на край стола, немного отвернуть болт-фиксатор и установить узел опоры для стопы в исходное положение. Вращая болт-фиксатор по часовой стрелке, заверните его до упора, после чего установите подножку на прежнее место.

Директор ООО «



/Ольшангер В.Т.

Таблица аналогов

Кресла-коляски «TRIVES»

Кресла-коляски «TRIVES» производства: «CareMax Rehabilitation Equipment Co. Ltd.»
Pingnan Industrial Area, Shugang Road, Pingzhou. 528251. Nanhai, Foshan, China

Предназначение: Для передвижения больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на открытых площадках. Для людей, не имеющих возможности двигаться, как и временно (из-за болезни), так и из-за инвалидности, но способных находиться в сидячем положении. Это устройство передвижения для людей с затруднением передвижения, которое можно использовать в пешеходных зонах.

Безопасность: Класс в зависимости от потенциального риска применения- 1 в соответствии с ГОСТ Р 51609-2000

Применение: Стационарные медицинские учреждения, медицинские лечебно-профилактические учреждения и для использования в домашних условиях.

Эффективность: Они используют для передвижения только энергию самого водителя. Это является основным достоинством, т.к. инвалид имеет возможность тренироваться, прикладывая физическую силу. Кресло-коляска это экологически чистое, безопасное, удобное и абсолютно не заменимое устройство для передвижения людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, а также инвалидов.

Габаритные размеры, масса, нагрузка:

- ширина, см от 53 до 68
- ширина вид с боку, см от 58 до 128
- ширина сиденья, см от 35 до 51
- высота от пола до сиденья, см от 44 до 50
- максимальная нагрузка, кг 100
- вес изделия, кг от 10 до 26

Аналог: Кресла-коляски, производства компании Amrus Enterprises, Ltd. , США, регистрационное удостоверение № ФС 2007/00972 от 26.12.2007 года.

Предназначение: Для передвижения больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на открытых площадках. Для людей, не имеющих возможности двигаться, как и временно (из-за болезни), так и из-за инвалидности, но способных находиться в сидячем положении. Это устройство передвижения для людей с затруднением передвижения, которое можно использовать в пешеходных зонах.

Безопасность: Класс в зависимости от потенциального риска применения- 1 в соответствии с ГОСТ Р 51609-2000

Применение: Стационарные медицинские учреждения, медицинские лечебно-профилактические учреждения и для использования в домашних условиях.


Эффективность: Они используют для передвижения только энергию самого водителя. Это является основным достоинством, т.к. инвалид имеет возможность тренироваться, прикладывая физическую силу. Кресло-коляска это экологически чистое, безопасное, удобное и абсолютно не заменимое устройство для передвижения людей с частичной

утратой функций опорно-двигательного аппарата, а также инвалидов.

Габаритные размеры, масса, нагрузка:

- ширина, см от 55 до 67
- ширина вид с боку, см от 60 до 120
- ширина сиденья, см от 35 до 48
- высота от пола до сиденья, см от 44 до 48
- максимальная нагрузка, кг 100
- вес изделия, кг от 12 до 23

Директор ООО «Тривес» _____

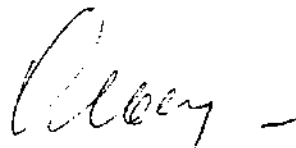

/Ольшангер В.Т.

Кресла-коляски «TRIVES», производства "CareMax Rehabilitation Equipment Co. Ltd.", Китай, является полным функциональным аналогом изделия «Кресло-коляска», производства компании Amrus Enterprises, Ltd. , США, регистрационное удостоверение ФС 2007/00972 от 26.12.2007 года.

Данные аналоги эквивалентны друг другу т.к имеют практически одинаковые габаритные размеры и используемые при изготовлении материалы из которого изготовлены. Изделия имеют идентичную конструкцию и функциональные возможности, а так же способы управления: с приводом за обручи и с приводом за рычаги.

	Зарегистрированный в РФ зарубежный аналог	Регистрируемое изделие
Наименования	Кресло-коляска	Кресла-коляски «TRIVES»
Изготовитель:	Amrus Enterprises, Ltd. , США	CareMax Rehabilitation Equipment Co. Ltd.
Область применения	предназначено для передвижения больных с частичной потерей функций орно-двигательного аппарата	предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно- двигательного аппарата
Способ приведения в движение	с приводом за обручи и с приводом за рычаги	с приводом за обручи и с приводом за рычаги
Возможность складывания	имеется	имеется
Тормоза на двух колесах	имеются	имеются
Съемные поворотные опоры для ног	имеются	имеются
Возможность съема подлокотников	имеется	имеется
Грузоподъемность	120 кг	100 кг
Ширина в сложенном состоянии	390 мм	220-310 мм
Ширина сиденья	380 мм	350-510 мм
Число секций	3	3
Используемые материалы	- металл с хромированным покрытием - сталь с хромированным покрытием - алюминий (педаль) - поливинилхлорид (подлокотники, обивка)	- металл с хромированным покрытием - сталь с хромированным покрытием - алюминий (педаль) - поливинилхлорид (подлокотники, обивка)

