

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ДОКТОР МЕБЕЛЬ»

Якимов Ю.В.

2023 г.



МОЙКА ПОДВЕСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

по ТУ 32.50.30-020-69573749-2021

Руководство по эксплуатации

ДМ.69573749.020.РЭ

Дата последнего пересмотра: 18.01.2023 г.

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13
3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
5 УТИЛИЗАЦИЯ	18
6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ	19
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	20
8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	21
9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	24
ПРИЛОЖЕНИЕ В	25
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	28
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	30

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Мойка подвесная медицинская по ТУ 32.50.30-020-69573749-2021» (далее – мойка) предназначенное для тщательной очистки и отмыывания ладоней, пальцев, ногтей и предплечий рук хирургического медперсонала перед операциями и процедурами требующими асептических условий проведения во избежание перекрестного заражения в различных специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические отделения, клиничко-диагностические и бактериологические лаборатории, а также в санитарных пропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах), в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Область применения: Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20.

Мойка предназначена для использования квалифицированным медицинским персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Показания к применению мойки: Тщательная очистка и отмыывание ладоней, пальцев, ногтей и предплечий рук хирургического медперсонала перед операциями и процедурами, требующими асептических условий проведения во избежание перекрестного заражения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Противопоказания к применению мойки: Не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением мойки по назначению: Не выявлены.

Риски применения мойки: Анализ рисков применения был произведен ООО «Доктор мебель» в полном объеме и представлен в Файле менеджмента

риска. Меры по снижению рисков применения мойки приведены в мерах предосторожности.

Мойка изготавливается в вариантах исполнения ДМ-6-111-01, ДМ-6-111-02, ДМ-6-111-07, ДМ-6-111-08 и представляет собой жесткую каркасную конструкцию из гнутого шлифованного нержавеющей листа. Мойка одноместная или двухместная, каждое место оборудуется смесителем локтевым и двумя диспенсерами автоматическими сенсорными для дезинфицирующего средства и для жидкого мыла. Мойка артикула ДМ-6-111-08 имеет встроенный фартук от брызг. Мойка крепится на стену.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508 и Приказу Минздрава РФ от 6 июня 2012 г. № 4н.

Перечень документов, на которые даны ссылки данным руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Внешний вид мойки приведен в Приложении Б.

Технические рисунки мойки геометрически сложной формы и смесителя приведены в Приложении В.

Список вариантов исполнения приведен в Приложении Г

Схема подключения мойки приведена в Приложении Д.

Расшифровка применяемых в маркировке символов приведена в Приложении Е.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики

1.1.1 Мойка изготавливается в вариантах исполнения согласно Приложению Б. Внешний вид мойки приведен в Приложении Б.

1.1.2 Функциональные размеры мойки приведены ниже.

Мойка артикул ДМ-6-111-01:

Размеры чаши мойки: длина составляет 745 ± 4 мм;

Высота смесителя от верхней горизонтальной плоскости чаши мойки 285 ± 12 мм, регулировка высоты осуществляется с помощью эксцентрика;

Диаметр отверстий под смеситель 25 ± 2 мм;

Межосевое расстояние выходов под смеситель 150 ± 10 мм;

Габаритные размеры чаши мойки в поперечном сечении представлены на рисунке В1 Приложения В.

Мойка артикул ДМ-6-111-02:

Размеры чаши мойки: длина составляет 1500 ± 4 мм.

Высота смесителя от верхней горизонтальной плоскости чаши мойки 285 ± 12 мм, регулировка высоты осуществляется с помощью эксцентрика;

Диаметр отверстий под смеситель 25 ± 2 мм;

Межосевое расстояние выходов под смеситель 150 ± 10 мм;

Габаритные размеры чаши мойки в поперечном сечении представлены на рисунке В1 Приложения В.

Мойка артикул ДМ-6-111-07:

Линейные размеры чаши мойки и форма приведены на рисунке В2 Приложения В;

Высота смесителя от верхней горизонтальной плоскости чаши мойки 265 ± 12 мм, регулировка высоты осуществляется с помощью эксцентрика;

Диаметр отверстий под смеситель 25 ± 2 мм;

Межосевое расстояние выходов под смеситель 150 ± 10 мм.

Мойка артикул ДМ-6-111-08:

Линейные размеры чаши мойки и форма фартука приведены на рисунке В3 Приложения В;

Высота смесителя от верхней горизонтальной плоскости чаши мойки 265 ± 12 мм, регулировка высоты осуществляется с помощью эксцентрика;

Диаметр отверстий под смеситель 25 ± 2 мм;

Межосевое расстояние выходов под смеситель 150 ± 10 мм.

1.1.3 Габаритные размеры и масса мойки в сборе приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Габаритные размеры мойки, (Ширина*Глубина*Высота), мм, ± 4 мм	Масса мойки, кг, ± 10 %
ДМ-6-111-01	845x600x1240	26
ДМ-6-111-02	1600x600x1240	46
ДМ-6-111-07	845x600x900	47
ДМ-6-111-08	900x705x900	40

1.1.4 Мойка оснащена подвесом для установки на стену.

1.1.5 Конструкция мойки обеспечивает уклон дна чаши к выпускному отверстию, обеспечивающий полный слив воды через выпуск.

1.1.6 Поверхности мойки устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113(Глутарал, Глутарал-Н, Бианол, Аламинол, Сайдекс, Гигасепт ФФ, Лизоформин 3000, Дезоформ, Альдазан 2000, Секусепт-форте, Септодорфорте и др.) 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства ("Прогресс", "Астра", "Айна", "Лотос", "Маричка", Россия) по ГОСТ 25644..

1.1.7 Средний срок службы мойки до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы мойки.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

Сведения о материалах и покупных изделиях

1.1.8 Мойка изготовлена из следующих материалов:

1.1.9 Мойка артикулов ДМ-6-111-01, ДМ-6-111-02 и корпус мойки артикулов ДМ-6-111-07, ДМ-6-111-08 изготовлены из шлифованного листа из высоколегированной нержавеющей стали марки AISI 304 или стали коррозионностойкой, жаропрочной, марки 08X18H10.

1.1.10 Чаша мойки артикулов ДМ-6-111-07, ДМ-6-111-08 изготовлена из литьевого мрамора.

1.1.11 Мойка укомплектована смесителем локтевым. Смеситель соответствует по размерам рисунку В4 Приложения В. Смеситель комплектуется гибкой подводкой диаметром 1/2", длиной 1м с допустимым отклонением $\pm 5\%$.

1.1.12 Мойка укомплектована сифоном сливным. Сливной сифон укомплектован гибкой гофрированной трубой диаметром 40/50 мм длиной 800 мм с допустимым отклонением $\pm 5\%$.

1.1.13 Мойка укомплектована двумя дозаторами автоматическим сенсорным для дезинфицирующего средства и для жидкого мыла. Характеристики дозатора автоматического сенсорного приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметр	Значение
Материал корпуса	Ударопрочный диэлектрический пластик
Габаритные размеры (Ширина*Глубина*Высота), мм, $\pm 10\%$	125 x 132 x 260
Масса, г	800
Объем, мл	1000-1400
Тип сенсора	Инфракрасный
Расстояние срабатывания сенсора, см	10-25
Тип питания	От батареек
Батарейки	Тип АА, 6 шт
Долговременность работы от батареек	3000 доз дезинфицирующего средства или жидкого мыла

Индикация низкого заряда батарей	Присутствует световой индикатор
----------------------------------	---------------------------------

Параметр	значение
Материал корпуса	Ударопрочный диэлектрический пластик
Габаритные размеры, (Ширина*Глубина*Высота), мм, $\pm 10\%$	100 x 90 x 190
Масса, г	430
Объем, мл	500
Тип сенсора	Инфракрасный
Расстояние срабатывания сенсора, см	10-25
Долговечность сенсора, срабатываний	100000
Долговечность дозатора, доз	100000
Тип питания	От батареек
Батарейки	Тип АА - 4 шт
Долговременность работы от батареек	3000 доз дезинфицирующего средства или жидкого мыла

Комплектность

1.1.14 В комплект поставки мойки входят:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Мойка одного артикула в соответствии с Приложением Б | 1 шт.; |
| 2 Руководство по эксплуатации ДМ.69573749.020.РЭ | 1 шт.; |
| 3 Смеситель | от 1 до 2 шт. (при необходимости); |
| 4 Гибкая подводка | от 2 до 4 шт. (при необходимости); |
| 5 Сифон сливной | от 1 до 2 шт. (при необходимости); |
| 6 Гибкая гофрированная труба | от 1 до 2 шт. (при необходимости); |
| 7 Дозатор автоматический сенсорный | от 2 до 4 шт. (при необходимости); |
| 8 Эксплуатационная документация к дозатору автоматическому сенсорному | 1 шт (при необходимости). |

1.1.15 Мойка поставляется в собранном виде. Сборка мойки должна осуществляться только представителями предприятия-изготовителя.

Упаковка

1.1.16 Перед упаковкой поверхности мойки подвергаются обезжириванию и консервированию по группе II-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

1.1.17 Потребительская упаковка должна представлять собой ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142, оклеенный клейкой лентой. Мойка оборачивается стрейтч-плёнкой из полиэтилена по ГОСТ 10354, на углах устанавливаются уголки из полиуретана по ГОСТ 34376.1 либо трубка из пенополиэтилена по ГОСТ Р 56729, затем мойка упаковывается в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Изнутри ящик должен быть выложен упаковочной бумагой по ГОСТ 515, по ГОСТ 8828 или по ГОСТ 8273 или гофрированным картоном марки "Т-22" по ГОСТ Р 52901 для предотвращения самопроизвольного перемещения мойки внутри упаковки при транспортировании.

1.1.18 Не установленные на мойку детали (механизмы, крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация упакованы в пакет из полиэтилена и затем помещены в потребительскую упаковку вместе со мойкой.

1.1.19 Дозатор автоматический сенсорный упакован согласно технической документации производителя и помещен в потребительскую упаковку вместе с мойкой.

1.1.20 Для транспортирования мойки в потребительских упаковках помещают в деревянный ящик. Перед упаковкой в транспортный ящик потребительская упаковка со мойкой прокладывается поролоном. Для фиксации на углах транспортной упаковки устанавливаются уголки.

1.1.21 Мойка может транспортироваться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

1.1.22 На транспортную и/или потребительскую упаковку прикреплен упаковочный лист, на котором указано:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование мойки;
- количество мест;
- условные номера упаковщика и контролера;
- дата упаковывания.

Массогабаритные характеристики упаковки

Артикул изделия	Габаритные размеры потребительской упаковки, мм, $\pm 10\%$	Вес изделия в потребительской упаковке, кг, $\pm 10\%$	Габаритные размеры транспортной упаковки, мм, $\pm 10\%$	Вес изделия в транспортной упаковке, кг, $\pm 10\%$	Количество упаковочных мест, $\pm 10\%$
ДМ-6-111-01	950x700x1300	34,6	1070x820x1360	91	1
ДМ-6-111-02	1700x700x1300	54,6	1820x820x1360	129	1
ДМ-6-111-07	950x700x950 1070x820x460	24,6	1010x760x1010 1070x820x460	62,4	2
ДМ-6-111-08	1000x550x950 1120x820x460	25,6	1060x610x1010 1120x820x460	54,4	2

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование мойки должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

2.1.1 Размещение и крепление упаковок со мойками в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

2.1.2 Транспортирование мойки крытыми транспортными средствами должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от минус 50 до плюс 50 °С;

Относительная влажность до 100 % при температуре плюс 25 °С.

Мойка должен храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

2.1.3 Хранение мойки должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 5 до плюс 40 °С;

Относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2.1.4 Хранение мойки в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию или разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мойка предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях специализированных медицинских помещений с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические отделения, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории, а также в санитарных пропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах.) в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Поверхности мойки не предназначены для контакта с телом человека для достижения заявленной эффективности в рамках установленного производителем специфичного медицинского назначения.

Эксплуатация мойки должна осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С;

Относительная влажность до 80 % при плюс 25°С.

Меры предосторожности при применении мойки

Мойка предназначена для применения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20, при обращении с мойкой необходимо пользоваться защитными медицинскими перчатками.

Мойка должна быть использована только по прямому назначению.

Мойка должна быть закреплена на несущей стене.

Запрещается вставать и/или садиться на мойку.

Запрещается использовать мойку, если имеются механические повреждения таких частей мойки, как чаша мойки, сливной сифон, смеситель, дозатор автоматический сенсорный.

Запрещено монтировать на мойке дополнительное оборудование или электрические розетки.

Указания по эксплуатации дозатора автоматического сенсорного

Перед применением необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на дозатор автоматический сенсорный.

Питание дозатора автоматического сенсорного допускается только от комплекта 6 батареек АА.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается подключать дозатор автоматический сенсорный к сети питания, используя адаптер питания, входящий в комплект дозатора.

При применении дозатора автоматического сенсорного допускается использование только дезинфицирующих средств с вязкостью не выше вязкости воды ($1,004 \times 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}$). Использование дозатора автоматического сенсорного с жидким мылом, шампунем, гелем или другими густыми жидкостями не допускается и может привести к поломке дозатора.

При наполнении дозатора автоматического сенсорного необходимо следить за отсутствием пролива дезинфицирующего средства внутрь корпуса дозатора.

Объем заливаемого в дозатор дезинфицирующего средства не должен превышать 1200 мл.

Необходимо регулярно осматривать дозатор на предмет наличия потеков дезинфицирующего средства, неисправностей, механических повреждений целостности изоляции на дозаторе автоматическом сенсорном.

В случае, если индикатор низкого заряда постоянно светится, необходимо в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на дозатор автоматический сенсорный удалить старый комплект из 6 батареек АА и установить новый. Не допускается производить частичную замену комплекта батареек.

Меры предосторожности при обнаружении неисправностей

При обнаружении неисправностей, механических повреждений целостности изоляции на дозаторе автоматическом сенсорном, а также при возникновении посторонних звуков (электрического треска), искр и иных свидетельств нарушения электробезопасности необходимо немедленно

прекратить использование мойки до устранения риска поражения электрическим током и обратиться к предприятию-изготовителю.

При обнаружении протечек, нарушений герметичности частей мойки, подключенных к водопроводу и канализации, необходимо незамедлительно отключить мойку от водоснабжения, освободить мойку от нагрузки и обратиться к предприятию-изготовителю.

При возникновении вопросов, связанных с безопасным применением мойки, необходимо обращаться к предприятию-изготовителю.

Порядок установки мойки

Мойка поставляется в собранном виде. Сборка мойки должна осуществляться только представителями предприятия-изготовителя.

Установка мойки осуществляется в соответствии с Приложением Г.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка мойки

Перед применением мойки ее поверхности должны быть подвергнуты предварительной дезинфекции и высушены.

Уход за мойкой заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5 % раствор моющего средства по ГОСТ 25644.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки мойку следует насухо протереть.

Дезинфекция мойки

Дезинфекцию наружных поверхностей мойки проводят путем однократного протирания поверхностей мойки по МУ 287-113(Глутарал, Глутарал-Н, Бианол, Аламинол, Сайдекс, Гигасепт ФФ, Лизоформин 3000, Дезоформ, Альдазан 2000, Секусепт-форте, Септодорфорте и др.) 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства ("Прогресс", "Астра", "Айна", "Лотос", "Маричка", Россия) по ГОСТ 25644..

Дезинфекцию мойки следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей мойки биологическими жидкостями и потенциально контаминированными веществами.

Мойка является нестерильной и не предназначена для стерилизации.

• Технические обслуживание

Техническое обслуживание смесителя, подключенных к водопроводу и канализации частей мойки осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Мойка подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

Мойка, не имевшая контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически безопасным медицинским отходам и должна утилизироваться совместно с твердыми коммунальными отходами.

Мойка, имевшая контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически опасным медицинским отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684-21 и перед утилизацией должна быть подвергнута дезинфекции. После соответствующей дезинфекции мойка может быть утилизирована совместно с твердыми коммунальными отходами.

Батарейки, использованные при применении дозатора автоматического сенсорного, должны быть утилизированы в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями к утилизации батарей, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе. Запрещается утилизация батареек совместно с твердыми коммунальными отходами.

**6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ**

ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские.
Общие технические условия»

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель . гарантирует соответствие мойки требованиям ТУ 32.50.30-020-69573749-2021 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и соблюдении мер предосторожности.

При нарушении мер предосторожности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок эксплуатации мойки составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения мойки составляет 5 лет.

Средний срок службы мойки до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы с мойки.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-
складская зона, строение № 82.

Рекламации, касающиеся качества мойки, отправлять по адресу:
info@doctormebel.ru

9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сервисное обслуживание и ремонт мойки осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих
технических условиях

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Внешний вид мойки

Рисунки определяют внешний вид, конструктивные особенности заданы отдельно.



Артикул: ДМ-6-111-01



Артикул: ДМ-6-111-02



Артикул: ДМ-6-111-07



Артикул: ДМ-6-111-08

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Технические рисунки

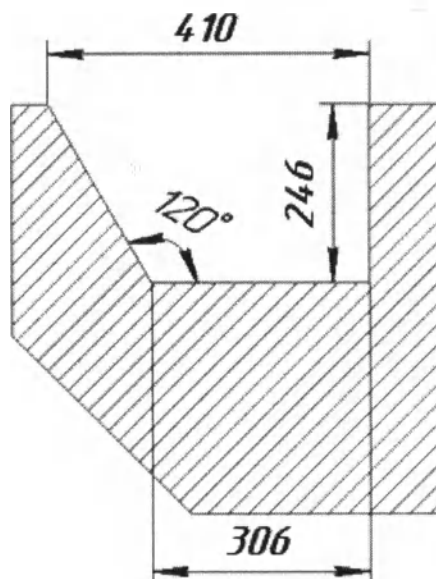


Рисунок В1 – Технический рисунок поперечного сечения мойки

ДМ-6-111-01 и ДМ-6-111-02

Допустимое отклонение линейных размеров ± 4 мм.

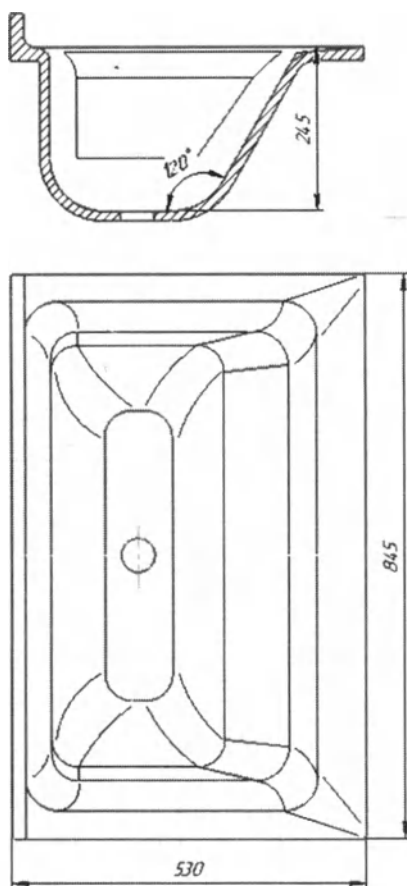


Рисунок В2 – Технический рисунок мойки ДМ-6-11-07

Допустимое отклонение линейных размеров ± 4 мм.

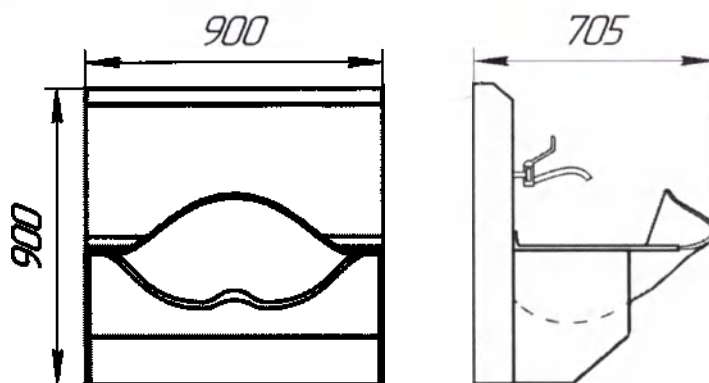


Рисунок В3 – Технический рисунок мойки ДМ-6-111-08

Допустимое отклонение линейных размеров ± 4 мм.

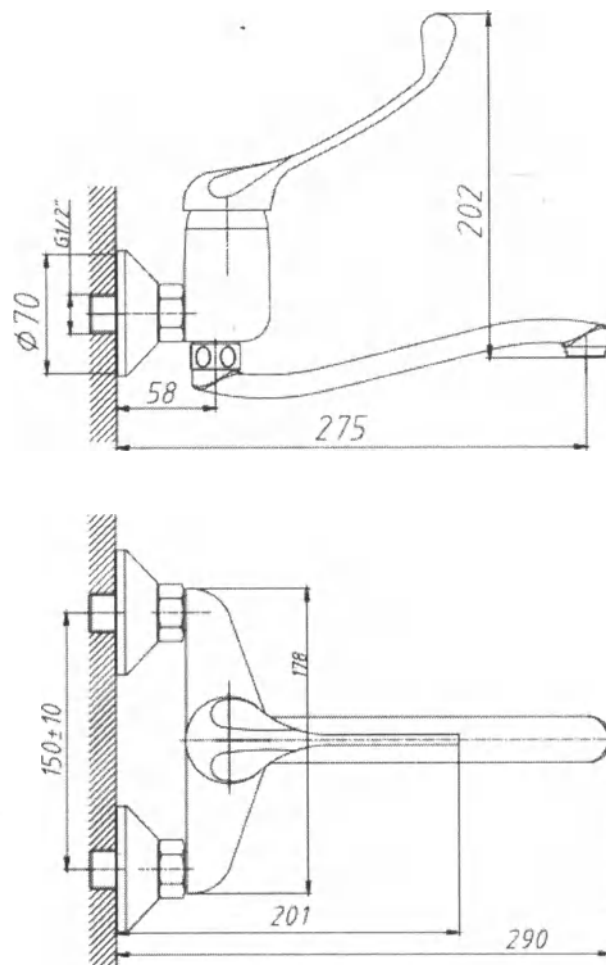


Рисунок В4 – Технический рисунок смесителя
Допустимое отклонение линейных размеров ± 4 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Перечень вариантов исполнения мойки

№ п.п.	Вариант исполнения	Обозначение конструкторского документа
1	Мойка подвесная медицинская по ТУ 32.50.30-020-69573749-2021 ДМ-6-111-01	ДМ-6.МКП.69573749.020.1
2	Мойка подвесная медицинская по ТУ 32.50.30-020-69573749-2021 ДМ-6-111-02	ДМ-6.МКП.69573749.020.2
3	Мойка подвесная медицинская по ТУ 32.50.30-020-69573749-2021 ДМ-6-111-07	ДМ-6.МКП.69573749.020.3
4	Мойка подвесная медицинская по ТУ 32.50.30-020-69573749-2021 ДМ-6-111-08	ДМ-6.МКП.69573749.020.4

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Схема установки мойки

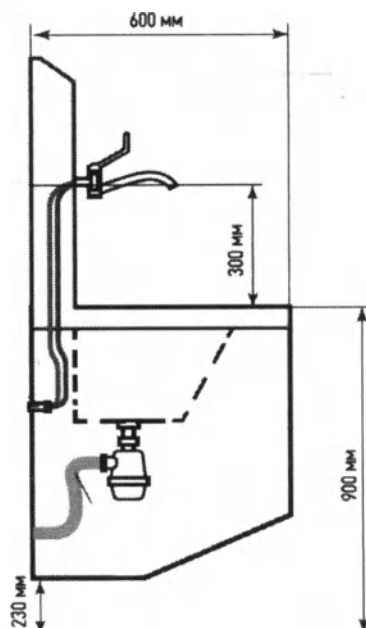


Рисунок Г1 – Схема установки мойки артикулов
ДМ-6-111-01 и ДМ-6-111-02

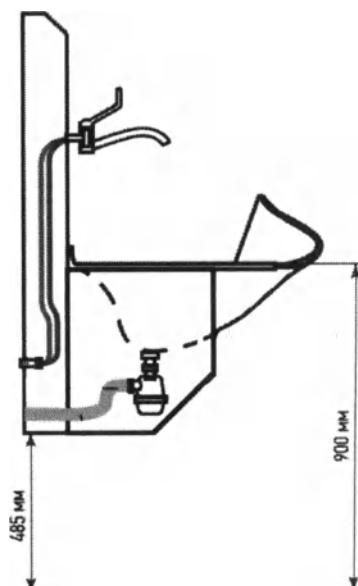


Рисунок Г2 – Схема установки мойки артикулов
ДМ-6-111-07 и ДМ-6-111-08

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Символы, применяемые в маркировке

Символ	Обозначение
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Знак соответствия при добровольной сертификации

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

130/тридцать листа(ов)

Генеральный директор

ООО «Доктор Мебель»

Якимов Ю. В.

