

Изготовитель: ООО «СКРИНИНГ-М», Россия, г. Москва.
Реагенты на подложке для экспресс-диагностики
наркотических соединений в моче
иммунохроматографическим методом

НВ-СКРИН

Только для *in vitro* диагностики.
Не подлежит обязательной сертификации.

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С


Изготовитель: ООО «СКРИНИНГ-М», 101000, Россия, г. Москва,
пер. Архангельский, д.9, стр.1, оф.6, телефон: (495) 829-70-56
Реагенты на подложке для экспресс-диагностики наркотических соединений в моче
иммунохроматографическим методом

НВ-СКРИН

Рег. №
ТУ 3298-011-0243794-2012

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Вскрыть упаковку реактивов и извлечь
полоску (полоску и держатель).
 2. Погрузить реактив строго вертикально
в мочу до уровня ограничительной линии
или 20-30 секунд для мочи 2-3 капли
мочи реактивкой «крутите окошко (окошки)»
кранового (для планшетного капельного типа).
 3. Оценить результат реакции визуально через 5 минут.
- Серия № 770412 Годен до: 04.2014 г.

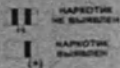

**МАРИХУАНА
АМФЕТАМИН
МОРФИН**

