

УТВЕРЖДАЮ

Специалист по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

И.А. Семина И.А. Семина

«15» *августа* 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

«Иглы ангиографические различных типоразмеров»

2010

Иглы ангиографические различных типоразмеров

Производители:

1. Cordis Europa N.V., Нидерланды
Oosteinde 8, 9301 LJ Roden, The Netherlands, Нидерланды
2. UNISIS Corp., Япония
5-14-3 Nishinipori, Arakawa-ku, Tokyo 116, Japan

Стерильно. Только для однократного применения. Повторно не стерилизовать.

Назначение: иглы ангиографические используются для пунктирования артерии при проведении рентгенэндоваскулярных процедур (введения контрастного вещества через ангиографический катетер).

Основные технические характеристики: иглы ангиографические выпускаются со стилетом или без стилета. Размеры 18G – 20G, внутренний просвет от 0,021 до 0,038 дюймов, длина от 50 мм до 70 мм. Со съемными крылышками или без них.

Каталожный номер	Размер	Длина, мм	Внутренний просвет, " (дюймы)
502-652	18 G	70	0,038
502-654	19 G	70	0,035
502-655	20 G	50	0,021
502-657	18 G	70	0,038
502-658	19 G	70	0,035
502-659	20 G	50	0,021

Противопоказания к применению: состояние пациента, препятствующее проведению рентгенэндоваскулярных процедур

Подготовка к работе изделия: иглы ангиографические готовы к использованию без специальной подготовки, поставляются в упаковке, обеспечивающей стерильность.

Порядок работы изделия:

Иглы ангиографические извлекают из упаковки в условиях, обеспечивающих сохранение стерильности изделия, пунктируют артерию, присоединяют ангиографический катетер и вводят рентгеноконтрастное средство. По окончании рентгенэндоваскулярной процедуры иглу удаляют.

Правила хранения и использования:

Иглы ангиографические служат для однократного использования. Хранить при температуре 25 °С, допустимое отклонение температуры от 15 °С до 30 °С.