

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»**



Осипова В.В.\

«21» ноября 2022 г.

Макет маркировки

**Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического
выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в
сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022**

2022

PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №1:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения:
2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.

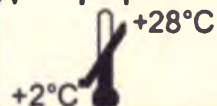

IVD



ПУ № XXX XXXX/XXXXX

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

HR-002/1.1



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД



Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

info@imbian.ru

Комплект 1

PSA-ИМБИАН-ИХА

**Флакон-капельница
с буферным раствором - 1 шт**

3 мл

IVD

+28°C
+2°C

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

LOT XXXXXX

REF HR-002/1.1



PSA-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

REF HR-002/1.1

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

+28°C
+2°C



PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №2:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 5 шт
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 5 шт
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 5 шт
2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция 1 шт

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.



ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

5 шт

1 шт

5 шт

5 шт

5 шт

1 шт



XXXXXX



HR-002/2.5



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД



Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

Комплект 2

PSA-ИМБИАН-ИХА

**Флакон-капельница
с буферным раствором - 1 шт**

3 мл

IVD



ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

LOT XXXXXX

REF HR-002/2.5



PSA-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

LOT XXXXXX


ГГГГ-ММ-ДД

REF HR-002/2.5

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

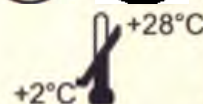

PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления *in vitro* специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №3:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 10 шт
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 10 шт
2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики *in vitro*.

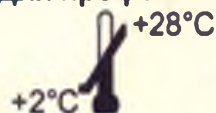

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

10 шт

1 шт



XXXXXX

10 шт



HR-002/3.10

10 шт



ГГГГ-ММ-ДД

10 шт



ГГГГ-ММ-ДД

1 шт



Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

Комплект 3

PSA-ИМБИАН-ИХА

**Флакон-капельница
с буферным раствором - 1 шт**

3 мл

IVD

+28°C
+2°C

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

LOT XXXXXX

REF HR-002/3.10



PSA-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

REF HR-002/3.10

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

+28°C
+2°C



PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления *in vitro* специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №4:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения:
2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики *in vitro*.

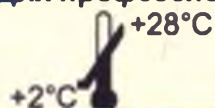

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

20 шт

1 шт



XXXXXX

20 шт



HR-002/4.20

20 шт



ГГГГ-ММ-ДД

20 шт



ГГГГ-ММ-ДД

1 шт

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru


Комплект 4

PSA-ИМБИАН-ИХА

**Флакон-капельница
с буферным раствором - 1 шт**

3 мл

IVD

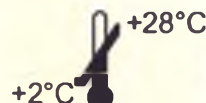

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

LOT XXXXXX

REF HR-002/4.20



PSA-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

REF HR-002/4.20

ГГГГ-ММ-ДД



IVD



PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №5:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения:
2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.

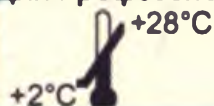

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

25 шт

1 шт



XXXXXX

25 шт



HR-002/5.25

25 шт



ГГГГ-ММ-ДД

25 шт



ГГГГ-ММ-ДД

1 шт

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7


8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

PSA-ИМБИАН-ИХА

**Флакон-капельница
с буферным раствором - 1 шт**

3 мл

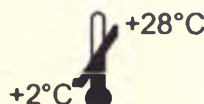

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

LOT XXXXXX

REF HR-002/5.25



PSA-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Тест-кассета - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

REF HR-002/5.25

ГГГГ-ММ-ДД

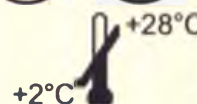

PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №6:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 50 шт
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 50 шт
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 50 шт
2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция 1 шт

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.

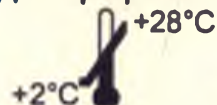

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

50 шт

1 шт



XXXXXX

50 шт



HR-002/6.50

50 шт



ГГГГ-ММ-ДД

50 шт



ГГГГ-ММ-ДД

1 шт



Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

PSA-ИМБИАН-ИХА

**Флакон-капельница
с буферным раствором - 1 шт**

3 мл

IVD



ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

LOT XXXXXX

REF HR-002/6.50



PSA-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

REF HR-002/6.50

ГГГГ-ММ-ДД



IVD



PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического выявления in vitro
специфического антигена предстательной железы
в сыворотке, плазме и цельной крови человека
«PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Количество
наборов

шт

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто

кг

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД

упаковки

REF XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Замораживать
не допускается!

+2°C



+28°C



Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

Транспортная упаковка


В.В. Осипова

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

14 лист об

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

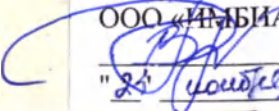 В.В. Осипов

"20" ноября 2022 г



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Осипова В.В.

«23» ноября 2022 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления
in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и
цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022


2022 г.

В состав наборов входят следующие компоненты:

Тест-кассета

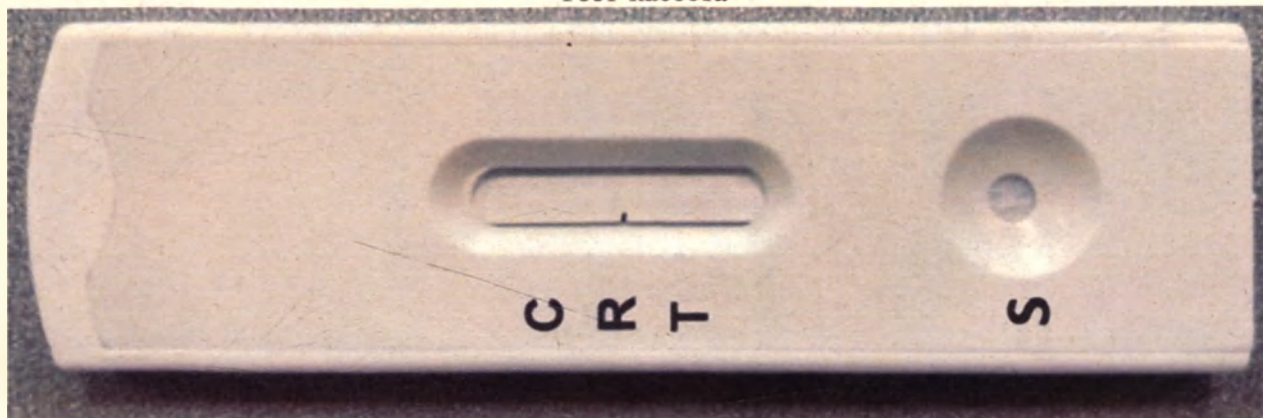

Индивидуальная фольгированная упаковка с осушителем для тест-кассеты

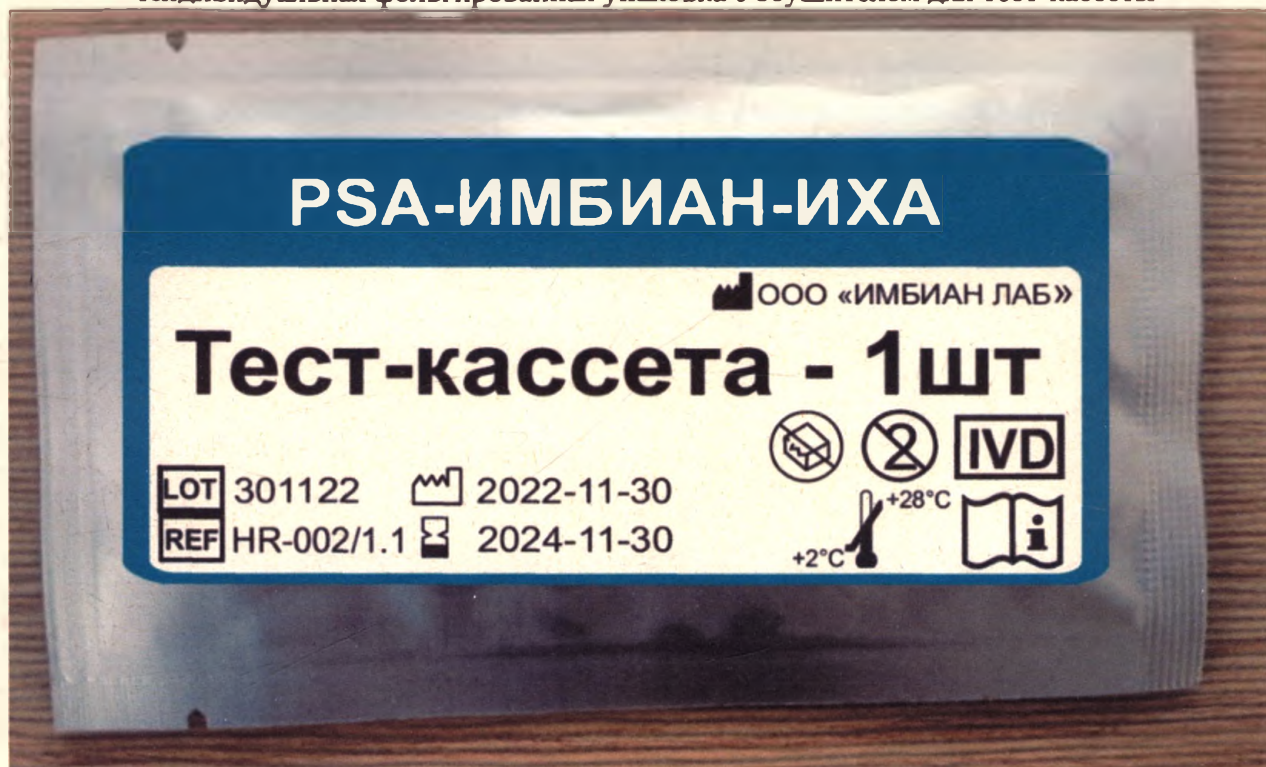

Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)



Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)



Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)



Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи

65*56 мм

только для наружного применения

СОСТАВ: салфетка из планлейса,
дезинфицирующая жидкость
(75% этиловый спирт,
5% изопропиловый спирт,
20% дистиллированная вода).

Антисептическая активность
подтверждена исследованием
ФБУН ГНЦ ВБ "ВЕКТОР"
Роспотребнадзора от 17.12.2018 г.



НАИМЕНОВАНИЕ: Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/822 от 02.03.2020 года
ПОКАЗАНИЯ: обработка кожи до и после инъекций; дезинфекция
рук медицинского персонала; обработка неповрежденной кожи вокруг ран).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "Нинбо Гринмед Медицинские Инструменты Ко., Лтд." Китай
NingboGreetmed Medical Instruments Co., Ltd., 18F-3, No 1 Building, Wante Business Centre,
Hi Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ИМПОРТЕР В РФ: ООО "Шаплин", г. Новосибирск, ул. Демазова, д. 30, оф. 901,
Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-02-23, 335-61-23

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие обладает дезинфицирующими свойствами! Не требует
стерилизации! Для одноразового использования! Не использовать при нарушении
целостности упаковки! Применять только в соответствии с инструкцией!

ХРАНЕНИЕ: Хранить закрытым при температуре от -10° до +30°C при относительной
влажности не более 80%.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления



: 202104



202104



4 6301012460897

PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №1:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0.25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.

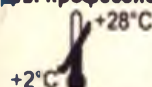

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

1 шт



301122

1 шт



HR-002/1.1

1 шт



2022-11-30

1 шт



2024-11-30

1 шт

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №2:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения:
2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.

+28°C
+2°C



ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

5 шт

1 шт

5 шт

5 шт

5 шт

1 шт

LOT

301122

REF

HR-002/2.5



2022-11-30



2024-11-30

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

Комплект №2

PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №3:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.

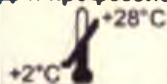

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

10 шт

1 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

1 шт



301122



HR-002/3.10



2022-11-30



2024-11-30



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №4:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (РУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения:
2. 65x56 (РУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.



РУ № XXX XXXX/XXXXXX

20 шт

1 шт

20 шт

20 шт

20 шт

1 шт



301122



HR-002/4.20



2022-11-30



2024-11-30

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

Комплект №4

PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №5:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.



ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

25 шт	LOT	301122
1 шт	REF	HR-002/5.25
25 шт		2022-11-30
25 шт		2024-11-30
1 шт		

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

Комплект №5

PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №6:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.

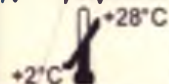

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

50 шт

1 шт

50 шт

50 шт

50 шт

50 шт

1 шт



301122



HR-002/6.50



2022-11-30



2024-11-30

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

Общий вид медицинского изделия
Комплект №1

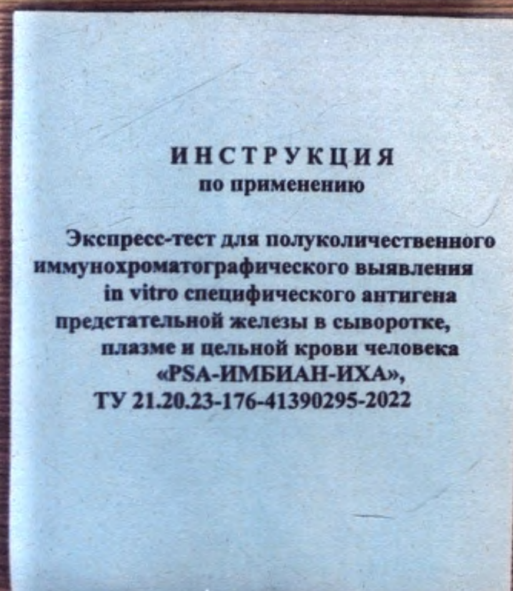

PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №2:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Гастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (РУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 85x56 (РУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.

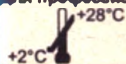

РУ № XXX XXXX/XXXXX

5 шт

1 шт

5 шт

5 шт

5 шт

1 шт



301122



HR-002/2.5



2022-11-30



2024-11-30

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

р.п. Колыцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54.

info@imbian.ru

PSA-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1шт

LOT 301122 HR-002/2.5

2022-11-30 2024-11-30

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022



PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления *in vitro* специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №3:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2.65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики *in vitro*.



ПУ № XXX XXXX/XXXXX

10 шт	LOT	301122
1 шт	REF	HR-002/3.10
10 шт		2022-11-30
10 шт		2024-11-30
1 шт		

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54.
info@imbian.ru

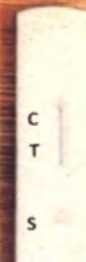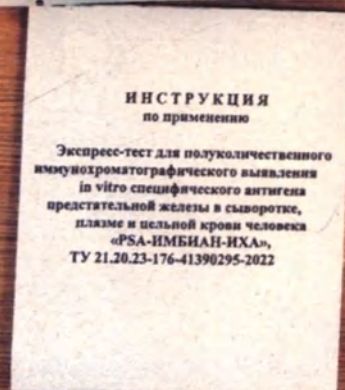

PSA- ИМБИАН- ИХА


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления *in vitro* специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект №4:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
3. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)
3. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (РУ № РЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Ineka варианты исполнения:
2. 65x56 (РУ № РЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики *in vitro*.

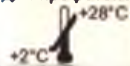

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

20 шт

1 шт

20 шт

20 шт

20 шт

20 шт

1 шт

LOT

301122

REF

HR-002/4.20

2022-11-30

2024-11-30

Imbian


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

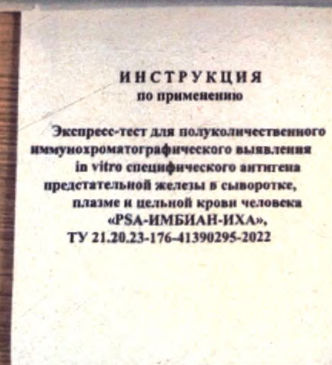

**PSA-
ИМБИАН-
ИХА**

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления in vitro специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

PY № XXX XXXX/XXXXXX

Комплект №3:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № ПЗН 2019/8912)
4. Лакшеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № ПЗН 2013/1213)
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Injekta варианты исполнения:
2. 65x56 (ПУ № ПЗН 2013/822)
5. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики in vitro.

25 WT		301122
1 WT		
25 WT		HR-002/5.25
25 WT		2022-11-30
25 WT		2024-11-30
1 WT		




Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imblan.ru

info@imblan.ru

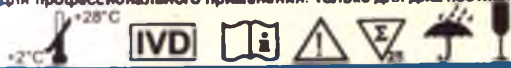

PSA-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления *in vitro* специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

Комплект ИМЕ:

1. Тест-кассета
2. Буферно-капельница с буферным раствором (3 мл)
3. Пипеточные градуированные полимерные ИМБИАН по ТУ 32.50.50-028-29508 133-2019
4. Палочки для переноса жидкостей (Палестер), 0.25 мл (РУ № РЗН 201908912)
5. Палочки одноразовые I/CHECK: AUTO SAFETY 2.8 мм (РУ № РЗН 2013/1213)
6. Салфетки дезинфицирующие спиртовые одноразовые Imbian варианты исполнения: 2. 65x56 (РУ № РЗН 2013/822)
7. Инструкция

Готово к использованию.

Для профессионального применения. Только для диагностики *in vitro*.

+28°C
+2°C

IVD

И

Σ

Σ

Σ

Σ

РУ № XXX XXXX/XXXXX

50 шт

1 шт

50 шт

50 шт

50 шт

50 шт

1 шт

LOT

REF

EXP

EXP

EXP

EXP

EXP

301122

HR-002/6 50

2022-11-30

2024-11-30

2024-11-30

2024-11-30

2024-11-30

Imbian


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630539, Новосибирская область,

р.п. Колыцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54;

info@imbian.ru

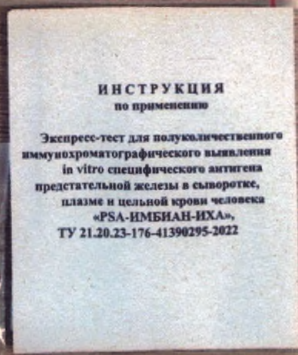

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического выявления *in vitro* специфического антигена предстательной железы в сыворотке, плазме и цельной крови человека «PSA-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

**PSA-
ИМБИАН-
ИХА**

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического выявления *in vitro*
специфического антигена предстательной железы
в сыворотке, плазме и цельной крови человека
«PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Количество
наборов

шт

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто кг

LOT 301122



2022-11-30

упаковки

REF HR-002/1.1



2024-11-30

IVD

Замораживать
не допускается!

+2°C



+28°C



Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического выявления *in vitro*
специфического антигена предстательной железы
в сыворотке, плазме и цельной крови человека
«PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Количество
наборов

шт

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто

кг

LOT 301122



2022-11-30

упаковки

REF HR-002/2.5



2024-11-30

IVD

Замораживать
не допускается!

+2°C



+28°C



Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического выявления *in vitro*
специфического антигена предстательной железы
в сыворотке, плазме и цельной крови человека
«PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Количество
наборов

шт

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто

кг

LOT 301122



2022-11-30

REF HR-002/3.10



2024-11-30

IVD

Замораживать
не допускается!



+28°C



Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического выявления *in vitro*
специфического антигена предстательной железы
в сыворотке, плазме и цельной крови человека
«PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Количество
наборов

шт

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто

кг

LOT 301122



2022-11-30

упаковки

REF HR-002/4.20



2024-11-30

IVD

Замораживать
не допускается!

+2°C



+28°C



Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7

8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического выявления *in vitro*
специфического антигена предстательной железы
в сыворотке, плазме и цельной крови человека
«PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Количество
наборов

шт

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто кг

LOT 301122

 2022-11-30

упаковки

REF HR-002/5.25

 2024-11-30

IVD

Замораживать
не допускается!

+28°C




Imbian

 ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

PSA- ИМБИАН- ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического выявления *in vitro*
специфического антигена предстательной железы
в сыворотке, плазме и цельной крови человека
«PSA-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-176-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Количество
наборов

шт

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто

кг

LOT 301122

 2022-11-30

упаковки

REF HR-002/6.50

 2024-11-30

IVD

Замораживать
не допускается!

+28°C
 +2°C



Imbian

 ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

24 лист а

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"16" 10 2022 г.

