

09401

From Medbar Tıbbi Malzemeler Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Turkey

Operational documentation for Protective cases "Chevron" for medical devices, sterile, options in Russian.

Signature

RUŞEN DERYA DEMİRDÖĞÜ
English Translator Under Oath
Yeminli İngilizce Tercüman
Cumhuriyet Bulv. Cumhuriyet İş Merkezi No:25 K:6 D:6
Tel:(0232) 463 20 22 Gsm:0535 393 89 06 Konak /İZMİR
Kemeraltı V.D./Kemeraltı Tel: 0312 417 80 00 No:148 362 56

medbay
 1000 14th Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103
 Phone: (415) 774-1100 Fax: (415) 774-1101
 Telex: 155555 MEDBAY CA 94103
 Email: medbay@medbay.com

Başkanlık Hasan KUMRU

Tercümedir;
medbar içerikli antet
Roszdravnadzor
Medbar Tıbbi Malzemeler Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,Türkiye

Rusya federasyonundaki tıbbi cihaz kaydı için aşağıdaki belgeyi size gönderiyoruz.

"Chevron" tıbbi cihazlar için Rusçada steril, seçenekler ve koruma kılıfları için operasyonel dokümantasyon/belgeler.

Veriliş Tarihi: 15.03.2023

İmza
Ümit Ömer BARAN
Kaşe ve İmza

Tercüme edilmek üzere tarafıma ibraz edilen işbu asıl belgeyi İngilizceden Türkçeye tam ve doğru olarak tercüme ettiğimi beyan ederim.

Adres: Cumhuriyet Bulvarı Cumhuriyet İş Merkezi No.26 K.6 D.605 KONAK-İZMİR/ TÜRKİYE.
Tel/Faks : (+)90.232 483 20 22

Yeminli İngilizce Tercüman;
Ruşen Derya DEMİRDÖĞEN

RUŞEN DERYA DEMİRDÖĞEN
English Translator Under Oath
Yeminli İngilizce Tercüman
Cumhuriyet Bul. Cumhuriyet İş Mrk.No:26 Kat:6 D:605
Tel: 0232 483 89 99 Gsm: 0535 233 89 99 Konak/İZMİR
Kemeraltı V.D.(Kemeraltı Tax Dept) T.C./TR No: 134 362 581 36

İşbu asıl belgenin dair yeminli İngilizce Tercümanları olan Ruşen Derya DEMİRDÖĞEN tarafından İngilizceden Türkçeye tercüme edildiğini onaylıyorum.

İZMİR OTUZ BEŞİNCİ NOTERİ;
MURADİYE YAKIN



İşi ve mazaretine binaen
birinci derecede imza yetkili
Başkatip Hasan KUMRU

17 MART 2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Чехлы защитные «Шеврон» для медицинских изделий, стерильные, варианты исполнения»

производства *Medbar Tıbbi Malzemeler Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi* (Медбар
Тыбби Малземелер Туризм Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети). Турция

Версия 2

Наименование медицинского изделия

Чехлы защитные «Шеврон» для медицинских изделий, стерильные, варианты исполнения.

Наименования и адреса

	Наименование, адрес
Ответственный производитель	Medbar Tıbbi Malzemeler Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fatih Mah. 1142 Sok. No:35 Sarnıç Gaziemir - İzmir - Turkey, Турция
Разработчик	Medbar Tıbbi Malzemeler Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fatih Mah. 1142 Sok. No:35 Sarnıç Gaziemir - İzmir - Turkey, Турция
Производственные подразделения (площадки)	Medbar Tıbbi Malzemeler Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fatih Mah. 1142 Sok. No:35 Sarnıç Gaziemir - İzmir - Turkey, Турция
Уполномоченный представитель на территории РФ	ООО «БОЗОН», 125212, Москва, Выборгская ул., дом 16, строение 1, помещение №XV ком.11, этаж 5 Тел: +7(495) 937-33-97 e-mail: info@bozon.ru

Классификация медицинского изделия

Классификация	Класс
Класс потенциального риска применения	1
Продолжительность контакта	Нет контакта с организмом человека. Многократное использование не предусмотрено. Медицинскому персоналу необходимо работать только в защитных перчатках

Назначение

Предназначены для защиты от загрязнений, сохранения стерильности медицинского изделия и создания стерильного барьера между медицинским персоналом и оборудованием.

Показания

Чехлы защитные «Шеврон» предназначены для:

- защиты от загрязнений.
- сохранения стерильности медицинского изделия
- создания стерильного барьера между медицинским персоналом и оборудованием.

Побочные эффекты

Нет

Область применения медицинского изделия

Чехлы защитные «Шеврон» были разработаны и изготовлены только для использования профессиональными пользователями, получившими медицинское образование. Не предназначены для самостоятельного использования пациентами.

Противопоказания

Противопоказания, связанные с ненадлежащим использованием хирургических чехлов (покрытий):

- Перекрестная контаминация примеси в окружающую среду.
- Аллергенность
- Сенсибилизация.

Предупреждения

- Чехлы защитные «Шеврон» - это изделия, разработанные только для профессиональных пользователей. Не подходит для использования некомпетентными лицами.
- Перед началом использования следует проверить целостность стерильной упаковки.
- Следует убедиться, что после извлечения изделия из пакета соблюдены правила стерильности и асептики.
- Изделия не должны использоваться ни в каких иных целях, помимо указанных в инструкции.
- Чехол, использованный в операции, больше не должен использоваться при другой операции.
- После использования изделие недопустимо использовать вновь, выполнив повторную стерилизацию.
- Использование продукта за рамками указанной области применения недопустимо.

Описание изделия

Чехлы защитные «Шеврон» для медицинских изделий - это стерильные одноразовые медицинские изделия, обеспечивающие защиту медицинских приборов, сохранения стерильности медицинского изделия и создания стерильного барьера между медицинским персоналом и оборудованием.

Состав изделия

См. приложение 1.

Биосовместимость. Информация о материалах изделия.

См. Приложение 2.

Сведения о стерильности и кратности применения.

Чехлы защитные «Шеврон» являются стерильными, одноразовыми.

Срок годности

Чехлы защитные «Шеврон» следует использовать сразу после вскрытия. Срок годности изделия составляет 5 лет.

Условия транспортирования, условия хранения; условия применения/эксплуатации

	Условия эксплуатации	Условия транспортировки	Условия хранения
Температура (°C)	+5 до +35	+5 до +35	+5 до +35
Влажность, %	20 - 70	20 - 70	20 - 70

Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие.
Смотрите Приложение 3.

Требования к охране окружающей среды, сведения по утилизации или уничтожению.

После использования покрытие снять с медицинского оборудования. Использованные покрытия должны быть подвергнуты обязательной дезинфекции. Для дезинфекции использовать рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в соответствующих рекомендациях по их использованию.

Класс опасности отходов в соответствии с СанПиН 2.1 3684-21 – класс А. Использованные продезинфицированные покрытия собрать в одноразовую герметичную упаковку.

При наличии специальных установок отходы утилизируются в печах крупных мусоросжигательных заводов, при отсутствии установок - после дезинфекции вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов.

Гарантийные обязательства

Изделие не имеет гарантийного срока, поскольку это стерильное одноразовое устройство. Любой дефект, который выявлен потребителем, в пределах определенного срока годности при хранении продукта, должен быть направлен производителю вместе с возвращаемым устройством в качестве рекламации. О любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с устройством, следует сообщить в компанию производителя и компетентный регулирующий орган страны, в которой установлен пользователь и/или пациент.

Расшифровка символов:

Символ	Расшифровка
Шеврон	Торговый знак производителя
	Наименование изделия
	Производитель
	Знак соответствия основным требованиям директив и стандартов Европейского союза
	Использовать до
	Предел температуры
	Запрет на повторное применение
	Запрет на повторную стерилизацию

	Стерилизация оксидом этилена
	Дата изготовления
	Код серии
	Каталожный номер
	Обратитесь к инструкциям
	Не содержит DEHP
	Не содержит натуральный латекс
	Внимание!
	Беречь от влаги
	Беречь от воздействия солнечного света
	Не использовать при повреждении упаковки

Адрес для обращения потребителей на территории РФ

Наименование: ООО «БОЗОН»

Юридический адрес: 125212, Москва, Выборгская ул., дом 16, строение 1, помещение №XV ком.11, этаж 5

Тел : +7(495) 937-33-97

e-mail : info@bozon.ru

Чехлы защитные «Шеврон» для медицинских изделий, стерильные, варианты исполнения:

1. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 14x140 см (202-24/M03150);
2. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 14x250 см (202-06/M00012);
3. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 14x300 см (202-23/M03149);
4. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 18x250 см (202-13/M02200);
5. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 18x300 см (202-14/M02201);
6. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 14x250 см (202-33/M02485);
7. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 14x300 см (202-34/M02486);
8. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 18x250 см (202-35/M02323);
9. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 18x300 см (202-36/M02487);
10. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 14x250 см (202-33WE/M03089);
11. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 14x300 см (202-34WE/M03154);
12. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 18x250 см (202-35WE/M03090);
13. Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 18x300 см (202-36WE/M03155);
14. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, 14x140 см (202-15/M02916);
15. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, 14x250 см (202-01/M00013);
16. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем с закрытой системой, 14x250 см (202-41/M02791);
17. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, 14x300 см (202-25/M02744);
18. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, 18x250 см (202-17/M02403);
19. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, 18x300 см (202-27/M02202);
20. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, эластичной вставкой, 14x250 см (202-07/M02187);
21. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, эластичной вставкой, 14x300 см (202-37/M02488);
22. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, эластичной вставкой, 18x250 см (202-20/M02489);
23. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, эластичной вставкой, 18x300 см (202-30/M02490);
24. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, эластичной вставкой, 14x250 см (202-07WE);
25. Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, эластичной

- 05/M00193);
61. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 75х60 см (222-08/M01811);
 62. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80х100 см (222-07/M01819);
 63. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80х145 см (291-04/M02232);
 64. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80х160 см (291-05/M02235);
 65. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80х60 см (222-06/M02435);
 66. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80х70 см (291-03/M02231);
 67. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80х45 см (M03314);
 68. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 90х60 см (222-01/M00185);
 69. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 90х75 см (291-23/M00188);
 70. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 91х91 см (291-30/M03012);
 71. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 95х85 см (291-32/M02877);
 72. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 90х110 см (291-31/M02722);
 73. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 90х130 см (227-02/M00205);
 74. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 30 см (291-09/M02224);
 75. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 40 см (227-18/M02225);
 76. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 50 см (291-10/M01946);
 77. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 55 см (227-07/M02820);
 78. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 60 см (291-11/M01945);
 79. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 65 см (227-01/M00204);
 80. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 70 см (291-12/M02119);
 81. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 80 см (291-13/M02228);
 82. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 90 см (227-22/M02229);
 83. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 100 см (227-19/M02230);
 84. Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 140 см (227-23/M02443);
 85. Чехол для напольного переключателя, 40х45 см (M03315);
 86. Чехол для микроскопа 48 мм, 115х225 см (204-27/M02207);
 87. Чехол для микроскопа 48 мм, 115х267 см (204-83/M02786);

- 138. Чехол для микроскопа 68 мм, 137х267 см (204-64/M02621);
- 139. Чехол для микроскопа 68 мм, 137х305 см (204-65/ M03201);
- 140. Чехол для микроскопа 68 мм, 137х381 см (204-66/M02551);
- 141. Чехол для микроскопа 68 мм, 137х391 см (204-67);
- 142. Чехол для микроскопа 68 мм, 137х400 см (204-68);

Варианты исполнения	Материал	Производитель	Поставщик	Страна поставщика
Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 14x140 см (202-24/M03150);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • Ekiniz	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 14x250 см (202-06/M00012);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • Ekiniz	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 14x300 см (202-23/M03149);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • Ekiniz	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 18x250 см (202-13/M02200);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • Ekiniz	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры, без картонного держателя, 18x300 см (202-14/M02201);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • Ekiniz	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 14x250 см (202-33/M02485);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Эластичный наконечник: Синий термопластичный эластомер	• Petkim • Ekiniz • VreeBerg	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj • VreeBerg BV	• Турция • Нидерланды (VreeBerg BV)
Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 14x300 см (202-34/M02486);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Эластичный наконечник: Синий термопластичный эластомер	• Petkim • Ekiniz • VreeBerg	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj • VreeBerg BV	• Турция • Нидерланды (VreeBerg BV)
Чехол, телескопически сложенный для эндоскопической камеры с эластичной вставкой, без картонного держателя, 18x250 см (202-35/M02323);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Эластичный наконечник: Синий термопластичный эластомер	• Petkim • Ekiniz • VreeBerg	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj • VreeBerg BV	• Турция • Нидерланды (VreeBerg BV)

202-01/M00013);	полиэтилен LDPE			
• Картонный держатель: картон (PAP)	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем с закрытой системой, 14x250 см (202- 41/M02791);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция
• Картонный держатель: картон (PAP)	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
• Система фиксации: : акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)	• LG-HI121	• Asil Plast		
Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, 14x300 см (202-25/M02744);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция
• Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
• Картонный держатель: картон (PAP)	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, 18x250 см (202-17/M02403);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция
• Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
• Картонный держатель: картон (PAP)	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, 18x300 см (202-27/M02202);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция
• Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
• Картонный держатель: картон (PAP)	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, эластичной вставкой, 14x250 см (202-07/M02187);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция
• Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		• Нидерланды (VreeBerg BV)
• Картонный держатель: картон (PAP)	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
• Эластичный наконечник: Синий термопластичный эластомер	• VreeBerg	• VreeBerg BV		
Чехол для эндоскопической камеры с картонным держателем, эластичной вставкой, 14x300 см (202-37/M02488);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция
• Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		• Нидерланды (VreeBerg BV)
• Картонный держатель: картон (PAP)	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj		
• Эластичный наконечник: Синий термопластичный эластомер	• VreeBerg	• VreeBerg BV		
Чехол для эндоскопической камеры с картонным	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция
				• Нидерланды

rg BV	• Картонный держатель: картон (PAP) • Эластичный наконечник: Натуральный термопластичный эластомер	• Ekiniz • VreeBerg	• Ekiniz Ambalaj • VreeBerg BV	
Чехол для эндоскопической камеры с пластиковым кольцом, 14x250 см (202-02/M00008);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Наружное кольцо: Полипропилен (PP) • Внутреннее кольцо: Полипропилен (PP)	• Petkim • Ekiniz • Sabic • Sabic	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj • Batı Polimer • Batı Polimer	• Турция
Чехол для эндоскопической камеры с пластиковым кольцом и эластичной вставкой, 14x250 см (202-09/M02286);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Кольцевая часть: Полипропилен (PP) • Эластичный наконечник: Синий термопластичный эластомер	• Petkim • Ekiniz • Sabic • VreeBerg	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj • Batı Polimer • VreeBerg BV	• Турция • Нидерланды (VreeBerg BV)
Чехол для эндоскопической камеры с пластиковым кольцом и белой эластичной вставкой, 14x250 см (202-09WE/M03072);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Наружное кольцо: Полипропилен (PP) • Внутреннее кольцо: Полипропилен (PP) • Эластичный наконечник: Натуральный термопластичный эластомер	• Petkim • Ekiniz • Sabic • Sabic • VreeBerg	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj • Batı Polimer • Batı Polimer • VreeBerg BV	• Турция • Нидерланды (VreeBerg BV)
Чехол для эндоскопической камеры, в форме «гармошка», 14x250 см (202-21/M02455);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Картонный держатель: картон (PAP) • Базовый синий краситель-015	• Petkim • Ekiniz • Renkplast	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj • Renkplast	• Турция
Чехол для эндоскопической камеры, в форме «гармошка», 14x300 см (202-22/M02456);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Картонный держатель: картон (PAP) • Базовый синий краситель-015	• Petkim • Ekiniz • Renkplast	• Batı Polimer • Ekiniz Ambalaj • Renkplast	• Турция
Чехол для рентгена С-дуга с держателями, 75x90 см (2 шт./уп.) (227-	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция

	краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 - Зеленая лента чехла: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 - Наклейка – для надписи, зеленая : Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2			
Чехол для рентгена С-дуга, 75см и 42х220 см (227-38/M02809);	- Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE - Наклейка – маленькая стрелка, зеленая: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 - Зеленая лента чехла: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 - Наклейка – для надписи, зеленая : Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2	- Petkim - Ege Plastik	- Bati Polimer - Ege Plastik	Турция
Чехол для рентгена С-дуга, 100х188 см (227-24/M02526);	- Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE - Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	- Petkim - Ekiniz	- Bati Polimer - Ekiniz Ambalaj	Турция
Чехол для рентгена С-дуга, 60х90 см (291-06/M02236);	- Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE - Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	- Petkim - Ekiniz	- Bati Polimer - Ekiniz Ambalaj	Турция
Чехол для рентгена С-дуга, 90х225 см (227-09/M00213);	- Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE - Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	- Petkim - Ekiniz	- Bati Polimer - Ekiniz Ambalaj	Турция
Чехол для рентгена С-дуга, 90х250 см (227-20/M02238);	- Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE - Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	- Petkim - Ekiniz	- Bati Polimer - Ekiniz Ambalaj	Турция
Чехол для рентгена С-дуга, 90х275 см (227-21/M02239);	- Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE - Клейкая лента: Низкоплотный	- Petkim - Ekiniz	- Bati Polimer - Ekiniz Ambalaj	Турция

	оборудование, 102x152 см (291-26/M00190);	• Воротник: Ткань эластан	• MR Tekstil	• MR Tekstil	
ия	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 125x125 см (291-27/M00192);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
ия	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 60x120 см (222-03/M00191);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
ия	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 75x75 см (222-04/M00187);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 75x90 см (222-05/M00193);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 75x60 см (222-08/M01811);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
ия	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80x100 см (222-07/M01819);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80x145 см (291-04/M02232);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
ия	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80x160 см (291-05/M02235);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
я	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80x60 см (222-06/M02435);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
я	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80x70 см (291-03/M02231);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
я	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 80x45 см (M03314);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
	Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, 90x60 см	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • MR	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция

70 см (291-12/M02119);	• Воротник: Ткань эластан	Tekstil		
Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 80 см (291-13/M02228);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 90 см (227-22/M02229);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 100 см (227-19/M02230);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
Чехол плоскостной формы на медицинское оборудование, диаметр 140 см (227-23/M02443);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Воротник: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
Чехол для напольного переключателя, 40x45 см (M03315);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Эластичная лента: Ткань эластан	• Petkim • MR Tekstil	• Batı Polimer • MR Tekstil	• Турция
Чехол для микроскопа 48 мм, 115x225 см (204-27/M02207);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 48 мм, 115x267 см (204-83/M02786);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 48 мм, 117x225 см (204-	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция

Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 115x225 см (291-17/M02209);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 115x300 см (291-14/M02210);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 117x163 см (291-18/M02214);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 117x203 см (291-19/M02215);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik	• Турция

	полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	Plastik • Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj	
Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 122x225 см (204-02/M00027);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 122x260 см (204-75/M02897);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 122x300 см (204-09/M01566);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
• Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 132x225 см (291-22/M02222);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный	• Petkim • LG • Sabic	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer	• Турция

	• Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	
Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 132x400 см (204-41/M02378);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 137x267 см (204-50/M02546);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, скошенный, 137x305 см (204-51);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция

скошенный, 76x60 см 19 (293-04);	• Эластичная лента: Ткань эластан • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• MR Tekstil • LG • Sabic	• MR Tekstil • Resinex • Batı Polimer	
Чехол для микроскопа 65 мм, 115x225 см (291-16/M02208);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE: Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, 117x163 см (204-71/M02535);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE: Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, 117x203 см (204-72/M02536);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE: Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 65 мм, 117x225 см (204-30/M02213);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция

Чехол для микроскопа 65 мм, 130x225 см (204-33/M02221);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 68 мм, 115x225 см (204-28/M02211);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 68 мм, 115x305 см (204-55/M02577);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 68 мм, 117x225 см (204-31/M02218);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik	• Турция

	краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Ekiniz	• Ekiniz Ambalaj	
Чехол для микроскопа 68 мм, 132x225 см (204-34/M00223);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batu Polimer • Resinex • Batu Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 68 мм, 132x267 см (204-58);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batu Polimer • Resinex • Batu Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 68 мм, 132x305 см (204-59);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE, Зеленый краситель для растворителя LDPE Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batu Polimer • Resinex • Batu Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 68 мм, 132x381 см (204-60/M02578);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic	• Batu Polimer • Resinex • Batu Polimer	• Турция

	• Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE. Зеленый краситель для растворителя LDPE: Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	
Чехол для микроскопа 68 мм, 137x305 см (204-65/M03201);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE. Зеленый краситель для растворителя LDPE: Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 68 мм, 137x381 см (204-66/M02551);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE. Зеленый краситель для растворителя LDPE: Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 68 мм, 137x391 см (204-67);	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Линза: Поликарбонат • Держатель линз: Низкоплотный полиэтилен LDPE • Зеленый пояс: Низкоплотный полиэтилен LDPE. Зеленый краситель для растворителя LDPE: Green 3 C28-H22-N2-O2 • Клейкая лента: Низкоплотный полиэтилен LDPE	• Petkim • LG • Sabic • Ege Plastik • Ekiniz	• Batı Polimer • Resinex • Batı Polimer • Ege Plastik • Ekiniz Ambalaj	• Турция
Чехол для микроскопа 68	• Чехол: Низкоплотный полиэтилен	• Petkim	• Batı Polimer	• Турция

Перечень национальных стандартов РФ, которым соответствует медицинское изделие:

- ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»
- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»
- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»
- ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»
- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»
- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»
- ГОСТ 31209–2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний».
- ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»
- ОФС.1.2.4.0003.15. «Стерильность»
- ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» п.2
- МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»
- ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида» п. 6

2	TS EN ISO 10993-1	2018 г.	
	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 1: Оценка и тестирование в рамках процесса управления рисками		
3	TS EN 62366-1/AC	19.11.2018 г.	
	Медицинские устройства – Часть 1: Применение проектирования с учетом эксплуатационной пригодности к медицинским изделиям		
4	TS EN ISO 10993-5	13.07.2010 г.	
	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 5: Испытания на цитотоксичность «in vitro».		
5	TS EN ISO 10993-7/AC	15.04.2015 г.	
	Оценка биологического действия медицинских устройств - Часть 7: Остатки при стерилизации этиленоксидом.		
6	TS EN ISO 10993-10	29.04.2014 г.	
	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 10: Пробы на раздражение и аллергическую реакцию кожи		
7	TS EN ISO 10993-18	2020 г.	
	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 18: Химическая характеристика материалов		
8	TS EN ISO 11138-1	24.04.2017 г.	

16	TS EN ISO 14644-1	18.02.2016 г.	
	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Часть 1: Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц		
17	TS EN ISO 14644-2	03.01.2019 г.	
	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2: Мониторинг для приведения доказательств эффективности чистой комнаты в отношении чистоты воздуха по концентрации частиц		
18	TS EN ISO 14644-3	2019 г.	
	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3: Методы испытаний		
19	TS EN ISO 14644-4	20.04.2006 г.	
	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 4: Дизайн, конструкция и ввод в эксплуатацию		
20	TS EN ISO 14644-5	20.04.2006 г.	
	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 5: Эксплуатация		
21	TS EN ISO 14971	2020 г.	
	Медицинские устройства - Применение управления рисками к медицинским устройствам		
22	TS EN 1779/A1	25.04.2006 г.	
	Неразрушающий контроль - Контроль герметичности - Критерии выбора метода и техники; поправка A1		
23	TS EN 868-5	28.01.2019 г.	
	Упаковка медицинских устройств, стерилизуемых на завершающей стадии производства - Часть 5: Запечатываемые пакеты и рулоны пористых материалов и пластиковой пленки. Требования и методы испытаний.		
24	TS EN 1895/AC	26.01.2010 г.	
	Клеи для бумаги и картона, упаковок и одноразовых сантехнических изделий - Испытание на отслаивание под углом 180° - Испытание на Т-образное отслаивание для двух сопряженных гибких поверхностей		
25	TS EN ISO 14161	13.12.2011 г.	

34	TS EN ISO 22610	21.12.2006 г.	
	Хирургические простыни, халаты и костюмы чистого воздуха, используемые в качестве медицинских устройств для пациентов, клинического персонала и оборудования - Метод испытаний для определения устойчивости к проникновению бактерий во влажной среде		

28/28

/Логотип: «Медбар®» (Medbar ®)/

/Штамп: Т.Р.

35-я НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА Г. ИЗМИР

Ондер Чд. №: 111/1-А Газиемир – ИЗМИР

(Önder Cd. No.: 111/1-A Gaziemir – İZMİR)

Тел.: 0232 220 17 17/

/Штамп: 17 МАРТА 2023 Г./

/Штамп: 009401/

Кому: в Росздравнадзор

От: «Медбар Тыбби Малземелер Туризм Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Medbar Tibbi Malzemeler Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi), Турция

Направляем Вам следующий документ для регистрации медицинского изделия в Российской Федерации:

Эксплуатационная документация на **Чехлы защитные «Шеврон»** для медицинских изделий, стерильные, **варианты исполнения**, на русском языке.

Дата выдачи: 15.03.2023

Подпись

Умит Омер БАРАН (Ümit Ömer BARAN)

/Штамп: «МЕДБАР»

«МЕДБАР ТЫББИ МАЛЗЕМЕЛЕР ТУРИЗМ САН. ВЕ
ТИДЖ. А. Ш.»

Фатих Мах. 1142 Шокак №: 35 Сарнич Газиемир –
Измир

(Fatih Mah. 1142 Sok No.:35 Sarniç Gaziemir – İzmir –
Türkiye)

Тел.: 0232 281 60 03 -0232 281 66 47 Факс: 0232 281 66
48

№ в Централизованной системе государственной
регистрации (MERSIS): 0613089864800025 Рег.

№ плательщика НДС: 613 089 86 /неразборчиво//

/Подпись/

/Штамп: Рушен Дерья Демирдоген (Ruşen Derya
Demirdöğen)

Присяжный переводчик с/на английский язык
Джумхуриет Бульв. Джумхуриет Иш Меркези №: 26

К: 6 Д: 605 Конак/ИЗМИР
(Cumhuriyet Bulv. Cumhuriyet İş Merkezi No: 25 K: 6 D:
605 Konak/İZMİR)

Тел.: (0232) 483 20 22 Моб.: 0535 233 89 99

Налоговая служба Кемералты,
Ид. № налогоплательщика/Рег. № плательщика НДС:
134 362 581 36/

/Подпись/

/Гербовая печать: Т.Р. * 1923 * 35-Я НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА Г. ИЗМИР/

/Подпись/

/Штамп: Уполномоченное лицо с правом подписи первой степени

Глава Хасан Кумру (Hasan Kumru)/

1142 Шок. № 35 Сарнич Газиемир, Измир 35414 Турция
Номер в торговом реестре: 124515

www.medbar.com.tr
info@medbar.com.tr

+90 232 281 6003
+90 232 281 6647

/Неразборчиво/
+90 232 281 6648

Перевод;
фирменный бланк с логотипом «медбар»
Кому: в Росздравнадзор
От: «Медбар Тыббй Малземелер Туризм Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети», Турция

Направляем Вам следующий документ для регистрации медицинского изделия в Российской Федерации:

Эксплуатационная документация на Чехлы защитные «Шеврон» для медицинских изделий, стерильные, в вариантах исполнения, на русском языке.

Дата выдачи: 15.03.2023

Подпись
Умит Омер БАРАН
Печать и подпись

Я заявляю, что я полностью и точно перевел исходный документ, представленный мне для перевода, с английского языка на турецкий язык.

Адрес: Джумхуриет Булвари Джумхуриет Иш Меркези № 26 К. 6 Д. 605 КОНАК-ИЗМИР/ТУРЦИЯ
(Cumhuriyet Bulvarı Cumhuriyet İş Merkezi No.26 K.6 D.605 KONAK-İZMİR/ TÜRKİYE).
Тел/факс: (+)90.232 483 20 22

Присяжный переводчик с/на английский язык
Рушен Дерья Демирдоген

/Штамп: Рушен Дерья Демирдоген
Присяжный переводчик с/на английский язык
Джумхуриет Булв. Джумхуриет Иш Меркези №: 26 К: 6 Д: 605 Конак/ИЗМИР
Тел.: (0232) 483 89 99 Моб.: 0535 233 89 99
Налоговая служба Кемералты, Ид. № налогоплательщика/Рег. № плательщика НДС: 134 362 581 36/
/Подпись/

Я подтверждаю, что данный оригинальный документ был переведен с английского на турецкий язык Рушеном Дерья ДЕМИРДОГЕНОМ, одним из присяжных переводчиков с/на английский язык, работающим в моей конторе.

/Штамп: 009401/

Т.Р.
35-я НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА Г. ИЗМИР

/Гербовая печать: Т.Р. * 1923 * 35-Я НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА Г. ИЗМИР/
/Подпись/

/Штамп: Уполномоченное лицо с правом подписи
первой степени
Глава Хасан Кумру/

/Штамп: 17 МАРТА 2023 Г./

Перевод данного текста выполнен переводчиком Шоинбодовой Мархабо Пайшанбеевной.

**Российская Федерация
Город Москва**

Двадцатого апреля две тысячи двадцать третьего года

Я, Симонян Диана Артуровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Шоинбодовой Мархабо Пайшанбеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2023-18-3419

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Сим

Д.А. Симонян

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью 30 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

