

ИНСТРУКЦИЯ

по применению жгута для внутривенных манипуляций Arxmed

1. Назначение

Жгут венозный предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях тела при проведении манипуляций

2. Основные технические характеристики

2.1 Изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты;

2.2 Длина ленты в свободном состоянии взрослого 45 ± 2 см, детского 34 ± 2 см.;

2.3 Ширина ленты - 2,5 см.;

2 Подготовка и порядок работы изделия

2.1 Обернуть жгут вокруг конечности, не допуская перекручивания ленты и вставить защелку в корпус жгута;

2.2 Потянуть за свободный конец жгута с усилием для ограничения циркуляции венозной крови;

Внимание! Пульс на периферических артериях должен сохраняться! Во избежание использования жгута не по назначению, конструкция жгута рассчитана только на усилие достаточное для ограничения циркуляции венозной крови. При возникновении большего усилия защелка автоматически покидает корпус жгута.

2.3 Для ослабления петли нажать на край кнопки, обращенной к наконечнику;

2.4 Для освобождения ленты после проведения манипуляций нажать на кнопку, расположенную ближе к защелке и освободить защелку, давая возможность жгуту расстегнуться.


3. Правила хранения и использования

3.1. Изделия должно храниться при температуре от -30 до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности от 30% до 85 %, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и влаги.

3.2. Утилизация и обработка согласно ОСТа 42-21-2-81.

3.3 Срок годности 5 лет с даты изготовления указанной на упаковке

Коммерческий директор
ООО «МЕДИКОМ»

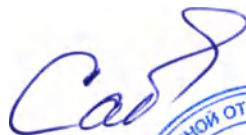

С. Н. Савосько