

ИНСТРУКЦИЯ

по применению зажима пупочного одноразового стерильного.

1. Назначение

Зажим пупочный одноразовый стерильный предназначен для пережатия пуповины у новорожденных

2. Основные технические характеристики

- 2.1 Изготовлен из прочного упругого стирола;
- 2.2 Механизм замка прочно фиксируется на пуповине;
- 2.3 Абсолютно биологически безопасен, атравматичный;
- 2.4 Стерилизован оксидом этилена.

2 Подготовка и порядок работы изделия

- 2.1 После пересечения пуповины между зажимами Кохера обработать культю пуповины на расстоянии 0,5- 1,0 см. от пупочного кольца 96% спиртом, выдавив пальцами предварительно остатки плацентарной крови
- 2.2 Вскрыть стерильную упаковку пупочного зажима
- 2.3 Наложить зажим на культю пуповины с полным ее охватом в поперечном направлении и сжать зажим до защелкивания замка (характерный щелчок)
- 2.4 Обрезать стерильными ножницами остатки культи пуповины по краю пупочного зажима;
- 2.5 Обработать край среза 5-10% раствором марганцовки
- 2.6 После отторжения культи пуповины вместе с пупочным зажимом через несколько дней, пупочное кольцо обработать 5-10% раствором марганцовки


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Только для однократного применения;
- Не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки;

3. Правила хранения и использования

- 3.1. Изделия должно храниться при температуре от - 30 до +45 °С и относительной влажности от 30% до 85 %, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и влаги.
- 3.2. Утилизация и обработка согласно ОСТа 42-21-2-81.
- 3.3 Срок годности 5 лет с даты изготовления указанной на упаковке

Коммерческий директор
ООО «МЕДИКОМ»

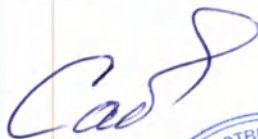

С. Н. Савосько

