

ИНСТРУКЦИЯ

по применению катетера Фолея

1. Назначение

Предназначен для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций

2. Основные технические характеристики

2.1. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом

2.2. Закрытый конец, 2 боковых отверстия

2.6. Стерилизован оксидом этилена

2.7. Катетеры Фолея имеют следующие размеры, длину и объем баллона в зависимости от размера:

По шкале Шарьера (Ch/Fr)	Внутренний диаметр ID (мм)	Внешний диаметр OD (мм)	Объем баллона (мл/куб.см)	Длина (мм)	Цвет
2-х ходовой					
6	1,1	2,0	3-5	280	розовый
8	1,7	2,7	3-5	280	черный
10	2,3	3,3	3-5	280	серый
12	2,8	4,0	30	400	белый
14	3,3	4,7	30	400	зеленый
16	3,8	5,3	30	400	оранжевый
18	4,5	6,0	30	400	красный
20	5,1	6,7	30	400	желтый
22	5,6	7,3	30	400	фиолетовый
24	6,2	8,0	30	400	синий
26	6,9	8,7	30	400	розовый
2-х ходовой женский					
12	2,8	4,0	30	260	белый
14	3,3	4,7	30	260	зеленый
16	3,8	5,3	30	260	оранжевый
18	4,5	6,0	30	260	красный
20	5,1	6,7	30	260	желтый
22	5,6	7,3	30	260	фиолетовый
24	6,2	8,0	30	260	синий
26	6,9	8,7	30	260	розовый
3-х ходовой					
16	3,8	5,3	30	400	оранжевый
18	4,5	6,0	30	400	красный
20	5,1	6,7	30	400	желтый
22	5,6	7,3	30	400	фиолетовый
24	6,2	8,0	30	400	синий
26	6,9	8,7	30	400	розовый

3. Подготовка и порядок работы изделия

- надеть перчатки
- взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу (4- 5см)
- свободный конец катетера захватить между 4-5 пальцами правой руки

- смазать вводимый конец катетера стерильным глицерином или стерильным вазелиновым маслом
- обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
- свободный конец опустить в ёмкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
- шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема (5мл. или 30 мл.) используя физиологический раствор или воздух
- по окончании выведения мочи шприцем убрать воздух или физраствор из фиксирующего баллона
- катетер извлечь, нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки
- промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном

ВНИМАНИЕ: При затруднении извлечения катетера вследствие невозможности аспирации воздуха или физиологического раствора из баллона катетера необходимо произвести пункцию иглой, сделать микронадрез ниже уровня клапана катетера или полностью отрезать клапан. Это способствует снижению давления в фиксирующем баллоне, и позволяют беспрепятственно извлечь катетер.

5. Правила хранения и использования

5.1. Изделия должно храниться при температуре от - 30 до +45 °С и относительной влажности от 30% до 85 % в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и влаги.

5.2. Перед применением изделия необходимо убедиться в целостности стерильной упаковки. Не применять при нарушенной упаковке и истечении срока годности.

5.3 Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке

5.3. Катетер является изделием однократного применения и подлежит утилизации после применения.

5.4 Утилизация и обработка согласно ОСТа 42-21-2-81

Коммерческий директор
ООО «МЕДИКОМ»



Н. Савосько