



Фото 1. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA, вариант исполнения SHOT OneStep-PB-96. Потребительская упаковка.

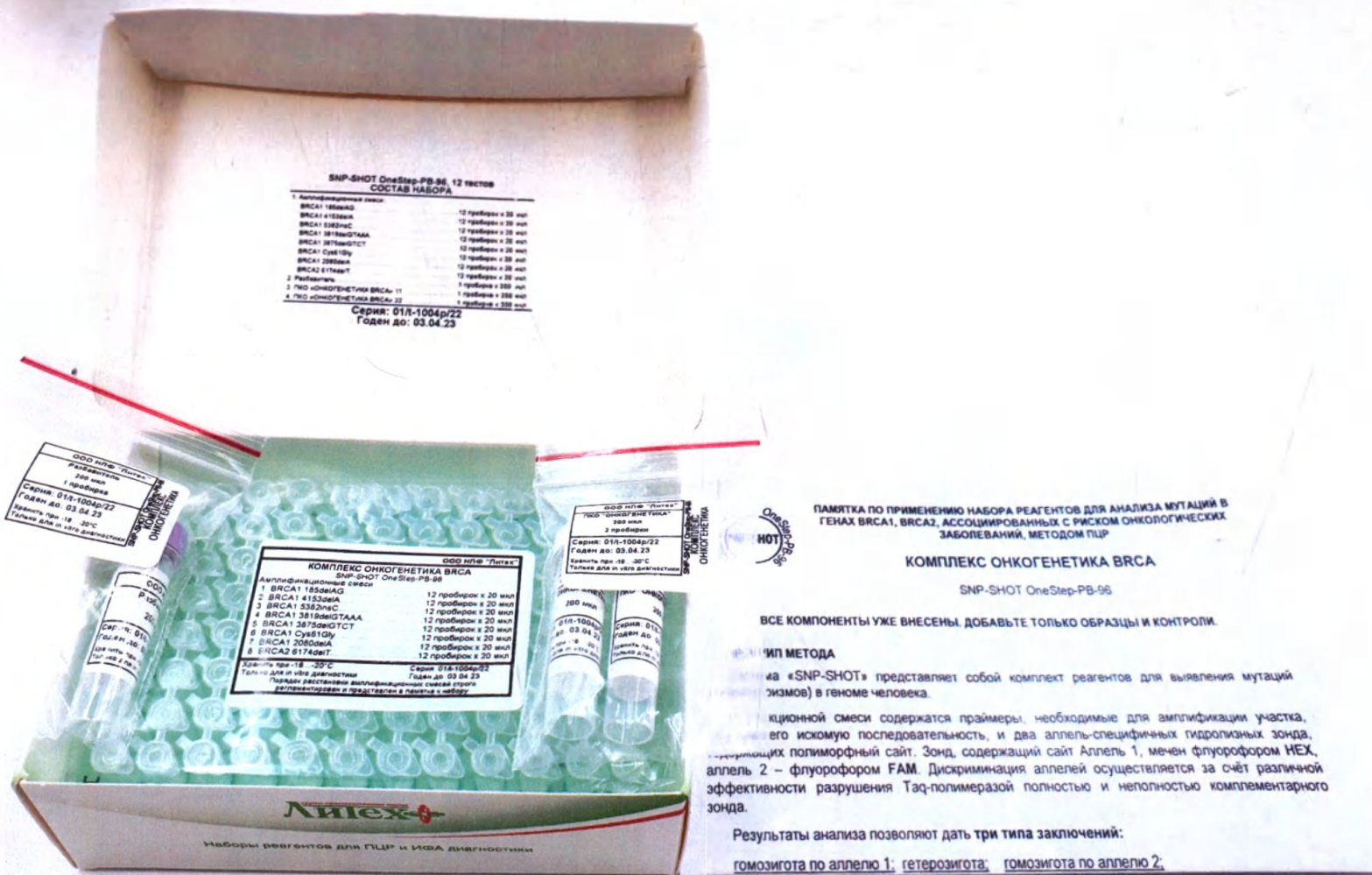


Фото 2. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRSA, вариант исполнения SNP-SHOT OneStep-PB-96. Комплектность.

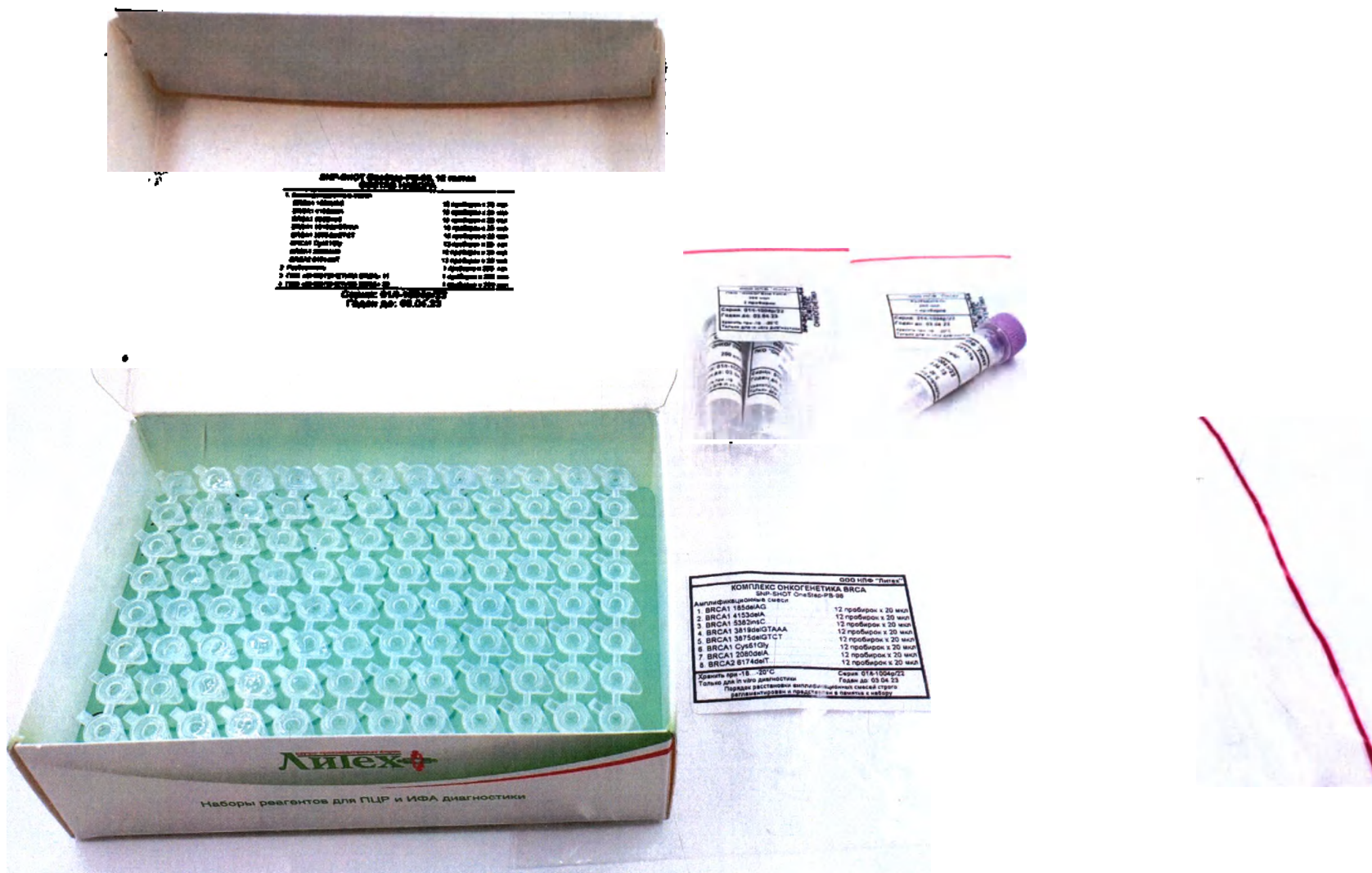


Фото 3. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA**, вариант исполнения **SNP- SHOT OneStep-PB-96**. Состав набора.



Фото 4. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA**, вариант исполнения SNP- SHOT *TwoStep-PB-96*. Потребительская упаковка.



ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА МУТАЦИЙ В ГЕНАХ BRCA1, BRCA2, АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МЕТОДОМ ПЦР

КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA

SNP-SHOT TwoStep-PB-96

ПРИНЦИП МЕТОДА

Система «SNP-SHOT» представляет собой комплект реагентов для выявления мутаций (морфизмов) в геноме человека.

Реакционной смеси содержатся праймеры, необходимые для амплификации участка, содержащего искомую последовательность, и два аллель-специфичных гидролизных зонда, содержащих полиморфный сайт. Зонд, содержащий сайт Аллель 1, мечен флуорофором HEX, а зонд 2 – флуорофором FAM. Дискриминация аллелей осуществляется за счет различной активности разрушения Taq-полимеразой полностью и неполностью комплементарного зонда.

Результаты анализа позволяют дать три типа заключений:

гомозигота по аллелю 1, гетерозигота, гомозигота по аллелю 2.

СОСТАВ НАБОРА

Фото 5. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA, вариант исполнения SNP-SHOT TwoStep-PB-96. Комплектность.

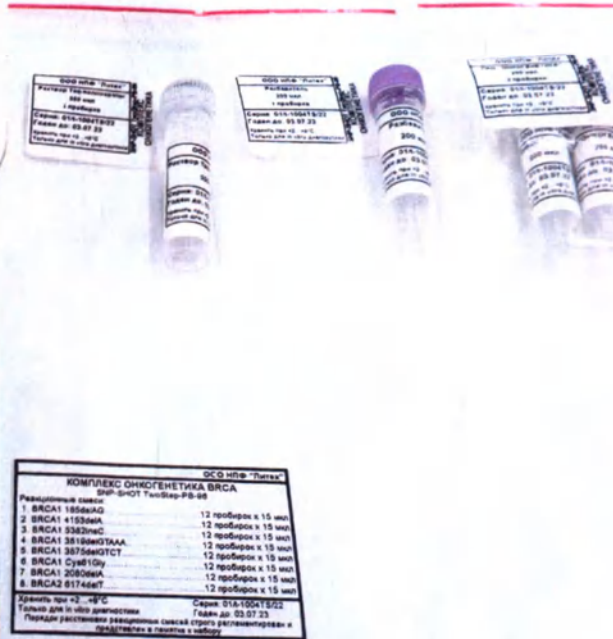
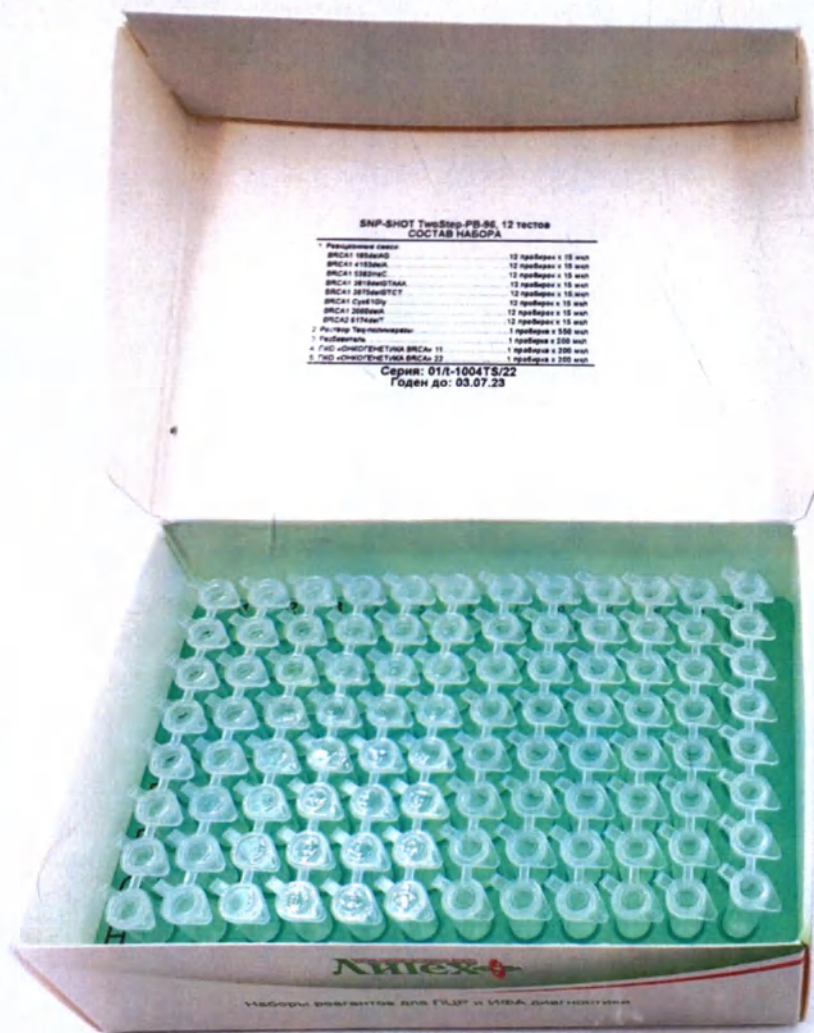


Фото 6. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRSA, вариант исполнения SNP- SHOT TwoStep-PB-96. Состав набора.

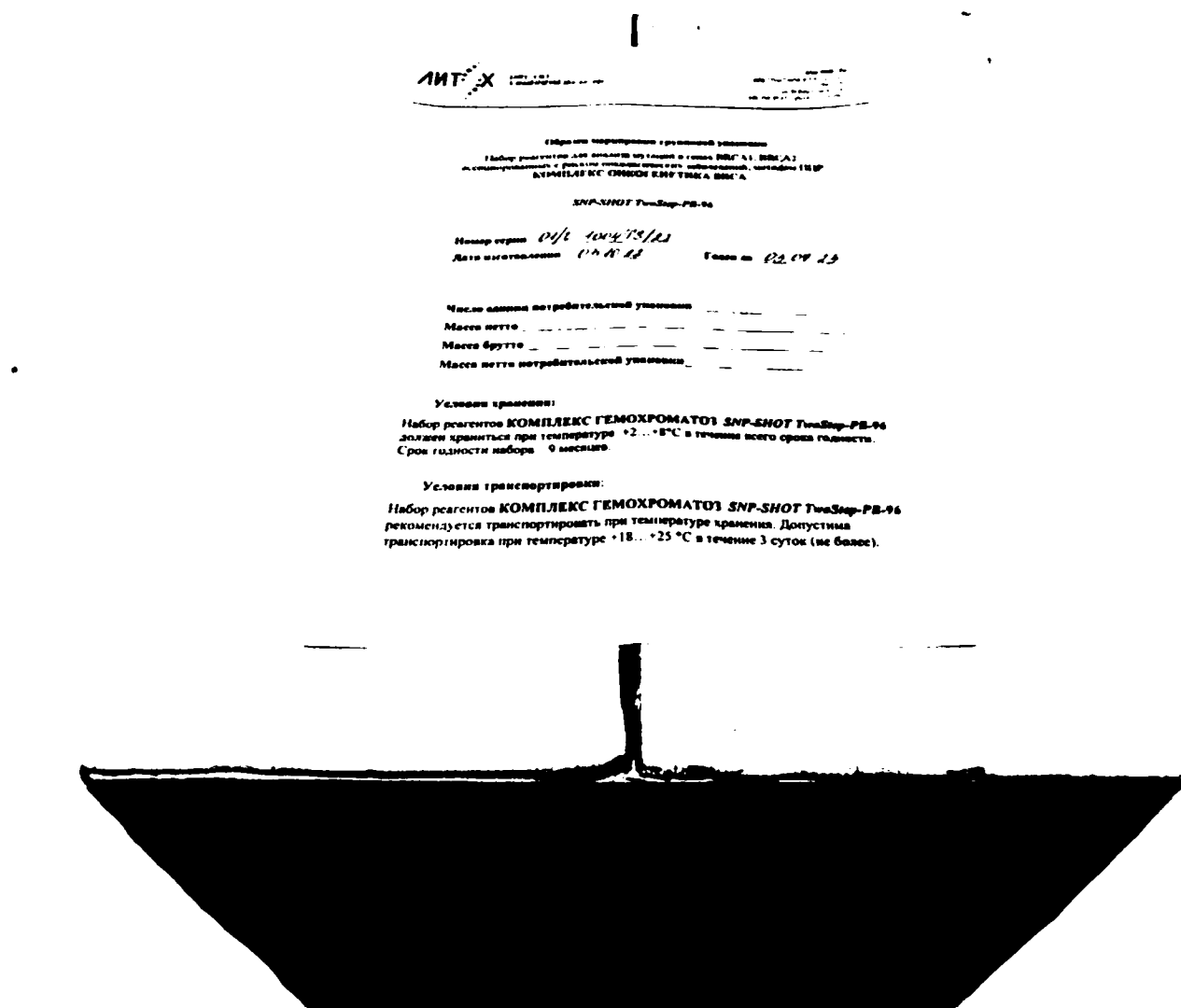


Фото 7. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRSA**, групповая упаковка. Внешний вид.

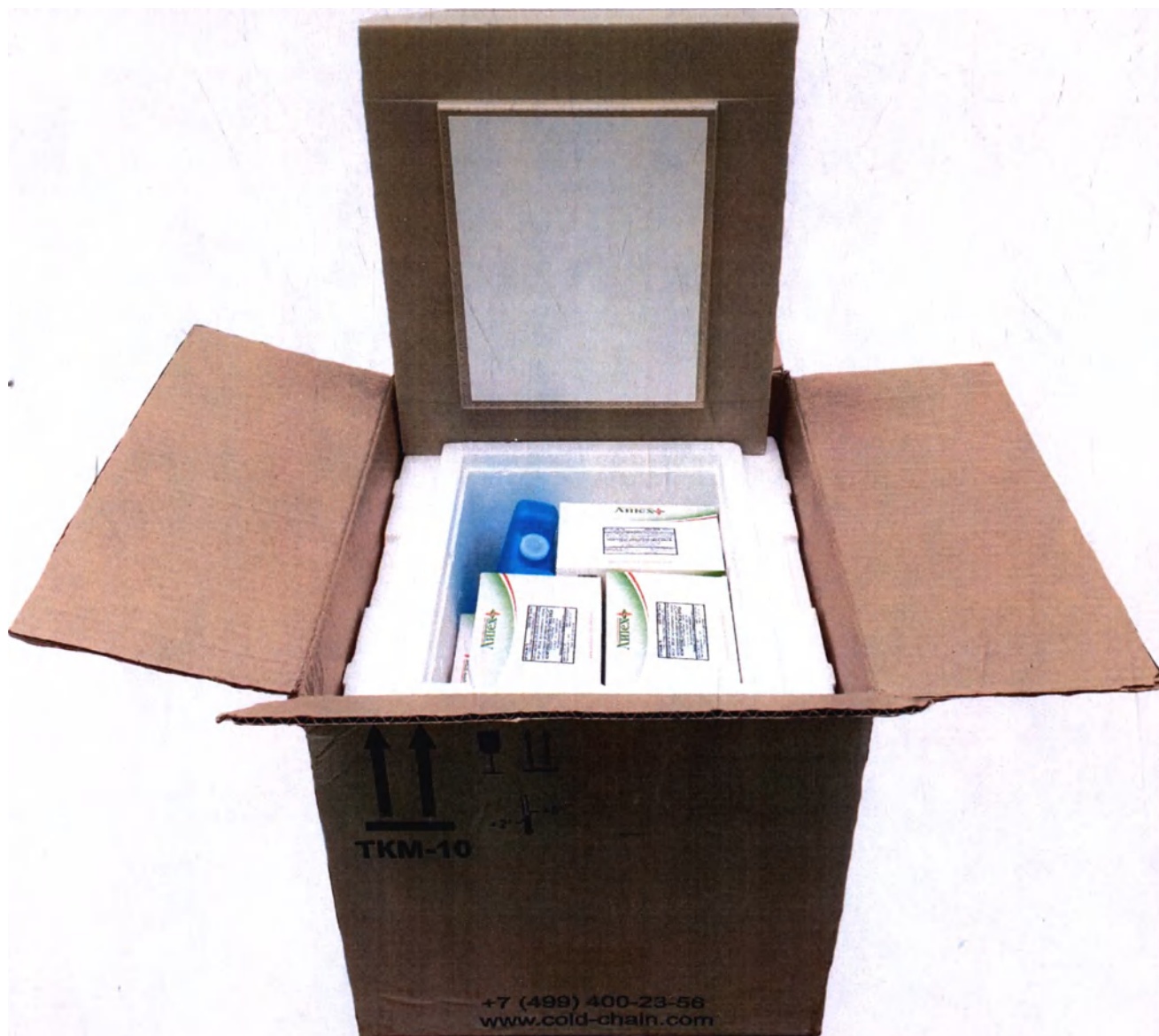


Фото 8. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRSA** групповая упаковка. Внутренний вид.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.
Количество листов



шт.

Директор

Наумов А.Ю.

Литех

101004-96-C ООО НПФ "Литех"
119435 г. Москва ул. Малая Пироговская д. 1 стр. 3
Набор реагентов для анализа мутаций в генах
BRCA1, BRCA2, ассоциированных с риском
онкологических заболеваний, методом ПЦР
КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA
SNP-SHOT OneStep-PB-96, 12 тестов
ТУ 21.20.23-1004-17253567-2022 РЗН
Для профессионального применения
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru
Хранить при -18...-20°C Серия: 01/L-1004p/22
Транспортировать при -18...-20°C Годен до: 03.04.23
Только для in vitro диагностики

www.lytech.ru • (495) 258-39-47

КОМПЛЕКС
ОНКОГЕНЕТИКА
BRCA

научно-производственная фирма
Литех

Серия: 01/L-1004p/22
Дата изготовления: 03.10.22
Годен до: 03.04.23

Фото 1. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA, вариант исполнения SNP-SHOT OneStep-PB-96. Потребительская упаковка.

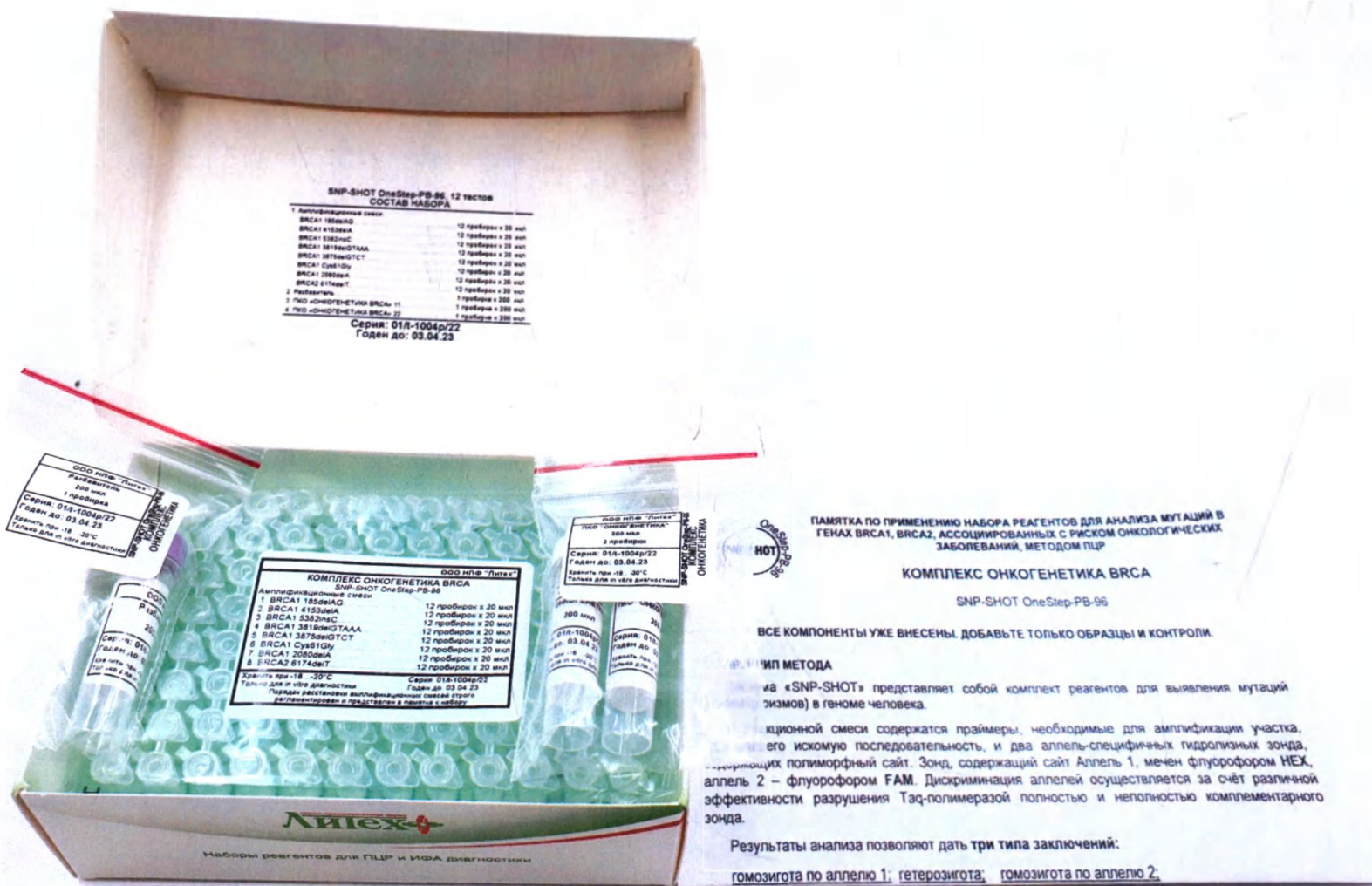


Фото 2. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA, вариант исполнения SNP-SHOT OneStep-PB-96. Комплектность.

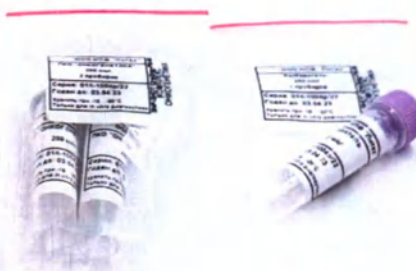


Фото 3. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRSA, вариант исполнения SNP- SHOT OneStep-PB-96. Состав набора.

Литех

101004-96-TS ООО НПФ "Литех"
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская д. 1, стр. 3
Набор реагентов для анализа мутаций в генах
BRCA1, BRCA2, ассоциированных с риском
онкологических заболеваний, методом ПЦР
КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA
SNP-SHOT TwoStep-PB-96, 12 тестов
ТУ 21.20.23-1004-17253567-2022 РЗН
Для профессионального применения
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru
Хранить при +2...+8°C Серия: 01/Л-1004TS/22
Транспортировать при +2...+8°C Годен до: 03.07.23
Только для in vitro диагностики


www.lytech.ru • (495) 258-39-47

КОМПЛЕКС
ОНКОГЕНЕТИКА
BRCA

Литех

Серия: 01/Л-1004TS/22
Дата изготовления: 03.10.22
Годен до: 03.07.23


Фото 4. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA, вариант исполнения SNP- SHOT TwoStep-PB-96. Потребительская упаковка.

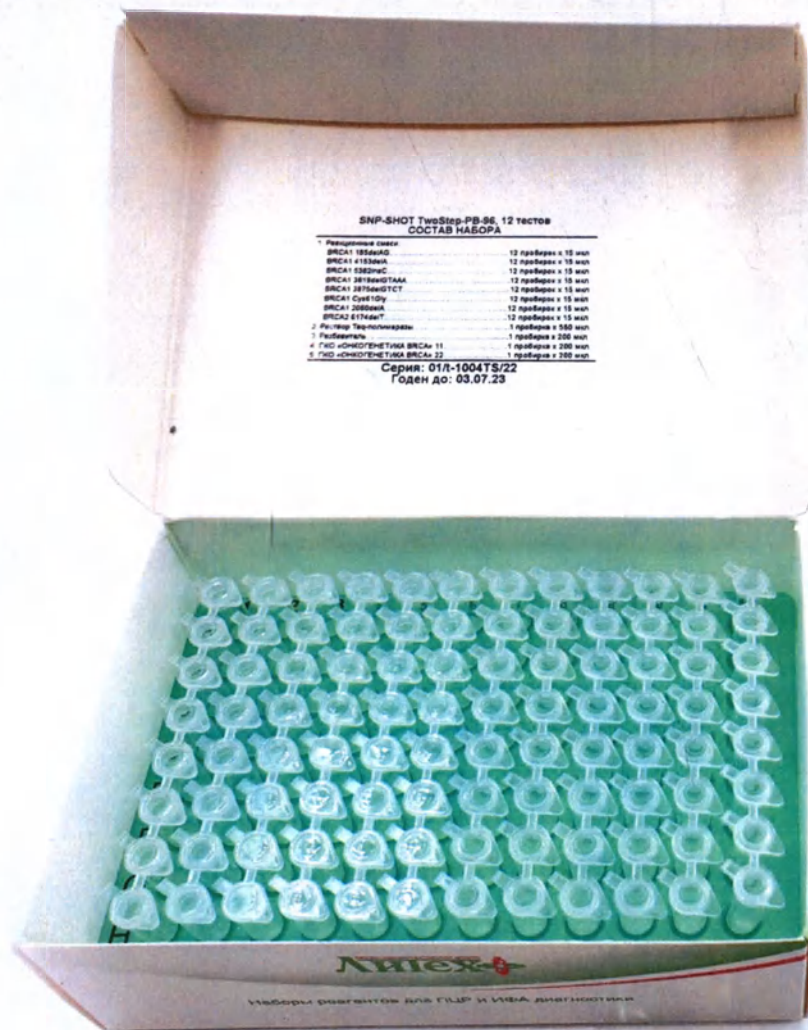

SNP-SHOT TwoStep-PB-96 12 тестов
СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь	12 пробирок x 15 мкл
BRCA1 185delAG	12 пробирок x 15 мкл
BRCA1 4153delA	12 пробирок x 15 мкл
BRCA1 5382insC	12 пробирок x 15 мкл
BRCA1 3818delGTTAA	12 пробирок x 15 мкл
BRCA1 3875delGTTCT	12 пробирок x 15 мкл
BRCA1 32461Gly	12 пробирок x 15 мкл
BRCA1 2080delA	12 пробирок x 15 мкл
BRCA2 6174delT	12 пробирок x 15 мкл
2. РНК-лигаза	1 пробирка x 500 мкл
3. РНК-лигаза	1 пробирка x 200 мкл
4. ГМО-ОМНОГЕНЕТИКА BRCA1 11	1 пробирка x 200 мкл
5. ГМО-ОМНОГЕНЕТИКА BRCA1 22	1 пробирка x 200 мкл

Серия: 018-1004TS/22
Годен до: 03.07.23

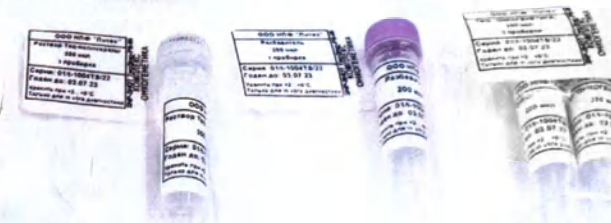

ООО ИТЕХ "Литех"
КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRCA
SNP-SHOT TwoStep-PB-96

1. BRCA1 185delAG	12 пробирок x 15 мкл
2. BRCA1 4153delA	12 пробирок x 15 мкл
3. BRCA1 5382insC	12 пробирок x 15 мкл
4. BRCA1 3818delGTTAA	12 пробирок x 15 мкл
5. BRCA1 3875delGTTCT	12 пробирок x 15 мкл
6. BRCA1 32461Gly	12 пробирок x 15 мкл
7. BRCA1 2080delA	12 пробирок x 15 мкл
8. BRCA2 6174delT	12 пробирок x 15 мкл

Хранить при +2...+8°C
Только для in vitro диагностики
Перед использованием реакционная смесь строго разгелифицировать и центрифугировать в течение 5 минут

Серия: 018-1004TS/22
Годен до: 03.07.23

Фото 6. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRSA, вариант исполнения SNP- SHOT TwoStep-PB-96. Состав набора.

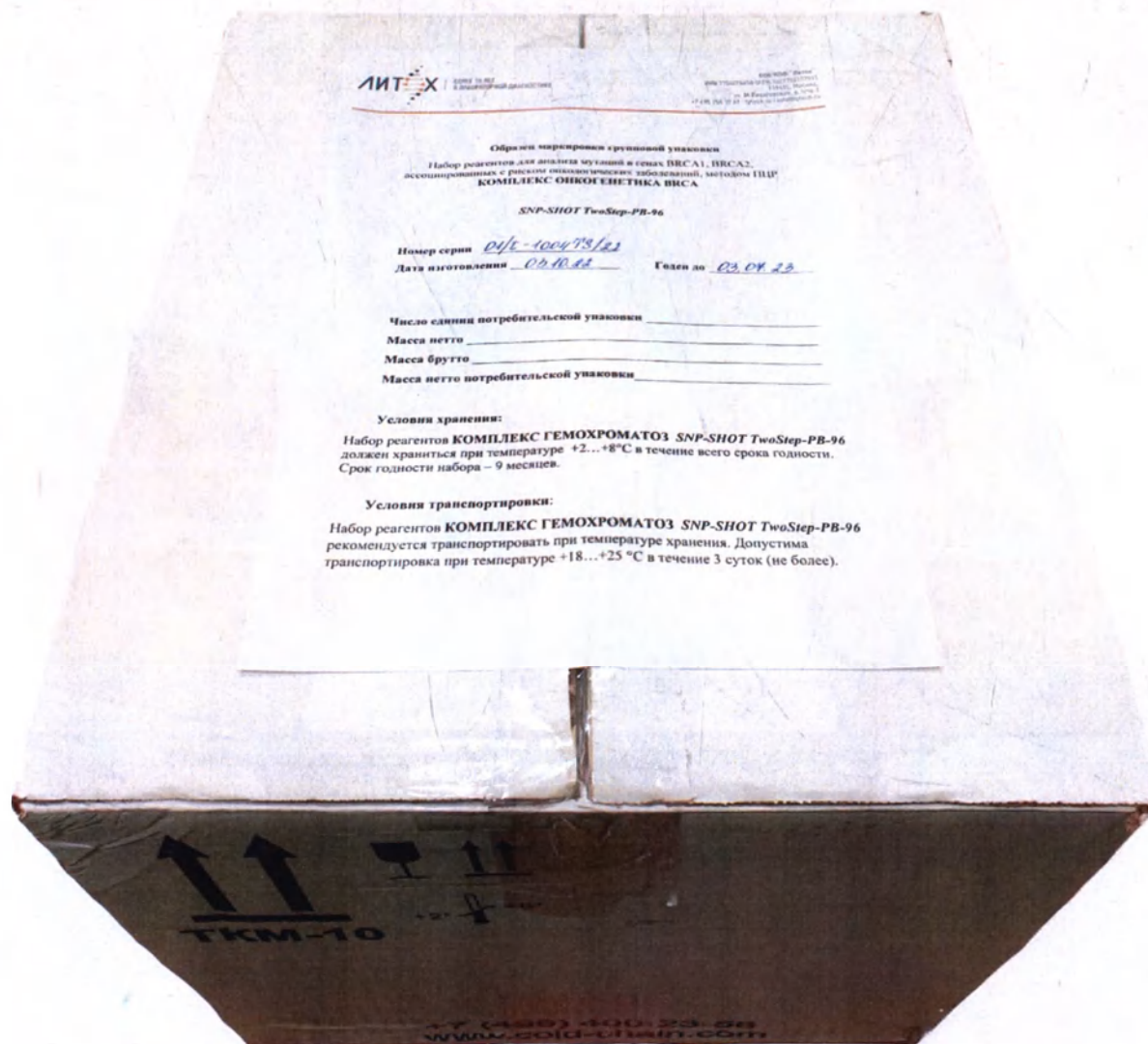


Фото 7. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRSA, групповая упаковка. Внешний вид.



Фото 8. Набор реагентов КОМПЛЕКС ОНКОГЕНЕТИКА BRSA групповая упаковка. Внутренний вид.

Прошито, проверено.
скреплено печатью.



Количество листов

шт.

Директор

Наумов А.Ю.