

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ **КАТЕТЕРЫ УРОЛОГИЧЕСКИЕ**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Надеть перчатки
- Взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу (4-5 см)
- Свободный конец катетера захватить между 4-5 пальцами правой руки
- Смазать вводимый конец катетера стерильным глицерином или стерильным вазелиновым маслом
- Обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
- Свободный конец опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- Ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
- Шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема (5мл. или 30 мл.) используя физиологический раствор или воздух
- По окончании выведения мочи шприцем убрать воздух или физраствор из фиксирующего баллона
- Катетер извлечь, нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки
- Промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном

ВНИМАНИЕ


При затруднении извлечения катетера вследствие невозможности аспирации воздуха или физиологического раствора из баллона катетера необходимо произвести пункцию иглой, сделать микронадрез ниже уровня клапана катетера или полностью отрезать клапан. Это способствует снижению давления в фиксирующем баллоне, и позволяют беспрепятственно извлечь катетер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Только для однократного применения
- Не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- Содержит латекс, который может вызывать аллергические реакции
- Хранить при температуре от -30 до +45°C
- Утилизация и обработка катетера согласно ОСТа 42-21-2-81

За дополнительной информацией о продукции обращайтесь по указанному адресу:
Alba Healthcare LLC
1023 15-th Street, NW, Suite 401, Washington, DC 20005, USA

Генеральный директор
ООО "Компания Новко Нобили"

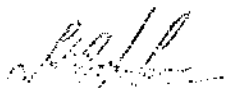


Стручков А.А.

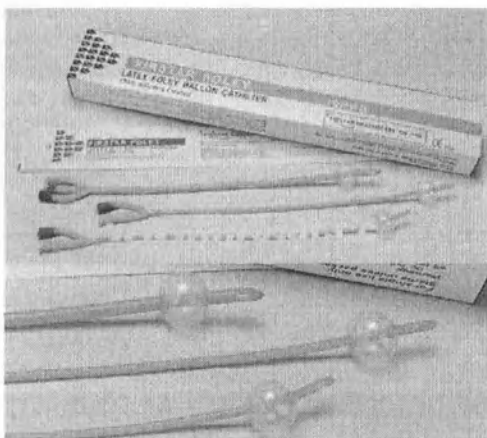

Катетер мочевой Нелатона F6- F24

Катетер мочевой латексный силиконизированный Фоллея двухходовой CH05- CH26

Катетер мочевой латексный силиконизированный Фоллея трехходовой CH12- CH26

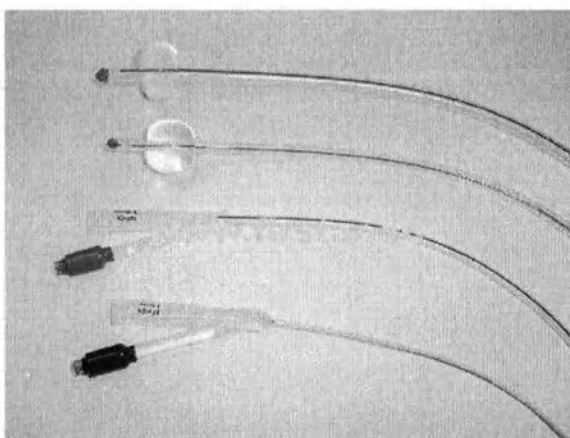

Катетер мочевой силиконовый Фоллея двухходовой CH05-CH26

Катетер мочевой силиконовый Фоллея трехходовой CH12-CH26

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

МЗ РФ № 2003/1435

Настоящее удостоверение выдано фирме
Apexmed International B.V., Нидерланды, Китай,

в том, что в соответствии с порядком, установленным Министерством
здравоохранения Российской Федерации, изделие медицинского
назначения под названием

*Катетеры урологические: Фолея, Нелатона, наружный мужской, урологический
женский*

производства фирмы Apexmed International B.V., Нидерланды, Китай,

после испытания зарегистрировано и может применяться в
медицинской практике на территории Российской Федерации. Данное
удостоверение действительно в течение 5 лет и не является
обязательством в закупке данного изделия.

Заместитель Министра



А. В. Катлинский

10 ноября 2003 г.

А. В. Катлинский

