

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ»




Р.М. Проценко
« » _____ 2010__г.
М.п.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


**Изделия медицинские стерильные и нестерильные для
взятия, хранения и транспортировки биологических проб,
производства Guangzhou Improve Medical
Instruments Co., Ltd., Китай**

Москва, 2010

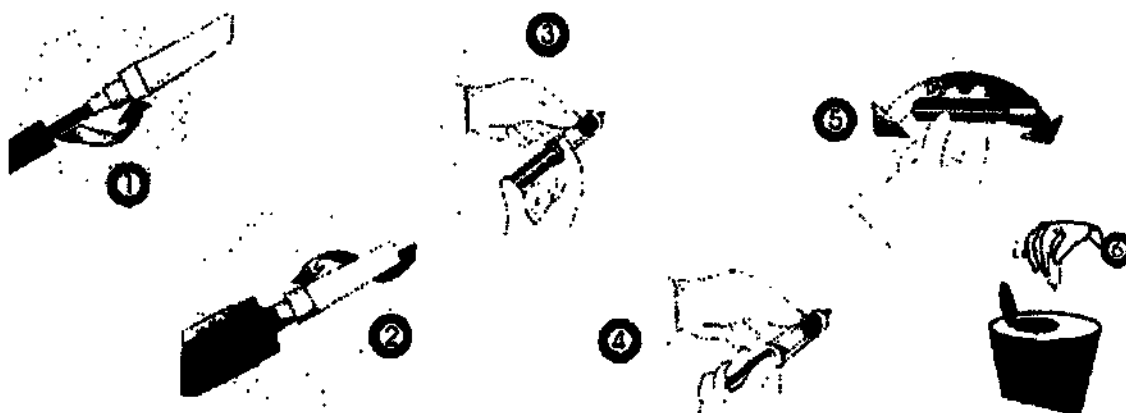
IMPROVACUTER


1. Выберите пробирки, соответствующие необходимым исследованиям.
2. Приготовьте иглу, держатель, спиртовые салфетки, пластырь.
3. Вставьте иглу в держатель и закрутите до упора. Проверьте, крепко ли игла закреплена, чтобы избежать ее соскальзывания во время использования.
4. Расположите руку пациента на инъекционном столе.
5. Наложите жгут, обработайте место венепункции спиртовой салфеткой.
6. Снимите защитный колпачок с иглы и произведите венепункцию.
7. Вставьте пробирку в иглодержатель до упора (при этом необходимо указательным и средним пальцами придерживать выступы держателя, а большим пальцем проталкивать пробирку к игле) и удерживайте ее до тех пор, пока кровь не перестанет поступать в пробирку. Для визуального контроля уровня заполнения на этикетке пробирки имеется риска. Если кровь не поступает в пробирку – это значит, что игла прошла вену насквозь – в этом случае нужно немного вытянуть иглу (но не вынимать), пока кровь не пойдет в пробирку. Уберите жгут, как только кровь появится в пробирке. При введении пробирки следите за ее положением по центру держателя, чтобы предотвратить боковой прокол крышки и последующую за этим преждевременную потерю вакуума.
8. Извлеките пробирку из держателя. Резиновая мембрана возвращается в исходное положение, перекрывая ток крови по игле. Если необходимо взять кровь в несколько пробирок, повторить процедуры № 7 – 8. Повторно вводить иглу в вену для этого не нужно.
9. Извлеките иглу из вены и зажмите место пункции сухим стерильным тампоном.
10. Снимите иглу с держателя в специальный контейнер для использованных игл.

11. Аккуратно переверните пробирку 5-8³ раз для того, чтобы достичь полного смешивания с реагентами. Не встряхивайте пробирку: резкое смешивание может вызвать пенообразование и гемолиз!
12. Нанесите на этикетку пробирки идентификационные данные пациента, указанные в направлении.
13. Отправьте пробирку в лабораторию.

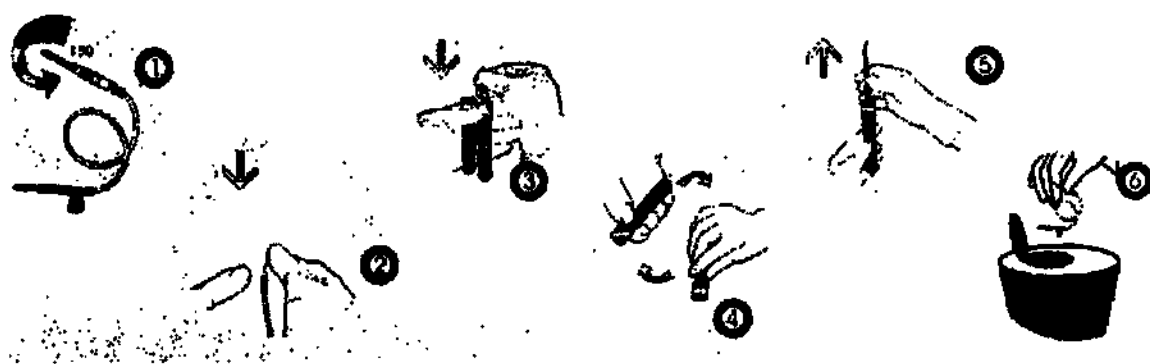

**Изделия медицинские стерильные и нестерильные для взятия,
хранения и транспортировки биологических проб,
Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd., Китай**

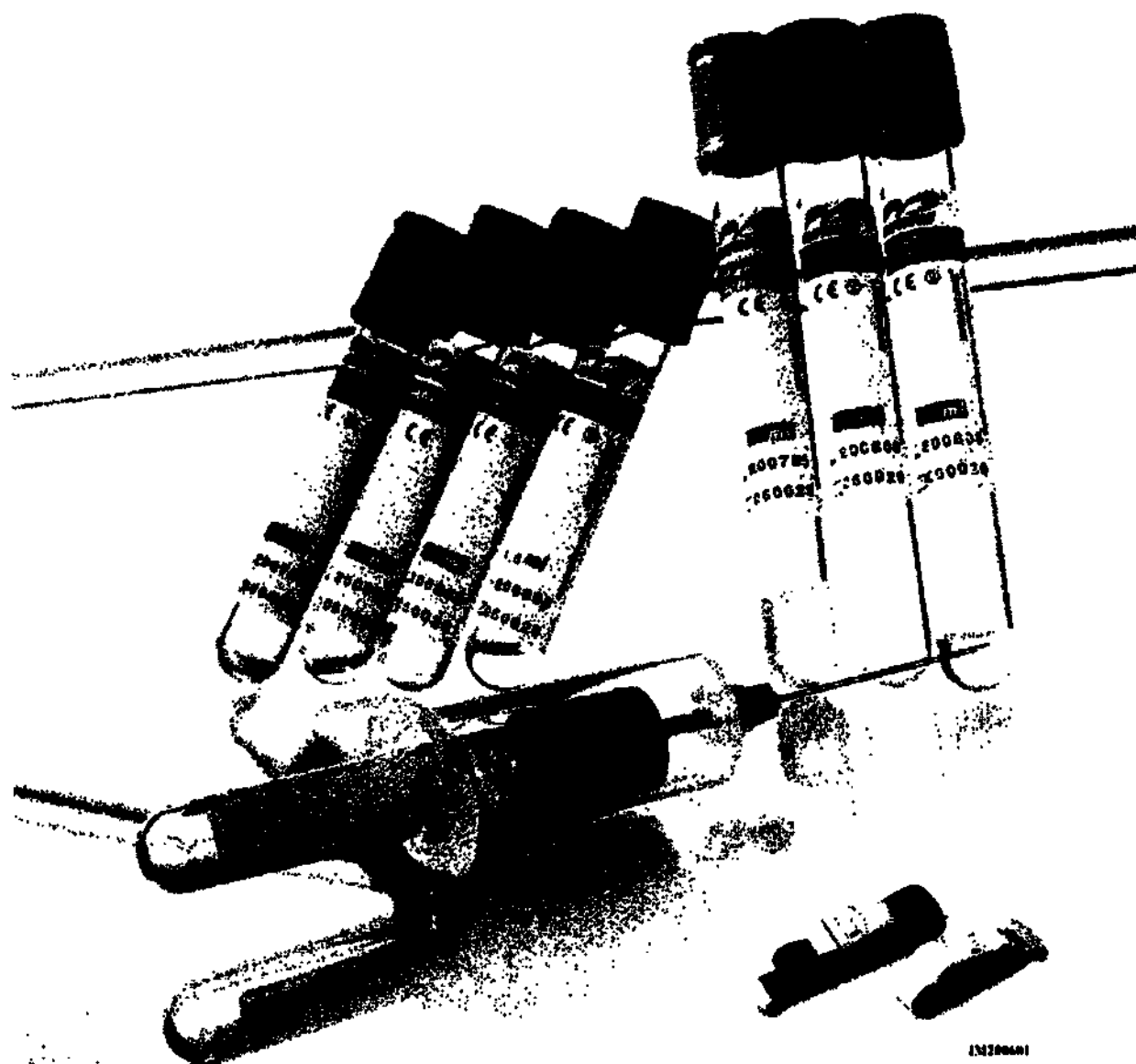

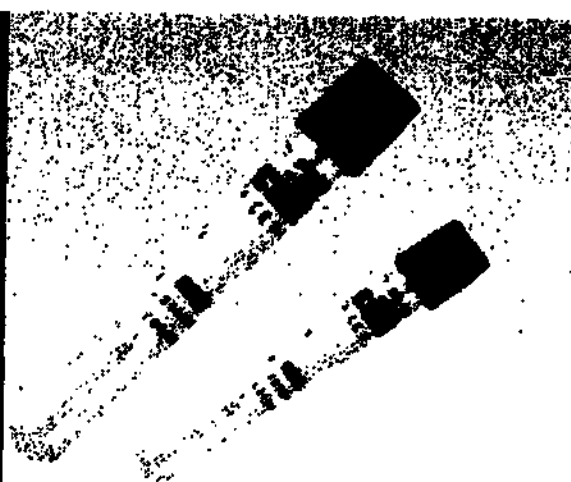


**Пробирки для получения сыворотки
с активатором свертывания**



**Пробирки с оксалатом
(для диализа)**



Пробирки с гепарином

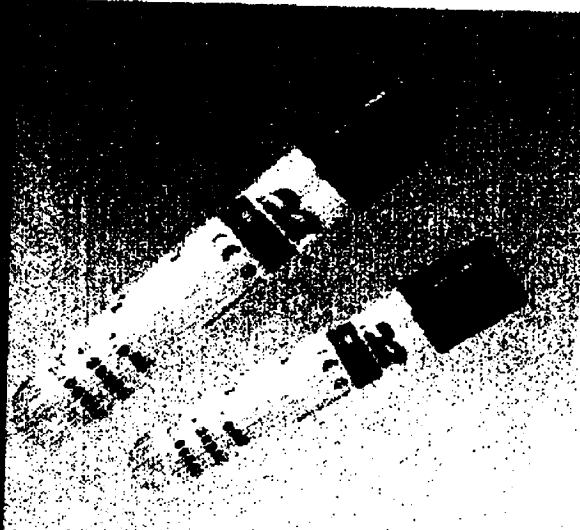

Пробирки для СОЭ



Жгут



Контейнеры для использованных игл