

8

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ»

Проценко

Проценко Р.М. Проценко


« » _____ 2010 г.

М.п.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Иглы одноразовые стерильные IMPROVACUTER в наборах
и отдельных упаковках,
производства Guangzhou Improve Medical
Instruments Co., Ltd., Китай**

Москва, 2010

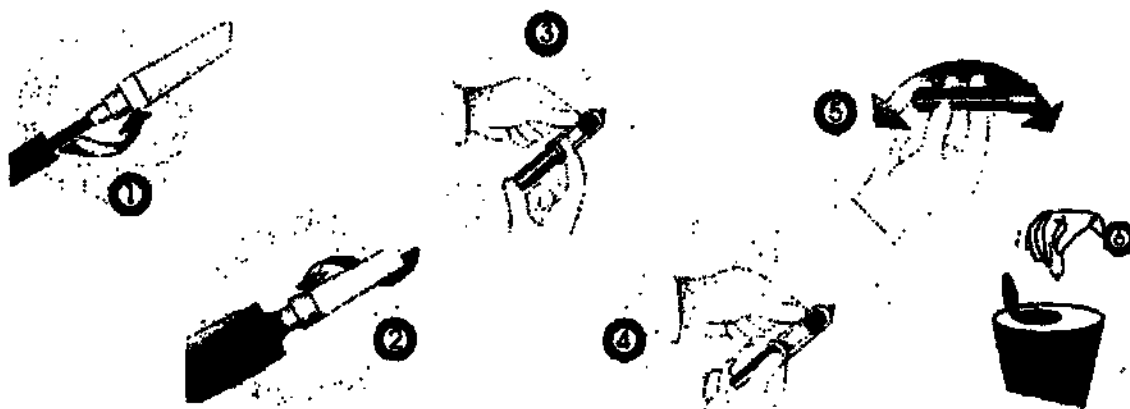IMPROVACUTER®

1. Приготовьте иглу, держатель, спиртовые салфетки, пластырь.
2. Вставьте иглу в держатель и закрутите до упора. Проверьте, крепко ли игла закреплена, чтобы избежать ее соскальзывания во время использования.
3. Расположите руку пациента на инъекционном столе.
4. Наложите жгут, обработайте место венепункции спиртовой салфеткой.
5. Снимите защитный колпачок с иглы и произведите венепункцию.
6. Вставьте пробирку в иглодержатель до упора (при этом необходимо указательным и средним пальцами придерживать выступы держателя, а большим пальцем проталкивать пробирку к игле) и удерживайте ее до тех пор, пока кровь не перестанет поступать в пробирку. Если кровь не поступает в пробирку – это значит, что игла прошла вену насквозь – в этом случае нужно немного вытянуть иглу (но не вынимать), пока кровь не пойдет в пробирку. Уберите жгут, как только кровь появится в пробирке.
7. Извлеките иглу из вены и зажмите место пункции сухим стерильным тампоном.
8. Снимите иглу с держателя в специальный контейнер для использованных игл.

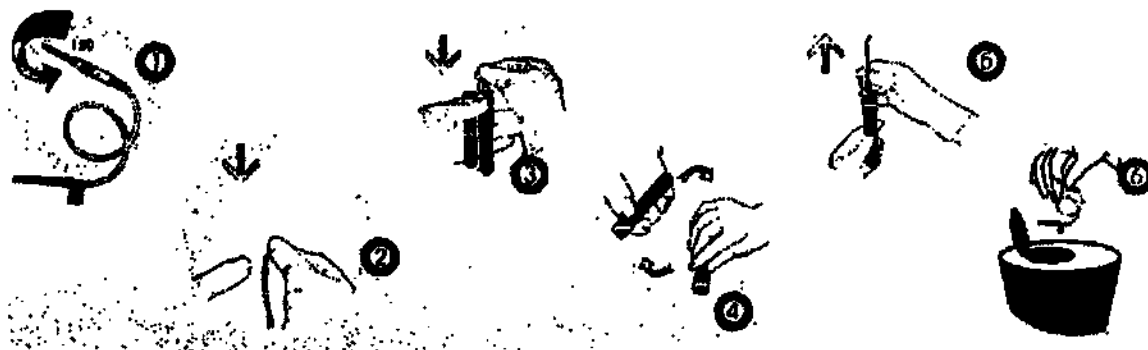

**Иглы одноразовые стерильные IMPROVACUTER в наборах и
отдельных упаковках, производства,
Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd., Китай**

