

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Казанская фабрика
«СпецМедЗащита»



А.В.Ефанов
«___» _____ 2022 г.

Инструкция по применению медицинского изделия:

Халат медицинский процедурный одноразовый «СпецМедЗащита» ТУ 32.50.50-032-64015714-2022

Мод. ХБКР110-48/50-25; Мод. ХБКР140-54/56-25; Мод. ХБКМ110-48/50-25;
Мод. ХБКМ140-54/56-25; Мод. ХБЛР110-48/50-25; Мод. ХБЛР140-54/56-25;
Мод. ХБЛМ110-48/50-25; Мод. ХБЛМ140-54/56-25; Мод. ХБЗР110-48/50-25;
Мод. ХБЗР140-54/56-25; Мод. ХГЗМ140-48/50-25; Мод. ХГЗМ140-54/56-25;
Мод. ХГЗМ140-48/50-40; Мод. ХГЗМ140-54/56-40.

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Халат предназначен для ношения работниками здравоохранения и пациентами, обеспечивают предотвращения заноса инфекции в медицинские учреждения с загрязненной одежды, переноса, например, микроорганизмов или жидкостей тела и возможностью последующего распространения инфекции воздушно-пылевым путем. Использование халатов медицинских обеспечивает гигиеничность выполнения медицинских манипуляций и чистоту в учреждении в целом.

Халат используется во время процедур осмотра пациентов.

Класс в зависимости от потенциального риска применения - 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – предназначены для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения пациента или персонала от передачи инфекционных агентов, носителями которых могут являться медицинские работники или посетители.

Условное обозначение (модель) изделий в конструкторской и сопроводительной документации должно строиться согласно нижеприведенному примеру: ХБКР110-48/50-25

Х	Б	К	Р	110-	48/50-	25
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
I	II	III	IV	V	VI	VII

I. Наименование изделия: Х – Халат. II. Цвет изделия: Б – белый; Г – голубой. III. Вид застежки: З – завязка; К – кнопка; Л – липучка. IV. Вид рукава: Р – резинка; М – манжета. V. Длина готового изделия: 110 см; 140 см. VI. Размер готового изделия: 48/50; 54/56. VII. Поверхностная плотность нетканого материала: 25 г/м²; 40 г/м².

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Общие сведения: Халат медицинский представляет собой вид одежды, изготовленный из нетканого материала: «Спанбонд» поверхностной плотностью (25 или 40) г/м²;

Размер: 48/50, длина – 110 см; 48/50, длина – 140 см; 54/56, длина – 140 см;

Цвет: голубой, белый.

Отделка рукава: с резинкой/ с манжетой.

Вид застежки: кнопка/липучка/завязка.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и гарантийный срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении гарантийного срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожных аллергических реакций, следует прекратить применение изделия.

Применение: извлечь халат из упаковки. Надеть халат. Застегнуть кнопки или липучки, или завязать завязки.

Утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69, но для температуры от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в потребительской таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150-69 по группе 1, но для температуры от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Халат после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Нестерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литер Ц, офис 717, помещ. 1-Н. Телефон: 8-812-400-81-00.

E- mail: officemanager@bahilyrf.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации



Ефимов А. В.