

**Общество с ограниченной ответственностью
«РУСМЕДХОЛДИНГ»**

105037, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайлово, ул. Парковая 3-я, д. 29А,
офис 3, каб. 203

ИНН 7719493157 КПП 771901001

«УТВЕРЖДАЮ»/ «APPROVE»

Генеральный директор

(должность/position)

В.В. Колышкин

(имя/name)

(подпись/signature)



Фотографические изображения

(ред. 1.2. от 20.02.2023)

**«Концентратор кислорода медицинский портативный «KINGON»
в исполнении P2, с принадлежностями»**



Фотография 2. Комплектация портативного кислородного концентратора Kingon P2.

Фотодиффузия и модификация - Концентрация воздуха медицинский КИТАЙ P2 - Водоструй



PORTABLE OXYGEN CONCENTRATOR MODEL: P2
INPUT: DC19V ~100W OUTPUT: 90% -3% /+5% OXYGEN MADE IN CHINA

NO SMOKING NO OPEN FLAMES IP22
DO NOT DISASSEMBLE NO OIL OR GREASE CE MR R
059R

Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co., Ltd.
Room 301-302, No. 18 Hanchang Road, Qingdao Free Trade Zone, Shandong, China, 266056

EC REP

2022-04-10
(01)00971802690017
(11)220410(21)22020697


SN 22020697




«Фотографическое изображение 3 – Концентратор кислорода медицинский портативный «K1XGON» в исполнении Р², с принадлежностями. Концентратор с присоединенной аддитером питания. Вид спереди



Фотографическое изображение 4 – Концентратор кислорода медицинский портативный K10GON P2. Вид сзади

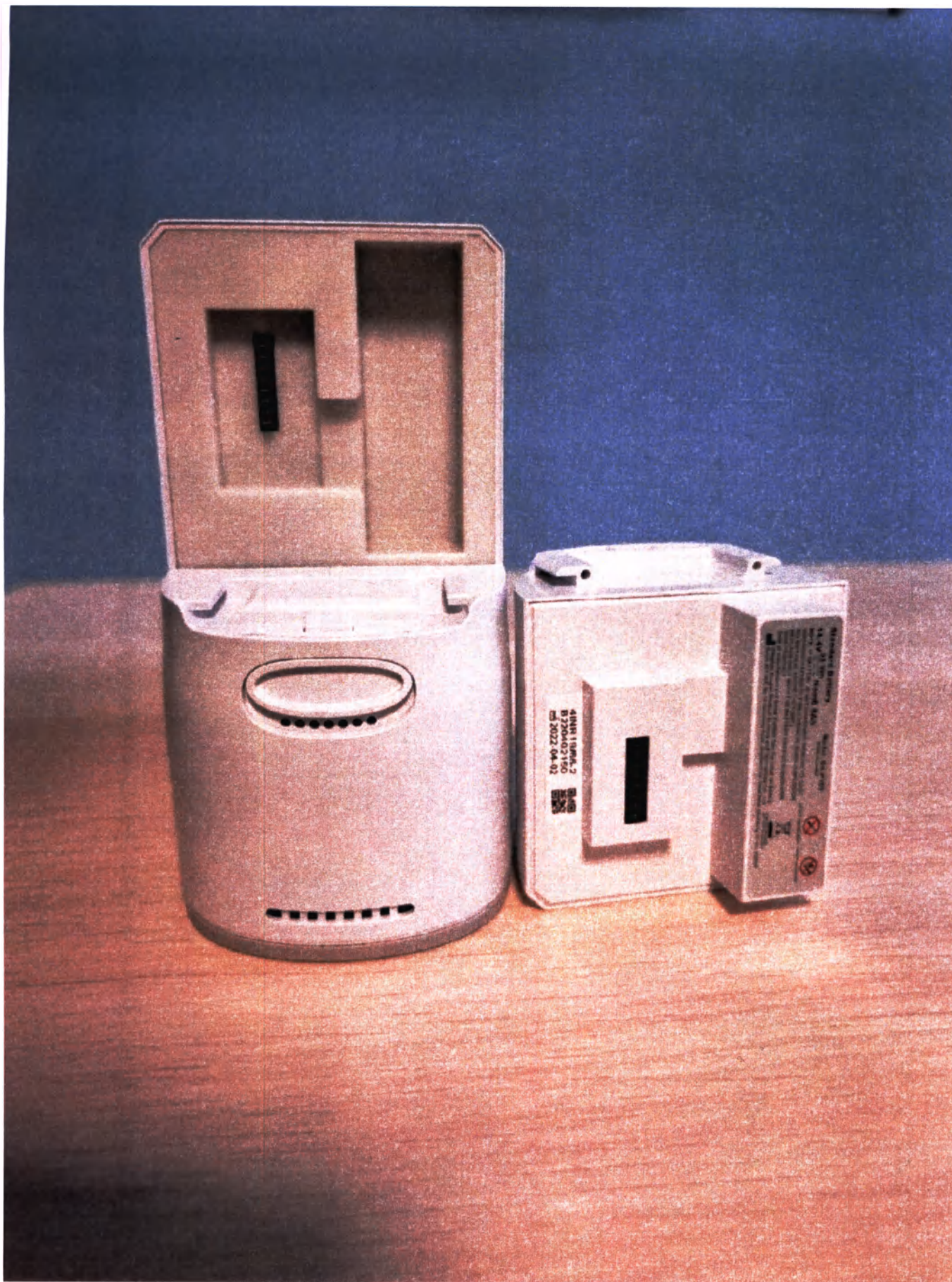

Фотографическое изображение 5 Концентратор кислорода медицинского портативный «KTXG-01» в исполнении Р2, с принадлежностями. Концентратор с отсоединенным аккумулятором. Вид справа

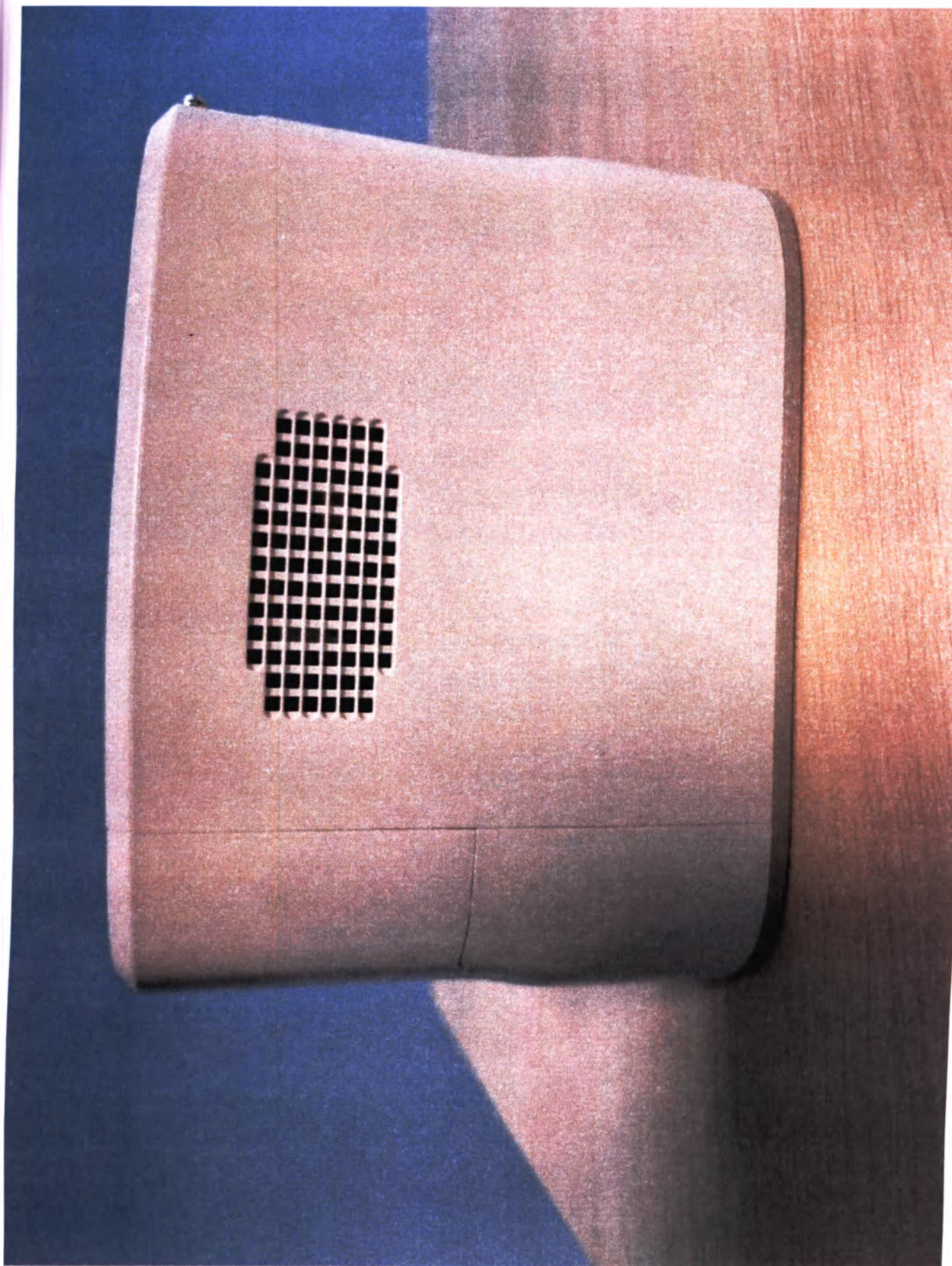

Фотографическое изображение 6 – Концентратор кислорода медицинский портативный KIXGON P2. Вид сверху




Фотографическое изображение – Концентратор кислорода медицинский портативный KINCOX P2. Вид слева

Фотографическое изображение 8 - Консультант для порода медвежьих порослят - K/V/G/A с гнезными P2, с
применением жидкостных концентраторов с функцией автоматического контроля. Вид сзади






Фотографическое изображение 9 Концентратор кислорода медицинский портативный KINGON P2. Вид сверху

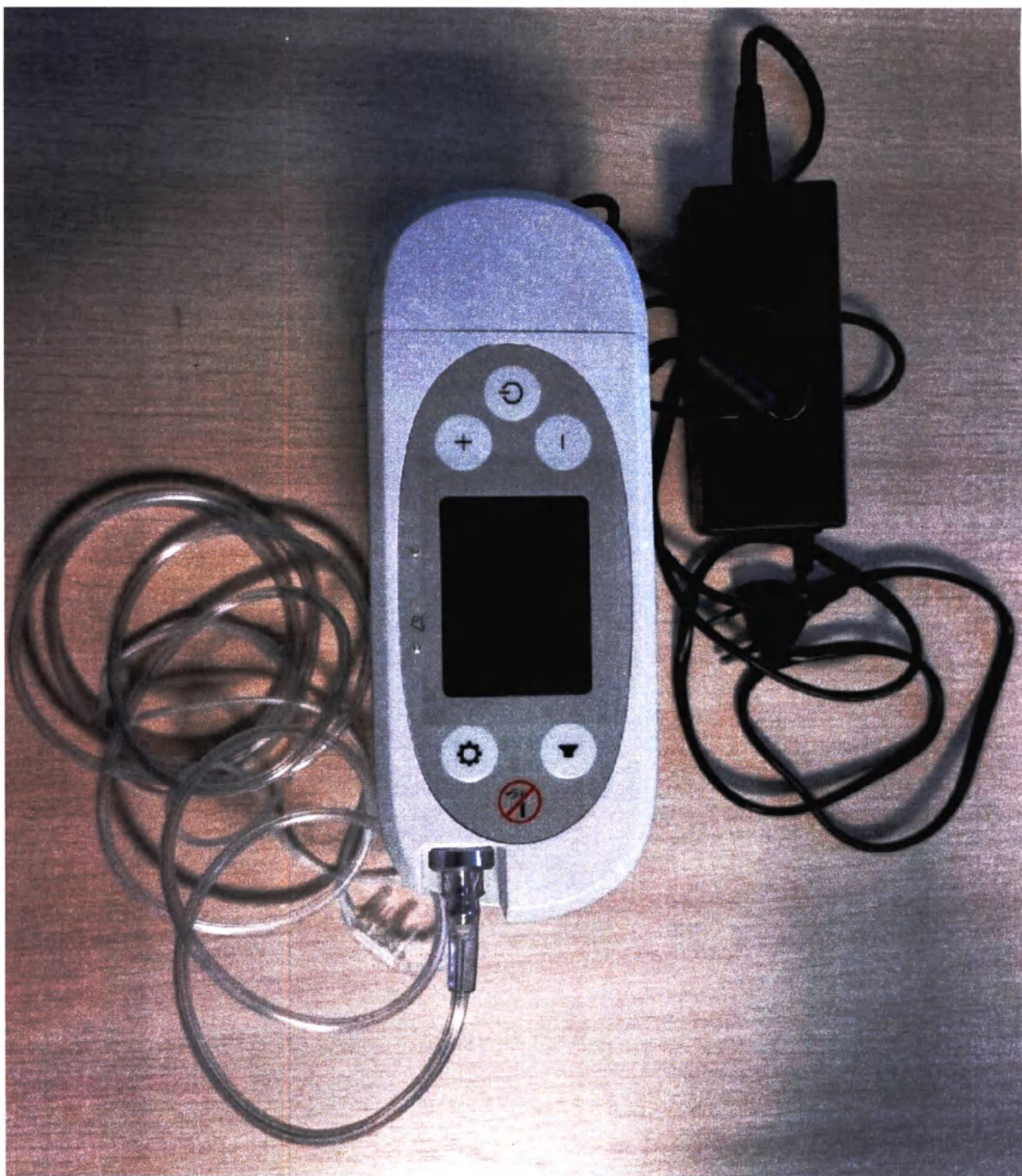

Фотографическое изображение 10 Концентратор кислорода медицинский портативный «KTXGOX» в исполнении Р2 с принадлежностями. Концентратор с присоединенной канюлей и адаптером питания. Вид сверху

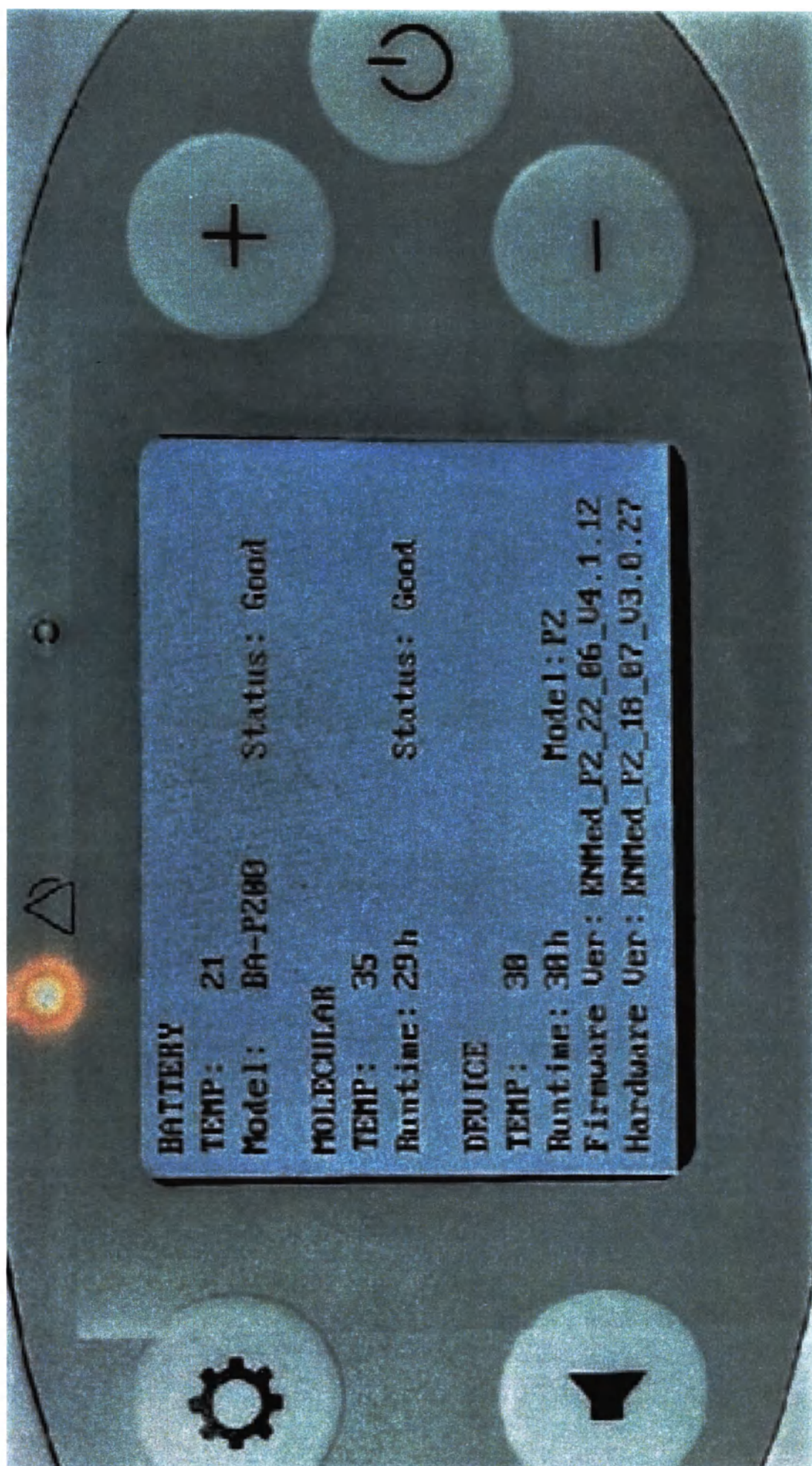

Фотографическое изображение 11 Концентратор кислорода медицинский портативный KXGDX P2. Включенный экран



Фотографическое изображение 12 Концентратор кислорода медицинский портативный KINGON P2. Маркировка

Концентратор кислорода медицинский портативный «KINGON» в
исполнении P2, с принадлежностями

Модель: P2

Входное напряжение

Сделано в Китае
19 В 

Номинальная потребляемая мощность

100 Вт

Номинальная концентрация кислорода в полученном газе, при
максимальном рекомендуемом потоке (производительности)

90 %
(- 3% / + 6 %)



НЕ КУРИТЬ



НИКАКОГО
ОТКРЫТОГО
ОГНЯ



IP22



НЕ
РАЗБИРАТЬ



БЕЗ МАСЛА
И ЖИРА



Rx Only



«Медицинская научно-техническая компания Kingon, Циндао»
провинция Шаньдун, город Циндао, бондовая портовая зона, улица Ханьчэн, 15,
помещение 301-302 (B)



ООО «РМХ»

105037, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайлово, ул.
Парковая 3-я, д. 29А, офис 3, каб. 203

Фотографическое изображение 13 Концентратор кислорода медицинский портативный KINGON P2.
Маркировка на русском языке

Символ	Объяснение
	Не курить
	Держите вдали от источников открытого пламени
	Не разбирать
	Не использовать масло или консистентную смазку
	Источник постоянного тока
	См. Инструкцию по эксплуатации
	Не выбрасывать в несортированные коммунальные отходы
	Накладываемая часть, тип BF
	Производитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
IP22	Степень защиты компонентов концентратора от проникновения воды
	Знак соответствия Директиве CE
	Знак безопасности магнитного резонанса
R _x Only	Использование по рецепту Внимание: Федеральный закон ограничивает продажу данного устройства врачом или по его заказу
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Внимание! Опасность

Фотометрическое измерение яркости лампы дневного света, модель Р 200 (общий вид)



Standard Battery

Model: BA-P200

MADE IN CHINA

14.4V ^{98 Wh} **Nom6.8Ah**

NOTE: IF BATTERY IS NOT CHARGING, REMOVE TO COOL
WARNING-HAZARD OF FIRE/CHEMICAL BURN /EXPLOSION
DO NOT HEAT ABOVE 140°F(60°C)
REPLACE ONLY WITH THE BATTERY PACK DESIGNED FOR
THIS PRODUCT

Date of manufacture and Serial Number: See the Label on Battery

Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co., Ltd
Room 301-302, No. 15 Hancheng Road, Qingdao Free Trade Zone, Shandong, China, 266555



DO NOT DISASSEMBLE DO NOT INCINERATE



DISPOSE OF USED
BATTERY PROPERLY

41NR19/66-2
B220402150
2022-04-02



Фотографическое изображение 16 – Батарея аккумуляторная, модель В А-Р200. Маркировка

Батарея аккумуляторной

98 Вт·ч

Номинальное напряжение на выходе

Емкость

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ НАГРЕЛАСЬ, СНИМИТЕ ЕЕ, ЧТОБЫ ОСТЫЛА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОБ ОПАСНОСТИ ПОЖАРА / ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА / ВЗРЫВА
НЕ НАГРЕВАЙТЕ ВЫШЕ 140 °F (60 °C)
ЗАМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО БАТАРЕЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ЭТОГО ПРОДУКТА

SN



Модель:BA-P200

Сделано в Китае

14,4 В 

6,8 Ач

«Медицинская научно-техническая компания Kingon, Циндао»
провинция Шаньдун, город Циндао, бондовая портовая зона, улица Ханьчэн, 15, помещение 301-302 (B)



НЕ РАЗБИРАТЬ



НИКАКОГО ОТКРЫТОГО ОГНЯ



Правильно утилизируйте использованную батарею



Фотографическое изображение 1 – Батарея аккумуляторная, модель BA-P200. Маркировка на русском языке

Символ	Объяснение
	Держите вдали от источников открытого пламени
	Не разбирать
	Источник постоянного тока
	Не выбрасывать в несортированные коммунальные отходы
	Серийный номер
	Производитель
	Внутренним источником питания Класс II

Предупреждения:

Символ	Объяснение
NOTE: IF BATTERY IS NOT CHARGING, REMOVE TO COOL	ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ НАГРЕЛАСЬ, СНИМИТЕ ЕЕ, ЧТОБЫ ОСТЫЛА.
WARNING-HAZARD OF FIRE/CHEMICAL BURN/ EXPLOSION	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОБ ОПАСНОСТИ ПОЖАРА / ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА / ВЗРЫВА
DO NOT HEAT ABOVE 140 °F (60 °C)	НЕ НАГРЕВАЙТЕ ВЫШЕ 140 °F (60 °C)
REPLACE ONLY WITH THE BATTERY PACK DESIGNED FOR THIS PRODUCT	ЗАМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО БАТАРЕЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ЭТОГО ПРОДУКТА

Фототрафаретное и координатное изображение 18 - компания «Скандинавия» - модель 18-1-100. В подгонку под формат А4




Фотографическое изображение 19 – Адаптер сетевой, модель EM11012E.

Item	AC Adapter
Model No.	EM11012E
SN No	/
Batch No.	220410
Qty / Pcs	1
Date	10-Apr-22



Фотографическое изображение 21 Кабель сетевой

Фотонграфическое изображение 22 Капюльты для бытовых кондиционеров (6-присоедин. кат. XOS-1D-1110721

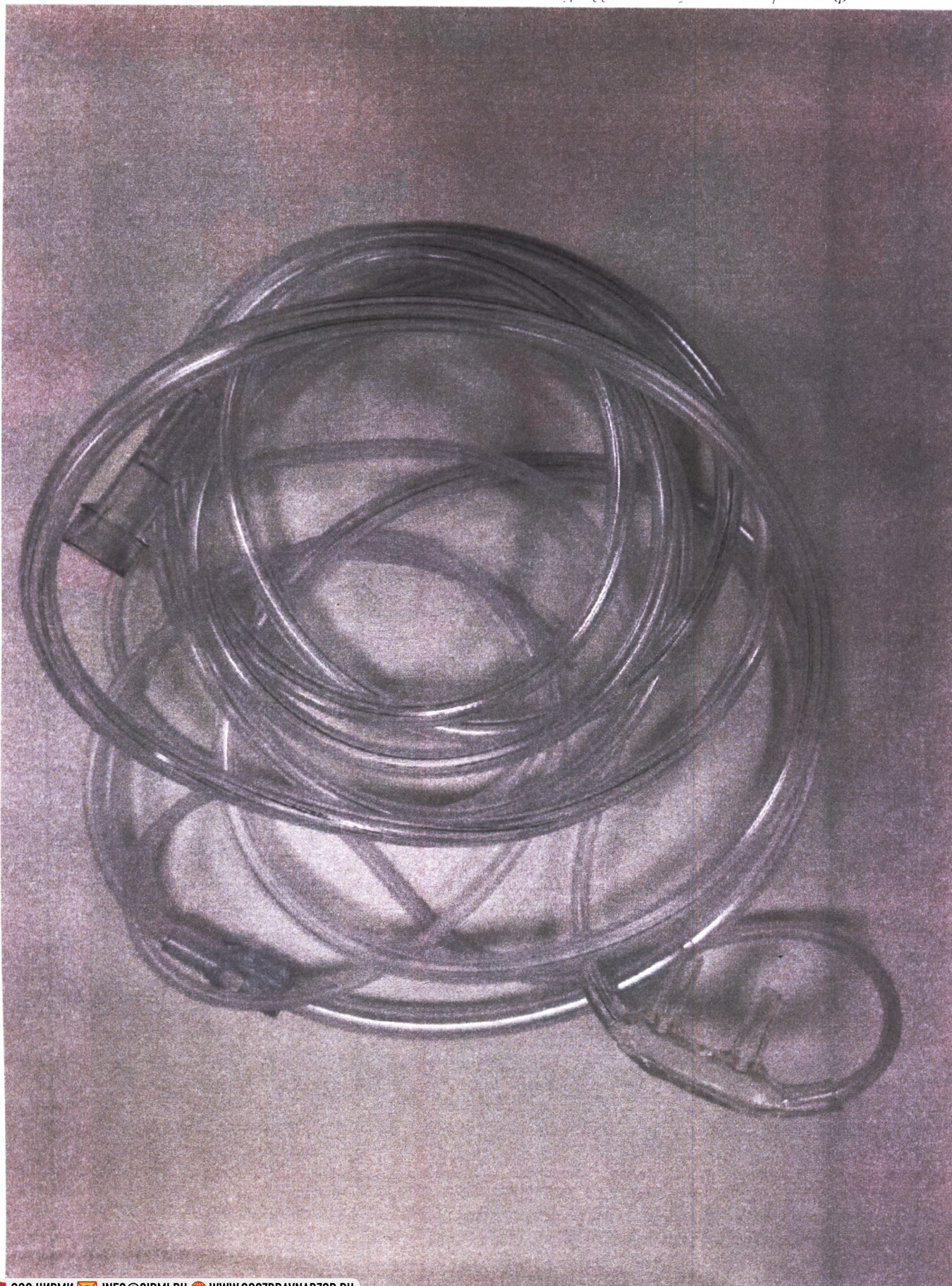



Фотографическое изображение 23 Катетер назальная кислородная (взрослая), кат. АОС-ДН 0721. В упаковке

Nasal Oxygen Cannula

Soft-Touch Adult with 7'(2.1m) Crush
Resistance Tubing



DIRECTIONS FOR USE

REF NOC-DAW0721

1. Wash hands. Remove nasal cannula from package.
2. Attach the end connector to oxygen source or humidifier.
3. Set the flow rate according to physician prescription.
4. Check for gas flow through the device.
5. Insert the nasal tips into the nostrils with the two plastic tubes over the ears and under the chin.
6. Slide adapter up tubing to adjust for comfort and fit. Tighten only enough to secure cannula in nostrils.



Caution

1. For single patient use.
2. Not intended for reprocessing. Discard after use.
3. Do not use if package is open or damaged.
4. Ensure that all connections are secure and air circulates freely through the tubing.



ZOUSTECH S.L.

Pso. Castellana, 141-Planta 19, 28046-Madrid, Spain

Tel: +34694426446 Fax: +34917915466

E-mail: legal@zoustech.eu



6 channel
safty tube



NINGBO RUNMAI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

NO.777 Binghai 4th Road Hangzhou Bay NewZone

315336 Ningbo, Zhejiang, P.R.China

Tel: +86-574-58580387 Fax: +86-574-58580386

Qty: 1

Made in China

Rev: A/0

LOT 220525

 2022-05

 2027-04

Канюля назальная кислородная

Мягкое прикосновение для взрослых с трубкой с сопротивлением к снятию 7 футов (2,1 м)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




NOC-DAW0721

1. Помойте руки. Выньте назальную канюлю из упаковки.
2. Подсоедините концевой разъем к источнику кислорода или увлажнителю.
3. Установите скорость потока в соответствии с назначением врача
4. Проверьте, проходит ли газ через устройство
5. Вставьте носовые наконечники в ноздри с помощью двух пластиковых трубок, закрепив устройство на ушах и под подбородком.
6. Сдвиньте адаптер вверх по трубке, чтобы отрегулировать его для удобства и подгонки. Затяните настолько, чтобы закрепить канюлю в ноздрях



ВНИМАНИЕ!

1. Использовать для одного пациента.
2. Не предназначен для переработки. Выбросить после использования
3. Не использовать, если упаковка открыта или повреждена
4. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены и воздух свободно циркулирует по трубке

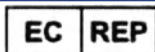

ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141-planta 19, 28046-Madrid, Spain
Тел. +34694426446 Факс: +349179155466
E-mail: legal@zoustech.eu



6-канальная
защитная
трубка



NINGBO RUNMAI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
No.777 Binghai 4th Road HangzhouBay NewZone
315336 Ningbo, Zhejiang, P.R. China
Тел: +86-574-58580387 Факс: +86-574-58580386

Qty: 1

Сделано в Китае



Фотографическое изображение 25 Канюля назальная кислородная (взрослая) кат. NOC-D (Ш0721). Маркировка на русском языке

Символ	Объяснение
	Обратитесь к инструкции по применению
	Номер по каталогу
	Внимание!
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Запрет на повторное применение
	Не Содержит натуральный каучуковый латекс
	6-канальная защитная трубка
	Знак соответствия Директиве CE
	Производитель
	Номер партии
	Дата производства
	Использовать до



Фотографическое изображение 2б — Сумка для переноски;



Фотографическое изображение 2^{ое} Рюкзак для переноски

фотоприкрепление и вложение 28. Фотографии не являются. В приложении не указаны






Фотографическое изображение 29. Фильтр тонкой очистки




Фотографическое изображение 30. Фильтр тонкой очистки в упаковке

«Фотодиагностическое и корректирующее 3D-сканирование монитора» Рисунок 3.1. Показывает, как можно использовать

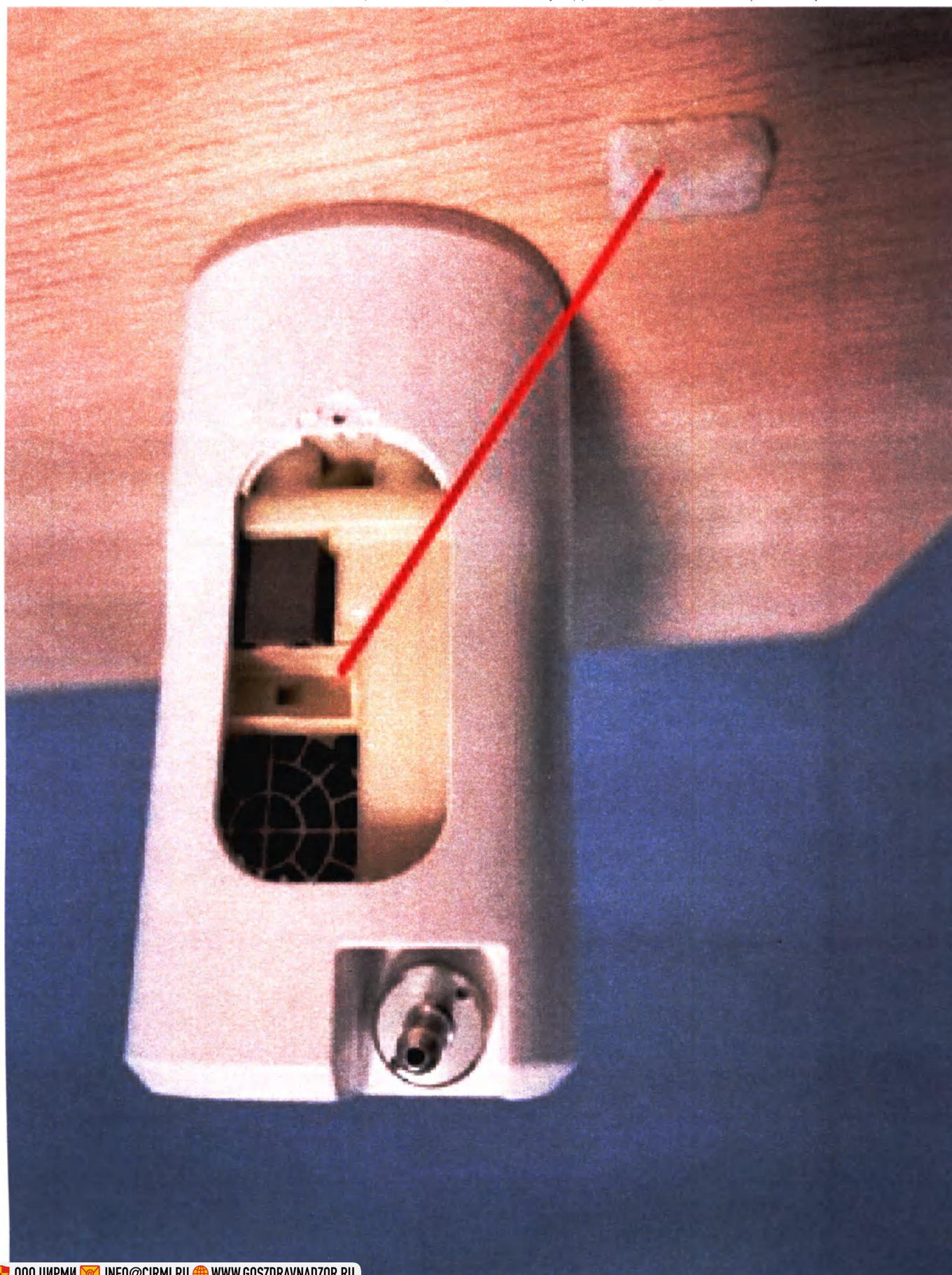

kingon^o

CE
0598

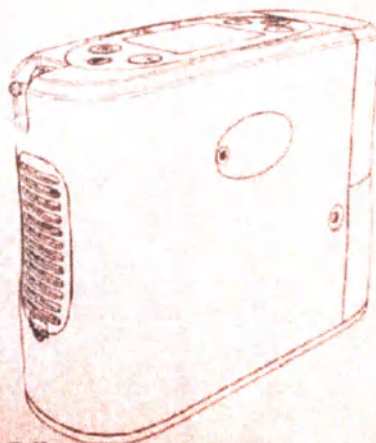

Portable Oxygen Concentrator

Qingdao Kingon Medical Science
and Technology Co., Ltd
Qingdao, Shandong, China
Call: +86 532 58792324
Email: kingonmed@gmail.com
www.kingonmed.com



Фотографическое изображение 3.2 Транспортная упаковка




THIS SIDE UP



FRAGILE



KEEP DRY

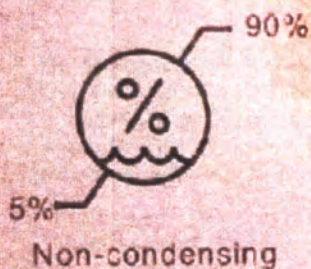

SEE INSTRUCTIONS



Watling Ltd (www.OE-marking.ru)
Enterprise Hub, N/A Business Complex,
1, Berghem Road, Carrystown, Carrystown,
Northern Ireland, UK.



Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co., Ltd. China
Room 301-302, No. 15 Hancheng Road, Qingdao Free Trade Zone,
Shandong, China, 266555

Фотографическое изображение 33 — Транспортная упаковка

Символ	Объяснение
	Верх
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Беречь от влаги
	Диапазон влажности
	Предел температуры
	См. Инструкцию по эксплуатации
	Производитель Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co., Ltd. («Медицинская научно-техническая компания Kingon, Циндао») Room 301-302 (B) No. 15, Hancheng Road, Bonded Port Area, Qingda City, Shandong Province, China (провинция Шаньдун, город Циндао, бондовая портовая зона, улица Ханьчэн, 15, помещение 301-302 (B))
EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе

Концентратор кислорода медицинский портативный «KINGON» в
исполнении Р2, с принадлежностями

Модель Р2

Комплектующее:



«Медицинская научно-техническая компания Kingon, Циндао»
провинция Шаньдун, город Циндао, бондовая портовая зона, улица Ханьчэн, 15,
помещение 301-302 (В)



ООО «РМХ»

105037, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайлово, ул.
Парковая 3-я, д. 29А, офис 3, каб. 203

Фотографическое изображение 34 Маркировка для потребителей РФ

Подпись _____ / Колышкин В.В. /

