

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АСВ ФАРМАЦИЯ»**

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, строение 160 А помещение 17/67
ИНН 6685181067, ОГРН 1206600067651

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «АСВ ФАРМАЦИЯ»



Андронов А.В.

« 24 » мая 2023 г.

Инструкция по применению медицинского изделия

**Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные
нестерильные одноразовые по ТУ 22.19.60-006-46527899-2022**

История изменений	3
1. Наименование медицинского изделия	4
2. Сфера применения медицинского изделия	4
2.1 Назначение	4
2.2 Область применения	4
2.3 Информация о потенциальных потребителях изделия	4
3. Применение медицинского изделия	4
3.1 Показания к применению	4
3.2 Противопоказания	4
3.3 Побочные действия	4
3.4 Использование по назначению	4
3.5 Методика надевания и снятия перчаток	5
4. Описание медицинского изделия	6
5. Технические характеристики	12
6. Условия хранения и транспортировки	26
7. Условия применения медицинского изделия	26
8. Упаковка	26
9. Маркировка	27
10. Комплект поставки	28
11. Гарантийные обязательства и срок годности	28
12. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	28
13. Сведения о изготовителе медицинского изделия	29
Приложение	30

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

№	История изменений	Утвердил:	Дата
1.0	Первый выпуск	Тиминдярова С.В.	25 апреля 2022 г.
1.1	Второй выпуск	Андронов А.В.	10 января 2023 г.
1.2	Третий выпуск	Андронов А.В.	24 мая 2023 г.

1. Наименование медицинского изделия

Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые по ТУ 22.19.60-006-46527899-2022 (далее – перчатки, изделия).

2. Сфера применения медицинского изделия

2.1 Назначение

Перчатки предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.

2.2 Область применения

Лечебно-профилактические учреждения широкого профиля.

2.3 Информация о потенциальных потребителях изделия

Медицинский персонал в лечебно-профилактических учреждениях.

3. Применение медицинского изделия

3.1 Показания к применению

Перчатки необходимо применять при диагностическом осмотре, терапевтических процедурах, медицинских исследованиях, требующих соблюдения требований по защите пациента/медицинского работника от перекрестной инфекции. Перчатки показаны к применению медицинскими работниками, имеющими аллергические реакции на натуральный латекс.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100 % защиты рук от проколов и порезов.

Перчатки предназначены для одноразового применения.

3.2 Противопоказания

Индивидуальная непереносимость или гиперчувствительность к изделиям из нитрильного латекса, а также к гидрогелям с Алюэ Вера, с Алюэ Вера и витамином Е, с ароматом зеленой мяты и гелю обеспечивающему поддержание уровня кислотности кожи pH5,5.

3.3 Побочные действия

Аллергическая реакция.

3.4 Использование по назначению

Перчатки являются эффективным средством, позволяющим предотвратить контаминацию рук медицинского персонала и снизить масштабы передачи потенциально патогенных микроорганизмов.

Необходимо применение правильной техники снятия и надевания перчаток, которая предотвращает контаминацию рук медицинских работников.

Если целостность перчатки нарушена (например, если она проколота), ее следует заменить как можно быстрее и провести гигиеническую антисептику рук.

Время применения одной пары перчаток должно быть непродолжительным. Рекомендуется менять перчатки не реже 1 раза в 20 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- При надевании перчатки всегда следуйте согласно инструкции по надеванию перчаток, чтобы предотвратить любую контаминацию.

- Следует оберегать перчатки и упаковку от механических повреждений.

- Нельзя использовать перчатки при обнаружении повреждения упаковки.

- Нельзя использовать перчатки после окончания срока годности.

- Нельзя касаться своего лица загрязненными перчатками.




- Нельзя касаться окружающих поверхностей дверные ручки, клавиатура, компьютерные мыши.

- После использования никогда не мойте или повторно не используйте одноразовые перчатки.

Если показание для проведения гигиены рук предшествует контакту, который требует также использования перчаток, необходимо провести гигиену рук (обработка антисептиком или мытье с мылом) до надевания перчаток. Руки пользователя после проведения гигиенических процедур должны быть сухими.

3.5 Методика надевания и снятия перчаток



3.5.1 Как надеть перчатки:

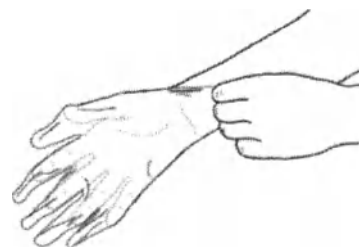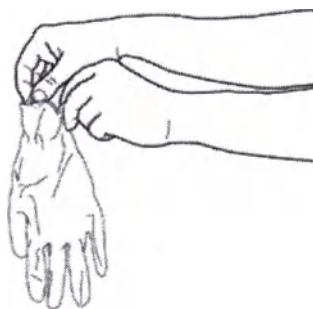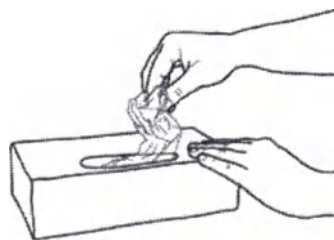

1. Достаньте перчатку из упаковки (коробки).

2. Прикасайтесь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты).

3. Наденьте первую перчатку.

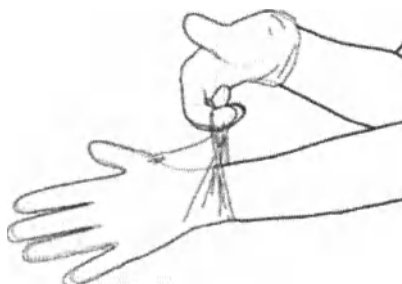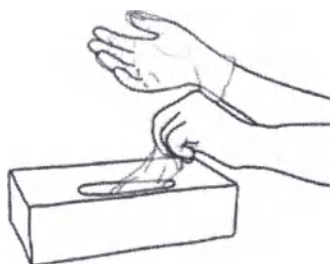



4. Возьмите вторую перчатку рукой без перчатки и прикасайтесь к той части перчатки, которая будет находиться на запястье.

5. Чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья, выверните наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, это позволит вам надеть вторую перчатку.

6. После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток.

3.5.2 Используйте перчатки по назначению.

3.5.3 Как снять перчатки:

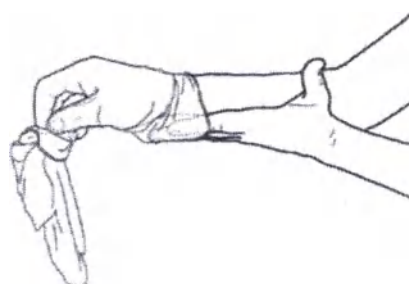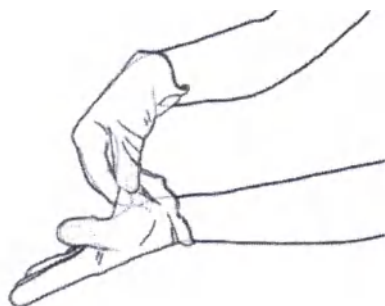

1. Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не дотрагиваясь к коже предплечья, и стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.

2. Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку.

3. Утилизируйте снятые перчатки.

Затем выполните гигиену рук путем гигиенической антисептики или мытья рук с мылом.

4. Описание медицинского изделия

4.1 Перчатки неопудренные, пятипалые, бесшовные, края манжеты закатаны в валик. Форма перчаток плоская, первый палец не противопоставлен четырем другим. Цвет перчаток: голубой, белый, фиолетовый, зелёный.

4.2 Техническое описание перчаток.

4.2.1 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью, должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера и витамином Е

4.2.2 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах, должны соответствовать Таблице 2.

Таблица 2

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера и витамином Е

4.2.3 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 3.

Таблица 3

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера и витамином Е

4.2.4 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 4.

Таблица 4

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера и витамином Е

4.2.5 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью удлинённых, должны соответствовать Таблице 5.

Таблица 5

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера и витамином Е

4.2.6 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах удлиненных, должны соответствовать Таблице 6.

Таблица 6

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера и витамином Е

4.2.7 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 7.

Таблица 7

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера и витамином Е

4.2.8 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 8.

Таблица 8

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера и витамином Е

4.2.9 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью, должны соответствовать Таблице 9.

Таблица 9

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Уровень pH 5,5

4.2.10 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах, должны соответствовать Таблице 10.

Таблица 10

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Уровень pH 5,5

4.2.11 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 11.

Таблица 11

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Уровень pH 5,5

4.2.12 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 12.

Таблица 12

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Уровень pH 5,5

4.2.13 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью удлинённых, должны соответствовать Таблице 13.

Таблица 13

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Уровень pH 5,5

4.2.14 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах удлинённых, должны соответствовать Таблице 14.

Таблица 14

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Уровень pH 5,5

4.2.15 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 15.

Таблица 15

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Уровень pH 5,5

4.2.16 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 16.

Таблица 16

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Уровень pH 5,5

1.2.17 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью, должны соответствовать Таблице 17.

Таблица 17

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера

4.2.18 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах, должны соответствовать Таблице 18.

Таблица 18

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера

4.2.19 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 19.

Таблица 19

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера

4.2.20 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 20.

Таблица 20

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера

4.2.21 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью удлиненных, должны соответствовать Таблице 21.

Таблица 21

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера

4.2.22 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах удлиненных, должны соответствовать Таблице 22.

Таблица 22

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера

4.2.23 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 23.

Таблица 23

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера

4.2.24 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 24.

Таблица 24

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Алоэ вера

4.2.25 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью, должны соответствовать Таблице 25.

Таблица 25

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Зеленая мята

4.2.26 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах, должны соответствовать Таблице 26.

Таблица 26

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Зеленая мята

4.2.27 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 27.

Таблица 27

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Зеленая мята

4.2.28 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 28.

Таблица 28

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Зеленая мята

4.2.29 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью удлинённых, должны соответствовать Таблице 29.

Таблица 29

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Зеленая мята

4.2.30 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах удлиненных, должны соответствовать Таблице 30.

Таблица 30

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Зеленая мята

4.2.31 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности, должны соответствовать Таблице 31.

Таблица 31

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные полностью
	Неопудренные
Обработка поверхности	Зеленая мята

4.2.32 Характеристики перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности должны соответствовать Таблице 32.

Таблица 32

Параметр	Значение
Размеры	XS, S, M, L, XL
Конструкция	Перчатки пятипалые, бесшовные. Удлиненная манжета перчатки с валиком
Отделка поверхности	Текстурированные на пальцах
	Неопудренные
Обработка поверхности	Зеленая мята

4.3 Перчатки выпускают нестерильными. Изделие перед применением не требует стерилизации.

4.4 Изделия предназначены для одноразового применения.

4.5 По потенциальному риску применения перчатки относятся к классу 2а.

5. Технические характеристики

5.1 Значения ширины, длины и толщины перчаток устанавливается в зависимости от их размера или характера поверхности.


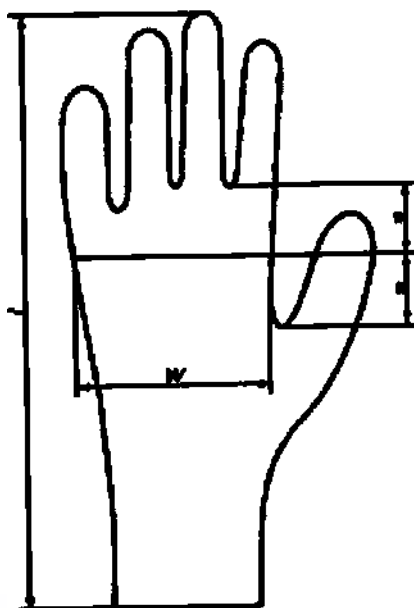


Рисунок 1 – Точки для измерения ширины и длины перчатки

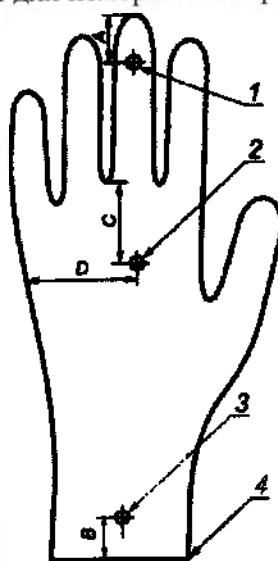

1 – кончик пальца; 2 – ладонь; 3 – манжета; 4 – край манжеты;
 $A=(13\pm3)$ мм; $B=(25\pm5)$ мм; $C=(33\pm5)$ мм; $D=(48\pm9)$ мм.

Рисунок 2 – Точки для измерения толщины стенки перчатки

5.1.1 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 33.

Таблица 33

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75 ± 5	240 ± 5	Толщина в области пальца – $0,12\pm0,03$ Толщина в области ладони – $0,12\pm0,03$ Толщина в области манжеты – $0,10\pm0,02$	$0,3 \div 2,5$
Маленькие (S)	80 ± 5	240 ± 5		$0,3 \div 2,5$
Средние (M)	90 ± 5	240 ± 5		$0,3 \div 2,5$
Большие (L)	105 ± 5	240 ± 5		$0,3 \div 2,5$
Сверхбольшие (XL)	120 ± 5	240 ± 5		$0,3 \div 2,5$

5.1.2 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 34.

Таблица 34

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,12±0,03 Толщина в области ладони – 0,11±0,03 Толщина в области манжеты – 0,08±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.3 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью, повышенной прочности; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 35.

Таблица 35

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.4 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах, повышенной прочности; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 36.

Таблица 36

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.5 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью удлиненных; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 37.

Таблица 37

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,15±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.6 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах удлиненных; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 38.

Таблица 38

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,14±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.7 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 39.

Таблица 39

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.8 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 40.

Таблица 40

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.9 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью удлиненных; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 41.

Таблица 41

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,15±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.10 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах удлиненных; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 42.

Таблица 42

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,14±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.11 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 43.

Таблица 43

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.12 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с алоэ вера и витамином Е текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 44.

Таблица 44

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.13 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 45.

Таблица 45

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,12±0,03 Толщина в области ладони – 0,12±0,03 Толщина в области манжеты – 0,10±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.14 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 46.

Таблица 46

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,12±0,03 Толщина в области ладони – 0,11±0,03 Толщина в области манжеты – 0,08±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.15 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью, повышенной прочности; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 47.

Таблица 47

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.16 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах, повышенной прочности; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 48.

Таблица 48

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.17 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью удлиненных; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 49.

Таблица 49

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,15±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.18 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах удлиненных; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 50.

Таблица 50

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,15±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.19 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 51.

Таблица 51

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.20 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 52.

Таблица 52

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.21 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью удлиненных; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 53.

Таблица 53

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,15±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.22 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах удлиненных; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 54.

Таблица 54

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,14±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.23 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 55.

Таблица 55

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.24 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с уровнем pH 5,5 текстурированных на пальцах удлинённых, повышенной прочности; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 56.

Таблица 56

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.25 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 57.

Таблица 57

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,12±0,03 Толщина в области ладони – 0,12±0,03 Толщина в области манжеты – 0,10±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.26 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 58.

Таблица 58

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,12±0,03 Толщина в области ладони – 0,11±0,03 Толщина в области манжеты – 0,08±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.27 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью, повышенной прочности; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 59.

Таблица 59

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.28 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах, повышенной прочности; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 60.

Таблица 60

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.29 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью удлиненных; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 61.

Таблица 61

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,15±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.30 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах удлиненных; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 62.

Таблица 62

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,14±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.31 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 63.

Таблица 63

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.32 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 64.

Таблица 64

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.33 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью удлиненных; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 65.

Таблица 65

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,15±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,01	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.34 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах удлиненных; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 66.

Таблица 66

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,14±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.35 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 67.

Таблица 67

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.36 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с обработкой алоэ вера текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 68.

Таблица 68

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.37 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 69.

Таблица 69

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,12±0,03 Толщина в области ладони – 0,12±0,03 Толщина в области манжеты – 0,10±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.38 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 70.

Таблица 70

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,12±0,03 Толщина в области ладони – 0,11±0,03 Толщина в области манжеты – 0,08±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.39 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью, повышенной прочности; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 71.

Таблица 71

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.40 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах, повышенной прочности; длина: 240 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 72.

Таблица 72

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	240±5	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	240±5		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	240±5		0,3 ÷ 2,5

5.1.41 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью удлиненных; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 73.

Таблица 73

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,15±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.42 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах удлиненных; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 74.

Таблица 74

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,14±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.43 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 75.

Таблица 75

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.44 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности; длина: 300 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 76.

Таблица 76

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	300±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	300±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	300±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.45 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью удлиненных; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 77.

Таблица 77

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,15±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.46 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах удлиненных; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 78.

Таблица 78

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,15±0,03 Толщина в области ладони – 0,14±0,03 Толщина в области манжеты – 0,13±0,02	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.47 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных полностью удлиненных, повышенной прочности; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 79.

Таблица 79

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,21±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.1.48 Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых с зеленой мятой текстурированных на пальцах удлиненных, повышенной прочности; длина: 400 мм, размеры должны соответствовать указанным в таблице 80.

Таблица 80

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм	Толщина валика, мм
Сверхмалые (XS)	75±5	400±10	Толщина в области пальца – 0,21±0,03 Толщина в области ладони – 0,20±0,03 Толщина в области манжеты – 0,20±0,03	0,3 ÷ 2,5
Маленькие (S)	80±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Средние (M)	90±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Большие (L)	105±5	400±10		0,3 ÷ 2,5
Сверхбольшие (XL)	120±5	400±10		0,3 ÷ 2,5

5.2 Перчатки должны быть герметичными.

5.3 Физико-механические показатели

5.3.1 Физико-механические показатели перчаток, до и после ускоренного старения, должны соответствовать значениям, указанными в таблице 81.

Таблица 81

До ускоренного старения		После ускоренного старения	
Прочность при растяжении, МПа, не менее	Удлинение при разрыве, %, не менее	Прочность при растяжении, МПа, не менее	Удлинение при разрыве, %, не менее
14	500	14	400

5.4 Площадь текстурирования перчатки.

- Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых текстурированных полностью, площадь текстуры включает пальцы и ладонь. Текстурирована ладонь и пальцы с обеих сторон перчатки.

- Для перчаток диагностических медицинских нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых текстурированных на пальцах, площадь текстуры включает пальцы. Текстурированы пальцы с обеих сторон перчатки.

5.5 Материалы, контактирующие с организмом человека.

5.5.1 Материалы перчатки: резиновая смесь на основе нитрильного латекса:

Сополимер акрилонитрил-бутадиен-метакриловой кислоты (нитрильный латекс NL производства Raysen (Tianjin) Healthcare Products Co., Ltd., Китай), CAS № 9010-81-5.

5.5.2 Обработка поверхности перчаток:

– Алоэ вера и витамин Е.

Алоэ Вера и Витамин Е добавляют в промывочную воду для того, чтобы потом при дальнейшем использовании перчаток их было удобно снимать и одевать (Алоэ Вера и Витамин Е придают перчаткам гладкость). Внутренняя поверхность перчаток обработана увлажняющим гидрогелем, содержащим экстракт растения алоэ вера и витамином Е. Увлажняющий гидрогель с алоэ вера и витамином Е способствует увлажнению и смягчению кожи.

В качестве обработки используется Гидрогель косметический «МилдГель» с Алоэ Вера и Витамин Е, производства ООО «Фарммедикал», Россия.

– С уровнем pH 5,5.

В промывочную воду добавляют гель, обеспечивающий поддержание уровня кислотности кожи pH 5,5. Покрытие с pH 5,5 предназначено для питания и увлажнения кожи и облегченного надевания. Перчатки с уровнем pH 5,5 обладают низкой аллергенностью, за счет внутреннего покрытия, позволяющего сохранять физиологическую кислотность кожи (pH 5,5).

В качестве обработки используется гелем, обеспечивающий поддержание уровня кислотности кожи pH 5,5, производства ООО «Фарммедикал», Россия.

– Алоэ вера.

В промывочную воду добавляют гель, содержащий экстракт растения алоэ вера. Алоэ вера является лучшим природным увлажнителем. Внутренняя поверхность перчаток обработана увлажняющим гидрогелем, содержащим экстракт растения алоэ вера. Увлажняющий гидрогель с алоэ вера способствует увлажнению кожи.

В качестве обработки используется Гидрогель косметический «МилдГель» с Алоэ Вера, производства ООО «Фарммедикал», Россия.

– Обработка зелёной мятой.

В промывочную воду добавляют гель с ароматом зеленой мяты. За счет добавления химически нейтрального ароматизатора, перчатки имеют легкий, ароматный запах свежей мяты. Ароматизированы мятой для того, чтобы минимизировать неприятный запах от нитрильного латекса.

В качестве обработки используется Гидрогель косметический «МилдГель» с ароматом зеленой мяты, производства ООО «Фарммедикал», Россия.

Концентрация данных добавок на поверхности перчаток менее 0,05%.

При производстве перчаток для их очистки от примесей последней стадией является промывка перчаток в воде. В воду добавляют маленькие концентрации добавок. В самом составе перчаток данных добавок нет. Концентрация данных добавок настолько мала, что она не влияет на кожу пациента.

5.5.3 При изготовлении перчаток используют следующие красители:

– голубой: Colanyl Blue A2R 100-CN, производства Clariant Pigments (Tianjin) Ltd., Китай;

– белый: Titanium Dioxide, производства Aquaspersions (M) Sdn Bhd, Малайзия;

– фиолетовый: Farsperse® VIOLET PV239, производства Farben Technique (M) Sdn. Bhd., Малайзия;

– зелёный: Farsperse® Green PG704, производства Farben Technique (M) Sdn. Bhd., Малайзия.

5.6 Содержание остаточного опудривающего вещества не более 2 мг/перчатка.

5.7 Поверхность перчаток должна быть без посторонних включений, без пузырей, складок, потеков.

5.8 Перчатки должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при эксплуатации при значениях температуры и относительной влажности воздуха:

температура — от +10 до +35 °C; относительная влажность воздуха — до 85 % при температуре воздуха +25 °C.

Перчатки должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при эксплуатации при значениях температуры тела человека:

температура — от +32 до +42 °C.

5.9 Перчатки в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при транспортировании для условий хранения 5 по ГОСТ 15150, при хранении - температуры от 0 до +25°C, влажности не более 85%.

5.10 Срок годности перчаток с даты выпуска – 3 года.

6. Условия хранения и транспортировки

6.1 Перчатки в транспортной таре перевозятся любым видом крытого транспорта в соответствии с действующими на них нормами и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта. Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

6.2 Перчатки должны храниться в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, прямого воздействия солнечных лучей, источников света и электрического оборудования. При температуре хранения ниже 10°C может возникнуть конденсация. Если температура хранения опустилась ниже 10°C, перчатки перед использованием должны быть нагреты до 25–30°C, иначе могут возникнуть трудности при их надевании вследствие потери их эластичности.

6.3 Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, флуоресцентного освещения, нагревания и влаги, при температуре от 5°C до 35°C.

6.4 Хранение перчаток должно производиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

6.5 Перчатки должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

7. Условия применения медицинского изделия

Перчатки применяются в помещениях при значениях температуры и относительной влажности воздуха:

температура — от +10 до +35 °C; относительная влажность воздуха — до 85 % при температуре воздуха +25 °C.

Перчатки применяются при значениях температуры тела человека:

температура — от +32 до +42 °C.

8. Упаковка

8.1 Перчатки одного исполнения, цвета и размера, в количестве 2 шт. (1 пара) и 20 шт. (10 пар) упаковывают в потребительскую упаковку – в пакет из пленки полиэтиленовой марки Н по ГОСТ 10354, производства ООО «РС-ГЕО», или из пленки полипропиленовой марки НОН, производства ООО «БИАКСПЛЕН».

Перчатки одного исполнения, цвета и размера, в количестве 50 шт. (25 пар), 100 шт. (50 пар), 200 шт. (100 пар) упаковывают в потребительскую упаковку – в коробку, из картона коробочного по ГОСТ 7933, ГОСТ 9142, производства АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

8.2 Размеры потребительской упаковки и количество изделий должны соответствовать таблице 82.

Таблица 82

Исполнение		Кол-во перчаток в потребительской упаковке, шт.	Размеры упаковки						Кол-во потребительской упаковки в транспортной упаковке, шт.
			Потребительская упаковка, ±5 мм			Транспортная упаковка, ±5 мм			
			Д	Ш	В	Д	Ш	В	
Перчатки с манжетой с валиком	200	310	120	70	370	250	320	10	
	100	250	120	70	315	230	210	10	
	50	130	120	40	620	270	170	40	
	20	285	130	-	315	230	210	250	
	2	140	140	-	315	230	210	500	

Продолжение таблицы 82

Перчатки с манжетой с валиком повышенной прочности	200	310	120	140	370	250	320	5
	100	250	120	140	315	230	210	5
	50	250	120	70	315	230	210	10
	20	285	130	-	315	230	210	250
	2	140	140	-	315	230	210	500
Перчатки с удлиненной манжетой с валиком	200	310	120	140	370	250	320	5
	100	250	120	140	315	230	210	5
	50	250	120	70	315	230	210	10
	20	285	130	-	315	230	210	250
	2	140	140	-	315	230	210	500
Перчатки с удлиненной манжетой с валиком повышенной прочности	200	310	120	140	370	250	320	5
	100	250	120	140	315	230	210	5
	50	250	120	70	315	230	210	10
	20	285	130	-	315	230	210	250
	2	140	140	-	315	230	210	500

8.3 Потребительские упаковки укладывают в транспортную упаковку - в ящики из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901, производства ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КАРТОН».

8.4 Транспортная тара с перчатками должна быть оклеена лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

8.5 Эксплуатационная документация должна быть вложена в транспортную тару вместе с изделием.

8.6 Масса брутто транспортной упаковки должна соответствовать таблице 83.

Таблица 83

Кол-во перчаток в потребительской упаковке, шт.	Масса брутто транспортной упаковки, кг
200	7,5
100	3,8
50	7,2
20	10
2	3,5

9. Маркировка

9.1. Символы, применяемые при маркировке:

- «Нитрил»



- «Неопудренные»



- «Микротекстура»



- «Не использовать повторно»



- «Нестерильно»



- «Не применять при повреждении упаковки»




- «Не допускать воздействия солнечного света»



- «Беречь от влаги»



- «Температурный диапазон»

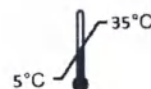

- «Не допускать воздействия озона»



- «Обратитесь к инструкции по применению»



- «Нетоксичные материалы»



- «Маркировка переработки»



- «Выброси мусор в урну»



- «Знак соответствия при декларировании соответствия»



10. Комплект поставки

№	Наименование	Количество
I	Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые по ТУ 22.19.60-006-46527899-2022*	2 или 20 или 50 или 100 или 200 шт. в 1 упаковке
II	Инструкция по применению	1 шт.

*- исполнение Заказчиком из числа представленных: см. приложение.

11. Гарантийные обязательства и срок годности

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

11.2 Гарантийный срок годности – 3 года с даты изготовления.

12. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

12.1 Утилизация перчаток должна проводиться в соответствии с законодательными актами по утилизации отходов потребления и правилами, принятыми в эксплуатирующем медицинском учреждении.

12.2 Перчатки должны подлежать утилизации в случаях:

- после использования по назначению;
- окончания срока годности;
- подтверждения фактов и обстоятельств, свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения либо создающих угрозу жизни и здоровью медработников и пациентов.

12.3 Перчатки с истекшим сроком годности, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, а также упаковка, должны утилизироваться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, относящимися к медицинским отходам класса А.

12.4 Перчатки, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями должны утилизироваться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, относящимися к медицинским отходам класса Б.

13. Сведения о изготовителе медицинского изделия

ООО «АСВ ФАРМАЦИЯ»

Юридический адрес: 620100, Свердловская область, город Екатеринбург, Восточная улица, строение 160а, помещение 17/67.

Адрес места производства: 620024, Свердловская область, город Екатеринбург, Походная улица, дом 81, литер И.

Претензии направлять по адресу:

ООО «АСВ ФАРМАЦИЯ»

Фактический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 19, офис 514.

Тел.: +7 (343) 226-94-84; +7 (922) 119-13-32

E-mail: sale@asvfarma.com

7.1 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные полностью удлиненные, повышенной прочности; длина: 300 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: XS.

7.3 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные полностью удлиненные, повышенной прочности; длина: 300 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: М.

7.5 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные полностью удлиненные, повышенной прочности; длина: 300 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: XL.

8.1 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 300 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: XS.

8.3 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 300 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: М.

8.5 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные*на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 300 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: XL.

9. Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные полностью удлиненные; длина: 400 мм.

9.2 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные полностью удлиненные; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: S.

9.4 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные полностью удлиненные; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: L.

9.5 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с алоэ вера и витамином Е текстурированные полностью удлиненные; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: XL.

16. Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с уровнем pH 5,5 текстурированные на пальцах, повышенной прочности; длина: 240 мм.

19.1 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с уровнем pH 5,5 текстурированные полностью удлиненные, повышенной прочности; длина: 300 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: XS.

25.2 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с обработкой алоэ вера текстурированные полностью; длина: 240 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: S.

31.3 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с обработкой алоэ вера текстурированные полностью удлиненные, повышенной прочности; длина: 300 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: М.

34.4 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с обработкой алоэ вера текстурированные на пальцах удлиненные; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: L.

44. Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 300 мм.

47.2 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные полностью удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: S.

47.3 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные полностью удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: M.

47.4 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные полностью удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: L.

47.5 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные полностью удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: XL.

48. Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм.

48.1 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: XS.

48.2 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: S.

48.3 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: M.

48.4 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: L.

48.5 Перчатки диагностические медицинские нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые с зеленой мятой текстурированные на пальцах удлиненные, повышенной прочности; длина: 400 мм; цвет: голубой, белый, фиолетовый, зелёный; размер: XL.

ООО «АСВ ФАРМАЦИЯ»
Итого в настоящем документе

45 листа (ов)

Директор
Андронов А.В.

