



**Инструкция по применению на медицинское изделие**  
**Комплект защитный одноразовый из нетканых материалов «МЕДБОНД»**  
**по ТУ 32.50.50-011-44813135-2023**

Настоящая инструкция по применению является эксплуатационным документом на медицинское изделие «Комплект защитный одноразовый из нетканых материалов «МЕДБОНД» по ТУ 32.50.50-011-44813135-2023» (далее – «Комплекты» или «Изделие»), в составе:

- Халат процедурный на завязках / на кнопках / на липучке укороченный, с рукавами на манжете / на резинке, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2, 5, 10 шт. / уп.
- Бахилы высокие на завязках / высокие на завязках и резинке / низкие на резинке, плотность: 25, 30, 35, 40, 50, 60 г / м<sup>2</sup>, размеры: 38–48, цвет: белый, голубой, зеленый, черный – 10 пар / уп.
- Шапочка типа «Берет» / «Шарлотта», плотность: 17, 20 г / м<sup>2</sup>, цвет: белый, голубой, зеленый, розовый, желтый, черный – 10 шт. / уп.
- Наручники, плотность: 25, 40 г / м<sup>2</sup>, цвет: белый, голубой, зеленый – 10, 50 пар / уп.
- Халат для хирурга на завязках / на липучке, ворот бейка / оверлок, с рукавами на манжете / на резинке, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40, 42 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2, 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).
- Халат для хирурга ламинированный на завязках / на липучке, ворот бейка / оверлок, с рукавами на манжете / на резинке, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40, 42 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2, 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).
- Комбинезон с застежкой на молнии с планкой / с застежкой на молнии с планкой на липучке, плотность: 25, 30, 35, 40, 50, 60 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2 шт. / уп. (при необходимости).
- Туника хирургическая, плотность 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).
- Рубашка медицинская смотровая, плотность: 25, 30, 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый, розовый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).
- Рубашка роженицы, плотность: 20, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: L, XL, XXL, XXXL, цвет: белый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).
- Брюки медицинские смотровые (гинекологические), плотность: 20, 25, 30, 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).
- Брюки медицинские смотровые для пресотерапии, плотность: 20, 25, 30, 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).
- Брюки хирургические на кулисе, плотность: 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).
- Носки-бахилы, плотность: 20, 25 г / м<sup>2</sup>, размеры: 38–48, цвет: белый, голубой, зеленый, черный – 10 пар / уп. (при необходимости).
- Трусы смотровые процедурные с разрезом / для колоноскопии / без разреза, на резинке / на завязках, плотность: 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, цвет: белый, голубой, зеленый, синий, черный – 5, 10, 20, 25, 30 шт. / уп. (при необходимости).
- Фартук медицинский защитный ламинированный, плотность: 40 г / м<sup>2</sup>, цвет: белый, голубой – 1, 10 шт. / уп. (при необходимости).

- Салфетка хирургическая, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 40×60, 45×45, 45×90, 50×70, 70×80 см, цвет: белый, голубой – 50, 100 шт. / уп. (при необходимости).
- Полотенце в рулонах, плотность: 20, 25 г / м<sup>2</sup>, размеры: 40×60 см, цвет: белый, голубой – 200 шт. / рулон (при необходимости).
- Простыня медицинская в рулонах, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 53×200, 70×200, 80×200 см, цвет: белый, голубой, зеленый, розовый, желтый – 5, 10, 20, 25, 30, 40 шт. / рулон (при необходимости).
- Простыня медицинская, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 50×200, 70×200, 80×200, 100×200, 140×200, 160×200 см, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10, 20, 25, 30, 40 шт. / уп. (при необходимости).
- Простыня медицинская на резинке, плотность: 20, 25 г / м<sup>2</sup>, размер: 140×250, цвет: белый, голубой – 5, 10, 20, 25, 30, 40 шт. / уп. (при необходимости).
- Пододеяльник, плотность 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 140×200, 160×200 см, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2, 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).
- Наволочка, плотность 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 60×60, 70×70, 90×90 см, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 5, 10, 20 шт. / уп. (при необходимости).
- Этикетка – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

**Производитель (изготовитель) медицинского изделия:**

Общество с ограниченной ответственностью ООО «МедБонд» (ООО «МедБонд»)

**Адрес места нахождения производителя (изготовителя):**

197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Чкаловское, пр. Константиновский, дом 19 литера А, помещение 108

**Номер телефона:** 8 (812) 648-70-07

**Адрес электронной почты:** [info@medbond.ru](mailto:info@medbond.ru)

**Назначение:** для поддержания гигиены и предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и медицинским персоналом.

**Область применения и потенциальные потребители:** комплекты могут применяться пациентом или медицинским персоналом на территории медицинских организаций и за их пределами.

По потенциальному риску применения комплекты относятся к изделиям медицинского назначения класса I по ГОСТ 31508 и согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Изделие предназначено для однократного применения.

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации и дезинфекции.

Комплект относится к медицинским изделиям, контактирующим с поверхностью неповрежденной кожи (подгруппа а по ГОСТ ISO 10993-1). Комплект относится к медицинским изделиям кратковременного контакта, общая продолжительность которого составляет не более 24 ч (категория А по ГОСТ ISO 10993-1).

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий изделие относится к группе 3 по ГОСТ 20790.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования изделия относится к классу Г3 по ГОСТ 20790.

**1 Технические характеристики**

**1.1 Общие положения**

1.1.1 Изделия должны соответствовать требованиям конструкторской документации и ТУ 32.50.50-011-44813135-2023

Основные параметры и характеристики  
Размеры изделий, входящих в состав комплектов, должны соответствовать значениям согласно  
табл. 1.1–1.16.

Таблица 1.1 – Размеры халатов

| Изделие                                                                                                              | Размер | Длина, см | Обхват грудной клетки или груди, см | Длина рукава, см |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| Халат для хирурга на завязках / на липучке, ворот бейка / оверлок, с рукавами на манжете / на резинке                | M      | 140       | 129–132                             | 58–60            |
|                                                                                                                      | L      |           | 131–133                             | 60–62            |
|                                                                                                                      | XL     |           | 133–135                             | 61–63            |
| Халат для хирурга ламинированный на завязках / на липучке, ворот бейка / оверлок, с рукавами на манжете / на резинке | XXL    | 140       | 135–137                             | 64–69            |
| Халат процедурный на завязках / на кнопках / на липучке укороченный, с рукавами на манжете / на резинке              | M      | 110       | 129–132                             | 58–60            |
|                                                                                                                      | L      |           | 131–133                             | 60–62            |
|                                                                                                                      | XL     |           | 133–135                             | 61–63            |
|                                                                                                                      | XXL    |           | 135–137                             | 64–69            |

Длина завязок должна быть 40 см. Ширина завязок должна быть 4 см.  
Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.2 – Размеры бахил

| Изделие                                                    | Длина, см | Ширина, см | Высота, см |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Бахилы низкие на резинке                                   | 36–38     | 16,5–17,5  | 16,5–17,5  |
| Бахилы высокие на завязках / высокие на завязках и резинке | 40–42     | 30–31      | 59–64      |
| Носки-бахилы                                               | 36–38     | 16–17      | 16–17      |

Длина завязок должна быть 65 см. Ширина завязок должна быть 4 см.  
Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.3 – Размеры шапочек

| Изделие                 | Длина в сложенном виде, см | Ширина в сложенном виде, см | Диаметр в растянутом виде, см |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Шапочка типа «Шарлотта» | 22–25                      | 1,5–3,5                     | 24–40                         |
| Шапочка типа «Берет»    | 23–26                      | 8–14                        | 20–28                         |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.4 – Размеры трусов процедурных

| Изделие                                                                                           | Размер | Обхват талии, см |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Трусы смотровые процедурные с разрезом / для колоноскопии / без разреза, на резинке / на завязках | L      | 86               |
|                                                                                                   | XL     | 92               |
|                                                                                                   | XXL    | 98               |
|                                                                                                   | XXXL   | 104              |
|                                                                                                   | XXXXL  | 110              |

Длина завязок должна быть 3 см.

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.5 – Размеры простыней медицинских

| Изделие                         | Длина, см | Ширина, см | Диаметр втулки, см |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Простыня медицинская            | 200       | 50         | –                  |
|                                 | 200       | 70         | –                  |
|                                 | 200       | 80         | –                  |
|                                 | 200       | 100        | –                  |
|                                 | 200       | 140        | –                  |
| Простыня медицинская в рулонах  | 200       | 53         | 3                  |
|                                 | 200       | 70         | 3                  |
|                                 | 200       | 80         | 3                  |
| Простыня медицинская на резинке | 250       | 140        | –                  |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.6 – Размеры изделия Полотенце в рулонах

| Изделие             | Длина, см | Ширина, см | Диаметр втулки, см |
|---------------------|-----------|------------|--------------------|
| Полотенце в рулонах | 60        | 40         | 3                  |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.7 – Размеры изделия Салфетка хирургическая

| Изделие                | Длина, см | Ширина, см |
|------------------------|-----------|------------|
| Салфетка хирургическая | 60        | 40         |
|                        | 45        | 45         |
|                        | 45        | 90         |
|                        | 80        | 70         |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.8 – Размеры изделия Комбинезон с застежкой на молнии с планкой / с застежкой на молнии с планкой на липучке

| Размер | Длина, см | Обхват грудной клетки или груди, см |
|--------|-----------|-------------------------------------|
| M      | 200       | 97–103                              |
| L      | 200       | 101–107                             |
| XL     | 200       | 105–111                             |
| XXL    | 200       | 109–115                             |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.9 – Размеры изделия Рубашка медицинская смотровая

| Размер | Длина, см | Обхват грудной клетки или груди, см | Длина рукава, см |
|--------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| XS     | 73–83     | 90–95                               | 56–62            |
| S      | 73–83     | 94–98                               | 57–63            |
| M      | 73–83     | 97–103                              | 58–64            |
| L      | 73–83     | 101–107                             | 59–65            |
| XL     | 73–83     | 105–111                             | 60–66            |
| XXL    | 73–83     | 109–115                             | 61–67            |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.10 – Размеры бюрок

| Размер | Длина, см | Обхват бедер, см |
|--------|-----------|------------------|
| M      | 119       | 99–109           |
| L      | 119       | 103–113          |
| XL     | 119       | 107–117          |
| XXL    | 119       | 111–121          |
| M      | 119       | 99–109           |
| L      | 119       | 103–113          |
| XL     | 119       | 107–117          |
| XXL    | 119       | 111–121          |
| L      | 119       | 99–109           |
| XL     | 119       | 103–113          |
| XXL    | 119       | 107–117          |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.11 – Размеры изделия Рубашка роженицы

| Размер | Длина, см | Обхват грудной клетки или груди, см |
|--------|-----------|-------------------------------------|
| L      | 95        | 131–133                             |
| XL     | 95        | 133–135                             |
| XXL    | 95        | 135–137                             |
| XXXL   | 95        | 137–139                             |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.12 – Размеры фартука

| Изделие                                    | Длина, см | Ширина, см |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Фартук медицинский защитный ламинированный | 135–145   | 70–85      |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.13 – Размеры нарукавников

| Изделие     | Длина, см | Ширина, см |
|-------------|-----------|------------|
| Нарукавники | 34–36     | 19–21      |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.14 – Размеры наволочки

| Изделие   | Длина, см | Ширина, см |
|-----------|-----------|------------|
| Наволочка | 60        | 60         |
|           | 70        | 70         |
|           | 90        | 90         |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.15 – Размеры пододеяльника

| Изделие      | Длина, см | Ширина, см |
|--------------|-----------|------------|
| Пододеяльник | 200       | 140        |
|              | 200       | 160        |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.16 – Размеры туники хирургической

| Размер | Обхват грудной клетки или | Длина рукава, см                    |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|
| P      | 000 ЦИРМИ                 | INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU |

|     |    |         |    |
|-----|----|---------|----|
| L   | 80 | 90–95   | 26 |
| XL  | 81 | 95–100  | 27 |
| XXL | 82 | 100–105 | 28 |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

1.2.2 Масса и плотность изделий, входящих в состав комплектов, должны соответствовать значениям согласно таблицам 1.17–1.38.

Таблица 1.17 – Комбинезон с застёжкой на молнии с планкой / с застёжкой на молнии с планкой на липучке

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
| 25                          | M      | 90–100   |
|                             | L      | 93–103   |
|                             | XL     | 96–106   |
|                             | XXL    | 99–109   |
| 30                          | M      | 93–103   |
|                             | L      | 96–106   |
|                             | XL     | 99–109   |
|                             | XXL    | 102–112  |
| 35                          | M      | 119–129  |
|                             | L      | 122–132  |
|                             | XL     | 125–135  |
|                             | XXL    | 128–138  |
| 40                          | M      | 135–145  |
|                             | L      | 138–148  |
|                             | XL     | 141–151  |
|                             | XXL    | 144–154  |
| 50                          | M      | 173–183  |
|                             | L      | 176–186  |
|                             | XL     | 179–189  |
|                             | XXL    | 182–192  |
| 60                          | M      | 171–181  |
|                             | L      | 174–184  |
|                             | XL     | 177–187  |
|                             | XXL    | 215–225  |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.18 – Рубашка медицинская смотровая

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
| 25                          | XS     | 25–34    |
|                             | S      | 27–37    |
|                             | M      | 30–40    |
|                             | L      | 33–43    |
|                             | XL     | 35–45    |
|                             | XXL    | 38–48    |
| 30                          | XS     | 30–38    |
|                             | S      | 32–42    |
|                             | M      | 35–45    |
|                             | L      | 38–48    |
|                             | XL     | 42–52    |
|                             | XXL    | 46–56    |

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 40 | XS  | 34-42 |
|    | S   | 38-44 |
|    | M   | 42-48 |
|    | L   | 46-52 |
|    | XL  | 50-56 |
| 50 | XXL | 54-60 |
|    | XS  | 36-46 |
|    | S   | 40-50 |
|    | M   | 44-54 |
|    | L   | 48-58 |
|    | XL  | 52-62 |
|    | XXL | 56-66 |
|    | XS  | 40-50 |
|    | S   | 44-54 |
|    | M   | 48-58 |
|    | L   | 52-62 |
|    | XL  | 56-66 |
|    | XXL | 60-70 |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.19 – Брюки медицинские смотровые для прессотерапии

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
| 20                          | M      | 26-28    |
|                             | L      | 29-31    |
|                             | XL     | 31-33    |
|                             | XXL    | 34-36    |
| 25                          | M      | 32-34    |
|                             | L      | 35-37    |
|                             | XL     | 38-40    |
|                             | XXL    | 41-43    |
| 30                          | M      | 36-38    |
|                             | L      | 39-41    |
|                             | XL     | 42-44    |
|                             | XXL    | 45-47    |
| 35                          | M      | 39-41    |
|                             | L      | 42-44    |
|                             | XL     | 46-48    |
|                             | XXL    | 50-52    |
| 40                          | M      | 47-49    |
|                             | L      | 50-52    |
|                             | XL     | 55-57    |
|                             | XXL    | 58-60    |
| 50                          | M      | 50-52    |
|                             | L      | 52-54    |
|                             | XL     | 56-58    |
|                             | XXL    | 59-61    |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.20 – Брюки медицинские смотровые (гинекологические)

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
|-----------------------------|--------|----------|

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 20 | M   | 26-28 |
|    | L   | 29-31 |
|    | XL  | 31-33 |
|    | XXL | 34-36 |
| 25 | M   | 32-34 |
|    | L   | 35-37 |
|    | XL  | 38-40 |
|    | XXL | 41-43 |
| 30 | M   | 36-38 |
|    | L   | 39-41 |
|    | XL  | 42-44 |
|    | XXL | 45-47 |
| 35 | M   | 39-41 |
|    | L   | 42-44 |
|    | XL  | 46-48 |
|    | XXL | 50-52 |
| 40 | M   | 47-49 |
|    | L   | 50-52 |
|    | XL  | 55-57 |
|    | XXL | 58-60 |
| 50 | M   | 50-52 |
|    | L   | 52-54 |
|    | XL  | 56-58 |
|    | XXL | 59-61 |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.21 – Рубашка роженицы

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
| 20                          | L      | 22-32    |
|                             | XL     | 24-34    |
|                             | XXL    | 26-36    |
|                             | XXXL   | 28-38    |
| 40                          | L      | 44-54    |
|                             | XL     | 47-57    |
|                             | XXL    | 50-60    |
|                             | XXXL   | 54-64    |
| 50                          | L      | 49-59    |
|                             | XL     | 54-64    |
|                             | XXL    | 58-68    |
|                             | XXXL   | 63-73    |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.22 – Халат для хирурга на завязках / на липучке, ворот бейка / оверлок, с рукавами на манжете / на резинке и Халат для хирурга ламинированный на завязках / на липучке, ворот бейка / оверлок, с рукавами на манжете / на резинке

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
| 30                          | M      | 88-98    |
|                             | L      | 93-103   |
|                             | XL     | 98-108   |
|                             | XXL    | 103-113  |

|     |         |
|-----|---------|
| M   | 95–105  |
| L   | 98–108  |
| XL  | 101–111 |
| XXL | 104–114 |
| M   | 100–110 |
| L   | 105–115 |
| XL  | 110–120 |
| XXL | 115–125 |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.23 – Халат процедурный на завязках / на кнопках, с рукавами на манжете / на резинке

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
| 17                          | M      | 44–54    |
|                             | L      | 47–57    |
|                             | XL     | 50–60    |
|                             | XXL    | 54–64    |
| 20                          | M      | 71–81    |
|                             | L      | 74–84    |
|                             | XL     | 77–87    |
|                             | XXL    | 80–90    |
| 25                          | M      | 77–87    |
|                             | L      | 80–90    |
|                             | XL     | 83–93    |
|                             | XXL    | 87–97    |
| 30                          | M      | 89–109   |
|                             | L      | 92–102   |
|                             | XL     | 95–105   |
|                             | XXL    | 98–108   |
| 35                          | M      | 102–112  |
|                             | L      | 105–115  |
|                             | XL     | 108–118  |
|                             | XXL    | 111–121  |
| 40                          | M      | 106–116  |
|                             | L      | 109–119  |
|                             | XL     | 112–122  |
|                             | XXL    | 115–125  |
| 42                          | M      | 109–119  |
|                             | L      | 112–122  |
|                             | XL     | 125–135  |
|                             | XXL    | 129–139  |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.24 – Халат процедурный на липучке укороченный, с рукавами на манжете / на резинке

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
| 17                          | M      | 44–54    |
|                             | L      | 47–57    |
|                             | XL     | 50–60    |
|                             | XXL    | 54–64    |
| 20                          | M      | 71–81    |
|                             | L      | 74–84    |

|    |     |         |
|----|-----|---------|
| 25 | XL  | 77–87   |
|    | XXL | 80–90   |
|    | M   | 77–87   |
|    | L   | 80–90   |
| 30 | XL  | 83–93   |
|    | XXL | 87–97   |
|    | M   | 89–109  |
|    | L   | 92–102  |
| 35 | XL  | 95–105  |
|    | XXL | 98–108  |
|    | M   | 102–112 |
|    | L   | 105–115 |
| 40 | XL  | 108–118 |
|    | XXL | 111–121 |
|    | M   | 106–116 |
|    | L   | 109–119 |
| 42 | XL  | 112–122 |
|    | XXL | 115–125 |
|    | M   | 109–119 |
|    | L   | 112–122 |
| 42 | XL  | 123–133 |
|    | XXL | 129–139 |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.25 – Наружавники (1 пара)

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Масса, г |
|-----------------------------|----------|
| 25                          | 10–11    |
| 40                          | 14–16    |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.26 – Бахилы / носки-бахилы (1 пара)

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Модель       | Масса, г  |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| 25                          | Низкие       | 7–13      |
|                             | Высокие      | 22–24     |
| 30                          | Низкие       | 8–14      |
|                             | Высокие      | 25–28     |
| 35                          | Низкие       | 7.5–13.5  |
|                             | Высокие      | 29–35     |
| 40                          | Низкие       | 8.5–12.5  |
|                             | Высокие      | 34–38     |
| 50                          | Низкие       | 10.5–14.5 |
|                             | Высокие      | 42–46     |
| 60                          | Низкие       | 12.5–16.5 |
|                             | Высокие      | 49–53     |
| 20                          | Носки-бахилы | 6–12      |
| 25                          | Носки-бахилы | 8–14      |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.27 – Салфетка хирургическая

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер, см | Масса, г |
|-----------------------------|------------|----------|
|-----------------------------|------------|----------|

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
|    | 40×60 | 3–5       |
|    | 70×80 | 7.5–10.5  |
|    | 50×70 | 6         |
|    | 45×45 | 3         |
|    | 45×90 | 7         |
| 20 | 40×60 | 3–7       |
|    | 70×80 | 8–12      |
|    | 50×70 | 7         |
|    | 45×45 | 4         |
|    | 45×90 | 8         |
| 25 | 40×60 | 5–7       |
|    | 70×80 | 13–16     |
|    | 50×70 | 9         |
|    | 45×45 | 5         |
|    | 45×90 | 10        |
| 30 | 40×60 | 6–10      |
|    | 70×80 | 14–17     |
|    | 50×70 | 10        |
|    | 45×45 | 6         |
|    | 45×90 | 12        |
| 35 | 40×60 | 7.5–11.5  |
|    | 70×80 | 16–20     |
|    | 50×70 | 12        |
|    | 45×45 | 7         |
|    | 45×90 | 14        |
| 40 | 40×60 | 7.5–9.5   |
|    | 70×80 | 20.5–22.5 |
|    | 50×70 | 14        |
|    | 45×45 | 8         |
|    | 45×90 | 16        |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.28 – Фартук медицинский защитный ламинированный

| Изделие         | Масса, г  |
|-----------------|-----------|
| Фартук защитный | 45,5–46,5 |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.29 – Шапочка типа «Берет» / «Шарлотта»

| Изделие                 | Плотность, г/м <sup>2</sup> | Масса, г |
|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Шапочка типа «Шарлотта» | 17                          | 3,0–3,5  |
|                         | 20                          | 4,5–5,0  |
| Шапочка типа «Берет»    | 17                          | 3,0–3,5  |
|                         | 20                          | 4,5–5,0  |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.30 – Трусы смотровые процедурные с разрезом / для колоноскопии / без разреза, на резинке / на завязках

| Размер | Плотность, г/м <sup>2</sup> | Масса одного изделия, г |
|--------|-----------------------------|-------------------------|
| L      | 20                          | 13                      |
| XL     |                             | 17                      |

|       |    |    |
|-------|----|----|
| XXL   | 25 | 18 |
| XXXL  |    | 19 |
| XXXXL |    | 21 |
| L     |    | 14 |
| XL    |    | 18 |
| XXL   | 30 | 19 |
| XXXL  |    | 20 |
| XXXXL |    | 22 |
| L     |    | 15 |
| XL    |    | 19 |
| XXL   | 35 | 20 |
| XXXL  |    | 21 |
| XXXXL |    | 23 |
| L     |    | 16 |
| XL    |    | 18 |
| XXL   | 40 | 21 |
| XXXL  |    | 22 |
| XXXXL |    | 24 |
| L     |    | 18 |
| XL    |    | 20 |
| XXL   | 40 | 23 |
| XXXL  |    | 25 |
| XXXXL |    | 26 |

Примечание – Предельное отклонение массы  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.31 – Полотенце в рулонах

| Изделие   | Плотность, г/м <sup>2</sup> | Масса, г |
|-----------|-----------------------------|----------|
| Полотенце | 20                          | 5        |
|           | 25                          | 6        |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.32 – Брюки хирургические на кулисе

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
| 35                          | L      | 60–62    |
|                             | XL     | 62–64    |
|                             | XXL    | 64–66    |
| 40                          | L      | 83–85    |
|                             | XL     | 84–86    |
|                             | XXL    | 94–96    |
| 50                          | L      | 93–95    |
|                             | XL     | 94–96    |
|                             | XXL    | 96–98    |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.33 – Туника хирургическая

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер | Масса, г |
|-----------------------------|--------|----------|
| 35                          | L      | 34–36    |
|                             | XL     | 36–38    |
|                             | XXL    | 39–41    |
| 40                          | L      | 43–45    |

|     |       |
|-----|-------|
| XL  | 46-48 |
| XXL | 49-51 |
| L   | 48-50 |
| XL  | 51-53 |
| XXL | 54-56 |

Замечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.34 – Простыня медицинская

| Надпись                        | Размер, см | Плотность, г/м <sup>2</sup> | Масса, г |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| Простыня медицинская           | 50×200     | 17                          | 17       |
|                                | 70×200     |                             | 24       |
|                                | 80×200     |                             | 27       |
|                                | 100×200    |                             | 29       |
|                                | 140×200    |                             | 34       |
|                                | 160×200    |                             | 36       |
|                                | 50×200     | 20                          | 20       |
|                                | 70×200     |                             | 28       |
|                                | 80×200     |                             | 32       |
|                                | 100×200    |                             | 36       |
|                                | 140×200    |                             | 41       |
|                                | 160×200    |                             | 45       |
|                                | 50×200     | 25                          | 25       |
|                                | 70×200     |                             | 35       |
|                                | 80×200     |                             | 40       |
|                                | 100×200    |                             | 44       |
|                                | 140×200    |                             | 48       |
|                                | 160×200    |                             | 53       |
|                                | 50×200     | 30                          | 30       |
|                                | 70×200     |                             | 42       |
|                                | 80×200     |                             | 48       |
|                                | 100×200    |                             | 54       |
|                                | 140×200    |                             | 61       |
|                                | 160×200    |                             | 68       |
|                                | 50×200     | 35                          | 35       |
|                                | 70×200     |                             | 49       |
|                                | 80×200     |                             | 56       |
|                                | 100×200    |                             | 63       |
|                                | 140×200    |                             | 72       |
|                                | 160×200    |                             | 78       |
|                                | 50×200     | 40                          | 40       |
|                                | 70×200     |                             | 56       |
|                                | 80×200     |                             | 64       |
|                                | 100×200    |                             | 75       |
|                                | 140×200    |                             | 110      |
|                                | 160×200    |                             | 130      |
| Простыня медицинская в рулонах | 53×200     | 17                          | 18       |
|                                | 70×200     |                             | 24       |
|                                | 80×200     |                             | 27       |
|                                | 53×200     | 20                          | 21       |
|                                |            |                             | 28       |

|                                 |         |    |     |
|---------------------------------|---------|----|-----|
|                                 | 80×200  | 25 | 32  |
|                                 | 53×200  |    | 27  |
|                                 | 70×200  |    | 35  |
|                                 | 80×200  |    | 40  |
|                                 | 53×200  | 30 | 32  |
|                                 | 70×200  |    | 42  |
|                                 | 80×200  |    | 48  |
|                                 | 53×200  |    | 37  |
|                                 | 70×200  | 35 | 49  |
|                                 | 80×200  |    | 56  |
|                                 | 53×200  |    | 42  |
|                                 | 70×200  |    | 230 |
|                                 | 80×200  |    | 260 |
| Простыня медицинская на резинке | 140×250 | 20 | 48  |
|                                 | 140×250 | 25 | 85  |

Примечание – Предельное отклонение массы  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.35 – Наволочка

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер, см | Масса, г |
|-----------------------------|------------|----------|
| 20                          | 60×60      | 24-28    |
|                             | 70×70      | 28-32    |
|                             | 90×90      | 37-41    |
| 25                          | 60×60      | 30-35    |
|                             | 70×70      | 35-40    |
|                             | 90×90      | 44-48    |
| 30                          | 60×60      | 32-36    |
|                             | 70×70      | 38-42    |
|                             | 90×90      | 49-54    |
| 35                          | 60×60      | 37-42    |
|                             | 70×70      | 43-48    |
|                             | 90×90      | 55-60    |
| 40                          | 60×60      | 44-48    |
|                             | 70×70      | 50-55    |
|                             | 90×90      | 65-70    |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

Таблица 1.36 – Пододеяльник

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Размер, см | Масса, г |
|-----------------------------|------------|----------|
| 20                          | 140×200    | 110-124  |
|                             | 160×200    | 150-168  |
| 25                          | 140×200    | 140-154  |
|                             | 160×200    | 190-208  |
| 30                          | 140×200    | 160-178  |
|                             | 160×200    | 220-234  |
| 35                          | 140×200    | 190-204  |
|                             | 160×200    | 240-252  |
| 40                          | 140×200    | 220-234  |
|                             | 160×200    | 245-255  |

Примечание – Предельное отклонение размеров  $\pm 10\%$ .

риалы изготовления представлены в Приложении А к инструкции.

#### Комплектность

Комплект защитный одноразовый из нетканых материалов «МЕДБОНД» по ТУ 32.50.50-011-013135-2023», в составе:

— Халат процедурный на завязках / на кнопках / на липучке укороченный, с рукавами на манжете / на резинке, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2, 5, 10 шт. / уп.

— Бахилы высокие на завязках / высокие на завязках и резинке / низкие на резинке, плотность: 25, 30, 35, 40, 50, 60 г / м<sup>2</sup>, размеры: 38–48, цвет: белый, голубой, зеленый, черный – 10 пар / уп.

— Шапочка типа «Берет» / «Шарлотта», плотность: 17, 20 г / м<sup>2</sup>, цвет: белый, голубой, зеленый, розовый, желтый, черный – 10 шт. / уп.

— Наручники, плотность: 25, 40 г / м<sup>2</sup>, цвет: белый, голубой, зеленый – 10, 50 пар / уп.

— Халат для хирурга на завязках / на липучке, ворот бейка / оверлок, с рукавами на манжете / на резинке, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40, 42 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2, 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Халат для хирурга ламинированный на завязках / на липучке, ворот бейка / оверлок, с рукавами на манжете / на резинке, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40, 42 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2, 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Комбинезон с застежкой на молнии с планкой / с застежкой на молнии с планкой на липучке, плотность: 25, 30, 35, 40, 50, 60 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2 шт. / уп. (при необходимости).

— Туника хирургическая, плотность 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Рубашка медицинская смотровая, плотность: 25, 30, 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый, розовый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Рубашка роженицы, плотность: 20, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: L, XL, XXL, XXXL, цвет: белый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Брюки медицинские смотровые (гинекологические), плотность: 20, 25, 30, 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Брюки медицинские смотровые для прессотерапии, плотность: 20, 25, 30, 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: М, L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Брюки хирургические на кулисе, плотность: 35, 40, 50 г / м<sup>2</sup>, размеры: L, XL, XXL, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Носки-бахилы, плотность: 20, 25 г / м<sup>2</sup>, размеры: 38–48, цвет: белый, голубой, зеленый, черный – 10 пар / уп. (при необходимости).

— Трусы смотровые процедурные с разрезом / для колоноскопии / без разреза, на резинке / на завязках, плотность: 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, цвет: белый, голубой, зеленый, синий, черный – 5, 10, 20, 25, 30 шт. / уп. (при необходимости).

— Фартук медицинский защитный ламинированный, плотность: 40 г / м<sup>2</sup>, цвет: белый, голубой – 1, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Салфетка хирургическая, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 40×60, 45×45, 45×90, 50×70, 70×80 см, цвет: белый, голубой – 50, 100 шт. / уп. (при необходимости).

— Полотенце в рулонах, плотность: 20, 25 г / м<sup>2</sup>, размеры: 40×60 см, цвет: белый, голубой – 200 шт. / рулон (при необходимости).

— Простыня медицинская в рулонах, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 53×200, 70×200, 80×200 см, цвет: белый, голубой, зеленый, розовый, желтый – 5, 10, 20, 25, 30, 40 шт. / рулон (при необходимости).

— Простыня медицинская, плотность: 17, 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 50×200, 70×200, 80×200, 100×200, 140×200, 160×200 см, цвет: белый, голубой, зеленый – 5, 10, 20, 25, 30, 40 шт. / уп. (при необходимости).

— Простыня медицинская на резинке, плотность: 20, 25 г / м<sup>2</sup>, размер: 140×250, цвет: белый, голубой – 5, 10, 20, 25, 30, 40 шт. / уп. (при необходимости).

— Пододеяльник, плотность 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 140×200, 160×200 см, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 2, 5, 10 шт. / уп. (при необходимости).

— Наволочка, плотность 20, 25, 30, 35, 40 г / м<sup>2</sup>, размеры: 60×60, 70×70, 90×90 см, цвет: белый, голубой, зеленый – 1, 5, 10, 20 шт. / уп. (при необходимости).

— Этикетка – 1 шт.

— Инструкция по применению – 1 шт.

Изделия в индивидуальной упаковке укладываются в транспортную тару – коробку/ящик из гофрированного картона.

#### 3 Показания к применению

Поддержание гигиены и предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами.

#### 4 Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изготовления.

#### 5 Побочные эффекты

При применении изделия возможны остаточные эффекты в виде последствий индивидуальной непереносимости материалов или перекрестного заражения ввиду нарушения правил эксплуатации и утилизации. При возникновении аллергических реакций (зуд, раздражение, покраснение кожи в месте контакта) применение изделия необходимо прекратить и обратиться к медицинскому специалисту для принятия мер по устранению таких реакций.

#### 6 Порядок применения

6.1. Извлеките изделие из неповрежденной упаковки, убедитесь в целостности всех деталей изделий комплекта.

6.2. Наденьте изделие и плотно зафиксируйте их с помощью встроенных элементов фиксации.

6.3. После однократного применения изделия подлежат утилизации в соответствии с правилами, приведенными в разделе 11 настоящей инструкции.

#### 7 Требования безопасности и меры предосторожности

7.1 Запрещается применение изделия при наличии внешних повреждений.

7.2 Запрещается применение изделия по истечении гарантийного срока годности.

7.3 Запрещается применение изделия при нарушении целостности упаковки.

7.4 Запрещается повторное применение изделия.

7.5 Максимальное время применения изделий комплекта – 24 ч.

#### 8 Обслуживание

8.1 Изделие не подлежит обслуживанию.

#### 9 Хранение

9.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80%.

9.2 Срок хранения изделия – 5 лет с даты изготовления.

#### 10 Транспортирование

10.1 Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 20790 и правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.

Условия транспортирования изделия – согласно условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 до +50 °С и относительной влажности до 100%.

#### Утилизация

Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684-21.

Изделия с нарушениями целостности упаковки и изделия с истекшим сроком годности соответствуют классу медицинских отходов А.

Изделия, использованные по назначению, соответствуют классу медицинских отходов Б.

В случае контакта с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, изделия относят к классу В.

#### 12 Гарантия изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных техническими условиями и инструкцией по применению.

12.2 Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты изготовления.

#### 13 Сведения о предоставлении рекламаций

13.1 Информация для предоставления рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «МедБонд» (ООО «МедБонд»), 197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Чкаловское, пр. Константиновский, дом 19 литера А, помещение 108

Номер телефона: 8 (812) 648-70-07

Адрес электронной почты: info@medbond.ru

#### 14 Маркировка

14.1 Расшифровка символов маркировки приведена в таблице:

| Символ                                                                             | Расшифровка                              | Символ                                                                              | Расшифровка                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | Производитель                            |    | Нестерильно                               |
|    | Дата производства                        |    | Температурный диапазон                    |
|   | Код партии                               |   | Диапазон влажности                        |
|  | Запрет на повторное применение           |  | Беречь от влаги                           |
|  | Не использовать при повреждении упаковки |  | Не допускать воздействия солнечного света |

#### 15 Применяемые стандарты

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования

ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

| Изделие                                               | Материал, марка, производитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комбинезон с застёжкой на молнии с планкой            | <p>Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полииматиз», Россия</p> <p>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай</p> <p>Застежка-молния: пластик марки ABS, производства ООО «Интер», Россия</p> <p>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия</p> <p>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация</p>                                                                                                                |
| Комбинезон с застёжкой на молнии с планкой на липучке | <p>Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полииматиз», Россия</p> <p>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай</p> <p>Застежка-молния: пластик марки ABS, производства ООО «Интер», Россия</p> <p>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия</p> <p>Застежка текстильная «лента-контакт» (липучка): 100% полиамид, производство «ОРТО Импекс Групп», Россия</p> <p>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация</p> |
| Рубашка медицинская смотровая                         | <p>Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полииматиз», Россия</p> <p>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай</p> <p>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, розовый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Брюки медицинские                                     | <p>Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полииматиз», Россия</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Изделие                                                                                                                                | Материал, марка, производитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| прессотерапии, Брюки медицинские смотровые гинекологические, Халат для хирурга на завязках, ворот бейка/оверлок, с рукавами на резинке | <p>производства АО «Полииматиз», Россия</p> <p>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай</p> <p>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия</p> <p>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Фартук медицинский защитный ламинированный                                                                                             | <p>Основной материал: полотно ламинированное нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полииматиз», Россия</p> <p>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Халат для хирурга ламинированный на завязках, с рукавами на резинке                                                                    | <p>Основной материал: полотно ламинированное нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полииматиз», Россия</p> <p>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай</p> <p>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия</p> <p>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация</p>                                                                                                                |
| Халат для хирурга ламинированный на липучке, с рукавами на резинке                                                                     | <p>Основной материал: полотно ламинированное нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полииматиз», Россия</p> <p>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай</p> <p>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия</p> <p>Застежка текстильная «лента-контакт» (липучка): 100% полиамид, производство «ОРТО Импекс Групп», Россия</p> <p>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация</p> |
| Халат для хирурга                                                                                                                      | <p>Основной материал: полотно ламинированное нетканое</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Изделие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Материал, марка, производитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Укороченный на завязках, с рукавами на манжете                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Мед», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Манжета: 100% полиэстер, производство ООО «МедБонд», Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация                                                                                                                                                                        |
| Халат для хирурга на завязках, ворот бейка/оверлок, с рукавами на резинке, Халат для хирурга укороченный на завязках, ворот бейка/оверлок, с рукавами на манжете, Халат процедурный на завязках, с рукавами на манжете, Халат процедурный на завязках укороченный, с рукавами на манжете                                                                 | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Мед», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Манжета: 100% полиэстер, производство ООО «МедБонд», Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация                                                                                                                                    |
| Халат процедурный на завязках укороченный, с рукавами на резинке<br>Халат для хирурга на липучке, ворот бейка/оверлок, с рукавами на резинке, Халат для хирурга укороченный на липучке, ворот бейка/оверлок, с рукавами на резинке, Халат процедурный на липучке, с рукавами на резинке, Халат процедурный на липучке укороченный, с рукавами на резинке | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Мед», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия<br><br>Застежка текстильная «лента-контакт» (липучка): 100% полиамид, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация |
| Халат для хирурга на липучке, ворот бейка/оверлок, с рукавами на манжете, Халат для хирурга укороченный на липучке, ворот бейка/оверлок, с рукавами на манжете, Халат для хирурга укороченный на липучке, ворот бейка/оверлок, с рукавами на манжете                                                                                                     | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Мед», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Манжета: 100% полиэстер, производство ООО «МедБонд», Россия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Изделие                                                                                                                                                                                                                     | Материал, марка, производитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Халат процедурный на липучке, с рукавами на манжете, Халат процедурный на липучке укороченный, с рукавами на манжете                                                                                                        | Застежка текстильная «лента-контакт» (липучка): 100% полиамид, производство «ОРТО Импекс Групп», Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Халат для хирурга укороченный на завязках, ворот бейка/оверлок, с рукавами на резинке, Халат процедурный на завязках, с рукавами на резинке, Наручники, Шапочка типа «Шарлотта», Шапочка типа «Берет», Брилки хирургические | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Мед», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация                                                                    |
| Халат процедурный на кнопках, с рукавами на резинке, Халат процедурный на кнопках укороченный, с рукавами на резинке                                                                                                        | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Мед», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия<br><br>Кнопка из пластика марки ABS, производства «ООО ПФК» Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация |
| Халат процедурный на кнопках, с рукавами на манжете, Халат процедурный на кнопках укороченный, с рукавами на манжете                                                                                                        | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Мед», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Кнопка из пластика марки ABS, производства «ООО ПФК» Россия<br><br>Манжета: 100% полиэстер, производство ООО «МедБонд», Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000:                                                                                           |

Манжета: 100% полиэстер, производство ООО «МедБонд», Россия

| Изделие                                                                                                                                                                                                        | Материал, марка, производитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бахилы низкие,<br>Бахилы высокие на<br>завязках и резинке,<br>Бахилы-носки,<br>Трусы смотровые<br>процедурные с разрезом<br>на резинке,                                                                        | голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация<br><br>Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, черный, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация |
| Бахилы высокие на<br>завязках,<br>Трусы смотровые<br>процедурные для<br>колоноскопии на завязках                                                                                                               | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, синий, черный, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация                                                                                                                                                              |
| Салфетка хирургическая,<br>Рубашка для рожеиц,<br>Трусы смотровые<br>процедурные с разрезом<br>на завязках,<br>Простыня медицинская                                                                            | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, синий, черный, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Трусы смотровые<br>процедурные с разрезом<br>на резинке,<br>Трусы смотровые<br>процедурные на резинке,<br>Трусы смотровые<br>процедурные для<br>колоноскопии на резинке,<br>Простыня медицинская<br>на резинке | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Шнур/лента эластичная: 100% полиэстер, производства «ОРТО Импекс Групп», Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, синий, черный, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация                                                                       |
| Простыня медицинская                                                                                                                                                                                           | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Изделие                                              | Материал, марка, производитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Картонная втулка, производство Geleon, Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, розовый, желтый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация                                                                                                                                            |
| Полотенце в рулоне                                   | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Картонная втулка, производство Geleon, Россия<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация                                         |
| Наволочка,<br>Пододеяльник,<br>Тунника хирургическая | Основной материал: полотно нетканое термоскрепленное из расплава полипропилена, СС, СМС – 2х слойный, марки «Полиспан®Меди», производства АО «Полиматиз», Россия<br><br>Нитки: 100% пряденный полиэстер, производства «Ningbo MH Industry Co», Китай<br><br>Концентраты добавок и пигментов «БАСКО» цветные (кроме серых и коричневых) на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000: голубой, зеленый, производства ООО НПФ «БАРС-2», Российская Федерация |

Прошито, пронумеровано  
и скреплено *12* листа(ов)  
Генеральный директор  
ООО «МедБонд»  
Стасенко Сергей Сергеевич

