



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "МедКомплект"
Ткалич И.О.

«3» августа 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

**«Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий
одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022»**

2023 г.

Инструкция по применению.

1. Наименование медицинского изделия:

«Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ГУ 14.12.30-010-87401986-2022» (далее – набор или изделие).

2. Производитель:

ООО «МедКомплект», ИНН 7805472016, ОГРН 1089847356543;

198095 г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литер П

Телефон/ факс +7 (812) 326-54-29, e-mail: info@euroday.ru, сайт: www.euroday.ru

3. Назначение:

Набор нестерильных предметов одежды и белья предназначен для использования медицинским персоналом и пациентами во время осмотра пациента или проведения медицинских процедур для поддержания гигиены и предотвращения перекрестного заражения между пациентом и персоналом. Набор предназначен повысить эффективность работы медицинского персонала за счет использования специализированных одноразовых наборов, включающих одежду, белье и необходимые расходные материалы в процессе оказания различных видов медицинской помощи.

4. Область применения: Изделие предназначено для использования в медицинских организациях.

5. Показания к применению наборов:

Изделие используют для обеспечения охраны здоровья медицинского персонала и пациентов.

6. Потенциальный потребитель:

Медицинский персонал и пациенты медицинских организаций.

7. Противопоказания и/или возможные побочные воздействия.

Противопоказаний не выявлено.

Возможна индивидуальная непереносимость на материалы, из которых изготовлены изделия.

8. Функциональные (эксплуатационные) характеристики и назначение медицинского изделия:

Набор применяется при осмотре пациента или при проведении медицинских процедур в качестве физического барьера между медицинским персоналом, пациентом и медицинским оборудованием, с целью предотвращения перекрестного заражения, а также предназначен для повышения эффективности работы медицинского персонала за счет использования специализированных одноразовых наборов.

8.1. Описание и технические характеристики медицинского изделия.

Набор состоит из нескольких одноразовых медицинских изделий, изготовленных из нетканых материалов, закрывающих тело пациента и медицинского персонала (полностью или частично), медицинское оборудование, мебель, и обеспечивающих барьер, который предотвращает прямую передачу инфекционных агентов (микроорганизмов) находящихся в воздухе или в брызгах биологических жидкостей. В состав набора включены предметы одежды, белья и необходимые расходные материалы, используемые во время осмотра пациента и/или проведения медицинских процедур, для сохранения гигиенических условий.

Набор поставляется в нестерильном виде, в потребительской упаковке, готовый к применению.

Набор является одноразовым изделием кратковременного контакта (до 24 часов) с неповрежденной кожей человека. Подлежит замене после каждой процедуры и/или загрязнения.

Повторному использованию, ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.

Класс в зависимости от потенциального риска применения 1 в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. № 4н и по ГОСТ 31508.

Вид изделий в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»: 332470 – набор №№ 1-24, 39-40, 48-54, 330730 – набор №№ 25-38, 41-47.

8.2. Комплект поставки.

8.2.1 В комплект поставки продукции входит:

- Изделия, входящие в состав набора согласно таблице №1, – 1 набор;
- Инструкция – 1 шт.

8.2.2 Для наборов, варианты исполнения № 1- 54, (кроме № 11) применяется Порядок использования медицинского изделия Тип 1, указанный в Инструкции.

Для набора, вариант исполнения № 11 «Набор для врача инфекциониста», применяется «Порядок использования медицинского изделия» Тип 2, указанный в Инструкции.

8.2.3. Для идентификации набора используются порядковые номера от 1 до 54.

8.3. Упаковка.

Изделия упаковываются в потребительскую упаковку, в соответствии с комплектацией. Изделия в потребительских упаковках упаковываются в транспортную упаковку - в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4. Срок хранения:

Срок хранения – 5 лет с даты производства, при соблюдении условий хранения.

5. Условия эксплуатации.

Условия эксплуатации изделий осуществляется при температуре: от плюс 5°C до плюс 35°C и относительной влажности 25-70%.

6. Указания по применению.

6.1. Проверьте срок хранения, указанный на упаковке, в случае истекшего срока хранения изделие непригодно к применению.

6.2. Не допускается использование изделия при наличии механических повреждений. В случае обнаружения нарушения упаковки изделия необходимо визуально осмотреть изделие или использовать новое.

6.3. Изделие одноразового применения.

ВАЖНО! Не используйте повторно одноразовое изделие.

10. Порядок использования медицинского изделия.

10.1 Тип 1. Порядок использования медицинского изделия.

Применяется для наборов, варианты исполнения №1-10, 12-54:

- Ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Проверьте срок хранения.
- Вскройте упаковку.
- Используйте по прямому назначению.
- Применение изделия не требует владения специальными навыками.

10.2. Тип 2. Порядок использования медицинского изделия.

Применяется для набора, вариант исполнения №11 «Набор для врача инфекциониста».

Порядок выполнения надевания защитной одежды при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ:

- ознакомьтесь с информацией на упаковке, проверьте срок хранения.
- вскрыйте упаковку, достаньте изделие.
- обработайте руки спиртосодержащим антисептиком.
- наденьте перчатки.

Комбинезон:

- наденьте брюки комбинезона
- наденьте рукава комбинезона (запрещается надевать одновременно оба рукава во избежание разрыва комбинезона);
- наденьте капюшон после надевания маски/респиратора, очков/экрана;
- застегните застежку комбинезона снизу-вверх.

Халат:

- наденьте халат, завяжите завязки на шее сзади, завяжите пояс на талии;

Куртка и брюки:

- наденьте брюки, завяжите пояс на талии (при наличии);
- наденьте куртку, застегните куртку снизу-вверх, завяжите завязки на шее и завяжите пояс на талии (при наличии);

Бахилы:

- наденьте бахилы, заправив под них брюки, завяжите завязки бахил (при наличии);

Маска, очки, головной убор:

- наденьте маску/респиратор;
- наденьте очки/экран;
- наденьте головной убор (капюшон у комбинезона);
- наденьте вторую пару перчаток, заправьте под них рукава комбинезона/халата/куртки;
- убедитесь в том, что элементы защитной одежды надеты правильно, и непокрытые кожные покровы исключены.

После окончания работы защитную одежду снимают в специально выделенном помещении в обратном порядке:

- снимите верхние перчатки, выворачивая наизнанку;
- снимите бахилы, развязав завязки (при наличии);
- обработайте руки в перчатках в контейнере с дезинфицирующим раствором;

- снимите комбинезон/халат/куртку/брюки и т.п. так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая внутри;
- обработайте руки в перчатках в контейнере с дезинфицирующим раствором;
- снимите очки/экран, не касаясь внутренней стороны;
- снимите маску/респиратор, не касаясь внутренней стороны;
- снимите вторые перчатки, выворачивая наизнанку;
- погружайте использованную одежду в контейнер для отходов класса Б с дезинфицирующим раствором в процессе снятия последовательно, после снятия каждого элемента защитной одежды;
- примите душ и наденьте чистую одежду.

1. Транспортирование и хранение.

1.1. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

1.2. Изделие в транспортной упаковке должно выдерживать воздействие температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, но с ограничением значений температуры хранения от плюс 40 °С до минус 40 °С и при относительной влажности 25-70%.

1.3. При транспортировке коробки с Изделием требуют надёжного закрепления.

1.4. Не допускается падение коробки с Изделием с высоты более 0,5 м.

1.5. Не допускается переворачивание транспортируемых коробок с Изделием в процессе транспортировки.

1.6. При транспортировке коробки с Изделием допускается устанавливать друг на друга не более чем в 5 ярусов.

1.7. Условия хранения Изделия в части воздействия климатических факторов 1 по ГОСТ 15150, но с ограничением значений температуры хранения от +5 °С до +35 °С и при относительной влажности 25-70%

1.8. Изделие хранят в потребительской упаковке в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, вдали от очагов открытого пламени, обогревательных элементов различных типов устройства. Запрещено хранение Изделия во вскрытой упаковке.

12. Сведения об утилизации.

Утилизация изделий должна проводиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса Б.

Изделия, не использованные по назначению с истекшим сроком хранения, утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса А.

13. Инструкция по монтажу, наладке, настройке, калибровке и прочим операциям, необходимым для ввода медицинского изделия в эксплуатацию и для его правильной эксплуатации (применения).

Изделие не является средством измерения, предметом медицинской техники и не требует монтажа, наладки, настройки, калибровки и прочих операций, необходимых для ввода медицинского изделия в эксплуатацию и для его правильной эксплуатации (применения).

14. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует сохранение Изделий в течение 5 лет при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

15. Информация об обстоятельствах, при которых пользователь должен проконсультироваться с медицинским специалистом.

При появлении симптомов аллергической реакции: кожного зуда, покраснения, отека, сыпи – прекратить контакт с аллергеном. При ухудшении общего состояния обратится к врачу.

16. Контактная информация.

По вопросам качества и безопасности медицинского изделия «Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022» обращаться по адресу:

198095, г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литер П.

Телефон факс +7 (812) 326-54-29, e-mail: info@euroday.ru, сайт: www.euroday.ru

17. Актуальность информации:

Август 2023 года.

18. Символы, применяемые при маркировке:

№ п/п	Тип информации	Визуальное изображение
1.	Серийный номер	
2.	Код партии	
3.	Дата изготовления	
4.	Не использовать при повреждении упаковки	
5.	Запрет на повторное применение	
6.	Не допускать воздействия солнечного света	
7.	Беречь от влаги	
8.	Температурный диапазон	
9.	Диапазон влажности	
10.	Обратитесь к инструкции по применению	
11.	Предел по количеству ярусов в штабеле – не более пяти ярусов (n=5)	
12.	Использовать до ...	
13.	Крюками не брать	
14.	Нестерильно	

19. Перечень нормативно-технической документации.

№п/п	Обозначение	Наименование
1.	ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
2.	ГОСТ 15150 -69	Машины, приборы и другие технические Изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения, транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды
3.	ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.
4.	ГОСТ ISO 10993-10-	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских

№п/п	Обозначение	Наименование
	2011	изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и sensibilizing действия.
5.	ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность.
6.	ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
7.	СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Приложение № 1
к Инструкции по применению

Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022, в вариантах исполнения:

1. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала универсальный №1, в составе:
 1. Халат медицинский (размер: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-72) или Халат медицинский с дополнительной защитой (размер: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-72) – не более 20 шт.
 2. Шапочка Берет или Шапочка Колпак или Косынка или Шапочка шлем или Шапочка шлем с впитывающей полосой или Шапочка бандана или Шапочка Василиса или Шапочка медицинская или Капюшон или Шапочка с креплением для очков или масок – не более 10 шт.
 3. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Пончо – не более 10 шт. (при необходимости)
 4. Куртка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)
 5. Брюки (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)
 6. Бахилы высокие или Бахилы с двойной подошвой высокие – не более 20 шт. (при необходимости)
 7. Бахилы низкие или Бахилы с двойной подошвой низкие – не более 20 шт. (при необходимости)
 8. Фартук медицинский или Фартук медицинский с закрытой спиной или Фартук медицинский с рукавами – не более 10 шт. (при необходимости)
 9. Нарукавники медицинские или Нарукавники медицинские с манжетами - не более 20 шт. (при необходимости)
 10. Маска медицинская: Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, варианты исполнения: маска медицинская стандарт - маска медицинская классик элит - маска медицинская утка вертикальная - маска медицинская утка, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673 или Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО "МАСКА", Россия, РУ № ФСР 2010/08512 – не более 10 шт. (при необходимости)
 11. Экран защитный: Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала ЭПГ-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-022-24320270-2008, производства АО "Елатомский Приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2008/03716 – не более 10 шт. (при необходимости)
 12. Перчатки: Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные по ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) варианты исполнения: 1. Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, опудренные, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL. 2. Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, опудренные, гладкие, размеры: XS, S, M, L, XL, производства АО «АЗРИ», Россия, РУ ФСР 2010/08547 или Перчатки смотровые нестерильные по ТУ 32.50.50-001-

02901167-2018 варианты исполнения: 1. Перчатки смотровые нестерильные из натурального латекса опудренные, №№ XS, S, M, L, XL. 2. Перчатки смотровые нестерильные из натурального латекса, неопудренные №№ XS, S, M, L, XL, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия, РУ № РЗН 018/6998 – не более 20 шт. (при необходимости)

3. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт. (при необходимости)

Инструкция по применению.

2. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала смотровой №2, в составе:

1. Шапочка Берет или Шапочка Колпак или Косынка или Шапочка шлем или Шапочка шлем с впитывающей полосой или Шапочка бандана или Шапочка Василиса или Шапочка с козырьком или Шапочка медицинская или Капюшон или Лента завязка медицинская или Шапочка с креплением для очков или масок – не более 100 шт.

2. Маска медицинская: Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, варианты исполнения: маска медицинская стандарт - маска медицинская классик элит - маска медицинская утка вертикальная - маска медицинская утка, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673 или Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО "МАСКА", Россия, РУ № ФСР 2010/08512 – не более 10 шт. (при необходимости)

3. Перчатки: Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные по ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) варианты исполнения: 1. Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, опудренные, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL. 2. Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, опудренные, гладкие, размеры: XS, S, M, L, XL, производства АО «АЗРИ», Россия, РУ ФСР 2010/08547 или Перчатки смотровые нестерильные по ТУ 32.50.50-001-02901167-2018 варианты исполнения: 1. Перчатки смотровые нестерильные из натурального латекса опудренные, №№ XS, S, M, L, XL. 2. Перчатки смотровые нестерильные из натурального латекса, неопудренные №№ XS, S, M, L, XL, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия, РУ № РЗН 2018/6998 – не более 20 шт. (при необходимости)

4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

3. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала стандартный №3, в составе:

1. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Пончо – не более 20 шт.

2. Брюки (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)

3. Бахилы высокие или Бахилы с двойной подошвой высокие – не более 20 шт. (при необходимости)

4. Бахилы низкие или Бахилы с двойной подошвой низкие – не более 20 шт. (при необходимости)

5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

4. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала большой №4, в составе:

1. Куртка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) – не более 20 шт.

2. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Пончо – не более 10 шт. (при необходимости)

3. Брюки (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)

4. Бахилы высокие или Бахилы с двойной подошвой высокие – не более 20 шт. (при необходимости)

5. Бахилы низкие или Бахилы с двойной подошвой низкие – не более 20 шт. (при необходимости)

6. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

5. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала малый №5, в составе:

1. Маска медицинская: Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, варианты исполнения: маска медицинская стандарт - маска медицинская классик элит - маска медицинская утка

вертикальная - маска медицинская утка, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673 или Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО "МАСКА", Россия, РУ № ФСР 2010/08512 – не более 10 шт. (при необходимости)

1. Бахилы высокие или Бахилы с двойной подошвой высокие – не более 20 шт. (при необходимости)
1. Бахилы низкие или Бахилы с двойной подошвой низкие – не более 20 шт. (при необходимости)
1. Брюки (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58) – не более 20 шт.
1. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

6. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала дополнительный средний №6, в составе:

1. Фартук медицинский или Фартук медицинский с закрытой спиной или Фартук медицинский с рукавами – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Нарукавники медицинские или Нарукавники медицинские с манжетами - не более 20 шт. (при необходимости)
3. Бахилы высокие или Бахилы с двойной подошвой высокие – не более 200 шт.
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

7. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала дополнительный малый №7, в составе:

1. Фартук медицинский или Фартук медицинский с закрытой спиной или Фартук медицинский с рукавами – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Нарукавники медицинские или Нарукавники медицинские с манжетами - не более 20 шт. (при необходимости)
3. Бахилы низкие или Бахилы с двойной подошвой низкие – не более 200 шт.
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

8. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала усиленный №8, в составе:

1. Маска медицинская: Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, варианты исполнения: маска медицинская стандарт - маска медицинская классик элит - маска медицинская утка вертикальная - маска медицинская утка, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673 или Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО "МАСКА", Россия, РУ № ФСР 2010/08512 – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Фартук медицинский или Фартук медицинский с закрытой спиной или Фартук медицинский с рукавами – не более 10 шт.
3. Нарукавники медицинские или Нарукавники медицинские с манжетами - не более 20 шт. (при необходимости)
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

9. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала процедурный №9, в составе:

1. Шапочка Берет или Шапочка Колпак или Косынка или Шапочка шлем или Шапочка шлем с впитывающей полосой или Шапочка бандана или Шапочка Василиса или Шапочка медицинская или Капюшон или Шапочка с креплением для очков или масок – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Бахилы высокие или Бахилы с двойной подошвой высокие – не более 20 шт. (при необходимости)
3. Бахилы низкие или Бахилы с двойной подошвой низкие – не более 20 шт. (при необходимости)
4. Нарукавники медицинские или Нарукавники медицинские с манжетами - не более 100 шт.
5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

10. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для медперсонала защитный №10, в составе:

1. Шапочка Берет или Шапочка Колпак или Косынка или Шапочка шлем или Шапочка шлем с впитывающей полосой или Шапочка бандана или Шапочка Василиса или Шапочка медицинская или Капюшон или Шапочка с креплением для очков или масок – не более 10 шт. (при необходимости)
 2. Маска медицинская: Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, варианты исполнения: маска медицинская стандарт - маска медицинская классик элит - маска медицинская утка вертикальная - маска медицинская утка, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673 или Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО "МАСКА", Россия, РУ № ФСР 2010/08512 – не более 10 шт. (при необходимости)
 3. Набородник медицинский – не более 10 шт.
 4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.
- Инструкция по применению.

11. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для врача инфекциониста №11, в составе:

1. Комбинезон (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58, 60-66, 68-74) – не более 10 шт.
2. Халат медицинский (размер: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-72) или Халат медицинский с дополнительной защитой (размер: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-72) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Шапочка Берет или Шапочка Колпак или Косынка или Шапочка шлем или Шапочка шлем с впитывающей полосой или Шапочка бандана или Шапочка Василиса или Шапочка медицинская или Капюшон или Шапочка с креплением для очков или масок – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Набородник медицинский – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Куртка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Брюки (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)
8. Бахилы высокие или Бахилы с двойной подошвой высокие – не более 20 шт. (при необходимости)
9. Бахилы низкие или Бахилы с двойной подошвой низкие – не более 20 шт. (при необходимости)
10. Бахилы полиэтиленовые: Бахилы медицинские одноразового использования по ТУ 9398-002-01054535-2015, 1. Бахилы гладкие, артикулы: БГ1.0Б, БГ1.0С, БГ1.0З, БГ1.3Б, БГ1.3С, БГ1.3З, БГ1.6Б, БГ1.6С, БГ1.6З, БГ1.8С, БГ1.8З, БГ2.0Б, БГ2.0С, БГ2.0З, БГ2.5Б, БГ2.5С, БГ2.5З, БГ3.0Б, БГ3.0С, БГ3.0З., производства ООО «Клевер-Про», Россия, РУ РЗН 2016/3571 или Бахилы медицинские одноразовые, из полиэтилена и нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-33186646-2017 варианты исполнений: 1. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-4/1р-С укор. 2. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-5/1р-С. 3. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-6/1р-С. 21. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-С. 23. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-Ор. 26. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-Ф. 27. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-З. 29. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-Ч. 48. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-10/2р-С. 86. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-15/2р-Ор. 89. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-15/2р-Ф. 90. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-15/2р-З. 92. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-15/2р-Ч. 138. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-9/2р-С-удл. 147. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-7/7/1р-Б-С. 154. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-8/8/1р-Б-С. 155. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-8/8/1р-Б-Ор. 157. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-8/8/1р-Б-Ф. 158. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-8/8/1р-Б-З. 170. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные - арт. ПНД2-8/8/2р-С-С. 171. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные - арт. ПНД2-8/15/2р-С-С. 172. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные - арт. ПНД2-8/18/2р-С-С. 174. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные - арт. ПНД2-8/32/2р-С-С, производства ООО «Элегрин», Россия, РУ РЗН 2017/6348 – не более 20 шт.

(при необходимости)

11. Фартук медицинский или Фартук медицинский с закрытой спиной или Фартук медицинский с рукавами – не более 10 шт. (при необходимости)

12. Нарукавники медицинские или Нарукавники медицинские с манжетами - не более 20 шт. (при необходимости)

13. Маска медицинская: Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, варианты исполнения: маска медицинская стандарт - маска медицинская классик элит - маска медицинская утка вертикальная - маска медицинская утка, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673 или Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО "МАСКА", Россия, РУ № ФСР 2010/08512 – не более 10 шт. (при необходимости)

14. Экран защитный: Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала ЭПГ-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-022-24320270-2008, производства АО "Елатомский Приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2008/03716 – не более 10 шт. (при необходимости)

15. Перчатки: Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные по ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) варианты исполнения: 1. Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, опудренные, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL. 2. Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, опудренные, гладкие, размеры: XS, S, M, L, XL, производства АО «АЗРИ», Россия, РУ ФСР 2010/08547 или Перчатки смотровые нестерильные по ТУ 32.50.50-001-02901167-2018 варианты исполнения: 1. Перчатки смотровые нестерильные из натурального латекса опудренные, №№ XS, S, M, L, XL. 2. Перчатки смотровые нестерильные из натурального латекса, неопудренные №№ XS, S, M, L, XL, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия, РУ № РЗН 2018/6998 – не более 20 шт. (при необходимости)

16. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

12. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 универсальный №12, в составе:

1. Халат медицинский (размер: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-72) или Халат медицинский с дополнительной защитой (размер: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-72) – не более 20 шт.

2. Шапочка Берет или Шапочка Колпак или Косынка или Шапочка шлем или Шапочка шлем с впитывающей полосой или Шапочка бандана или Шапочка Василиса или Шапочка с козырьком или Шапочка медицинская или Капюшон или Лента завязка медицинская или Шапочка с креплением для очков или масок – не более 10 шт. (при необходимости)

3. Бахилы высокие или Бахилы с двойной подошвой высокие – не более 20 шт. (при необходимости)

4. Бахилы низкие или Бахилы с двойной подошвой низкие – не более 20 шт. (при необходимости)

5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

13. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для пациента/посетителя №13, в составе:

1. Халат для посетителя (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Халат кимоно или Халат накидка – не более 20 шт.

2. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)

3. Маска медицинская: Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, варианты исполнения: маска медицинская стандарт - маска медицинская классик элит - маска медицинская утка вертикальная - маска медицинская утка, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673 или Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО "МАСКА", Россия, РУ № ФСР 2010/08512 – не более 10 шт. (при необходимости)

4. Бахилы высокие или Бахилы с двойной подошвой высокие – не более 20 шт. (при необходимости)

5. Бахилы низкие или Бахилы с двойной подошвой низкие – не более 20 шт. (при необходимости)

6. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)

7. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)

8. Бахилы полиэтиленовые: Бахилы медицинские одноразового использования по ТУ 9398-002-01054535-2015, 1.Бахилы гладкие, артикулы: БГ1.0Б, БГ1.0С, БГ1.0З, БГ1.3Б, БГ1.3С, БГ1.3З, БГ1.6Б, БГ1.6С,

БГ1.63, БГ1.8С, БГ1.83, БГ2.0Б, БГ2.0С, БГ2.03, БГ2.5Б, БГ2.5С, БГ2.53, БГ3.0Б, БГ3.0С, БГ3.03., производства ООО «Клевер-Про», Россия, РУ РЗН 2016/3571 или Бахилы медицинские одноразовые, из полиэтилена и нетканого материала по ТУ 32.50.50-00133186646-2017, варианты исполнений: 1. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-4/1р-С укор. 2. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-5/1р-С. 3. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-6/1р-С. 21. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-С. 23. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-Ор. 26. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-Ф. 27. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-3. 29. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-8/1р-Ч. 48. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-10/2р-С. 86. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-15/2р-Ор. 89. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-15/2р-Ф. 90. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-15/2р-3. 92. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-15/2р-Ч. 138. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления - арт. ПНД-9/2р-С-удл. 147. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-7/7/1р-Б-С. 154. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-8/8/1р-Б-С. 155. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-8/8/1р-Б-Ор. 157. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-8/8/1р-Б-Ф. 158. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления с двойной подошвой - арт. ПНД-8/8/1р-Б-3. 170. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные - арт. ПНД2-8/8/2р-С-С. 171. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные - арт. ПНД2-8/15/2р-С-С. 172. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные - арт. ПНД2-8/18/2р-С-С. 174. Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные - арт. ПНД2-8/32/2р-С-С, производства ООО «Элегрин», Россия, РУ РЗН 2017/6348 – не более 20 шт. (при необходимости)

9. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.
Инструкция по применению.

14. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для пациента смотровой №14, в составе:

1. Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Пелерина или Пончо – не более 20 шт.
2. Халат для посетителя (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Халат кимоно или Халат накидка – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Бахилы низкие – не более 20 шт. (при необходимости)
5. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)
6. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
7. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.
Инструкция по применению.

15. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для пациента смотровой малый №15, в составе:

1. Халат для посетителя (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Халат кимоно или Халат накидка – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Тапочки процедурные – не более 200 шт.
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.
Инструкция по применению.

16. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для пациента смотровой средний №16, в составе:

1. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54,

6-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Пелерина или Пончо – не более 10 шт. (при необходимости)

2. Брюки (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58) или Брюки процедурные (размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62) или Юбка – не более 10 шт. (при необходимости)

3. Носки – не более 200 шт.

4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

7. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для пациента процедурный №17, в составе:

1. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Пелерина или Пончо – не более 10 шт. (при необходимости)

2. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)

3. Юбка или Брюки (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58) или Брюки процедурные (размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62) – не более 20 шт

4. Бахилы низкие – не более 20 шт. (при необходимости)

5. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)

6. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)

7. Трусы процедурные мужские или Трусы процедурные женские или Трусы мужские (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54) или Трусы женские (размер: 46-48, 52-54, 54-56) - не более 10 шт. (при необходимости)

8. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

18. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для пациента процедурный малый №18, в составе:

1. Рубашка для лежачего пациента или Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58)– не более 10 шт. (при необходимости)

2. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)

3. Нагрудник или Нагрудник с карманом – не более 20 шт.

4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

19. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для пациента смотровой/процедурный №19, в составе:

1. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58)– не более 10 шт. (при необходимости)

2. Трусы процедурные женские или Трусы процедурные мужские или Трусы мужские (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54) или Трусы женские (размер: 46-48, 52-54, 54-56) – не более 50 шт.

3. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)

4. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)

5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

20. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для пациента реанимации №20, в составе:

1. Рубашка для лежачего пациента – не более 20 шт.

2. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)

3. Бахилы низкие – не более 20 шт. (при необходимости)

4. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)

5. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)

6. Нагрудник или Нагрудник с карманом – не более 10 шт. (при необходимости)
 7. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 8. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.
- Инструкция по применению.

21. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для пациента проктологический №21, в составе:

1. Шорты проктологические (размер: 46-48, 48-50, 50-52, 52-54) – не более 20 шт.
2. Бахилы низкие – не более 20 шт. (при необходимости)
3. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)
4. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
5. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Халат для посетителя (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Халат кимоно или Халат накидка – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
8. Карман медицинский (5-100х5-100см с шагом 1см) или Карман секционный медицинский (10-160х10-160см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
9. Карман-приемник медицинский для сбора жидкости (10-160х10-160см с шагом 1см) или Карман-накопитель медицинский для сбора жидкости (10-160х10-160см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
10. Мешок медицинский (15-200х15-120см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
11. Фиксатор медицинский соединительный – не более 10 шт. (при необходимости)
12. Лента медицинская фиксирующая – не более 10 шт. (при необходимости)
13. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

22. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 гинекологический большой №22, в составе:

1. Рубашка для роженицы (размер: 46-48, 50-52, 52-54) – не более 20 шт.
2. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Бахилы низкие – не более 20 шт. (при необходимости)
4. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)
5. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
6. Трусы процедурные женские или Трусы женские (размер: 46-48, 52-54, 54-56) – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Салфетка многослойная впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см, от 2-х до 20-ти слоев с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
8. Пеленка впитывающая: Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, производства ООО «Медмил», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 и/или Пеленки (простыни) впитывающие одноразовые «Seni», производства ООО «Белла», Россия, РУ № РЗН 2015/2475 – не более 10 шт. (при необходимости)
9. Прокладка: Прокладки женские впитывающие гинекологические под товарным знаком "bella" по ТУ 17.22.12-088-11736425-2020, производства ООО «БЕЛЛА», Россия, РУ № ФСР 2010/08493 и/или Прокладки урологические по ТУ 32.50.50-024-11736425-2017 вариант исполнения: SENI LADY, размеры: micro, mini, mini plus, normal, extra, extra plus, super, plus, производства ООО «БЕЛЛА», Россия, РУ № РЗН 2018/7051 – не более 10 шт. (при необходимости)
10. Подгузник: Подгузники для взрослых «Seni» по ГОСТ Р 55082-2012, производства ООО «Белла», Россия, РУ № 2015/2493 – не более 10 шт. (при необходимости)
11. Прокладка медицинская впитывающая (2,5-120х2,5-70см с шагом 0,5см) – не более 10 шт. (при необходимости)
12. Фиксатор медицинский соединительный – не более 10 шт. (при необходимости)
13. Лента медицинская фиксирующая – не более 10 шт. (при необходимости)
14. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
15. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

23. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 гинекологический малый №23, в составе:

1. Рубашка для роженицы (размер: 46-48, 50-52, 52-54) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Трусы процедурные женские или Трусы женские (размер: 46-48, 52-54, 54-56) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)
4. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
5. Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Прокладка медицинская впитывающая (2,5-120х2,5-70см с шагом 0,5см) – не более 10 шт.
7. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

24. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 акушерско-гинекологический №24, в составе:

1. Рубашка для роженицы (размер: 46-48, 50-52, 52-54) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка бандана или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Трусы процедурные женские или Трусы женские (размер: 46-48, 52-54, 54-56) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Прокладка медицинская впитывающая (2,5-120х2,5-70см с шагом 0,5см) или Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)
6. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
7. Лента умбиликальная (пояс) – не более 10 шт.
8. Салфетка многослойная впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см, от 2-х до 20-ти слоев с шагом-1слоем) – не более 10 шт. (при необходимости)
9. Карман медицинский (5-100х5-100см с шагом 1см) или Карман секционный медицинский (10-160х10-160см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
10. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению

25. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 гинекологический процедурный №25, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Простыня с карманом (60-310х40-310см с шагом 1см) – не более 10 шт.
3. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

26. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 процедурный универсальный №26, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Мешок медицинский (15-200х15-120см с шагом 1см) – не более 10 шт.
4. Фиксатор медицинский соединительный – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

27. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 процедурный дополнительный №27, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при

необходимости)

3. Карман медицинский (5-100х5-100см с шагом 1см) или Карман секционный медицинский (10-160х10-160см с шагом 1см) или Карман-приемник медицинский для сбора жидкости (10-160х10-160см с шагом 1см) или Карман-накопитель медицинский для сбора жидкости (10-160х10-160см с шагом 1см) – не более 10 шт.
 4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.
- Инструкция по применению.

28. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 процедурный усиленный №28, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 2. Фиксатор медицинский соединительный или Лента медицинская фиксирующая – не более 10 шт.
 3. Чехол медицинский на оборудование (диаметр 5-600см с шагом 1см) или Чехол медицинский на эндоскопическое оборудование (20-300х6-100см с шагом 1см) или Чехол медицинский на инструментальный стол (20-600х20-600см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 4. Чехол медицинский на мебель (20-300х20-300см с шагом 1см) или Чехол медицинский на подлокотник (5-100х5-100см с шагом 1см) или Чехол медицинский на подголовник (10-100х10-100см с шагом 1см) - не более 10 шт. (при необходимости)
 5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.
- Инструкция по применению.

29. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 процедурный №29, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 300 шт.
2. Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Салфетка марлевая: Салфетки марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 16427-93 варианты исполнения: - 45 х 29 см (однослойные) по 100 шт.; - 45 х 29 см (двухслойные) по 50 шт.; - 16 х 14 см (однослойные) по 100 шт. или 200 шт.; - 16 х 14 см (двухслойные) по 50 шт. или 100 шт.; - 16 х 14 см (четырёхслойные) по 25 шт. или 50 шт, производства ООО «Емельянь Савостинь. Ватная фабрика», Россия, РУ РЗН № 2015/2817 и/или Салфетки марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-007-10715071-2014 варианты исполнения: 1. Салфетки марлевые медицинские нестерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров: в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 5,0±0,5х5,0±0,5; 7,5±0,5х7,5±0,5; 10,0±0,5х10,0±0,5; 16,0±1,0х14,0±1,0; 45,0±1,5х29,0±1,5 производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, РУ № РЗН 2015/2559 – не более 200 шт. (при необходимости)
5. Бинт марлевый: Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «Емельянь Савостинь. Ватная фабрика», Россия, РУ № ФСР 2010/08979 и/или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014 следующих типоразмеров: 5м х 5см, 5м х 7см, 5м х 10см, 7м х 10см, 7м х 14см, 10м х 16см, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, РУ № РЗН 2015/2557 и/или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 5см, 5м х 7см, 5м х 10см, 7м х 10см, 7м х 14см, 10м х 16см, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, РУ № РЗН 2015/2555 – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Вата: Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и нестерильная, хлопковая и хлопково-вискозная по ГОСТ 5556-81, производства АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ № ФСР 2009/06567 и/или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопко-полиэфирная нестерильная в рулонах массой 25г, 50г, 100г, 150г, 200г, 250г, 500г, 1кг, 2,5кг; спрессованная в кипы массой 20кг, 30кг, 40кг, 50кг; в виде зигзагообразной ленты массой 50г, 100г, 200г; ватного полотна массой 25г, 50г, 100г, 150г, 200г, 250г, 500г, 1кг, 2,5кг по ТУ 9393-004-44881728-2008, варианты исполнения: в рулонах массой 25г, 50г, 100г, 150г, 200г, 250г; в виде зигзагообразной ленты массой 50г, 100г, 200г; ватного полотна массой 25г, 50г, 100г, 150г, производства ООО «Емельянь Савостинь. Ватная фабрика», Россия, РУ № РЗН 2014/2133 и/или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 производства ООО «Емельянь Савостинь. Ватная фабрика», Россия, РУ № ФСР 2010/06930 – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Отрез марлевый: Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ТУ 8461-011-44881728-2010, производства ООО ЕМЕЛЬЯНЬ САВОСТИНЬ. ВАТНАЯ ФАБРИКА», Россия, РУ № ФСР 2010/08978 и/или

Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ТУ 21.20.24-013-71847378-2020, следующих размеров: - ширина: 10,0 см, 15,0 см, 30,0 см, 45,0 см, 80,0 см, 84,0 см, 88,0 см, 90,0 см; - длина: 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м производства ООО «НБЮФАРМ», Россия, РУ № РЗН 2022/17456 – не более 10 шт. (при необходимости)

8. Лейкопластырь: Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 следующих исполнений: I. Основа (подложка): 1. тканая. 2. нетканая. 3. полимерная. II. Размерный ряд, см: 1. тканая и полимерная основа (лейкопластырь в виде рулона намотанного без гильзы (катушки) или на картонную гильзу или пластмассовую катушку): - длина 500,0 х ширина от 1,0 до 5,0 шаг 0,5; - длина 500,0 х ширина свыше 5,0 до 20,0 шаг 1,0. 2. нетканая основа (лейкопластырь в виде рулона намотанного без гильзы (катушки) или на картонную гильзу или пластмассовую катушку): - длина 1000,0 х ширина от 1,0 до 5,0 шаг 0,5; - длина 1000,0 х ширина свыше 5,0 до 30,0 шаг 1,0, производства ООО «НПМ», Россия, РУ № ФСП 2007/00789 и/или Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в следующих исполнениях: - полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) следующих размеров в см: 300х1,0; 500х1,0; 500х2,0; 500х3,0; 500х4,0; 500х5,0; - полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпулю (катушка) следующих размеров в см: 300х1,0; 500х1,0; 500х2,0; 500х3,0; 500х4,0; 500х5,0; - полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием следующих размеров в см: 3,8х3,8; 10,0х4,0; 10,0х6,0; 18,0х10,0, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ № ФСП 2009/05363 и/или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019 в следующих исполнениях: - полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю или без шпули (катушка), следующих размеров в см: 500х1,25; 500х2,5; 500х5,0; 500х10,0; - полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием следующих размеров в см: 3,8х3,8; 1,9х7,2; Ø2,3; Ø3,0, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ № ФСП 2008/03212 – не более 10 шт. (при необходимости)

9. Тампон марлевый: Тампоны марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-011-10715071-2016, варианты исполнения: 1 Тампоны - турунды различных типоразмеров (в развернутом виде): 1,0 ± 0,1м х 1,0 ± 0,2см 1,0 ± 0,1м х 2,0 ± 0,3см 1,0 ± 0,1м х 5,0 ± 0,5см 2,0 ± 0,2м х 1,0 ± 0,2см 2,0 ± 0,2м х 2,0 ± 0,3см 2,0 ± 0,2м х 5,0 ± 0,5см 2,0 ± 0,2м х 7,5 ± 0,5см 2,0 ± 0,2м х 10,0 ± 1,0см 3,5 ± 0,2м х 1,0 ± 0,2см 3,5 ± 0,2м х 2,0 ± 0,3см 3,5 ± 0,2м х 3,0 ± 0,3см 3,5 ± 0,2м х 4,0 ± 0,3см 3,5 ± 0,2м х 5,0 ± 0,5см 3,5 ± 0,2м х 7,5 ± 0,5см 4,0 ± 0,4м х 1,0 ± 0,2см 4,0 ± 0,4м х 2,0 ± 0,3см 4,0 ± 0,4м х 3,5 ± 0,3см 4,0 ± 0,4м х 5,5 ± 0,5см 5,0 ± 0,5м х 1,0 ± 0,2см 5,0 ± 0,5м х 2,0 ± 0,3см 5,0 ± 0,5м х 3,0 ± 0,3см 5,0 ± 0,5м х 4,0 ± 0,3см 5,0 ± 0,5м х 5,0 ± 0,5см 5,0 ± 0,5м х 7,5 ± 0,5см 2. Тампоны - шарики различных типоразмеров (в развернутом виде): - с грецкий орех - 13,0 ± 1,0см х 13,0 ± 1,0см - со сливу - 18,0 ± 1,0см х 18,0 ± 1,0см - с яйцо - 23,0 ± 1,5см х 23,0 ± 1,5см - экстра большой - 33,0 ± 1,5см х 33,0 ± 1,5см - с кулак - 42,0 ± 2,0см х 42,0 ± 2,0см 12. Тампоны фигурные различных типоразмеров (в развернутом виде): 12.1. Шарик: 15,0 ± 1,5см х 15,0 ± 1,5см 20,0 ± 2,0см х 20,0 ± 2,0см 30,0 ± 3,0см х 30,0 ± 3,0см 40,0 ± 4,0см х 40,0 ± 4,0см 50,0 ± 5,0см х 50,0 ± 5,0см 12.2. Фасолька: 7,5 ± 0,5см х 7,5 ± 0,5см 9,5 ± 0,5см х 9,5 ± 0,5см 15,0 ± 1,5см х 15,0 ± 1,5см 12.3. Усик: 10,0 ± 1,0см х 10,0 ± 1,0см 15,0 ± 1,5см х 15,0 ± 1,5см 12.4. Треугольник: 12,0 ± 1,0см х 12,0 ± 1,0см 15,0 ± 1,5см х 15,0 ± 1,5см 18,0 ± 1,5см х 18,0 ± 1,5см 25,0 ± 2,5см х 25,0 ± 2,5см 12.5. Наперсток: 45,0 ± 4,5см х 10,0 ± 1,0см 82,0 ± 8,0см х 26,0 ± 2,0см 12.6. Горошек: 5,0 ± 0,5см х 5,0 ± 0,5см 12,0 ± 1,0см х 12,0 ± 1,0см, производства ООО «ХБК» «Навтекс», РУ № РЗН 2017/6360 – не более 100 шт. (при необходимости)

10. Тампон нетканый впитывающий круглый или Тампон нетканый впитывающий треугольный или Тампон нетканый впитывающий прямоугольный или Тампон нетканый впитывающий удлиненный или Тампон нетканый впитывающий спонж – не более 100 шт. (при необходимости)

11. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

30. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 смотровой №30, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) или Простыня в рулоне (60-310х40-310см с шагом 1см, перфорация с шагом 1см) – не более 300 шт.

2. Бахилы низкие – не более 20 шт. (при необходимости)

3. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)

4. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)

5. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)

6. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)

7. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

31. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 смотровой малый №31, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)
3. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Полотенце нетканое в рулоне (5-145х5-145см с шагом 1см, перфорация с шагом 1см) – не более 300 шт.
5. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

32. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 смотровой расширенный №32, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка ламинированная (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка полиэтиленовая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка в рулоне (3-100х3-100см с шагом 1см, перфорация с шагом 1см) или Салфетка в рулоне впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см, перфорация с шагом 1см) – не более 300 шт.
3. Салфетка с отверстием (3-100х3-100см с шагом 1см, диаметр отверстия 3-30см с шагом 0,5см) или Салфетка с адгезивным краем (3-100х3-100см с шагом 1см – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Лента медицинская фиксирующая – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

33. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 смотровой дополнительный №33, в составе:

1. Подстилка медицинская (20-90х20-90см с шагом 1см) или Подстилка медицинская с адгезивным краем (20-90х20-90см с шагом 1см) или Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт.
2. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Простыня с адгезивным краем (60-310х40-310см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

34. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 смотровой защитный №34, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Чехол медицинский на мебель (20-300х20-300см с шагом 1см) или Чехол медицинский на подлокотник (5-100х5-100см с шагом 1см) или Чехол медицинский на подголовник (10-100х10-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.
4. Фиксатор медицинский соединительный – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Лента медицинская фиксирующая – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

35. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для обследования пациента большой №35, в составе:

1. Простыня с отверстием (60-310х40-310см с шагом 1см, диаметр отверстия 3-60см с шагом 1см) или Простыня с отверстием и адгезивным краем (60-310х40-310см с шагом 1см, диаметр отверстия 3-60см с шагом 1см) или Простыня с адгезивным краем (60-310х40-310см с шагом 1см) – не более 10 шт.
2. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)

4. Трусы процедурные мужские или Трусы процедурные женские – не более 10 шт. (при необходимости)
 5. Фиксатор медицинский соединительный – не более 10 шт. (при необходимости)
 6. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
 7. Прокладка медицинская впитывающая (2,5-120х2,5-70см с шагом 0,5см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 8. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.
- Инструкция по применению.

36. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для обследования пациента малый №36, в составе:

1. Салфетка с отверстием (3-100х3-100см с шагом 1см, диаметр отверстия 3-30см с шагом 0,5см) или Салфетка с адгезивным краем (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка многослойная впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см, от 2-х до 20-ти слоев с шагом-1слой) – не более 10 шт.
 2. Повязка медицинская нетканая фиксирующая (3-160х3-40см с шагом 1см) - не более 10 шт. (при необходимости)
 3. Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.
- Инструкция по применению.

37. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для обследования пациента усиленный №37, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 2. Простыня системная с карманами (60-310х40-310см с шагом 1см) – не более 10 шт.
 3. Мешок медицинский (15-200х15-120см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 4. Фиксатор медицинский соединительный – не более 10 шт. (при необходимости)
 5. Прокладка медицинская впитывающая (2,5-120х2,5-70см с шагом 0,5см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 6. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 7. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.
- Инструкция по применению.

38. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для обследования пациента универсальный №38, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 2. Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 3. Повязка медицинская нетканая фиксирующая (3-160х3-40см с шагом 1см) – не более 10 шт.
 4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 5. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.
- Инструкция по применению.

39. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для физиотерапевтических процедур тип 1 №39, в составе:

1. Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)
 2. Шапочка Берет или Косынка или Шапочка медицинская или Лента завязка медицинская – не более 10 шт. (при необходимости)
 3. Рукавица физиотерапевтическая или Рукавица фигурная физиотерапевтическая – не более 10 шт.
 4. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
 6. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.
- Инструкция по применению.

40. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для физиотерапевтических процедур тип 2 №40, в составе:

1. Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Бахилы низкие – не более 20 шт. (при необходимости)
3. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)
4. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
5. Фиксатор на руку медицинский – не более 10 шт.
6. Бинт нетканый фиксирующий (3-1000х3-40см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
8. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
9. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

41. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 диагностический малый №41, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Тампон нетканый впитывающий круглый или Тампон нетканый впитывающий треугольный или Тампон нетканый впитывающий прямоугольный или Тампон нетканый впитывающий удлиненный или Тампон нетканый впитывающий спонж – не более 100 шт.
3. Рубашка для процедур (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Пелерина или Рубашка (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) или Туника (размер: 46-48, 50-52, 52-54, 56-58) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
5. Носки – не более 20 шт. (при необходимости)
6. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

42. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для отделения функциональной диагностики №42, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Фиксатор медицинский соединительный – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Чехол медицинский на оборудование (диаметр 5-600см с шагом 1см) или Чехол медицинский на эндоскопическое оборудование (20-300х6-100см с шагом 1см) или Чехол медицинский на инструментальный стол (20-600х20-600см с шагом 1см) – не более 10 шт.
5. Лента медицинская фиксирующая – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Мешок медицинский (15-200х15-120см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

43. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для гипсовочного кабинета №43, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Мешок медицинский (15-200х15-120см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Бинт нетканый фиксирующий (3-1000х3-40см с шагом 1см) – не более 10 шт.
4. Повязка медицинская нетканая фиксирующая (3-160х3-40см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Фиксатор медицинский соединительный – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Салфетка многослойная впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см, от 2-х до 20-ти слоев с шагом-1слой) – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Тапочки процедурные – не более 20 шт. (при необходимости)
8. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
9. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

44. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для отделения реанимации большой №44, в составе:

1. Пододеяльник медицинский одноразовый (100-300х60-200см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Наволочка медицинская одноразовая (20-100х20-100см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Наматрасник медицинский одноразовый (40-260х40-210см с шагом 1см) – не более 10 шт.
5. Пеленка медицинская впитывающая (20-150х20-150см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

45. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для отделения реанимации средний №45, в составе:

1. Пододеяльник медицинский одноразовый (100-300х60-200см с шагом 1см) – не более 10 шт.
2. Наволочка медицинская одноразовая (20-100х20-100см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) или Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

46. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 для отделения реанимации малый №46, в составе:

1. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Наволочка медицинская одноразовая (20-100х20-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.
3. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

47. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 патологоанатомический №47, в составе:

1. Мешок патологоанатомический одноразовый – не более 10 шт.
2. Мешок медицинский (15-200х15-120см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) - не более 10 шт.

Инструкция по применению.

48. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 детский смотровой №48, в составе:

1. Кофточка детская – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Брюки детские – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Шапочка детская – не более 10 шт.
4. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

49. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 детский смотровой расширенный №49, в составе:

1. Кофточка детская – не более 10 шт.
2. Шапочка детская – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Накидка детская – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Носки детские – не более 20 шт. (при необходимости)
5. Конверт детский – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Комбинезон детский – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Брюки детские – не более 10 шт. (при необходимости)
8. Маска медицинская: Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, варианты исполнения: - маска медицинская детская - маска медицинская детская элит производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673 – не более 10 шт. (при необходимости)
9. Лента умбиликальная (пояс) – не более 10 шт. (при необходимости)
10. Подстилка медицинская (20-90х20-90см с шагом 1см) или Подстилка с адгезивным краем (20-90х20-90см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
11. Подгузник детский: Подгузники медицинские для детей seni KIDS под товарным знаком «seni» по ТУ 32.50.50-031-11736425-2019, размеры: NEWBORN, MINI, MIDI, MAXI, MAXI PLUS, JUNIOR, JUNIOR EXTRA, производства ООО "Белла", Россия, РУ № РЗН 2018/7802, или Подгузники, подгузники-трусики одноразовые впитывающие для детей с нарушением функции выделения или ограниченными возможностями "iD kids" по ТУ 17.22.12-003-75244903-2017, 1. Подгузники одноразовые впитывающие для детей с нарушением функции выделения или ограниченными возможностями "iD kids", размеры: - Бефо нью борн (Before New Born); - Нью Борн (New Born); - Мини (Mini); - Миди (Midi); - Макси (Maxi); - Юниор (Junior); - ИксЛ (XL). 2. Подгузники-трусики одноразовые впитывающие для детей с нарушением функции выделения или ограниченными возможностями "iD kids", размеры: - Макси (Maxi); - Юниор (Junior); - ИксЛ (XL), производства ООО "Онтэкс РУ", Россия, РУ № РЗН 2018/6754 – не более 10 шт. (при необходимости)
12. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
13. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
14. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

50. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 детский процедурный № 50, в составе:

1. Брюки детские – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Накидка детская – не более 10 шт.
3. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

51. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 детский смотровой малый №51, в составе:

1. Брюки детские – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Носки детские – не более 20 шт.
3. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

52. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 детский смотровой большой №52, в составе:

1. Шапочка детская – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Кофточка детская – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Брюки детские – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Конверт детский – не более 10 шт.
5. Накидка детская – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)

7. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
8. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

53. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 детский процедурный большой №53, в составе:

1. Комбинезон детский – не более 10 шт.
2. Шапочка детская – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Накидка детская – не более 10 шт. (при необходимости)
4. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

54. Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022 детский процедурный малый № 54, в составе:

1. Кофточка детская – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Брюки детские – не более 10 шт.
3. Носки детские – не более 20 шт. (при необходимости)
4. Простыня (60-600х40-600 см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
5. Полотенце нетканое (5-145х5-145см с шагом 1см) – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Салфетка нетканая (3-100х3-100см с шагом 1см) или Салфетка впитывающая (3-100х3-100см с шагом 1см) – не более 10 шт.

Инструкция по применению.

Приложение № 2
к Инструкции по применению

Технические характеристики и описание внешнего вида медицинских изделий, входящих в «Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022»:

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
Комбинезон	размер: с 46 по 74 -длина 150-210 см с шагом в 1 см; -рукава на манжетах / на манжетах с отверстием / на резинках; -с капюшоном/ без капюшона (горловина на липучке /на завязках); -с бахилами/ без бахил; -резинка на спине; -на застежке-молнии (планка на липучке/ без липучек)
Комбинезон детский	-длина изделия 44-84 см с шагом в 1 см; -ширина изделия 130-180 см с шагом в 1 см;
Халат медицинский	-размер с 38 по 72; -длина 85-180 см с шагом в 1 см; -рукав «Т-образный» / рукав реглан; -рукава на манжетах / на резинках/ рукава без фиксации; -горловина на липучке/ на завязках / на кнопках/ с воротником стойка / горловина без воротника; -с запахом спины / без запаха; -с отверстием для пояса / без отверстия / с прикрепленным поясом / с цельновыкроенным поясом; -складки на спине / без складок;
Халат медицинский с дополнительной	-размер с 38 по 72; -длина 85-180 см с шагом в 1 см;

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
защитой	-рукав «Т-образный» / рукав реглан; -рукава на манжетах / на резинках / рукава без фиксации; -горловина на липучке/ на завязках / на кнопках/ с воротником стойка / горловина без воротника/ с капюшоном; -влагонепроницаемый перед; -влагонепроницаемые рукава / влагонепроницаемые рукава 3/4; -с запахом спины / без запаха; -с отверстием для пояса / без отверстия / с прикрепленным поясом / с цельновыкроенным поясом; -складки на спине / без складок;
Халат для посетителя	-размер с 46-58; -длина 90-170 см с шагом в 1 см; -рукава на манжетах / на резинках / рукава без фиксации; -горловина с воротником стойка/ с отложным воротником / горловина без воротника; -с отверстием для пояса / без отверстия / с поясом / с цельновыкроенным поясом / без пояса; -на кнопках / на липучке/ на завязках;
Халат кимоно	-длина 90-170 см с шагом в 1 см; -ширина изделия 55,0-80,0 см с шагом в 1 см; -с коротким / длинным рукавом;
Халат накидка	-длина 90-170 см с шагом в 1 см; -ширина изделия 85-110 см с шагом в 1 см;
Шапочка Берет	-внутренний диаметр 10-20 см с шагом в 1 см; -внешний диаметр 20-37 см с шагом в 1 см; -на резинке; -с впитывающей полосой/ без нее;
Шапочка Колпак	-высота 10-38 см с шагом в 1 см; -длина (в сложенном пополам) 20-33 см с шагом в 1 см; -с впитывающей полосой/ без нее; -с подворотом/без подворота; -на завязках/на резинке;
Косынка	-высота 60-85 см с шагом в 1 см; -длина 80-120 см с шагом в 1 см;
Шапочка шлем	-высота 45-66 см с шагом в 1 см; -ширина (в сложенном виде) 15-37 см с шагом в 1 см; -на резинке с завязками/на завязках; -с пелериной/без пелерины; -с петлей/без нее;
Шапочка шлем с впитывающей полосой	-высота 45-66 см с шагом в 1 см; -ширина (в сложенном виде) 15-37 см с шагом в 1 см; -на резинке с завязками/на завязках; -с пелериной/без пелерины; -с петлей/без нее;
Шапочка бандана	-высота 10,0-23,0 см с шагом в 1 см; -длина (в сложенном пополам) 20-37 см с шагом в 1 см; -на завязках/на завязках с впитывающей полосой/на резинке с впитывающей полосой;
Шапочка Василиса	-высота 10-23 см с шагом в 1 см; -длина (в сложенном пополам) 20-40 см с шагом в 1 см;

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
	-на резинке; -с впитывающей полосой/ без нее;
Шапочка с козырьком	-внутренний диаметр 10-20 см с шагом в 1 см; -внешний диаметр 20-37 см с шагом в 1 см;
Шапочка медицинская	-высота 10-23 см с шагом в 1 см; -длина (в сложенном пополам) 20-33 см с шагом в 1 см; с впитывающей полосой / с впитывающей полосой на лобной части/ с козырьком / без дополнительных элементов;
Капюшон	-высота 30-60 см с шагом в 1 см; -ширина (в сложенном виде) 15-38 см с шагом в 1 см; -с впитывающей полосой/ без впитывающей полосы;
Лента завязка медицинская	-длина (в сложенном пополам) 5-160 см; -ширина 0,8-25,0 см;
Шапочка детская	-высота 10-20 см с шагом в 1 см; -ширина (в сложенном виде) 10-25 см с шагом в 1 см;
Шапочка с креплением для очков или масок	-высота 10-23 см с шагом в 1 см; -длина (в сложенном пополам) 20-33 см с шагом в 1 см;
Набородник медицинский	-высота 20-30 см с шагом в 1 см; -ширина 30-42 см с шагом в 1 см;
Рубашка	-размер 46 по 58; -длина 35-170 см с шагом в 1 см; -горловина с круглым вырезом / с V-образным вырезом; -без карманов / с 1 карманом / с 2 карманами / с 3 карманами/ с 4 карманами; -с коротким /длинным рукавом; -на завязке/ без завязки;
Туника	-размер с 46 по 58; -длина 35-170 см с шагом в 1 см; -без карманов / с 1 карманом / с 2 карманами / с 3 карманами; -с коротким /длинным рукавом;
Пелерина	-длина 30-150 см с шагом в 1 см; -ширина 30-210 см с шагом в 1 см; -на резинке с липучками / с двумя резинками на завязках;
Пончо	-длина 20-230 см с шагом в 1 см; -ширина 20-200 см с шагом в 1 см;
Рубашка для процедур	-размер с 46 по 58; -длина 35-170 см с шагом в 1 см;
Рубашка для роженицы	-размер с 46 по 54; -длина 80-170 см с шагом в 1 см; -с кокеткой / с углубленной кокеткой/ без кокетки;
Кофточка детская	-длина 20-40 см с шагом в 1 см; -ширина 20-35 см с шагом в 1 см; с закрытым рукавом / с открытым рукавом;
Накидка детская	-длина 50-110 см с шагом в 1 см; -ширина (в сложенном пополам) 15,0-80,0 см с шагом в 1 см;
Конверт детский	-длина 30 -100 см с шагом в 1 см; -ширина 25 - 80 см с шагом в 1 см;

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
	- на липучках/без липучек; -на застежке-молнии/без застежки-молнии; -с клапаном/ без клапана;
Рубашка для лежачего пациента	-длина 50-150 см с шагом в 1 см; -ширина 50-85 см с шагом в 1 см; - на липучке/на завязках;
Куртка	-размер с 46 по 58; -длина 60-170 см с шагом в 1 см; -на застежке-молнии/на липучке/на кнопках; -без карманов / с 1 карманом / с 2 карманами / с 3 с карманами/ с 4 карманами; -с коротким / длинным рукавом; -рукава на манжетах / рукава на резинке / без фиксации;
Брюки	-размеры с 46 по 58; -длина 50-140 см с шагом в 1 см; -на завязке / на резинке; -низ без резинки / низ на резинке; -без карманов / с 1 карманом / с 2 с карманами / с 3 карманами/ с 4 карманами/ спереди / сзади;
Юбка	-длина 30-150 см с шагом в 1 см; -ширина 30-210 см с шагом в 1 см; -на резинке с завязками / на резинке с липучкой / на завязках;
Шорты проктологические	-размер с 46 по 54; -длина 20- 80 см с шагом в 1 см;
Трусы мужские	-размер с 46 по 54; -на резинке/ на завязке;
Брюки детские	-длина 25-55 см с шагом в 1 см; -ширина 20-50 см с шагом в 1 см; -закрытые/открытые
Брюки процедурные	-размер с 36 по 62; -длина 97-170 см с шагом в 1 см;
Трусы процедурные мужские	-длина 13-33 см с шагом 1 см; -ширина 15-35 см с шагом в 1 см; -на резинке/на завязке;
Трусы процедурные женские	-длина 13-33 см с шагом 1 см; -ширина 15-35 см с шагом в 1 см; -на резинке/на завязке;
Трусы женские	-размер с 46 по 56; -на резинке / с тремя резинками;
Бахилы высокие	-высота 15-70 см с шагом в 1 см; -длина ступни 18-50 см с шагом в 1 см; -на резинке/на резинках/ на завязке/ на завязках /на манжете;

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
Бахилы низкие	-высота 5-45 см с шагом в 1 см; -длина ступни 18-50 см с шагом в 1 см; -на резинке/ на манжете;
Бахилы с двойной подошвой высокие	-высота 15-70 см с шагом в 1 см; -длина ступни 18-50 см с шагом в 1 см; -на резинке/на резинках/ на завязке/ на завязках /на манжете;
Бахилы с двойной подошвой низкие	-высота 5-45 см с шагом в 1 см; -длина ступни 18-50 см с шагом в 1 см; -на резинке/ на манжете;
Носки	-высота 15-30 см с шагом в 1 см; -длина ступни 18-50 см с шагом в 1 см;
Тапочки процедурные	-длина ступни 10-25 см с шагом в 1 см; -ширина 18-35 см с шагом в 1 см;
Носки детские	-высота 5-20 см с шагом в 1 см; -ширина 4-15 см с шагом в 1 см; -на манжете/ без манжеты;
Фартук медицинский	-длина 80-200 см с шагом в 1 см; -ширина 40-100 см с шагом в 1 см; -на завязках / цельнокроенный
Фартук медицинский с закрытой спиной	-длина 140-280 см с шагом в 1 см; -ширина 40-100 см с шагом в 1 см; -с цельновыкроенным поясом / с отдельным поясом;
Фартук медицинский с рукавами	-длина 80-200 см с шагом в 1 см; -ширина 40-120 см с шагом в 1 см; -с цельновыкроенным поясом / с отдельным поясом;
Нагрудник	-длина 30-160 см с шагом в 1 см; -ширина 30-160 см с шагом в 1 см;
Нагрудник с карманом	-длина 30-110 см с шагом в 1 см; -ширина 25-55 см с шагом в 1 см;
Нарукавники медицинские	-длина 20-60 см с шагом в 1 см; -ширина 10-35 см с шагом в 1 см;
Нарукавники медицинские с манжетами	-длина 20-60 см с шагом в 1 см; -ширина 10-35 см с шагом в 1 см;
Рукавица физиотерапевтическая	-длина 15-45 см с шагом в 1 см; -ширина 10-30 см с шагом в 1 см;
Рукавица физиотерапевтическая фигурная	-длина 15-45 см с шагом в 1 см; -ширина 15-45 см с шагом в 1 см;

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
Салфетка нетканая	-длина 3-100 см с шагом в 1 см; -ширина 3-100 см с шагом в 1 см; -с разрезом/ с Y-образным разрезом/без разреза;
Салфетка впитывающая	
Салфетка ламинированная	
Салфетка полиэтиленовая	
Салфетка с отверстием	-длина 3-100 см с шагом в 1 см; -ширина 3-100 см с шагом в 1 см; -диаметр отверстия 3- 30 см с шагом 0,5 см;
Салфетка с адгезивным краем	-длина 3-100 см с шагом в 1 см; -ширина 3-100 см с шагом в 1 см;
Салфетка многослойная впитывающая	-длина 3-100 см с шагом в 1 см; -ширина 3-100 см с шагом в 1 см; -с разрезом/ с Y-образным разрезом/без разреза; -с петлей/ без петли; -от 2-х до 20 слоев, с шагом-1слой;
Салфетка в рулоне	-длина 3-100 см с шагом в 1 см, перфорация с шагом в 1 см; -ширина 3-100 см с шагом в 1 см;
Салфетка в рулоне впитывающая	
Прокладка медицинская впитывающая	-длина 2,5-120 см с шагом в 0,5 см; -ширина 2,5-70 см с шагом в 0,5 см;
Полотенце нетканое	-длина 10-145 см с шагом в 1 см; -ширина 10-145 см с шагом в 1 см;
Полотенце нетканое в рулоне	-длина 10-145 см с шагом в 1 см, перфорация с шагом в 1 см; -ширина 10-145 см с шагом в 1 см;
Тампон нетканый впитывающий круглый	-диаметр 1-12 см шагом в 1 см;
Тампон нетканый впитывающий треугольный	-длина 1-18 см с шагом в 1 см; -ширина 1-18 см с шагом в 1 см;
Тампон нетканый впитывающий прямоугольный	-длина 1-12 см с шагом в 1 см; -ширина 1-12 см с шагом в 1 см;

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
Тампон нетканый впитывающий удлиненный	-ширина 0,5-5 см с шагом в 0,5 см; -длина 3-20 см с шагом в 1 см;
Тампон нетканый впитывающий спонж	-диаметр 1-10 см с шагом в 0,5 см
Повязка медицинская нетканая фиксирующая	-длина 3-160 см с шагом в 1 см; -ширина 3-40 см с шагом в 1 см; - с 1 адгезивным слоем/ с 2 адгезивными слоями
Бинт нетканый фиксирующий	-длина 3-1000 см с шагом в 1 см; -ширина 3-40 см с шагом в 1 см;
Фиксатор медицинский соединительный	-длина 10-600 см с шагом в 1 см; -ширина 0,8-20 см с шагом в 0,8 см; -с формообразующим элементом.
Лента медицинская фиксирующая	-длина 10-600 см с шагом в 1 см; -ширина 0,8-20 см с шагом в 0,8 см;
Лента умбиликальная (пояс)	-длина 10-210 см с шагом в 1 см; -ширина 1-20 см с шагом в 0,5 см;
Фиксатор на руку медицинский	-длина 20-110 см с шагом в 1 см; -ширина 20-110 см с шагом в 1 см; - на липучке/ без липучки;
Мешок медицинский	-длина 15-200 см с шагом в 1 см; -ширина 15-120 см с шагом в 1 см; -на резинке/ на завязке/ на липучке/ на застежке-молнии; -с ручкой/с ручками/ без ручек; -с фиксатором/фиксатором и карманами/без них; -с карманом/с 2,3,4,5,6 карманами;
Мешок патологоанатомический и одноразовый	-длина 100-300 см с шагом в 1 см; -ширина 60-300 см с шагом в 1 см; - на застежке-молнии/ на липучке/ на завязках; - с ручками/без ручек;
Простыня	-длина 60-600 см с шагом в 1 см; -ширина 40-600 см с шагом в 1 см;
Простыня с ответствием	-длина 60-310 см с шагом в 1 см; -ширина 40-310 см с шагом в 1 см; -диаметр отверстия 3,0- 60,0 см с шагом в 1 см;
Простыня с ответствием и адгезивным краем	-длина 60-310 см с шагом в 1 см; -ширина 40-310 см с шагом в 1 см; -диаметр отверстия 3,0-30,0 см с шагом в 1 см;

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
Простыня с адгезивным краем	-длина 60-310 см с шагом в 1 см; -ширина 40-310 см с шагом в 1 см;
Простыня системная с карманами	-длина 60-310 см с шагом в 1 см; -ширина 40-310 см с шагом в 1 см;
Простыня с карманом	-длина 60-310 см с шагом в 1 см; -ширина 40-310 см с шагом в 1 см; -с карманом; -с карманом со сливом;
Простыня в рулоне	-длина 60-310 см с шагом в 1 см, перфорация с шагом 1 см; -ширина 40-310 см с шагом в 1 см;
Пеленка медицинская впитывающая	-длина 20-150 см с шагом в 1 см; -ширина 20-150 см с шагом в 1 см;
Подстилка медицинская	-длина 20-90 см с шагом в 1 см; -ширина 20-90 см с шагом в 1 см;
Подстилка медицинская с адгезивным краем	-длина 20-90 см с шагом в 1 см; -ширина 20-90 см с шагом в 1 см;
Чехол медицинский на оборудование	-диаметр 5-600 см с шагом в 1 см; -на резинке / на липучке/ на завязке/на кулиске; -с разрезом/ без разреза; -с отверстием/ без отверстия; -с впитывающей зоной/ без впитывающей зоны; -с карманами: 1-10 шт/ без карманов; -с фиксаторами: 1-20 шт/ без фиксаторов;
Чехол медицинский на мебель	-длина 20-600 см с шагом в 1 см; -ширина 20-600 см с шагом в 1 см; - на резинке / на липучке/на завязке/на кулиске; -с разрезом/ без разреза; -с отверстием/ без отверстия; -с впитывающей зоной/ без впитывающей зоны; -с карманами: 1-10 шт/ без карманов; -с фиксаторами: 1-20 шт/ без фиксаторов;
Чехол медицинский на инструментальный стол	-длина 20-600 см с шагом в 1 см; -ширина 20-600 см с шагом в 1 см; -на резинке / на липучке/ на завязке/на кулиске; -с разрезом/ без разреза; -с отверстием/ без отверстия; -с впитывающей зоной/ без впитывающей зоны; -с карманами: 1-10 шт/ без карманов; -с фиксаторами: 1-20 шт/ без фиксаторов;

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
Чехол медицинский на эндоскопическое оборудование	-длина 20-300 см с шагом в 1 см; -ширина 6-100 см с шагом в 1 см; -с фиксаторами/ без фиксаторов; -с конусом/ без конуса; -с закрытым концом/ с открытым концом; -с перфорацией/без перфорации; -на резинке / на липучке/ на завязке/на кулиске; -с отверстием/ без отверстия;
Чехол медицинский на подлокотник	-длина 5-100 см с шагом в 1 см; -ширина 5-100 см с шагом в 1 см; - на резинке / на липучке/на завязке/ без них;
Чехол медицинский на подголовник	-длина 10-100 см с шагом в 1 см; -ширина 10-100 см с шагом в 1 см; - на резинке / на липучке/на завязке/ без них;
Карман-приемник медицинский для сбора жидкости	-длина 10-160 см с шагом в 1 см; -ширина 10-160 см с шагом в 1 см; -прямоугольной формы/треугольной формы; -с укрепленной зоной/ без нее; -количество карманов: от 1 до 12; -с фиксаторами: 1-12 шт/без них; -с адгезивными слоями: 1-12 шт/ без них; -с встроенными штуцерами: 1-3 шт/без них;
Карман-накопитель медицинский для сбора жидкости	-длина 10-160 см с шагом в 1 см; -ширина 10-160 см с шагом в 1 см; -прямоугольной формы/треугольной формы; -с укрепленной зоной/ без нее; -количество карманов: от 1 до 12; -с фиксаторами: 1-12 шт/без них; -с адгезивными слоями: 1-12 шт/ без них; -с встроенными штуцерами: 1-3 шт/без них;
Карман секционный медицинский	-длина 10-160 см с шагом в 1 см; -ширина 10-160 см с шагом в 1 см; -количество секций: от 1 до 12; -с укрепленной зоной/ без нее; -с фиксаторами: 1-12 шт/без них; -с адгезивными слоями: 1-12 шт/ без них; -на липучках/ на завязках;
Карман медицинский	-длина 5-100 см с шагом в 1 см; -ширина 5-100 см с шагом в 1 см; -прямоугольной формы/треугольной формы; -с укрепленной зоной/ без нее; -количество карманов: от 1 до 12; -с фиксаторами: 1-12 шт/без них; -с адгезивными слоями: 1-12 шт/ без них; -на липучках/ на завязках;
Наматрасник медицинский одноразовый	-длина 40-260 см с шагом в 1 см; -ширина 40-210 см с шагом в 1 см; -на резинке/ на липучке/ на застежке-молнии;
Наволочка медицинская одноразовая	-длина 20-100 см с шагом в 1 см; -ширина 20-100 см с шагом в 1 см; -на липучке/ без липучки; -с клапаном/ без него;

Наименование изделий	Технические характеристики и описание внешнего вида изделий
1	2
Пододеяльник медицинский одноразовый	-длина 100-300 см с шагом в 1 см; -ширина 60-200 см с шагом в 1 см; -на резинке/ на липучке; -с клапаном/ без него;

Прожито, пронумеровано и скреплено
печатью 31 (тридцать один) лист

Генеральный директор
ООО "МедКомплект"

Подпись /И/ / И.О. Ткалич /





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "МедКомплект"
Ткалич И.О.
«3» августа 2023 г.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия

«Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022»

1. Наименование медицинского изделия:

«Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022» (далее – набор или изделие).

2. Производитель:

ООО «МедКомплект», ИНН 7805472016, ОГРН 1089847356543;
198095 г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литер П
Телефон/ факс +7 (812) 326-54-29, e-mail: info@euroday.ru, сайт: www.euroday.ru

3. Назначение:

Набор нестерильных предметов одежды и белья предназначен для использования медицинским персоналом и пациентами во время осмотра пациента или проведения медицинских процедур для поддержания гигиены и предотвращения перекрестного заражения между пациентом и персоналом. Набор предназначен повысить эффективность работы медицинского персонала за счет использования специализированных одноразовых наборов, включающих одежду, белье и необходимые расходные материалы в процессе оказания различных видов медицинской помощи.

Область применения: Изделие предназначено для использования в медицинских организациях.

Показания к применению наборов:

Изделие используют для обеспечения охраны здоровья медицинского персонала и пациентов.

Потенциальный потребитель:

Медицинский персонал и пациенты медицинских организаций.

Противопоказания и/или возможные побочные воздействия.

Противопоказаний не выявлено.

Возможна индивидуальная непереносимость на материалы, из которых изготовлены изделия.

Функциональные (эксплуатационные) характеристики и назначение медицинского изделия:

Набор применяется при осмотре пациента или при проведении медицинских процедур в качестве физического барьера между медицинским персоналом, пациентом и медицинским оборудованием, с целью предотвращения перекрестного заражения, а также предназначен для повышения эффективности работы медицинского персонала за счет использования специализированных одноразовых наборов.

1. Описание и технические характеристики медицинского изделия.

Набор состоит из нескольких одноразовых медицинских изделий, изготовленных из нетканых материалов, закрывающих тело пациента и медицинского персонала (полностью или частично), медицинское оборудование, мебель, и обеспечивающих барьер, который предотвращает прямую передачу инфекционных агентов (микроорганизмов) находящихся в воздухе или в брызгах биологических жидкостей. В состав набора включены предметы одежды, белья и необходимые расходные материалы, используемые во время осмотра пациента и/или проведения медицинских процедур, для сохранения гигиенических условий.

Набор поставляется в нестерильном виде, в потребительской упаковке, готовый к применению.

Набор является одноразовым изделием кратковременного контакта (до 24 часов) с неповрежденной кожей человека. Подлежит замене после каждой процедуры и/или загрязнения.

Повторному использованию, ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.

Класс в зависимости от потенциального риска применения 1 в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. № 4н и по ГОСТ 31508.

Вид изделий в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»: 332470 - набор № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19; 330730 - набор № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

8.2. Комплект поставки.

8.2.1. В комплект поставки продукции входит:

- Изделия, входящие в состав набора согласно таблице №1, – 1 набор;
- Инструкция – 1 шт.

8.2.2. Для наборов, варианты исполнения № 1- 54, (кроме № 11) применяется Порядок использования медицинского изделия Тип 1, указанный в Инструкции.

Для набора, вариант исполнения № 11 «Набор для врача инфекциониста», применяется «Порядок использования медицинского изделия» Тип 2, указанный в Инструкции.

8.2.3. Для идентификации набора используются порядковые номера от 1 до 54.

8.3. Упаковка.

Изделия упаковываются в потребительскую упаковку, в соответствии с комплектацией. Изделия в потребительских упаковках упаковываются в транспортную упаковку - в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

8.4. Срок хранения:

Срок хранения – 5 лет с даты производства, при соблюдении условий хранения.

8.5. Условия эксплуатации.

Условия эксплуатации изделий осуществляется при температуре: от плюс 5°C до плюс 35°C и относительной влажности 25-70%.

9. Указания по применению.

9.1. Проверьте срок хранения, указанный на упаковке, в случае истекшего срока хранения изделие непригодно к применению.

9.2. Не допускается использование изделия при наличии механических повреждений. В случае обнаружения нарушения упаковки изделия необходимо визуально осмотреть изделие или использовать новое.

9.3. Изделие одноразового применения.

ВАЖНО! Не используйте повторно одноразовое изделие.

10. Порядок использования медицинского изделия.

10.1 Тип 1. Порядок использования медицинского изделия.

Применяется для наборов, варианты исполнения №1-10, 12-54:

- Ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Проверьте срок хранения.
- Вскройте упаковку.
- Используйте по прямому назначению.
- Применение изделия не требует владения специальными навыками.

10.2. Тип 2. Порядок использования медицинского изделия.

Применяется для набора, вариант исполнения №11 «Набор для врача инфекциониста».

Порядок выполнения надевания защитной одежды при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ:

- ознакомьтесь с информацией на упаковке, проверьте срок хранения.
- вскройте упаковку, достаньте изделие.
- обработайте руки спиртосодержащим антисептиком.
- наденьте перчатки.

Комбинезон:

- наденьте брюки комбинезона
- наденьте рукава комбинезона (запрещается надевать одновременно оба рукава во избежание разрыва комбинезона);
- наденьте капюшон после надевания маски/респиратора, очков/экрана;
- застегните застежку комбинезона снизу-вверх.

Халат:

- наденьте халат, завяжите завязки на шее сзади, завяжите пояс на талии;

Куртка и брюки:

- наденьте брюки, завяжите пояс на талии (при наличии);
- наденьте куртку, застегните куртку снизу-вверх, завяжите завязки на шее и завяжите пояс на талии (при наличии);

Бахилы:

- наденьте бахилы, заправив под них брюки, завяжите завязки бахил (при наличии);

Маска, очки, головной убор:

- наденьте маску/респиратор;
- наденьте очки/экран;
- наденьте головной убор (капюшон у комбинезона);
- наденьте вторую пар перчаток, заправьте под них рукава комбинезона/халата/куртки;
- убедитесь в том, что элементы защитной одежды надеты правильно, и непокрытые кожные покровы исключены.

После окончания работы защитную одежду снимают в специально выделенном помещении в обратном порядке:

- снимите верхние перчатки, выворачивая наизнанку;
- снимите бахилы, развязав завязки (при наличии);
- обработайте руки в перчатках в контейнере с дезинфицирующим раствором;
- снимите комбинезон/халат/куртку/брюки и т.п. так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая внутри;
- обработайте руки в перчатках в контейнере с дезинфицирующим раствором;
- снимите очки/экран, не касаясь внутренней стороны;
- снимите маску/респиратор, не касаясь внутренней стороны;
- снимите вторые перчатки, выворачивая наизнанку;
- погружайте использованную одежду в контейнер для отходов класса Б с дезинфицирующим раствором в процессе снятия последовательно, после снятия каждого элемента защитной одежды;
- примите душ и наденьте чистую одежду.

11. Транспортирование и хранение.

11.1. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

11.2. Изделие в транспортной упаковке должно выдерживать воздействие температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, но с ограничением значений температуры хранения от плюс 40 °С до минус 40 °С и при относительной влажности 25-70%.

11.3. При транспортировке коробки с Изделием требуют надёжного закрепления.

11.4. Не допускается падение коробки с Изделием с высоты более 0,5 м.

11.5. Не допускается переворачивание транспортируемых коробок с Изделием в процессе транспортировки.

11.6. При транспортировке коробки с Изделием допускается устанавливать друг на друга не более чем в 5 ярусов.

11.7. Условия хранения Изделия в части воздействия климатических факторов 1 по ГОСТ 15150, но с ограничением значений температуры хранения от +5 °С до +35 °С и при относительной влажности 25-70%

11.8. Изделие хранят в потребительской упаковке в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, вдали от очагов открытого пламени, обогревательных элементов различных типов устройства. Запрещено хранение Изделия во вскрытой упаковке.

12. Сведения об утилизации.

Утилизация изделий должна проводиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса Б.

Изделия, не использованные по назначению с истекшим сроком хранения, утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса А.

13. Инструкция по монтажу, наладке, настройке, калибровке и прочим операциям, необходимым для ввода медицинского изделия в эксплуатацию и для его правильной эксплуатации (применения).

Изделие не является средством измерения, предметом медицинской техники и не требует монтажа, наладки, настройки, калибровки и прочих операций, необходимых для ввода медицинского изделия в эксплуатацию и для его правильной эксплуатации (применения).

14. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует сохранение Изделий в течение 5 лет при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

15. Информация об обстоятельствах, при которых пользователь должен проконсультироваться с медицинским специалистом.

При появлении симптомов аллергической реакции: кожного зуда, покраснения, отека, сыпи – прекратить контакт с аллергеном. При ухудшении общего состояния обратиться к врачу.

16. Контактная информация. По вопросам качества и безопасности медицинского изделия «Набор одежды и белья из нетканых материалов и медицинских изделий одноразовый нестерильный по ТУ 14.12.30-010-87401986-2022» обращаться по адресу:

198095, г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литер П.

Телефон факс +7 (812) 326-54-29, e-mail: info@euroday.ru, сайт: www.euroday.ru

17. Актуальность информации: Август 2023 года.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 3 (три) листа

Генеральный директор

ООО "МедКомплект"

Подпись  / И.О. Ткалич /

