

Общество с ограниченной ответственностью

«РАДИАН»

117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.3, корп.1
(499) 613-94-08

Памятка

по пользованию салфетками для стимуляции дыхания «РАДИАН»

Салфетки для стимуляции дыхания «РАДИАН» (далее салфетки) предназначена для возбуждения дыхательного центра и выведения больных из синкопального (обморочного) состояния ингаляционно.

Салфетки представляют собой основу из нетканого полотна, пропитанную раствором аммиака, упакованную в герметичную индивидуальную упаковку. Выпускаются двух размеров: большого и малого.

Достаньте салфетку из упаковки, поднесите к лицевой части человека. Стимуляция дыхания осуществляется путем кратковременного контакта с неповрежденной кожей лица. При этом пары аммиака попадают в дыхательные пути пациента, возбуждая дыхательный центр, в результате чего происходит улучшение снабжения кислородом мозга, и больной выводится из обморочного состояния.

Средний срок годности салфеток - 3 года в ненарушенной упаковке.

Хранить при комнатной температуре, не подвергать воздействию солнечных лучей и нагревательных приборов. Возможно кратковременное замораживание, при размораживании восстанавливает свои свойства.

Генеральный директор ООО «РАДИАН»:

Анчугин Д.Г. Анчугин Д.Г.

