

Руководитель ИЛ
ООО «ПолимерТест» СПб

Тихомирова Т.И.
2010 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БЕЛЛА Восток»

Славомир Кшизиньски
«___» _____ 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Комплект медицинских изделий для применения в перевязочных кабинетах в наборах и отдельных упаковках Matoset стерильные под товарным знаком matorat с принадлежностями:

1) марля перевязочная MATOCOMP/ салфетки: марлевые, из нетканого материала MATOVLIES, нейрохирургические NEUROCOMPRESS; 2) марлевые операционные салфетки/ марлевые операционные салфетки ABDOMA; 3) марлевые тупферы, сетоны, живота / тупферы из нетканого материала; 4) салфетки, простыни, чехлы, мешки, карманы, чехлы на провода - из нетканого материала / хирургическая пленка / салфетки из нетканого материала с хирургической пленкой / целлюлозные полотенца; 5) перчатки смотровые Ambulex/перчатки хирургические Surgilex; 6) повязки / бинты эластичные и бинты вискозные; 7) повязки / бинты фиксирующие; 8) бинты хлопковые тканые / бинты хлопковые тканые Matopat standard; 9) пластыри и медицинские ленты/пластыри Steri -Strip; 10) повязки плёночные на рану.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Наборы Matoset используются на операционных блоках, в процедурных кабинетах, амбулаториях и станциях диализа. Применяются при таких процедурах как центральный вкол, проводниковая анестезия, катетеризация, смена повязки, удаление швов, диализ. Каждый из наборов предназначен для комплексного проведения определенной процедуры.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Набор Matoset упаковывается в стерилизационный пакет, или, по желанию клиента, имеет двойную упаковку, например, может быть дополнительно упакован в салфетку, имеющую барьерные свойства, благодаря которой обеспечивается стерильная поверхность для раскладки изделий, находящихся в наборе. У всех наборов этикетка типа TAG, которая облегчает архивирование информации, касающейся применяемого во время процедуры медицинского изделия. Данная этикетка состоит из основной части, на которой указывается подробное описание содержимого в наборе, а также из двух самоклеящихся элементов. Самоклеящиеся элементы

предназначены для размещения их в документации операционной процедуры. На наклейках указывается код изделия, номер партии товара, срок годности и идентификация производителя.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Запрещается использовать изделие, если:

- истёк допускаемый срок хранения изделия, указанный на упаковке,
- нарушена целостность упаковки,
- упаковка находится во влажном состоянии (подмочена).

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:

- вымыть руки перед использованием изделия;
- открыть общую упаковку с изделиями;
- достать изделие из упаковки.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:

- после извлечения изделия из упаковки, использовать по назначению

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Хранение изделий – в закрытых сухих помещениях, защищённых от атмосферных осадков и почвенной влаги,
- При отсутствии нарушений упаковку вскрывают и содержащиеся в ней изделия используют по назначению.