

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЭсДжиМедикал»



Т.Ю. Иванова
2022 г.

Комплект белья постельного медицинского многоразового
в вариантах исполнения

Инструкция по применению

1. Наименование медицинского изделия

«Комплект белья постельного медицинского многоразового в вариантах исполнения» (далее – комплект).

Нормативный документ: ТУ 14.12.30.190-014-09922741-2021.

Комплект выпускается в вариантах исполнения.

Состав вариантов исполнения комплекта приведен в Приложении А.

2. Разработчик и производитель медицинского изделия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСДЖИМЕДИКАЛ" (ООО «ЭсДжиМедикал»),

Адрес: 127015, город Москва, Вятская улица, дом 70, эт 5 пом I ком 27.

Тел: +7 495 120-10-67

e-mail: info@sgmedical.ru

место производства: ООО «ЭсДжиМедикал», 153921, г. Иваново, Проезд красных зорь, д.1 а

3. Назначение медицинского изделия, установленное производителем

Комплект предназначен для обеспечения покрытия/защиты кровати и спальных принадлежностей.

Область применения – применение в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, в домашних условиях.

Потенциальные потребители – медицинский персонал и/или лица, не имеющие медицинского образования.

Комплект изготавливается из тканого материала, одного размера, одного цвета, поставляется в нестерильном виде и предназначен для многоразового применения.

4. Перечень показаний к применению медицинского изделия, противопоказаний к применению, возможных побочных действий:

4.1. Показания к применению:

соблюдение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях при длительном или кратковременном сидении, лежании, проведении терапевтических процедур.

4.2. Противопоказания:

- механические повреждения;
- индивидуальная непереносимость (аллергическая реакция) на материал комплекта.

4.3. Возможные побочные воздействия: индивидуальная непереносимость (аллергическая реакция) на материал комплекта.

5. Описание, параметры и характеристики медицинского изделия:

5.1. Описание

5.1.1. Комплект представляет собой покрывной материал для обеспечения покрытия/защиты кровати и спальных принадлежностей.

5.1.2. Комплект из хлопчатобумажных материалов устойчив к дезинфекционной обработке и стирке по МУ 3.5.736.

5.1.3. Комплект из синтетических материалов с пленочным покрытием устойчив к дезинфекционной обработке по МУ-287-113, допускать стирку с применением бытовых моющих средств.

5.1.4. Комплект обладает устойчивостью к воздействию агрессивной биологической жидкости (пота, мочи) в соответствии с МУ 25.1-001.

5.2. Основные параметры и характеристики

5.2.1. Размерный ряд и техническое описание составного элемента, входящего в варианты исполнения комплекта в соответствии с указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Техническое описание	Размерный ряд (длина-ширина), см
Пододеяльник медицинский многоцветный Модель А1 Модель А2 Модель А3	В форме прямоугольника; закрытый, без выреза на внешней стороне изделия, с входом 3-х видов: с переходом 25 см нижнего полотна на внешнюю сторону пододеяльника для образования клапана (модель А1); с вырезом для входа по длинной стороне (модель А2); с вырезом для входа по короткой стороне (модель А3);	125x120, 147x112, 147x125, 178x122, 215x143, 215x153, 215x163, 215x175
Простыня медицинская многоцветная Модель В1 Модель В2	В форме прямоугольника с двумя подшитыми краями (модель В1) или в форме прямоугольника, края которого обработаны по всему периметру швом в подгибку с применением эластичной тесьмы (модель В2)	117x100, 138x100, 159x100, 180x100, 203x120, 214x120, 214x130, 214x145-150, 214x150-180, 230x150-165.
Простыня медицинская многоцветная, водонепроницаемая Модель В3 Модель В4	В форме прямоугольника с двумя подшитыми краями (В3) или в форме прямоугольника, края которого обработаны по всему периметру швом в подгибку с применением эластичной тесьмы (В4)	117x100, 138x100, 159x100, 180x100, 203x120, 214x120, 214x130, 214x145-150, 214x150-180, 230x150-165.
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоцветная, водонепроницаемая Модель С4 Модель С5	В форме квадрата или прямоугольника, с тремя стачанными краями и одним открытым краем (вход), с клапаном 25 см (Модель С4), либо с застежкой-молнией, вшитой в открытый торцевой край (Модель С5)	38x38, 58x58, 68x68, 73x73, 78x78, 38x58, 58x68
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоцветная, водонепроницаемая Модель С5-1	В форме квадрата или прямоугольника, с тремя сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), с застежкой-	38x38, 58x58, 68x68, 73x73, 78x78, 38x58, 58x68

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Техническое описание	Размерный ряд (длина-ширина), см
	молнией, вшитой в открытый торцевой край	
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая Модель D1	В форме прямоугольника с тремя стачанными краями и одним открытым краем (вход), с застёжкой-молнией, вшитой в длинный и (или) короткий торцевой край, либо по всему периметру наматрачника	113x70, 135x76, 156x76, 178x81, 208x82, 208x92, 208x103, 208x123, 208x134
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2	В форме прямоугольника с тремя стачанными краями и одним открытым краем (вход), с застёжкой-молнией, вшитой в длинный и (или) короткий торцевой край, либо по всему периметру наматрачника	113x70, 135x76, 156x76, 178x81, 208x82, 208x92, 208x103, 208x123, 208x134
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6	В форме прямоугольника с тремя стачными краями и одним открытым краем (вход), с застёжкой-молнией, вшитой в длинный и (или) короткий торцевой край, либо по всему периметру наматрачника	113x70, 135x76, 156x76, 178x81, 208x82, 208x92, 208x103, 208x123, 208x134

5.2.2. Поверхностная плотность материала, из которого изготовлены составные элементы, входящие в состав комплекта в соответствии с указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Поверхностная плотность, г/м ² , не менее
Пододеяльник медицинский многоразовый Модель A1 Модель A2 Модель A3	110

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Поверхностная плотность, г/м ² , не менее
Простыня медицинская многоразовая Модель В1 Модель В2	110
Простыня медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель В3 Модель В4	95
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С4 Модель С5	95
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С5-1	125
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая Модель D1	125
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2	95
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6	95

5.2.3. Воздухопроницаемость материала, из которого изготовлены составные элементы, входящие в состав комплекта в соответствии с указанным в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² , не менее кроме указанных
Пододеяльник медицинский многоразовый Модель А1 Модель А2 Модель А3	100
Простыня медицинская многоразовая Модель В1 Модель В2	100

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2$, не менее кроме указанных
Простыня медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель В3 Модель В4	<5
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С4 Модель С5	<5
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С5-1	<5
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая Модель D1	100
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2	<5
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6	<5

5.2.4. Гигроскопичность материала, из которого изготовлены составные элементы, входящие в состав комплекта, при относительной влажности 98% в соответствии с указанным в таблице 5.

Таблица 5

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Гигроскопичность, %, не менее кроме указанных
Пододеяльник медицинский многоразовый Модель А1 Модель А2 Модель А3	12,0
Простыня медицинская многоразовая Модель В1 Модель В2	12,0

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Гигроскопичность, %, не менее кроме указанных
Простыня медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель В3 Модель В4	<1
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С4 Модель С5	<1
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С5-1	<1
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая Модель D1	12,0
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2	<1
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6	<1

5.2.5. Удельное поверхностное электрическое сопротивление материала, из которого изготовлены составные элементы, входящие в состав комплекта не более 10^{12} Ом.

5.2.6. Технические характеристики материала, из которого изготовлены составные элементы, входящие в состав комплекта в соответствии с указанным в таблице 6.

Таблица 6

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Водонепроницаемость, мм вод. ст., не менее	Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50x200 мм, Н (кгс), не менее	
		по основе	по утку
Пододеяльник медицинский многоразовый Модель А1 Модель А2 Модель А3	—	216 (22)	177 (18)

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Водонепроницаемость, мм вод. ст., не менее	Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50x200 мм, Н (кгс), не менее	
		по основе	по утку
Простыня медицинская многоразовая Модель В1 Модель В2	—	216 (22)	177 (18)
Простыня медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель В3 Модель В4	1000	390 (29,7)	240 (18,3)
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С4 Модель С5	1000	390 (29,7)	240 (18,3)
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С5-1	1000	390 (29,7)	240 (18,3)
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая Модель D1	—	216 (22)	177 (18)
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2	1000	390 (29,7)	240 (18,3)
Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6	1000	441 (45)	324 (33)

5.2.7. Пиллингуемость хлопчатобумажных тканей, из которого изготовлен комплект не более 3 пиллей на 10 см.

5.2.8. Изменение линейных размеров после мокрой обработки не превышает минус 5,0%.

5.2.9. Стойкость к истиранию материала, из которого изготовлен комплект не менее 600 циклов.

5.2.10. Сведения о материалах:

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Наименование ткани. Цвет	Состав ткани
Пододеяльник медицинский многоцветный Модель А1 Модель А2 Модель А3	Хлопчатобумажная ткань 2-го сорта (ГОСТ 29298) отбеленная, гладкокрашеная в цветовом исполнении (бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), набивная	1.Хлопок 100%
Простыня медицинская многоцветная Модель В1 Модель В2	Хлопчатобумажная ткань 2-го сорта (ГОСТ 29298) отбеленная, гладкокрашеная в цветовом исполнении (бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), набивная	Хлопок 100%
Простыня медицинская многоцветная, водонепроницаемая Модель В3 Модель В4	Двухслойная водонепроницаемая синтетическая ткань полотняного переплетения с полиуретановой мембраной марки WK, в цветовом исполнении (бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая) с полиуретановой мембраной, в цветовом исполнении белая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая	97% - полиэфир, 3% - полиуретан (мембранный слой)
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоцветная, антибактериальная Модель С3	Ткань хлопчатобумажная защитная «Капсула» по ТУ 13.20.20-007-50391496-2020 в цветовом исполнении (бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), набивная	Ткань хлопчатобумажная защитная «Капсула»

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Наименование ткани. Цвет	Состав ткани
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С4 Модель С5	Двухслойная водонепроницаемая синтетическая ткань плотняного переплетения с полиуретановой мембраной марки WK, в цветовом исполнении (бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая) с полиуретановой мембраной, в цветовом исполнении (белая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая)	97% - полиэфир, 3% - полиуретан (мембранный слой)
Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С5-1	Двухслойная водонепроницаемая трикотажная синтетическая ткань с полиуретановой мембраной в цветовом исполнении (белая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая)	43% - полиуретан, 57% - трикотажный полиэфир
Наволочка (наматрачник) многоразовая Модель D1	Хлопчатобумажная ткань 2-го сорта (ГОСТ 29298), отбеленная, гладкокрашеная, в цветовом исполнении (бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая).	Хлопок 100%
Наволочка (наматрачник) многоразовая, водонепроницаемая Модель D2	Двухслойная водонепроницаемая синтетическая ткань плотняного переплетения с полиуретановой мембраной марки WK, в цветовом исполнении (бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая)	97% - полиэфир, 3% - полиуретан (мембранный слой)
Наволочка (наматрачник) многоразовая, водонепроницаемая,	Двухслойная водонепроницаемая трикотажная синтетическая ткань с полиуретановой мембраной в цветовом	43% - полиуретан, 57% - трикотажный полиэфир

Наименование/тип-условное обозначение составного элемента	Наименование ткани. Цвет	Состав ткани
с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6	исполнении (белая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая)	

6. Указания по применению

- 6.1. Перед эксплуатацией проверьте наличие составных элементов, входящие в состав комплекта, размер.
- 6.2. Извлеките комплект из упаковки.
- 6.3. Проверьте чтобы комплект был без внешних дефектов.
- 6.4. Перед первым применением предварительная стирка обязательна.
- 6.5. Укройте кровать и спальные принадлежности используя составные элементы комплекта.

7. Условия эксплуатации

Комплект применяется в следующих климатических условиях:

- Температура: от +40 °С до -25 °С;
- Номинальная относительная влажность воздуха от 70% до 100%.

8. Методы и условия стерилизации и дезинфекции

- 8.1. Комплект предназначен для многократного применения.
- 8.2. Комплект подлежит дезинфекции в соответствии с правилами и нормами, действующими в медицинском учреждении с учетом МУ 3.5.736-99, МУ-287-113-98, МУ 25.1-001-86 и указаний на вшивном ярлыке и этикетке.
- 8.3. Дезинфицирующие хлорсодержащие средства используются из расчета 1 г активного хлора на 1 кг белья, дезсредства на основе перекиси водорода - 4 мл 30 %-ной перекиси водорода на 1 кг белья.
- 8.4. Дезинфекцию комплекта с использованием химических средств проводят способом погружения в раствор в специальных емкостях из стекла, пластмасс или покрытых эмалью без повреждений.
- 8.5. Для дезинфекции комплекта, не соприкасающихся непосредственно с пациентом, может быть использован способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (способом протирания не рекомендуется применять средства, содержащие альдегиды).
- 8.6. Дезинфекция инфицированных и сильно загрязненных комплектов из отбеленной 100% хлопчатобумажной ткани 2-го сорта (ГОСТ 29298) осуществляется в проходных стиральных машинах при температуре до 95°C (программа № 10), обычный режим (); барабанная сушка возможна при максимальной температуре на выходе 80°C (); разрешено отбеливание любым окисляющим агентом (); разрешено гладить, температура нижней плиты утюга должна быть не более 200 °С ().
- 8.7. Стирка неинфицированных изделий из 100% хлопчатобумажной ткани 2-го сорта (ГОСТ 29298) бельевой для белья нательного и постельного гладкокрашенной и набивной может осуществляться в обычных стиральных машинах при температуре от 40°C (белье х/б

цветное прорама № 07), обычный режим (); барабанная сушка возможна при максимальной температуре на выходе 60°C (); отбеливание запрещено (); разрешено гладить, температура нижней плиты утюга должна быть не более 150 °C (); сухая химическая чистка запрещена ().

8.8. Изделия из синтетических тканей с пленочным покрытием и изделия из синтетического трикотажа с полиуретановой мембраной должны быть устойчивы к дезинфекционной обработке по МУ-287-113, допускать стирку с применением бытовых моющих средств по МУ 3.5.736-99.

8.9. Изделия из синтетических водонепроницаемых тканей с полиуретановой мембраной - подлежат стирке при максимальной температуре 95°C, обычный режим (); барабанная сушка возможна при максимальной температуре на выходе 60°C ();

отбеливание запрещено (); изделия не должны подвергаться глажению ();

сухая химическая чистка запрещена (); нельзя выкручивать изделие при отжиме ().

9. Сведения о техническом обслуживании, текущий ремонт

Допускается мелкий ремонт (штопка).

10. Комплектность

- Комплект одного варианта исполнения, одного цвета (в соответствии с приложением А) в потребительской упаковке – 1 шт.;
- Этикетка (вложенная в потребительскую упаковку или наклеенная на потребительскую упаковку) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт. на транспортную тару.

11. Упаковка

11.1. Потребительская упаковка представляет собой полиэтиленовый пакет.

11.2. Для транспортирования потребительские упаковки укладываются в коробку из гофрированного картона или пакет из плотного полиэтилена.

12. Транспортирование

Транспортировать комплект следует в транспортной упаковке транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Транспортируются комплекты в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от минус 50 до плюс 50 °C;
- относительная влажность воздуха: 98% при 35 °C.

13. Хранение

Хранение комплекта осуществляется в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от минус 50 до плюс 50 °C;
- относительная влажность воздуха: 98% при 35 °C.

В процессе хранения комплект в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

14. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие комплекта заявленным в документации показателям качества и характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Производитель не несет ответственности за комплект с механическими повреждениями, полученными при транспортировании или в результате неправильной эксплуатации. Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты производства.

15. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

15.1. Утилизация комплекта осуществляется на общих основаниях и в соответствии с требованиями согласно СанПиН 2.1.3684-21.

15.2. Использованный комплект должен быть утилизирован как медицинские отходы класса «Б» в соответствии с классификацией по СанПиН 2.1.3684-21.

15.3. Не использованный комплект со следами повреждений или с истекшим сроком годности должен быть утилизирован в потребительской упаковке как медицинские отходы класса «А» в соответствии с классификацией по СанПиН 2.1.3684-21.

16. Контактная информация

В случае возникновения вопросов, связанных с применением комплекта, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:

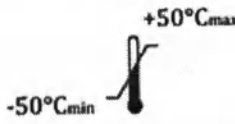
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСДЖИМЕДИКАЛ" (ООО «ЭсДжиМедикал»),

Адрес: 127015, город Москва, Вятская улица, дом 70, эт 5 пом I ком 27.

Тел: +7 495 120-10-67

e-mail: info@sgmedical.ru

17. Расшифровка используемых символов на потребительской упаковке:

Символ	Обозначение
	«не стерильно»
	«беречь от влаги»
	«температурный диапазон»

	максимальная температура стирки 95°C, обычный режим
	максимальная температура стирки 40°C, обычный режим
	барабанная сушка возможна, температура 60 градусов
	барабанная сушка возможна, температура 80 градусов
	разрешено отбеливание любым окисляющим агентом
	температура нижней плиты утюга должна быть не более 200 °C
	температура нижней плиты утюга должна быть не более 150 °C
	не отбеливать
	изделие не должно подвергаться глажению
	сухая химическая чистка запрещена

	нельзя выкручивать изделие при отжиме
---	--

18. Перечень применяемых национальных стандартов

Отсутствуют национальные стандарты на территории РФ предъявляющие требования к комплектam для проверки правильности установки (монтажа) медицинского изделия и его готовности к безопасной работе/эксплуатации.

Приложение А

Варианты исполнения комплектов

Комплект №1:

1. Пододеяльник медицинский многоцветный – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель А1/ Модель А2/ Модель А3, размер: 125х120/ 147х112/ 147х125/ 178х122/ 215х143/ 215х153/ 215х163/ 215х175, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/набивная;
2. Простыня медицинская многоцветная, водонепроницаемая – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель В4, размер: 117х100/ 138х100/ 159х100/ 180х100/ 203х120/ 214х120/ 214х130/ 214х145-150/ 214х150-180/ 230х150-165 цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая;
3. Наволочка – от 1 шт. до 2 шт. в вариантах исполнения:
 - 3.1. Наволочка нижняя для подушек медицинская многоцветная, водонепроницаемая – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель С4/ Модель С5/ Модель С5-1, размер: 38х38/ 58х58/ 68х68/ 73х73/ 78х78, 38х58, 48х68, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – от 0 до 2 шт. (при необходимости);
 - 3.2. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоцветная Модель D1, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/белая в полоску – 1 шт. (при необходимости);
 - 3.3. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоцветная, водонепроницаемая Модель D2, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости);
 - 3.4. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоцветная, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости).

Комплект № 2:

1. Пододеяльник медицинский многоцветный – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель А1/ Модель А2/ Модель А3, размер: 125х120/ 147х112/ 147х125/ 178х122/ 215х143/ 215х153/ 215х163/ 215х175, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/набивная;
2. Простыня медицинская многоцветная – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель В1/ Модель В2, размер: 117х100/ 138х100/ 159х100/ 180х100/ 203х120/ 214х120/ 214х130/

214x145-150/ 214x150-180/ 230x150-165, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая /набивная;

3. Наволочка – от 1 шт. до 2 шт. в вариантах исполнения:

3.1. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель D1, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/белая в полоску;

3.2. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости);

3.3. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопрележневого матраца Модель D6, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости).

Комплект № 3:

1. Пододеяльник медицинский многоразовый – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель A1/ Модель A2/ Модель A3, размер: 125x120/ 147x112/ 147x125/ 178x122/ 215x143/ 215x153/ 215x163/ 215x175, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/набивная;

2. Простыня медицинская многоразовая – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель B1/ Модель B2, размер: 117x100/ 138x100/ 159x100/ 180x100/ 203x120/ 214x120/ 214x130/ 214x145-150/ 214x150-180/ 230x150-165, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая /набивная;

3. Наволочки – от 1 шт. до 2 шт. в вариантах исполнения:

3.1. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель D2, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая

3.2. Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель C4/ Модель C5/ Модель C5-1, размер: 38x38/ 58x58/ 68x68/ 73x73/ 78x78, 38x58, 48x68, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – от 0 до 2 шт. (при необходимости);

3.3. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая Модель D1, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/белая в полосу – 1 шт. (при необходимости);

3.4. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости).

Комплект №4:

1. Пододеяльник медицинский многоразовый – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель A1/ Модель A2/ Модель A3, размер: 125x120/ 147x112/ 147x125/ 178x122/ 215x143/ 215x153/ 215x163/ 215x175, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/набивная;

2. Простыня медицинская многоразовая – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель B1/ Модель B2, размер: 117x100/ 138x100/ 159x100/ 180x100/ 203x120/ 214x120/ 214x130/ 214x145-150/ 214x150-180/ 230x150-165, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая /набивная;

3. Наволочка – от 1 шт. до 2 шт. в вариантах исполнения:

3.1. Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель C4/ Модель C5/ Модель C5-1, размер: 38x38/ 58x58/ 68x68/ 73x73/ 78x78, 38x58, 48x68, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – от 0 до 2 шт. (при необходимости);

3.2. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая Модель D1, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/белая в полосу – 1 шт. (при необходимости);

3.3. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости);

3.4. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/

208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости).

Комплект №5:

1. Пододеяльник медицинский многоцветный – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель А1/ Модель А2/ Модель А3, размер: 125x120/ 147x112/ 147x125/ 178x122/ 215x143/ 215x153/ 215x163/ 215x175, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая /набивная;
2. Простыня медицинская многоцветная – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель В1/ Модель В2, размер: 117x100/ 138x100/ 159x100/ 180x100/ 203x120/ 214x120/ 214x130/ 214x145-150/ 214x150-180/ 230x150-165, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая /набивная;
3. Наволочка – от 1 шт. до 2 шт. в вариантах исполнения:
 - 3.1. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоцветная Модель D1, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/белая в полоску – 1 шт.;
 - 3.2. Наволочка нижняя для подушек медицинская многоцветная, водонепроницаемая Модель С4/ Модель С5/ Модель С5-1, размер: 38x38/ 58x58/ 68x68/ 73x73/ 78x78, 38x58, 48x68, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – от 0 до 2 шт. (при необходимости);
 - 3.3. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоцветная, водонепроницаемая Модель D2, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости);
 - 3.4. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоцветная, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости).

Комплект №6:

1. Простыня медицинская многоцветная – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель В1, размер: 117x100/ 138x100/ 159x100/ 180x100/ 203x120/ 214x120/ 214x130/ 214x145-150/ 214x150-180/ 230x150-165, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая /набивная;

2. Пододеяльник медицинский многоцветный – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель А1/ Модель А2/ Модель А3, размер: 125х120/ 147х112/ 147х125/ 178х122/ 215х143/ 215х153/ 215х163/ 215х175, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/ набивная;

3. Наволочка - от 1 шт. до 2 шт. в вариантах исполнения:

3.1. Наволочка нижняя для подушек медицинская многоцветная, водонепроницаемая Модель С4/ Модель С5/ Модель С5-1, размер: 38х38/ 58х58/ 68х68/ 73х73/ 78х78, 38х58, 48х68, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – от 0 до 2 шт. (при необходимости);

3.2. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоцветная Модель D1, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/ белая в полоску – 1 шт. (при необходимости);

3.3. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоцветная, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости).

Комплект № 7:

1. Пододеяльник медицинский многоцветный – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель А1/ Модель А2/ Модель А3, размер: 125х120/ 147х112/ 147х125/ 178х122/ 215х143/ 215х153/ 215х163/ 215х175, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/ набивная;

2. Простыня медицинская многоцветная – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель В2, размер: 117х100/ 138х100/ 159х100/ 180х100/ 203х120/ 214х120/ 214х130/ 214х145-150/ 214х150-180/ 230х150-165, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/ набивная – 1 шт.;

3. Наволочка – от 1 шт. до 2 шт. в вариантах исполнения:

3.1. Наволочка нижняя для подушек медицинская многоцветная, водонепроницаемая Модель С4/ Модель С5/ Модель С5-1, размер: 38х38/ 58х58/ 68х68/ 73х73/ 78х78, 38х58, 48х58, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – от 0 до 2 шт. (при необходимости);

3.2. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоцветная Модель D1, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет:

белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/ белая в полосу – 1 шт. (при необходимости);

3.3. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости);

3.4. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости).

Комплект №8:

1. Пододеяльник медицинский многоразовый – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель A1/ Модель A2/ Модель A3, размер: 125x120/ 147x112/ 147x125/ 178x122/ 215x143/ 215x153/ 215x163/ 215x175, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/ набивная;

2. Простыня медицинская многоразовая, водонепроницаемая – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель B3, размер: 117x100/ 138x100/ 159x100/ 180x100/ 203x120/ 214x120/ 214x130/ 214x145-150/ 214x150-180/ 230x150-165, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая;

3. Наволочка – от 1 шт. до 2 шт. в вариантах исполнения:

3.1. Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель C4/ Модель C5/ Модель C5-1, размер: 38x38/ 58x58/ 68x68/ 73x73/ 78x78, 38x58, 48x58, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – от 0 до 2 шт. (при необходимости);

3.2. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая Модель D1, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/ белая в полосу – 1 шт. (при необходимости);

3.3. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2, размер: 113x70/ 135x76/ 156x76/ 178x81/ 208x82/ 208x92/ 208x103/ 208x123/ 208x134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости);

3.4. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического

противопролежневого матраца Модель D6, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости).

Комплект №9:

1. Простыня медицинская многоразовая – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель В1, размер: 117х100/ 138х100/ 159х100/ 180х100/ 203х120/ 214х120/ 214х130/ 214х145-150/ 214х150-180/ 230х150-165, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая /набивная;
2. Пододеяльник медицинский многоразовый – 1 шт. в вариантах исполнения: Модель А1/ Модель А2/ Модель А3, размер: 125х120/ 147х112/ 147х125/ 178х122/ 215х143/ 215х153/ 215х163/ 215х175, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/ набивная;
3. Наволочка – от 1 шт. до 2 шт. в вариантах исполнения:
 - 3.1. Наволочка нижняя для подушек медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель С4/ Модель С5/ Модель С5-1, размер: 38х38/ 58х58/ 68х68/ 73х73/ 78х78, 38х58, 48х68, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – от 0 до 2 шт. (при необходимости);
 - 3.2. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая Модель D1, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая/ белая в полоску – 1 шт. (при необходимости);
 - 3.3. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая Модель D2, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости);
 - 3.4. Наволочка тюфячная (наматрачник) медицинская многоразовая, водонепроницаемая, с дополнительным отделением для пневматического противопролежневого матраца Модель D6, размер: 113х70/ 135х76/ 156х76/ 178х81/ 208х82/ 208х92/ 208х103/ 208х123/ 208х134, цвет: белая/ бордовая/ оранжевая/ желтая/ голубая/ синяя/ фиолетовая/ зеленая – 1 шт. (при необходимости).

Прошито, пронумеровано

количество листов 22

ООО «ЭсДжиМедикал»

Генеральный директор Иванова Татьяна Юрьевна



Подпись

ФИО

Иванова Т.Ю.