

Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA общий АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»




Полынцев Д.Г.

Вариант исполнения 1

Кат. № 1140201

На коробку:

виннэииди олончлнннссифордн влт
оиннвнссосчлнлннн к оводн

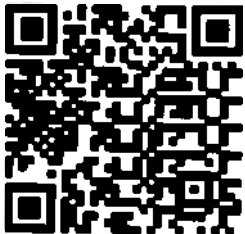

Контроли MagnoLIA АФП
Набор реагентов для контроля
качества анализа
«Контроли MagnoLIA АФП»,
по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	1 фл.
Контроль 2	1 фл.

LOT E003 2022-07-27 2023-07-27

REF 1140201

IVD

ТУ 21.20.23-626-98539446-2022
RU NXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
АФП
Контроль 1
объем 1 мл
+2⁸
-2⁴ °C
ООО «Компания Алкор Био»



Контроли
MagnoLIA
АФП
Контроль 2
объем 1 мл
+2⁸
-2⁴ °C
ООО «Компания Алкор Био»



Вариант исполнения 2

Кат. № 1140205

На коробку:



Контроли MagnoLIA АФП

Состав набора:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.

ТУ 21.20.23-626-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXX

Контроли MagnoLIA АФП
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

LOT E003	 2022-07-27	 +2...+8 °C	
REF 1140205	 2023-07-27		
IVD	 100		

Готово к использованию
Для профессионального применения



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6787779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

REF 1140205
LOT E003
2023-07-27
+2...+8 °C

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
АФП
Контроль 1
объем 1 мл

ООО «Компания Алкор Био»



-5шт.

Контроли
MagnoLIA
АФП
Контроль 2
объем 1 мл

ООО «Компания Алкор Био»



-5шт.

Вариант исполнения 3

Кат. № 1140210

На коробку:

Контроли MagnoLIA АФП

LOT E003
1140210

REF 1140210

2023-07-27

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6787779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



Контроли MagnoLIA АФП
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E003

REF 1140210

IVD

2022-07-27

2023-07-27

Σ 200

+2⁺8
°C

i

!



ТУ 21.20.23-626-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
АФП

Контроль 1
объем 1 мл

+2⁺8
°C

ООО «Компания Алкор Био»



-10 шт.

Контроли
MagnoLIA
АФП

Контроль 2
объем 1 мл

+2⁺8
°C

ООО «Компания Алкор Био»



-10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) лист а

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA общий АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022», производства ООО «Компания Алкор Био»

Вариант исполнения 1

стр. 2,3,4

Вариант исполнения 2

стр. 5,6,7

Вариант исполнения 3

стр. 8,9,10

Контроли 1, 2

стр. 11,12

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Кат. № 1140201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA общий АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Кат. № 1140201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

															Соответст-		
LOT E003			2022-07-27			-20°C			Biohazard								
REF 1140201			2023-07-27			1											
IVD			Σ ₂₀			!											
ТУ 21 20 23-626-98539446-2022 РУ №XXXXXXXXXXXXXX																	
ООО «Компания Алкор Био», 192148, Россия, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит А тел./факс: +7(812)6778779; 6772162 info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru																	

Контроли
MagnoLIA
АФП
Контроль 2
Объем 1 мл
-20°C
Biohazard
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли
MagnoLIA
АФП
Контроль 1
Объем 1 мл
-20°C
Biohazard
ООО «Компания Алкор Био»



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Кат. № 1140201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответст-

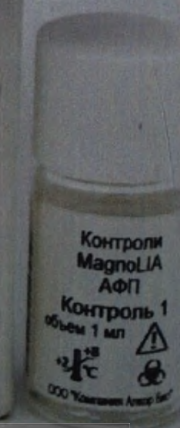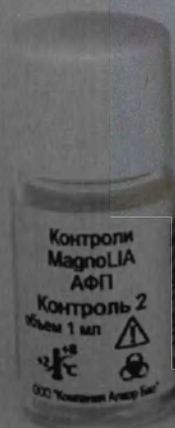

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Кат. № 1140205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствует кон:



Контроли MagnoLIA АФП

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Состав набора

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.

ТУ 21.20.23-626-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXX

LOT E003

2022-07-27

REF 1140205

2023-07-27

IVD

Σ 100

+3

1

!



Готово к использованию
Для профессионального применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA общий АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Кат. № 1140205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответст-
ние кон-

Контроли MagnoLIA АФП

LOT E003

2023-07-27

REF 1140205

+2⁺8
°C

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Кат. № 1140205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответ-
ствие кон-



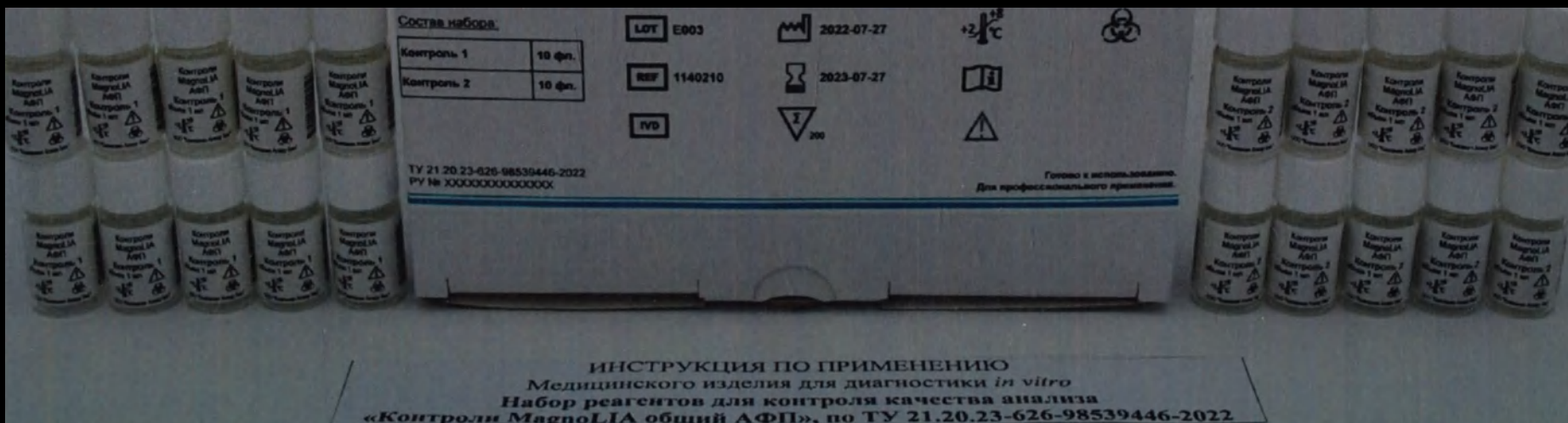

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022
Кат. № 1140210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Контроли MagnoLIA АФП

LOT E003

2023-07-27

REP 1140210

+2⁰ +8⁰ °C



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E003


Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроль Magnolia АФП», по ТУ 21.20.23-626-98539446-2022

Кат. № 1140210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствует КМ



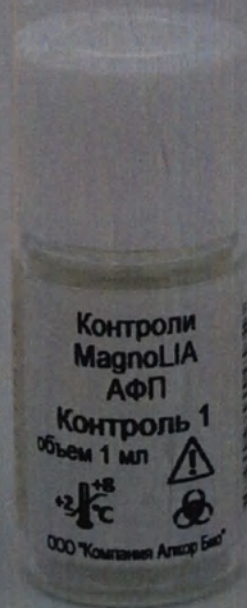

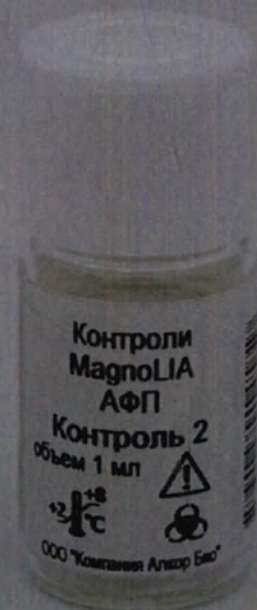

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (двадцать) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

