

ОК1ЦД 2 29.10.59.170

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИНТЕРАВТОЦЕНТР»

Д.В. Пантелеев

«26» апреля 2023 г.



**КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ  
«ИНТЕРАВТОЦЕНТР»**

**ПО ТУ 29.10.59-001-78724354-2020**

**Руководство по эксплуатации  
КМП-И982.00.020 РЭ**

Версия: 6.0

2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Интеравтоцентр»  
Россия, 603123, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
Южное шоссе, д.1  
Тел./Факс: 8 (831) 295 36 59, 429-20-20

**КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ  
«ИНТЕРАВТОЦЕНТР»  
ПО ТУ 29.10.59-001-78724354-2020**

**Руководство по эксплуатации  
КМП-И982.00.020 РЭ**



2023 г.

## Предисловие

В этом руководстве содержится важная информация и рекомендации по эксплуатации комплекса. Другая важная информация, которую необходимо знать для Вашей собственной безопасности и безопасности Ваших пассажиров, находится в других брошюрах Вашего бортового журнала.

Проследите за тем, чтобы бортовая литература была в автомобиле, когда Вы отдаете на время автомобиль или продаете его.

Возможные дополнения будут приложены к бортовой литературе отдельно.

Указания по направлению имеют в основе направление движения автомобиля.



### ВНИМАНИЕ

Тексты с таким значком содержат информацию по обеспечению безопасности движения, предупреждению возможных травм и нанесению повреждений Вашему автомобилю.



### Примечание

Тексты с таким значком содержат дополнительную информацию.

## СИМВОЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ:



**Внимание!** Изучите данное руководство по эксплуатации перед использованием изделия. Ознакомьтесь с символами, нанесёнными на корпус изделия.

|  |                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Символ «Изготовитель»                                                                                                                                                                |
|  | Знак «Заземление» - обозначение соединителей заземления, создающих защиту от поражения электрическим током                                                                           |
|  | ОСТОРОЖНО! Перед использованием изделия необходимо обязательно прочитать данное Руководство по эксплуатации и соблюдать указания по технике безопасности                             |
|  | Символ «Переменный ток» - обозначает наличие переменного тока                                                                                                                        |
|  | Знак «Опасность поражения электрическим током» - обозначает необходимость быть осторожным, так как присутствует высокое напряжение и имеется опасность поражения электрическим током |
|  | Знак радиационной опасности                                                                                                                                                          |

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                                                                                                                                                               |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.....                                                                                                                                | 5   |
| 1.1 | Общие сведения.....                                                                                                                                           | 5   |
| 1.2 | Технические характеристики.....                                                                                                                               | 8   |
| 1.3 | Комплектность.....                                                                                                                                            | 9   |
| 1.4 | Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения..... | 10  |
| 1.5 | Материалы.....                                                                                                                                                | 10  |
| 1.6 | Устройство и принцип работы.....                                                                                                                              | 10  |
| 1.7 | Соответствие национальным стандартам.....                                                                                                                     | 16  |
| 2   | ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....                                                                                                                                             | 17  |
| 2.1 | Указания мер безопасности.....                                                                                                                                | 17  |
| 2.2 | Порядок закрепления оборудования.....                                                                                                                         | 18  |
| 2.3 | Подготовка комплекса к работе.....                                                                                                                            | 18  |
| 2.4 | Эксплуатация комплекса.....                                                                                                                                   | 19  |
| 2.5 | Меры предосторожности при эксплуатации комплекса.....                                                                                                         | 19  |
| 2.6 | Характерные неисправности.....                                                                                                                                | 20  |
| 3   | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....                                                                                                                | 21  |
| 4   | РЕКЛАМАЦИОННЫЕ РАБОТЫ.....                                                                                                                                    | 21  |
| 5   | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....                                                                                                                             | 23  |
| 6   | УТИЛИЗАЦИЯ.....                                                                                                                                               | 24  |
| 7   | СТЕРИЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....                                                                                                                        | 24  |
| 8   | ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....                                                                                                                                    | 24  |
| 9   | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....                                                                                                                                  | 25  |
| 10  | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....                                                                                                                                        | 25  |
| 11  | СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....                                                                                                                                   | 28  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ А.....                                                                                                                                             | 29  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....                                                                                                                                             | 76  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ В.....                                                                                                                                             | 81  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....                                                                                                                                             | 91  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....                                                                                                                                             | 93  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.....                                                                                                                                             | 95  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ З.....                                                                                                                                             | 98  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ И.....                                                                                                                                             | 108 |

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

### 1.1 Общие сведения

#### Наименование изделия:

Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020

(далее по тексту – изделие, комплекс), следующих вариантов исполнения:

- «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD.
- «Диспансеризация» №2, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD.
- «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ – 1767М9(тип А, тип А6)
- «Профосмотр» исполнение №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD.
- «Профосмотр» исполнение №2, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD.
- «Профосмотр» исполнение №3, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD.
- «Стоматология», размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD.
- «Офтальмология», размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD.

Комплекс размещается на различных типах базового транспортного средства:

- на базе автомобиля - фургона ИАЦ-В-1767KD;
- на базе автомобиля - фургона ИАЦ – 1767М9(тип А, тип А6).

Комплекс в зависимости от варианта исполнения оснащен следующими медицинскими кабинетами:

- Кабинет «Диагностика»;
- Кабинет «Лаборатория»;
- Кабинет «Женское здоровье»;
- Кабинет «Офтальмология»;
- Кабинет «Стоматология».

#### Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью

«Интеравтоцентр»

Россия, 603123, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

Южное шоссе, д.1

Тел./Факс: 8 (831) 295 36 59, 229-20-20.

#### Место производства изделия:

Россия, 603123, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д.80

#### Назначение изделия:

Изделие предназначено для проведения профилактических и диагностических обследований, оказания различной медицинской помощи населению труднодоступных и удаленных районов в соответствии со специализацией медицинского комплекса.

#### Потенциальный потребитель:

Комплекс применяется квалифицированным специалистом для оказания медицинской помощи населению труднодоступных и удаленных районов.

*Пользователь должен применять изделие только в средствах индивидуальной защиты (в перчатках). Работа с изделием без СИЗ запрещена.*

**Область применения:** Учреждения здравоохранения, специализированные медицинские подразделения.

#### Показания к применению:

Показания к применению, в зависимости от применяемого варианта исполнения комплекса, представлены в таблице 1

Таблица 1 - Показания к применению

| Наименование исполнения       | Показания к применению                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Диспансеризация» №1, №2 и №3 | Необходимость проведения комплексных осмотров населения в труднодоступных местах, в целях выявления заболеваний на ранних стадиях, с возможностью забора крови и вакцинации населения.                                                                                             |
| «Профосмотр» №1, №2 и №3      | Необходимость проведения выездных медицинских осмотров на территории предприятия с целью своевременного выявления профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, охраны здоровья и сохранения способности к труду. |
| «Стоматология»                | Необходимость проведения профилактических стоматологических осмотров и лечения в выездных условиях, а также как дополнительный кабинет при лечебно-профилактических учреждениях.                                                                                                   |
| «Офтальмология»               | Необходимость проведения диагностики, профилактики и назначения лечения органов зрения, в выездных условиях, а также как дополнительный кабинет при лечебно-профилактических учреждениях.                                                                                          |

**Противопоказания:**

Отсутствуют.

Не допускается использование Комплекса не по назначению!

**Побочные эффекты:**

Отсутствуют.

Комплекс используется для всех групп населения без градации по возрастному, демографическому или популяционному признаку.

Комплекс не применяется на ходу или в движении. Комплекс применяется по назначению при установке его по месту временной дислокации.

Изделие при определенных условиях может представлять опасность для здоровья и жизни человека.

**Источники опасности:**

- бортовая электросеть и электрооборудование – опасность поражения людей электрическим током;

- нагревательные приборы – пожаробезопасность, термические ожоги;

- бактерицидный облучатель – опасность ультрафиолетового облучения (фотоофтальмия и эритема кожи).


Залогом безопасной и безаварийной работы является соблюдение правил работы и работа только на исправном и неповрежденном оборудовании.

**ВНИМАНИЕ**

*Запрещается перевозить в медицинских кабинетах людей, незакрепленные грузы и предметы.*

Изделие изготовлено в соответствии с техническими условиями ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 и имеет обозначение КМ11-И982.00.020 РЭ.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

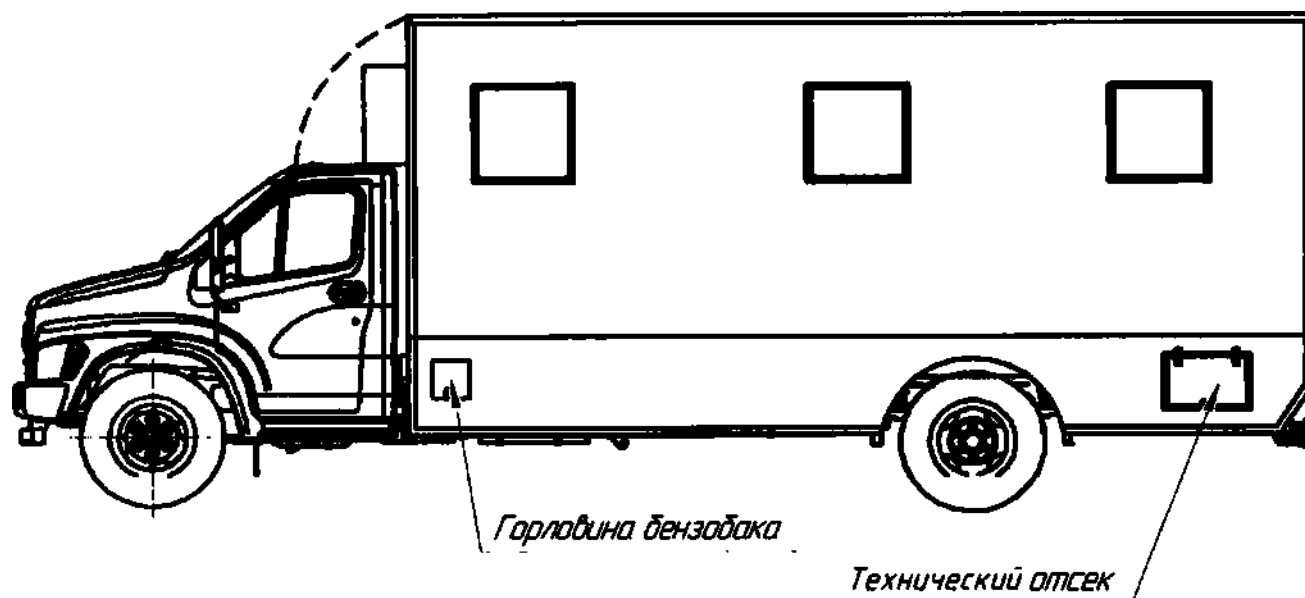



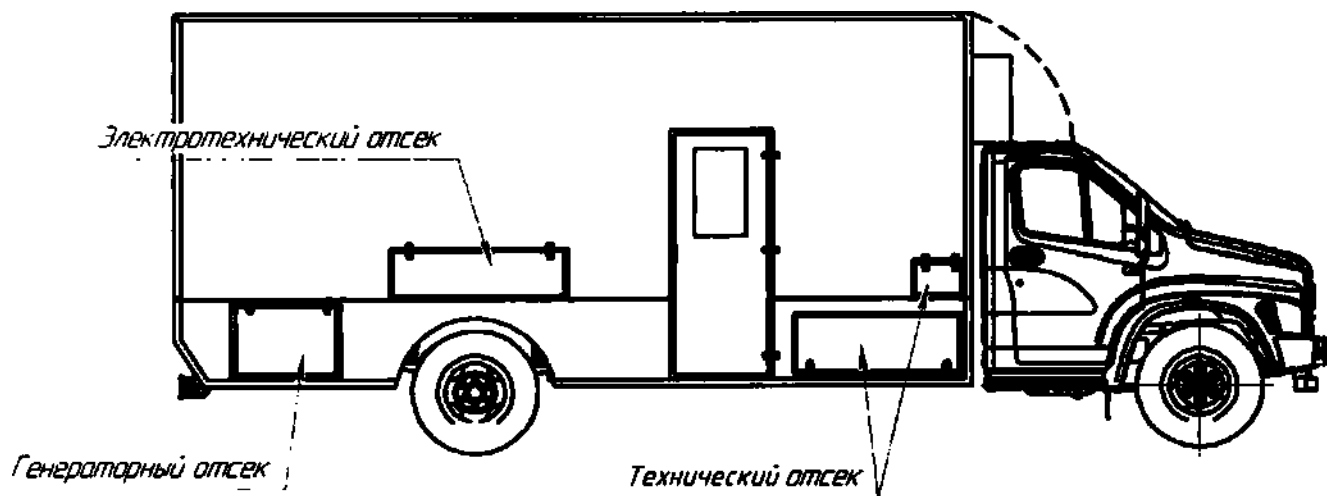


Рисунок 1-Общий вид изделия на базе автомобиля-фургона ИАЦ-В-1767KD

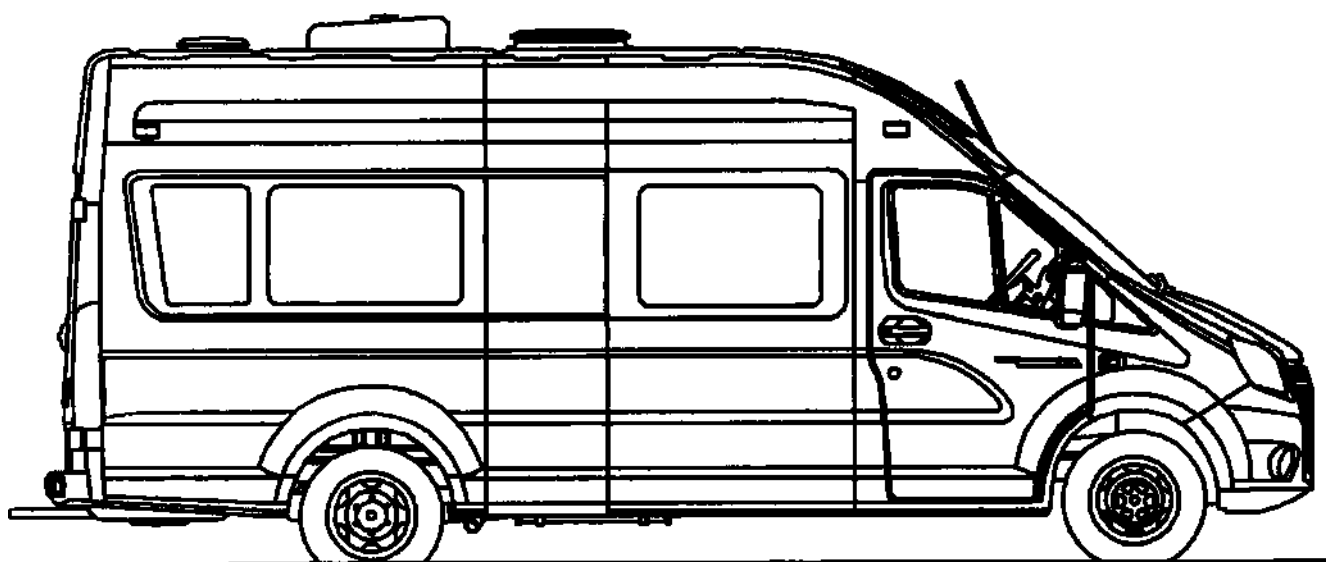
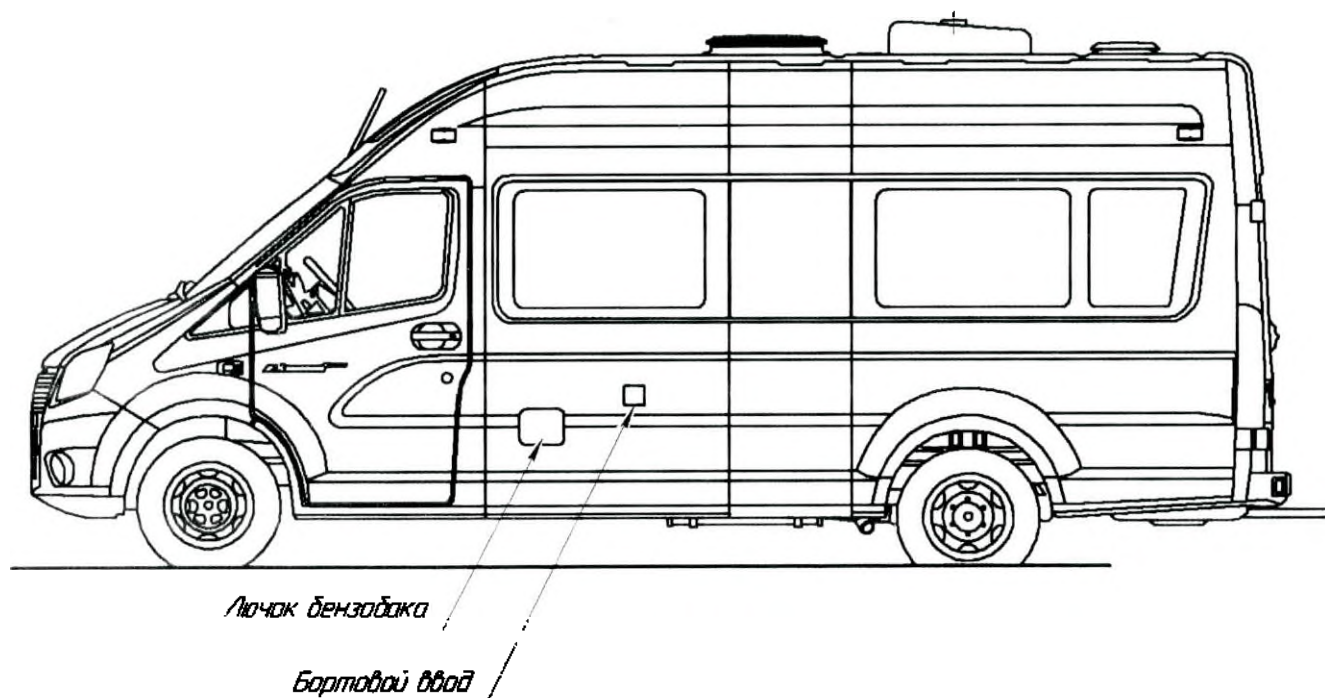


Рисунок 2-Общий вид изделия базе автомобиля-фургона ИАЦ – 1767М9 (тип А, тип А6)

### Условия эксплуатации:

Комплекс рассчитан на эксплуатацию при наружных температурах воздуха от минус 40°C до плюс 40°C, относительной влажности воздуха до 100% при плюс 25°C.

Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации комплектующих изделий и приборов приведены в эксплуатационной документации на эти изделия.

### Классификация

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий комплекс относится к группе 4 по ГОСТ Р 50444 при движении своим ходом по дорогам всех категорий (в соответствии с правилами дорожного движения) в период транспортирования.

В зависимости от потенциального риска применения средство относится к классу 26 в соответствии с приказом от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатуры классификации медицинских изделий».

По степени защиты от поражения электрическим током изделие относится к классу 1 без рабочей части по ГОСТ Р МЭК 60601-1.

Режим работы комплекса - продолжительный. Продолжительность непрерывной работы Комплекса - 8 ч в сутки.

Комплекс не предназначен для работы в средах с повышенным содержанием кислорода.

Комплекс соответствует требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2.

По степени защиты от проникновения твердых предметов и попадания воды система относится к категории IPX2 в соответствии с ГОСТ 14254.

### 1.2 Технические характеристики

Основные параметры и характеристики для вариантов исполнения комплекса, изготавливаемые на базе автомобиля-фургона ИАЦ-В-1767KD, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные параметры и характеристики автомобиля-фургона ИАЦ-В-1767KD.

| Характеристики                                | Вариант исполнения комплекса                                                                  |                        |              |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
|                                               | Диспансеризация №1 и №2                                                                       | Профосмотр №1, №2 и №3 | Стоматология | Офтальмология |
| Полная масса базового автомобиля, кг          | 8700 ± 10                                                                                     | 8700 ± 10              | 8700 ± 10    | 8700 ± 10     |
| Распределение полной массы, кг                |                                                                                               |                        |              |               |
| - через шины передних колес                   | 2650 ± 10                                                                                     | 2650 ± 10              | 2650 ± 10    | 2650 ± 10     |
| - через шины задних колес                     | 6600 ± 10                                                                                     | 6600 ± 10              | 6600 ± 10    | 6600 ± 10     |
| Снаряженная масса в/м с кабинетами, кг        | 6500 ± 10                                                                                     | 6500 ± 10              | 7200 ± 10    | 6500 ± 10     |
| Распределение снаряженной массы на дорогу, кг |                                                                                               |                        |              |               |
| - через шины передних колес                   | 2360 ± 10                                                                                     | 2360 ± 10              | 2360 ± 10    | 2360 ± 10     |
| - через шины задних колес                     | 5890 ± 10                                                                                     | 5890 ± 10              | 5890 ± 10    | 5890 ± 10     |
| Габаритные размеры автомобиля, мм             |                                                                                               |                        |              |               |
| - длина                                       | 9770 ± 10                                                                                     | 9770 ± 10              | 9770 ± 10    | 9770 ± 10     |
| - ширина                                      | 2500 ± 10                                                                                     | 2500 ± 10              | 2500 ± 10    | 2500 ± 10     |
| - высота                                      | 3650 ± 10                                                                                     | 3650 ± 10              | 3650 ± 10    | 3650 ± 10     |
| База, мм                                      | 4515 ± 10                                                                                     | 4515 ± 10              | 4515 ± 10    | 4515 ± 10     |
| Максимальная скорость движения, км/ч          | При движении по асфальтному покрытию: 60 км/ч.<br>При движении по грунтовым дорогам: 20 км/ч. |                        |              |               |
| Колесная формула                              | 4x2                                                                                           |                        |              |               |



| Характеристики                                          | Вариант исполнения комплекса |                        |              |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
|                                                         | Диспансеризация №1 и №2      | Профосмотр №1, №2 и №3 | Стоматология | Офтальмология |
| <b>Электротехнические характеристики</b>                |                              |                        |              |               |
| Сеть питания                                            | 220В ± 10%, 50 ± 0,5 Гц.     |                        |              |               |
| Потребляемая мощность от внешней и бортовой сети, кВт   | 25 ± 2                       |                        |              |               |
| Потребляемая мощность от автономного генератора, кВт    | 13 ± 2                       |                        |              |               |
| Длина кабеля для подключения внешнего электропитания, м | 15 ± 0,15                    |                        |              |               |
| Масса кабеля для подключения внешнего электропитания, г | 3500 ± 20                    |                        |              |               |

Основные параметры и характеристики для варианта исполнения комплекса, изготавливаемого на базе автомобиля-фургона ИАЦ – 1767М9 (тип А, тип А6), представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные параметры и характеристики автомобиля-фургона ИАЦ – 1767М9 (тип А, тип А6).

| Характеристики                                          | Вариант исполнения комплекса                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Диспансеризация №3                                                                             |
| Полная масса базового автомобиля, кг                    | 4600 ± 10                                                                                      |
| Распределение полной массы, кг                          | 1650 ± 10                                                                                      |
| - через шины передних колес                             |                                                                                                |
| - через шины задних колес                               | 2670 ± 10                                                                                      |
| Снаряженная масса а/м с кабином, кг                     | 3700 ± 10                                                                                      |
| Распределение снаряженной массы на дорогу, кг           |                                                                                                |
| - через шины передних колес                             | 1450 ± 10                                                                                      |
| - через шины задних колес                               | 2348 ± 10                                                                                      |
| Габаритные размеры, не более, мм                        |                                                                                                |
| - длина                                                 | 6907 ± 10                                                                                      |
| - ширина                                                | 2070 ± 10                                                                                      |
| - высота                                                | 2753 ± 10                                                                                      |
| База, мм                                                | 3950 ± 10                                                                                      |
| Максимальная скорость движения, км/ч                    | При движении по асфальтному покрытию: 60 км/ч.<br>При движении по грунтовыми дорогам: 20 км/ч. |
| Колесная формула                                        | 4x2                                                                                            |
| <b>Электротехнические характеристики</b>                |                                                                                                |
| Сеть питания                                            | 220В ± 10%, 50 ± 0,5 Гц,                                                                       |
| Потребляемая мощность от внешней и бортовой сети, кВт   | 25 ± 2                                                                                         |
| Потребляемая мощность от автономного генератора, кВт    | 13 ± 2                                                                                         |
| Длина кабеля для подключения внешнего электропитания, м | 15 ± 0,15                                                                                      |
| Масса кабеля для подключения внешнего электропитания, г | 3500 ± 20                                                                                      |

### 1.3 Комплектность

Комплект поставки Комплекса должен соответствовать приложению А.

Комплекс оснащается медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Заказчика, с учетом направления деятельности и проводимых исследований, манипуляций Заказчика.

**1.4 Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения**

Изделие не содержит лекарственных средств для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения.

### 1.5 Материалы

Части комплекса (кроме покупного), изготовлены из следующих материалов:

#### **Корпус мебели:**

- Плита древесностружечная ламинированная тип Р2, производства ООО «Сыктывкарский фанерный завод», Россия  
- Кант ПВХ – Поливинилхлорид марка МП-23-90, МП-23Д-90Д, производства «Финист и Ко», Россия

- Кромка ПВХ – Поливинилхлорид производства МААГ, Польша

- Крепежные изделия – оцинкованная сталь, производства Pulse, Китай

- Фанера – Шпон лиственных пород, марки ФСФ, производства ООО «ИнвессФорест», Россия

- Петли – сталь, ГОСТ 13-40-75 производства Hettich, Польша

- Ручки – сталь, ГОСТ 13-40-75 производства Hettich, Польша

#### **Обтяжка рабочих кресел/матрацев кушеток:**

**Лицевой слой:** Винилискожа обивочная ВО-Т, марка 1 и/или марка 2, трикотажное полотно из синтетический пряжи (ворсовое), производства ООО «Трейд-Вит», Россия

**Промежуточный слой:** пенополиуритан эластичный на основе простого полиэфира, производства ООО «Трейд-Вит», Россия

**Нижний слой:** трикотажное полотно из синтетической пряжи, производства ООО «Трейд-Вит», Россия

**Пол:** фанера – шпон лиственных пород, марки ФСФ, производства ООО «ИнвессФорест, Россия; линолеум ПВХ для автотранспортных средств – поливинилхлорид на подоснове, производства ООО «Техно-Текс», Россия.

**Стены и потолок:** панель пластик-алюминиевая композитная трёхслойная, марка «ALTEC», производства ООО «Производственные технологии», Россия

**Входная и внутренняя дверь:** металлопрокат, сталь марки Ст3, производства АО «Борский Трубный Завод», Россия; панель пластик-алюминиевая композитная трёхслойная, марка «ALTEC», производства ООО «Производственные технологии», Россия

**Технический и входной трап** – металлопрокат, сталь марки Ст3, производства АО «Борский Трубный Завод», Россия.

**Кабель питания** – медь в оплетке поливинилхлорид марка ПВХ-С, производства ООО «Коаксиал», Россия.

### 1.6 Устройство и принцип работы

#### 1.6.1 Конструкция комплекса

Комплекс представляет собой утепленный корпус, оборудованный инженерными системами жизнеобеспечения, встроенной мебелью, оснащен специальным медицинским и вспомогательным оборудованием (приложения А, В и Г).

Описание исполнения фургона автомобиля ИАЦ-В-1767KD:

|                                                                      |         |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кузов-фургон изотермического исполнения со встроенными перегородками |         | наличие                                                                                                                   |
| толщина панелей                                                      |         | 50 мм                                                                                                                     |
| наружная обшивка                                                     |         | наличие                                                                                                                   |
| внутренняя обшивка всех отсеков за исключением технических           |         | наличие                                                                                                                   |
| Технический отсек по правому борту                                   | 3 шт.   |                                                                                                                           |
| Технический отсек по левому борту                                    | 2 шт.   |                                                                                                                           |
| Подножка уличная                                                     | 1 шт.   |                                                                                                                           |
| Ступени входной группы                                               | наличие |                                                                                                                           |
| Поручень при входе слева                                             | 1 шт.   |                                                                                                                           |
| Ящики аккумуляторные                                                 | 1 к-т.  |                                                                                                                           |
| Автономный выносной генератор                                        | 1 шт.   | Принцип работы:<br><br>для избежания возможных вибраций, для корректной работы медицинских приборов, генератор необходимо |

|                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                                 | выставить с платформы во время эксплуатации на землю                                                                                                                                               |
| Платформа выкатная для электрогенератора                                                                                                                                                              | 1 шт.                           |                                                                                                                                                                                                    |
| Щит питания и автоматического защитного отключения при перегрузке электропроводки или замыкании в цепи.                                                                                               | 1 шт.                           | Предназначен для избежание поражения человеком электрическим током и защита от короткого замыкания.                                                                                                |
| Система заземления                                                                                                                                                                                    | 1 шт.                           | Предназначена для корректной работы оборудования.                                                                                                                                                  |
| Инвертор 12/220В, для работы оборудования с номинальным напряжением 220В от бортовой сети автомобиля (12 В).                                                                                          | 1 шт.                           | Предназначен для преобразования электрического напряжения с 12 на 220В.                                                                                                                            |
| Преобразователь напряжения 220/12В для работы оборудования с номинальным напряжением 12В во время работы электрогенератора                                                                            | 1 шт.                           | Предназначен для преобразования электрического напряжения с 220 на 12В.                                                                                                                            |
| Зарядное устройство для аккумуляторов 12 В                                                                                                                                                            | 1 шт.                           | Предназначен для зарядки дополнительной АКБ.                                                                                                                                                       |
| Источник бесперебойного питания                                                                                                                                                                       | 1 шт.                           | Предназначен для бесперебойного напряжения электропитания. При пропадании которого он производит плавное отключение напряжения.                                                                    |
| Кабель для подключения внешнего электропитания 220В                                                                                                                                                   | 1 шт.                           | Для подключения к внешней сети имеется 3-х проводной электрический кабель в двойной изоляции, с многожильными медными проводами с сечением 6 мм <sup>2</sup><br><br>Длина кабеля 15 ± 0,15 метров. |
| Ящик ввода-вывода электропитания 220В                                                                                                                                                                 | 1 шт.                           | Предназначен для контроля/мониторинга ввода-вывода электропитания 220В                                                                                                                             |
| Приточный фильтровентиляционный блок, оснащенный электронной регулируемой заслонкой, вентилятором со ступенчатой регулировкой оборотов, фильтрами грубой, тонкой и высокоэффективной очистки воздуха. | 3 шт.                           | Предназначен для вентиляции помещения и очистки воздуха                                                                                                                                            |
| Система кондиционирования                                                                                                                                                                             | наличие                         | Предназначен для кондиционирования медицинского салона. Работает от внешнего питания (генератор или внешняя сеть).                                                                                 |
| Система отопления независимая, автономная                                                                                                                                                             | наличие                         | Подсоединен к топливной системе и производит забор топлива из бака ТС. Работает от дополнительной АКБ 12В.                                                                                         |
| Электрическая нагревательная панель                                                                                                                                                                   | 4 шт.                           | Работает от внешнего питания (генератор или внешняя сеть).                                                                                                                                         |
| Система коммуникации и связи                                                                                                                                                                          | наличие                         | Предназначена для обеспечения коммуникации и связи                                                                                                                                                 |
| Сетевой дисковый накопитель                                                                                                                                                                           | 1 шт.                           | Для накопления, хранения информации                                                                                                                                                                |
| Сетевой коммутатор                                                                                                                                                                                    | 1 шт.                           | Для обеспечения коммуникации на несколько пользователей                                                                                                                                            |
| Точка доступа Wi-Fi                                                                                                                                                                                   | 1 шт.                           | Для обеспечения коммуникации на несколько пользователей                                                                                                                                            |
| Огнетушитель порошковый, объем 2,0л                                                                                                                                                                   | Зависит от количества помещений | Для обеспечения противопожарной безопасности                                                                                                                                                       |

#### Описание исполнения автомобиля ИАЦ-В-1767М9:

|                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Цельнометаллический кузов                                                                         | наличие |
| Термошумоизоляция                                                                                 | наличие |
| Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования                                        | наличие |
| Отделка боковых панелей и потолка медицинских отсеков композитными материалами на основе алюминия | наличие |
| Подножка у правой сдвижной двери                                                                  | 1 шт.   |
| Поручень при входе слева                                                                          | 1 шт.   |

|                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автономный выносной генератор                                                                                                                                                                         | 1 шт.                           | Принцип работы:<br>для избежания возможных вибраций, для корректной работы медицинских приборов, генератор необходимо выставить с платформы во время эксплуатации на землю.                      |
| Щит питания и автоматического защитного отключения при перегрузке электропроводки или замыкании в цепи.                                                                                               | 1 шт.                           | Предназначен для избежания поражения человеком электрическим током и защита от короткого замыкания.                                                                                              |
| Система заземления                                                                                                                                                                                    | 1 шт.                           | Предназначена для корректной работы оборудования.                                                                                                                                                |
| Инвертор 12/220В. для работы оборудования с номинальным напряжением 220В от бортовой сети автомобиля (12 В).                                                                                          | 1 шт.                           | Предназначен для преобразования электрического напряжения с 12 на 220В.                                                                                                                          |
| Преобразователь напряжения 220/12В для работы оборудования с номинальным напряжением 12В во время работы электрогенератора                                                                            | 1 шт.                           | Предназначен для преобразования электрического напряжения с 220 на 12В.                                                                                                                          |
| Зарядное устройство для аккумуляторов 12 В                                                                                                                                                            | 1 шт.                           | Предназначен для зарядки дополнительной АКБ.                                                                                                                                                     |
| Источник бесперебойного питания                                                                                                                                                                       | 1 шт.                           | Предназначен для бесперебойного напряжения электропитания. При пропадании которого он производит плавное отключение напряжения.                                                                  |
| Кабель для подключения внешнего электропитания 220В                                                                                                                                                   | 1 шт.                           | Для подключения к внешней сети имеется 3-х проводной электрический кабель в двойной изоляции, с многожильными медными проводами с сечением 6 мм <sup>2</sup><br>Длина кабеля не менее 15 метров. |
| Ящик ввода-вывода электропитания 220В                                                                                                                                                                 | 1 шт.                           | Предназначен для контроля/мониторинга ввода-вывода электропитания 220В                                                                                                                           |
| Приточный фильтровентиляционный блок, оснащенный электронной регулируемой заслонкой, вентилятором со ступенчатой регулировкой оборотов, фильтрами грубой, тонкой и высокоэффективной очистки воздуха. | 3 шт.                           | Предназначен для вентиляции помещения и очистки воздуха                                                                                                                                          |
| Система кондиционирования                                                                                                                                                                             | наличие                         | Предназначен для кондиционирования медицинского салона. Работает от внешнего питания (генератор или внешняя сеть).                                                                               |
| Система отопления независимая, автономная                                                                                                                                                             | наличие                         | Подсоединен к топливной системе и производит забор топлива из бака ТС. Работает от дополнительной АКБ 12В.                                                                                       |
| Электрическая нагревательная панель                                                                                                                                                                   | 4 шт.                           | Работает от внешнего питания (генератор или внешняя сеть).                                                                                                                                       |
| Система коммуникации и связи                                                                                                                                                                          | наличие                         | Предназначена для обеспечения коммуникации и связи                                                                                                                                               |
| Сетевой дисковый накопитель                                                                                                                                                                           | 1 шт.                           | Для накопления, хранения информации                                                                                                                                                              |
| Сетевой коммутатор                                                                                                                                                                                    | 1 шт.                           | Для обеспечения коммуникации на несколько пользователей                                                                                                                                          |
| Точка доступа Wi-Fi                                                                                                                                                                                   | 1 шт.                           | Для обеспечения коммуникации на несколько пользователей                                                                                                                                          |
| Огнетушитель порошковый, объем 2,0л                                                                                                                                                                   | Зависит от количества помещений | Для обеспечения противопожарной безопасности                                                                                                                                                     |

Питание электрооборудования на стоянке осуществляется однофазным переменным напряжением 220 В  $\pm$  10% частотой 50  $\pm$  0,5 Гц, от источников внешнего питания:

- автономного выносного генератора мощностью 4,4 кВт при 220В  $\pm$  10 %;
- подключение к внешней сети переменного тока частотой 50  $\pm$  0,5 Гц, напряжением 220 В  $\pm$  10


%





#### Примечание

Оба вида подачи электричества осуществляются через кабель внешнего питания к розетке бортового ввода, находящей по правому борту в задней части фургона.

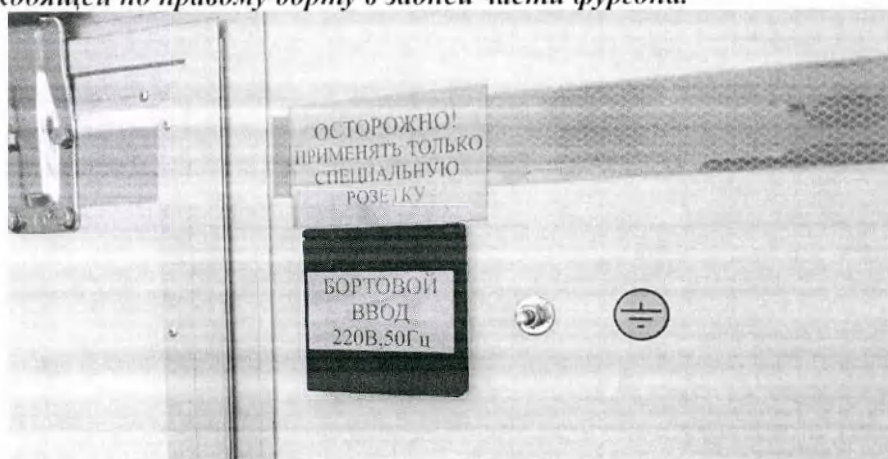

#### Генератор дизельный RedVerg RD-D5000EN.

Находится в заднем ящике по правому борту. Современный компактный дизельные двигателя с прямым впрыском

Автономная продолжительность работы - 12 ч

Мощность номинальная при 220В, 4.4 кВт

Стартер - Электро 12V/Ручной

Выходное Напряжение - 220 В

Объем картера двигателя - 1.6 л.

Объем топливного бака - 15 л

Двигатель - 4-х тактный

Тип охлаждения - воздушное


Аккумулятор в комплекте

Номинальная частота, об./мин. - 3000

Тип и фаза - Бесщёточный, однофазный

Конструкция - Рамная

Система аварийного отключения при низком давлении масла.

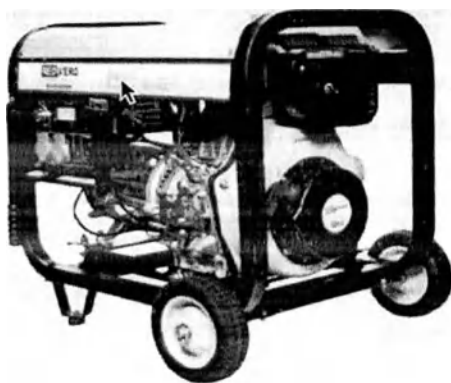

#### **Подготовка к работе генератора.**

Подготовку к работе агрегата и его работоспособности следует проводить в соответствии с Руководством по эксплуатации на генератор.

Для правильной работы медицинского оборудования РЕКОМЕНДУЕМ произвести следующие работы:

1. Открыть ящик и выкатить подиум с генератором. Выкаткой постамент предназначен для удобства снять генератор.
2. Открутить и поставить на определенном расстоянии от медицинского кабинета на внешнюю платформу поверхности земли.
3. Установить заземление транспортного средства.
4. Произвести заправку генератора топливом.
5. Проверить масло в двигателе.
6. Завести агрегат.
7. Подсоединить кабель внешнего питания к бортовому вводу (розетки).
8. Подсоединить вилку кабеля к ГЕНЕРАТОРУ.



#### **ВНИМАНИЕ**

Не заводить генератор при подсоединенном кабеле внешнего питания к медицинскому комплексу. Подавать напряжение к медицинскому комплексу только при постоянной и равномерной работе генератора.



#### **Примечание**

При не снятом генераторе с платформы шасси и не установленном на внешнюю платформу от машины, работа медицинского оборудования будет некорректной.

Т.к. будет происходить вибрация по всему транспортному средству в том числе и в медицинских кабинетах!!



#### **ВНИМАНИЕ**

Подавая напряжение к медицинскому комплексу через источник внешнего питания, подсоединяя розетку к другой линии электросетей. **УБЕДИТЕСЬ**, что установлено заземление и кабель внешнего питания подключен к розетки на транспортном средстве.



#### **ВНИМАНИЕ**

Категорически запрещается подключать кабель ~ 220В к розетке ~ 220В, необорудованной заземленным контактом или не имеющей цепи заземления.



#### **Примечание**

При подачи электроснабжения от внешней сети (генератор или другая линия электросети) автоматически производится зарядка дополнительных аккумуляторных батарей.



Устройство защитного отключения предусматривает защиту от коротких замыканий. Комплекс имеет общую точку защитного заземления для всех электрических потребителей. Местонахождение точки защитного заземления находится в нижней правой задней части подрамника. Точка является выносной, состоит из троса и штыря.

Потребляемая мощность комплекса от внешней и бортовой сети  $25 \pm 2$  кВт, от автономного выносного генератора -  $13 \pm 2$  кВт. Необходимое время работы комплекса от дополнительных аккумуляторных батарей, для каждого варианта исполнения комплекса, 2 часа. Автономная продолжительность работы комплекса от генератора, для каждого варианта исполнения, 12 часов.

Система электроснабжения комплекса имеет следующие отдельные системы с собственными защитными устройствами:

- система электроснабжения специального оборудования (систем освещения, отопления, кондиционирования, вентиляции, водоснабжения);
- система электроснабжения медицинских изделий;
- система электроснабжения средств связи.

Комплекс оборудован средствами внешней связи и передачи данных со стационарными медицинскими учреждениями (ноутбук). Ноутбук обладает следующими аппаратными характеристиками:

- Процессор: Intel Pentium x86-совместимый процессор с 2 процессорными ядрами частотой от 2 ГГц;

- Оперативная память: 2 Гб;
- Дисковая подсистема: 50 Гб свободного дискового пространства;
- Монитор с поддерживаемым разрешением 1280\*1024 или 1366\*768 ;
- Наличие интерфейса RS-232 (последовательный порт).

В комплект поставки ноутбук не входит, устанавливается заказчиком самостоятельно или по его потребности в зависимости от поставленных задач. Ноутбук размещается на столе врача.

Установка и подключение электроприборов соответствуют схеме электрической принципиальной, для каждого варианта исполнений, представленной в приложении Д.

Общий уровень освещенности комплекса, за исключением технических отсеков, на горизонтальной плоскости на высоте 1 м от пола на расстоянии 0,5 м от стеновых панелей – от 270 до 480 лк.

Местное освещение на рабочих местах и манипуляционных полях - от 150 до 300 лк при лампах накаливания или от 300 до 400 лк при люминесцентных или светодиодных лампах.

Аварийное освещение помещений комплекса обеспечивается от штатного АКБ. Уровень аварийного освещения от 30 до 250 лк на горизонтальной плоскости на высоте 1 м от пола и на расстоянии 0,5 м от стеновых панелей. Подножки внешних дверей, площадки, трапы комплекса должны иметь местное освещение, обеспечивающее освещенность поверхностей от 30 до 250 лк.

Помещения комплекса оснащены электрическими розетками для питания медицинских изделий и специального оборудования. Минимальное число розеток в каждом помещении, за исключением технических отсеков, выбирается исходя из общего количества потребителей. Розетки, установленные внутри комплекса, имеют заземляющий контакт и служат для подключения потребителей, рассчитанных на питание напряжением 220 В. Подключение к розеткам электроприборов мощностью более 2,2 кВт не допускается. Схема расположения розеток, для каждого варианта исполнения, предоставлена в приложении Ж.

Система водоснабжения комплекса имеет емкости для чистой воды объемом  $5 \pm 3$  л или  $10 \pm 3$  л и емкости для сбора сточных вод. Система слива использованной воды заключается в сливе в емкость, с запасом 30% от объема емкостей для чистой воды, для последующей утилизации ее за пределами комплекса.

Варианты исполнения комплекса оборудованы отдельным изолированным помещением для санузла, которое оснащено рукомойником с подачей подогретой воды. Санузел оснащен биотуалетом.

### 1.7 Соответствие национальным стандартам.

Изделие соответствует приведенным ниже национальным стандартам, которые обеспечивают безопасность и эффективность применения.

- ГОСТ 28385 «Комплексы медицинского назначения передвижные (подвижные) на автомобильных шасси. Цветографические схемы, опознавательные знаки. Технические требования»;
- ГОСТ 31508 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»;
- ГОСТ Р 50444 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;
- ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части климатических факторов внешней среды»;
- ГОСТ 14192 «Маркировка грузов»;
- ГОСТ Р 52770 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
- ГОСТ Р 56328-2 «Изделия медицинские. Подвижные (передвижные) комплексы медицинского назначения. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания»;
- ГОСТ Р МЭК 60601-1 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик»;
- ГОСТ 31508 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»;
- ГОСТ ISO 14971 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям».

## 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 2.1 Указания мер безопасности

#### ОСТОРОЖНО

-  Эксплуатация комплекса должна осуществляться в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
-  Автомобиль, оборудование и медицинские электрические изделия, входящие в состав всех вариантов исполнений комплекса, эксплуатируются согласно эксплуатационной документации на них.
-  Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.
-  К эксплуатации изделия допускается только специально обученный персонал.
-  Лица, работающие с изделием, должны изучить описанные в настоящем руководстве устройство и принцип работы изделия, его технические характеристики, указания мер безопасности и правила эксплуатации.
-  К работе с изделием допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
-  Запрещается вносить изменения в конструкцию комплекса.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Запрещается пользоваться неисправным изделием.
-  Запрещается оставлять работающее изделие без присмотра.
-  Запрещается подключать сетевой шнур к розеткам, не имеющим контакта защитного заземления.

Автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому при эксплуатации комплекса необходимо строго соблюдать требования безопасности и предупреждения, приведенные в Руководстве по эксплуатации на базовое шасси.

Конструкция крепежных устройств для приборов, аппаратов, укладок должна обеспечивать их надежную фиксацию, исключая самопроизвольное смещение и раскрепление в движении и обеспечивающую возможность быстрого освобождения их от крепежных устройств для использования вне салона автомобиля.

#### *Меры защиты от поражения электрическим током*

По степени защиты от поражения электрическим током изделие относится к классу I/без рабочей части.

Источником возникновения опасности являются: кабель, электропроводка, щиток распределительный, электрооборудование, установленное в комплексе.

-  Изделие должно быть подключено только к сети с напряжением, указанным на наклейке с серийным номером.

-  Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно быть присоединено только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.

-  Во время эксплуатации изделия сетевая кабельная вилка должна быть легко доступна.

-  К работам по подготовке электрооборудования комплекса к работе и техническому обслуживанию допускаются лица, специально обученные правилам работы с электроустановками. Руководитель работ должен иметь IV, а члены бригады III квалификационные группы (до 1000 В) по электробезопасности.

-  Использование кабелей с поврежденной изоляцией, контактов и корпусов соединителей не допускается.

-  Для предупреждения поражения электрическим током необходимо:

- проверить устранение повреждений, неисправностей (работы выполнять только на обесточенном оборудовании);
- применять ЗИП только соответствующего номинала;
- не закорачивать и не снимать защитные блокировки в электрооборудовании;

- при необходимости использовать основные и дополнительные изолирующие средства от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики и др.).

 При внезапном отключении электроэнергии необходимо обесточить включенное электрооборудование для предотвращения его самопроизвольного включения при подаче электроэнергии.

#### **Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами**

 Запрещается применение не рекомендованных производителем способов очистки и дезинфекции.

 Не допускается обработка изделия воспламеняющимися жидкостями (антисептиками, чистящими агентами и т.д.).

 Пользователь несет ответственность за обезвреживание опасных материалов, пролитых на изделие или попавших внутрь его корпуса.

#### **Меры пожарной безопасности**

Помещения комплекса оснащены средствами пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с установленными требованиями по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.033

Основными источниками пожарной опасности являются нагревательные приборы и электропроводка.

Для предупреждения пожаров и несчастных случаев необходимо:

- не оставлять работающие нагревательные приборы без присмотра.

В каждом помещении всех вариантов исполнения комплекса, включая общие проходные помещения, по 1 шт. размещаются порошковые огнетушители марки ОП-5(з)-АВСЕ-01, производителя ООО «МЕЛАНТИ», Россия.

В случае воспламенения электропроводки гасить пламя порошковым огнетушителем. Ежегодно необходимо проверять сохранность заряда огнетушителя путем его взвешивания.

**Категорически запрещается** использовать химический пенный огнетушитель или заливать пламя водой до тех пор, пока кабель электропитания комплекса не будет обесточен и не отключен от источника внешнего электропитания.

Запрещается пользоваться внутри салона легковоспламеняющимися и сомовозгораемыми материалами, а также использовать самодельные или дополнительные нагревательные приборы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций при работе генераторной как на стоянке, так и при передвижении комплекса, генераторный отсек оборудован пожарной сигнализацией с выводом сигнальных устройств в кабину автомобиля.

#### **2.2 Порядок закрепления оборудования:**

1. Переносное оборудование (ноутбук, кресло врача, укладка и т.д.) закрепите ремнями транспортировочными для исключения перемещения.

2. Стационарное оборудование (облучатель и т.д.) закрепите болтами в места крепления в установленные места.

#### **2.3 Подготовка комплекса к работе**

По прибытии комплекса на место назначения необходимо расположить его на ровной площадке с твердым грунтом не более 10 м от источника электроэнергии 220В ± 10% частотой 50 ± 0,5 Гц, или установить выносной генератор. Установить площадку, трапы и опорные устройства (при их наличии) в рабочее положение.

Проверить комплектность комплекса, в соответствии с приложением А, одновременно следует убедиться в отсутствии механических повреждений оборудования, нарушения изоляции электрических кабелей и заземляющего провода.

Проверить положение кнопок управления перед включением комплекса. (Выключатели оборудования установить в выключенное положение).

Проверить надежность крепления заземлителей. Местонахождение точки защитного заземления находится в нижней правой задней части подрамника. Точка является выносной, состоит из троса и штыря.

Установить в рабочее положение оборудование, упакованное и закрепленное на время транспортировки.

Для сбора и последующей утилизации использованной воды необходимо установить пустую емкость под сливным патрубком мойки.

Подключение электропитания:

Подключить кабель питания с проводом заземления к вилке «ВВОД 220 В».

Убедиться, что положение органов управления на щите автоматической защиты находится в соответствующем выключенном положении.

Подключить другой конец кабеля питания с проводом заземления к предварительно обесточенному источнику внешнего питания или к выносному генератору.

К источнику внешнего электропитания кабель следует подключать через автоматический выключатель или плавкие вставки. Автоматический выключатель содержит тепловой и электромагнитный расцепители. Номинальный ток теплового расцепителя или тепловых вставок должен быть  $25 \pm 2$  кВт.

Проверить правильность и надежность подключения кабеля и провода заземления.

Включить напряжение на кабель со стороны внешнего источника питания.

#### **2.4 Эксплуатация комплекса**

К работам по эксплуатации комплекса допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с источниками ионизирующих излучений, прошедшие специальную подготовку для работы с рентгеновским флюорографическим оборудованием и имеющие квалификационную группу не ниже II.

Эксплуатация медицинского оборудования – в соответствии с его эксплуатационной документацией.

Эксплуатация электроприборов жизнеобеспечения персонала – согласно инструкциям по эксплуатации на них.

##### **Дезинфекция:**

Внутреннюю поверхность и наружные поверхности, установленных в салоне мебели и оборудования, при необходимости, следует протирать чистой салфеткой из марли по ГОСТ 11109, смоченной 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5%-ного моющего средства по ГОСТ 25644 или 1%-ным раствором хлорамина В ТУ6-01-4689387-16-89.

Дезинфекцию воздуха в комплексе осуществлять периодическим включением бактерицидного облучателя. Эксплуатация облучателя – согласно руководству по его эксплуатации.

##### **Порядок выключения комплекса для всех вариантов исполнений:**

- обесточить все оборудование медицинского назначения;
- зафиксировать двери комплекса;
- отключить электропроводонагреватель и слить воду;
- отключить все отопители, кондиционеры согласно их инструкции;
- слить воду из емкости слива использованной воды и произвести ее дезинфекцию 1% раствором хлорамина В;
- дверцы и ящики шкафов и столов зафиксировать;
- закрыть окно;
- произвести отключение всех электроприборов на щите управления;
- отключить источник внешнего электропитания;
- отсоединить конец кабеля от обесточенного источника внешнего электропитания или от генератора;
- произвести отключение другого конца кабеля от разъема «ВВОД 220 В» на комплексе;
- произвести отключение заземляющего провода (контакта);
- очистить кабель (с проводом заземления) от пыли и грязи, свернуть и уложить в рундук;
- выключить аварийное освещение;
- площадку и опорные устройства комплекса (при их наличии) уложить в технические ниши-отески/предусмотренные места транспортировки.

#### **2.5 Меры предосторожности при эксплуатации комплекса**

##### **Регулярно проверяйте:**

- надежность креплений мебели и оборудования, при ослаблении необходимо подтянуть болты, винты;
- давление воздуха в шинах;
- состояние резиновых стяжек. Поврежденные резиновые стяжки необходимо заменить;
- чистоту клемм и зажимов аккумуляторных батарей и за надежностью их соединения (шасси транспортного средства и электрогенератора);
- уровни и состояние горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей.

**Выхлопные газы ядовиты! Поэтому помещение, в котором производится пуск и прогрев двигателя и электрогенератора, должно хорошо вентилироваться.**

Используйте горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, рекомендованные заводами-изготовителями изделий.

**Дизельное топливо (или бензин), а так же его пары ядовиты и огнеопасны! Соблюдайте меры предосторожности и правила пожарной безопасности! Избегайте попадания бензина на кожу**



и одежду, а паров бензина - в дыхательные пути. При заправке транспортного средства и электрогенератора избегайте попадания топлива на лакокрасочное покрытие.

Соблюдайте скоростной режим. При движении по асфальтному покрытию, не превышайте скорость 60 км/ч. При движении по грунтовым дорогам не превышайте 20 км/ч.

**ВНИМАНИЕ! ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФЕКТАМ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ К ПОВРЕЖДЕНИЮ МЕБЕЛИ И КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСА!**

Не нарушайте сроки проведения технического осмотра и регламентных работ. Все работы проводите в полном объеме.

Для длительного сохранения транспортного средства в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и после окончания гарантийного срока.

## 2.6 Характерные неисправности

Характерные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 4.

Если причину неисправности установить и устранить не удастся, следует снять изделие с эксплуатации и обратиться в сервисный центр или специализированную мастерскую, где ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку.

Таблица 4 – Характерные неисправности и способы их устранения

| Вид неисправности                                           | Возможная причина                                               | Способ устранения                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| При подключении кабеля отсутствует питание 220 В            | Поврежден кабель питания                                        | Заменить кабель питания                                    |
|                                                             | Повреждена электропроводка                                      | Обратиться в сервисный центр                               |
| Не работает система отопления                               | Не включено питание/повреждение электрической цепи              | Подключить кабель в электросеть, включить кнопку включения |
|                                                             | Неисправен предохранитель                                       | Заменить предохранитель                                    |
|                                                             | Отсутствие топлива в топливном баке                             | Долить топливо в топливный бак                             |
|                                                             | Вышла из строя                                                  | Заменить / ремонт в сервисном центре                       |
| Не работает тепловая завеса                                 | Не включено питание/повреждение электрической цепи              | Подключить кабель в электросеть, включить кнопку включения |
|                                                             | Неисправен предохранитель                                       | Заменить предохранитель                                    |
|                                                             | Вышел из строя                                                  | Заменить / ремонт в сервисном центре                       |
| Не работает кондиционер, холодильник                        | Не включено питание/повреждение электрической цепи              | Заменить кабель, включить кнопку включения                 |
|                                                             | Неисправен предохранитель                                       | Заменить предохранитель                                    |
|                                                             | Недостаточный уровень фреона                                    | Ремонт в сервисном центре                                  |
|                                                             | Вышел из строя                                                  | Заменить / ремонт в сервисном центре                       |
| Не работает подогрев воды в умывальнике                     | Не включено питание/повреждение электрической цепи              | Заменить кабель, включить кнопку включения                 |
|                                                             | Неисправен предохранитель                                       | Заменить предохранитель                                    |
| Внешние повреждения                                         | Механическое воздействие                                        | Ремонт в сервисном центре                                  |
| Нарушение герметичности или брызгозащитности кузова-фургона | Механическое повреждение или старение резинового профиля дверей | Ремонт в сервисном центре                                  |

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

3.1 Работоспособность и исправность комплекса, в том числе находящихся в нем инженерных систем, оборудования, мебели, на протяжении их срока службы должны обеспечивать эксплуатирующие организации путем проведения технического обслуживания (с периодическим контролем) и ремонта, которые включают в себя ежедневное обслуживание (ЕО), техническое обслуживание (ТО), периодическое и сезонное обслуживание (СО) и текущий ремонт (ТР).

3.2 ЕО проводить ежедневно, оно должно включать в себя осмотр комплекса и выявление возможных неисправностей - проверку действия приборов освещения, отопления и вентиляции, плотности притвора дверей, наличия противопожарных средств, уборку помещений.

3.3 ТО проводить не реже одного раза в месяц, оно должно включать в себя выполнение всех работ ежедневного обслуживания, а также проверку состояния самого комплекса, его заземления, визуальную оценку целостности изоляции кабеля сетевого, а также работу всего электрооборудования и освещения путем пробных включений с устранением замеченных неисправностей.

3.4 СО проводить не реже одного раза в три - шесть месяцев или после перемещения комплекса на новое место, оно должно включать в себя выполнение всех работ, входящих в ЕО и ТО, а также осмотр и чистку от пыли пита питания, кондиционеров, отопителей, проверку заземления всех электроприемников, визуальную оценку целостности изоляции кабеля сетевого, проверку крепления электрооборудования и проводов, проверку состояния наружной и внутренней обшивок, подкраску поверхностей с наружным лакокрасочным покрытием, проверку состояния и работоспособности окон и дверей, замков и защелок, состояние оплечушителей, проверку работы инженерных систем и устранение замеченных неисправностей.

3.5 ТР проводить один раз в год (при необходимости) и он должен включать в себя частичное восстановление или замену наружной и внутренней обшивок, полов, теплоизоляции, конструкций дверей и окон, мебели, инженерных систем, подкраску внутренних и наружных поверхностей, проверку сопротивления изоляции электропроводки комплекса.

3.6 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и приборов, установленных в комплексе производить в соответствии с указаниями прилагаемых на них документов.

Не допускается использование комплекса, не прошедшего плановые ТО, а также при наличии в конструкциях, инженерных системах, оборудовании и мебели дефектов, которые могут оказать влияние на безопасность находящихся в них людей.

### 4. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Для предотвращения появления коррозии необходимо 2 раза в год смазывать соединительные элементы тросов, окон будки, петли дверей и ящиков.

Обслуживание медицинской техники, входящей в состав Комплекса, производится согласно регламентам производителей и инструкциям по эксплуатации, являющимся неотъемлемой частью документации поставляемой вместе с Комплексом.

Перечень регламентных работ на сплит - системах:

#### А. Проверки на обесточенном оборудовании:

- Внешний осмотр оборудования проверка целостности и надежности крепления компонентов кондиционера, отсутствие течей масла и дренажной воды.
- Проверка и протяжка контактов электрических соединений.
- Проверка отсутствия проводимости силовой цепи - корпус кондиционера.
- Проверка сопротивления рабочих обмоток электродвигателей контакторов, соленоидных вентилей.

- Проверка свободного вращения крыльчаток вентиляторов.

- Чистка воздушных фильтров внутреннего блока.

- Проверка чистоты (при необходимости чистка - не менее 2-х раз в год) теплообменника наружного блока кондиционера.

#### Б. Проверки на включенном оборудовании:

- Проверка кондиционера на отсутствие посторонних шумов.
- Проверка направления и свободы вращения крыльчаток вентиляторов.
- Измерение рабочих токов электродвигателей кондиционера в рабочих режимах кондиционера.
- Измерение параметров холодильного контура в рабочих режимах.
- Измерение параметров обрабатываемого воздуха в рабочих режимах.
- Оценка состояния кондиционера.
- При обнаружении отклонений в работе кондиционера - планирование и проведение ремонтных или других работ.

### **В. Сезонная регулировка режимов:**

- Выполняется для оборудования оснащённого зимним комплектом, работа которого предусматривается зимой в режиме «Холод», в октябре - ноябре.
- Проверка и регулировка работы замедлителя вентилятора зимнего комплекта.
- Проверка исправности нагревателя картера.
- Проверка исправности нагревателя дренжа.

### **Перечень регламентных работ на тепловую завесу:**

Фильтр необходимо чистить регулярно, поскольку загрязнение будет снижать эффективность работы завесы и ее тепловую мощность. Степень загрязнения фильтра и периодичность чистки определяется местными условиями эксплуатации.

До проведения каких-либо работ, завесу необходимо обесточить.

1) Обесточьте завесу.

2) Ослабьте винты и откройте сервисный люк, повернув защелки на 90°.

3) Фильтр можно чистить пылесосом или прополоскать в слабо-мыльном растворе. Перед установкой просушить. Замена необходима в случае повреждения или сильной загрязненности моторы вентиляторов и другие элементы не требуют специального обслуживания за исключением периодической очистки. Необходимая периодичность определяется конкретными условиями, но должна производиться 2 раза в год. Решетки, элементы вентиляторы и внутренние поверхности очищаются с помощью пылесоса или влажной тряпкой.

**Перечень регламентных работ на автономный электрогенератор прописано в инструкции по эксплуатации генератора, входящей в комплект документации при поставке.**

### **Перечень регламентных работ на огнетушители:**

Огнетушители диагностируются, обслуживаются, ремонтируются, перезаряжаются (заряжаются) и освидетельствуются только в специализированных пунктах технического обслуживания огнетушителей (ПТОО) имеющих лицензию на выполнение этих работ.

- огнетушители всех типов диагностируются 1 раз в год.
- порошковые огнетушители перезаряжаются 1 раз в два года, а углекислотные 1 раз в 5 лет.
- после использования огнетушителя (тушение загорания, тренировка или случайное срабатывание) огнетушители обязательно перезаряжаются.

### **Перечень регламентных работ на пожарную сигнализацию:**

1) Ежемесячно проверять:

- работоспособность основных и резервных источников питания;
- работоспособность звуковых и световых оповещателей;
- техническое состояние разъемов шлейфов сигнализации, мониторингового и дополнительного оборудования информационных линий и линий электропитания.

2) Не менее 2-х раз в год проводить внешний осмотр составных частей охраннопожарной сигнализации (приемно-контрольных панелей, извещателей, резервных источников питания, шлейфов сигнализации и кабелей) на отсутствие механических повреждений, коррозии, окисления, а также прочности их крепления и т. д.

Провести техническое диагностирование приборов по методикам производителя. Проверить работоспособность систем в целом.

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Допускается транспортировать комплекс всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид транспорта должен оговариваться в договоре на поставку.

Размещение и крепление комплекса на открытом железнодорожном транспорте выполняется в соответствии с требованиями, установленными в документах, утвержденных Министерством путей сообщения, в установленном порядке.

5.2 Условия транспортирования комплекса – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150 со следующими ограничениями: температура воздуха: от плюс 50 до минус 50°C; значение относительной влажности воздуха: верхнее - 100% при плюс 25 °С, среднегодовое- 75% при 15°C.; воздействие солнечного излучения - учитывается; интенсивность дождя верхнее значение 3 мм/мин.

5.3 Условия хранения – 8 по ГОСТ 15150.

5.4 Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.

5.5 Правила хранения, консервации и транспортирования автомобиля (шасси) изложены в Руководстве по эксплуатации на базовый автомобиль.

5.6 Правила хранения и консервации комплектующих изделий и приборов приведены в эксплуатационной документации на эти изделия.

5.7 Перед транспортированием комплекса необходимо проверить надежность закрепления комплектующих приборов и оборудования.



*Автомобили могут храниться на складах не более трех месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Если после указанного срока автомобиль не вводится в эксплуатацию, то в процессе хранения должны быть выполнены регламентные профилактические работы, обеспечивающие сохранность и работоспособность автомобиля.*

## 6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Утилизации подвергаются изделия, отслужившие установленный срок или пришедшие в негодность.

6.2 Утилизацию осуществляет потребитель согласно правилам сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений, действующим в стране пользователя (для Российской Федерации – правила и нормы Минздрава РФ и СанПиН 2.1.3684 Класс опасности Б).

**Δ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, НО НЕ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ.**

6.3 Утилизация медицинских изделий, входящих в комплект поставки Комплекса, осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие и в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.

Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями относятся к классу Б.

Упаковка, изделие с истекшим сроком годности, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями относятся к медицинским отходам класса А.

6.4 Утилизация базового транспортного средства должна осуществляться в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

## 7 СТЕРИЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие не стерильно

## 8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты передачи ТС конечному покупателю, но не более 18 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ или 120 000 км. пробега (в зависимости от того, что наступит ранее), с даты подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.



*В случае отсутствия в паспорте отметки о вводе комплекса в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется от даты изготовления комплекса.*

Гарантийные обязательства включают в себя ремонтные работы, выполнение которых необходимо для устранения выявленных владельцем автомобиля неисправностей оборудования или элементов внутренней отделки салона (работ по установке дополнительного оборудования).

8.2 Гарантийные сроки на медицинское оборудование и комплектующие изделия устанавливаются заводами-изготовителями этого оборудования.

8.3 Комплексы, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящего руководства, ремонтируются заводами изготовителями за свой счет.

8.4 В случаях использования комплексов не по назначению, эксплуатации его с нарушением указания руководства по эксплуатации и сервисной книжки, а также внесения каких-либо конструктивных изменений без согласования с предприятием-изготовителем рекламации от потребителя не принимаются и претензий не рассматриваются.

8.5 Гарантийные обязательства предприятий-изготовителей комплектующих изделий определяются в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя изделия. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, эксплуатируемые на территории СНГ.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью

«Интеграавтоцентр»

603123, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород.

Кожное шоссе, д.1

Тел./Факс: 8 (831) 295 36 59, 429-20-20.



## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплексе медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020  
, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

исполнение  
заводской номер \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям  
ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 и признан годным для эксплуатации.  
Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)  
Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.  
Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(год, месяц, число)

Комплексе медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020  
, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-1767M9

исполнение  
заводской номер \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям  
ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 и признан годным для эксплуатации.  
Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)  
Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.  
Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(год, месяц, число)

## 10 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020  
\_\_\_\_\_, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

исполнение

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Контролер ОТК \_\_\_\_\_  
(штамп или фамилия)

**Характер неисправности**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Контактное лицо, ответственное за техническое обслуживание:

\_\_\_\_\_  
ФИО, телефон

Дата возникновения неисправности \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнена работа по устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Акт высылается на адрес изготовителя: ООО «ИНТЕРАВТОЦЕНТР»  
Россия, 603123, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д.1  
Тел./факс 8 (831) 295 36 59, 429-20-20

Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020  
\_\_\_\_\_, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-1767М9

исполнение  
Серийный № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Контролер ОТК \_\_\_\_\_  
(штамп или фамилия)

**Характер неисправности**

---

---

---

---

---

Контактное лицо, ответственное за техническое обслуживание:

\_\_\_\_\_  
ФИО, телефон

Дата возникновения неисправности \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнена работа по устранению неисправностей:

---

---

---

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Акт высылается на адрес изготовителя: ООО «ИНТЕРАВТОЦЕНТР»  
Россия, 603123, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д.1  
Тел./факс 8 (831) 295 36 59, 429-20-20

## 11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Сведения о рекламациях должны указываться в таблице 5.

Таблица 5 - Сведения о рекламациях.

| Наименование и обозначение составных частей | Основание для сдачи в ремонт | Дата                 |                   | Наименование ремонтного органа | Вид ремонта | Наименование ремонтных работ | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |                               |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                             |                              | поступления в ремонт | выхода из ремонта |                                |             |                              | производившего ремонт                            | принявшего изделие из ремонта |
|                                             |                              |                      |                   |                                |             |                              |                                                  |                               |

**Приложение А**  
**(обязательное)**  
**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКСА**

| № п/п                     | Наименование/тип                                                                                                                                                                                                    | Обозначение документа, изготовитель                                              | К-во, к-т (шт.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Вариант исполнения</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                 |
| <b>1.</b>                 | <b>«Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD, в составе:</b>                                                                                                                              |                                                                                  |                 |
| <b>1.</b>                 | <b>Кабинет «Диагностика», в составе:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |
| 1.1                       | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                               | 1               |
| 1.2                       | Набор изделий для врача общей практики ИВОП-01-"МЕДПЛАНТ-М" в сумке универсальной СМУ-03 по ТУ 32.50.13-012-18585567-2005                                                                                           | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР 2010/08890                                      | 1               |
| 1.3                       | Изделия для фиксации емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013, вариант исполнения: Штатив разборный для вливаний ШР-"Медплант",                                  | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № РЗН 2014/1603                                       | 1               |
| 1.4                       | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д» по ТУ 9441-004-24149103-2003                                                                                                                                | ООО "НПП "Монитор" Россия, РУ № ФСР 2012/13811                                   | 1               |
| 1.5                       | Устройство для определения объема легких Spirotest с принадлежностями,                                                                                                                                              | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/08455                             | 1               |
| 1.6                       | Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания «Прессотахо-спирограф ПТС-1411-01» по ТУ 9441-001-82193046-2007                                                                                         | ООО "Ланамедика", Россия, РУ № ФСР 2008/02820                                    | 1               |
| 1.7                       | Пульсоксиметр медицинский «Armed», вариант исполнения: УХ300                                                                                                                                                        | "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461 | 1               |
|                           | Пульсоксиметр напалеchnый серии MD300C, с принадлежностями, исполнение MD300C12;                                                                                                                                    | "Бейджинг Чойс Электроникс Технолоджи Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2009/03850       |                 |
|                           | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1" с принадлежностями по ТУ 26.60.12-011-18585567-2004,                                                                                                   | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № РЗН 2013/1343;                                      |                 |
|                           | Пульсоксиметр РМ-60 с принадлежностями                                                                                                                                                                              | "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2008/02505 |                 |
|                           | Пульсоксиметр портативный ПП-01 по ТУ 26.60.12-247-49640047-2018 с принадлежностями                                                                                                                                 | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № РЗН 2020/11229                                |                 |
| 1.8                       | Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU)                                                                                                                                                  | ОМРОН ХЕЛСКСЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № ФСЗ 2009/05423                            | 1               |
| 1.9                       | Весы напольные медицинские электронные ВМЭП-150, ВМЭП-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения ВМЭП-150-50/100-А                                                                                        | ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/09964   | 1               |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" по ТУ 4274-017-27450820-2008, вариант исполнения ВЭМ-150-А1 без стойки с одним интервалом взвешивания                                                                                                                                                                       | АО «МАССА-К», Россия, РУ № ФСР 2008/02905                                                |          |
| 1.10 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭД-01- "Малыш" по ТУ 4274-02100226454-2002                                                                                                                                                                                                          | ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/11958           | 1        |
| 1.11 | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M2 Basic (HEM-7121-ALRU), или M2 Basic (HEM-7121-RU), или M2 Basic (HEM-7121-ARU), или M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), или M3 Family (HEM-7133-ALRU), с принадлежностями | ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № РЗН 2015/3210                                      | 1        |
|      | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M6 (HEM-7322-ALRU), или M2 Eco (ARU), или M2 Plus (ARU), или 737 (HEM-8713-CM), или M2 Eco (RU)                                                                                                                                                    | ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № РЗН 2016/4995                                      |          |
|      | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD с принадлежностями варианты исполнения: LD2, или LD3, или LD3a, или LD4, или LD5, или LD5a, или LD8                                                                                                                                               | "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур, Дальнее зарубежье, РУ № ФСЗ 2012/11647 |          |
| 1.12 | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFIB, (M110), производства                                                                                                                                                                                                                  | Метракс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/10093                                              | 1        |
|      | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, варианты исполнения: 1. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01; или 2. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02.; или 3. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05.                                                               | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № РЗН 2017/5391                                         |          |
|      | Монитор-дефибриллятор BeneHeart с принадлежностями, варианты исполнения: BeneHeart D3, или BeneHeart D6                                                                                                                                                                                                                    | "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР РУ № ФСЗ 2011/10043          |          |
|      | Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Филипс Медикал Системс", США, РУ № ФСЗ 2008/02312                                       |          |
|      | Дефибриллятор ZOLL, модель AED Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZOLL Medical Corporation, США, РУ № РЗН 2014/1903                                        |          |
| 1.13 | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: buck, C-128 Гц                                                                                                                                                                         | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/08456                                     | 1        |
| 1.14 | Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп ri-derma                                                                                                                                                                                                                           | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03906                                     | 1        |
| 1.15 | Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели pen-score, ri-score I.                                                                                                                                                                                                   | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03905                                     | 1 компл. |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.16 | Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 2660-005-24149103-2018, вариант исполнения ЭК12Т-01-«Р-Д»/63, МПЦ.30.00.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО "НПП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2012/14015                                |             |
|      | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-006-24149103-2010 (ЭК 3Т-01-«Р-Д»/1, МПЦ.34.00.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО "НПП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2010/08437                                |             |
|      | Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Фукуда Дэнси Ко., Лтд.", Япония<br>РУ № РЗН 2016/4703                         | 1           |
|      | Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 «Аксион»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № ФСР 2007/00454                              |             |
|      | Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗПЦ-3/6-04 «Аксион» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № ФСР 2008/01874                              |             |
| 1.17 | Стетоскоп LD с принадлежностями, вариант исполнения: LD Special (длина трубок 72 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур, РУ № ФСЗ 2008/01941          | 1           |
| 1.18 | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РОН, РЭС, РП и РС, исполнение РП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/11607 | 1           |
| 1.19 | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072                | 1           |
| 1.20 | Тест-полоски LabStrip U11Plus для проведения анализа мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "77 Электроника Кфт.", Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583                            | не более 10 |
| 1.21 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А | ООО "Биосенсор АН", Россия, РУ № ФСР 2008/02809                                | не более 10 |
| 1.22 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «Компания «ЭЛТА», Россия, РУ №ФСР 2009/06498                               | 1           |
| 1.23 | Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 по ППТУ.2955.003ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО «Пневмоприбор», Россия, РУ № ФСР 2010/07081                                | 1           |
| 1.24 | Аптечка первой помощи Анти-СПИД - "ВИТАЛФАРМ" по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ЗАО "Виталфарм", Россия РУ № РЗН 2015/2519                                     | 1           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | «ВИТАЛФАРМ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |   |
| 1.25 | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "Инновация",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2014/2254                                     | 1 |
| 1.26 | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2008/02305                                     | 1 |
| 1.27 | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004, в трех исполнениях: УМСП-01-П, УМСП-01-Пм и в сумке из синтетической ткани                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2014/1928                                      | 1 |
| 1.28 | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 исполнения: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм                                                                   | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2010/07335                                     | 1 |
| 1.29 | Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФГУП "ЦИТО",<br>Россия,<br>РУ № ФСР 2010/07249                                        | 1 |
| 1.30 | Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО "Полимерные изделия", Россия, РУ № ФСР 2010/07935                                 | 1 |
| 1.31 | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-П и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2007/00439                                     | 1 |
| 1.32 | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение: ВТ-02-1-м 2. (модификация 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Научно-Медицинская Фирма МБН", Россия, РУ № ФСР 2011/10954                       | 1 |
| 1.33 | Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО "Биомедилек",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2011/11116                                   | 1 |
| 1.34 | Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-61593132-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "Медтехпром+",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2018/7299                                   | 1 |
| 1.35 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДЦЮ по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДЦЮ-1-02-2                                                                                                                                                               | АО "Елатомский приборный завод",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2009/05373                    | 1 |
| 1.36 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1 |
| 2.   | Кабинет «Лаборатория», в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОБУ-21, ОБУ-22, ОБУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020. вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОБУ-22                                                                                                                                                                                                                         | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096             | 1           |
| 2.2  | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0.1; - КДС-0.2. исполнение КДС-1                                                             | АО "КРОНТ-М", Россия, РУ № ФСР 2009/06144                      | 1           |
| 2.3  | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                 | ООО "Иновация", Россия, РУ № РЗН 2014/2254                     | 1           |
| 2.4  | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДЦО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями. исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДЦО-1-02-2                                                                                                                             | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2009/05373   | 1           |
| 2.5  | Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012. исполнение: Емкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1.5 л - "РЕСПЕКТ" по ТУ 9398-002-13014251-2012                                                                                                                               | ООО "ГК "Респект", Россия, РУ № РЗН 2013/1089                  | 1           |
| 2.6  | Штатив для пробирок универсальный ШПУ-"КРОНТ" по ТУ 9452-037-11769436-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | АО "КРОНТ-М", Россия, РУ № ФСР 2011/10034                      | 1 комплект  |
|      | Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПЛПП по ТУ 9452-156-05519988-2006 в вариантах исполнения: 1. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПЛПП-10; или 2. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПЛПП-20; или 3. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПЛПП-40                                                                                                                                                        | ООО "Полимерные изделия", Россия, РУ № ФСР 2011/11883          |             |
| 2.7  | Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Полимер Технологии Системс, Инк.", США, РУ № РЗН 2015/2693    | 1           |
| 2.8  | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Биокемикал Системз Интернэйшл Срд, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072 | 1           |
| 2.9  | Тест-полоски LabStrip UTIPlus для проведения анализа мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "77 Электроника Кфт.", Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583            | не более 10 |
| 2.10 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018. вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, | ООО "Биосенсор АН", Россия, РУ № ФСР 2008/02809                | не более 10 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уринопан-11А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |            |
| 2.11 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови ЭИ-60 по ТУ 9443-003-42980704-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ООО "Научно-производственное предприятие Кверти-Мед", Россия, РУ № ФСР 2007/00762 | 1          |
| 2.12 | Экспресс-коагулометр КуЛабс Электрометр ("qlabs ElectroMeter"), исполнение: КуЛабс Электрометр ("qlabs ElectroMeter")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Микропоинт Биотехнологиз Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2016/3832                   | 1          |
| 2.13 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-00478939528-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ООО «Компания «ЭЛ-ТА», Россия, РУ № ФСР 2009/06498                                | 1          |
| 2.14 | Система для измерения уровня гемоглобина HemoControl с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "ЕКФ-диагностик ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2008/02911                              | 1          |
| 2.15 | Анализаторы мочи С1-50 Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "Хай Текнолоджи, Инк.", США, РУ № РЗН 2016/3986                                   | 1          |
| 2.16 | Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/06301                | 1 комплект |
| 2.17 | Пробирки вакуумные МиниМед по ТУ 32.50.50-024-29508133-2017, вариант исполнения: 1. Пробирки вакуумные с К2ЭДТА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 2. Пробирки вакуумные с К2ЭДТА и разделительным телом 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 3. Пробирки вакуумные с К3ЭДТА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 4. Пробирки вакуумные с К3ЭДТА и разделительным телом 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 5. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,2% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 6. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,8% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 7. Пробирки вакуумные с лития гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 8. Пробирки вакуумные с натрия гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 9. Пробирки вакуумные без наполнителя 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 10. Пробирки вакуумные с разделительным телом 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 11. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл. 12. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) и разделительным телом 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл | ООО "МиниМед", Россия, РУ № РЗН 2019/8175                                         | 1 комплект |
| 2.18 | Посуда для лабораторных исследований из полимерных материалов вариант исполнения: наконечники универсальные для дозаторов объемом 0,2-5мл, 0,5-10мл, 20мл, 30мл, 200мл, 250мл, 300мл, 1000мл, 5мл, 10мл, россылью и в штативах. Пробирки полимерные лабораторные, в том числе с сепараторами и антикоагуляторами, зондами и транспортными средами. Контейнеры лабораторные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ф.Л. Медикал с.р.л., Италия, РУ № ФСЗ 2011/09735                                  |            |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | для взятия проб. Чашки Петри и кюветы для анализаторов. Коробки, планшеты и слайды лабораторные. Пробирки винтовые, конические и с основанием, объемом 0,5мл, 1,5мл, 2мл, 5мл, 7,5мл, 10мл, 15мл, 50мл. Винтовые крышки с прокладками и без прокладок для пробирок и контейнеров. Петли микробиологические и зонды. Штативы для хранения и замораживания пробирок, криопробирок, объемом 0,2-50мл. Пипетки серологические и для переноса                                      |                                                                                       |   |
| 2.19 | Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Хай Текнолоджи, Инк., США, РУ № ФСЗ 2010/07756                                        | 1 |
| 2.20 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2020/10939                            | 1 |
| 2.21 | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10267           | 1 |
|      | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия, РУ № ФСР 2010/07332                                |   |
| 2.22 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140«ПЮЗИС» 2. ХФ-140-1 «ПЮЗИС» 3. ХФ-140-2 «ПЮЗИС» 4. ХФ-140-3 «ПЮЗИС» 5. ХФ-250-2 «ПЮЗИС» 6. ХФ-250-3 «ПЮЗИС» 7. ХФ-250-4 «ПЮЗИС» 8. ХФ-250-5 «ПЮЗИС» 9. ХФ-400-2 «ПЮЗИС» 10. ХФ-400-3 «ПЮЗИС» 11. ХФ-400-4 «ПЮЗИС» 12. ХФ-400-5 «ПЮЗИС», модель: ХФ-140 "ПЮЗИС"                                                                                                                        | АО "ПЮЗИС", Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                               | 1 |
| 2.23 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1 |
| 3    | <b>Кабинет «Женское здоровье», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |   |
|      | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-К10М по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: «Клер»-К10М-01, производства АО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО ТПФ "Клер", Россия, РУ № ФСР 2008/03499                                           | 1 |
|      | Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 по ТУ 9452-021-07614107-2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия, РУ № ФСР 2010/07065            |   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
|     | Кресло гинекологическое КГ-«МСК» по ТУ 9452-018-52962725-2008, в следующих исполнениях: КГ-«МСК» (МСК-409); или Г-«МСК» (МСК-1409); или Г-«МСК» (МСК-413); или КГ-«МСК» (МСК-410); или КГ-«МСК» (МСК-415); или КГ-«МСК» (МСК-416); или КГ-«МСК» (МСК-3416); или КГ-«МСК» (МСК-417); или КГ-«МСК» (МСК-3417); или КГ-«МСК» (МСК-418); или КГ-«МСК» (МСК-3418); или КГ-«МСК» (МСК-411); или КГ-Г (МСК-414) | ООО "Медстальконструкция", Россия, РУ № ФСР 2008/02743                   |   |
|     | Кресло гинекологическое КГ- «Ока-Медик» по ТУ 9452-011-70373441-2008, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО "Производственное предприятие Ока-Медик", Россия, РУ № ФСР2009/04054 |   |
|     | Кресло гинекологическое универсальное КГУ-01 VI.ANA по ТУ 9452-002-91587838-2013 с принадлежностями в вариантах исполнения: КГУ-01.1 VI.ANA, или КГУ-01.2 VI.ANA, или КГУ-01.3 VI.ANA                                                                                                                                                                                                                    | ООО «Горское», Россия, РУ № РЗН 2015/2876                                |   |
| 3.2 | Колпоскоп КС-01 по ТУ 9442-001-52132018-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ООО "Здоровый Мир", Россия, РУ № РЗН 2013/733                            | 1 |
| 3.3 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОБУ-21, ОБУ-22, ОБУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОБУ-22                                                                                                                                                                                      | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                       | 1 |
| 3.4 | Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045- 44942795-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ООО "Полимерные изделия", Россия, РУ ФСР 2010/07047                      | 1 |
| 3.5 | Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", Россия, РУ ФСР 2007/00767 | 1 |
| 3.6 | Прибор ультразвуковой диагностический с принадлежностями, варианты исполнения: DUS 3, DUS 6, DUS 8, DUS 60, U50, исполнение: DUS 60                                                                                                                                                                                                                                                                      | "Элан Инструментс, Инк.", Китай, РУ ФСЗ 2011/10381                       | 1 |
| 3.7 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2                                                                                          | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2009/05373             | 1 |
| 3.8 | Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Емкость-контейнер для сбора                                                                                                                                                                                                                   | ООО "ГК "Респект", Россия, РУ № РЗН 2013/1089                            | 1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л - "ПЕРСПЕКТ" по ТУ 9398-002-13014251-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                |
| 3.9  | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "Инновация", Россия, РУ № РЗН 2014/2254                                           | 1              |
| 3.10 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1              |
| 4.   | <b>Специальное оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                |
| 4.1  | Автомобиль-фургон ИАЦ-В-1767KD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 1              |
| 4.2  | Отопитель воздушный PLANAR-44D-12-GP-S-3925 по ТУ 4591-008-40991176-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Адверс», Россия                                                                  | 1              |
| 4.3  | Установка на крышная вентиляционная мод. 01-9010-12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО «Нижегородский Завод Автокомпонентов», Россия                                     | 1              |
| 4.4  | Установка для кондиционирования воздуха "сплит-системы", внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD., Китай                                 | 1              |
| 4.5  | Электрогенераторная установка с маркировкой "ELEMAX", модели: SH6500EX-R, SH11000-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD", Япония                                                  | 1              |
| 4.6  | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. "Noirot", модель Spot E-5 Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Noirot S.A.S.", Франция                                                              | не более 8     |
| 4.7  | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. "Ballu", модель BHC-1.08-T03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО "Ижевский завод тепловой техники", Россия                                         | не более 8 шт. |
| 4.8  | Прибор приемно-контрольный охранной, модель Кварц вариант 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО НПО "Сибирский Арсенал", Россия                                                   | 1              |
| 4.9  | Многофункциональный автономный преобразователь энергии MAH SINE, модель PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "МикроАрт", Россия                                                                | 1              |
| 4.10 | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО "ВАНВЕНТ ПК", Россия                                                              | 1              |
| 4.11 | Генератор дизельный RedVerг RID-D5000EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REDVERG, Китай                                                                        | 1              |
| 5.   | <b>Встраиваемая мебель:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                |
| 5.1  | Шкаф стеллаж, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 3              |
| 5.2  | Шкаф для одежды, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 1              |
| 5.3  | Кухонка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 1              |
| 5.4  | Кресло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО «Интеравтоцентр»,                                                                 | 2              |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                     | Россия                                                                           |                       |
| 5.5 | Кресло поворотное                                                                                                                                                                                                   | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                     | 2                     |
| 5.6 | Мойка                                                                                                                                                                                                               | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                     | 1                     |
| 5.7 | Столики процедурные передвижные, модель СП-и-01-МСК(501)                                                                                                                                                            | ООО «Медстальконструкции», Россия                                                | 1 (при необходимости) |
| 6.  | <b>Эксплуатационная документация</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                       |
| 6.1 | Руководство по эксплуатации КМП-И982.00.020 РЭ                                                                                                                                                                      | -                                                                                | 1                     |
| II  | <b>«Диспансеризация» №2, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD, в составе:</b>                                                                                                                              |                                                                                  |                       |
| I.  | <b>Кабинет «Диагностика», в составе:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                       |
| 1.1 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                               | 1                     |
| 1.2 | Набор изделий для врача общей практики ИВОП-01- "МЕДИПЛАТ-М" в сумке универсальной СМУ-03 по ТУ 32.50.13-012-18585567-2005                                                                                          | ООО "МЕДПЛАТ", Россия, РУ № ФСР 2010/08890                                       | 1                     |
| 1.3 | Изделия для фиксации емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013, вариант исполнения: Штатив разборный для вливаний ПР-"Медплант".                                  | ООО "МЕДПЛАТ", Россия, РУ № РЗН 2014/1603                                        | 1                     |
| 1.4 | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д» по ТУ 9441-004-24149103-2003                                                                                                                                | ООО "НПП "Монитор" Россия, РУ № ФСР 2012/13811                                   | 1                     |
| 1.5 | Устройство для определения объема легких Spirotest с принадлежностями,                                                                                                                                              | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/08455                             | 1                     |
| 1.6 | Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания «Прессотахоспирограф ПТС-14П-01» по ТУ 9441-001-82193046-2007                                                                                           | ООО "Лапамедика", Россия, РУ № ФСР 2008/02820                                    | 1                     |
| 1.7 | Пульсоксиметр медицинский «Armed», вариант исполнения: УХ300                                                                                                                                                        | "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Салпай Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461  | 1                     |
|     | Пульсоксиметр напалеchnый серии MD300C, с принадлежностями, исполнение MD300C12.;                                                                                                                                   | "Бейджинг Чойс Электроникс Технолоджи Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2009/03850       |                       |
|     | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1" с принадлежностями по ТУ 26.60.12-011-18585567-2004,                                                                                                   | ООО "МЕДПЛАТ", Россия, РУ № РЗН 2013/1343;                                       |                       |
|     | Пульсоксиметр РМ-60 с принадлежностями                                                                                                                                                                              | "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2008/02505 |                       |
|     | Пульсоксиметр портативный ПП-01 по ТУ 26.60.12-247-49640047-2018 с принадлежностями                                                                                                                                 | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № РЗН 2020/11229                                |                       |
| 1.8 | Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU)                                                                                                                                                  | ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № ФСЗ 2009/05423                             | 1                     |
| 1.9 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭП-                                                                                                                                                                        | ОАО "Тулиновский                                                                 | 1                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | 150. ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения ВМЭН-150-50/100-А                                                                                                                                                                                                                                            | приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/09964                            |          |
|      | Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" по ТУ 4274-017-27450820-2008, вариант исполнения ВЭМ-150-А1 без стойки с одним интервалом взвешивания                                                                                                                                                                        | АО «МАССА-К», Россия, РУ № ФСР 2008/02905                                                |          |
| 1.10 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01- "Малыш" по ТУ 4274-02100226454-2002                                                                                                                                                                                                          | ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/11958           | 1        |
| 1.11 | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M2 Basic (HEM-7121-A1.RU),или M2 Basic (HEM-7121-RU),или M2 Basic (HEM-7121-ARU),или M2 Classic (HEM-7122-A1.RU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-A1.RU), или M3 Family (HEM-7133-A1.RU), с принадлежностями | ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № РЗН 2015/3210                                      | 1        |
|      | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M6 (HEM-7322-A1.RU), или M2 Eco (ARU), или M2 Plus (ARU), или 737 (HEM-8713-CM), или M2 Eco (RU)                                                                                                                                                    | ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № РЗН 2016/4995                                      |          |
|      | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD с принадлежностями варианты исполнения: LD2, или LD3, или LD3a, или LD4, или LD5, или LD5a, или LD8                                                                                                                                                | "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур, Дальнее зарубежье, РУ № ФСЗ 2012/11647 |          |
| 1.12 | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFIB, (M110), производства                                                                                                                                                                                                                   | Метракс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/10093                                              | 1        |
|      | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, варианты исполнения: 1. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01; или 2. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02.; или 3. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05,                                                                | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № РЗН 2017/5391                                         |          |
|      | Монитор-дефибриллятор Benel heart с принадлежностями, варианты исполнения: BenelHeart D3, или BenelHeart D6                                                                                                                                                                                                                 | "Шэньжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР РУ № ФСЗ 2011/10043           |          |
|      | Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Филипс Медикал Системс", США, РУ № ФСЗ 2008/02312                                       |          |
|      | Дефибриллятор ZOLL, модель AED Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZOLL Medical Corporation, США, РУ № РЗН 2014/1903                                        |          |
| 1.13 | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: buck, C-128 Гц                                                                                                                                                                          | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/08456                                     | 1        |
| 1.14 | Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп ri-derma                                                                                                                                                                                                                            | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03906                                     | 1        |
| 1.15 | Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели ren-score, ri-score L                                                                                                                                                                                                     | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03905                                     | 1 компл. |
| 1.16 | Электрокардиограф 3-6-12 каналный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д" по ТУ 2660-005-24149103-2018, вариант исполнения ЭК12Т-01-"Р-Д"/63, МТИ.30.00.000                                                                                                                                     | ООО "ГППП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2012/14015                                         | 1        |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-«Р-Д» по ТУ 9441-006-24149103-2010 (ЭКЗТ-01-«Р-Д»/1, МТИ.34.00.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ООО "НПП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2010/08437                                |             |
|      | Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Фукуда Дэнси Ко., Лтд.", Япония РУ № РЗН 2016/4703                            |             |
|      | Электрокардиограф одно/трехканальный ЭКИТ-1/3-07 «Аксон»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ООО Концерн "Аксон", Россия, РУ № ФСР 2007/00454                               |             |
|      | Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗПЦ-3/6-04 «Аксон» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО Концерн "Аксон", Россия, РУ № ФСР 2008/01874                               |             |
| 1.17 | Стетоскоп LD с принадлежностями, вариант исполнения: LD Special (длина трубок 72 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур, РУ № ФСЗ 2008/01941          | 1           |
| 1.18 | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/11607 | 1           |
| 1.19 | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072                | 1           |
| 1.20 | Тест-полоски LabStrip UTIPlus для проведения анализа мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "77 Электроника Кфг.", Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583                            | не более 10 |
| 1.21 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ПА | ООО "Биосенсор АН", Россия, РУ № ФСР 2008/02809                                | не более 10 |
| 1.22 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО «Компания «ЭЛТА», Россия, РУ №ФСР 2009/06498                               | 1           |
| 1.23 | Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 по ППТУ.2955.003ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО «Пневмоприбор», Россия, РУ № ФСР 2010/07081                                | 1           |
| 1.24 | Аптечка первой помощи Анти-СПИД - «ВИТАЛФАРМ» по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1 - «ВИТАЛФАРМ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ЗАО "Вигалфарм", Россия РУ № РЗН 2015/2519                                     | 1           |
| 1.25 | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО "Инновация", Россия, РУ № РЗН 2014/2254                                    | 1           |
| 1.26 | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Медит-М" по ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР                                               | 1           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | 9398-006-18585567-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2008/02305                                                                            |   |
| 1.27 | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ИРСИ-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004, в трех исполнениях: УМСИ-01-П, УМСИ-01-Пм и в сумке из синтетической ткани                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № РЗН 2014/1928                                            | 1 |
| 1.28 | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСИ-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСИ-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСИ-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСИ-01-С; в металлическом футляре УМСИ-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСИ-01-Пм                                                                   | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР 2010/07335                                           | 1 |
| 1.29 | Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФГУП "ЦИТО", Россия, РУ № ФСР 2010/07249                                              | 1 |
| 1.30 | Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО "Полимерные изделия", Россия, РУ № ФСР 2010/07935                                 | 1 |
| 1.31 | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-П и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-П по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР 2007/00439                                           | 1 |
| 1.32 | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение: ВТ-02-1-м 2, (модификация 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Научно-Медицинская Фирма МБН", Россия, РУ № ФСР 2011/10954                       | 1 |
| 1.33 | Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО "Биомедилен", Россия, РУ № ФСР 2011/11116                                         | 1 |
| 1.34 | Кресло Баранн по ТУ 32.50.50-001-61593132-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "Медтехпром+", Россия, РУ № РЗН 2018/7299                                         | 1 |
| 1.35 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДЦЮ по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДЦЮ-1-02-2                                                                                                                                                               | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2009/05373                          | 1 |
| 1.36 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1 |
| 2.   | <b>Кабинет «Лаборатория», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |   |
| 2.1  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОБУ-21, ОБУ-22, ОБУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОБУ-22                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                                    | 1 |
| 2.2  | Контейнеры полимерные с перфорированным дном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | АО "КРОНТ-М", Россия, РУ № ФСР 2009/06144                                             | 1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | 009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - К/ДС-1; - К/ДС-3; - К/ДС-5; - К/ДС-6; - К/ДС-6Л-1К; - К/ДС-6Л-2К; - К/ДС-10; - К/ДС-11; - К/ДС-20; - К/ДС-30; - К/ДС-35; - К/ДС-0.1; - К/ДС-0.2, исполнение К/ДС-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                |
| 2.3  | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ООО "Инновация",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2014/2254                                               | 1              |
| 2.4  | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДЦО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДЦО-1-02-2                                                                                                                                                                                                                                                        | АО "Елатомский<br>приборный завод",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2009/05373                           | 1              |
| 2.5  | Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Емкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л -"РЕСПЕКТ" по ТУ 9398-002-13014251-2012                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО "ГК "Респект",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2013/1089                                             | 1              |
| 2.6  | Штатив для пробирок универсальный ШПУ-"КРОНТ" по ТУ 9452-037-11769436-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | АО "КРОНТ-М",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2011/10034                                                 | 1<br>комплект  |
|      | Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛШШ по ТУ 9452-156-05519988-2006 в вариантах исполнения: 1. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛШШ-10; или 2. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛШШ-20; или 3. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛШШ-40                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "Полимерные<br>изделия", Россия, РУ<br>№ ФСР 2011/11883                                     |                |
| 2.7  | Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "Полимер<br>Технологии Системс,<br>Инк.", США,<br>РУ № РЗН 2015/2693                            | 1              |
| 2.8  | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Биоксикал Системз<br>Интернэйшнл Срд,<br>Италия, РУ № ФСЗ<br>2011/10072                         | 1              |
| 2.9  | Тест-полоски LabStrip UT1Plus для проведения анализа мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "77 Электроника<br>Кфт.", Венгрия, РУ №<br>ФСЗ 2010/07583                                       | не более<br>10 |
| 2.10 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуквантитативного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуквантитативного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А | ООО "Биосенсор АН",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2008/02809                                           | не более<br>10 |
| 2.11 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови ОЦ-60 по ТУ 9443-003-42980704-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Научно-<br>производственное<br>предприятие Квирти-<br>Мед", Россия, РУ №<br>ФСР 2007/00762 | 1              |
| 2.12 | Экспресс-коагулометр КуЛабс Электромметр ("ql.labs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Микропоинт                                                                                     | 1              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|      | ElectroMeter"), исполнение: Кулабе Электрометр ("qlabs ElectroMeter")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Биотекнолоджиз Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2016/3832               |            |
| 2.13 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полосковой электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-00478939528-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО «Компания «ЭЛ-ТА», Россия, РУ № ФСР 2009/06498                 | 1          |
| 2.14 | Система для измерения уровня гемоглобина HemoControl с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "ЕКФ-диагностик ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2008/02911               | 1          |
| 2.15 | Анализаторы мочи CL-50 Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Хай Текнолоджи, Инк.", США, РУ № РЗН 2016/3986                    | 1          |
| 2.16 | Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/06301 | 1 комплект |
| 2.17 | Пробирки вакуумные МиниМед по ТУ 32.50.50-024-29508133-2017, вариант исполнения: 1. Пробирки вакуумные с КЭД/ГЛА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 2. Пробирки вакуумные с КЭД/ГЛА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 3. Пробирки вакуумные с КЭД/ГЛА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 4. Пробирки вакуумные с КЭД/ГЛА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 5. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,2% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 6. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,8% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 7. Пробирки вакуумные с лития гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 8. Пробирки вакуумные с натрия гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 9. Пробирки вакуумные без наполнителя 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 10. Пробирки вакуумные с разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 11. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл. 12. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) и разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл | ООО "МиниМед", Россия, РУ № РЗН 2019/8175                          | 1 комплект |
| 2.18 | Посуда для лабораторных исследований из полимерных материалов вариант исполнения: накопечники универсальные для дозаторов объемом 0,2-5мл, 0,5-10мл, 20мл, 30мл, 200мл, 250мл, 300мл, 1000мл, 5мл, 10мл, россыпью и в штативах. Пробирки полимерные лабораторные, в том числе с сепараторами и антикоагуляторами, зондами и транспортными средами. Контейнеры лабораторные для взятия проб. Чашки Петри и кюветы для анализаторов, Коробки, планшеты и слайды лабораторные. Пробирки винтовые, конические и с основанием, объемом 0,5мл, 1,5мл, 2мл, 5мл, 7,5мл, 10мл, 15мл, 50мл. Винтовые крышки с прокладками и без прокладок для пробирок и контейнеров. Петли микробиологические и зонды. Штативы для хранения и замораживания пробирок, криопробирок, объемом 0,2-50мл. Пипетки серологические и для переноса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ф.И. Медикал с.р.л., Италия, РУ № ФСЗ 2011/09735                   |            |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.19 | Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Хай Текнолоджи, Инк., США, РУ № ФСЗ 2010/07756                                        | 1              |
| 2.20 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2020/10939                            | 1              |
| 2.21 | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10267           | 1              |
|      | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия, РУ № ФСР 2010/07332                                |                |
| 2.22 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140 «ПЮЗИС» 2. ХФ-140-1 «ПЮЗИС» 3. ХФ-140-2 «ПЮЗИС» 4. ХФ-140-3 «ПЮЗИС» 5. ХФ-250-2 «ПЮЗИС» 6. ХФ-250-3 «ПЮЗИС» 7. ХФ-250-4 «ПЮЗИС» 8. ХФ-250-5 «ПЮЗИС» 9. ХФ-400-2 «ПЮЗИС» 10. ХФ-400-3 «ПЮЗИС» 11. ХФ-400-4 «ПЮЗИС» 12. ХФ-400-5 «ПЮЗИС», модель: ХФ-140 "ПЮЗИС"                                                                                                                       | АО "ПОЗИС", Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                               | 1              |
| 2.23 | Стулья медицинские марки "KM-Magma" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1              |
| 3.   | <b>Специальное оборудование:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                |
| 3.1  | Автомобиль-фургон ИАЦ-В-1767KD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 1              |
| 3.2  | Отопитель воздушный PLANAR-44D-12-GP-S-3925 по ТУ 4591-008-40991176-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Адверс», Россия                                                                  | 1              |
| 3.3  | Установка накрышная вентиляционная мод. 01-9010-12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО «Нижегородский Завод Автокомпонентов», Россия                                     | 1              |
| 3.4  | Установка для кондиционирования воздуха "сплит-системы", внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD., Китай                                 | 1              |
| 3.5  | Электрогенераторная установка с маркировкой "ELEMEX", модели: SH16500EX-R, SH11000-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD", Япония                                                  | 1              |
| 3.6  | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. "Noirot", модель Spot E-5 Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Noirot S.A.S.", Франция                                                              | не более 8     |
| 3.7  | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. "Ballu", модель ВНС-LO8-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Ижевский завод тепловой техники", Россия                                         | не более 8 шт. |
| 3.8  | Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО НПО "Сибирский Арсенал", Россия                                                   | 1              |
| 3.9  | Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАИ SINE, модель PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "МикроАрт", Россия                                                                | 1              |
| 3.10 | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО "ВАНВЕНТ"                                                                         | 1              |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК", Россия                                                  |   |
| 3.11 | Генератор дизельный RedVerg RD-D5000EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REDVERG, Китай                                               | 1 |
| 4.   | <b>Встраиваемая мебель:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |   |
| 4.1  | Шкаф стеллаж, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                 | 3 |
| 4.2  | Шкаф для одежды, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                 | 1 |
| 4.3  | Мойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                 | 1 |
| 4.4  | Кушетка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                 | 1 |
| 4.5  | Кресло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                 | 2 |
| 4.6  | Кресло поворотное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                 | 2 |
| 4.7  | Столики процедурные передвижные, модель СП-п-01-МСК(501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО «Медстальконструкция», Россия                            | 1 |
| 5.   | <b>Эксплуатационная документация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |   |
| 5.1  | Руководство по эксплуатации КМП-И982.00.020 РЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                            | 1 |
| III. | <b>Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-1767М9 (тип А, тип А6), в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |   |
| 1.   | <b>Кабинет «Лаборатория», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |   |
| 1.1  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                             | ООО «РЭМО-Технологии», Россия, РУ № РЗН 2023/20096           | 1 |
| 1.2  | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0.1; - КДС-0.2, исполнение КДС-1 | АО «КРОНТ-М», Россия, РУ № ФСР 2009/06144                    | 1 |
| 1.3  | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                     | ООО «Инновация», Россия, РУ № РЗН 2014/2254                  | 1 |
| 1.4  | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2                                                                 | АО «Елатомский приборный завод», Россия, РУ № ФСР 2009/05373 | 1 |
| 1.5  | Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Емкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012                                                                   | ООО «ГК «Респект», Россия, РУ № РЗН 2013/1089                | 1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.6  | Штатив для пробирок универсальный ППУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | АО «КРОНТ-М», Россия, РУ № ФСР 2011/10034                                         | 1 комплект  |
|      | Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПППП по ТУ 9452-156-05519988-2006 в вариантах исполнения: 1. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПППП-10; или 2. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШППП-20; или 3. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШППП-40                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ № ФСР 2011/11883                             |             |
| 1.7  | Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | «Полимер Технолоджи Системс, Инк.», США, РУ № РЗН 2015/2693                       | 1           |
| 1.8  | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072                   | 1           |
| 1.9  | Тест-полоски LabStrip U11Plus для проведения анализа мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | «77 Электроника Кфт.», Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583                               | не более 10 |
| 1.10 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А | ООО «Биосенсор АН», Россия, РУ № ФСР 2008/02809                                   | не более 10 |
| 1.11 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови ДЦ-60 по ТУ 9443-003-42980704-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Научно-производственное предприятие Кверти-Мед», Россия, РУ № ФСР 2007/00762 | 1           |
| 1.12 | Экспресс-коагулометр КуЛабс Электрометр («qLabs ElectroMeter»), исполнение: КуЛабс Электрометр («qLabs ElectroMeter»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «Микроингит Биотехнолоджиз Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2016/3832                  | 1           |
| 1.13 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-00478939528-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО «Компания «ЭЛ-ТА», Россия, РУ № ФСР 2009/06498                                | 1           |
| 1.14 | Система для измерения уровня гемоглобина HemoControl с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «ГКФ-диагностик ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2008/02911                              | 1           |
| 1.15 | Анализаторы мочи CL-50 Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | «Хай Технолоджи, Инк.», США, РУ № РЗН 2016/3986                                   | 1           |
| 1.16 | Пробирки для взятия крови «Проба», вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | «Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2010/06301                | 1 комплект  |
| 1.17 | Пробирки вакуумные МиниМед по ТУ 32.50.50-024-29508133-2017, вариант исполнения: 1. Пробирки вакуумные с КЭД/ТА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 2. Пробирки вакуумные с КЭД/ТА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО «МиниМед», Россия, РУ № РЗН 2019/8175                                         | 1 комплект  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 3.Пробирки вакуумные с КЭД(ГА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 4. Пробирки вакуумные с КЭД(ГА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 5.Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,2% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 6. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,8% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 7. Пробирки вакуумные с лития гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 8. Пробирки вакуумные с натрия гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 9.Пробирки вакуумные без наполнителя 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 10.Пробирки вакуумные с разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 11. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл. 12. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) и разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл |                                                                             |            |
| 1.18 | Посуда для лабораторных исследований из полимерных материалов вариант исполнения: наконечники универсальные для дозаторов объемом 0,2-5мкл, 0,5-10мкл, 20мкл, 30мкл, 200мкл, 250мкл, 300мкл, 1000мкл, 5мл, 10мл, россыпью и в штативах. Пробирки полимерные лабораторные, в том числе с сепараторами и антикоагуляторами, зондами и транспортными средами. Контейнеры лабораторные для взятия проб. Чашки Петри и кюветы для анализаторов. Коробки, планшеты и слайды лабораторные. Пробирки винтовые, конические и с основанием, объемом 0,5мл, 1,5мл, 2мл, 5мл, 7,5мл, 10мл, 15мл, 50мл. Винтовые крышки с прокладками и без прокладок для пробирок и контейнеров. Петли микробиологические и зонды. Штативы для хранения и замораживания пробирок, криопробирок, объемом 0,2-50мл. Пипетки серологические и для переноса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ф.Л. Медикал с.р.л., Италия, РУ № ФСЗ 2011/09735                            | 1 комплект |
| 1.19 | Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Хай Текнолоджи, Инк., США, РУ № ФСЗ 2010/07756                              | 1          |
| 1.20 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | «Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2020/10939                  | 1          |
| 1.21 | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | АО «Государственный Рязанский приборный завод», Россия, РУ № ФСР 2011/10267 | 1          |
|      | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОАО «Смоленское СКГБ СПУ», Россия, РУ № ФСР 2010/07332                      |            |
| 1.22 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140 «ПЮЗИС» 2. ХФ-140-1 «ПЮЗИС» 3. ХФ-140-2 «ПЮЗИС» 4. ХФ-140-3 «ПЮЗИС» 5. ХФ-250-2 «ПЮЗИС» 6. ХФ-250-3 «ПЮЗИС» 7. ХФ-250-4 «ПЮЗИС» 8. ХФ-250-5 «ПЮЗИС» 9. ХФ-400-2 «ПЮЗИС» 10. ХФ-400-3 «ПЮЗИС» 11. ХФ-400-4 «ПЮЗИС» 12. ХФ-400-5 «ПЮЗИС», модель: ХФ-140 «ПЮЗИС»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | АО «ПЮЗИС», Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                     | 1          |
| 1.23 | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО научно-                                                                 | 1          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | 008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа. исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 |                |
| <b>2.</b> | <b>Специальное оборудование:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                |
| 2.1       | Автомобиль фургон ИАЦ-1767М9 (тип А, тип А6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                               | 1              |
| 2.2       | Отопитель воздушный PLANAR-44D-12-GP-S-3925 по ТУ 4591-008-40991176-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО «Адверс», Россия                                                       | 1              |
| 2.3       | Установка на крышная вентиляционная мод. 01-9010-12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО «Нижегородский Завод Автокомпонентов», Россия                          | 1              |
| 2.4       | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD., Китай                      | 1              |
| 2.5       | Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMAX», модели: SH6500EX-R, SH11000-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония                                       | 1              |
| 2.6       | Обогреватель электрический бытового конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot E-5 Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «Noirot S.A.S.», Франция                                                   | не более 8     |
| 2.7       | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. «Ballu», модель ВПС-1.08-Т03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия                              | не более 8 шт. |
| 2.8       | Прибор приемно-контрольный охранной, модель Кварц вариант 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО ППО «Сибирский Арсенал», Россия                                        | 1              |
| 2.9       | Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАП SINE, модель PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО «МикроАрт», Россия                                                     | 1              |
| 2.10      | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО «ВАНВЕНТ ПК», Россия                                                   | 1              |
| 2.11      | Генератор дизельный RedVerg RD-ID5000EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REDVERG, Китай                                                             | 1              |
| <b>3.</b> | <b>Встраиваемая мебель:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                |
| 3.1       | Шкаф стеллаж, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                               | не более 3     |
| 3.2       | Мойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                               | 1              |
| 3.3       | Столики процедурные передвижные, модель СИ-п-01-МСК(501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО «Медстальконструкция», Россия                                          | 1              |
| <b>4.</b> | <b>Эксплуатационная документация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                |
| 4.1       | Руководство по эксплуатации КМ11-И982.00.020 РЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                          | 1              |
| <b>IV</b> | <b>«Профосмотр» исполнение №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD, в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                |
| <b>1.</b> | <b>Кабинет «Лаборатория», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                |
| 1.1       | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                                                                            | ООО «РЭМО-Технологии», Россия, РУ № РЗН 2023/20096                         | 1              |
| 1.2       | Контейнеры полимерные с перфорированным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | АО «КРОИТ-М»,                                                              | 1              |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|      | поддон и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-1                                                                                                                                                                                                                                  | Россия, РУ № ФСР 2009/06144                                     |             |
| 1.3  | Ёмкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ООО «Инновация», Россия, РУ № РЗН 2014/2254                     | 1           |
| 1.4  | Ёмкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДЦЮ по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Ёмкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДЦЮ-1-02-2                                                                                                                                                                                                                                                        | АО «Елатомский приборный завод», Россия, РУ № ФСР 2009/05373    | 1           |
| 1.5  | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012                                                                                                                                                                                                                                                          | ООО «ГК «Респект», Россия, РУ № РЗН 2013/1089                   | 1           |
| 1.6  | Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | АО «КРОНТ-М», Россия, РУ № ФСР 2011/10034                       | 1 комплект  |
|      | Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП по ТУ 9452-156-05519988-2006 в вариантах исполнения: 1. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-10; или 2. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-20; или 3. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-40                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ № ФСР 2011/11883           |             |
| 1.7  | Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | «Полимер Технологии Системс, Инк.», США, РУ № РЗН 2015/2693     | 1           |
| 1.8  | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Биокемикал Системз Интернэйшнл Срд, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072 | 1           |
| 1.9  | Тест-полоски LabStrip U11Plus для проведения анализа мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | «77 Электроника Кфт.», Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583             | не более 10 |
| 1.10 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уринолиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уринолиан-11А | ООО «Биосенсор АН», Россия, РУ № ФСР 2008/02809                 | не более 10 |
| 1.11 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови СИ-60 по ТУ 9443-003-42980704-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Научно-производственное предприятие Кверти-                | 1           |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Мед», Россия, РУ №<br>ФСР 2007/00762                               |            |
| 1.12 | Экспресс-коагулометр КуЛабс Электрометр («ql.labs ElectroMeter»), исполнение: КуЛабс Электрометр («ql.labs ElectroMeter»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | «Микропоинт Биотехнологиз Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2016/3832    | 1          |
| 1.13 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИИИ» по ТУ 9443-00478939528-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ООО «Компания «ЭЛ-ТА», Россия, РУ № ФСР 2009/06498                 | 1          |
| 1.14 | Система для измерения уровня гемоглобина HemoControl с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «ЕКФ-диагностик ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2008/02911               | 1          |
| 1.15 | Анализаторы мочи CI-50 Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «Хай Текнолоджи, Инк.», США, РУ № РЗН 2016/3986                    | 1          |
| 1.16 | Пробирки для взятия крови «Проба», вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | «Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2010/06301 | 1 комплект |
| 1.17 | Пробирки вакуумные МиниМед по ТУ 32.50.50-024-29508133-2017, вариант исполнения: 1. Пробирки вакуумные с КЭДТА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 2. Пробирки вакуумные с КЭДТА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 3. Пробирки вакуумные с КЭДТА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 4. Пробирки вакуумные с КЭДТА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 5. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3.2% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 6. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3.8% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 7. Пробирки вакуумные с лития гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 8. Пробирки вакуумные с натрия гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 9. Пробирки вакуумные без наполнителя 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 10. Пробирки вакуумные с разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 11. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл. 12. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) и разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл | ООО «МиниМед», Россия, РУ № РЗН 2019/8175                          | 1 комплект |
| 1.18 | Посуда для лабораторных исследований из полимерных материалов вариант исполнения: наконечники универсальные для дозаторов объемом 0,2-5мл, 0,5-10мл, 20мл, 30мл, 200мл, 250мл, 300мл, 1000мл. 5мл, 10мл, россыпью и в штативах. Пробирки полимерные лабораторные, в том числе с сенсаторами и антикоагуляторами, зондами и транспортными средами. Контейнеры лабораторные для взятия проб. Чашки Петри и кюветы для анализаторов. Коробки, планшеты и слайды лабораторные. Пробирки винтовые, конические и с основанием, объемом 0,5мл, 1,5мл, 2мл, 5мл, 7,5мл, 10мл, 15мл, 50мл. Винтовые крышки с прокладками и без прокладок для пробирок и контейнеров. Петли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ф.Л. Медикал с.р.л., Италия, РУ № ФСЗ 2011/09735                   | 1 комплект |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | микробиологические и зонды. Штативы для хранения и замораживания пробирок, криопробирок, объемом 0,2-50мл. Пипетки серологические и для переноса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |   |
| 1.19 | Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Хай Текнолоджи, Инк., США, РУ № ФСЗ 2010/07756                                        | 1 |
| 1.20 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Агмед»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | «Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2020/10939                            | 1 |
| 1.21 | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-11-157390-2011, модель: ГП-10 МО, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | АО «Государственный Рязанский приборный завод», Россия, РУ № ФСР 2011/10267           | 1 |
|      | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия, РУ № ФСР 2010/07332                                |   |
| 1.22 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140«ПЮЗИС» 2. ХФ-140-1 «ПЮЗИС» 3. ХФ-140-2 «ПЮЗИС» 4. ХФ-140-3 «ПЮЗИС» 5. ХФ-250-2 «ПЮЗИС» 6. ХФ-250-3 «ПЮЗИС» 7. ХФ-250-4 «ПЮЗИС» 8. ХФ-250-5 «ПЮЗИС» 9. ХФ-400-2 «ПЮЗИС» 10. ХФ-400-3 «ПЮЗИС» 11. ХФ-400-4 «ПЮЗИС» 12. ХФ-400-5 «ПЮЗИС», модель: ХФ-140 «ПЮЗИС»                                                                                                                        | АО «ПЮЗИС», Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                               | 1 |
| 1.23 | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1 |
| 2.   | <b>Кабинет «Стоматология», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |   |
| 2.1  | Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов «Ультразет» по ТУ 9451-008-56755207-2009, варианты исполнения: - «Ультразет» УВ-1 (объем ванны 150 мл); - «Ультразет-ФСМ» УВ-2 (объем ванны 1500 мл); - «Ультразет-М» УВ-3 (объем ванны 1600 мл); - «Ультразет-Т» УВ-4 (объем ванны 3200 мл, с нагревом), исполнение: «Ультразет-М» УВ-3 (объем ванны 1600 мл)                                  | ЗАО «Г'еософт Дент», Россия, РУ № ФСР 2007/00048                                      | 1 |
| 2.2  | Автоклав серии «ВТ» в следующих исполнениях: ВТД23Л-А, ВТС23Л-А, ВТД18Л-А, ВТС18Л-А, ВТД17Л-А, ВТС17Л-А, ВТД16Л-А, ВТС16Л-А, ВТД12Л-А, ВТС12Л-А, ВТД8Л-А, ВТС8Л-А с принадлежностями, исполнение ВТД17Л-А                                                                                                                                                                                                                                                                     | «Пи энд Ти (Нинбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2009/04596            | 1 |
| 2.3  | Аппарат светодиодный АФС с принадлежностями по ТУ 9444-005-17515211-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Полироник», Россия, РУ № ФСР 2011/10669                                          | 1 |
| 2.4  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-03-«Я»-ФП по ТУ 9452-003-55307168-2004, варианты исполнения: КБ-03-«Я»-ФП; КБ-03-«Я»-ФП                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО «Ферропласт Медикал», Россия, № РУ ФСР 2009/06570                                 | 1 |
| 2.5  | Определитель электронный верхушки корня зуба «Аверон» модель 1.0 АВЕКС по ТУ 9452-006-25014322-2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО «ВЕЛ'А-ПРО», Россия, РУ № ФСР 2009/05904                                          | 1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.6  | Электроодонтогигиенизатор состояния пульпы зуба со звуковой и цифровой индикацией ЭОТ-01 «Аверон» по ГУ 9452-017-25014322-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «ВЕГА-ПРО», Россия, РУ № ФСР 2012/13364                                | 1 |
| 2.7  | Утилизатор медицинских игл УМИ-01 по ТУ 9452-001-51715746-2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «Медторг+», Россия, РУ № ФСР 2008/03814                                | 1 |
| 2.8  | Компрессор медицинский DK50, исполнения: DK50 B, DK50 BS, DK50 D, DK50 DM, DK50 I, DK50 II, DK50 C, DK50 P, DK50 K, DK50 Z, DK50 Z/K, DK50 S, DK50 S/K, DK50 DS, DK50 DMS, DK50-10 I, DK50-10 Z, DK50-10 Z/K, DK50-10 S, DK50-10 S/K, DK50-10 Z/M, DK50-10 S/M, DK50 PI.US, DK50 PI.US/K, DK50 PI.US/M, DK50 PI.US S, DK50 PI.US S/K, DK50 PI.US S/M, DK50 2V, DK50 2V/M, DK50 2V/K, DK50 2V/S, DK50 2V/S/K, DK50 2V/S/M, DK50 2V/110, DK50 2V/110/K, DK50 2V/110/M, DK50 2V/110S, DK50 2V/110S/K, DK50 2V/110S/M, DK50 2x2V/110, DK50 2x2V/110/K, DK50 2x2V/110/M, DK50 2x2V/110S, DK50 2x2V/110S/K, DK50 2x2V/110S/M, DK50 4x2V/M, DK50 4x2V, DK50 6x2V, DK50 6x2V/M, DK50 4x2VT/M, DK50 4x2VTD, DK50 6x2VT/M, DK50 9x2VT/M, DK50 12x2VT/M, DK50 15x2VT/M, DK50 4x2VT, DK50 6x2VT, DK50 9x2VT, DK50 12x2VT, DK50 15x2VT, DK50 4V, DK50 4V/M, DK50 4V/110, DK50 4V/110/M, DK50 2x4V/110, DK50 2x4V/110/M, DK50 4x4VT/M, DK50 6x4VT/M, DK50 9x4VT/M, DK50 12x4VT/M, DK50 15x4VT/M, DK50 4x4VT, DK50 6x4VT, DK50 9x4VT, DK50 12x4VT, DK50 15x4VT, исполнение DK50 S | «ЭКОМ спол. С р.о.», Словацкая Республика, РУ № ФСЗ 2008/03234             | 1 |
| 2.9  | Лампа полимеризационная WOODPECKER, исполнения: WOODPECKER LED.B, WOODPECKER LED.C, WOODPECKER LED.D, WOODPECKER LED.I, WOODPECKER LED.M, WOODPECKER LED.G., исполнение WOODPECKER LED.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2009/05324 | 1 |
| 2.10 | Скейлер стоматологический WOODPECKER для снятия зубных отложений, исполнения: WOODPECKER UDS, WOODPECKER DTE., исполнение WOODPECKER UDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2009/05323 | 1 |
| 2.11 | Электрокоагулятор портативный стоматологический Экис-20-1 по ТУ 9444-003-12359918-2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ООО НПО «Рубикон-Инновация», Россия, РУ № ФСР 2008/02240                   | 1 |
| 2.12 | Инструмент медицинский металлический стоматологический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ЗАО «СТРУМ», Республика Беларусь, РУ № РЗН 2018/7276                       | 1 |
| 2.13 | Инструменты стоматологические механизированные серии СХ в отдельных упаковках с принадлежностями: Наконечники стоматологические порошкоструйные для удаления зубного налета: C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, исполнение C102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Фосан Коксо Медикал Инструмент Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2012/13562      | 1 |
| 2.14 | Наконечники турбинные стоматологические НТС-300-05-М4 и НТС-300-05-В2 по ТУ 9452-033-48777198-2004, исполнение НТС-300-05-М4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО «ВХ-Тайфун», Россия, РУ № ФСР 2008/01751                               | 1 |
| 2.15 | Наконечник для микромоторов прямой НУПМ-40-02 по ТУ 9452-084-05519988-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | АО «Казанский медико-инструментальный завод», Россия, РУ № ФСР 2011/10010  | 1 |
| 2.16 | Наконечник для микромоторов угловой НУПМ-40 с поворотной защелкой по ТУ 9452-084-05519988-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | АО «Казанский медико-инструментальный завод», Россия, РУ №                 | 1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФСР 2011/10011                                                                 |   |
| 2.17 | Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклянными шариками СС-01 «ТермоЭст» по ТУ 9451-001-56755207-2005, вариант исполнения «Термоэст» с комплектом шариков (с гласперленовым наполнителем)                                                                                      | АО «Геософт Дент», Россия, РУ № ФСР 2010/08560                                 | 1 |
| 2.18 | Ёмкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Ёмкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2 | АО «Елатомский приборный завод», Россия, РУ № ФСР 2009/05373                   | 1 |
| 2.19 | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-18, по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры, исполнение: КФ-3                                                                                                                                                            | АО «Досчатипский завод медицинского оборудования», Россия, РУ № ФСР 2010/07067 | 1 |
| 2.20 | Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 «Стомэл» по ТУ 9452-003-26502549-00                                                                                                                                                                                                                   | ООО «СТОМЭЛ-К», Россия, РУ № ФСР 2009/05060                                    | 1 |
| 2.21 | Бормашина электрическая универсальная БЭУ-01 по ТУ 9452-002-51715746-2010, исполнение ДП-5                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Медторг+», Россия, РУ № ФСР 2010/08175                                    | 1 |
| 2.22 | Установка стоматологическая «Siger» в следующих исполнениях: S30, S60, S90, U100, U200, U500 с принадлежностями, исполнение U200                                                                                                                                                                                | «Жухай Сайгер Медикал Иквинмент Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2009/04648          | 1 |
|      | Установка стоматологическая STOMADENT HARMONY с принадлежностями, производства                                                                                                                                                                                                                                  | «СТОМАДЕНТ СК с.р.о.», Словакия, РУ № ФСЗ 2008/02141                           |   |
|      | Установка стоматологическая пневматическая «Клер» по ТУ 9452-001-43656656-2005                                                                                                                                                                                                                                  | ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия, РУ № ФСР 2010/09501    |   |
|      | Установки стоматологические Hallim Dentech, модели: Challenge, Eclipse, с принадлежностями, исполнение Eclipse                                                                                                                                                                                                  | «Халлим Ослам Имплант Ко., Лтд», Республика Корея, РУ № РЗН 2016/5163          |   |
|      | Установка стоматологическая в исполнениях: «SL8100», «SL8200», «SL8300», «SL8500», «SL8600», исполнение «SL8100»                                                                                                                                                                                                | «Гуанчжоу Санлайт Медикал Эквипмент Ко., ЛТД», Китай, РУ № РЗН 2016/5045       |   |
|      | Установка стоматологическая, варианты исполнения: AJ11, AJ12, AJ15, AJ16, AJ18, исполнение AJ11                                                                                                                                                                                                                 | «Гуанчжоу Аджакс Медикал Иквинмент Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07225       |   |
| 2.23 | Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов «СПДС» по ТУ 9452-001-75620370-2010, в следующих исполнениях: «СПДС-1-К», «СПДС-2-К», «СПДС-3-К», исполнение: «СПДС-3-К»                                                                                                          | ООО «СПДС», Россия, РУ № ФСР 2010/09347                                        | 1 |
| 2.24 | Аппараты для локализации апикального сужения корневого канала зуба по ТУ 9452-005-56755207-2016, вариант исполнения: «ИндюЭст-3Д»                                                                                                                                                                               | ЗАО «Геософт Дент», Россия, РУ № ФСР 2007/00078                                | 1 |
| 2.25 | Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических наконечников: Assistina 301 Plus, с принадлежностями                                                                                                                                                                                          | «Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ», Австрия, РУ № РЗН                        | 1 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.26 | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СИУ, ГП-20 СИУ по ТУ 9451-013-001-11798-2005, исполнение ГП-20 СИУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017/5826<br>ОАО «Смоленское СКГБ СИУ», Россия, РУ № ФСР 2010/07332                   | 1 |
|      | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-11457390-2011, модель: ГП-20 МО по ТУ 9451-026-11457390-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | АО «Государственный Рязанский приборный завод», Россия, РУ № ФСР 2011/10267           |   |
| 2.27 | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFI-B, (M110), производства Метракс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/10093; или Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, варианты исполнения: 1. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01; или 2. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02.; или 3. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05                                                       | ООО Концерн «Аксион», Россия, РУ № РЗН 2017/5391                                      | 1 |
|      | Монитор-дефибриллятор BeneHeart с принадлежностями, варианты исполнения: BeneHeart D3, или BeneHeart D6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд., КНР, РУ № ФСЗ 2011/10043        |   |
|      | Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | «Филипс Медикал Системс», США, РУ № ФСЗ 2008/02312                                    |   |
|      | Дефибриллятор ZOLL, модель AED Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZOLL Medical Corporation, США, РУ № РЗН 2014/1903                                     |   |
| 2.28 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140«ПОЗИС» 2. ХФ-140-1 «ПОЗИС» 3. ХФ-140-2 «ПОЗИС» 4. ХФ-140-3 «ПОЗИС» 5. ХФ-250-2 «ПОЗИС» 6. ХФ-250-3 «ПОЗИС» 7. ХФ-250-4 «ПОЗИС» 8. ХФ-250-5 «ПОЗИС» 9. ХФ-400-2 «ПОЗИС» 10. ХФ-400-3 «ПОЗИС» 11. ХФ-400-4 «ПОЗИС» 12. ХФ-400-5 «ПОЗИС», модель: ХФ-140 «ПОЗИС»                                                                                                                        | АО «ПОЗИС», Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                               | 1 |
| 2.29 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО «РЭМО-Технологии», Россия, РУ № РЗН 2023/20096                                    | 1 |
| 2.30 | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1 |
| 2.31 | Аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable, модель VEX-P300 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «ВАТЕК Ко., Лтд.», Корея, РУ № РЗН 2020/9794                                          | 1 |
| 2.32 | Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor, варианты исполнения: 1. Аппарат обработки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | «Рэйенс Ко., Лтд.», Корея, РУ № РЗН                                                   | 1 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|      | интраоральных изображений EzSensor Classic, модель IOS-U10IB                                                                                                                                                                              | 2022/17045                                            |                |
|      | Аппарат радиовизиографический EzSensor с принадлежностями, производства «Рэйенс Ко., Лтд.», Корея                                                                                                                                         | «Рэйенс Ко., Лтд.», Корея, РУ № ФСЗ 2011/11400        |                |
| 2.33 | Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фартук защитный стоматологический ФРЗС-«Р-К»      | ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия, РУ № ФСР 2010/08183      | 1              |
| 2.34 | Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К» | ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия, РУ № ФСР 2010/08183      | 1              |
| 3.   | <b>Специальное оборудование:</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                |
| 3.1  | Автомобиль-фургон ИАЦ-В-1767KD                                                                                                                                                                                                            | ООО «Интеравтоцентр», Россия                          | 1              |
| 3.2  | Отопитель воздушный PLANAR-44D-12-GP-S-3925 по ТУ 4591-008-40991176-2005                                                                                                                                                                  | ООО «Адверс», Россия                                  | 1              |
| 3.3  | Установка накрывная вентиляционная мод. 01-9010-12.00                                                                                                                                                                                     | ООО «Нижегородский Завод Автокомпонентов», Россия     | 1              |
| 3.4  | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                                                                                       | MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD., Китай | 1              |
| 3.5  | Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMAX», модели: SH6500EX-R, SH11000-R                                                                                                                                                       | «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония                  | 1              |
| 3.6  | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot F-5 Plus                                                                                                                                               | «Noirot S.A.S.», Франция                              | не более 8     |
| 3.7  | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. «Ballu», модель ВИС-1.08-Т03                                                                                                                 | ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия         | не более 8 шт. |
| 3.8  | Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2                                                                                                                                                                               | ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия                   | 1              |
| 3.9  | Многофункциональный автономный преобразователь энергии MAH SINE, модель PRO                                                                                                                                                               | ООО «МикроАрт», Россия                                | 1              |
| 3.10 | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                                                                                                                   | ООО «ВАНВЕНТ ПК», Россия                              | 1              |
| 3.11 | Генератор дизельный RedVerg RD-DS000EN                                                                                                                                                                                                    | REDVERG, Китай                                        | 1              |
| 4.   | <b>Встраиваемая мебель:</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                |
| 4.1  | Шкаф стеллаж, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                  | ООО «Интеравтоцентр», Россия                          | 3              |
| 4.2  | Шкаф для одежды, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                               | ООО «Интеравтоцентр», Россия                          | 1              |
| 4.3  | Мойка                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «Интеравтоцентр», Россия                          | 1              |
| 4.4  | Кресло                                                                                                                                                                                                                                    | ООО «Интеравтоцентр», Россия                          | не более 2 шт. |
| 4.5  | Кресло поворотное                                                                                                                                                                                                                         | ООО                                                   | не более       |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                                                     | «Интеравтоцентр»,<br>Россия                                                      | 2 шт. |
| 1.6 | Столешница ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                               | ООО<br>«Интеравтоцентр»,<br>Россия                                               | 4     |
| 4.7 | Столики процедурные передвижные, модель СП-п-01-<br>МСК(501)                                                                                                                                                        | ООО<br>«Медстальконструкци<br>я», Россия                                         | 1     |
| 5.  | <b>Эксплуатационная документация</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                  |       |
| 5.1 | Руководство по эксплуатации КМП-И982.00.020 РЭ                                                                                                                                                                      | -                                                                                | 1     |
| V.  | <b>«Профосмотр» исполнение №2, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767КД, в составе:</b>                                                                                                                        |                                                                                  |       |
| I.  | <b>Кабинет «Диагностика», в составе:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                  |       |
| 1.1 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                               | 1     |
| 1.2 | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01- "МЕДИНГТ-М" в сумке универсальной СМУ-03 по ТУ 32.50.13-012-18585567-2005                                                                                           | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР 2010/08890                                      | 1     |
| 1.3 | Подставки для фиксации емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013, вариант исполнения: Подставка разборная для вливаний ШР-"Медплант",                             | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № РЗН 2014/1603                                       | 1     |
| 1.4 | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Ц» по ТУ 9441-004-24149103-2003                                                                                                                                | ООО "НПП "Монитор" Россия, РУ № ФСР 2012/13811                                   | 1     |
| 1.5 | Устройство для определения объема легких Spirotest с принадлежностями.                                                                                                                                              | "Рудольф Ристер ГмБХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/08455                             | 1     |
| 1.6 | Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания «Прессотахоспирограф ПТС-14П-01» по ТУ 9441-001-82193046-2007                                                                                           | ООО "Ланамедика", Россия, РУ № ФСР 2008/02820                                    | 1     |
| 1.7 | Пульсоксиметр медицинский «Armed», вариант исполнения: YX300                                                                                                                                                        | "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461 | 1     |
|     | Пульсоксиметр напалеchnый серии MD300C, с принадлежностями, исполнение MD300C12,;                                                                                                                                   | "Бейджинг Чойс Электроникс Технолоджи Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2009/03850       |       |
|     | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1" с принадлежностями по ТУ 26.60.12-011-18585567-2004,                                                                                                   | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № РЗН 2013/1343;                                      |       |
|     | Пульсоксиметр РМ-60 с принадлежностями                                                                                                                                                                              | "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2008/02505 |       |
|     | Пульсоксиметр портативный ПП-01 по ТУ 26.60.12-247-49640047-2018 с принадлежностями                                                                                                                                 | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № РЗН 2020/11229                                |       |
| 1.8 | Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU)                                                                                                                                                  | ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № ФСЗ 2009/05423                             | 1     |
| 1.9 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005,                                                                                                                             | ОАО "Тулиновский приборостроительный                                             | 1     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | вариант исполнения ВМЭП-150-50/100-А                                                                                                                                                                                                                                                                                    | завод "ТВЕС", Россия,<br>РУ № ФСР 2011/09964                                                |          |
|      | Весы электронные медицинские ВМ-150-"Масса-К" по ТУ 4274-017-27450820-2008, вариант исполнения ВМ-150-А1 без стойки с одним интервалом взвешивания                                                                                                                                                                      | АО «МАССА-К»,<br>Россия,<br>РУ № ФСР 2008/02905                                             |          |
| 1.10 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01- "Малыш" по ТУ 4274-02100226454-2002                                                                                                                                                                                                      | ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия,<br>РУ № ФСР 2011/11958           | 1        |
| 1.11 | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M2 Basic (HEM-7121-ALRU),или M2 Basic (HEM-7121-RU),или M2 Basic (HEM-7121-ARU),или M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), или M3 Family (HEM-7133-ALRU), с принадлежностями | ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № РЗН 2015/3210                                         | 1        |
|      | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M6 (HEM-7322-ALRU), или M2 Eco (ARU), или M2 Plus (ARU), или 737 (HEM-8713-CM), или M2 Eco (RU)                                                                                                                                                 | ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № РЗН 2016/4995                                         |          |
|      | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD с принадлежностями варианты исполнения: LD2, или LD3, или LD3a, или LD4, или LD5, или LD5a, или LD8                                                                                                                                            | "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур, Дальнее зарубежье.<br>РУ № ФСЗ 2012/11647 |          |
| 1.12 | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFI-B, (M110), производства                                                                                                                                                                                                              | Метракс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/10093                                                 | 1        |
|      | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, варианты исполнения: 1. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01; или 2. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02.; или 3. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05.                                                            | ООО Концерн "Аксон", Россия, РУ № РЗН 2017/5391                                             |          |
|      | Монитор-дефибриллятор Benel heart с принадлежностями, варианты исполнения: Benel heart D3, или Benel heart D6                                                                                                                                                                                                           | "Пэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР<br>РУ № ФСЗ 2011/10043          |          |
|      | Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Филипс Медикал Системс", США,<br>РУ № ФСЗ 2008/02312                                       |          |
|      | Дефибриллятор ZOLL, модель AED Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZOLL Medical Corporation, США, РУ № РЗН 2014/1903                                           |          |
| 1.13 | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: buck, C-128 Гц                                                                                                                                                                      | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/08456                                        | 1        |
| 1.14 | Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп ri-derma                                                                                                                                                                                                                        | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03906                                        | 1        |
| 1.15 | Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели pen-score, ri-score L                                                                                                                                                                                                 | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03905                                        | 1 компл. |
| 1.16 | Электрокардиограф 3-6-12 каналный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д" по ТУ 2660-005-24149103-2018, вариант исполнения ЭК12Т-01-"Р-Д"/63, МТЦ.30.00.000                                                                                                                                 | ООО "НПП "Монитор", Россия,<br>РУ № ФСР 2012/14015                                          | 1        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-«Р-Д» по ТУ 9441-006-24149103-2010 (ЭКЗТ-01-«Р-Д»/1, МТЦ.34.00.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ООО "НПП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2010/08437                                |             |
|      | Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Фукуда Дэнси Ко., Лтд.", Япония РУ № РЗН 2016/4703                            |             |
|      | Электрокардиограф одно/трехканальный ЭКИТ-1/3-07 «Аксион»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № ФСР 2007/00454                              |             |
|      | Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «Аксион»с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № ФСР 2008/01874                              |             |
| 1.17 | Стетоскоп LD с принадлежностями, вариант исполнения: LD Special (длина трубок 72 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур, РУ № ФСЗ 2008/01941          | 1           |
| 1.18 | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/11607 | 1           |
| 1.19 | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Биокемикал Системз Интернэйшнл Срд, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072                | 1           |
| 1.20 | Тест-полоски LabStrip U11Plus для проведения анализа мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "77 Электроника Кфт.", Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583                            | не более 10 |
| 1.21 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ПА | ООО "Биосенсор АН", Россия, РУ № ФСР 2008/02809                                | не более 10 |
| 1.22 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО «Компания «ЭЛТА», Россия, РУ №ФСР 2009/06498                               | 1           |
| 1.23 | Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 по ППТД.2955.003ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО «Пневмоприбор», Россия, РУ № ФСР 2010/07081                                | 1           |
| 1.24 | Аптечка первой помощи Анти-СПИД - "ВИТАЛФАРМ" по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип I - «ВИТАЛФАРМ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ЗАО "Виталфарм", Россия РУ № РЗН 2015/2519                                     | 1           |
| 1.25 | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО "Инновация", Россия, РУ № РЗН 2014/2254                                    | 1           |
| 1.26 | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-«Мединт- М» по ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР                                               | 1           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | 9398-006-18585567-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2008/02305                                                                            |   |
| 1.27 | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004, в трех исполнениях: УМСП-01-П, УМСП-01-Пм и в сумке из синтетической ткани                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2014/1928                                      | 1 |
| 1.28 | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм                                                                   | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2010/07335                                     | 1 |
| 1.29 | Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФГУП "ЦИТО",<br>Россия,<br>РУ № ФСР 2010/07249                                        | 1 |
| 1.30 | Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО "Полимерные изделия", Россия, РУ № ФСР 2010/07935                                 | 1 |
| 1.31 | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-П и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ К/Д-МП-В, К/Д-МП-Д, К/Д-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2007/00439                                     | 1 |
| 1.32 | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение: ВТ-02-1-м 2, (модификация 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Научно-Медицинская Фирма МБН", Россия, РУ № ФСР 2011/10954                       | 1 |
| 1.33 | Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО "Биомедилек",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2011/11116                                   | 1 |
| 1.34 | Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-61593132-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "Медтехпром+",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2018/7299                                   | 1 |
| 1.35 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДЦЮ по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДЦЮ-1-02-2                                                                                                                                                               | АО "Елатомский приборный завод",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2009/05373                    | 1 |
| 1.36 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1 |
| 2.   | <b>Кабинет «Стоматологии», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |   |
| 2.1  | Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов "Ультразет" по ТУ 9451-008-56755207-2009, варианты исполнения: - "Ультразет" УВ-1 (объем ванны 150 мл); - "Ультразет-ФСМ" УВ-2 (объем ванны 1500 мл); - "Ультразет-М" УВ-3 (объем ванны 1600 мл); - "Ультразет-Т" УВ-4 (объем ванны 3200 мл, с нагревом), исполнение: "Ультразет-М"                                                             | ЗАО "ГеоСофт Дент",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2007/00048                                 | 1 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.2  | УВ-3 (объем ванны 1600 мл)<br>Автоклав серии "BT" в следующих исполнениях: BTD23L-A, BTS23L-A, BTD18L-A, BTS18L-A, BTD17L-A, BTS17L-A, BTD16L-A, BTS16L-A, BTD12L-A, BTS12L-A, BTD8L-A, BTS8L-A с принадлежностями, исполнение BTD17L-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Ти энд Ти (Нингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2009/04596 | 1 |
| 2.3  | Аппарат светодиодный АФС с принадлежностями по ТУ 9444-005-17515211-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ООО "Полироник", Россия, РУ № ФСР 2011/10669                                | 1 |
| 2.4  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-03-"Я"-ФП по ТУ 9452-003-55307168-2004, варианты исполнения: КБ-03-"Я"-ФП; КБн-03-"Я"-ФП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Ферропласт Медикал", Россия, № РУ ФСР 2009/06570                       | 1 |
| 2.5  | Определитель электронный верхушки корня зуба «Аверон» модель 1.0 АВЕКС по ТУ 9452-006-25014322-2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО "ВЕГА-ПРО", Россия, РУ № ФСР 2009/05904                                 | 1 |
| 2.6  | Электроодонтогистер состояния пульпы зуба со звуковой и цифровой индикацией ЭОТ-01 "Аверон" по ТУ 9452-017-25014322-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ООО "ВЕГА-ПРО", Россия, РУ № ФСР 2012/13364                                 | 1 |
| 2.7  | Утилизатор медицинских игл УМИ-01 по ТУ 9452-001-51715746-2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ООО "Медторг+", Россия, РУ № ФСР 2008/03814                                 | 1 |
| 2.8  | Компрессор медицинский DK50, исполнения: DK50 B, DK50 BS, DK50 D, DK50 DM, DK50 I, DK50 II, DK50 C, DK50 P, DK50 K, DK50 Z, DK50 Z/K, DK50 S, DK50 S/K, DK50 DS, DK50 DMS, DK50-10 I, DK50-10 Z, DK50-10 Z/K, DK50-10 S, DK50-10 S/K, DK50-10 Z/M, DK50-10 S/M, DK50 PLUS, DK50 PLUS/K, DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S, DK50 PLUS S/K, DK50 PLUS S/M, DK50 2V, DK50 2V/M, DK50 2V/K, DK50 2VS, DK50 2VS/K, DK50 2VS/M, DK50 2V/110, DK50 2V/110/K, DK50 2V/110/M, DK50 2V/110S, DK50 2V/110S/K, DK50 2V/110S/M, DK50 2x2V/110, DK50 2x2V/110/K, DK50 2x2V/110/M, DK50 2x2V/110S, DK50 2x2V/110S/K, DK50 2x2V/110S/M, DK50 4x2V/M, DK50 4x2V, DK50 6x2V, DK50 6x2V/M, DK50 4x2VT/M, DK50 4x2VTD, DK50 6x2VT/M, DK50 9x2VT/M, DK50 12x2VT/M, DK50 15x2VT/M, DK50 4x2VT, DK50 6x2VT, DK50 9x2VT, DK50 12x2VT, DK50 15x2VT, DK50 4V, DK50 4V/M, DK50 4V/110, DK50 4V/110/M, DK50 2x4V/110, DK50 2x4V/110/M, DK50 4x4VT/M, DK50 6x4VT/M, DK50 9x4VT/M, DK50 12x4VT/M, DK50 15x4VT/M, DK50 4x4VT, DK50 6x4VT, DK50 9x4VT, DK50 12x4VT, DK50 15x4VT, исполнение DK50 S | "ЭКОМ спол. с р.о.", Словацкая Республика, РУ № ФСЗ 2008/03234              | 1 |
| 2.9  | Лампа полимеризационная WOODPECKER, исполнения: WOODPECKER LED.B, WOODPECKER LED.C, WOODPECKER LED.D, WOODPECKER LED.I, WOODPECKER LED.M, WOODPECKER LED.G, исполнение WOODPECKER LED.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2009/05324   | 1 |
| 2.10 | Скейлер стоматологический WOODPECKER для снятия зубных отложений, исполнения: WOODPECKER UDS, WOODPECKER DTE., исполнение WOODPECKER UDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2009/05323   | 1 |
| 2.11 | Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКис-20-1 по ТУ 9444-003-12359918-2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО НПО "Рубикон-Инновация", Россия, РУ № ФСР 2008/02240                    | 1 |
| 2.12 | Инструмент медицинский металлический стоматологический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗАО "СТРУМ", Республика Беларусь, РУ № РЗН 2018/7276                        | 1 |
| 2.13 | Инструменты стоматологические механизированные серии СХ в отдельных упаковках с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Фонлан Коксо Медикал Инструмент                                             | 1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | принадлежностями: Наконечники стоматологические порошкоструйные для удаления зубного налета: С101, С102, С103, С104, С105, С106, С107, исполнение С102                                                                                                                                                          | Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13562                                         |   |
| 2.14 | Наконечники турбинные стоматологические НТС-300-05-М4 и НТС-300-05-В2 по ТУ 9452-033-48777198-2004, исполнение НТС-300-05-М4                                                                                                                                                                                    | ООО "ВХ-Тайфун", Россия, РУ № ФСР 2008/01751                                   | 1 |
| 2.15 | Наконечник для микромоторов прямой ППМ-40-02 по ТУ 9452-084-05519988-2002                                                                                                                                                                                                                                       | АО "Казанский медико-инструментальный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10010      | 1 |
| 2.16 | Наконечник для микромоторов угловой НУПМ-40 с поворотной защелкой по ТУ 9452-084-05519988-2002                                                                                                                                                                                                                  | АО "Казанский медико-инструментальный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10011      | 1 |
| 2.17 | Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклянными шариками СС-01 "ТермоЭст" по ТУ 9451-001-56755207-2005, вариант исполнения "ТермоЭст" с комплектом шариков (с гласперленовым наполнителем)                                                                                      | АО "Геософт Дент", Россия, РУ № ФСР 2010/08560                                 | 1 |
| 2.18 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДЦЮ по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДЦЮ-1-02-2 | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2009/05373                   | 1 |
| 2.19 | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-18, по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры, исполнение: КФ-3                                                                                                                                                            | АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия, РУ № ФСР 2010/07067 | 1 |
| 2.20 | Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 "Стомэл" по ТУ 9452-003-26502549-00                                                                                                                                                                                                                   | ООО "СТОМЭЛ-К", Россия, РУ № ФСР 2009/05060                                    | 1 |
| 2.21 | Бормашина электрическая универсальная БЭУ-01 по ТУ 9452-002-51715746-2010, исполнение ДП-5                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Медторг+", Россия, РУ № ФСР 2010/08175                                    | 1 |
| 2.22 | Установка стоматологическая "Siger" в следующих исполнениях: S30, S60, S90, U100, U200, U500 с принадлежностями, исполнение U200                                                                                                                                                                                | "Жухай Сайгер Медикал Иквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2009/04648          | 1 |
|      | Установка стоматологическая STOMADENT HARMONY с принадлежностями, производства                                                                                                                                                                                                                                  | "СТОМАДЕНТ СК с.р.о.", Словакия, РУ № ФСЗ 2008/02141                           |   |
|      | Установка стоматологическая пневматическая «Клер» по ТУ 9452-001-43656656-2005                                                                                                                                                                                                                                  | ООО Научно-производственная фирма "Дентофлекс", Россия, РУ № ФСР 2010/09501    |   |
|      | Установки стоматологические Hallim Dentech, модели: Challenge, Eclipse, с принадлежностями, исполнение Eclipse                                                                                                                                                                                                  | "Халлим Ослам Имплант Ко., Лтд", Республика Корея, РУ № РЗН 2016/5163          |   |
|      | Установка стоматологическая в исполнениях: «SI.8100», «SI.8200», «SI.8300», «SI.8500», «SI.8600», исполнение «SI.8100»                                                                                                                                                                                          | "Гуанчжоу Санлайт Медикал Эквипмент Ко., ЛТД", Китай, РУ № РЗН 2016/5045       |   |
|      | Установка стоматологическая, варианты исполнения:                                                                                                                                                                                                                                                               | "Гуанчжоу Аджакс                                                               |   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | AJ11, AJ12, AJ15, AJ16, AJ18, исполнение AJ11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Медиал Иквипмент Ко., Лтд., Китай, РУ № ФСЗ 2010/07225                                |   |
| 2.23 | Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, в следующих исполнениях: "СПДС-1-К", "СПДС-2-К", "СПДС-3-К", исполнение: "СПДС-3-К"                                                                                                                                                                                                                 | ООО "СПДС", Россия, РУ № ФСР 2010/09347                                               | 1 |
| 2.24 | Аппараты для локализации апикального сужения корневого канала зуба по ТУ 9452-005-56755207-2016, вариант исполнения: "ЭндоЭст-3Д"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ЗАО "Геософт Дент", Россия, РУ № ФСР 2007/00078                                       | 1 |
| 2.25 | Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических наконечников: Assistina 301 Plus, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ", Австрия, РУ № РЗН 2017/5826                     | 1 |
| 2.26 | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия, РУ № ФСР 2010/07332                                | 1 |
|      | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-20 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011                                                                                                                                                                                                                                                                    | АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10267           |   |
| 2.27 | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFIB. (M110), производства Метракс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/10093; или Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, варианты исполнения: 1. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01; или 2. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02.; или 3. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05 | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № РЗН 2017/5391                                      | 1 |
|      | Монитор-дефибриллятор BeneHeart с принадлежностями, варианты исполнения: BeneHeart D3, или BeneHeart D6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд., КНР, РУ № ФСЗ 2011/10043        |   |
|      | Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Филипс Медикал Системс", США, РУ № ФСЗ 2008/02312                                    |   |
|      | Дефибриллятор Zoll, модель AED Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZOLL Medical Corporation, США, РУ № РЗН 2014/1903                                     |   |
| 2.28 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140 «ПОЗИС» 2. ХФ-140-1 «ПОЗИС» 3. ХФ-140-2 «ПОЗИС» 4. ХФ-140-3 «ПОЗИС» 5. ХФ-250-2 «ПОЗИС» 6. ХФ-250-3 «ПОЗИС» 7. ХФ-250-4 «ПОЗИС» 8. ХФ-250-5 «ПОЗИС» 9. ХФ-400-2 «ПОЗИС» 10. ХФ-400-3 «ПОЗИС» 11. ХФ-400-4 «ПОЗИС» 12. ХФ-400-5 «ПОЗИС», модель: ХФ-140 «ПОЗИС»                                                                | АО "ПОЗИС", Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                               | 1 |
| 2.29 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                                                                    | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                                    | 1 |
| 2.30 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача                                                                                                                                                                                   | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|      | СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ                                                |                                                                |                   |
| 2.31 | Аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable, модель VEX-P300 с принадлежностями                                                                                                                                                                                     | "БАТЕК Ко., Лтд.",<br>Корея, РУ<br>№ РЗН 2020/9794             | 1                 |
|      | Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor, варианты исполнения: 1. Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor Classic, модель IOS-U101B                                                                                                                            | "Рэйенс Ко., Лтд.",<br>Корея, РУ № РЗН<br>2022/17045           | 1                 |
|      | Аппарат радиовизиографический EzSensor с принадлежностями, производства "Рэйенс Ко., Лтд.", Корея                                                                                                                                                                                       | "Рэйенс Ко., Лтд.",<br>Корея, РУ № ФСЗ<br>2011/11400           |                   |
| 2.32 | Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фардук защитный стоматологический ФРЗС-«Р-К»; Фардук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К» | ООО<br>"СПЕЦМЕДПРИБОР"<br>, Россия, РУ № ФСР<br>2010/08183     | 1                 |
| 2.33 | Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фардук защитный стоматологический ФРЗС-«Р-К»                                                    | ООО<br>"СПЕЦМЕДПРИБОР"<br>, Россия, РУ № ФСР<br>2010/08183     | 1                 |
| 2.34 | Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фардук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К»                                               | ООО<br>"СПЕЦМЕДПРИБОР"<br>, Россия, РУ № ФСР<br>2010/08183     | 1                 |
| 3.   | <b>Специальное оборудование:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                   |
| 3.1  | Автомобиль-фургон ИАЦ-В-1767KD                                                                                                                                                                                                                                                          | ООО<br>«Ингравтоцентр»,<br>Россия                              | 1                 |
| 3.2  | Отопитель воздушный PLANAR-44D-12-GP-S-3925 по ТУ 4591-008-40991176-2005                                                                                                                                                                                                                | ООО «Адверс»,<br>Россия                                        | 1                 |
| 3.3  | Установка крышная вентиляционная мод. 01-9010-12.00                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «Нижегородский<br>Завод<br>Автокомпонентов»,<br>Россия     | 1                 |
| 3.4  | Установка для кондиционирования воздуха "сплит-системы", внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                                                                                                                                     | MIDEA ELECTRIC<br>TRADING<br>(SINGAPORE)<br>CO.PTE.LTD., Китай | 1                 |
| 3.5  | Электрогенераторная установка с маркировкой "ELIMAX", модели: SH6500EX-R, SH11000-R                                                                                                                                                                                                     | "SAWAFUJI<br>ELECTRIC Co., LTD",<br>Япония                     | 1                 |
| 3.6  | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. "Noirot", модель Spot E-5 Plus                                                                                                                                                                                             | "Noirot S.A.S.",<br>Франция                                    | не более<br>8     |
| 3.7  | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. "Ballu", модель ВНС-LO8-T03                                                                                                                                                                | ООО "Ижевский завод<br>тепловой техники",<br>Россия            | не более<br>8 шт. |
| 3.8  | Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2                                                                                                                                                                                                                             | ООО НПО<br>"Сибирский Арсенал",<br>Россия                      | 1                 |
| 3.9  | Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАИ SINE, модель PRO                                                                                                                                                                                                             | ООО "МикроАрт",<br>Россия                                      | 1                 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 3.10 | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО "ВАНВЕНТ<br>ПК", Россия                                           | 1 |
| 3.11 | Генератор дизельный RedVerg RD-D5000EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REDVERG, Китай                                                        | 1 |
| 4.   | <b>Встраиваемая мебель:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |   |
| 4.1  | Шкаф стеллаж. ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО<br>«Интеравтоцентр»,<br>Россия                                    | 3 |
| 4.2  | Шкаф для одежды. ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО<br>«Интеравтоцентр»,<br>Россия                                    | 1 |
| 4.3  | Мойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО<br>«Интеравтоцентр»,<br>Россия                                    | 1 |
| 4.4  | Кухонка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО<br>«Интеравтоцентр»,<br>Россия                                    | 1 |
| 4.5  | Столешница ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО<br>«Интеравтоцентр»,<br>Россия                                    | 4 |
| 4.6  | Столики процедурные передвижные, модель СП-п-01-МСК(501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО<br>«Медстальконструкци<br>я», Россия                              | 1 |
| 5.   | <b>Эксплуатационная документация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |   |
| 5.1  | Руководство по эксплуатации КМП-I-982.00.020 РЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                     | 1 |
| VI.  | <b>«Профосмотр» исполнение №3, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD, в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |   |
| I.   | <b>Кабинет «Лаборатория», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |   |
| 1.1  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                             | ООО "РЭМО-<br>Технологии", Россия,<br>РУ № РЗН 2023/20096             | 1 |
| 1.2  | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-1 | АО "КРОНТ-М",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2009/06144                       | 1 |
| 1.3  | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                     | ООО "Инновация",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2014/2254                     | 1 |
| 1.4  | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2                                                                 | АО "Елатомский<br>приборный завод",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2009/05373 | 1 |
| 1.5  | Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Емкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л - "РЕСПЕКТ" по ТУ 9398-002-13014251-2012                                                                   | ООО "ГК "Респект",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2013/1089                   | 1 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.6  | Штатив для пробирок универсальный ШПУ-"КРОНТ" по ТУ 9452-037-11769436-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | АО "КРОНТ-М", Россия, РУ № ФСР 2011/10034                                         | 1 комплект  |
|      | Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП по ТУ 9452-156-05519988-2006 в вариантах исполнения: 1. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-10; или 2. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-20; или 3. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-40                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "Полимерные изделия", Россия, РУ № ФСР 2011/11883                             |             |
| 1.7  | Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "Полимер Технологии Системс, Инк.", США, РУ № РЗН 2015/2693                       | 1           |
| 1.8  | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Биокемикал Системз Интернэйшнл Срд, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072                   | 1           |
| 1.9  | Тест-полоски LabStrip U11Plus для проведения анализа мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "77 Электроника Кфт.", Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583                               | не более 10 |
| 1.10 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А | ООО "Биосенсор АП", Россия, РУ № ФСР 2008/02809                                   | не более 10 |
| 1.11 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови АЦ-60 по ТУ 9443-003-42980704-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Научно-производственное предприятие Кверти-Мед", Россия, РУ № ФСР 2007/00762 | 1           |
| 1.12 | Экспресс-коагулометр КуЛабс Электрометр ("qLabs ElectroMeter"), исполнение: КуЛабс Электрометр ("qLabs ElectroMeter")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Микропоинт Биотехнологиз Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2016/3832                   | 1           |
| 1.13 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МПШН» по ТУ 9443-00478939528-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО «Компания «ЭЛ-ТА», Россия, РУ № ФСР 2009/06498                                | 1           |
| 1.14 | Система для измерения уровня гемоглобина HemoControl с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "ЕКФ-диагностик ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2008/02911                              | 1           |
| 1.15 | Анализаторы мочи CL-50 Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Хай Текнолоджи, Инк.", США, РУ № РЗН 2016/3986                                   | 1           |
| 1.16 | Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/06301                | 1 комплект  |
| 1.17 | Пробирки вакуумные МиниМед по ТУ 32.50.50-024-29508133-2017, вариант исполнения: 1. Пробирки вакуумные с КЭД/ТА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 2. Пробирки вакуумные с КЭД/ТА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "МиниМед", Россия, РУ № РЗН 2019/8175                                         | 1 комплект  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | мл: 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 3. Пробирки вакуумные с КЭД/ГА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 4. Пробирки вакуумные с КЭД/ГА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 5. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,2% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 6. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,8% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 7. Пробирки вакуумные с лития гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 8. Пробирки вакуумные с натрия гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 9. Пробирки вакуумные без наполнителя 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 10. Пробирки вакуумные с разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 11. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл. 12. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) и разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл. |                                                                             |            |
| 1.18 | Посуда для лабораторных исследований из полимерных материалов вариант исполнения: наконечники универсальные для дозаторов объемом 0,2-5мкл, 0,5-10мкл, 20мкл, 30мкл, 200мкл, 250мкл, 300мкл, 1000мкл, 5мл, 10мл, россыпью и в штативах. Пробирки полимерные лабораторные, в том числе с сепараторами и антикоагуляторами, зондами и транспортными средами. Контейнеры лабораторные для взятия проб. Чашки Петри и кюветы для анализаторов. Коробки, планшеты и слайды лабораторные. Пробирки винтовые, конические и с основанием, объемом 0,5мл, 1,5мл, 2мл, 5мл, 7,5мл, 10мл, 15мл, 50мл. Винтовые крышки с прокладками и без прокладок для пробирок и контейнеров. Петли микробиологические и зонды. Штативы для хранения и замораживания пробирок, криопробирок, объемом 0,2-50мл. Пипетки серологические и для переноса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ф.Л. Медикал с.р.л., Италия, РУ № ФСЗ 2011/09735                            | 1 комплект |
| 1.19 | Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Хай Текнолоджи, Инк., США, РУ № ФСЗ 2010/07756                              | 1          |
| 1.20 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2020/10939                  | 1          |
| 1.21 | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10267 | 1          |
|      | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия, РУ № ФСР 2010/07332                      |            |
| 1.22 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140 «ПОЗИС» 2. ХФ-140-1 «ПОЗИС» 3. ХФ-140-2 «ПОЗИС» 4. ХФ-140-3 «ПОЗИС» 5. ХФ-250-2 «ПОЗИС» 6. ХФ-250-3 «ПОЗИС» 7. ХФ-250-4 «ПОЗИС» 8. ХФ-250-5 «ПОЗИС» 9. ХФ-400-2 «ПОЗИС» 10. ХФ-400-3 «ПОЗИС» 11. ХФ-400-4 «ПОЗИС» 12. ХФ-400-5 «ПОЗИС», модель: ХФ-140 "ПОЗИС"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АО "ПОЗИС", Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                     | 1          |
| 1.23 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО научно-                                                                 | 1          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973    |    |
| 2.   | <b>Кабинет «Офтальмология», в составе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |    |
| 2.1  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                                                                            | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                            | 11 |
| 2.2  | Авторефрактометр с принадлежностями. варианты исполнения: - HRK-9000A или - HRK-7000A или - HRK-8000A или - HRK-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Хувитц Ко., Лтд", Республика Корея, РУ № ФСЗ 2012/12458                      | 1  |
|      | Авторефрактометр RC-5000 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония, РУ № РЗН 2015/2726                                |    |
| 2.3  | Офтальмоскопы портативные по ТУ 9442-005-11555014-2004. В следующих исполнениях: Офтальмоскоп портативный ОФТА-2,5 или Офтальмоскоп портативный ОФТА-3,5                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО "НПО "ЭКОМЕД", Россия, РУ № ФСР 2011/11212                                | 1  |
| 2.4  | Бесконтактный тонометр FT-1000 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Томи ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2008/01687                                    | 1  |
| 2.5  | Проектор знаков экранный офтальмологический ТСП, с принадлежностями. вариант исполнения: ТСП-3000 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Томэй ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2010/07992                                     | 1  |
| 2.6  | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО МРП "Техноаргус", Россия, РУ № ФСР 2007/00950                             | 1  |
| 2.7  | Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели Х1.-1 в комплекте с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Рексам Ко., Лтд.", Япония, РУ № РЗН 2016/4151                                | 1  |
|      | Лампа щелевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Томэй ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2011/11147                                   |    |
| 2.8  | Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО МРП "Техноаргус", Россия, РУ № ФСР 2007/00471                             | 1  |
|      | Наборы пробных очковых линз "АРМЕД" с оправой на 266, 232, 158, 103, 42, 60 линз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "Янгсу Ююе Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай, РУ ФСЗ 2008/02071 |    |
| 2.9  | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № РЗН 2015/2997                   | 1  |
| 2.10 | Периметр автоматический офтальмологический AP-3000 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Томэй ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/09934                                     | 1  |
| 2.11 | Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100-"ПЕРИТЕСТ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ИП Гуров Андрей Сергеевич, Россия, РУ № ФСР 2012/13976                        | 1  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | по ТУ 9442-002-11432330-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                |
| 2.12 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1              |
| 3.   | <b>Специальное оборудование:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                |
| 3.1  | Автомобиль фургон ИАЦ-В-1767KD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 1              |
| 3.2  | Отопитель воздушный PLANAR-44D-12-GP-S-3925 по ТУ 4591-008-40991176-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Адверс», Россия                                                                  | 1              |
| 3.3  | Установка крышная вентиляционная мод. 01-9010-12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО «Нижегородский Завод Автокомпонентов», Россия                                     | 1              |
| 3.4  | Установка для кондиционирования воздуха "сплит-системы", внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD., Китай                                 | 1              |
| 3.5  | Электрогенераторная установка с маркировкой "ELEMAX", модели: SH6500EX-R, SH11000-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD", Япония                                                  | 1              |
| 3.6  | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. "Noirot", модель Spot E-5 Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Noirot S.A.S.", Франция                                                              | не более 8     |
| 3.7  | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. "Ballu", модель BHC-L08-T03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Ижевский завод тепловой техники", Россия                                         | не более 8 шт. |
| 3.8  | Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО НПО "Сибирский Арсенал", Россия                                                   | 1              |
| 3.9  | Многофункциональный автономный преобразователь энергии MAI SINI, модель PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "МикроАрт", Россия                                                                | 1              |
| 3.10 | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО "ВАИВЕНТ ПК", Россия                                                              | 1              |
| 3.11 | Генератор дизельный RedVerg RD-D5000EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REDVERG, Китай                                                                        | 1              |
| 4.   | <b>Встраиваемая мебель:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                |
| 4.1  | Шкаф стеллаж, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 3              |
| 4.2  | Шкаф для одежды, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 1              |
| 4.3  | Мойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 1              |
| 4.4  | Кресло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | не более 2 шт. |
| 4.5  | Кресло поворотное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | не более 2 шт. |
| 4.6  | Столешница ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 4              |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4.7  | Столики процедурные передвижные, модель СП-п-01-МСК(501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Медстальконструкция», Россия                                            | 1 |
| 5.   | <b>Эксплуатационная документация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |   |
| 5.1  | Руководство по эксплуатации КМП-И982.00.020 РЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                            | 1 |
| VII. | <b>«Стоматология», размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD, в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |   |
| 1.   | <b>Кабинет «Стоматология», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |   |
| 1.1  | Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов "Ультразет" по ТУ 9451-008-56755207-2009, варианты исполнения: - "Ультразет" УВ-1 (объем ванны 150 мл); - "Ультразет-ФСМ" УВ-2 (объем ванны 1500 мл); - "Ультразет-М" УВ-3 (объем ванны 1600 мл); - "Ультразет-Г" УВ-4 (объем ванны 3200 мл, с нагревом), исполнение: "Ультразет-М" УВ-3 (объем ванны 1600 мл)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ЗАО "Геософт Дент", Россия, РУ № ФСР 2007/00048                              | 1 |
| 1.2  | Автоклав серии "ВТ" в следующих исполнениях: ВТД231.-А., ВТС231.-А., ВТД181.-А., ВТС181.-А., ВТД171.-А., ВТС171.-А., ВТД161.-А., ВТС161.-А., ВТД121.-А., ВТС121.-А., ВТД81.-А., ВТС81.-А с принадлежностями, исполнение ВТД171.-А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Пин энд Ти (Нингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2009/04596 | 1 |
| 1.3  | Аппарат светодиодный АФС с принадлежностями по ТУ 9444-005-17515211-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Полироник", Россия, РУ № ФСР 2011/10669                                 | 1 |
| 1.4  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-03-"Я"-ФП по ТУ 9452-003-55307168-2004, варианты исполнения: КБ-03-"Я"-ФП; КБн-03-"Я"-ФП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ООО "Ферропласт Медикал", Россия, № РУ ФСР 2009/06570                        | 1 |
| 1.5  | Определитель электронный верхушки корня зуба «Аверон» модель 1.0 АВЕКС по ТУ 9452-006-25014322-2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО "ВЕГА-ПРО", Россия, РУ № ФСР 2009/05904                                  | 1 |
| 1.6  | Электроодонтогестер состояния пульпы зуба со звуковой и цифровой индикацией ЭОТ-01 "Аверон" по ТУ 9452-017-25014322-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "ВЕГА-ПРО", Россия, РУ № ФСР 2012/13364                                  | 1 |
| 1.7  | Ультразвуковой медицинский игл УМИ-01 по ТУ 9452-001-51715746-2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ООО "Медторг+", Россия, РУ № ФСР 2008/03814                                  | 1 |
| 1.8  | Компрессор медицинский DK50, исполнения: DK50 B, DK50 BS, DK50 D, DK50 DM, DK50 I, DK50 H, DK50 C, DK50 P, DK50 K, DK50 Z, DK50 Z/K, DK50 S, DK50 S/K, DK50 DS, DK50 DMS, DK50-10 I, DK50-10 Z, DK50-10 Z/K, DK50-10 S, DK50-10 S/K, DK50-10 Z/M, DK50-10 S/M, DK50 PLUS, DK50 PLUS/K, DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S, DK50 PLUS S/K, DK50 PLUS S/M, DK50 2V, DK50 2V/M, DK50 2V/K, DK50 2VS, DK50 2VS/K, DK50 2VS/M, DK50 2V/110, DK50 2V/110/K, DK50 2V/110/M, DK50 2V/110S, DK50 2V/110S/K, DK50 2V/110S/M, DK50 2x2V/110, DK50 2x2V/110/K, DK50 2x2V/110/M, DK50 2x2V/110S, DK50 2x2V/110S/K, DK50 2x2V/110S/M, DK50 4x2V/M, DK50 4x2V, DK50 6x2V, DK50 6x2V/M, DK50 4x2VТ/M, DK50 4x2VТD, DK50 6x2VТ/M, DK50 9x2VТ/M, DK50 12x2VТ/M, DK50 15x2VТ/M, DK50 4x2VТ, DK50 6x2VТ, DK50 9x2VТ, DK50 12x2VТ, DK50 15x2VТ, DK50 4V, DK50 4V/M, DK50 4V/110, DK50 4V/110/M, DK50 2x4V/110, DK50 2x4V/110/M, DK50 4x4VТ/M, DK50 6x4VТ/M, DK50 9x4VТ/M, DK50 12x4VТ/M, DK50 15x4VТ/M, DK50 | "ЭКОМ спол. с р.о.", Словацкая Республика, РУ № ФСЗ 2008/03234               | 1 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | 4x4VT, DK50 6x4VT, DK50 9x4VT, DK50 12x4VT, DK50 15x4VT, исполнение DK50 S                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |   |
| 1.9  | Лампа полимеризационная WOODPECKER, исполнения: WOODPECKER LED.B, WOODPECKER LED.C, WOODPECKER LED.D, WOODPECKER LED.L, WOODPECKER LED.M, WOODPECKER LED.G., исполнение WOODPECKER LED.B                                                                                                                        | "Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2009/05324     | 1 |
| 1.10 | Скейлер стоматологический WOODPECKER для снятия зубных отложений, исполнения: WOODPECKER UDS, WOODPECKER DTE., исполнение WOODPECKER UDS                                                                                                                                                                        | "Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2009/05323     | 1 |
| 1.11 | Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКпе-20-1 по ТУ 9444-003-12359918-2007                                                                                                                                                                                                                          | ООО НПО "Рубикон-Инновация", Россия, РУ № ФСР 2008/02240                       | 1 |
| 1.12 | Инструмент медицинский металлический стоматологический                                                                                                                                                                                                                                                          | ЗАО "СТРУМ", Республика Беларусь, РУ № РЗН 2018/7276                           | 1 |
| 1.13 | Инструменты стоматологические механизированные серии СХ в отдельных упаковках с принадлежностями: Наконечники стоматологические порошкоструйные для удаления зубного налета: С101, С102, С103, С104, С105, С106, С107, исполнение С102                                                                          | Фошан Коксо Медикал Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13562          | 1 |
| 1.14 | Наконечники турбинные стоматологические НТС-300-05-М4 и НТС-300-05-В2 по ТУ 9452-033-48777198-2004, исполнение НТС-300-05-М4                                                                                                                                                                                    | ООО "ВХ-Тайфун", Россия, РУ № ФСР 2008/01751                                   | 1 |
| 1.15 | Наконечник для микромоторов прямой НПМ-40-02 по ТУ 9452-084-05519988-2002                                                                                                                                                                                                                                       | АО "Казанский медико-инструментальный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10010      | 1 |
| 1.16 | Наконечник для микромоторов угловой НУПМ-40 с поворотной защелкой по ТУ 9452-084-05519988-2002                                                                                                                                                                                                                  | АО "Казанский медико-инструментальный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10011      | 1 |
| 1.17 | Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклянными шариками СС-01 "ТермоЭст" по ТУ 9451-001-56755207-2005, вариант исполнения "ТермоЭст" с комплектом шариков (с гласперленовым наполнителем)                                                                                      | АО "Геософт Дент", Россия, РУ № ФСР 2010/08560                                 | 1 |
| 1.18 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2 | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2009/05373                   | 1 |
| 1.19 | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-18, по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры, исполнение: КФ-3                                                                                                                                                            | АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия, РУ № ФСР 2010/07067 | 1 |
| 1.20 | Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 "Стомэл" по ТУ 9452-003-26502549-00                                                                                                                                                                                                                   | ООО "СТОМЭЛ-К", Россия, РУ № ФСР 2009/05060                                    | 1 |
| 1.21 | Бормашина электрическая универсальная БЭУ-01 по ТУ 9452-002-51715746-2010, исполнение ДП-5                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Медторг+", Россия, РУ № ФСР 2010/08175                                    | 1 |
| 1.22 | Установка стоматологическая "Siger" в следующих исполнениях: S30, S60, S90, U100, U200, U500 с                                                                                                                                                                                                                  | "Жухай Сайгер Медикал Иквипмент                                                | 1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | принадлежностями, исполнение U200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2009/04648                                           |   |
|      | Установка стоматологическая STOMADENT HARMONY с принадлежностями, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "СТОМАДЕНТ СК с.р.о.", Словакия, РУ № ФСЗ 2008/02141                            |   |
|      | Установка стоматологическая пневматическая «Клер» по ТУ 9452-001-43656656-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО Научно-производственная фирма "Дентофлекс", Россия, РУ № ФСР 2010/09501     |   |
|      | Установки стоматологические Hallim Dentech, модели: Challenge, Eclipse, с принадлежностями, исполнение Eclipse                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Халлим Ослам Имплант Ко., Лтд", Республика Корея, РУ № РЗН 2016/5163           |   |
|      | Установка стоматологическая в исполнениях: «SL8100», «SL8200», «SL8300», «SL8500», «SL8600», исполнение «SL8100»                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Гуанчжоу Саплайт Медикал Эквипмент Ко., ЛТД", Китай, РУ № РЗН 2016/5045        |   |
|      | Установка стоматологическая, варианты исполнения: AJ11, AJ12, AJ15, AJ16, AJ18, исполнение AJ11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Гуанчжоу Аджакс Медикал Иквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/07225       |   |
| 1.23 | Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, в следующих исполнениях: "СПДС-1-К", "СПДС-2-К", "СПДС-3-К", исполнение: "СПДС-3-К"                                                                                                                                                                                                                 | ООО "СПДС", Россия, РУ № ФСР 2010/09347                                         | 1 |
| 1.24 | Аппараты для локализации апикального сужения корневого канала зуба по ТУ 9452-005-56755207-2016, вариант исполнения: "ЭндоЭст-3Д"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ЗАО "Геософт Дент", Россия, РУ № ФСР 2007/00078                                 | 1 |
| 1.25 | Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических накопечников: Assistina 301 Plus, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ", Австрия, РУ № РЗН 2017/5826               | 1 |
| 1.26 | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-001-41798-2005, исполнение ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия, РУ № ФСР 2010/07332                          |   |
|      | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-20 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011                                                                                                                                                                                                                                                                    | АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10267     | 1 |
| 1.27 | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEF-B, (M110), производства Метракс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/10093; или Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, варианты исполнения: 1. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01; или 2. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02.; или 3. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05 | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № РЗН 2017/5391                                | 1 |
|      | Монитор-дефибриллятор Benel heart с принадлежностями, варианты исполнения: BeneHeart D3, или BeneHeart D6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2011/10043 |   |
|      | Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Филипс Медикал Системс", США, РУ № ФСЗ 2008/02312                              |   |
|      | Дефибриллятор ZOLL, модель AED Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZOLL Medical Corporation, США, РУ № РЗН 2014/1903                               |   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.28 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140«ИОЗИС» 2. ХФ-140-1 «ИОЗИС» 3. ХФ-140-2 «ИОЗИС» 4. ХФ-140-3 «ИОЗИС» 5. ХФ-250-2 «ИОЗИС» 6. ХФ-250-3 «ИОЗИС» 7. ХФ-250-4 «ИОЗИС» 8. ХФ-250-5 «ИОЗИС» 9. ХФ-400-2 «ИОЗИС» 10. ХФ-400-3 «ИОЗИС» 11. ХФ-400-4 «ИОЗИС» 12. ХФ-400-5 «ИОЗИС», модель: ХФ-140 "ИОЗИС"                                                                                                                        | АО "ИОЗИС", Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                               | 1 |
| 1.29 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                                    | 1 |
| 1.30 | Стулья медицинские марки "KM-Magma" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1 |
| 1.31 | Аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable, модель VEX-P300 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "ВАТЕК Ко., Лтд.", Корея, РУ № РЗН 2020/9794                                          | 1 |
| 1.32 | Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor, варианты исполнения: I. Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor Classic, модель IOS-L10IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Рэйенс Ко., Лтд.", Корея, РУ № РЗН 2022/17045                                        | 1 |
|      | Аппарат радиовизиографический EzSensor с принадлежностями, производства "Рэйенс Ко., Лтд.", Корея                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Рэйенс Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11400                                        |   |
| 1.33 | Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фартик защитный стоматологический ФРЗС-«Р-К»                                                                                                                                                                                                                                          | ООО "СПЕЦМЕДПРИБОР", Россия, РУ № ФСР 2010/08183                                      | 1 |
| 1.34 | Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фартик защитный односторонний тяжелый ФРЗОг-«Р-К»                                                                                                                                                                                                                                     | ООО "СПЕЦМЕДПРИБОР", Россия, РУ № ФСР 2010/08183                                      | 1 |
| 2.   | <b>Специальное оборудование:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |   |
| 2.1  | Автомобиль-фургон ИАЦ-B-1767KD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 1 |
| 2.2  | Отопитель воздушный PLANAR-44D-12-GP-S-3925 по ТУ 4591-008-40991176-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Адверс», Россия                                                                  | 1 |
| 2.3  | Установка крышная вентиляционная мод. 01-9010-12,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО «Нижегородский Завод Автокомпонентов», Россия                                     | 1 |
| 2.4  | Установка для кондиционирования воздуха "сплит-системы", внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD., Китай                                 | 1 |
| 2.5  | Электрогенераторная установка с маркировкой "ELEMEX", модели: SH6500EX-R, SH11000-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD", Япония                                                  | 1 |

|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 2.6   | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. "Noirot", модель Spot E-5 Plus                                                                                                                         | "Noirot S.A.S.", Франция                                 | не более 8     |
| 2.7   | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. "Ballu", модель BHC-L08-T03                                                                                            | ООО "Ижевский завод тепловой техники", Россия            | не более 8 шт. |
| 2.8   | Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2                                                                                                                                                         | ООО НПО "Сибирский Арсенал", Россия                      | 1              |
| 2.9   | Многофункциональный автономный преобразователь энергии MAH SINE, модель PRO                                                                                                                                         | ООО "МикроАрт", Россия                                   | 1              |
| 2.10  | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                                                                                             | ООО "ВАНВЕНТ ПК", Россия                                 | 1              |
| 2.11  | Генератор дизельный RedVerg RD-D5000EN                                                                                                                                                                              | REDVERG, Китай                                           | 1              |
| 3.    | <b>Встраиваемая мебель:</b>                                                                                                                                                                                         |                                                          |                |
| 3.1   | Шкаф стеллаж, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                            | ООО «Интеравтоцентр», Россия                             | 3              |
| 3.2   | Шкаф для одежды, ГОСТ 16371                                                                                                                                                                                         | ООО «Интеравтоцентр», Россия                             | 1              |
| 3.3   | Мойка                                                                                                                                                                                                               | ООО «Интеравтоцентр», Россия                             | 1              |
| 3.4   | Столешки процедурные передвижные, модель СИ-п-01-МСК(501)                                                                                                                                                           | ООО «Медметалконструкция», Россия                        | 1              |
| 4.    | <b>Эксплуатационная документация</b>                                                                                                                                                                                |                                                          |                |
| 4.1   | Руководство по эксплуатации КМП-И982.00.020 РЭ                                                                                                                                                                      | -                                                        | 1              |
| VIII. | <b>«Офтальмология», размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD, в составе:</b>                                                                                                                                   |                                                          |                |
| 1.    | <b>Кабинет «Офтальмология», в составе</b>                                                                                                                                                                           |                                                          |                |
| 1.1   | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096       | 11             |
| 1.2   | Автоматический рефрактометр с принадлежностями, варианты исполнения: - ИРК-9000А или - ИРК-7000А или - ИРК-8000А или - ИРК-1                                                                                        | "Хувитц Ко., Лтд", Республика Корея, РУ № ФСЗ 2012/12458 | 1              |
|       | Автоматический рефрактометр RC-5000 с принадлежностями                                                                                                                                                              | «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония, РУ № РЗН 2015/2726           |                |
| 1.3   | Офтальмоскопы портативные по ТУ 9442-005-11555014-2004, В следующих исполнениях: Офтальмоскоп портативный ОФТА-2,5 или Офтальмоскоп портативный ОФТА-3,5                                                            | ООО "НПО "ЭКОМЕД", Россия, РУ № ФСР 2011/11212           | 1              |
| 1.4   | Бесконтактный тонометр FT-1000 с принадлежностями                                                                                                                                                                   | "Томи ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2008/01687               | 1              |
| 1.5   | Проектор знаков экранный офтальмологический ТСП, с принадлежностями, вариант исполнения: ТСП-3000 Р                                                                                                                 | Томэй ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2010/07992                | 1              |
| 1.6   | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002                                                                                                                           | ООО МРП "Техноартус", Россия, РУ № ФСР 2007/00950        | 1              |
| 1.7   | Целевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями                                                                                                                                  | "Рексам Ко., Лтд.", Япония, РУ № РЗН 2016/4151           | 1              |
|       | Лампа целевая офтальмологическая TSL-5000 с                                                                                                                                                                         | "Томэй ГмбХ",                                            |                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Германия, РУ № ФСЗ 2011/11147                                                         |                |
| 1.8  | Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО МРПТ "Техноаргус", Россия, РУ № ФСР 2007/00471                                    | 1              |
|      | Наборы пробных очковых линз "АРМЕД" с оправой на 266, 232, 158, 103, 42, 60 линз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Янгсу Ююе Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай, РУ ФСЗ 2008/02071         |                |
| 1.9  | Тонometr внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № РЗН 2015/2997                           | 1              |
| 1.10 | Периметр автоматический офтальмологический АР-3000 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Томэй ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/09934                                             | 1              |
| 1.11 | Анализатор определения границ дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100-"ПЕРИТЕСТ" по ТУ 9442-002-11432330-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ИП Гуров Андрей Сергеевич, Россия, РУ № ФСР 2012/13976                                | 1              |
| 1.12 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | 1              |
| 2.   | <b>Специальное оборудование:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                |
| 2.1  | Автомобиль-фургон ИАЦ-В-1767KD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО «Интеравтоцентр», Россия                                                          | 1              |
| 2.2  | Отопитель воздушный PLANAR-44D-12-GP-S-3925 по ТУ 4591-008-40991176-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО «Адверс», Россия                                                                  | 1              |
| 2.3  | Установка накрывная вентиляционная мод. 01-9010-12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО «Нижегородский Завод Автокомпонентов», Россия                                     | 1              |
| 2.4  | Установка для кондиционирования воздуха "сплит-системы", внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD., Китай                                 | 1              |
| 2.5  | Электрогенераторная установка с маркировкой "ELEMAR", модели: SH6500EX-R, SH11000-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD", Япония                                                  | 1              |
| 2.6  | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. "Noirot", модель Spot E-5 Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Noirot S.A.S.", Франция                                                              | не более 8     |
| 2.7  | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. "Ballu", модель ВИС-L08-T03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Ижевский завод тепловой техники", Россия                                         | не более 8 шт. |
| 2.8  | Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО НПО "Сибирский Арсенал", Россия                                                   | 1              |
| 2.9  | Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАИ SINE, модель PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "МикроАрт", Россия                                                                | 1              |
| 2.10 | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО "ВАНВЕНТ ГИК", Россия                                                             | 1              |



|           |                                                           |                                   |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2.1.1     | 1 генератор дизельный RedVerg RID-D5000EN                 | REDVERG, Китай                    | 1 |
| <b>3.</b> | <b>Встраиваемая мебель:</b>                               |                                   |   |
| 3.1       | Шкаф стеллаж, ГОСТ 16371                                  | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | 3 |
| 3.2       | Шкаф для одежды, ГОСТ 16371                               | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | 2 |
| 3.3       | Мойка                                                     | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | 1 |
| 3.4       | Столешница ГОСТ 16371                                     | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | 3 |
| 3.5       | Столешки процедурные передвижные, модель СП-п-01-МСК(501) | ООО «Медстальконструкция», Россия | 1 |
| <b>4.</b> | <b>Эксплуатационная документация</b>                      |                                   |   |
| 4.1       | Руководство по эксплуатации КМП-И982.00.020 РЭ            | -                                 | 1 |

*Конкретная модель варианта исполнения комплекса может быть оснащена оборудованием в соответствии с заказом.*

*Шасси и все входящие в состав комплекса покупное оборудование поставляется в комплекте с руководством (инструкциями) по эксплуатации.*

Приложение Б  
(обозначение)  
Общий вид, основные габаритные размеры и масса изделий

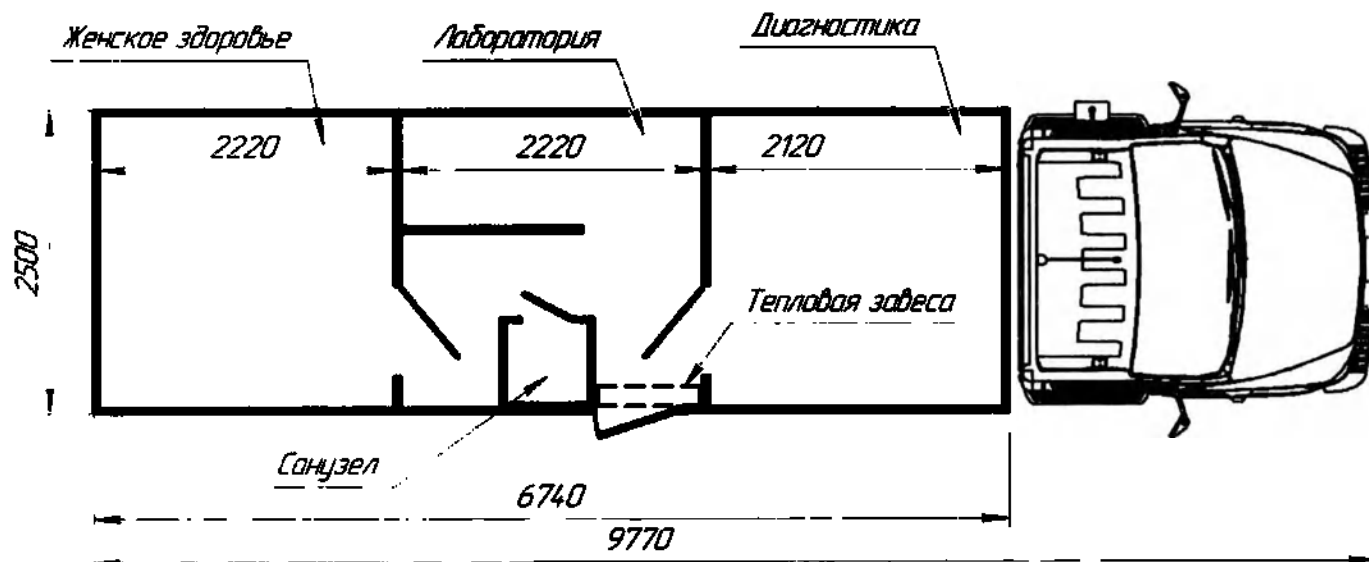


Рисунок Б.1 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения:

«Диспансеризация» № 1, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

Таблица Б.1 Габаритные размеры фургона и помещений входящих в состав комплекса.

| Характеристики | Габаритные размеры фургона | Кабинет «Женское здоровье» | Кабинет «Лаборатория» | Кабинет «Диагностика» | Санузел   |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Длина, мм      | 6740 ± 10                  | 2220 ± 10                  | 2220 ± 10             | 2120 ± 10             | 700 ± 10  |
| Ширина, мм     | 2500 ± 10                  | 2500 ± 10                  | 1500 ± 10             | 2500 ± 10             | 700 ± 10  |
| Высота, мм     | 2300 ± 10                  | 2300 ± 10                  | 2300 ± 10             | 2300 ± 10             | 2300 ± 10 |

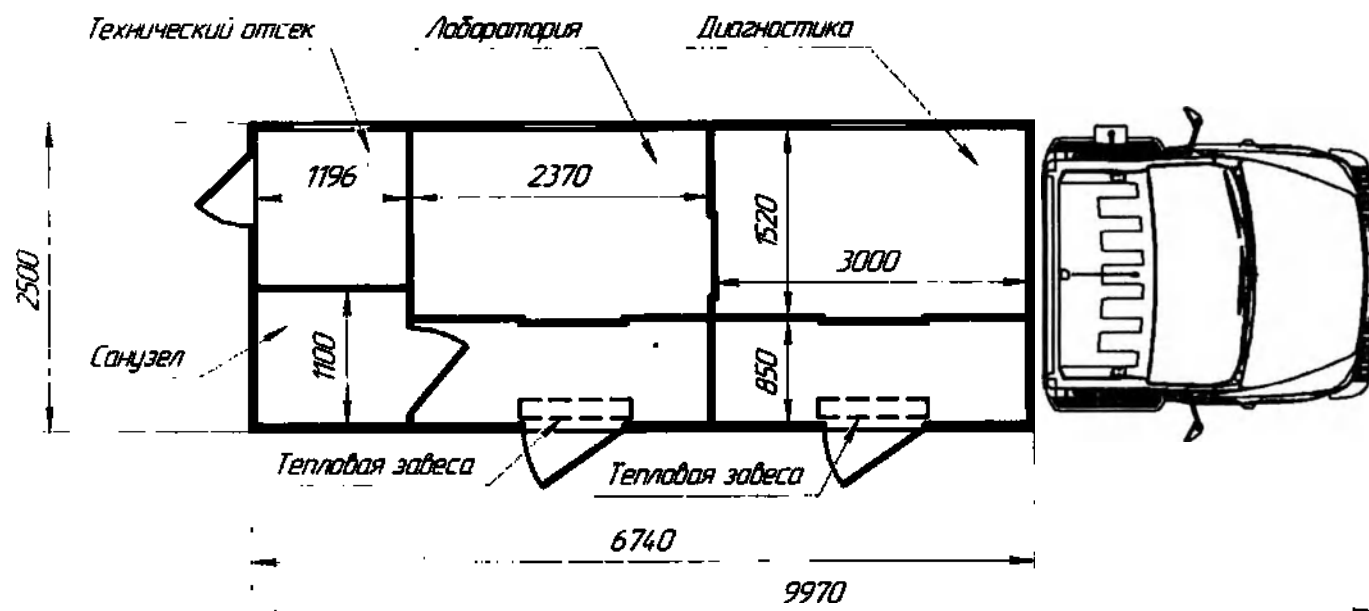


Рисунок Б.2 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения:

«Диспансеризация» № 2, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

Таблица Б.2 Габаритные размеры фургона и помещений входящих в состав комплекса.

| Характеристики | Габаритные размеры фургона | Кабинет «Диагностика» | Кабинет «Лаборатория» | Санузел   |
|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Длина, мм      | 6740 ± 10                  | 3000 ± 10             | 2370 ± 10             | 1196 ± 10 |
| Ширина, мм     | 2500 ± 10                  | 1520 ± 10             | 1520 ± 10             | 1100 ± 10 |
| Высота, мм     | 2300 ± 10                  | 2300 ± 10             | 2300 ± 10             | 2300 ± 10 |

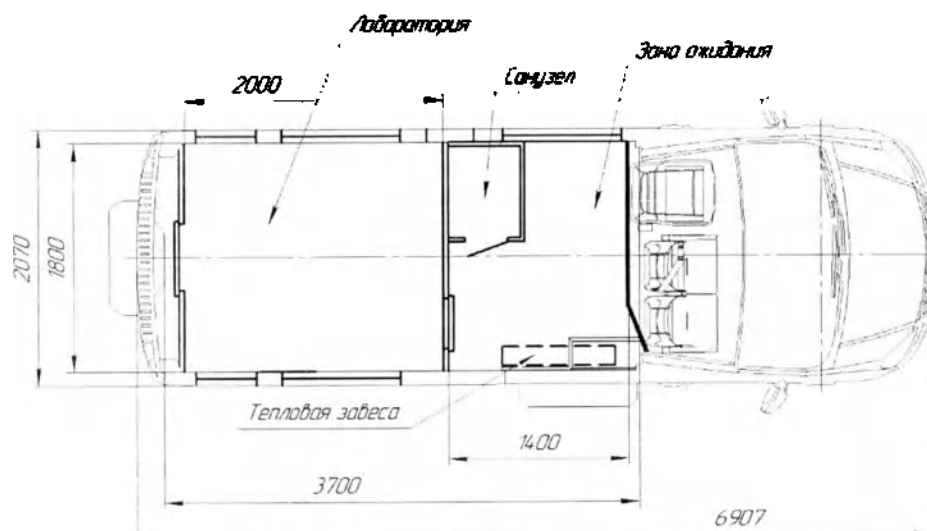


Рисунок Б.3 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Диспансеризация» № 3, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ – 1767М9 (тип А, тип А6)

Таблица Б.3 Габаритные размеры фургона и помещений входящих в состав комплекса.

| Характеристики | Внутренние габаритные размеры фургона | Кабинет «Лаборатория» | Зона ожидания | Санузел   |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| Длина, мм      | 3700 ± 10                             | 2000 ± 10             | 1400 ± 10     | 610 ± 10  |
| Ширина, мм     | 1800 ± 10                             | 1800 ± 10             | 1800 ± 10     | 800 ± 10  |
| Высота, мм     | 1940 ± 10                             | 1940 ± 10             | 1940 ± 10     | 1940 ± 10 |

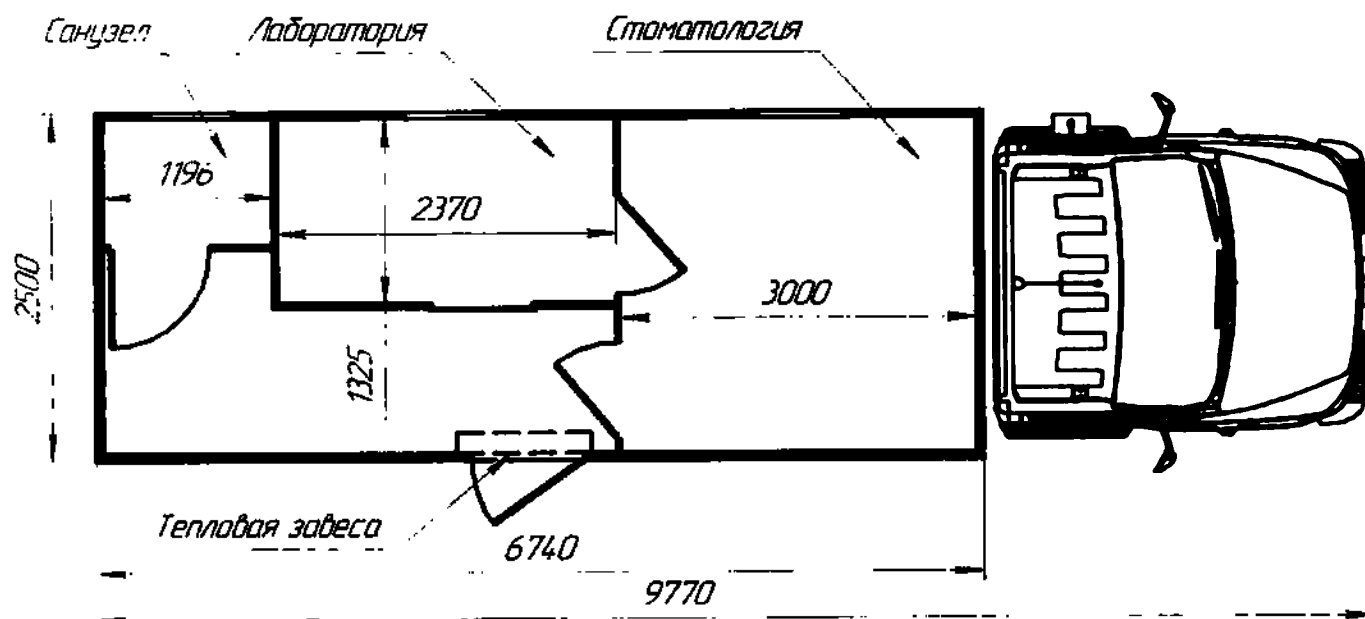


Рисунок Б.4 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения:

«Профосмотр» исполнение №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

Таблица Б.4 Габаритные размеры фургона и помещений входящих в состав комплекса.

| Характеристики | Внутренние габаритные размеры фургона | Кабинет «Стоматология» | Кабинет «Лаборатория» | Санузел   |
|----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Длина, мм      | 6740 ± 10                             | 3000 ± 10              | 2370 ± 10             | 1196 ± 10 |
| Ширина, мм     | 2500 ± 10                             | 2500 ± 10              | 1325 ± 10             | 1000 ± 10 |
| Высота, мм     | 2300 ± 10                             | 2300 ± 10              | 2300 ± 10             | 2300 ± 10 |

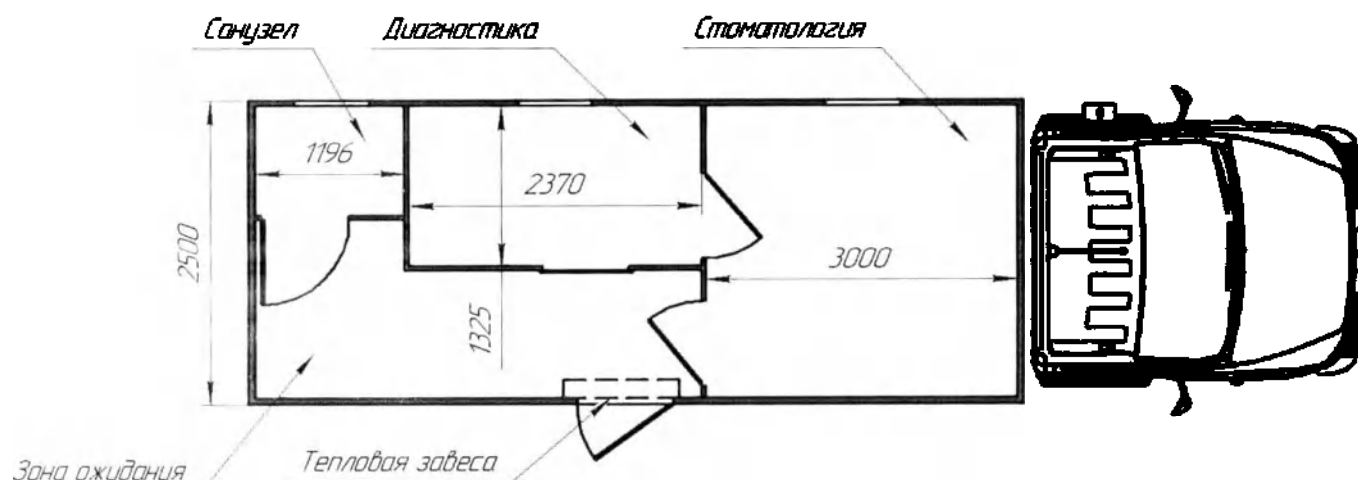


Рисунок Б.5 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения:

«Профосмотр» исполнение №2, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

Таблица Б.5 Габаритные размеры фургона и помещений входящих в состав комплекса.

| Характеристики | Габаритные размеры фургона | Кабинет «Диагностика» | Кабинет «Стоматология» | Санузел   |
|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Длина, мм      | 6740 ± 10                  | 2370 ± 10             | 3000 ± 10              | 1196 ± 10 |
| Ширина, мм     | 2500 ± 10                  | 1325 ± 10             | 2500 ± 10              | 1000 ± 10 |
| Высота, мм     | 2300 ± 10                  | 2300 ± 10             | 2300 ± 10              | 2300 ± 10 |

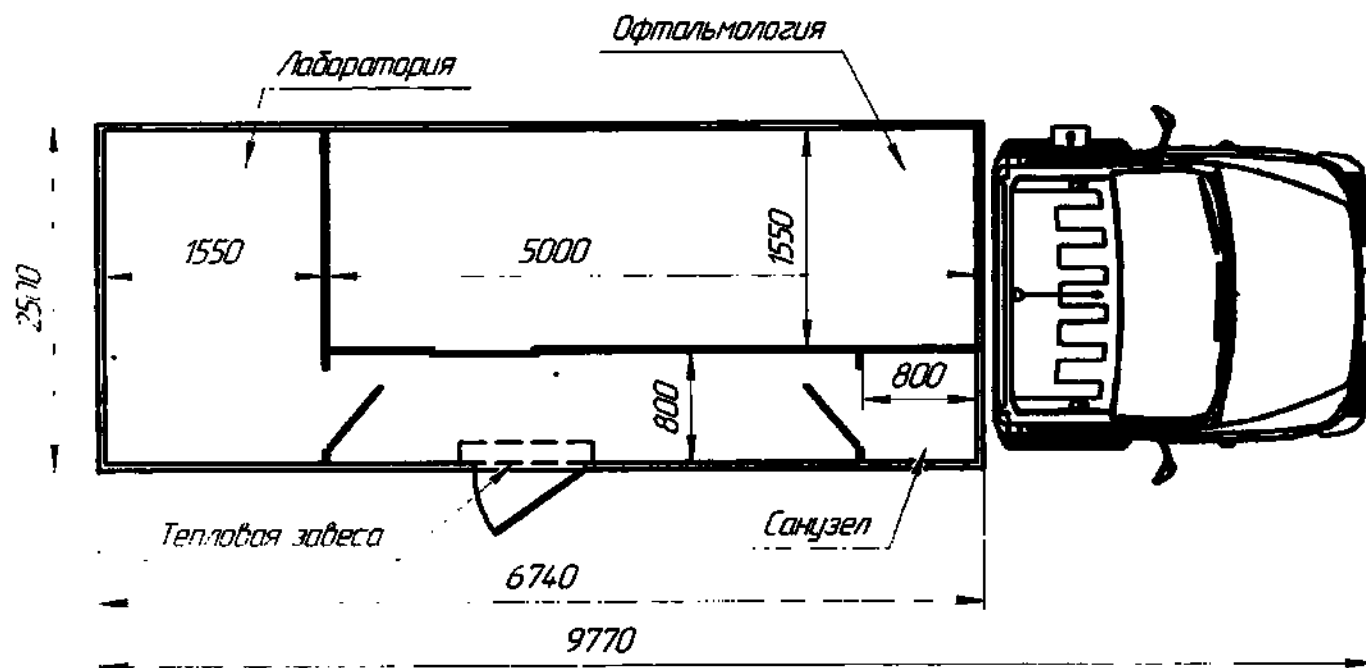


Рисунок Б.6 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения:

«Профосмотр» исполнение №3, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

Таблица Б.6 Габаритные размеры фургона и помещений входящих в состав комплекса.

| Характеристики | Внутренние габаритные размеры фургона | Кабинет «Офтальмология» | Кабинет «Лаборатория» | Санузел   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| Длина, мм      | 6740 ± 10                             | 5000 ± 10               | 1550 ± 10             | 800 ± 10  |
| Ширина, мм     | 2500 ± 10                             | 1550 ± 10               | 2500 ± 10             | 800 ± 10  |
| Высота, мм     | 2300 ± 10                             | 2300 ± 10               | 2300 ± 10             | 2300 ± 10 |

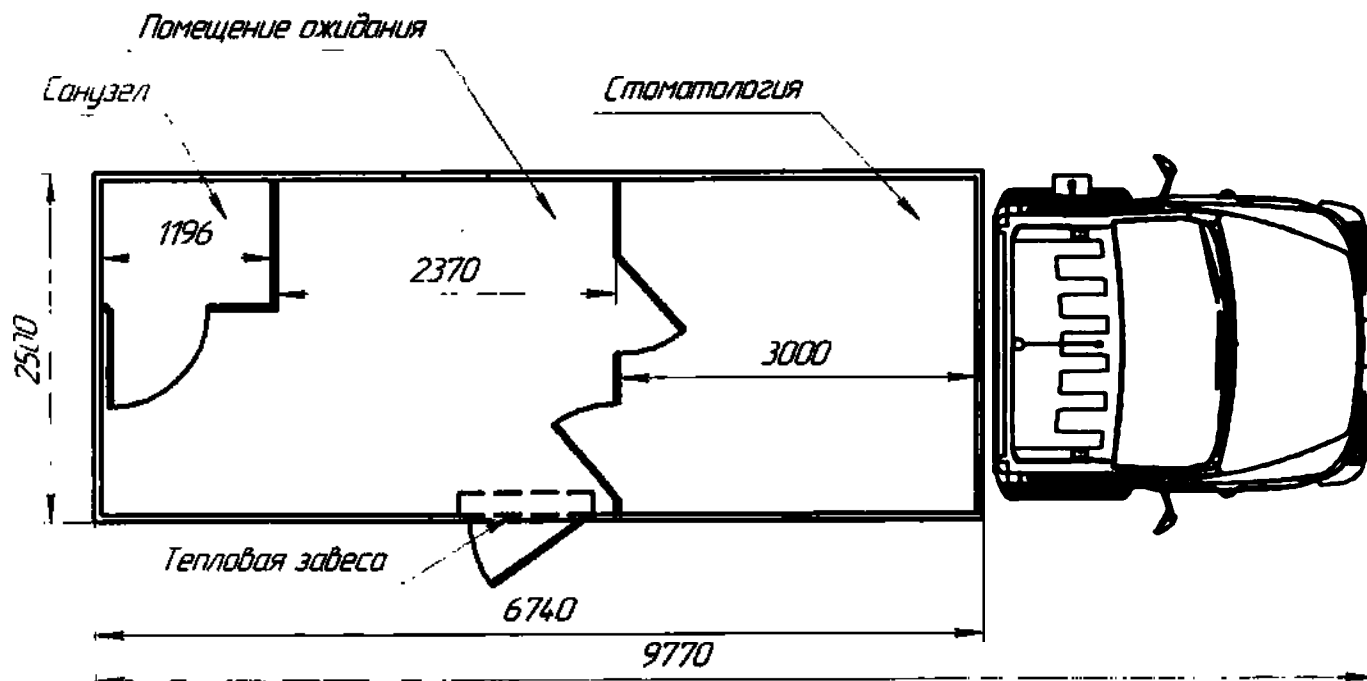


Рисунок Б.7 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения:

«Стоматология», размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD.

Таблица Б.7 Габаритные размеры фургона и помещений входящих в состав комплекса.

| Характеристики | Внутренние габаритные размеры фургона | Кабинет «Стоматология» | Санузел   | Помещение ожидания |
|----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Длина, мм      | 6740 ± 10                             | 3000 ± 10              | 1196 ± 10 | 2370 ± 10          |
| Ширина, мм     | 2500 ± 10                             | 2500 ± 10              | 1000 ± 10 | 2500 ± 10          |
| Высота, мм     | 2300 ± 10                             | 2300 ± 10              | 2300 ± 10 | 2300 ± 10          |



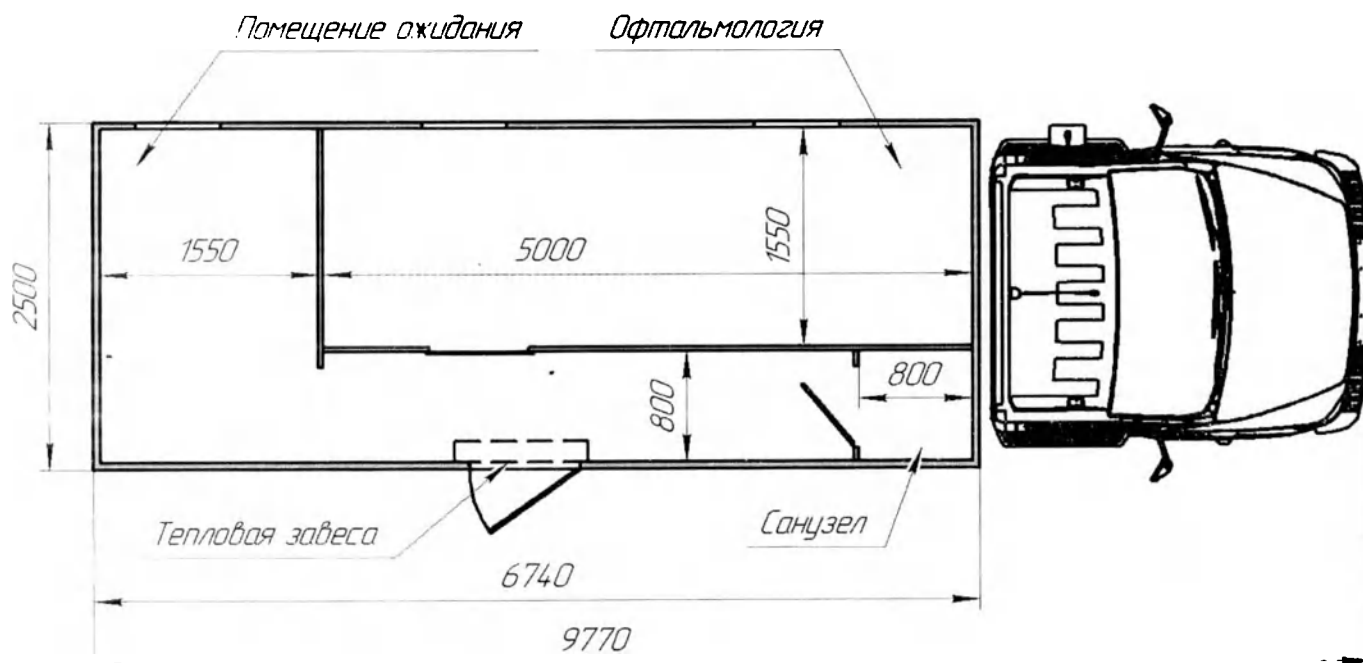


Рисунок Б.8 Комплекса медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Офтальмология», размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

Таблица Б.8 Габаритные размеры фургона и помещений входящих в состав комплекса


| Характеристики | Внутренние габаритные размеры фургона | Кабинет «Офтальмология» | Санузел   | Помещение для ожидания |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|
| Длина, мм      | 6740 ± 10                             | 5000 ± 10               | 800 ± 10  | 1550 ± 10              |
| Ширина, мм     | 2500 ± 10                             | 1550 ± 10               | 800 ± 10  | 2500 ± 10              |
| Высота, мм     | 2300 ± 10                             | 2300 ± 10               | 2300 ± 10 | 2300 ± 10              |

Приложение В  
(справочное)


Схемы расположения медицинского оборудования и мебели в кабинетах

Кабинет «Диагностика»


Для варианта исполнения «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

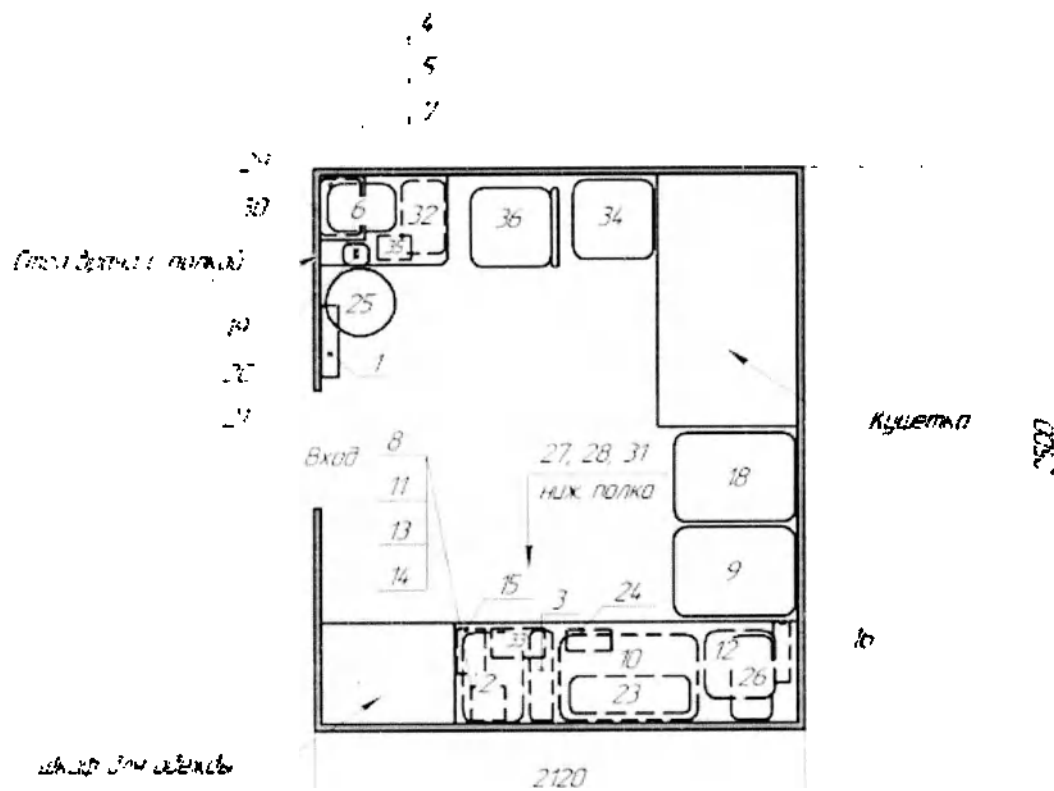

Для варианта исполнения «Диспансеризация» №2, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

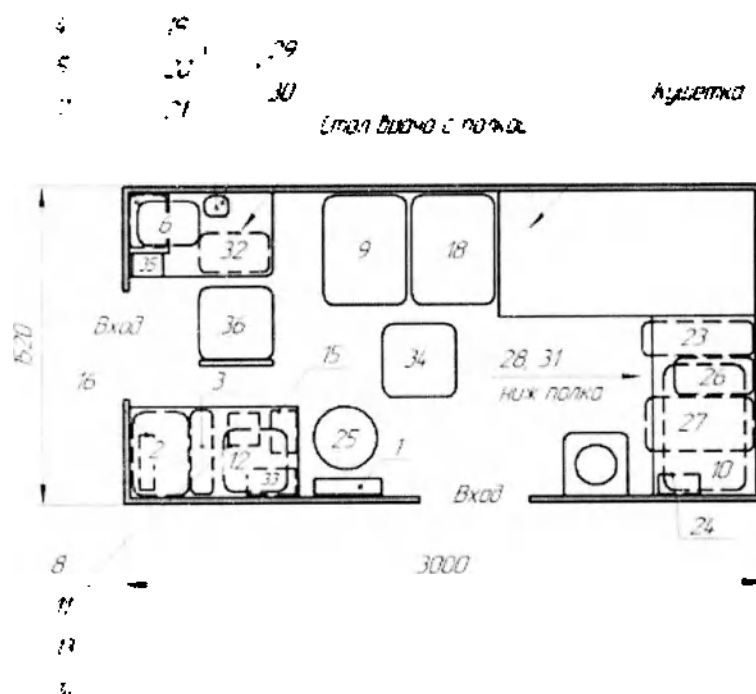

Для варианта исполнения «Профосмотр» исполнение №2, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

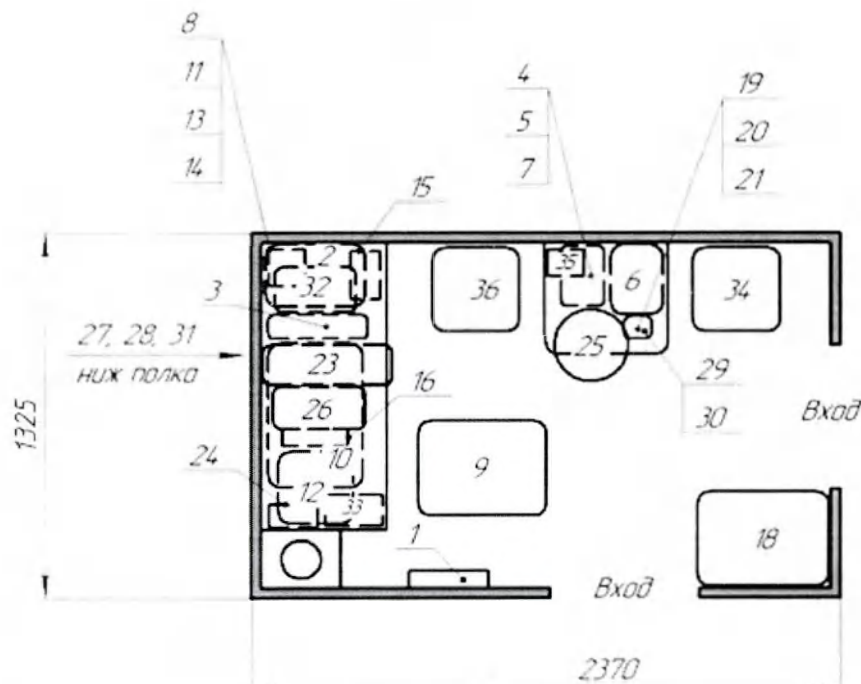

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22, производства ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096 – 1 шт.
2. Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«МЕДИНТ-М» в сумке универсальной СМУ-03 по ТУ 32.50.13-012-18585567-2005, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР 2010/08890 – 1 шт.
3. Изделия для фиксации емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013, вариант исполнения: Штатив разборный для вливаний ИШР-«Медплант», производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № РЗН 2014/1603 – 1 шт.
4. Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д» по ТУ 9441-004-24149103-2003, производства ООО "НПП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2012/13811 – 1 шт.
5. Устройство для определения объема легких Spirotest с принадлежностями, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/08455 – 1 шт.
6. Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания «Прессотахоспирограф ПТС-14П-01» по ТУ 9441-001-82193046-2007, производства ООО "Ланамедика", Россия, РУ № ФСР 2008/02820 – 1 шт.
7. Пульсоксиметр медицинский «Armed», вариант исполнения: УХ300, производство: "Джагсу Юю Медикал Эквипмент энд Саплай Ко, Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461, или Пульсоксиметр напалечный серии MD300C, с принадлежностями, исполнение MD300C12, производства "Бейджинг Чойе Электроник Технолоджи Ко, Лтд", КНР, РУ № ФСЗ 2009/03850, или Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1" с принадлежностями по ТУ 26.60.12-011-18585567-2004, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № РЗН 2013/1343, или Пульсоксиметр РМ-60 с принадлежностями, производства "Шэньчжэнь Майндри Бью-Медикал Электроникс Ко, Лтд", КНР, РУ № ФСЗ 2008/02505, или Пульсоксиметр портативный ПП-01 по ТУ 26.60.12-247-49640047-2018 с принадлежностями, производства ООО Концерн "Аксон", Россия, РУ № РЗН 2020/11229 – 1 шт.
8. Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU), производства OMRON ХЕЛСКОА Ко, Лтд, Япония, РУ № ФСЗ 2009/05423 – 1 шт.
9. Весы настольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения ВМЭН-150-50/100-А, производства ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/09964, или Весы электронные медицинские ВЭМ-150-«Масса-К» по ТУ 4274-017-27450820-2008, вариант исполнения ВЭМ-150-А1 без стойки с одним интервалом взвешивания, производства АО «МАССА-К», Россия, РУ № ФСР 2008/02905 – 1 шт.
10. Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНД-01-«Малыш» по ТУ 4274-02100226454-2002, производство: ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/11958 – 1 шт.
11. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M2 Basic (HEM-7121-ALRU), или M2 Basic (HEM-7121-RU), или M2 Basic (HEM-7121-ARU), или M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), или M3 Family (HEM-7133-ALRU), с принадлежностями, производства OMRON ХЕЛСКОА Ко, Лтд, Япония, РУ № РЗН 2015/3210, или Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M6 (HEM-7322-ALRU), или M2 Eco (ARU), или M2 Plus (ARU), или 737 (HEM-8713-CM), или M2 Eco (RU), производства OMRON ХЕЛСКОА Ко, Лтд, Япония, РУ № РЗН 2016/4995, или Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD с принадлежностями варианты исполнения LD2, или LD3, или LD3a, или LD4, или LD5, или LD8 производства "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд", Сингапур, Далеко зарубежье, РУ № ФСЗ 2012/11647 – 1 шт.
12. Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEF1-B, (M110), производства Метракс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/10093, или Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, варианты исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01; или 2. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02; или 3. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05, производства ООО Концерн "Аксон", Россия, РУ № РЗН 2017/5391, или Монитор-дефибриллятор BeneHeart с принадлежностями, варианты исполнения: BeneHeart D3, или BeneHeart D6, производства "Шэньчжэнь Майндри Бью-Медикал Электроникс Ко, Лтд", КНР, РУ № ФСЗ 2011/10043; или Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями, производства "Филипп Медикал Системс", США, РУ № ФСЗ 2008/02312, или Дефибриллятор ZOLL, модель AED Plus с принадлежностями, производства ZOLL Medical Corporation, США, РУ № РЗН 2014/1903 – 1 шт.

15. Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели реп-соре, ги-соре L, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03905 – 1 компл.
16. Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 2660-005-24149103-2018, вариант исполнения ЭК12Т-01-«Р-Д»/63, МПЦ 30.00.000, производства ООО "НПП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2012/14015, или Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-006-24149103-2010 (ЭК 3Т-01-«Р-Д»/1, МПЦ 34.00.000), производства ООО "НПП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2010/08437, или Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, производства "Фукула Дэиси Ко, Лтд", Япония, РУ № РЗН 2016/4703, или Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 «Аксон», производства ООО Концерн "Аксон", Россия, РУ № ФСР 2007/00454, или Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗЦП-3/6-04 «Аксон» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004, производства ООО Концерн "Аксон", Россия, РУ № ФСР 2008/01874 – 1 шт.
17. Стетоскоп LD с принадлежностями, вариант исполнения: LD Special (длина трубок 72 см), производства "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд", Сингапур, РУ № ФСЗ 2008/01941 – 1 шт.
18. Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РП, производства ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/11607 – 1 шт.
19. Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in, производства Биомедикал Системз Интернэшнл Срд, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072 – 1 шт.
20. Тест-полоски LabStrip U11Plus для проведения анализа мочи, производства "77 Электроника Кфт", Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583 – не более 10 шт.
21. Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А, производства ООО "Биосенсор АП", Россия, РУ № ФСР 2008/02809 – не более 10 шт.
22. Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009, производства ООО «Компания «ЭЛТА», Россия, РУ № ФСР 2009/06498 – 1 шт.
23. Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 по ППДТ 2955.003ТУ, производства ООО «Пневмоприбор», Россия, РУ № ФСР 2010/07081 – 1 шт.
24. Аптечка первой помощи Анти-СПИД - «ВИТАЛФАРМ» по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1 - «ВИТАЛФАРМ», производства ЗАО "Виталфарм", Россия (РЗН 2015/2519) – 1 шт.
25. Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментального и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями, производства ООО "Иноваша", Россия, РУ № РЗН 2014/2254 – 1 шт.
26. Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи ИФСМП-«Мединт-М» по ТУ 9398-006-18585567-2003, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР 2008/02305 – 1 шт.
27. Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ИРСМП-01-«Мединт-М» по ТУ 9437-010-18585567-2004, в трех исполнениях: ИРСМП-01-П, ИРСМП-01-Пм и в сумке из синтетической ткани, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № РЗН 2014/1928 – 1 шт.
28. Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010, исполнение: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П, в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм, в сумке тканевой карманной УМСП-01-С, в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР 2010/07335 – 1 шт.
29. Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005, производства ФГУП "ЦИТО", Россия, РУ № ФСР 2010/07249 – 1 шт.

КМП-И982.00.020 РЗ

Версия 6.0

82

13. Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в комплекте или отдельными упаковками, варианты исполнения: Виск, С-128 Гц, производства Рудольф Ристер ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2010/08456 - 1 шт.

14. Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп п-фетны, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03936 - 1 шт.

30. Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005, производства ООО "Полимерные изделия", Россия, РУ № ФСР 2010/07935 - 1 шт.

31. Аппараты дыхательные ручные АДР-МП1-В, АДР-МП1-Д, АДР-МП1-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-001-52777873-2007, исполнение АДР-МП1-В, производства ООО "МЕДПЛАСТ", Россия, РУ № ФСР 2007/00439 - 1 шт.

32. Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение ВТ-02-1-м 2, (модификация 2), производства ООО "Научно-Медицинская Фирма МБН", Россия, РУ № ФСР 2011/10954 - 1 шт.

33. Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390-2011, производства ООО "Биомедикон", Россия, РУ № ФСР 2011/11116 - 1 шт.

34. Кресло Барана по ТУ 32.50.50-001-61593132-2018, производства ООО "Медтехпром+", Россия, РУ № РЗН 2018/7299 - 1 шт.

35. Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкости-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с кварцем) ЕДПО-1-02-2, производства АО "Елатонский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2009/05373 - 1 шт.


36. Стулья медицинские марки "КМ-Матрикс" по ТУ 9452-008-32494920-2006 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ, стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, стул медицинский стационарный СМС, стул медицинский для врача СМВ, стул медицинский обзорный СМС, стул медицинский стоматологический для врача СМС, стул медицинский стоматологический для ассистента СМС, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ, стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 - 1 шт.

## Рисунок В.1 Кабинет «Диагностика»



## Кабинет «Офтальмология»

Для варианта исполнения «Профосмотр» исполнение №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD и «Офтальмология», размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

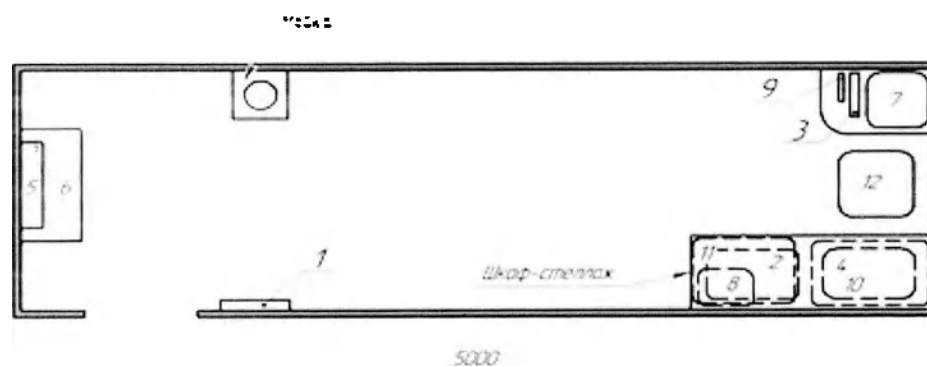

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 12.40.50-004-13760380-2020, вариант исполнения. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22, производства ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096 - 1 шт.
2. Авторефрактометр с принадлежностями, варианты исполнения - HRK-9000A или - HRK-1000A или - HRK-8000A или - HRK-1, производства "Хуангцз Ко., Лтд", Республика Корея, РУ № ФСЗ 2012/12458 или Авторефрактометр RC-5000 с принадлежностями, производства - ТОМЕЙ Корпорейшн, Япония, РУ № РЗН 2015/2726 - 1 шт.
3. Офтальмоскопы портативные по ТУ 9442-005-11555014-2004, В следующих исполнениях: Офтальмоскоп портативный ОФТА-2,5 или Офтальмоскоп портативный ОФТА 3,5, производства ООО "НПО "ЭКОМЕД", Россия, РУ № ФСР 2011/11212 - 1 шт.
4. Бесконтактный тонометр BT-1000 с принадлежностями, производства "Томай ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2008/01687 - 1 шт. - измерение внутриглазного давления через зеркальное око.
5. Проектор знаков экранный офтальмологический ТСП, с принадлежностями, вариант исполнения ТСП-1000 Р, производства Томай ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2010/07992 - 1 шт.
6. Поворотный табурет для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-10454405-2002, производства ООО МРП "Техноартус", Россия, РУ № ФСР 2007/00950 - 1 шт.

7. Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями, производства "Рексам Ко., Лтд", Япония, РУ № РЗН 2016/4151 или Лампа щелевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями, производства "Томай ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2011/11147 - 1 шт.
8. Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-30589405-2002, производства ООО МРП "Техноартус", Россия, РУ № ФСР 2007/00471; или Набор пробных очковых линз "АРМЕД" с оправой на 246, 232, 158, 103, 42, 60 линз, производства "Янгту Ююе Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2008/02071 - 1 шт.
9. Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС 941329.102 ТУ, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № РЗН 2015/2997 - 1 шт.
10. Периметр автоматический офтальмологический AP-3000 с принадлежностями, производства Томай ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/09934 - 1 шт.
11. Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100 "ЦЕРИТЕСТ" по ТУ 9442-002-11432330-2003, производства ИП Гуров Андрей Сергеевич, Россия, РУ № ФСР 2012/13976 - 1 шт.
12. Стулья медицинские марок "KM-Magna" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ, стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ, стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 - 1 шт.


Рисунок В.2 Кабинет «Офтальмология»



## Кабинет «Женское здоровье»


Для варианта исполнения «Диспансеризация» №1,  
размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

Модель

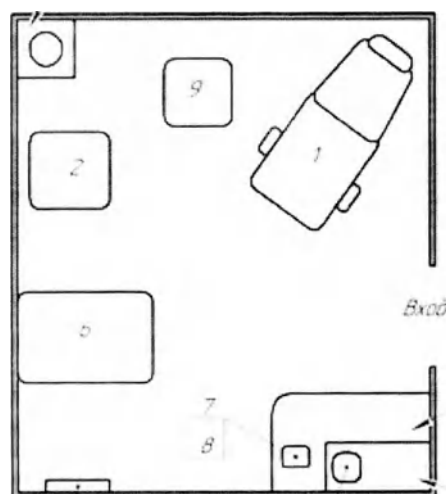

Литра с полноты

Шкаф-стеллаж

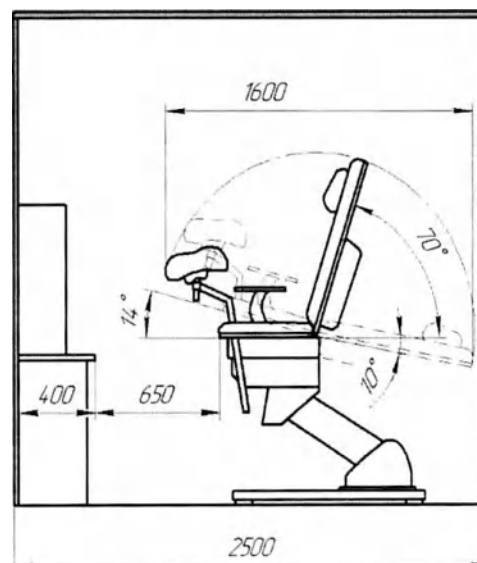

1. Кресла гинекологическо-урологическое "Клер"-КТЭМ по ТУ 9452-003-4365656-2011, исполнение «Клер-КТЭМ-01, производства ООО ТПФ "Клер", Россия, РУ № ФСР 7008-03400 или Кресло гинекологическое с ручным приводом КТ-1 по ТУ 9452-021-07614107-2004, производства АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия, РУ № ФСР 2010-07065; или Кресло гинекологическое КТ-«МСК» по ТУ 9452-018-4200275-2008, в следующих исполнениях: КТ-«МСК» (МСК-409); или КТ-«МСК» (МСК-1409); или КТ-«МСК» (МСК-413); или КТ-«МСК» (МСК-410); или КТ-«МСК» (МСК-415); или КТ-«МСК» (МСК-416); или КТ-«МСК» (МСК-3416); или КТ-«МСК» (МСК-417); или КТ-«МСК» (МСК-3417); или КТ-«МСК» (МСК-418); или КТ-«МСК» (МСК-3418); или КТ-«МСК» (МСК-411); или КТ-«МСК» (МСК-414), производства ООО "Мезастальконструкция", Россия, РУ № ФСР 2008/02743, или Кресло гинекологическое КТ-«Окс-Медик» по ТУ 9452-011-70373441-2008, производства ООО "Производственное предприятие Ока-Медик", Россия, РУ № ФСР 2009/04054, или Кресло гинекологическое универсальное КТУ-01 VLANA по ТУ 9452-002-91587818-2013 с принадлежностями в вариантах исполнения: КТУ-01.1 VLANA, или КТУ-01.2 VLANA, или КТУ-01.3 VLANA, производства ООО "Горское", Россия, РУ № РЗН 2013/2876 - 1 шт.
2. Кабинет КТ-01 по ТУ 9452-001-52132018-2003, производства ООО "Здоровый Мир", Россия, РУ № РЗН 2013/733 - 1 шт.
3. Обучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, (ОВУ-22, ОВУ-21 по ТУ 32 50 50-04-11760586-2020, вариант исполнения, Обучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22, производства ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096 - 1 шт.
4. Пациент гинекологический симулятор однократный стационарный "Ева" по ТУ 9437-045-14942795-2009, производства ООО "Полимерные изделия", Россия, РУ ФСР 2010/07047 - 1 шт.
5. Стетоскоп акушерский дерматный Сад «М-МН3» по ТУ 9398-093-07613473-2003, производства ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", Россия, РУ ФСР 2017/00767 - 1 шт.

6. Прибор ультразвуковой диагностический с принадлежностями, варианты исполнения: DUS 3, DUS 6, DUS 8, DUS 60, U50, исполнение. DUS 60, производства "Эдан Инструментс, Инк", Китай, РУ ФСР 2011/10381 - 1 шт.
7. Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкости-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2009/05373 - 1 шт.
8. Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение. Емкости-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовый 1,5 л - "РЕСПЕКТ" по ТУ 9398-002-13014251-2012, производства ООО "ГК "Роспект", Россия, РУ № РЗН 2013/1080 - 1 шт.
9. Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22 22 14-001-21109963-2017 с принадлежностями, производства ООО "Ининовация", Россия, РУ № РЗН 2014/2254 - 1 шт.
10. Стулья медицинские марки "КМ-Малма" по ТУ 9452-008-32494920-2006 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ, стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 - 1 шт.

Рисунок В.3 Кабинет «Женское здоровье»



9452-033-48779198-2001, исполнение НТС-300-05-M4, производства ООО "ВХ-Тайфун", RU № ФСР 2010/05373 - 1 шт.

15. Наконечник для микроинструмента прямой ННМ-40-02 по ТУ 9452-084-05519088-2002, производства АО "Казанский медико-инструментальный завод", Россия, RU № ФСР 2011/00110 - 1 шт.

16. Наконечник для микроинструмента прямой ННМ-40 с микроотверстием по ТУ 9452-084-05519088-2002, производства АО "Казанский медико-инструментальный завод", Россия, RU № ФСР 2011-00011 - 1 шт.

17. Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклокерамическим шариком СС-1 "ТермоJet" по ТУ 9451-001-56755207-2005, вариант исполнения "ТермоJet" с комплектом шариков (с кластерным наполнителем), производства АО "Тексиф Дент", Россия, RU № ФСР 2010-08560 - 1 шт.

18. Емкость контейнера полимерная для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Бюксы-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия, RU № ФСР 2009/05373 - 1 шт.

250-5 «ПОЗИС» 9, ХФ-400-2 «ПОЗИС» 10, ХФ-400-3 «ПОЗИС» 11, ХФ-400-4 «ПОЗИС» 12, ХФ-400-4 «ПОЗИС», модель ХФ-140 "ПОЗИС", производства АО "ПОЗИС", Россия, RU № ФСР 2009/05705 - 1 шт.

29. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50.004.13760586-2020, вариант исполнения. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22, производства ООО "РЭМО-Технологии", Россия, RU № РЭН 2023/20096 - 1 шт.

30. Стулья медицинские марки "KM-Magica" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская меттехника, Россия, RU № ФСР 2008/03973 - 1 шт.

31. Аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable, модель VEX-R300 с принадлежностями, производства "BATEK Co., Ltd", Korea, RU № РЭН 2020/9794 - 1 шт.

32. Аппарат обработки интрависальных изображений EzSenslog, варианты исполнения 1. Аппарат обработки интрависальных изображений EzSenslog Classic, модель IOS-U101B, производства "Рэйенс Ко., Лтд", Korea, RU № РЭН 2022/17045 или Аппарат радиоэнцефалографический EzSenslog с принадлежностями, производства "Рэйенс Ко., Лтд", Korea, RU № ФСР 2011/11400 - 1 шт.

33. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЭИ-Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фарфуг защитный стоматологический ФРЗС-«Р-К», производства ООО "СПЕЦИМЕДПРИБОР", Россия, RU № ФСР 2010/08183 - 1 шт.


34. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЭИ-Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фарфуг защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К», производства ООО "СПЕЦИМЕДПРИБОР", Россия, RU № ФСР 2010/08183 - 1 шт.

## Рисунок В.4 Кабинет «Стоматология»


### Кабинет «Лаборатория»

Для варианта исполнения «Профосмотр» исполнение №3,  
размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD


Для варианта исполнения «Диспансеризация» №2,  
размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

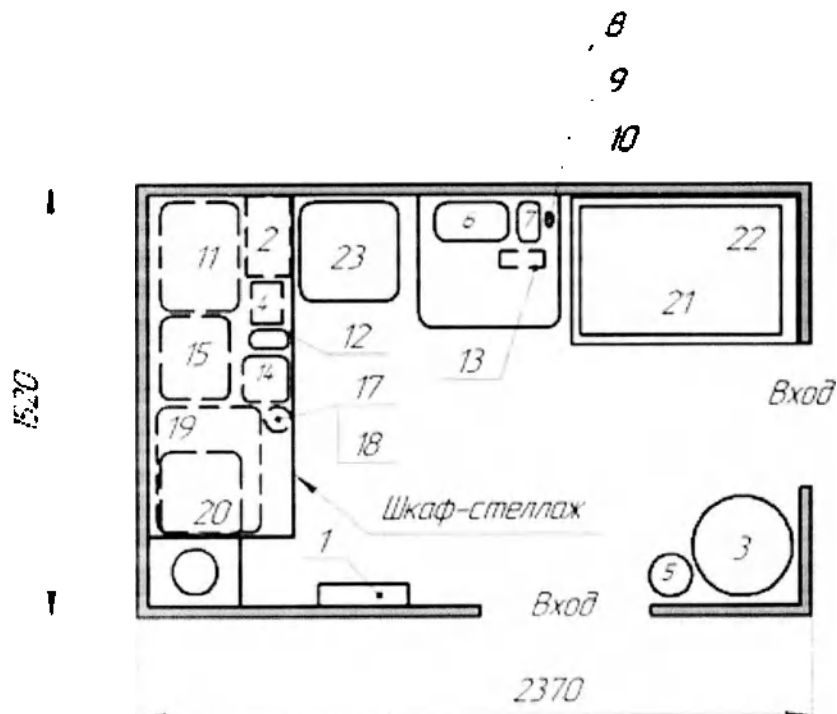


Для варианта исполнения «Профосмотр» исполнение №3,  
размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

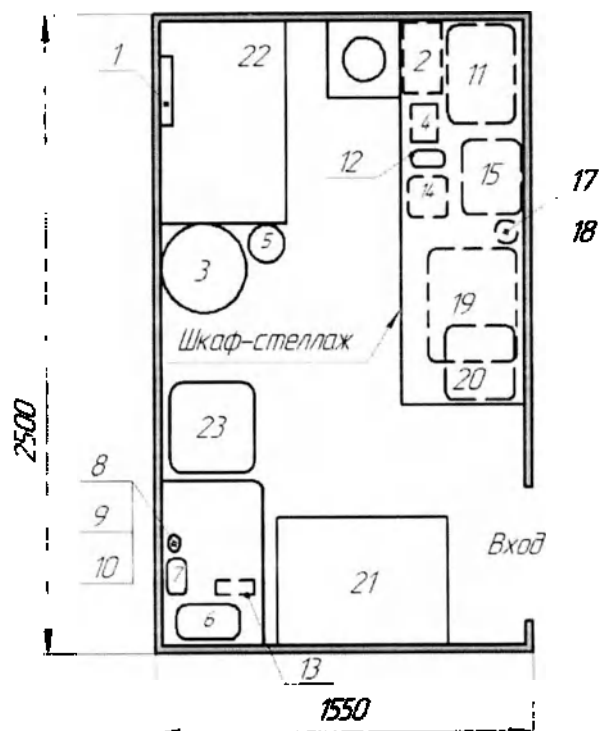

Для варианта исполнения «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)

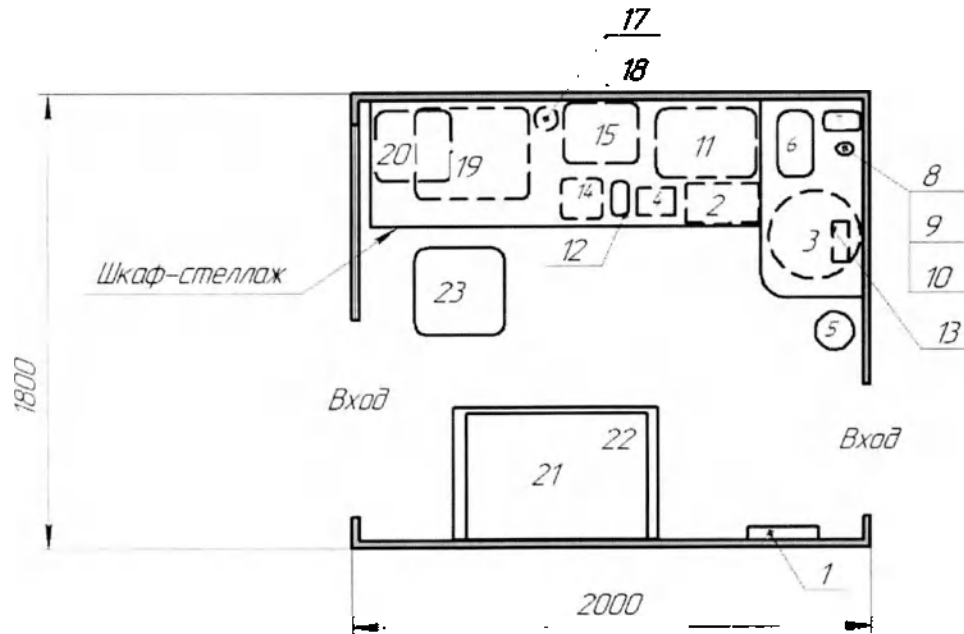

Для варианта исполнения «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-В-1767KD

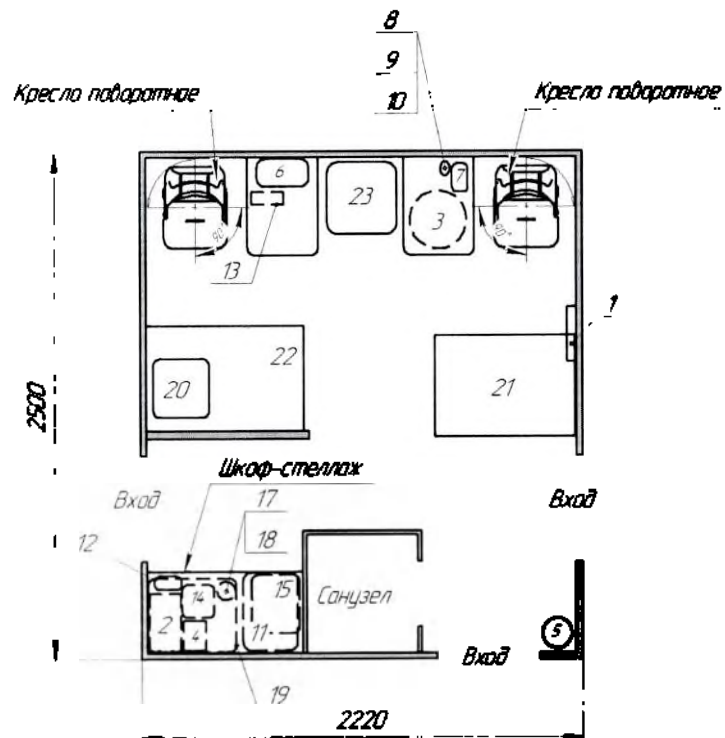[illegible]

репаркитатор электрический механический автоматический ОВУ-22, производства ООО "РЭНТехнологии" Россия РЧ № РН1702329086 1шт

Классификация полимерных и перфторполимерных изделий и изделий для термостатической обработки химической дефениции на термостабильных медицинских изделий КДС «КРОНТ» по РУ 4431.009.117444-20-2011 в следующих исполнениях: КДС-1, КДС-2, КДС-3, КДС-4, КДС-4-1К, КДС-4-2К, КДС-10, КДС-11, КДС-20, КДС-30, КДС-35, КДС-40, КДС-42, исполнение КДС-1, производства АО «КРОНТ-М», Россия РУ 40 ФДСР 2009.06144 - 1 шт

3. Инвентаризационные для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, остроинструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, I по ТВ 22 32 34-001-21 (04465-5) 2017 г. принадлежность ООО "Иммунити".  
Ростов: РХ № РРН 2014-2254 3 шт.

4. Искусственные материалы, используемые для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий, в т.ч. ДДХ (№ ГН 748) и «МДХ» (№ 749) с присадочными компонентами. Данные дезинфицирующего (антисептического) (антисептический) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (используя в качестве) ЕДН 10-102-2, присвоенная АИТ «Евразийский патентный кластер» России № ФСР 2009/05373 - 1 шт.

© 2012 ООО «ИП «СЭП». Все права защищены. Любое использование материалов без письменного разрешения ООО «ИП «СЭП» запрещено.

13 Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с оптической дискриминацией для применения ПК1-03 «АТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПК1-03 «АТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-00478939528-2009, производитель ООО «Компания «ЭЛ-ТА», Россия. РУ № ФГР 200404449 - 1 шт.

14 Система для измерения уровня гемоглобина HemoControl с принадлежностями производится "ЕКФ-диагностик ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2008/02911 - 1 шт

15. Анализаторы мочи CL-50 Plus с принадлежностями, производства "Хай Текнолоджиз, Инк.", США, РУ № РЗН 2016/3986 - 3 шт.

16. Пробірки для взяття крові "Проба", варіант виконання. Пробірки з активатором згортання, виробництва "Ченгду Рич Сайєнс Індустрі Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2010/06301 - 1 компл.

17. Пробирки вакуумные МиниМед по ТУ 32.50.50-024-29506133-2017, вариант исполнения 1. Пробирки вакуумные с К23ДТА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл 2. Пробирки вакуумные с К23ДТА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4

мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл 3 Пробирик вакуумные с КЭЗД4 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл 4 Пробирик вакуумные с КЭЗД4 и раздельным лезвием 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл 5 Пробирик вакуумные с шприцом натрия 3,2% 1,8 мл, 2,7 мл, 3,6 мл, 4,5 мл, 5,4 мл, 6 мл. Пробирик вакуумные с шприцом натрия 3,8% 1,8 мл, 2,7 мл, 3,6 мл, 4,5 мл, 5,4 мл 6 Пробирик вакуумные с лезвием гепаринном 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл 7 Пробирик вакуумные с натрия гепаринном 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл 8 Пробирик вакуумные без



Бюксеты, контейнер для сбора острого инструментария и механических отходов класса Б и В, оприходованная СЗ в "РЕСЦЕКТ" по ТУ 9452-002-1014251-2012, производства ООО "ГК "Ресурс", Россия, РУ № РЭН 2013/1089 - 1 шт.

6. Штатив для пробирок универсальный ШНУ "КРНИТ" по ТУ 9452-037-11769436-2010, производства АО "КРНИТ-М", Россия, РУ № ФЭР 2011/10034 - 1 шт., или Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПЛПП по ТУ 9452-156-05519988-2006 в варианте исполнения 1 Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПЛПП-10, или 2 Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПЛПП-20, или 3 Штатив лабораторный полимерный для пробирок ПЛПП-40, производства ООО "Полимерные системы", Россия, РУ № ФЭР 2011/1083 - 1 комплект.

7. Анализатор крови биохимический портативный, модели CardioCheck, CardioCheck PA, с принадлежностями, модели CardioCheck PA, производства "Полимер Технолоджи Системс, Инк.", США, РУ № РЭН 2015/2093 - 3 шт.

8. Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения BlueGate, multiGate, с принадлежностями, исполнение multiGate-1a, производства Биохимикал Системс Интернационал Спр, Италия, РУ № ФЭР 2011/10072 - 1 шт.

9. Тест-полоски LabStrip С11Plus для проведения анализа мочи, производства "27 Laboratories Ltd", Бразилия, РУ № ФЭР 2010/07583 - не более 10 шт.

10. Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы, билирубина, кетонургии, лейкоцитов, нитритов, кетонургии, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполан-ХН по ТУ 212023-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, билирубина, кетонургии, лейкоцитов, нитритов, кетонургии, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполан-11А, производства ООО "Биосенсор", Россия, РУ № ФЭР 2010/07583 - не более 10 шт.

11. Анализатор кислотности основного равновесия крови СИ-60 по ТУ 9453-003-42980704-2003, производства ООО "Научно-производственное предприятие Кверти-Мед", Россия, РУ № ФЭР 2009/00162 - 1 шт.

12. Экспресс-анализатор Ку,Лабе Электромтр ("qLabs ElectroMeter"), исполнение Ку,Лабе Электромтр ("qLabs ElectroMeter"), производства "Микрополит Биотехнологиз", Россия, РУ № РЭН 2016/3832 - 1 шт.

наполнителя 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 10. Пробирки вакуумные с разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 11. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл. 12. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) и разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл., производства ООО "МиниМед", Россия, РУ № РЭН 2019/8175 - 1 комплект.

18. Посуда для лабораторных исследований из полимерных материалов вариант исполнения наконечники универсальные для дозаторов объемом 0,2-5мл, 0,5-10мл, 20мл, 30мл, 200мл, 250мл, 300мл, 1000мл, 5мл, 10мл, рассыпные и в штативах. Пробирки полимерные лабораторные, в том числе с сепараторами и антиконмогаторами, зондами и транспортными средами. Контейнеры лабораторные для взятия проб. Чашки Петри и лоты для анализаторов, Коробки, пиллиметы и слайды лабораторные. Пробирки винтовые, конические и с основанием, объемом 0,5мл, 1,5мл, 2мл, 5мл, 7,5мл, 10мл, 15мл, 50мл. Винтовые крышки с прокладками и без прокладок для пробирок и контейнеров. Петли микробиологические и зонды Штиты для крашения и замораживания пробирок, криопробирок, объемом 0,2-50мл. Пипетки серологические и для переноса, производства Ф.Л. Медикал с.р.л., Италия, РУ № ФЭР 2011/09735 - 1 комплект.

19. Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения MicroCC-20Plus, производства "Хай Текнолоджи, Инк.", США, РУ № ФЭР 2010/07736 - 1 шт.

20. Центрифуга лабораторная механическая настольная "Alpmed", производства "Зенит Лаб (Цинсу) Ко., Лтд", Китай, РУ № РЭН 2020/10939 - 1 шт.

21. Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель ГП-10 МО, производства АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия, РУ № ФЭР 2011/10267, или Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение ГП-20 СПУ, производства ОАО "Смоленское СКБ СПУ", Россия, РУ № ФЭР 2010/07332 - 1 шт.

22. Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующие модели: 1. ХФ-140-1 «ЮЗИС» 2. ХФ-140-1 «ЮЗИС» 3. ХФ-140-2 «ЮЗИС» 4. ХФ-140-3 «ЮЗИС» 5. ХФ-250-2 «ЮЗИС» 6. ХФ-250-3 «ЮЗИС» 7. ХФ-250-4 «ЮЗИС» 8. ХФ-250-5 «ЮЗИС» 9. ХФ-400-2 «ЮЗИС» 10. ХФ-400-3 «ЮЗИС» 11. ХФ-400-4 «ЮЗИС» 12. ХФ-400-5 «ЮЗИС», модель ХФ-140 «ЮЗИС», производства АО "ЮЗИС", Россия, РУ № ФЭР 2009/05705 - 1 шт.

23. Стулья медицинские марки "ЮМ-Медиа" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ, стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ, стул медицинский секционный СМС, стул медицинский стоматологический для врача СМСв, стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения стул медицинский лабораторный СМ, стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФЭР 2008/03973 - 8 шт.

## Рисунок В.5 Кабинет «Лаборатория»

# Приложение Г

Схема, габаритные размеры и масса мебели входящей в состав комплекса

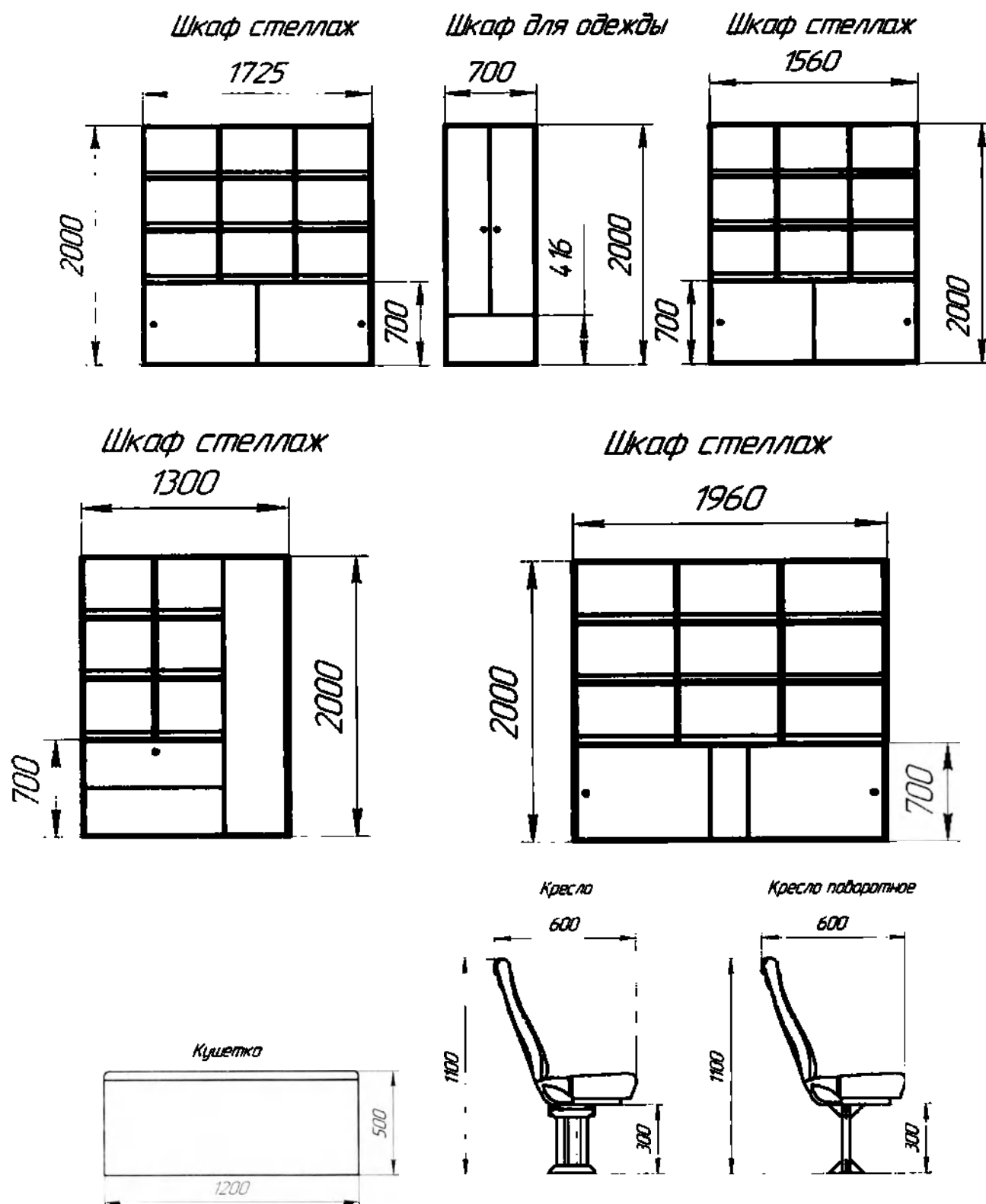


Таблица Г.1 Габаритные размеры и масса мебели входящей в состав комплекса.

| Характеристики         | Шкаф стеллаж |           |           |           | Шкаф для одежды | Кушетка   | Кресло    | Кресло поворотное |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| Габаритные размеры, мм | 2000 ± 10    | 2000 ± 10 | 2000 ± 10 | 2000 ± 10 | 2000 ± 10       | 500 ± 10  | 1100 ± 10 | 1100 ± 10         |
| - высота               | 1725 ± 10    | 1560 ± 10 | 1300 ± 10 | 1960 ± 10 | 700 ± 10        | 1200 ± 10 | 600 ± 10  | 600 ± 10          |
| - ширина               |              |           |           |           |                 |           |           |                   |

|                       |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - глубина             | 500 ± 10 | 400 ± 10 | 400 ± 10 | 600 ± 10 | 400 ± 10 | 400 ± 10 | 420 ± 10 | 420 ± 10 |
| -высота нижнего ящика | 700 ± 10 | 700 ± 10 | 700 ± 10 | 700 ± 10 | 416 ± 10 | -        | -        | -        |
| Масса (± 5%), кг      | 40± 5%   | 35± 5%   | 30± 5%   | 45± 5%   | 20± 5%   | 13± 5%   | 30± 5%   | 35± 5%   |

Приложение Д  
(справочное)  
**Схемы электрические принципиальные**  
Схема электрическая принципиальная

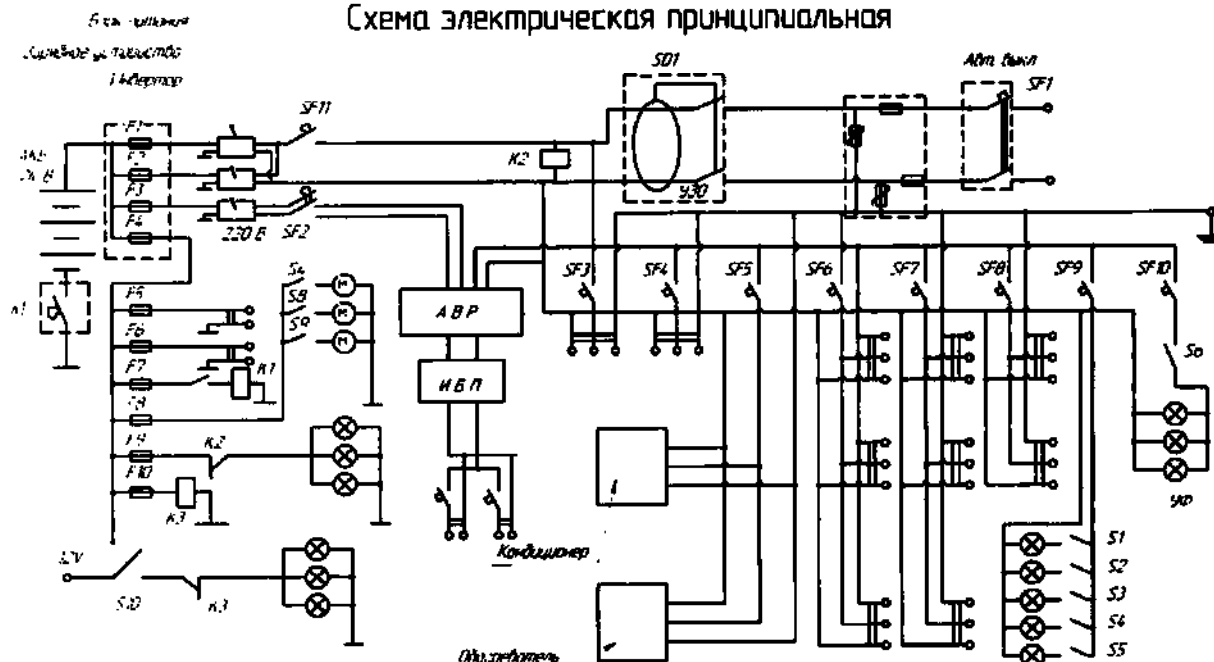


Рисунок Д.1 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» вариант исполнения: «Диспансеризация» №1, №2 и №3.

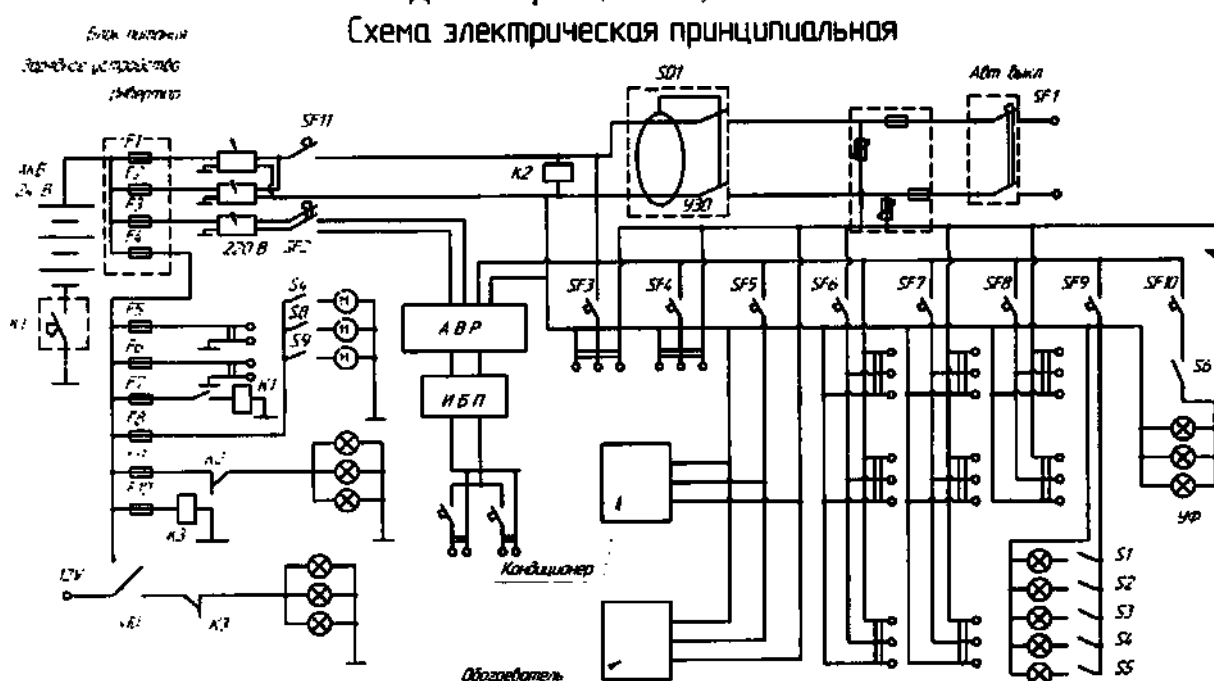


Рисунок Д.2 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Профоскоп» исполнение №1, №2 и №3.

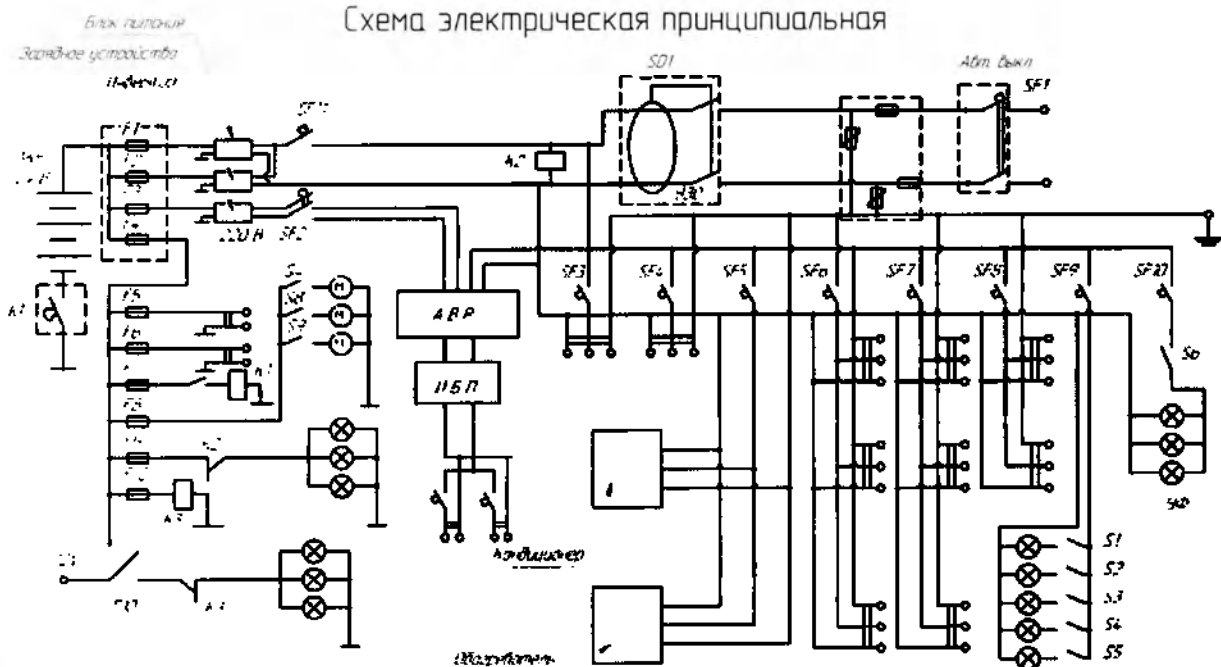


Рисунок Д.3 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения:  
«Стоматология».

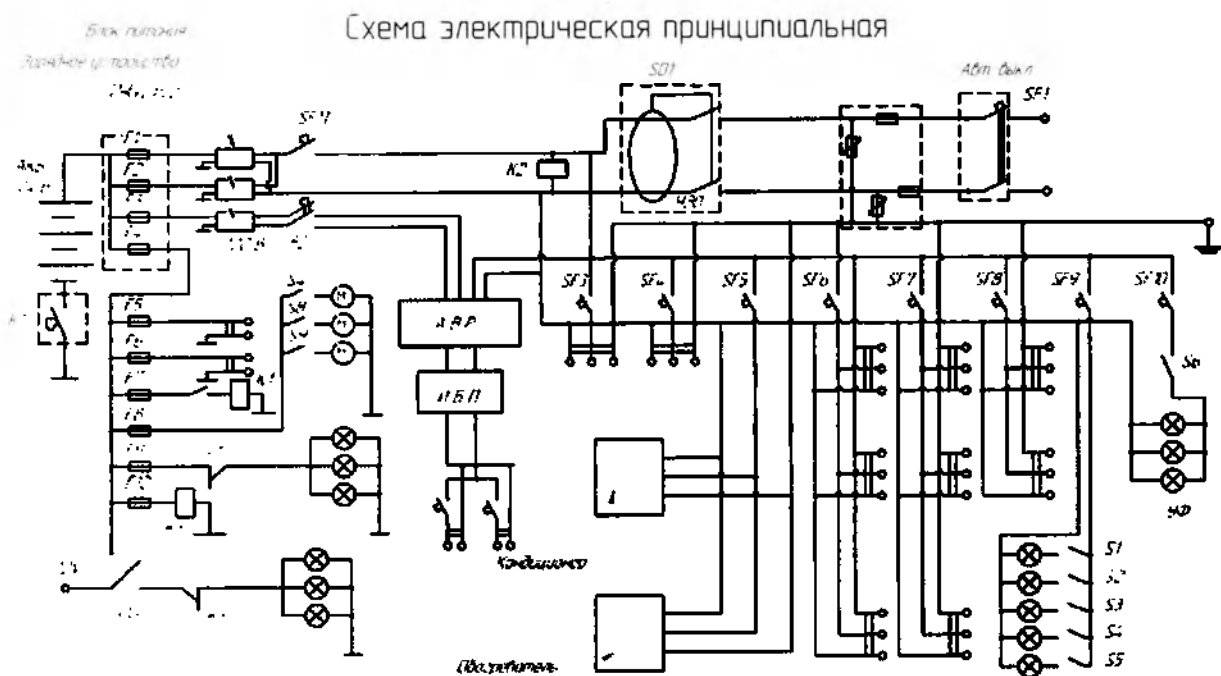


Рисунок Д.4 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения:  
«Офтальмология».



**Приложение Ж**  
(справочное)

**Схемы расположения электрического оборудования(розеток)**

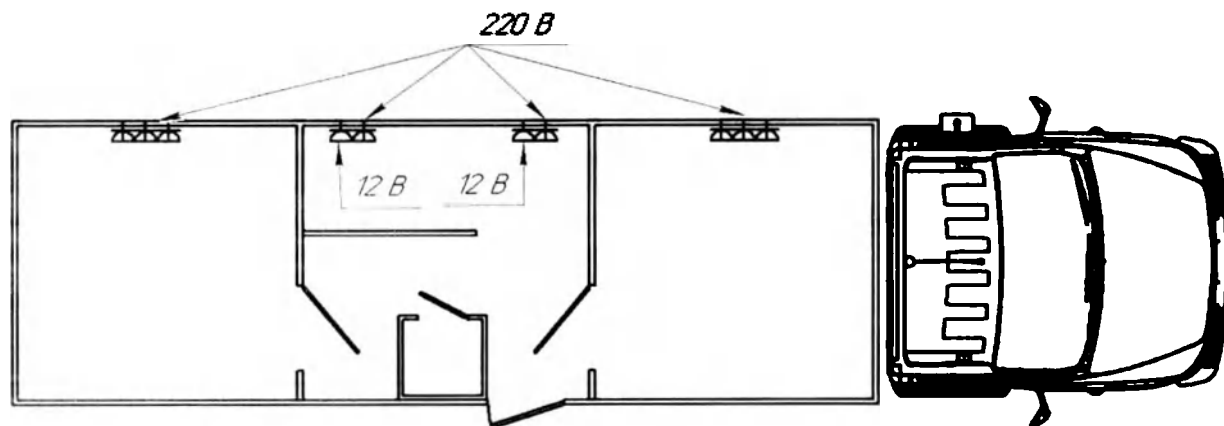


Рисунок Ж.1 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Диспансеризация» № 1, «Профосмотр» исполнение №2, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

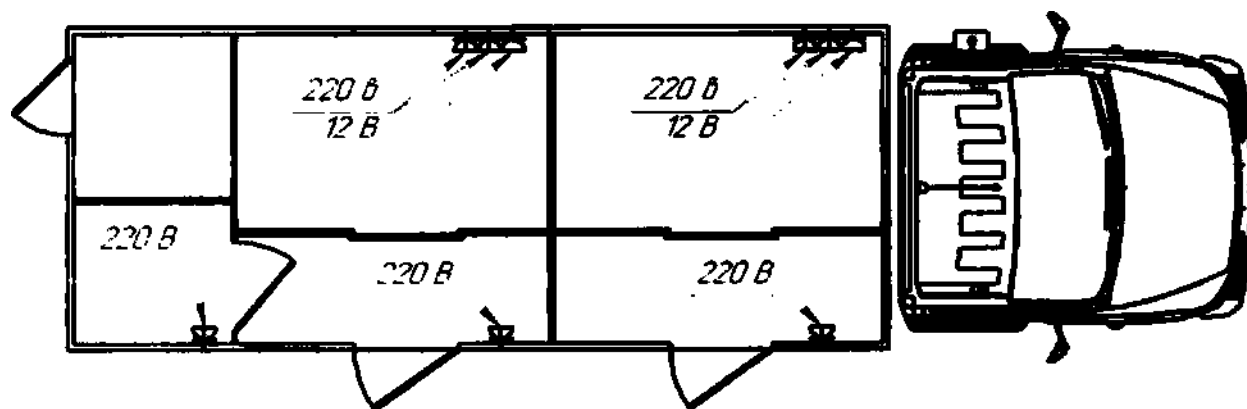


Рисунок Ж.2 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Диспансеризация» № 2, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

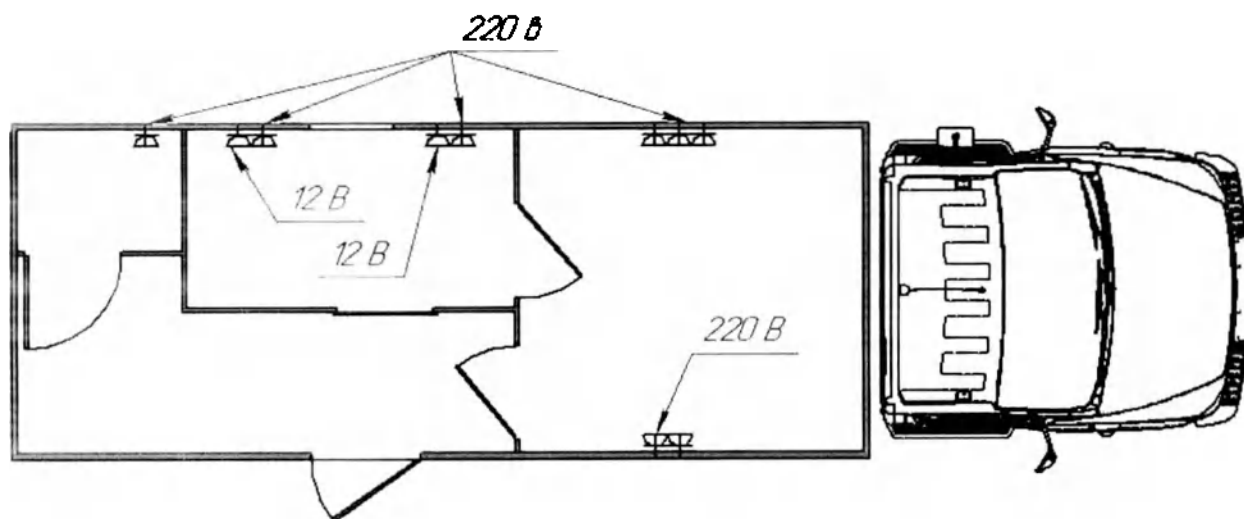


Рисунок Ж.3 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Профосмотр» исполнение №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

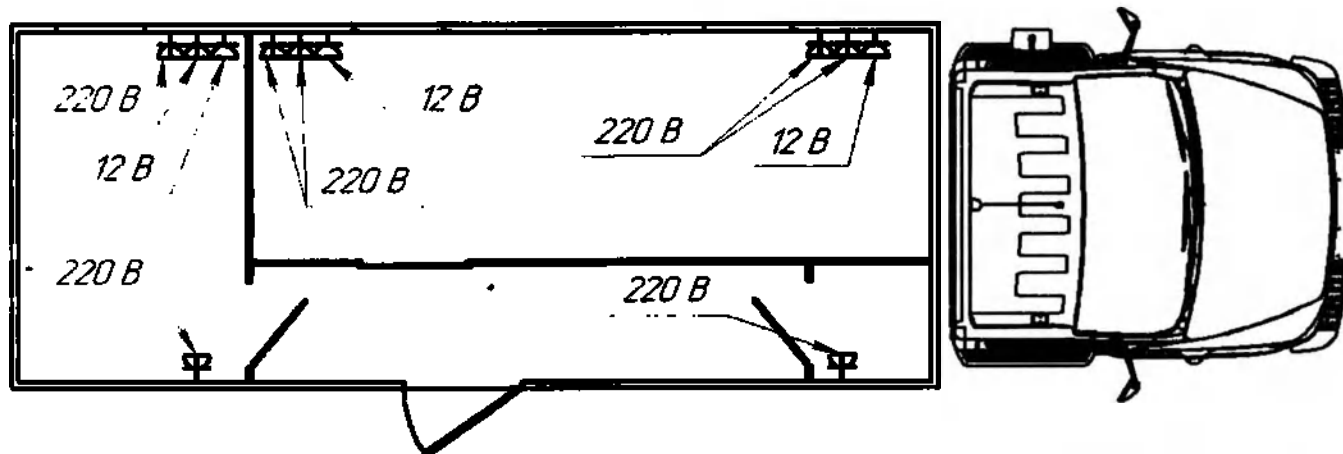


Рисунок Ж.4 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Профосмотр» исполнение №3, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

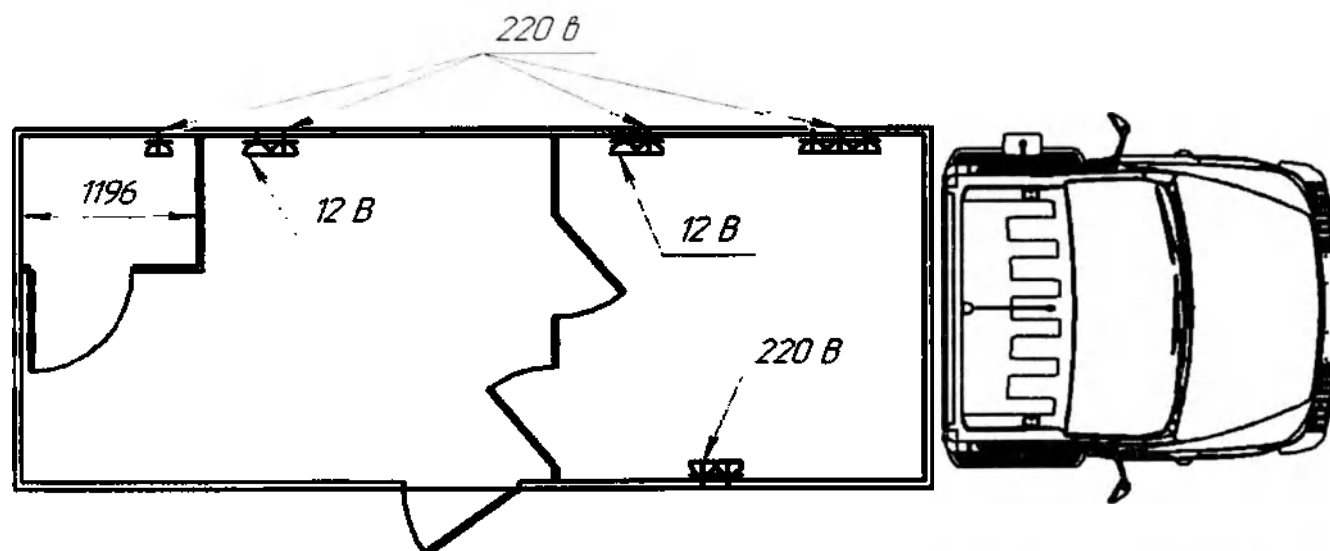


Рисунок Ж.5 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Стоматология», размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

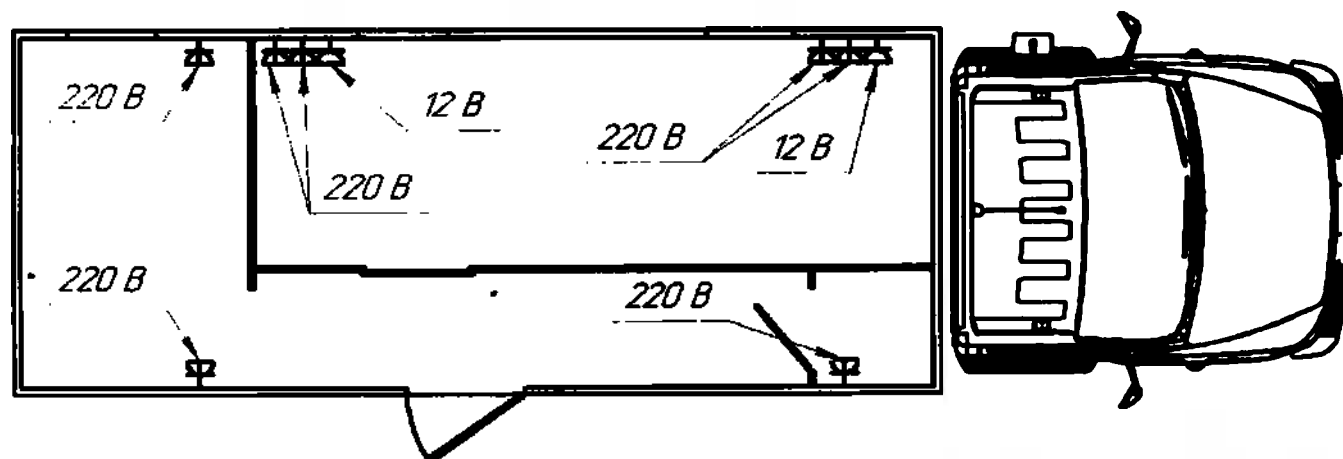


Рисунок Ж.6 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Офтальмология», размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD

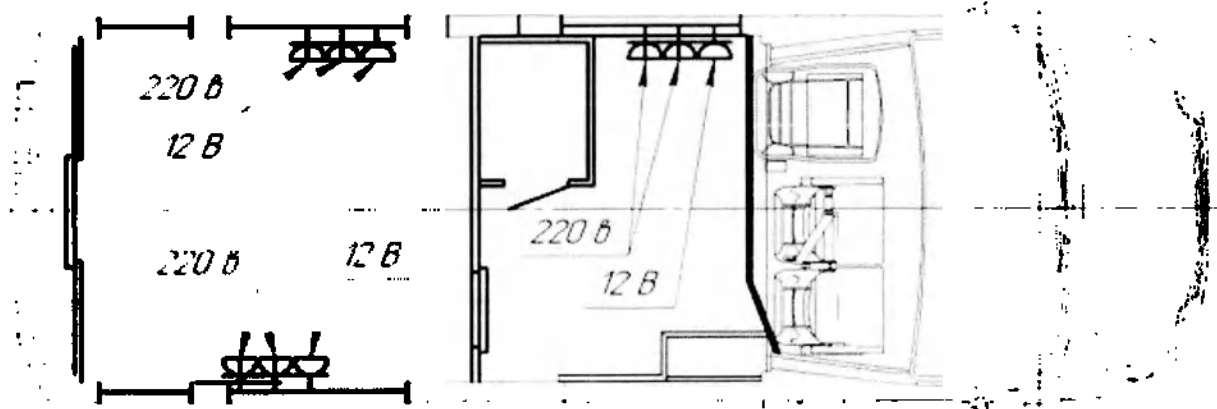


Рисунок Ж.7 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», вариант исполнения: «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ – 1767М9(тип А, тип А6)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

| Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><i>Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767KD</i> предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020, исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767KD</i> следует обеспечить её применение в указанной обстановке</p> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Испытание на электромагнитную эмиссию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соответствие              | Электромагнитная обстановка - указания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Радиопомехи по СИСТР II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Группа I                  | <p><i>Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767KD</i> использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Радиопомехи по СИСТР II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Класс Б                   | <p><i>Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767KD</i> для применения в любых местах размещения, кроме жилых домов и зданий,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Гармонические составляющие тока по МЭК 61000-3-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Класс А                   | <p>непосредственно подключенных к распределительной электрической сети, питающей жилые дома. Могут быть применены в жилых домах и зданиях, непосредственно подключенных к распределительной электрической сети, питающей жилые дома, при наличии следующего предупреждения:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Колебания напряжения и фликер по МЭК 61000-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соответствует требованиям | <p>Предупреждение. Настоящее оборудование/ система предназначены для применения исключительно профессионалами в области здравоохранения. Настоящее оборудование/система могут вызвать ухудшение приема радиосигналов и нарушить работу оборудования, расположенного поблизости. В этом случае может быть необходимым принять меры для снижения помех, такие как изменение ориентации, смена места размещения <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, состоит из кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Женское здоровье». Размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767KD</i> или экранирование места размещения</p> |  |

| Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| <p><i>Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767KD</i> предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767KD</i> следует обеспечить её применение в указанной обстановке</p> |                                    |                      |                                        |
| Испытание на помехоустойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Испытательный уровень по МЭК 60601 | Уровень соответствия | Электромагнитная обстановка - указания |
| Электростатические разряды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ±6 кВ контактный                   | ±6 кВ                | Пол в помещении из дерева, бетона или  |

|                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ЭСР) по МЭК 61000-4-2                                                                        | разряд                                                                                                  | контактный разряд                                                                                         | керамической плитки. При полах, покрытых синтетическим материалом, относительная влажность воздуха - не менее 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               | +8 кВ воздушный разряд                                                                                  | ±8 кВ воздушный разряд                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4                                              | ±2 кВ для линий электропитания<br><br>±1 кВ - для линий ввода/вывода                                    | ±2 кВ для линий электропитания<br><br>Не применимо                                                        | Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5                             | ±1 кВ - при подаче помех по схеме «провод-провод»<br><br>±2 кВ при подаче помех по схеме «провод-земля» | ±1 кВ - при подаче помех по схеме «провод-провод»<br><br>±2 кВ - при подаче помех по схеме «провод-земля» | Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Провалы, прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11 | <5% $U_n$ (провал напряжения >95% $U_n$ ) в течение 0,5 периода                                         | <5% $U_n$ (провал напряжения >95% $U_n$ ) в течение 0,5 периода                                           | Качество электрической энергии в сети - в соответствии с типичными условиями коммерческой или больницы обстановки. Если пользователю <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD</i> необходимо обеспечить непрерывную работу в условиях возможных прерываний сетевого напряжения, рекомендуется питание <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767KD</i> осуществлять от источника бесперебойного питания или батарей |
|                                                                                               | 40% $U_n$ (провал напряжения 60% $U_n$ ) в течение пяти периодов                                        | 40% $U_n$ (провал напряжения 60% $U_n$ ) в течение пяти периодов                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                               | 70% $U_n$ (провал напряжения 30% $U_n$ ) в течение 25 периодов                                          | 70% $U_n$ (провал напряжения 30% $U_n$ ) в течение 25 периодов                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                               | <5% $U_n$ (провал напряжения >95% $U_n$ ) в течение 5 с)                                                | <5% $U_n$ (провал напряжения >95% $U_n$ ) в течение 5 с)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) по МЭК 61000-4-8                               | 3 А/м                                                                                                   | 3 А/м                                                                                                     | Уровни магнитного поля промышленной частоты следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больницы обстановки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Примечание: $U_n$ - напряжение сети переменного тока до применения испытательного уровня      |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Дистансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767КД предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Дистансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767КД следует обеспечить её применение в указанной обстановке |                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Испытание на помехоустойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Испытательный уровень по МЭК 60601                             | Уровень соответствия | Электромагнитная обстановка - указания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по МЭК 61000-4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3В (среднеквадратичное значение) в полосе от 150 кГц до 80 МГц | 3 В                  | Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом пользователю Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Дистансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767КД включая кабели, не должно быть меньше рекомендуемого расстояния, рассчитанного по формуле, применимой к частоте передатчика.<br><br>Рекомендуемый пространственный разнос:<br>$d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$<br><br>$d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$ от 80 МГц до 800 МГц<br>$d = 2,3 \cdot \sqrt{P}$ от 800 МГц до 2,5 ГГц,<br>где $d$ — рекомендуемый пространственный разнос, м <sup>0</sup> ;<br>$P$ — номинальное значение максимальной выходной мощности в Вт в соответствии со значением, установленным изготовителем. |
| Радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 В/м в полосе от 80 МГц до 2,5 ГГц                            | 3 В/м                | <b>ВНИМАНИЕ:</b> Портативное радиочастотное оборудование связи (включая периферийные устройства, такие как антенные кабели и внешние антенны) необходимо устанавливать не ближе 30 см к любой части пользователю Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Дистансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767КД, включая кабели, указанные производителем. В противном случае, могут быть сбои в работе оборудования.<br><br>Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | <p>результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой<sup>а)</sup> должна быть ниже уровня соответствия в каждой полосе частот<sup>б)</sup>.</p> <p>Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком:</p>  |
| <p>а) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767КД</i> превышают применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767КД</i> с целью проверки их нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767КД</i>. Уровни соответствия требованиям помехоустойчивости в диапазонах частот, выделенных для ПИМ ВЧ устройств в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц, а также уровни в полосе частот от 80 МГц до 2,5 ГГц предназначаются для уменьшения вероятности того, что мобильные портативные радиотелефонные системы связи могут стать причиной нарушения функционирования, если они непреднамеренно оказываются расположенными в зоне пациента. Для этого при расчетах рекомендуемого разнеса для передатчиков, работающих в этих полосах частот, используется дополнительный коэффициент 10/3.</p> <p>б) Вне полосы от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем 3 В/м.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 1: На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 2: Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.</p> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Рекомендуемые значения пространственного разнosa между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и *Комплексом медицинским передвижным «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767КД*

*Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767КД* предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь *Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767КД* может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и *Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №1, размещается в автомобиле-фургоне ИАЦ-В-1767КД*, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи

| Номинальная<br>максимальная<br>выходная мощность<br>передатчика Р, Вт | Пространственный разнос d, м, в зависимости от частоты передатчика |                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                       | $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$<br>в полосе от 150 кГц до 80<br>МГц       | $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$<br>в полосе от 80 до 800 МГц | $d = 2,3 \cdot \sqrt{P}$<br>в полосе от 800 МГц до 2,5<br>ГГц |
| 0,01                                                                  | 0,12                                                               | 0,12                                                  | 0,23                                                          |
| 0,1                                                                   | 0,38                                                               | 0,38                                                  | 0,73                                                          |
| 1                                                                     | 1,2                                                                | 1,2                                                   | 2,3                                                           |
| 10                                                                    | 3,8                                                                | 3,8                                                   | 7,3                                                           |
| 100                                                                   | 12                                                                 | 12                                                    | 23                                                            |

Примечания

1. Для 80 и 800 МГц применяют разделительное расстояние для более высокого диапазона частоты.
2. При определении рекомендуемых значений пространственного разнosa для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.
3. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

| Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6) предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020, исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6) следует обеспечить с/ применение в указанной обстановке</i></p> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Испытание на электромагнитную эмиссию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Соответствие              | Электромагнитная обстановка - указания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Радиопомехи по СИСПР 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Группа 1                  | <p><i>Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6) использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Радиопомехи по СИСПР 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Класс Б                   | <p><i>Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6) для применения в любых местах размещения, кроме жилых домов и зданий, непосредственно подключенных к распределительной электрической сети, питающей жилые дома. Могут быть применены в жилых домах и зданиях, непосредственно подключенных к распределительной электрической сети, питающей жилые дома, при наличии следующего предупреждения:</i></p> <p><i>Предупреждение. Настоящее оборудование/ система предназначены для применения исключительно профессионалами в области здравоохранения. Настоящее оборудование/система могут вызвать ухудшение приема радиосигналов и нарушить работу оборудования, расположенного поблизости. В этом случае может быть необходимо принять меры для снижения помех, такие как изменение ориентации, смена места размещения Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6) или экранирование места размещения</i></p> |
| Гармонические составляющие тока по МЭК 61000-3-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Класс А                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Колесания напряжения и фликер по МЭК 61000-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соответствует требованиям |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6) предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6) следует обеспечить с/ применение в указанной обстановке</i></p> |                                    |                      |                                                                                |
| Испытание на помехоустойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Испытательный уровень по МЭК 60601 | Уровень соответствия | Электромагнитная обстановка - указания                                         |
| Электростатические разряды (ЭСР) по МЭК 61000-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ±6 кВ - контактный разряд          | ±6 кВ – контактный   | Пол в помещении из дерева, бетона или керамической плитки. При полах, покрытых |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | разряд                                                                                                                                                                                                                                                                                | синтетическим материалом, относительная влажность воздуха - не менее 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               | $\pm 8$ кВ - воздушный разряд                                                                                                                                                                                                                                                         | $\pm 8$ кВ - воздушный разряд                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4                                              | $\pm 2$ кВ для линий электропитания<br><br>$\pm 1$ кВ - для линий ввода/вывода                                                                                                                                                                                                        | $\pm 2$ кВ для линий электропитания<br><br>Не применимо                                                                                                                                                                                                                               | Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5                             | $\pm 1$ кВ - при подаче помех по схеме «провод-провод»<br><br>$\pm 2$ кВ - при подаче помехи по схеме «провод-земля»                                                                                                                                                                  | $\pm 1$ кВ - при подаче помех по схеме «провод-провод»<br><br>$\pm 2$ кВ - при подаче помехи по схеме «провод-земля»                                                                                                                                                                  | Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Провалы, прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11 | $<5\% U_n$ (провал напряжения $>95\% U_n$ ) в течение 0,5 периода<br><br>$40\% U_n$ (провал напряжения $60\% U_n$ ) в течение пяти периодов<br><br>$70\% U_n$ (провал напряжения $30\% U_n$ ) в течение 25 периодов<br><br>$<5\% U_n$ (провал напряжения $>95\% U_n$ ) в течение 5 с) | $<5\% U_n$ (провал напряжения $>95\% U_n$ ) в течение 0,5 периода<br><br>$40\% U_n$ (провал напряжения $60\% U_n$ ) в течение пяти периодов<br><br>$70\% U_n$ (провал напряжения $30\% U_n$ ) в течение 25 периодов<br><br>$<5\% U_n$ (провал напряжения $>95\% U_n$ ) в течение 5 с) | Качество электрической энергии в сети - в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки. Если пользователю <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)</i> необходимо обеспечить непрерывную работу в условиях возможных прерываний сетевого напряжения, рекомендуется питание <i>Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)</i> осуществлять от источника бесперебойного питания или батареи |
| Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) по МЭК 61000-1-8                               | 3 А/м                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 А/м                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Уровни магнитного поля промышленной частоты следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Примечание: $U_n$ - напряжение сети переменного тока до применения испытательного уровня      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Дистансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6) предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Дистансеризация» №3, размещается в автомобиле-фургоне ИАП-В-1767KD следует обеспечить её применение в указанной обстановке |                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Испытание на помехоустойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Испытательный уровень по МЭК 60601                                | Уровень соответствия | Электромагнитная обстановка - указания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по МЭК 61000-4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3В<br>(среднеквадратичное значение) в полосе от 150 кГц до 80 МГц | 3 В                  | Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом пользователю Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Дистансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6) включая кабели, не должно быть меньше рекомендуемого расстояния, рассчитанного по формуле, применимой к частоте передатчика.<br><br>Рекомендуемый пространственный разнос:<br>$d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$<br><br>$d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$ от 80 МГц до 800 МГц<br>$d = 2,3 \cdot \sqrt{P}$ от 800 МГц до 2,5 ГГц,<br>где $d$ - рекомендуемый пространственный разнос, м <sup>3</sup> ;<br>$P$ - номинальное значение максимальной выходной мощности в Вт в соответствии со значением, установленным изготовителем. |
| Радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 В/м в полосе от 80 МГц до 2,5 ГГц                               | 3 В/м                | <b>ВНИМАНИЕ:</b> Портативное радиочастотное оборудование связи (включая периферийные устройства, такие как антенные кабели и внешние антенны) необходимо устанавливать не ближе 30 см к любой части пользователю Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Дистансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАП-1767М9(тип А, тип А6), включая кабели, указанные производителем. В противном случае, могут быть сбои в работе оборудования.<br><br>Напряженность поля при                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой<sup>а)</sup> должна быть ниже уровня соответствия в каждой полосе частот<sup>б)</sup>.</p> <p>Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком:</p>  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

а) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций. АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения *Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)* превышают применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой *Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)* с целью проверки их нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение *Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)*. Уровни соответствия требованиям помехоустойчивости в диапазонах частот, выделенных для ИИМ ВЧ устройств в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц, а также уровни в полосе частот от 80 МГц до 2,5 ГГц предназначаются для уменьшения вероятности того, что мобильные портативные радиотелефонные системы связи могут стать причиной нарушения функционирования, если они непреднамеренно оказываются расположенными в зоне пациента. Для этого при расчетах рекомендуемого разнеса для передатчиков, работающих в этих полосах частот, используется дополнительный коэффициент 10/3.

б) Вне полосы от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем 3 В/м.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

Рекомендуемые значения пространственного разнosa между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и *Комплексом медицинским передвижным «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)*

*Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)* предназначен для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь *Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)* может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и *Комплекса медицинского передвижного «ИНТЕРАВТОЦЕНТР» по ТУ 29.10.59-001-78724354-2020 исполнение «Диспансеризация» №3, размещается в автомобиле – фургоне ИАЦ-1767М9(тип А, тип А6)*, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи

| Номинальная<br>максимальная<br>выходная мощность<br>передатчика Р, Вт | Пространственный разнос d, м, в зависимости от частоты передатчика |                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                       | $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$<br>в полосе от 150 кГц до 80<br>МГц       | $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$<br>в полосе от 80 до 800 МГц | $d = 2,3 \cdot \sqrt{P}$<br>в полосе от 800 МГц до 2,5<br>ГГц |
| 0,01                                                                  | 0,12                                                               | 0,12                                                  | 0,23                                                          |
| 0,1                                                                   | 0,38                                                               | 0,38                                                  | 0,73                                                          |
| 1                                                                     | 1,2                                                                | 1,2                                                   | 2,3                                                           |
| 10                                                                    | 3,8                                                                | 3,8                                                   | 7,3                                                           |
| 100                                                                   | 12                                                                 | 12                                                    | 23                                                            |

#### Примечания

1. Для 80 и 800 МГц применяют разделительное расстояние для более высокого диапазона частоты.
2. При определении рекомендуемых значений пространственного разнosa для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.
3. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

## ПРИЛОЖЕНИЕ И

### Назначение медицинских изделий и специального оборудования, используемых в комплексе

| № п.п. | Наименование/тип                                                                                                                                                                                                    | Обозначение документа, изготовитель                | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Кабинет «Диагностика», в составе:</b>                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1    | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096 | для обеззараживания воздуха (от бактерий, вирусов и других простейших организмов) ультрафиолетовым (УФ) излучением, создаваемым безозоновыми люминесцентными УФ бактерицидными лампами с длиной волны (253,7±5) нм, в салоне и кабине объемом от 15 до 100 м <sup>3</sup> (в зависимости от варианта исполнения) специальных и специализированных транспортных средств, легковых автомобилей и микроавтобусов, с целью снижения уровня обсемененности воздушной среды. |
| 1.2    | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"МЕДПЛАНТ-М" в сумке универсальной СМУ-03 по ТУ 32.50.13-012-18585567-2005                                                                                           | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № ФСР 2010/08890        | для оказания первичной медико-санитарной помощи в объеме, оказываемом врачом общей практики на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3    | Изделия для фиксации емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013, вариант исполнения: Штатив разборный для инфузий ППР-"Медплант",                                  | ООО "МЕДПЛАНТ", Россия, РУ № РЗН 2014/1603         | для проведения инфузионной терапии в условиях скорой медицинской помощи, в полевых условиях и на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4    | Спирограф микропроцессорный портативный СМ11-21/01-«Р-Д» по ТУ 9441-004-24149103-2003                                                                                                                               | ООО "НПП "Монитор" Россия, РУ № ФСР 2012/13811     | для качественной и количественной оценки изменений функционального состояния легких и прим. снимается на разных этапах лечебно-диагностического процесса (выявление нарушений, оценка их выраженности, обоснование и оценка эффективности проводимой терапии, прослеживание динамики заболевания), при экспертизе                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                              |                                                                                  | трудоспособности и пригодности к работе в определенных условиях, при массовых и эпидемиологических обследованиях групп населения.                 |
| 1.5 | Устройство для определения объема легких Spirotest с принадлежностями,                                                       | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/08455                             | позволяет измерять объем легких без использования воды. Диапазон измерений от 1000 до 7000 см <sup>3</sup> .                                      |
| 1.6 | Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания «Прессотахопирогрф ПТС-1411-01» по ТУ 9441-001-82193046-2007     | ООО "Ланамедика", Россия, РУ № ФСР 2008/02820                                    | позволяет производить измерения и регистрацию объемных и скоростных показателей внешнего дыхания при проведении функциональных дыхательных тестов |
| 1.7 | Пульсоксиметр медицинский «Armed», вариант исполнения: YX300                                                                 | "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461 | для измерения степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (сатурации) и частоты пульса неинвазивным методом                       |
|     | Пульсоксиметр напалецный серии MD300C, с принадлежностями, исполнение MD300C12                                               | "Бейджинг Чойс Электроник Технолоджи Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2009/03850        |                                                                                                                                                   |
|     | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1" с принадлежностями по ТУ 26.60.12-011-18585567-2004,            | ООО "МЕДИЦИАНТ", Россия, РУ № РЗН 2013/1343;                                     |                                                                                                                                                   |
|     | Пульсоксиметр РМ-60 с принадлежностями                                                                                       | "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2008/02505 |                                                                                                                                                   |
|     | Пульсоксиметр портативный ПП-01 по ТУ 26.60.12-247-49640047-2018 с принадлежностями                                          | ООО Концерн "Аксон", Россия, РУ № РЗН 2020/11229                                 |                                                                                                                                                   |
| 1.8 | Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU)                                                           | ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № ФСЗ 2009/05423                             | для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и аксиллярным способами                                                              |
| 1.9 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения ВМЭН-150-50/100-А | ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/09964   | для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту                                                   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" по ТУ 4274-017-27450820-2008, вариант исполнения ВЭМ-150-А1 без стойки с одним интервалом взвешивания                                                                                                                                                                         | АО «МАССА-К», Россия, РУ № ФСР 2008/02905                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.10 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01- "Малыш" по ТУ 4274-02100226454-2002                                                                                                                                                                                                           | ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/11958      | для взвешивания и измерения роста новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет в родильных и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реабилитации педиатрического профиля, в яслях и других детских учреждениях, в быту |
| 1.11 | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M2 Basic (HEM-7121-A1.RU), или M2 Basic (HEM-7121-RU), или M2 Basic (HEM-7121-ARU), или M2 Classic (HEM-7122-A1.RU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), или M3 Family (HEM-7133-ALRU), с принадлежностями | ОМРОН ХЕЛСКОЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № РЗН 2015/3210                                | для измерения артериального давления и частоты пульса                                                                                                                                                                           |
|      | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M6 (HEM-7322-A1.RU), или M2 Eco (ARU), или M2 Plus (ARU), или 737 (HEM-8713-CM), или M2 Eco (RU)                                                                                                                                                     | ОМРОН ХЕЛСКОЭА Ко., Лтд., Япония, РУ № РЗН 2016/4995                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD с принадлежностями варианты исполнения: LD2, или LD3, или LD3a, или LD4, или LD5, или LD5a, или LD8                                                                                                                                                 | "Литл Доктор Интернэшнл (С) Лтд.", Сингапур, Дальнее зарубежье, РУ № ФСЗ 2012/11647 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.12 | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEF1-B, (M110), производства                                                                                                                                                                                                                   | Метракс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/10093                                         | для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма                                                                                                                                                                        |
|      | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, варианты исполнения: 1. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01; или 2. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02.; или 3. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05,                                                                 | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № РЗН 2017/5391                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Монитор-дефибриллятор BeneHeart с принадлежностями, варианты исполнения: BeneHeart D3, или BeneHeart D6                                                                                                                                                                                                                      | "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР РУ № ФСЗ 2011/10043     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Филипс Медикал Системс", США, РУ № ФСЗ 2008/02312                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Дефибриллятор Zoll, модель AED Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZOLL Medical Corporation, США, РУ № РЗН 2014/1903                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.13 | Инструмент медицинский для диагностики                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Рудольф Ристер                                                                     | для диагностики                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | первый или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: buck, C-128 Гц                                                                                | ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/08456                                            | полинейропатии, проявляющейся в снижении вибрационной чувствительности                                                                                                                                             |
| 1.14 | Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп gi-derma                                                                                        | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03906                            | для исследования верхнего слоя кожи (эпидермиса) и раннего выявления патологий                                                                                                                                     |
| 1.15 | Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели rep-score, gi-score I.                                                                | "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/03905                            | для осмотра слухового канала и барабанной перепонки                                                                                                                                                                |
| 1.16 | Электрокардиограф 3-6-12 каналный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Г-01-"Р-Д" по ТУ 2660-005-24149103-2018, вариант исполнения ЭК12Г-01-"Р-Д"/63, МПЦ.30.00.000 | ООО "НПП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2012/14015                                 | для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца с целью проведения электрокардиографических обследований в качестве портативного электрокардиографа для взрослых и детей.                          |
|      | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Г-01-"Р-Д" по ТУ 9441-006-24149103-2010 (ЭК 3Г-01-"Р-Д"/1, МПЦ.34.00.000)                                                          | ООО "НПП "Монитор", Россия, РУ № ФСР 2010/08437                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102                                                                             | "Фукуда Дэнси Ко., Лтд.", Япония РУ № РЗП 2016/4703                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Г-1-3-07 «Аксион»                                                                                                                               | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № ФСР 2007/00454                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Электрокардиограф 3-6 каналный ЭКЗТЦ-3/6-04 «Аксион» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004                                       | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № ФСР 2008/01874                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.17 | Стегоскоп LD с принадлежностями, вариант исполнения: LD Special (длина трубок 72 см)                                                                                                    | "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур, РУ № ФСЗ 2008/01941           | для аускультации сердца, легких, сосудов, желудочно-кишечного тракта у взрослых пациентов и детей                                                                                                                  |
| 1.18 | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РП                                                                                        | ОАО "Тулинковский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия, РУ № ФСР 2011/11607 | для измерения роста как стоя, так и сидя (для модификации ростомеров со встроенным пульчиком) взрослых и детей старше одного года в медицинских, «здоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в быту. |
| 1.19 | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                              | Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072                 | для определения в цельной капиллярной крови следующих параметров: глюкоза, общий холестерин и триглицериды в цельной крови                                                                                         |
| 1.20 | Тест-полоски LabStrip UTIPlus для проведения анализа мочи                                                                                                                               | "77 Электроника Кфт.", Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583                             | для диагностики заболеваний печени, билиарной или                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоциированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений pH, а также для исследования осадка мочи.                                                                     |
| 1.21 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ПА | ООО "Биосенсор АП", Россия, РУ № ФСР 2008/02809  | для качественного и полуколичественного определения крови (свободного гемоглобина), кетоновых тел, белка, нитритов, билирубина, уробилиногена, глюкозы, pH, относительной плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты в моче в медицинских учреждениях, а также в домашних условиях (для экспресс-анализа диагностики in vitro) |
| 1.22 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО «Компания «ЭЛТА», Россия, РУ №ФСР 2009/06498 | для измерения уровня глюкозы в крови пациентами с сахарным диабетом или пациентами, находящимися в группе риска                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.23 | Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 по ИИП/Д.2955.003ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ООО «Пневмоприбор», Россия, РУ № ФСР 2010/07081  | для понижения давления кислорода с давления в кислородном баллоне до заданной величины, проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также служит для подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи.                                          |
| 1.24 | Аптечка первой помощи Анти-СПИД - "ВИТАЛФАРМ" по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ЗАО "Виталфарм", Россия РУ № РЗН 2015/2519       | для оказания доврачебной само- и взаимопомощи при чрезвычайных                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | передвижных медицинских бригад» тип I - «ВИТАЛФАРМ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | ситуациях                                                                                                                                                                                              |
| 1.25 | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                                 | ООО "Инновация",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2014/2254           | сбор, транспортировка, маркировка и герметизация медицинских отходов класса А, Б, В, Г, в местах их образования                                                                                        |
| 1.26 | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи ИФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2008/02305           | для оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе                                                                                                                                     |
| 1.27 | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004, в трех исполнениях: УМСП-01-П, УМСП-01-Пм и в сумке из синтетической ткани                                                                                                                                                                                                      | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2014/1928            | позволяет подготовленному персоналу оказывать реанимационную помощь на догоспитальном этапе детям от 6 лет и взрослым пациентам                                                                        |
| 1.28 | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 исполнения: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2010/07335           | для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи |
| 1.29 | Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ФГУП "ЦИТО",<br>Россия,<br>РУ № ФСР<br>2010/07249           | предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника у взрослых и детей                                                                |
| 1.30 | Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Полимерные изделия", Россия,<br>РУ № ФСР<br>2010/07935 | для освещения отраженным светом уха, горла и носа во время лечебных процедур и профилактических осмотров                                                                                               |
| 1.31 | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2007/00439           | для проведения искусственной вентилиации легких ручным способом взрослым (АДР-МП-В, вес пациентов свыше 15 кг) в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии.                                 |
| 1.32 | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВГ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ООО "Научно-Медицинская                                     | для исследования вибрационной                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение: ВТ-02-1-м 2, (модификация 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Фирма МБН",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2011/10954                                                         | чувствительности<br>человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.33 | Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9411-001-23115390-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО "Биомедилег",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2011/11116                                                   | для формирования<br>акустических<br>сигналов в<br>автоматизированном<br>и ручном режимах<br>работы с заданными<br>уровнями<br>прослушивания и<br>частотами с целью<br>определения потерь<br>слуха при воздушном<br>звукопроведении с<br>использованием<br>головных телефонов и<br>при костном<br>звукопроведении с<br>использованием<br>вибратора |
| 1.34 | Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-61593132-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО<br>"Медтехпром+",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2018/7299                                                | для диагностики и<br>исследования<br>функционального<br>состояния<br>вестибулярного<br>аппарата пациентов,<br>путем вращения<br>вокруг своей оси                                                                                                                                                                                                  |
| 1.35 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2                                                                                                                                                               | АО "Елатомский<br>приборный завод",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2009/05373                                 | для дезинфекции к<br>предстерилизационно<br>й обработки изделий<br>медицинского<br>назначения в лечебно-<br>профилактических<br>учреждениях                                                                                                                                                                                                       |
| 1.36 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-<br>производственная<br>фирма Костромская<br>медтехника, Россия,<br>РУ № ФСР<br>2008/03973 | для оснащения<br>лечебно -<br>профилактических<br>учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.   | <b>Кабинет «Лаборатория», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО "РЭМО-<br>Технологии",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2023/20096                                          | для обеззараживания<br>воздуха (от бактерий,<br>вирусов и других<br>простейших<br>организмов)<br>ультрафиолетовым<br>(УФ) излучением,<br>создаваемым<br>безозоновыми<br>люминесцентными<br>УФ бактерицидными<br>лампами с длинной<br>волны (253,7+5) нм, в<br>салоне и кабине<br>объемом от 15 до 100                                             |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | м3 (в зависимости от варианта исполнения) специальных и специализированных транспортных средств, легковых автомобилей и микроавтобусов, с целью снижения уровня обсемененности воздушной среды. |
| 2.2 | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий К/ДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - К/ДС-1; - К/ДС-3; - К/ДС-5; - К/ДС-6; - К/ДС-6Л-1К; - К/ДС-6Л-2К; - К/ДС-10; - К/ДС-11; - К/ДС-20; - К/ДС-30; - К/ДС-35; - К/ДС-0.1; - К/ДС-0.2, исполнение К/ДС-1 | АО "КРОНТ-М",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2009/06144                      | для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции, а также для обработки утилизируемых медицинских отходов                                                                               |
| 2.3 | Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                    | ООО "Инновация",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2014/2254                    | сбор, транспортировка, маркировка и герметизация медицинских отходов класса А, Б, В, Г, в местах их образования                                                                                 |
| 2.4 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДЦО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДЦО-1-02-2                                                                                | АО "Елатомский приборный завод",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2009/05373   | для дезинфекции к предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях                                                                         |
| 2.5 | Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Емкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л - "РЕСПЕКТ" по ТУ 9398-002-13014251-2012                                                                                  | ООО "ГК "Респект",<br>Россия, РУ № РЗН<br>2013/1089                  | для сбора, хранения и удаления подготовленных отходов лечебно-профилактических учреждений, в том числе и острого инструментария                                                                 |
| 2.6 | Штатив для пробирок универсальный ШПУ-"КРОНТ" по ТУ 9452-037-11769436-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | АО "КРОНТ-М",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2011/10034                      | для установки стеклянных пробирок с питательными средами, культурами бактерий и реактивами, в качестве вспомогательного средства в клинической лабораторной диагностике (in vitro)              |
|     | Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛП по ТУ 9452-156-05519988-2006 в вариантах исполнения: 1. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛП-10; или 2. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛП-20; или 3. Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛП-10                                                                                                               | ООО "Полимерные изделия", Россия,<br>РУ № ФСР<br>2011/11883          |                                                                                                                                                                                                 |
| 2.7 | Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Полимер Технолоджи Системс, Инк.",<br>США,<br>РУ № РЗН<br>2015/2693 | позволяет определять 7 параметров: глюкозу, общий холестерин, холестерин ЛПВН, холестерин ЛПНП, триглицериды, кетоны и креатинин.                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8  | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Биокемикал Системз Интернэйшнл Срд, Италия, РУ № ФСЗ 2011/10072                   | для определения в цельной капиллярной крови следующих параметров: глюкоза, общий холестерин и триглицериды в цельной крови                                                                                                                                                                                                      |
| 2.9  | Тест-полоски LabStrip UIIPlus для проведения анализа мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "77 Электроника Кфт.", Венгрия, РУ № ФСЗ 2010/07583                               | для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоциированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений pH, а также для исследования осадка мочи.                   |
| 2.10 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уринолиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уринолиан-11А | ООО "Биосенсор АН", Россия, РУ № ФСР 2008/02809                                   | для качественного и полуколичественного определения крови (свободного гемоглобина), кетоновых тел, белка, нитритов, билирубина, уробилиногена, глюкозы, pH, относительной плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты в моче в медицинских учреждениях, а также в домашних условиях (для экспресс-анализа диагностики in vitro) |
| 2.11 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови ЭП-60 по ТУ 9443-003-42980704-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Научно-производственное предприятие Кверти-Мед", Россия, РУ № ФСР 2007/00762 | для исследования кислотно-основного равновесия крови на основе сравнения величины pH, парциальных давлений углекислого газа и кислорода крови с указанными параметрами калибраторов                                                                                                                                             |
| 2.12 | Экспресс-коагулометр КуЛабс Электрометр ("qlabs ElectroMeter"), исполнение: КуЛабс Электрометр ("qlabs ElectroMeter")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Микропоннт Биотехнолоджиз Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2016/3832                  | Для использования при оценке показателей протромбинового времени (ПТВ)/международного нормализованного отношения (МНО) и                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | активированного<br>частичного<br>тромбопластинового<br>времени (АЧТВ) в<br>крови.                                                |
| 2.13 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИИИ» по ТУ 9443-00478939528-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО «Компания «ЭЛ-ТА», Россия, РУ № ФСР 2009/06498                 | для измерения уровня глюкозы в крови пациентами с сахарным диабетом или пациентами, находящимися в группе риска                  |
| 2.14 | Система для измерения уровня гемоглобина HemoControl с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "ЕКФ-диагностик ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2008/02911               | для использования при количественном определении концентрации гемоглобина (Hb) в крови человека                                  |
| 2.15 | Анализаторы мочи CL-50 Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Хай Текнолоджи, Инк.", США, РУ № РЗН 2016/3986                    | для анализа мочи                                                                                                                 |
| 2.16 | Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/06301 | для сбора материала и анализа биохимии, серологии, бактериологии, определение группы крови                                       |
| 2.17 | Пробирки вакуумные МиниМед по ТУ 32.50.50-024-29508133-2017, вариант исполнения: 1. Пробирки вакуумные с К2О/ДТА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 2. Пробирки вакуумные с К2О/ДТА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 3. Пробирки вакуумные с К3О/ДТА 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 4. Пробирки вакуумные с К3О/ДТА и разделительным гелем 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 5. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,2% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 6. Пробирки вакуумные с цитратом натрия 3,8% 1,8 мл; 2,7 мл; 3,6 мл; 4,5 мл; 5,4 мл. 7. Пробирки вакуумные с лития гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 8. Пробирки вакуумные с натрия гепарином 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 9. Пробирки вакуумные без наполнителя 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 10. Пробирки вакуумные с разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 9 мл; 10 мл. 11. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл. 12. Пробирки вакуумные с активатором свертывания (сухие кристаллы кремнезема) и разделительным гелем 2 мл; 3 мл; 3,5 мл; 4 мл; 5 мл; 6 мл; 7 мл; 8 мл; 8,5 мл; 9 мл; 10 мл. | ООО "МиниМед", Россия, РУ № РЗН 2019/8175                          | для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур                                                         |
| 2.18 | Посуда для лабораторных исследований из полимерных материалов вариант исполнения: накопечники универсальные для дозаторов объемом 0,2-5мл, 0,5-10мл, 20мл, 30мл, 200мл, 250мл, 300мл, 1000мл, 5мл, 10мл, распылю и в штативах. Пробирки полимерные лабораторные, в том числе с сепараторами и антикоагуляторами, зондами и транспортными средами. Контейнеры лабораторные для взятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ф.Л. Медикал с.р.л., Италия, РУ № ФСЗ 2011/09735                   | для отбора, хранения, транспортирования биологического материала и проведения дальнейших лабораторных аналитических исследований |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | проб. Чашки Петри и кюветы для анализаторов. Коробки, пипетты и слайды лабораторные. Пробирки винтовые, конические и с основанием, объемом 0,5мл, 1,5мл, 2мл, 5мл, 7,5мл, 10мл, 15мл, 50мл. Винтовые крышки с прокладками и без прокладок для пробирок и контейнеров. Петли микробиологические и зонды. Штативы для хранения и замораживания пробирок, криопробирок, объемом 0,2-50мл. Пипетки серологические и для переноса |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.19 | Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Хай Текнолоджи, Инк., США, РУ № ФСЗ 2010/07756                              | для анализа образца крови in-vitro                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.20 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Anped"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2020/10939                  | предназначена для разделения биологических жидкостей на вещества, различные по консистенции, центрифугирования различных проб, взятых у пациентов (образцы биологических жидкостей организма), либо отдельно, либо после добавления реагентов или других добавок до исследования анализов в целях проведения диагностики методом in vitro |
| 2.21 | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                         | АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10267 | для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200 °С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки объектов медицинского назначения                                                                   |
|      | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ОАО "Смоленское СКГБ СПУ", Россия, РУ № ФСР 2010/07332                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.22 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140«ПОЗИС» 2. ХФ-140-1 «ПОЗИС» 3. ХФ-140-2 «ПОЗИС» 4. ХФ-140-3 «ПОЗИС» 5. ХФ-250-2 «ПОЗИС» 6. ХФ-250-3 «ПОЗИС» 7. ХФ-250-4 «ПОЗИС» 8. ХФ-250-5 «ПОЗИС» 9. ХФ-400-2 «ПОЗИС» 10. ХФ-400-3 «ПОЗИС» 11. ХФ-400-4 «ПОЗИС» 12. ХФ-400-5 «ПОЗИС», модель: ХФ-140 "ПОЗИС"                                                                       | АО "ПОЗИС", Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                     | для хранения лекарственных препаратов, реагентов и биологических препаратов в помещениях аптек, клиник, больниц, научноисследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения                                                                                                                                                  |
| 2.23 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО научно-производственная фирма Костромская                               | для оснащения лечебно - профилактических                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ                                                    | мелтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973                                    | учреждений                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | <b>Кабинет «Женское здоровье», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГДМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: «Клер»-КГДМ-01, производства АО                                                                                                                                                                                                                                                                              | ООО ТПФ "Клер", Россия, РУ № ФСР 2008/03499                                | для проведения гинекологических, урологических и проктологических осмотров и лечения в стационарных условиях.                                                                                                                         |
|     | Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 по ТУ 9452-021-07614107-2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия, РУ № ФСР 2010/07065 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Кресло гинекологическое КГ-«МСК» по ТУ 9452-018-52962725-2008, в следующих исполнениях: КГ-«МСК» (МСК-409); или КГ-«МСК» (МСК-1409); или КГ-«МСК» (МСК-413); или КГ-«МСК» (МСК-410); или КГ-«МСК» (МСК-415), или КГ-«МСК» (МСК-416); или КГ-«МСК» (МСК-3416); или КГ-«МСК» (МСК-417); или КГ-«МСК» (МСК-3417); или КГ-«МСК» (МСК-418); или КГ-«МСК» (МСК-3418); или КГ-«МСК» (МСК-411); или КГ (МСК-414) | ООО "Медстальконструкция", Россия, РУ № ФСР 2008/02743                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Кресло гинекологическое КГ- «Ока-Медик» по ТУ 9452-011-70373441-2008 , производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО "Производственное предприятие Ока-Медик", Россия, РУ № ФСР2009/04054   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Кресло гинекологическое универсальное КГУ-01 VLANA по ТУ 9452-002-91587838-2013 с принадлежностями в вариантах исполнения: КГУ-01.1 VLANA, или КГУ-01.2 VLANA, или КГУ-01.3 VLANA                                                                                                                                                                                                                        | ООО «Горское», Россия, РУ № РЗН 2015/2876                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2 | Кольпоскоп КС-01 по ТУ 9442-001-52132018-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ООО "Здоровый Мир", Россия, РУ № РЗН 2013/733                              | для проведения визуального исследования наружных половых органов, влагалища, шейки матки                                                                                                                                              |
| 3.3 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                                                      | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                         | для обеззараживания воздуха (от бактерий, вирусов и других простейших организмов) ультрафиолетовым (УФ) излучением, создаваемым безозоновыми люминесцентными УФ бактерицидными лампами с длиной волны (253,7±5) нм, в салоне и кабине |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | объемом от 15 до 100 м3 (в зависимости от варианта исполнения) специальных и специализированных транспортных средств, легковых автомобилей и микроавтобусов, с целью снижения уровня обсемененности воздушной среды.                              |
| 3.4 | Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045- 44942795-2009                                                                                                                                                                                                                   | ООО "Полимерные изделия", Россия, РУ ФСР 2010/07047                      | для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур в женских консультациях и клиниках                                                                                                                                         |
| 3.5 | Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003                                                                                                                                                                                                                                      | ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", Россия, РУ ФСР 2007/00767 | для прослушивания сердцебиения плода у беременных женщин                                                                                                                                                                                          |
| 3.6 | Прибор ультразвуковой диагностический с принадлежностями, варианты исполнения: DUS 3, DUS 6, DUS 8, DUS 60, U50, исполнение: DUS 60                                                                                                                                                                           | "Элан Инструментс, Инк.", Китай, РУ № ФСЗ 2011/10381                     | для проведения гинекологических, акушерских, педиатрических, урологических, трансвагинальных и кардиологических исследований, а также исследований брюшной полости, поверхностных органов, периферических сосудов и опорно-двигательного аппарата |
| 3.7 | Ёмкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Ёмкость-контейнер полимерный (полупрозрачный) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2 | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2009/05373             | для дезинфекции к предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях                                                                                                                           |
| 3.8 | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л - "РЕСПЕКТ" по ТУ 9398-002-13014251-2012 | ООО "ГК "Респект", Россия, РУ № РЗН 2013/1089                            | для сбора, хранения и удаления подготовленных отходов лечебно-профилактических учреждений, в том числе и острого инструментария                                                                                                                   |
| 3.9 | Ёмкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований,                                                                                                                                                                                                                   | ООО "Импювация", Россия, РУ № РЗН                                        | для сбора и транспортировки                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014/2254                                                                             | биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г в местах их образования                                                                                   |
| 3.10 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМГ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМГ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | для оснащения лечебно - профилактических учреждений                                                                                                                                                                                |
| 4.   | <b>Кабинет «Стоматология», в составе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1  | Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов "УльтраОст" по ТУ 9451-008-56755207-2009, варианты исполнения: - "УльтраОст" УВ-1 (объем ванны 150 мл); - "УльтраОст-ФСМ" УВ-2 (объем ванны 1500 мл); - "УльтраОст-М" УВ-3 (объем ванны 1600 мл); - "УльтраОст-Г" УВ-4 (объем ванны 3200 мл, с нагревом), исполнение: "УльтраОст-М" УВ-3 (объем ванны 1600 мл)                                  | ЗАО "Геософт Дефт", Россия, РУ № ФСР 2007/00048                                       | предстерилизационной очистки и дезинфекции мелких инструментов и приспособлений, применяемых в различных областях медицины                                                                                                         |
| 4.2  | Автоклав серии "BT" в следующих исполнениях: BT1D23L-A, BTS23L-A, BT1D18L-A, BTS18L-A, BT1D17L-A, BTS17L-A, BT1D16L-A, BTS16L-A, BT1D12L-A, BTS12L-A, BT1D8L-A, BTS8L-A с принадлежностями, исполнение BT1D17L-A                                                                                                                                                                                                                                                              | "Пи энд Ти (Пингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2009/04596           | для стерилизации хирургических и стоматологических инструментов, одежды, стеклянной посуды, шприцев                                                                                                                                |
| 4.3  | Аппарат световодный АФС с принадлежностями по ТУ 9444-005-17515211-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО "Полироник", Россия, РУ № ФСР 2011/10669                                          | применяются при проведении физиотерапевтических процедур, в том числе в оториноларингологии, стоматологии, гинекологии, дерматологии и т.д., а также для возбуждения и визуализации флуоресцентного излучения биологических тканей |
| 4.4  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-03-"Я"-Ф11 по ТУ 9452-003-55307168-2004, варианты исполнения: КБ-03-"Я"-Ф11; КБн-03-"Я"-Ф11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО "Ферропласт Медикал", Россия, № РУ ФСР 2009/06570                                 | для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами                                                                                          |
| 4.5  | Определитель электронный верхушки корня зуба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ООО "ВЕГА-ПРО,                                                                        | Определитель                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | «Аверон» модель 1.0 АВЕКС по ТУ 9452-006-25014322-2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Россия, РУ № ФСР 2009/05904                                    | верхушки корня зуба со звуковой и светодиодной индикацией прохождения канала, грубой и точной шкалами определения, а также возможностью калибровки в дополнительном режиме положения апекса                                                           |
| 4.6 | Электроодонтоотестер состояния пульпы зуба со звуковой и цифровой индикацией ЗОТ-01 "Аверон" по ТУ 9452-017-25014322-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ООО "ВЕГА-ПРО", Россия, РУ № ФСР 2012/13364                    | для электроодонтоотестирования импульсным током, формирует и индицирует нормированное по величине воздействие                                                                                                                                         |
| 1.7 | Утилизатор медицинских игл УМИ-01 по ТУ 9452-001-51715746-2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "Медторг", Россия, РУ № ФСР 2008/03814                     | для применения в медицинских, процедурных, стоматологических, физиотерапевтических кабинетах, фельдшерских и амбулаторных пунктах, и других кабинетах медицинского назначения с целью уничтожения медицинских игл непосредственно после использования |
| 4.8 | Компрессор медицинский DK50, исполнения: DK50 B, DK50 BS, DK50 D, DK50 DM, DK50 I, DK50 II, DK50 C, DK50 P, DK50 K, DK50 Z, DK50 Z/K, DK50 S, DK50 S/K, DK50 DS, DK50 DMS, DK50-10 I, DK50-10 Z, DK50-10 Z/K, DK50-10 S, DK50-10 S/K, DK50-10 Z/M, DK50-10 S/M, DK50 PLUS, DK50 PLUS/K, DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S, DK50 PLUS S/K, DK50 PLUS S/M, DK50 2V, DK50 2V/M, DK50 2V/K, DK50 2VS, DK50 2VS/K, DK50 2VS/M, DK50 2V/110, DK50 2V/110/K, DK50 2V 110/M, DK50 2V/110S, DK50 2V/110S/K, DK50 2V 110S/M, DK50 2x2V/110, DK50 2x2V/110/K, DK50 2x2V/110/M, DK50 2x2V/110S, DK50 2x2V 110S/K, DK50 2x2V 110S/M, DK50 4x2V/M, DK50 4x2V, DK50 6x2V, DK50 6x2V/M, DK50 4x2VT/M, DK50 4x2VTD, DK50 6x2VT/M, DK50 9x2VT/M, DK50 12x2VT/M, DK50 15x2VT/M, DK50 4x2VT, DK50 6x2VT, DK50 9x2VT, DK50 12x2VT, DK50 15x2VT, DK50 4V/M, DK50 4V/110, DK50 4V/110/M, DK50 2x4V/110, DK50 2x4V/110/M, DK50 4x4VT/M, DK50 6x4VT/M, DK50 9x4VT/M, DK50 12x4VT/M, DK50 15x4VT/M, DK50 4x4VT, DK50 6x4VT, DK50 9x4VT, DK50 12x4VT, DK50 15x4VT, исполнение DK50 S | "ЭКОМ спол. с р.о.", Словацкая Республика, РУ № ФСЗ 2008/03234 | для получения диагностических рентгенограмм зубного аппарата, челюстей и других ротовых структур                                                                                                                                                      |
| 4.9 | Лампа полимеризационная WOODPECKER, исполнения: WOODPECKER LED.B, WOODPECKER LED.C, WOODPECKER LED.D, WOODPECKER LED.L, WOODPECKER LED.M,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ №    | для затверждения чувствительного к свету связующего вещества, путем                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | WOODPECKER LED.G., исполнение<br>WOODPECKER LED.B                                                                                                                                                                                                     | ФСЗ 2009/05324                                                                         | направления луча на<br>вещество в течение<br>короткого времени                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.10 | Скейлер стоматологический WOODPECKER для<br>снятия зубных отложений, исполнения:<br>WOODPECKER UDS, WOODPECKER DTE.,<br>исполнение WOODPECKER UDS                                                                                                     | "Туилин Вудпекер<br>Медикал<br>Инструмент Ко.,<br>Лтд.", Китай, РУ №<br>ФСЗ 2009/05323 | для очистки зубов, а<br>также для<br>предотвращения<br>заболевания зубов и<br>их лечения.                                                                                                                                                                                                              |
| 4.11 | Электрокоагулятор портативный<br>стоматологический ЭКис-20-1 по ТУ 9444-003-<br>12359918-2007                                                                                                                                                         | ООО ИПЮ<br>"Рубикон-<br>Инновация", Россия,<br>РУ № ФСР<br>2008/02240                  | для коагуляции<br>мягких тканей и<br>пульпы токами<br>высокой частоты                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.12 | Инструмент медицинский металлический<br>стоматологический                                                                                                                                                                                             | ЗАО "СТРУМ",<br>Республика<br>Беларусь, РУ №<br>РЗН 2018/7276                          | для манипуляций при<br>диагностике,<br>профилактике и<br>лечении<br>стоматологических<br>заболеваний.<br>Инструменты<br>предназначены для<br>многократного<br>использования                                                                                                                            |
| 4.13 | Инструменты стоматологические<br>механизированные серии СХ в отдельных<br>упаковках с принадлежностями: Наконечники<br>стоматологические поронкоструйные для<br>удаления зубного налета: С101, С102, С103, С104,<br>С105, С106, С107, исполнение С102 | Фопан Коксо<br>Медикал<br>Инструмент Ко.,<br>Лтд.", Китай, РУ №<br>ФСЗ 2012/13562      | для удаления зубного<br>налета                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.14 | Наконечники турбинные стоматологические НТС-<br>300-05-М4 и НТС-300-05-В2 по ТУ 9452-033-<br>18777198-2004, исполнение НТС-300-05-М4                                                                                                                  | ООО "ВХ-Тайфун",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2008/01751                                     | для закрепления<br>режущих<br>инструментов с<br>диаметром хвостовика<br>1,6 мм и передачи им<br>вращения от<br>бормашины                                                                                                                                                                               |
| 4.15 | Наконечник для микромоторов прямой ННМ-40-02<br>по ТУ 9452-084-05519988-2002                                                                                                                                                                          | АО "Казанский<br>медико-<br>инструментальный<br>завод", Россия, РУ<br>№ ФСР 2011/10010 | для закрепления<br>режущих<br>инструментов с<br>диаметром хвостовика<br>2,35 мм и передачи им<br>вращения от<br>микромоторов                                                                                                                                                                           |
| 4.16 | Наконечник для микромоторов угловой НУНМ-40<br>с поворотной защелкой по ТУ 9452-084-05519988-<br>2002                                                                                                                                                 | АО "Казанский<br>медико-<br>инструментальный<br>завод", Россия, РУ<br>№ ФСР 2011/10011 | для закрепления<br>режущих<br>инструментов с<br>диаметром хвостовика<br>2,35 мм и передачи им<br>вращения от<br>микромоторов                                                                                                                                                                           |
| 4.17 | Стерилизатор мелких стоматологических<br>инструментов электрический со стеклянными<br>шариками СС-01 "ТермоЭст" по ТУ 9451-001-<br>56755207-2005, вариант исполнения "ТермоЭст" с<br>комплектom шариков (с тласперленовым<br>наполнителем)            | АО "Гесософт Центр",<br>Россия, РУ № ФСР<br>2010/08560                                 | для быстрой<br>стерилизации<br>цельнометаллических,<br>не имеющих<br>полостей, каналов и<br>замковых частей,<br>стоматологических и<br>других медицинских<br>инструментов и<br>приспособлений в<br>среде нагретых до<br>температуры 190-<br>290°C стеклянных<br>шариков при полном<br>погружении в них |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                | мелких изделий, а также рабочих частей более крупных изделий в стоматологических учреждениях и в кабинетах акупунктурной терапии                                         |
| 4.18 | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, исполнение Емкости-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом) ЕДПО-1-02-2 | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2009/05373                   | для дезинфекции к предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях                                                  |
| 4.19 | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-18, по ТУ 9451-018-0761-1107-2002 и сменные части: фильтры, исполнение: КФ-3                                                                                                                                                           | АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия, РУ № ФСР 2010/07067 | для размещения в них предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования |
| 4.20 | Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 "Стомэл" по ТУ 9157-003-26502549-00                                                                                                                                                                                                                   | ООО "СТОМОЛ-К", Россия, РУ № ФСР 2009/05060                                    | для питания сжатым воздухом стоматологического оборудования, не имеющего собственного источника сжатого воздуха                                                          |
| 4.21 | Бор-машина электрическая универсальная БЭУ-01 по ТУ 9452-002-51715746-2010, исполнение ДП-5                                                                                                                                                                                                                     | ООО "Мелторг", Россия, РУ № ФСР 2010/08175                                     | для терапевтических, ортопедических и зуботехнических работ в стоматологии                                                                                               |
| 4.22 | Установка стоматологическая "Siger" в следующих исполнениях: S30, S60, S90, U100, U200, U500 с принадлежностями, исполнение U200                                                                                                                                                                                | "Жухай Сайгер Медикал Иквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2009/04648          | для всех видов терапевтических, ортопедических и хирургических работ в области стоматологии                                                                              |
|      | Установка стоматологическая STOMADENT HARMONY с принадлежностями, производства                                                                                                                                                                                                                                  | "СТОМАДЕНТ СК с.р.о.", Словакия, РУ № ФСЗ 2008/02141                           |                                                                                                                                                                          |
|      | Установка стоматологическая пневматическая «Клер» по ТУ 9452-001-43656656-2005                                                                                                                                                                                                                                  | ООО Научно-производственная фирма "Дентофлекс", Россия, РУ № ФСР 2010/09501    |                                                                                                                                                                          |
|      | Установки стоматологические Hallim Dentech, модели: Challenge, Eclipse, с принадлежностями, исполнение Eclipse                                                                                                                                                                                                  | "Халлим Ослам Имплант Ко., Лтд", Республика Корея, РУ № РЗП 2016/5163          |                                                                                                                                                                          |
|      | Установка стоматологическая в исполнениях: «SL.8100», «SL.8200», «SL.8300», «SL.8500», «SL.8600», исполнение «SL.8100»                                                                                                                                                                                          | "Гуанчжоу Санлайт Медикал Эквипмент Ко., ЛТД", Китай, РУ № РЗН 2016/5045       |                                                                                                                                                                          |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Установка стоматологическая, варианты исполнения: AJ11, AJ12, AJ15, AJ16, AJ18, исполнение AJ11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Гуанчжоу Алокас Медикал Иквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/07225      |                                                                                                                                                                                                   |
| 4.23 | Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, в следующих исполнениях: "СПДС-1-К", "СПДС-2-К", "СПДС-3-К", исполнение: "СПДС-3-К"                                                                                                                                                                                                                 | ООО "СПДС", Россия, РУ № ФСР 2010/09347                                        | для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами                                               |
| 4.24 | Аппараты для локализации апикального сужения корневого канала зуба по ТУ 9452-005-56755207-2016, вариант исполнения: "ЭпиОст-3Д"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ЗАО "Геософт Дент", Россия, РУ № ФСР 2007/00078                                | для локализации апикального сужения корневого канала зуба                                                                                                                                         |
| 4.25 | Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических наконечников: Assistina 301 Plus, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ", Австрия, РУ № РЗН 2017/5826              | для очистки и ухода за стоматологическими инструментами (в особенности за прямыми и угловыми наконечниками, турбинами, воздушными инструментами для удаления зубного камня и воздушными моторами) |
| 4.26 | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-001-41798-2005, исполнение ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия, РУ № ФСР 2010/07332                         | для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов                                                                                                         |
|      | Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-11157390-2011, модель: ГП-20 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011                                                                                                                                                                                                                                                                    | АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия, РУ № ФСР 2011/10267    | хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий                                                                                                                        |
| 4.27 | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFIB. (M110), производства Метракс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/10093; или Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9414-228-49640047-2015, варианты исполнения: 1. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01; или 2. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02.; или 3. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05 | ООО Концерн "Аксион", Россия, РУ № РЗН 2017/5391                               | для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма                                                                                                                                          |
|      | Монитор-дефибриллятор BeneHeart с принадлежностями, варианты исполнения: BeneHeart D3, или BeneHeart D6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шэньжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2011/10043 |                                                                                                                                                                                                   |
|      | Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Филипс Медикал Системс", США, РУ № ФСЗ 2008/02312                             |                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Дефибриллятор ZOLL, модель AED Plus с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZOLL Medical Corporation, США, РУ № РЗН 2014/1903                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.28 | Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, следующих моделей: 1. ХФ-140«ПОЗИС» 2. ХФ-140-1 «ПОЗИС» 3. ХФ-140-2 «ПОЗИС» 4. ХФ-140-3 «ПОЗИС» 5. ХФ-250-2 «ПОЗИС» 6. ХФ-250-3 «ПОЗИС» 7. ХФ-250-4 «ПОЗИС» 8. ХФ-250-5 «ПОЗИС» 9. ХФ-400-2 «ПОЗИС» 10. ХФ-400-3 «ПОЗИС» 11. ХФ-400-4 «ПОЗИС» 12. ХФ-400-5 «ПОЗИС», модель: ХФ-140 "ПОЗИС"                                                                                                                        | АО "ПОЗИС", Россия, РУ № ФСР 2009/05705                                               | для хранения лекарственных препаратов, реагентов и биологических препаратов в помещениях аптек, клиник, больниц, научноисследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.29 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096                                    | для обеззараживания воздуха (от бактерий, вирусов и других простейших организмов) ультрафиолетовым (УФ) излучением, создаваемым безозоновыми люминесцентными УФ бактерицидными лампами с длиной волны (253,7±5) нм, в салоне и кабине объемом от 15 до 100 м3 (в зависимости от варианта исполнения) специальных и специализированных транспортных средств, легковых автомобилей и микроавтобусов, с целью снижения уровня обсемененности воздушной среды. |
| 4.30 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа. исполнения: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | для оснащения лечебно - профилактических учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.31 | Аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable, модель VEX-P300 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "БАТЕК Ко., Лтд.", Корея, РУ № РЗН 2020/9794                                          | для проведения обследования полости рта (зубов и челюстей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.32 | Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor, варианты исполнения: 1. Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor Classic, модель IOS-U101B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Рэйенс Ко., Лтд.", Корея, РУ № РЗН 2022/17045                                        | для регистрации фотонов при выполнении рентгеновского снимка зубов и преобразования их в цифровое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | изображение, которое можно хранить отображать и проводить манипуляции с целью постановки диагноза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Аппарат радиовизиографический EzSensor с принадлежностями, производства "Рэйсис Ко., Лтд.", Корея                                                                                                                                         | "Рэйсис Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11400     | предназначен для регистрации рентгеновского излучения и последующей передачи цифрового изображения на компьютер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.33 | Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фартук защитный стоматологический ФРЗС-"Р-К"      | ООО "СПЕЦМЕДПРИБ ОР", Россия, РУ № ФСР 2010/08183  | для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Изделие предназначено для защиты туловища пациента, включая гонады, кости таза и щитовидную железу, со стороны пучка излучения при дентальных исследованиях или исследовании черепа                                                                                                                                                                             |
| 4.34 | Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, исполнение: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-"Р-К" | ООО "СПЕЦМЕДПРИБ ОР", Россия, РУ № ФСР 2010/08183  | для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты тела персонала спереди от горла до голени                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.   | <b>Кабинет «Офтальмология», в составе</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21, ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020, вариант исполнения: Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22                       | ООО "РЭМО-Технологии", Россия, РУ № РЗН 2023/20096 | для обеззараживания воздуха (от бактерий, вирусов и других простейших организмов) ультрафиолетовым (УФ) излучением, создаваемым безозоновыми люминесцентными УФ бактерицидными лампами с длиной волны (253,7±5) нм, в салоне и кабине объемом от 15 до 100 м3 (в зависимости от варианта исполнения) специальных и специализированных транспортных средств, легковых автомобилей и микроавтобусов, с целью снижения уровня обсемененности |

|     |                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                          |                                                         | воздушной среды.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.2 | Авторысфкератометр с принадлежностями, варианты исполнения: - HRK-9000A или - HRK-7000A или - HRK-8000A или - HRK-1                                      | "Хувит Ко., Лтд", Республика Корея, РУ № ФСЗ 2012/12458 | для измерения аномалии рефракции глаза (нарушения фокусировки света на сетчатке) путем измерения изменения света при попадании в глаз(а) пациента, а также данных кератометрии (кривизны передней поверхности роговицы, в частности, для определения наличия, степени и оси астигматизма)                |
|     | Авторысфкератометр RC-5000 с принадлежностями                                                                                                            | «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония, РУ № РЗН 2015/2726          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.3 | Офтальмоскопы портативные по ТУ 9442-005-11555014-2004, В следующих исполнениях: Офтальмоскоп портативный ОФТА-2,5 или Офтальмоскоп портативный ОФТА-3,5 | ООО "НПО "ЭКОМЕД", Россия, РУ № ФСР 2011/11212          | для исследования глазного дна методами прямой офтальмоскопии в условиях неотложной и скорой медицинской помощи и полевых, в службе врача общей практики, при диспансеризации населения, в армейской медицине и медицине чрезвычайных ситуаций, поликлинических и клинических учреждениях здравоохранения |
| 5.4 | Бесконтактный тонометр FT-1000 с принадлежностями                                                                                                        | "Томи Гмбх", Германия, РУ № ФСЗ 2008/01687              | для определения внутриглазного давления на основе аппланационной тонометрии Голдмана                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.5 | Проектор знаков экранный офтальмологический ТСП, с принадлежностями, вариант исполнения: ТСП-3000 Р                                                      | Томэй ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2010/07992               | для обеспечения интерпретируемости прибора с устройствами, приобретенными у различных поставщиков                                                                                                                                                                                                        |
| 5.6 | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОГИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002                                                                | ООО МРП "Техноаргус", Россия, РУ № ФСР 2007/00950       | для равномерного освещения таблиц с тестовыми знаками при установлении остроты зрения в офтальмологических отделениях клиники больницы, в офтальмологических кабинетах поликлиники, в пунктах подбора очков при магазинах - салонах «Оптика», при массовых                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | обследованиях и осмотрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.7  | Целевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Рексам Ко., Лтд.", Япония, РУ № РЗН 2016/4151                                        | для наблюдения, измерения и диагностики переднего сегмента глаза, катаракты и глаукомы, а также в подборе контактных линз. Целевая лампа используется для осмотра различных частей глаза                                                                                                                                                  |
|      | Лампа целевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Томэй ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2011/11147                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.8  | Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002, производства                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ООО МРП "Техноартус", Россия, РУ № ФСР 2007/00471                                     | для подбора корректирующих очков методом субъективной пробы в диапазоне рефракций до +/-30 дптр (при комбинации из 2-х линз) и астигматической разностью в интервале от +/-0,25 до +/-4,0 дптр.                                                                                                                                           |
|      | Наборы пробных очковых линз "АРМЕД" с оправой на 266, 232, 158, 103, 42, 60 линз                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "Янгсу Ююе Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай, РУ ФСЗ 2008/02071         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.9  | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | АО "Елатомский приборный завод", Россия, РУ № РЗН 2015/2997                           | для измерения истинного и тонометрического внутриглазного давления через веко у взрослых и детей без использования анестетиков, в диапазоне от 5 до 60 мм рт. ст., в котором точность измерения регламентируется при измерении истинного давления в пределах от 7 до 50 мм рт.ст., при измерении тонометрического - от 15 до 53 мм рт.ст. |
| 5.10 | Периметр автоматический офтальмологический AP-3000 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Томэй ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2011/09934                                             | для определения остроты зрения для дали, астигматизм и направление главных меридианов астигматического глаза                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.11 | Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100-"ПЕРИТЕСТ" по ТУ 9442-002-11432330-2003                                                                                                                                                                                                                      | ИП Гуров Андрей Сергеевич, Россия, РУ № ФСР 2012/13976                                | для определения границ поля зрения, дефектов внутри него и функций периферического зрения                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.12 | Стулья медицинские марки "КМ-Магма" по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: стул медицинский лабораторный СМ; стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; стул медицинский стационарный СМС; стул медицинский для врача СМВ; стул медицинский секционный СМС; стул медицинский стоматологический для врача СМСв; стул медицинский стоматологический для ассистента | ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия, РУ № ФСР 2008/03973 | для оснащения лечебно - профилактических учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|      |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | СМСа, исполнения: стул медицинский<br>лабораторный СМ: стул-табурет медицинский<br>лабораторный СМ1                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.   | <b>Специальное оборудование:</b>                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.1  | Автомобиль фургон ИАЦ-В-1767KD                                                                                                                | ООО<br>«Интеравтоцентр»,<br>Россия                                | Базовое транспортное<br>средство с<br>изотермическим<br>фургоном, в котором<br>размещаются<br>кабинеты                                                                                                                  |
| 6.2  | Автомобиль фургон ИАЦ-В-1767KD                                                                                                                | ООО<br>«Интеравтоцентр»,<br>Россия                                | Базовое транспортное<br>средство с<br>изотермическим<br>фургоном, в котором<br>размещаются<br>кабинеты                                                                                                                  |
| 6.3  | Отопитель воздушный PLANAR-44D-12-GP-S-<br>3925 по ТУ 4591-008-40991176-2005                                                                  | ООО «Адверс»,<br>Россия                                           | для отопления<br>изотермического<br>фургона                                                                                                                                                                             |
| 6.4  | Установка на крышная вентиляционная мод. 01-<br>9010-12.00                                                                                    | ООО<br>«Нижегородский<br>Завод<br>Автокомпонентов»,<br>Россия     | устройство для<br>поддержания<br>оптимальных<br>климатических<br>условий в<br>помещениях                                                                                                                                |
| 6.5  | Установка для кондиционирования воздуха "сплит-<br>системы", внешние и внутренние блоки<br>кондиционеров, с маркировкой Midea, модель<br>MSMB | MIDEA ELECTRIC<br>TRADING<br>(SINGAPORE)<br>CO.PTE.LTD.,<br>Китай | устройство для<br>поддержания<br>оптимальных<br>климатических<br>условий в<br>помещениях                                                                                                                                |
| 6.6  | Электрогенераторная установка с маркировкой<br>"ELEMEX", модели: SH16500EX-R, SH11000-R                                                       | "SAWAFUJI<br>ELECTRIC Co.,<br>LTD", Япония                        | для преобразования в<br>конечном итоге<br>энергию топлива в<br>электрическую                                                                                                                                            |
| 6.7  | Обогреватель электрический бытовой<br>конвекционного типа, т.м. "Noirot", модель Spot E-<br>5 Plus                                            | "Noirot S.A.S.",<br>Франция                                       | для отопления<br>помещений                                                                                                                                                                                              |
| 6.8  | Электрооборудование для обогрева помещений:<br>тепловая завеса электрическая стационарная, т.м.<br>"Ballu", модель ВНС-1.08-103               | ООО "Ижевский<br>завод тепловой<br>техники", Россия               | для нагрева и<br>отсечения холодного<br>уличного воздуха в<br>холодное время года и<br>для защиты от<br>теплого воздуха летом                                                                                           |
| 6.9  | Прибор приемно-контрольный охранный, модель<br>Кварц вариант 2                                                                                | ООО НПО<br>"Сибирский<br>Арсенал", Россия                         | пожарная<br>сигнализация                                                                                                                                                                                                |
| 6.10 | Многофункциональный автономный<br>преобразователь энергии MAH SINE, модель PRO                                                                | ООО "МикроАрт",<br>Россия                                         | электротехническое<br>устройство,<br>преобразующее<br>электрическую<br>энергию с одними<br>значениями<br>параметров и / или<br>показателей качества<br>в электрическую<br>энергию с другими<br>значениями<br>параметров |
| 6.11 | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                       | ООО "ВАНВЕНТ<br>ПК", Россия                                       | используются для<br>перемещения воздуха                                                                                                                                                                                 |
| 7.   | <b>Встраиваемая мебель:</b>                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1  | Шкаф стеллаж, ГОСТ 16371                                                                                                                      | ООО<br>«Интеравтоцентр»,                                          | для хранения<br>материалов.                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                          |                                   |                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | Россия                            | расходных материалов, медицинских изделий, образцов и других предметов                                                                                         |
| 7.2 | Шкаф для одежды, ГОСТ 16371                              | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | для хранения одежды медперсонала                                                                                                                               |
| 7.3 | Мойка                                                    | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой, инструментами, материалами и иными изделиями в том числе мытья медицинских инструментов и принадлежностей |
| 7.4 | Кушетка                                                  | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | для удобного размещения пациента при проведении различных лечебных процедур, а также для обеспечения оптимальных условий работы медицинского персонала         |
| 7.5 | Кресло                                                   | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | для удобного размещения пациента при проведении различных лечебных процедур, а также для обеспечения оптимальных условий работы медицинского персонала         |
| 7.6 | Кресло поворотное                                        | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | для удобного размещения пациента при проведении различных лечебных процедур, а также для обеспечения оптимальных условий работы медицинского персонала         |
| 7.7 | Столешница, ГОСТ 16371                                   | ООО «Интеравтоцентр», Россия      | для проведения терапевтических процедур, установки медицинских изделий                                                                                         |
| 7.8 | Столики процедурные передвижные, модель СП-п-01-МСК(501) | ООО «Медстальконструкция», Россия | для оснащения стоматологических, смотровых процедурных кабинетов                                                                                               |

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

131 (сто тридцать один) листов  
цифрами прописью

Должность *Директор*

Подпись *Исаев*

« 10 » 20 23 г. М.П.

