



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»

Кривицкая И.А.
25 марта 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«РЕКЛИНАТОР ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ – «КРЕЙТ»»
НЕСТЕРИЛЬНО
ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009
Регистрационное удостоверение № _____ от _____**

Изделия применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Реклинатор предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, при остеохондрозе грудного отдела, грыжах межпозвонковых дисков, а также для разведения верхнего плечевого пояса и формирования осанки.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сколиозы, крыловидные лопатки;
Кифозы и кифосколиозы;
Остеохондроз грудного отдела позвоночника;
Межпозвонковые грыжи грудного отдела позвоночника;
Период реабилитации после травм и операций грудного отдела позвоночника.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Реклинатор ортопедический - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- 6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- 6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.
- 6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- 6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1 Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-10.

Таблица 1 - Размерный ряд и масса изделия F-08

Размер	Обхват груди, см	Масса, г
		F-08
№ 1	55-65	135,7
№ 2	60-75	139,3
№ 3	70-85	146,7
№ 4	80-95	154,0
№ 5	90-105	161,3
№ 6	100-115	168,6
№ 7	110-125	175,9
№ 8	120-135	183,2

Таблица 2- Размерный ряд и масса изделия F-09

Размер	Обхват под грудью, см	Масса, г
		F-09
№ 1	55-65	100,2
№ 2	65-80	122,1
№ 3	75-90	144
№ 4	85-100	149,9
№ 5	95-110	155,8
№ 6	105-120	161,7
№ 7	115-130	167,6
№ 8	125-140	173,5

Таблица 3 - Размерный ряд и масса изделия F-11

Размер	Рост, см	Обхват талии, см	Масса, г
			F-11
№ 1, P1	До 150	40-50	143,4
№ 2, P1		50-60	163,2
№ 3, P1		60-70	184,5
№ 3, P2	150-160	60-75	173,5
№ 4, P2		75-90	188,6
№ 5, P2		90-105	209,1
№ 6, P2		105-120	223,4
№ 7, P2		120-135	237,7
№ 8, P2		135-150	252,0
№ 3, P3	160-170	60-75	202,0
№ 4, P3		75-90	224,2
№ 5, P3		90-105	234,0
№ 6, P3		105-120	243,8
№ 7, P3		120-135	253,6
№ 8, P3		135-150	263,4
№ 3, P4	170-180	60-75	211,8
№ 4, P4		75-90	242,2
№ 5, P4		90-105	249,6
№ 6, P4		105-120	257,0
№ 7, P4		120-135	264,4
№ 8, P4		135-150	271,8

Таблица 4 - Размерный ряд и масса изделия E-11

Размер	Обхват талии, см	Рост, см	Масса, г
			E-11
№ 1	40-50	До 150	155,2
№ 2	50-60		172,2
№ 3	60-70		189,2

№ 4	70-80		206,2
-----	-------	--	-------

Таблица 5 - Размерный ряд и масса изделия F-14

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г
		F-14
№ 1	50-70	97,2
№ 2	70-90	107,1
№ 3	90-115	117,0
№ 4	115-140	128,0
№ 5	140-175	139,0
№ 6	175-210	150,0

Таблица 6 - Размерный ряд и масса изделия E-14

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г	Масса, г
		F-14	F-16
№ 1	40-55	57,8	68,8
№ 2	55-75	72,3	70,2
№ 3	85-100	86,8	93,5
№ 4	120-115	101,3	110,1
№ 5	115-130	115,8	118,4
№ 6	130-135	130,3	68,8

Таблица 7 - Размерный ряд и масса изделия F-19, F-17

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г	Масса, г
		F-19	F-17
№ 1	55- 70	68,8	68,8
№ 2	70- 85	73,1	70,2
№ 3	85- 100	82,0	93,5
№ 4	100- 115	95,1	110,1
№ 5	115- 130	100,5	118,4

Таблица 8 - Размерный ряд и масса изделия F-15, F-18 (*размеры № 9-10 только для F-18)

Размер	Рост, см	Обхват талии, см	Масса, г	Масса, г
			F-15	F-18
№ 3, P1	150-160	60-75	244,6	421,0
№ 4, P1		75-90	283,3	491,0
№ 5, P1		90-105	287,4	561,0
№ 6, P1		105-120	291,5	631,0
№ 7, P1		120-135	295,6	701,0
№ 8, P1		135-150	299,7	771,0
*№ 9, P1		150-165	-	841,0
*№ 10, P1		165-180	-	911,0
№ 3, P2	160-170	60-75	257,0	470,0
№ 4, P2		75-90	294,2	480,0
№ 5, P2		90-105	307,1	500,0
№ 6, P2		105-120	309,7	520,0
№ 7, P2		120-135	313,8	545,0
№ 8, P2		135-150	317,9	580,0
*№ 9, P2		150-165	-	615,0
*№ 10, P2		165-180	-	750,0
№ 3, P3	170-180	60-75	272,2	480,0
№ 4, P3		75-90	317,3	500,0
№ 5, P3		90-105	325,3	520,0
№ 6, P3		105-120	327,9	545,0
№ 7, P3		120-135	332,0	580,0

№ 8, P3	180-190	135-150	336,1	615,0
*№ 9, P3		150-165	-	750,0
*№ 10, P3		165-180	-	790,0
№ 3, P4		60-75	287,4	500,0
№ 4, P4		75-90	340,4	520,0
№ 5, P4		90-105	343,5	545,0
№ 6, P4		105-120	346,1	580,0
№ 7, P4		120-135	350,2	615,0
№ 8, P4		135-150	354,3	750,0
*№ 9, P4		150-165	-	790,0
*№ 10, P4		165-180	-	830,0

Таблица 9 - Размерный ряд и масса изделий Б-505, Р-150

Размер	Обхват под грудью, см	Масса, г	
		Б-505	Р-150
№ 1	50-60	158,2	141,9
№ 2	55-65	214,9	162,1
№ 3	60-75	300,7	176,6
№ 4	70-85	316,5	193,6
№ 5	80-95	338,4	225,6
№ 6	90-105	356,6	242,3
№ 7	100-115	374,8	251,1
№ 8	115-130	393,0	259,9
№ 9	130-145	411,2	268,7

Таблица 10- Размерный ряд и масса изделия Б-508

Размер	Рост, см	Обхват талии, см	Масса, г
			Б-508
№ 3, P1	155-165	60-80	400,2
№ 4, P1		80-100	430,5
№ 5, P1		100-120	471,2
№ 6, P1		120-140	505,2
№ 7, P1		140-160	540,5
№ 8, P1		160-180	580,6
№ 3, P2	165-175	60-80	440,1
№ 4, P2		80-100	471,2
№ 5, P2		100-120	500,2
№ 6, P2		120-140	532,6
№ 7, P2		140-160	561,2
№ 8, P2		160-180	590,5
№ 3, P3	175-185	60-80	475,5
№ 4, P3		80-100	505,6
№ 5, P3		100-120	535,6
№ 6, P3		120-140	562,3
№ 7, P3		140-160	600,3
№ 8, P3		160-180	625,5
№ 3, P4	185-195	60-80	500,3
№ 4, P4		80-100	525,6
№ 5, P4		100-120	565,6
№ 6, P4		120-140	610,2
№ 7, P4		140-160	635,5
№ 8, P4		160-180	670,5

Таблица 11 - Размерный ряд и масса изделий Д-130, Д-131, Д-132, Д-133

Размер	Обхват под грудью, см	Масса, г			
		Д-130	Д-131	Д-132	Д-133
№ 1	55-70	76	91,3	160,3	140,3

№ 2	70-75	78,6	93,1	168,7	148,7
№ 3	75-80	81,2	94,9	177,1	157,1
№ 4	80-85	84,1	93,1	188,0	168,0
№ 5	85-90	90,4	94,9	195,3	175,3
№ 6	90-95	93,8	98,3	210,5	190,5
№ 7	95-100	98,2	101,9	214,9	194,9
№ 8	100-105	102,6	107,1	217,4	197,4
№ 9	105-110	107	112,3	219,9	199,9
№ 10	110-115	111,4	117,5	222,4	202,4
№ 11	115-120	115,8	122,7	224,9	204,9
№ 12	120-125	120,2	127,9	227,4	207,4

Таблица 12- Размерный ряд и масса изделия У-700, У-701

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г	Масса, г
		У-700	У-701
№ 3	73-82	77,0	128,0
№ 4	83-95	89,0	135,0
№ 5	96-106	113,0	140,0
№ 6	107-115	129,0	150,0
№ 7	116-124	141,0	165,0

Таблица 13 - Размерный ряд и масса изделия У-702

Размер	Обхват груди, см	Масса, г
		У-702
№ 2	52-56	48,0
№ 3	56-60	50,0
№ 4	60-64	53,0
№ 5	64-68	55,0
№ 6	68-72	57,0
№ 7	72-76	60,0
№ 8	76-80	62,0
№ 9	80-84	66,0
№ 10	84-88	69,0
№ 11	88-92	72,0

Таблица 14- Размерный ряд и масса изделия У-703, У-704, У-705 (*размеры №9,10,11 только для У-703)

Размер	Обхват груди, см	Масса, г	Масса, г	Масса, г
		У-703	У-704	У-705
№ 2	84-88	125,0	119,0	115,1
№ 3	88-92	131,0	125,0	118,5
№ 4	92-96	144,0	130,0	222,0
№ 5	96-100	152,0	136,0	230,5
№ 6	100-104	161,0	141,0	242,0
№ 7	104-108	170,0	148,0	258,1
№ 8	108-112	178,0	153,0	269,5
*№ 9	112-116	186,0	-	-
*№ 10	116-120	194,0	-	-
*№ 11	120-124	206,0	-	-

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

- 8.2. Надеть реклинатор на нижнее белье. При необходимости ребра жесткости изогнуть по форме спины. Наплечные ремни зафиксировать на спине (для изделий F-08, F-09, F-11, E-11, F-14, E-14, F-17) или перекрестить на спине и зафиксировать спереди на талии (для изделий F-15, F-18, Б-505, Б-508, Р-150). Изделия Д-130, Д-131, Д-132, Д-133, F-19, У-700, У-701, У-702, У-703, У-704, У-705 надеть как жилет и зафиксировать по фигуре.
- 8.3. СТИРКА И УХОД.
- 8.3.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°C.
- 8.3.2. Отбеливание запрещено.
- 8.3.3. Не применять барабанную сушилку.
- 8.3.4. Глажение запрещено.
- 8.3.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- 9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- 9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- 9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- 11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 лист(ов)

Руководитель организации

Круж

