

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор



ООО «МайДент24»

Крейзеров Б.И.

2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению


**«Материалов слепочных стоматологических Exaplast:
база Exaplast-putty, коррегирующий слой Exasoft-wash,
катализатор Exagel-cat»**

производства фирмы:

«DETAH GmbH & Co. KG», Германия

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральный директор
ООО «МайДент24»

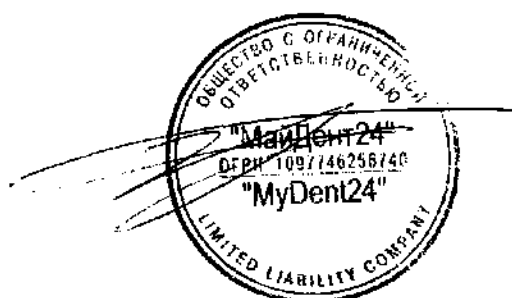

Крейзеров Б.И.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- exaplast putty применяется для снятия первичных слепков в двухфазной технике, базисной массы в технике двойного смешивания, для снятия ситуационных слепков, для регистрации прикуса
- exasoft wash применяется для снятия корректирующих слепков в технике двойного слепка и двойного смешивания, а также для формирования подложки

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

exaplast putty

DIN EN ISO 4823 - тип O

exasoft wash

DIN EN ISO 4823 - тип 3

• Дозировка:

exaplast putty / exagel cat

1 мерная ложка = 13,5 г / 6 см = 0,3 г

exasoft wash / exagel cat 10 см = 5,0 г / 10 см = 0,5 г

• Цвета:

exaplast putty: зелёный

exasoft wash: фиолетовый

exagel cat: синий

Время замешивания: около 30 с

Время обработки: около 1 минуты 15 секунд*

Время схватывания: exaplast putty: около 4 минут 45 секунд*

exasoft wash: около 3 минут 45 секунд*

• Длительность пребывания в ротовой полости:

exaplast putty: около 3 минут 30 секунд

exasoft wash: около 2 минут 30 секунд

• Деформация под давлением:

exaplast putty: 2,9 %

exasoft wash: 7,0 %

Восстановление после деформации:

exaplast putty: 98,0 %

exasoft wash: 98,5 %

• Линейное изменение размеров:

exaplast putty: 0,3 %

exasoft wash: 0,7 %

• Обработка: при 23 ° C ± 2 ° C, 50 ± 5% отн. влажности

с момента начала смешивания при 23 ° C ± 2 ° C, 50 ± 5% отн.

влажности. Более высокая температура уменьшает, более низкая –



увеличивает указанное время.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Подготовка слепочной ложки. Выбрать слепочную ложку в соответствии с техникой производства слепка. Затем выполняется снятие первичного слепка с помощью eхaplast putty

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Первичный слепок. Заполнить мерную ложку материалом eхaplast putty Шпателем нанести eхaplast putty на блок смешивания и выдавить желобки крест-накрест. Добавить eхagel cat согласно инструкции по дозировке. Массу и активатор тщательно вымешать шпателем и затем пальцами до достижения равномерного цвета (около 30 с). Прорезание отводных каналов и вырезание слепка рекомендуется произвести перед выполнением последующих действий. Очистить поверхность первичного слепка перед снятием корректирующего слепка

Корректирующий слепок. Выдавить полоски eхasoft wash и eхagel cat одинаковой длины на блок смешивания (рис. 5), при этом следить за равномерной толщиной полосок. Смешивать оба компонента шпателем в течение 30 с до получения однородного оттенка. Забор и нанесение eхasoft wash производить только одноразовым / специальным шприцем для слепочной массы.

Дезинфекция. После извлечения из ротовой полости промыть слепок тёплой проточной водой. Последующую дезинфекцию можно выполнять в 2 % растворе глутарового альдегида в течение 15 минут

Изготовление модели. Слепок необходимо отлить не ранее 30 минут и не позднее 72 часов после извлечения из ротовой полости. Рекомендуемые материалы для моделирования: стоматологические гипсы классов III и IV, а также предлагаемые в продаже моделировочные пластмассы

Гальванизация. Слепки могут быть гальванизированы обычными медными и серебряными пластинами.

Очистка ложки. Затвердевший материал поддаётся механическому удалению тупым инструментом. Плёнку адгезива можно легко удалить аэрозолем без фреонов. Применять только в хорошо вентилируемых помещениях. Затем очистить и дезинфицировать ложку обычным способом.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Важные указания по работе

- После снятия первичного слепка с exaplast putty рекомендуется использовать exasoft wash для корректирующего слепка.

- Меньшее количество активатора и более высокие температуры ускоряют затвердевание, меньшее количество и более низкие температуры - замедляют.

Тщательно закрыть тюбик exagel cat после использования.

Отверждённые слепочные массы химически устойчивы - избегать пятен на одежде.


Не допускать остатков материала во рту.


- Во избежание раздражений не допускать попадания катализатора в глаза и на кожу, при необходимости тщательно промыть водой. При попадании в глаза немедленно обратиться к врачу.

- Соблюдайте указания по технике безопасности.

Материалы сохраняют свои свойства как минимум до даты, указанной на упаковке, в хорошо закрытой емкости, при 15-25° С и отн. влажности 50%. Сlepки хранить при обычной комнатной температуре. Избегать жары и прямого солнечного света.

Запрещается хранить при температуре выше 25°С.

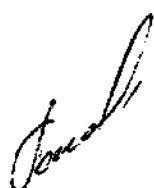

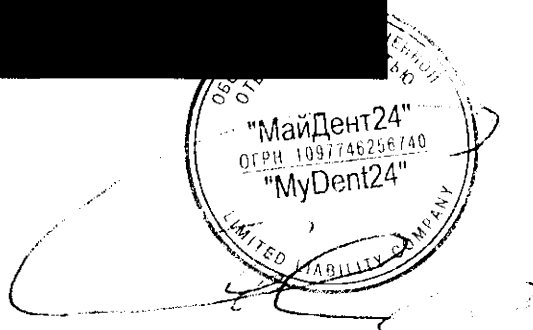

Скоф