

ООО «ХЕЛСЛАБ»

ОГРН 1187746755206, ИНН/КПП 7727390162/772001001, Юр. адрес: 143909, МО, г.о. Балашиха, г.
Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А
р/с 40702810738000213807 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «ХЕЛСЛАБ»
Коканов М.И.

«01» июня 2022 г.

Инструкция по применению медицинского изделия

Бинт когезивный самофиксирующийся
по ТУ 32.50.22-003-32459763-2022,
в вариантах исполнения

2022

Наименование

Бинт когезивный самофиксирующийся по ТУ 32.50.22-003-32459763-2022, в вариантах исполнения (см. Приложение 1)

Назначение

Предназначен для фиксации перевязочных средств, подкладочного материала и компрессов на различных частях тела.

Потенциальный потребитель

Медицинский работник, пациент

Показания к применению

Бинт используется при различных манипуляциях, требующих фиксации перевязочных средств, подкладочного материала и компрессов на различных частях тела, в том числе на суставах и частях тела имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов бинта (аллергические реакции).

Не следует использовать бинт при кожных заболеваниях и на повреждённой коже.

Возможные побочные эффекты

Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Область применения

Бинт применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, как пациентами, так и медицинским персоналом.

Бинт может быть использован для оказания первой помощи (на неповрежденной коже).

Бинт является изделием одноразового использования кратковременного контакта (до 24 часов) с неповрежденной кожей.

Климатическое исполнение бинта – УХЛ категории размещения изделия 3.1 по ГОСТ 15150 с рабочим значением диапазона температуры воздуха при эксплуатации от -10°C до +40°C и относительной влажности в диапазоне 25% - 85%.

Рекомендуется хранить при сокращенном температурном диапазоне от 0°C до +30°C и относительной влажности в диапазоне 25% - 85%.

Способ наложения

Бинт раскручивается непосредственно на поверхности кожи, накладывается путём совершения необходимого количества равномерных витков (минимум 2) без складок, лишнее при необходимости отрезать. Каждый последующий виток должен покрывать 40-50% предыдущего. Открытые раны должны быть дополнительно защищены повязкой.

Меры предосторожности при применении

- не применять при наличии аллергической реакции и индивидуальной непереносимости на компоненты бинта;
- не применять при наличии кожных заболеваний;
- не применять повторно;
- применять только наружно;
- не использовать, если упаковка или бинт повреждены или загрязнены;
- не использовать увлажнённый или нагретый бинт;
- утилизировать сразу после использования;
- не использовать по истечении срока годности;
- заменять по необходимости или не позже чем через 24 часа.

Основные функциональные и технические характеристики бинта

По форме, конструкции и применяемым материалам бинт должен представлять собой медицинское изделие ленточной формы в рулонах на текстильной (тканевой) с крепированной структурой основе с микроточечной пропиткой гипоаллергенным клеем включая клей, содержащий латекс для усиления эффекта сцепления.

Бинт не должен иметь внешних дефектов, например: неровно обрезанных краев, дыр, посторонних включений, комков, неравномерной пропитки клеем, не покрытых клеем отрезков.

Физико-технические показатели бинта представлены в таблице 1.

Таблица 1

Растяжимость, %	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка, Н (кгс)	Когезионная прочность расслаивания, Н/м, более
От 10 до 160 включ.	От 40 до 120 включ.	Не менее 117,6 (12)	15 – 70

Масса-габаритные показатели изделия отражены в таблице 2.

Таблица 2

Тип материала	Размеры			Масса, г $\pm 20\%$
	Ширина, см $\pm 10\%$	Длина в растянутом состоянии (при максимальном натяжении до разрыва), м $\pm 20\%$	Фактическая длина в развернутом состоянии (без натяжения), см $\pm 20\%$	
Тканевая основа с латексом	2,5	4,5	200	5,5
	4	4	210	10
	5	4,5	225	12
	6	4	200	13
	8	4	200	18
	10	4,5	180	25
	4	10	700	24
	6	10	700	35
	8	10	700	53
	10	10	700	65
	4	20	1300	36
	6	20	1300	50
	10	20	1300	87
	12	20	1300	105
	2,5	4,5	220	5
	4	4	200	8,5
Тканевая основа (без латекса)	5	4,5	225	11,5
	6	4	200	13
	8	4	200	17,5
	10	4,5	225	20
	4	10	700	22
	6	10	700	30
	8	10	700	53
	10	10	700	63
	4	20	1300	36
	6	20	1300	48
	10	20	1300	84
	12	20	1300	108

Материалы, из которых изготовлено изделие

Для изготовления бинта возможно использование материалов, перечень которых приведён в таблице 3

Таблица 3

Материал, марка	Состав
Тканевая основа	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Тканевая основа бежевого цвета	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Тканевая основа черного цвета	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Тканевая основа голубого цвета	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Тканевая основа красного цвета	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Тканевая основа зеленого цвета	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Тканевая основа желтого цвета	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Тканевая основа с рисунком «Смайл»	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Тканевая основа с рисунком «Лапки»	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Тканевая основа с рисунком «Камуфляж»	Смесь 94-95% хлопок и 4-5% спандекс (полиуретан), 0-1% краситель
Клей синтетический гипоаллергенный	100% полиизопреновый полимер
Клей, содержащий латекс	50% натуральный каучуковый латекс 5% белое масло 1% эмульгатор 0.5% консервант 1% ПАВ 1% стабилизатор 41.5% вода
Втулка	Бумага

Бинт не содержит лекарственных средств и материалов животного и (или) человеческого происхождения

Изделие нестерильное. Одноразового применения. Готово к применению. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Бинт когезивный самофиксирующийся в вариантах исполнения по ТУ 32.50.22-003-32459763-2022 сочетается со всеми видами медицинских

изделий, которые применяются при проведении необходимых для пациента процедур, в виде перевязочных средств, подкладочного материала и компрессов. В том числе с ватой, бинтом, кожной повязкой.

Транспортирование и хранение

Бинт в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта крытого исполнения или в контейнерах на любые расстояния, с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении бинта должна быть обеспечена его защита от механических повреждений, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования бинта в части воздействия климатических факторов внешней среды – по сокращенным условиям хранения 3 по ГОСТ 15150 при температуре от 0°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Бинт должен храниться в упакованном виде в закрытых проветриваемых помещениях при температуре от 0°C до +30°C и относительной влажности в диапазоне 25% - 85% расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с предохранением от попадания на него прямых солнечных лучей (сокращенные условия хранения 3 по ГОСТ 15150).

Бинт должен храниться при отсутствии в окружающей среде паров кислотных, щелочных, органических растворителей, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Утилизация

Утилизация использованного и с истёкшим сроком годности бинта, а также использованной тары должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ и СанПиН 2.1.3684-21 как отход класса А (неиспользованный бинт и использованная тара) и Б (использованный бинт).

В домашних условиях утилизация использованного и с истёкшим сроком годности бинта, а также использованной тары должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ - как твердые коммунальные отходы.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие бинта требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Срок годности бинта составляет 5 (пять) лет со дня изготовления сырьевого компонента, (тканевая основа; клей синтетический гипоаллергенный; клей, содержащий латекс).

По истечении срока годности бинт должен быть подвергнут утилизации.

При обнаружении потребителем в пределах срока годности дефектов бинта, обозначенных эксплуатационной документацией как недопустимые, что должно быть подтверждено доказательствами (экспертизой), бинт должен быть заменён предприятием-изготовителем (поставщиком).

Обозначение используемых символов на маркировке

Таблица 4

Символ	Обозначение символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Использовать до (дата)
	Код партии
	Нестерильно
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Предел температуры (0° нижняя и +30° верхняя)
	Запрет на повторное применение
	Содержит натуральный каучуковый латекс (при его наличии)
	Диапазон влажности (25% нижняя и 85% верхняя)
	Символ утилизации картона
	Беречь от загрязнений окружающую среду

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7а, Этаж № 1, помещ. IV

Место производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха, промзона Северная. ул. Звездная, вл. 7 А

Бинт когезивный самофиксирующийся по ТУ 32.50.22-003-32459763-2022, в вариантах исполнения

I. TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе:

1.1 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом). Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.2 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (без латекса). Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.3 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) цветной: бежевый. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.4 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) цветной: чёрный. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.5 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) цветной: голубой. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.6 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) цветной: красный. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.7 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) цветной: зеленый. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.8 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) цветной: желтый. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.9 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной: «Смайл»**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.10 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной: «Лапки»**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.11 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной: «Камуфляж»**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.12 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (**без латекса**) **цветной: бежевый**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.13 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (**без латекса**) **цветной: чёрный**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.14 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (**без латекса**) **цветной: голубой**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.15 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (**без латекса**) **цветной: красный**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.16 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (**без латекса**) **цветной: зеленый**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

1.17 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (**без латекса**) **цветной: желтый**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м;

4 см х 10 м; 6 см х 10 м; 8 см х 10 м; 10 см х 10 м; 4 см х 20 м; 6 см х 20 м; 10 см х 20 м; 12 см х 20 м.

1.18 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе **(без латекса) цветной: «Смайл»**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м; 4 см х 4 м; 5 см х 4,5 м; 6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4,5 м; 4 см х 10 м; 6 см х 10 м; 8 см х 10 м; 10 см х 10 м; 4 см х 20 м; 6 см х 20 м; 10 см х 20 м; 12 см х 20 м.

1.19 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе **(без латекса) цветной: «Лапки»**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м; 4 см х 4 м; 5 см х 4,5 м; 6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4,5 м; 4 см х 10 м; 6 см х 10 м; 8 см х 10 м; 10 см х 10 м; 4 см х 20 м; 6 см х 20 м; 10 см х 20 м; 12 см х 20 м.

1.20 TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе **(без латекса) цветной: «Камуфляж»**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м; 4 см х 4 м; 5 см х 4,5 м; 6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4,5 м; 4 см х 10 м; 6 см х 10 м; 8 см х 10 м; 10 см х 10 м; 4 см х 20 м; 6 см х 20 м; 10 см х 20 м; 12 см х 20 м.

II. FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе:

2.1 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом). Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м; 4 см х 4 м; 5 см х 4,5 м; 6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4,5 м; 4 см х 10 м; 6 см х 10 м; 8 см х 10 м; 10 см х 10 м; 4 см х 20 м; 6 см х 20 м; 10 см х 20 м; 12 см х 20 м.

2.2 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе **(без латекса)**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м; 4 см х 4 м; 5 см х 4,5 м; 6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4,5 м; 4 см х 10 м; 6 см х 10 м; 8 см х 10 м; 10 см х 10 м; 4 см х 20 м; 6 см х 20 м; 10 см х 20 м; 12 см х 20 м.

2.3 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной: бежевый**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м; 4 см х 4 м; 5 см х 4,5 м; 6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4,5 м; 4 см х 10 м; 6 см х 10 м; 8 см х 10 м; 10 см х 10 м; 4 см х 20 м; 6 см х 20 м; 10 см х 20 м; 12 см х 20 м.

2.4 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной: чёрный**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м; 4 см х 4 м; 5 см х 4,5 м; 6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4,5 м; 4 см х 10 м; 6 см х 10 м; 8 см х 10 м; 10 см х 10 м; 4 см х 20 м; 6 см х 20 м; 10 см х 20 м; 12 см х 20 м.

2.5 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной: голубой**. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м; 4 см х 4 м; 5 см х 4,5 м; 6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4,5 м; 4 см х 10 м; 6 см х 10 м; 8 см х 10 м; 10 см х 10 м; 4 см х 20 м; 6 см х 20 м; 10 см х 20 м; 12 см х 20 м.

2.6 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной: красный**. Размер (длина в растянутом состоянии):

2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.7 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной:** зеленый. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.8 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной:** желтый. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.9 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной:** «Смайл». Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.10 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной:** «Лапки». Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.11 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (с латексом) **цветной:** «Камуфляж». Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.12 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (**без латекса**) **цветной:** бежевый. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.13 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (**без латекса**) **цветной:** чёрный. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.14 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (**без латекса**) **цветной:** голубой. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.15 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (без латекса) цветной: красный. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.16 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (без латекса) цветной: зеленый. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.17 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (без латекса) цветной: желтый. Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.18 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (без латекса) цветной: «Смайл». Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.19 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (без латекса) цветной: «Лапки». Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

2.20 FIRSTAID Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (без латекса) цветной: «Камуфляж». Размер (длина в растянутом состоянии): 2,5 см × 4,5 м; 4 см × 4 м; 5 см × 4,5 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м; 4 см × 10 м; 6 см × 10 м; 8 см × 10 м; 10 см × 10 м; 4 см × 20 м; 6 см × 20 м; 10 см × 20 м; 12 см × 20 м.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на
2 листах

Генеральный директор ООО «ХЕЛСЛАБ»

/ Коканов М.И.

