

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Альгимед»




Д. Л. Славашевич

«24» апреля 2023 г.


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Система автоматизированная для жидкостной цитологической диагностики
«NOVAPREP Processor System», с принадлежностями, в вариантах исполнения**

1. Система автоматизированная для жидкостной цитологической диагностики «NC . . PREP Processor System» с принадлежностями, вариант исполнения NPS 25:

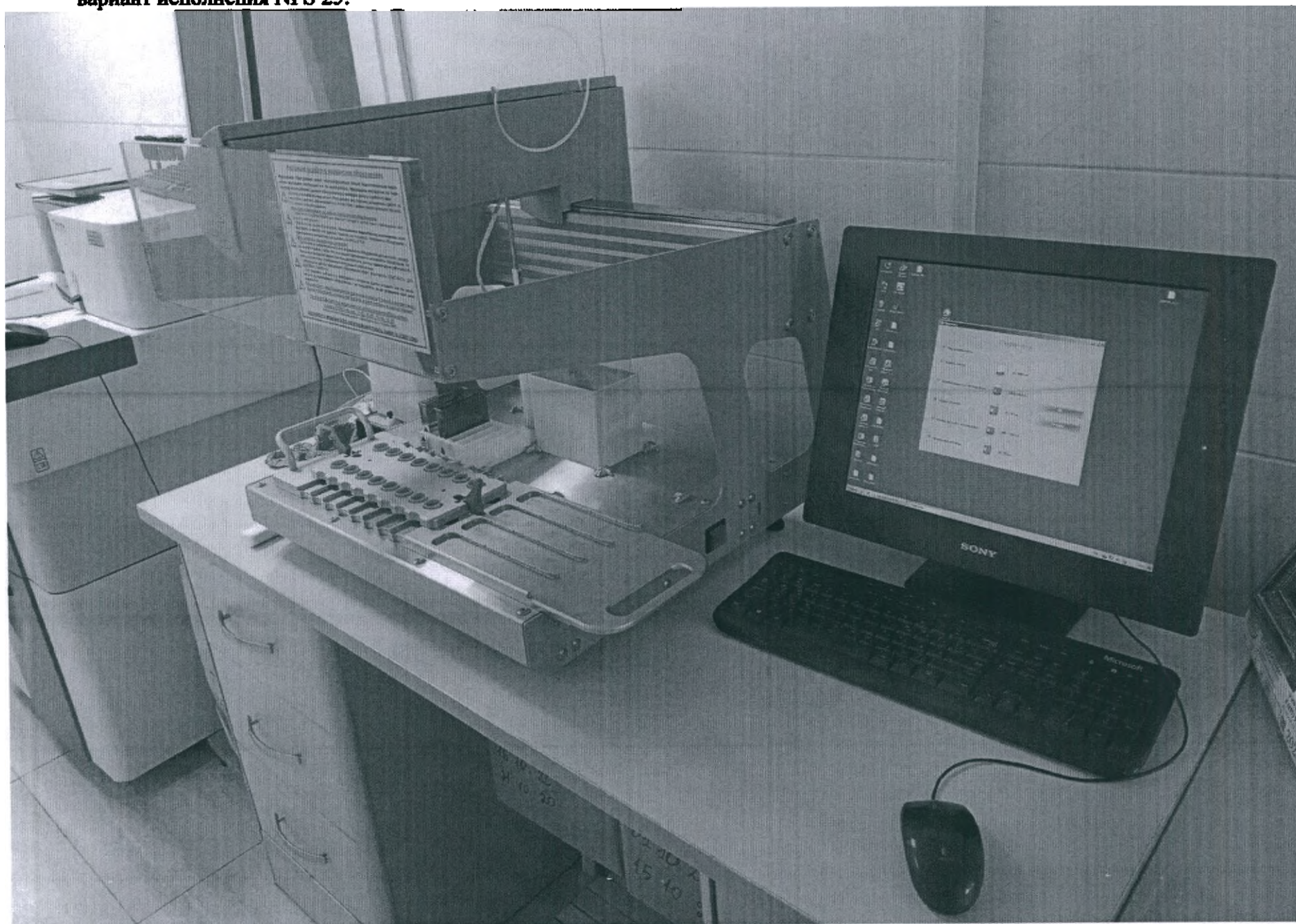

1. Робот-дозатор с одной иглой модель RD114 – 1 шт.

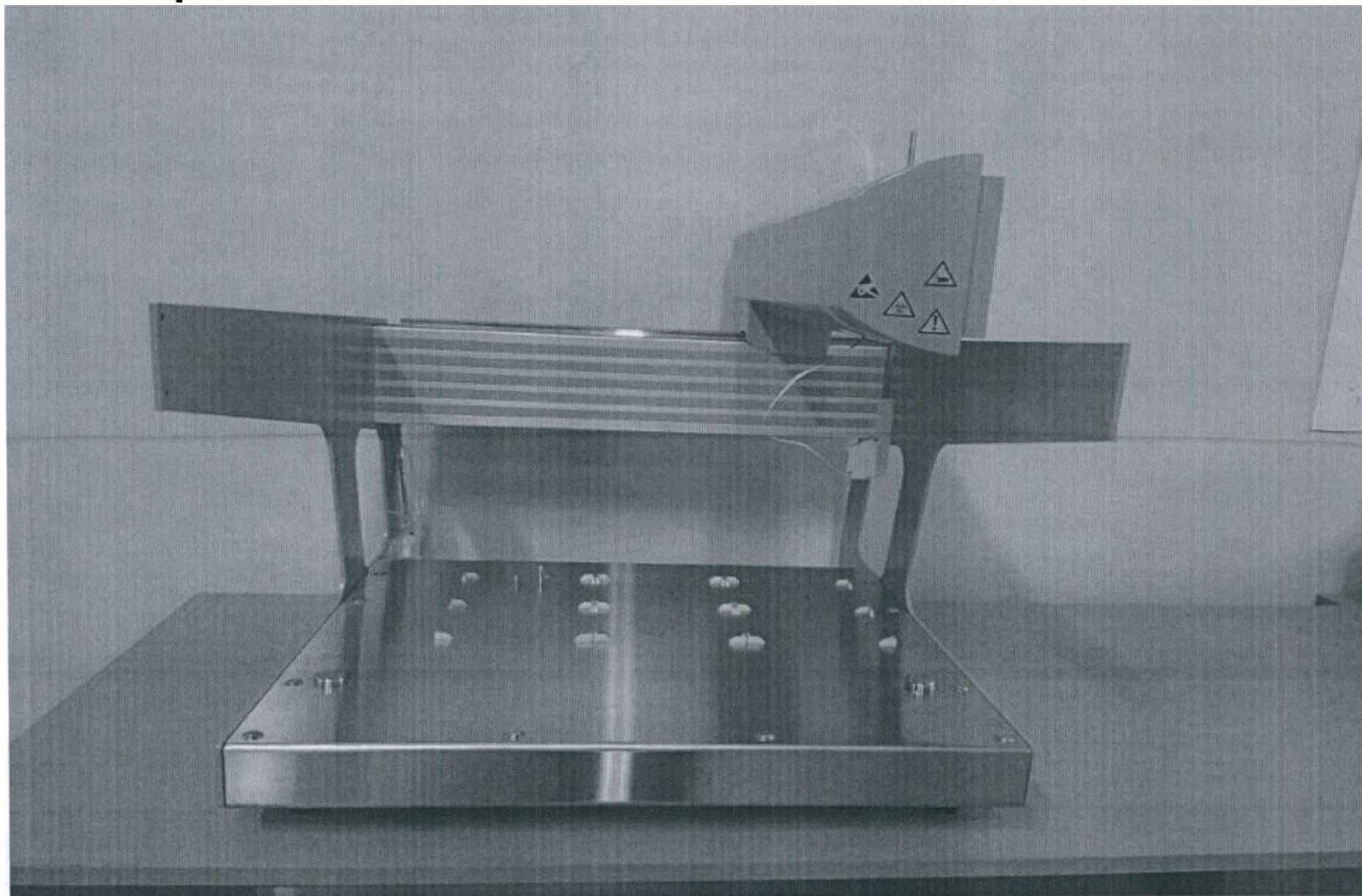

Маркировочная табличка системы автоматизированной для жидкостной цитологической диагностики «NOVAPREP Processor System» с принадлежностями, вариант исполнения NPS 25

NOVAPrep®

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor System»,
с принадлежностями, в вариантах исполнения



ООО «Альгимед Техно»
220090, Республика Беларусь,
г. Минск, Логойский тракт
22/1, ком. 309

Исполнение:	NPS 25
REF	NOV010
Сеть:	110-240 В ~ 50/60 Гц
Максимальная номинальная мощность:	450 Вт
SN	35326


IVD




Для профессионального применения
Регистрационное удостоверение № _____

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед» (ООО «Альгимед»)
121596, Российская Федерация, г. Москва, ул. Толбухина, дом 10, корп. 1, комн. 39,
Тел. +7 499 682 61 09


2. Ограничительное стекло модель LG558/1 – 1 шт.

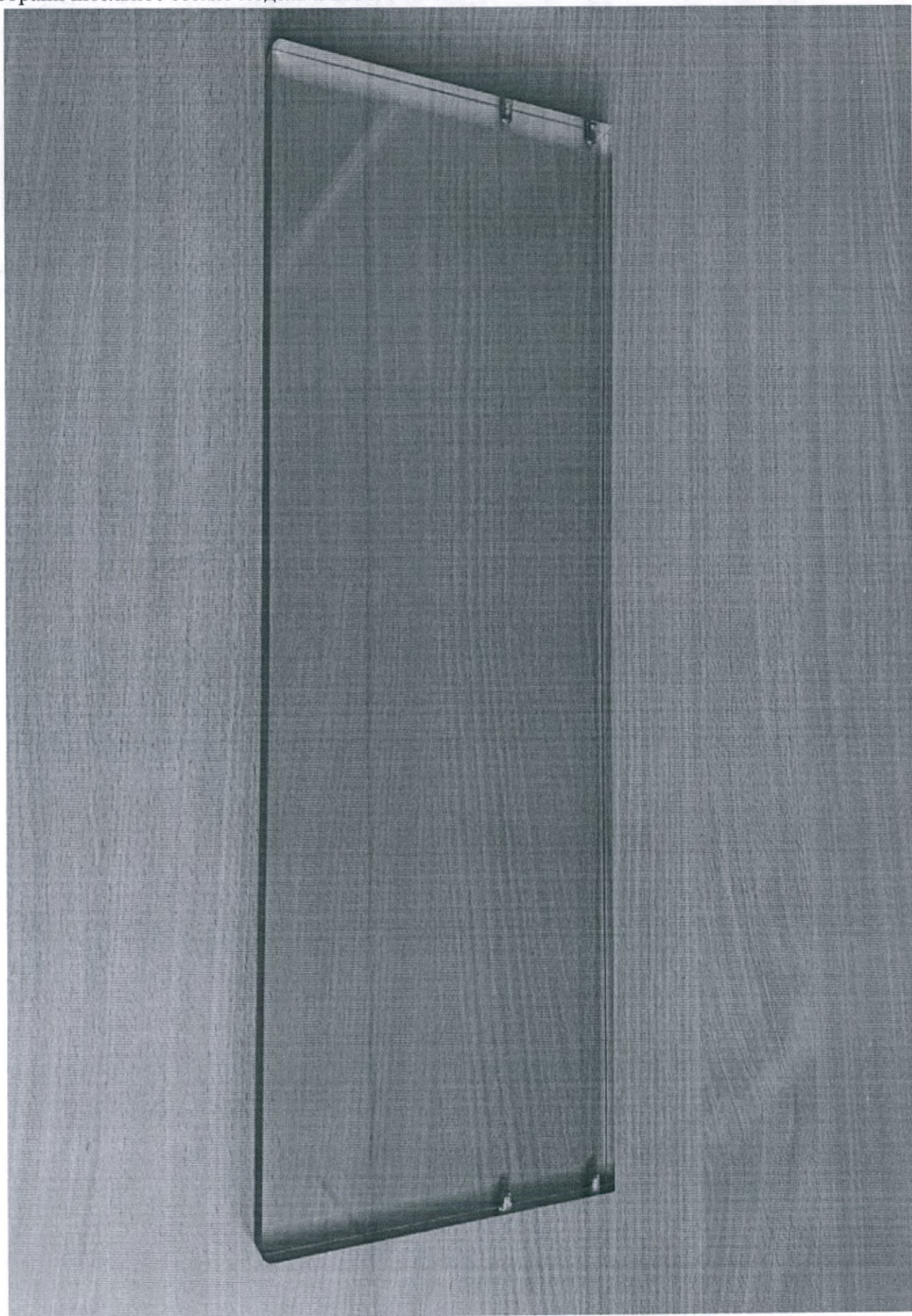


3. Загрузочная панель, модель DECKTRAY NOV019 – 1 шт.

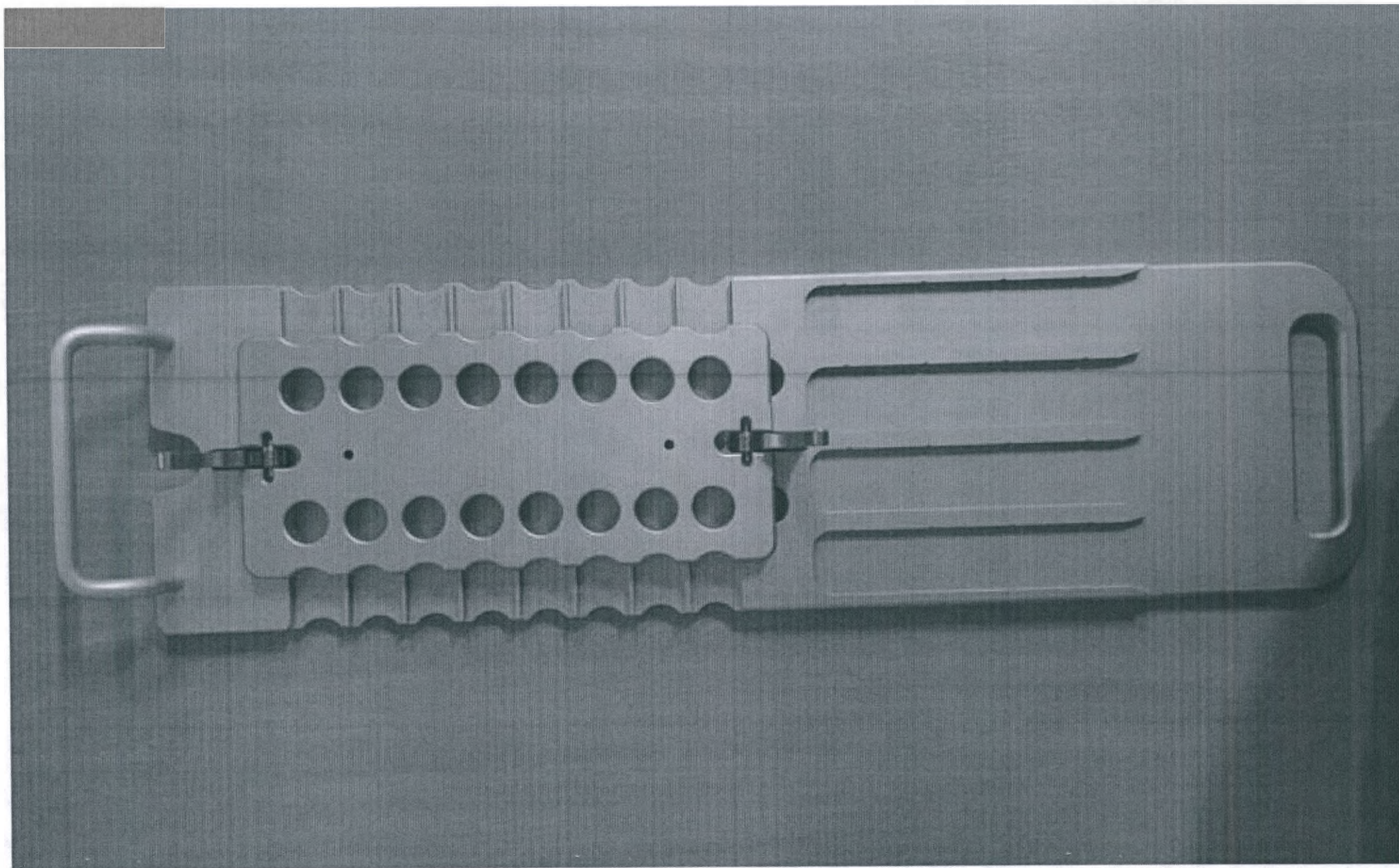


4. Штатив для реагентов (7 лунок). модель RR7 – 1 шт.

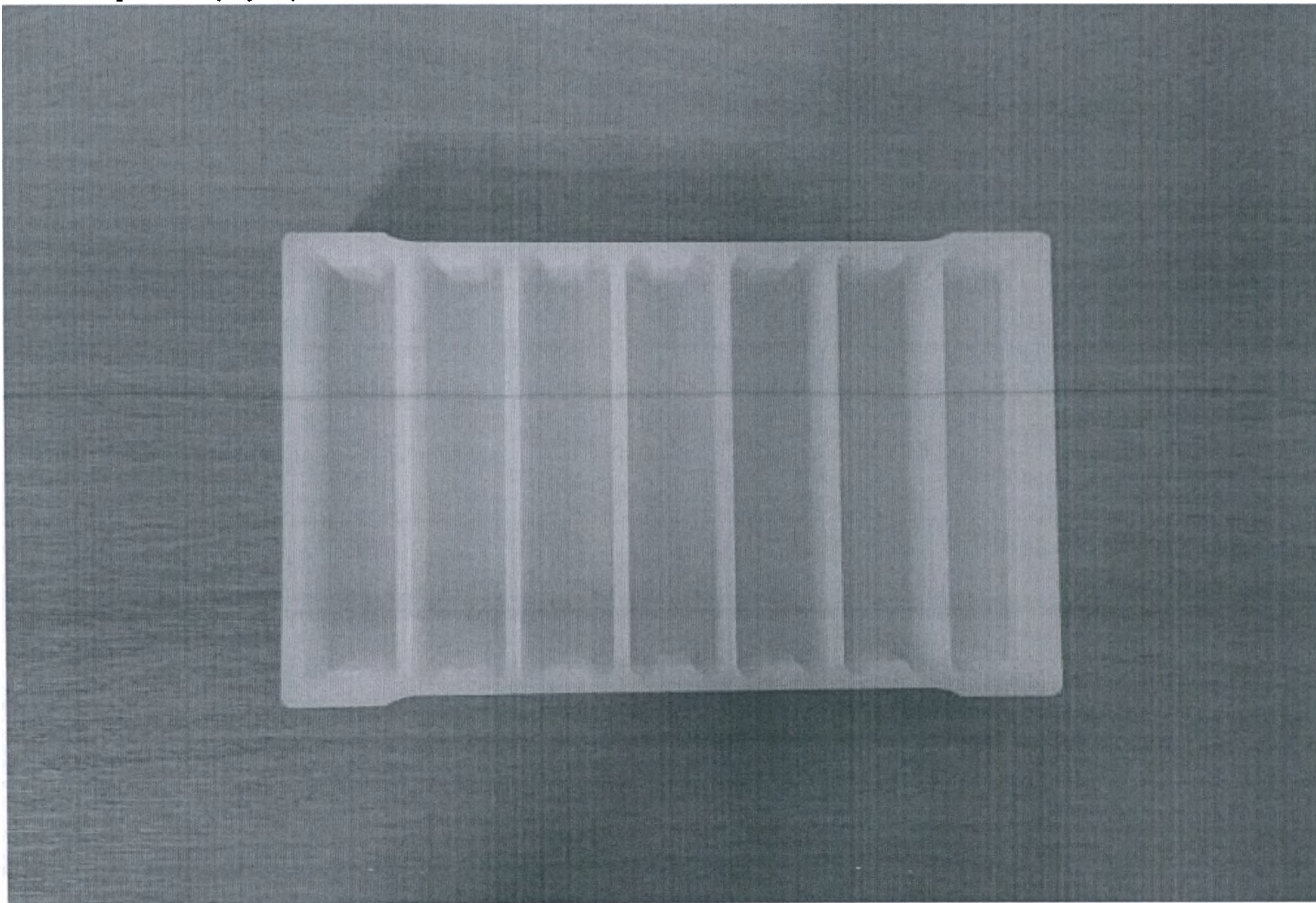


5. Промывочная станция, модель WS25 – 1 шт.

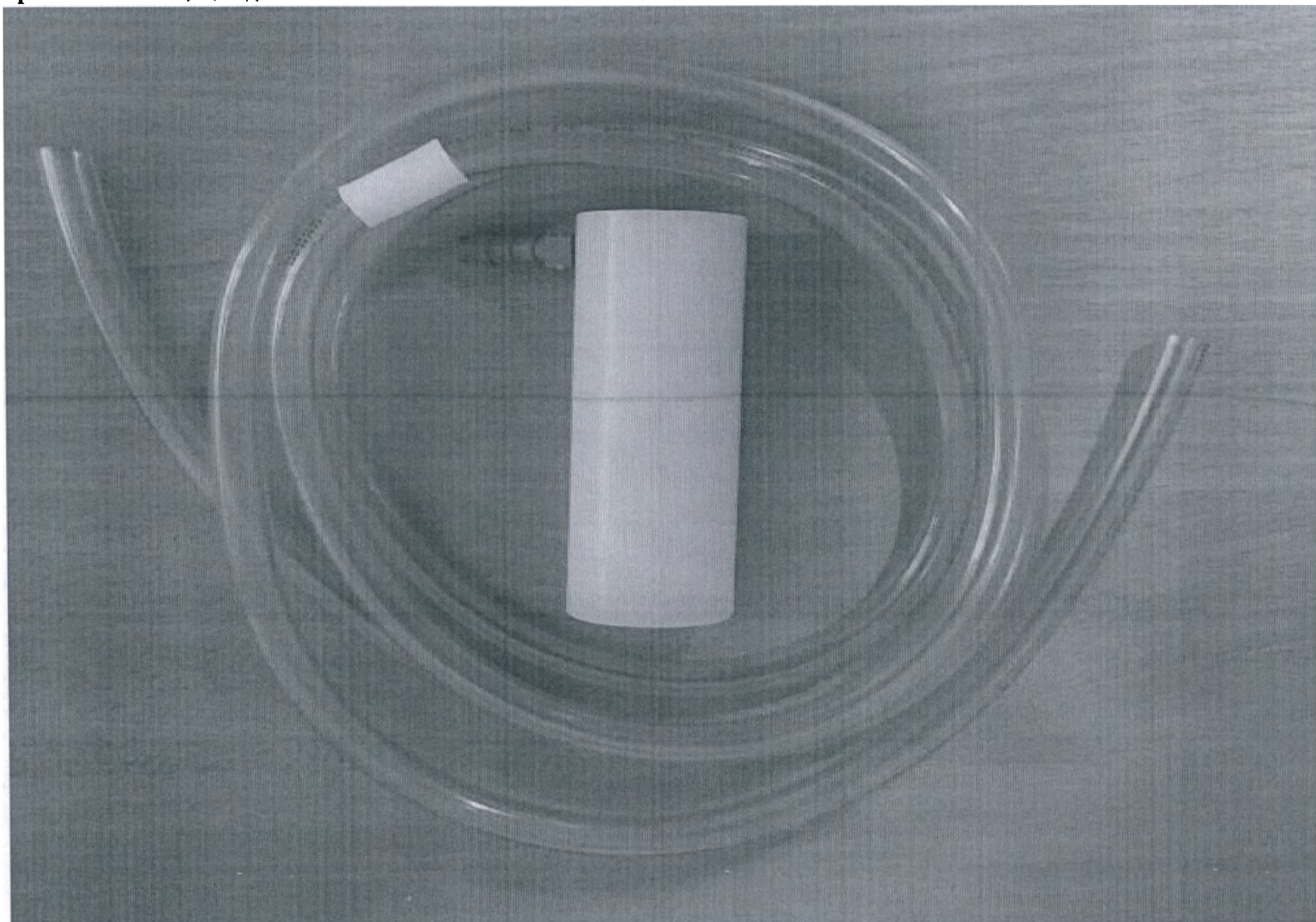


6. Сливная канистра, модель WC5L – 1 шт.

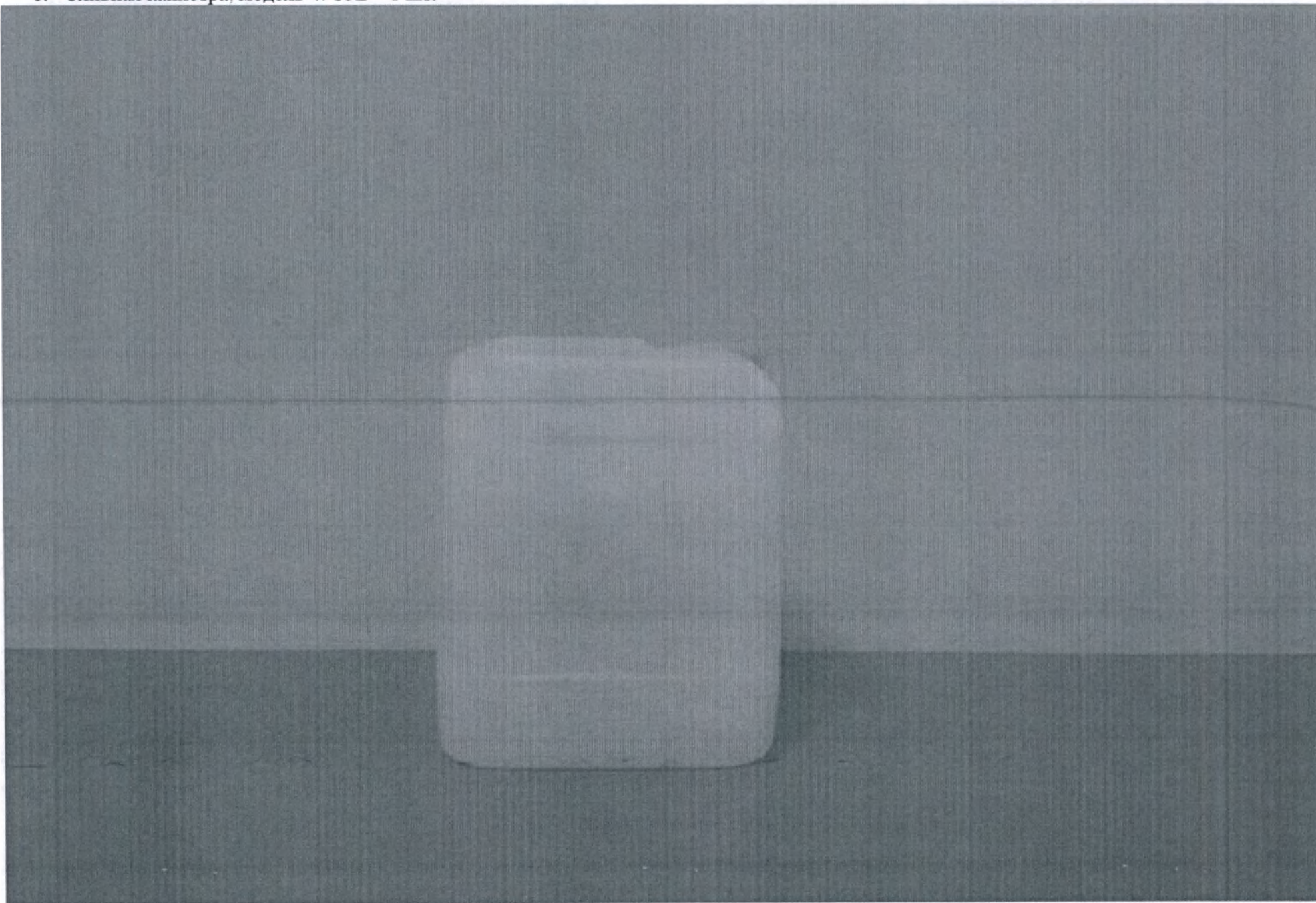


7. Контейнер системной жидкости, модель DSC/B – 1 шт.

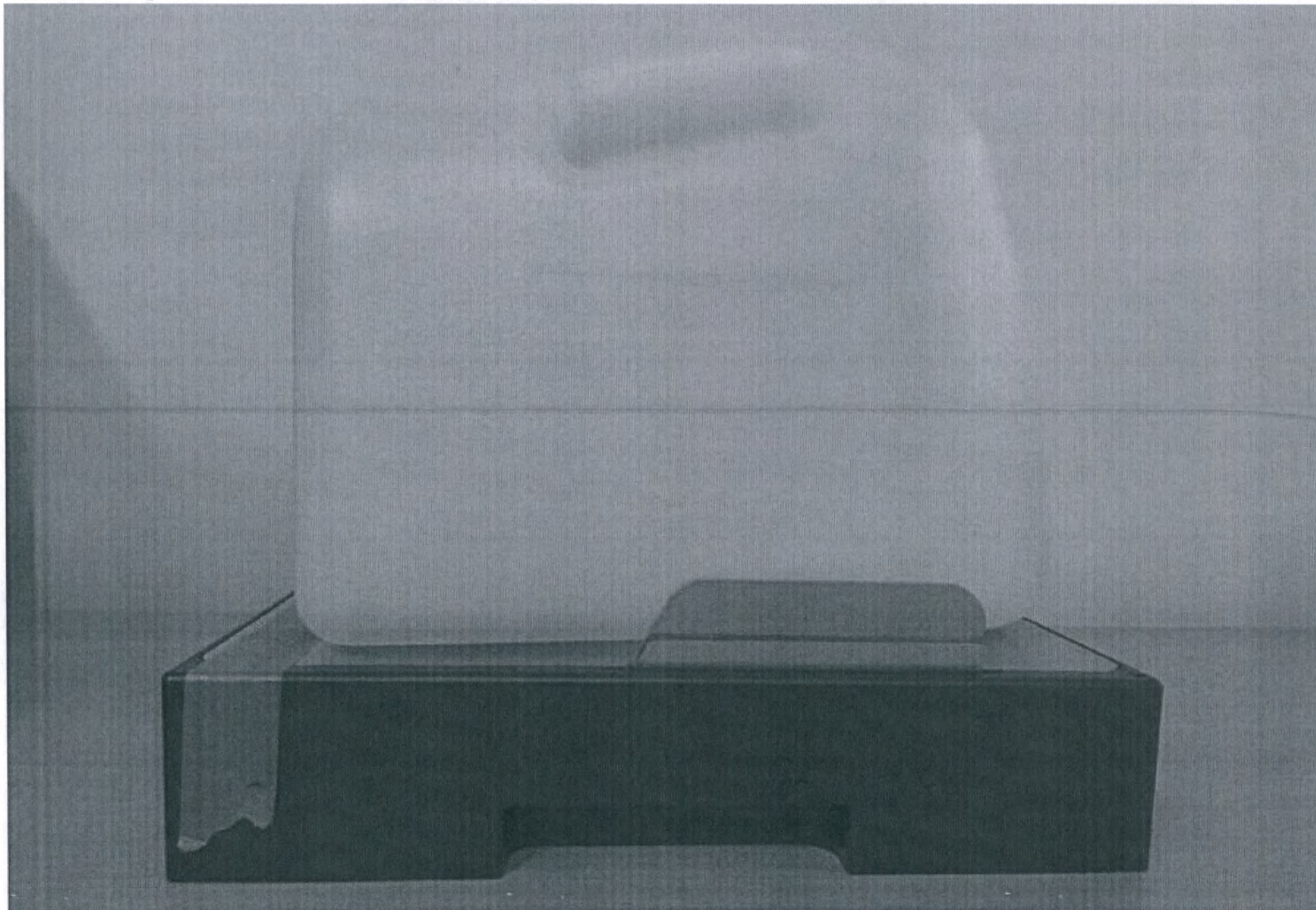


8. Контейнер для гипохлорита натрия, модель ВС – 1 шт.

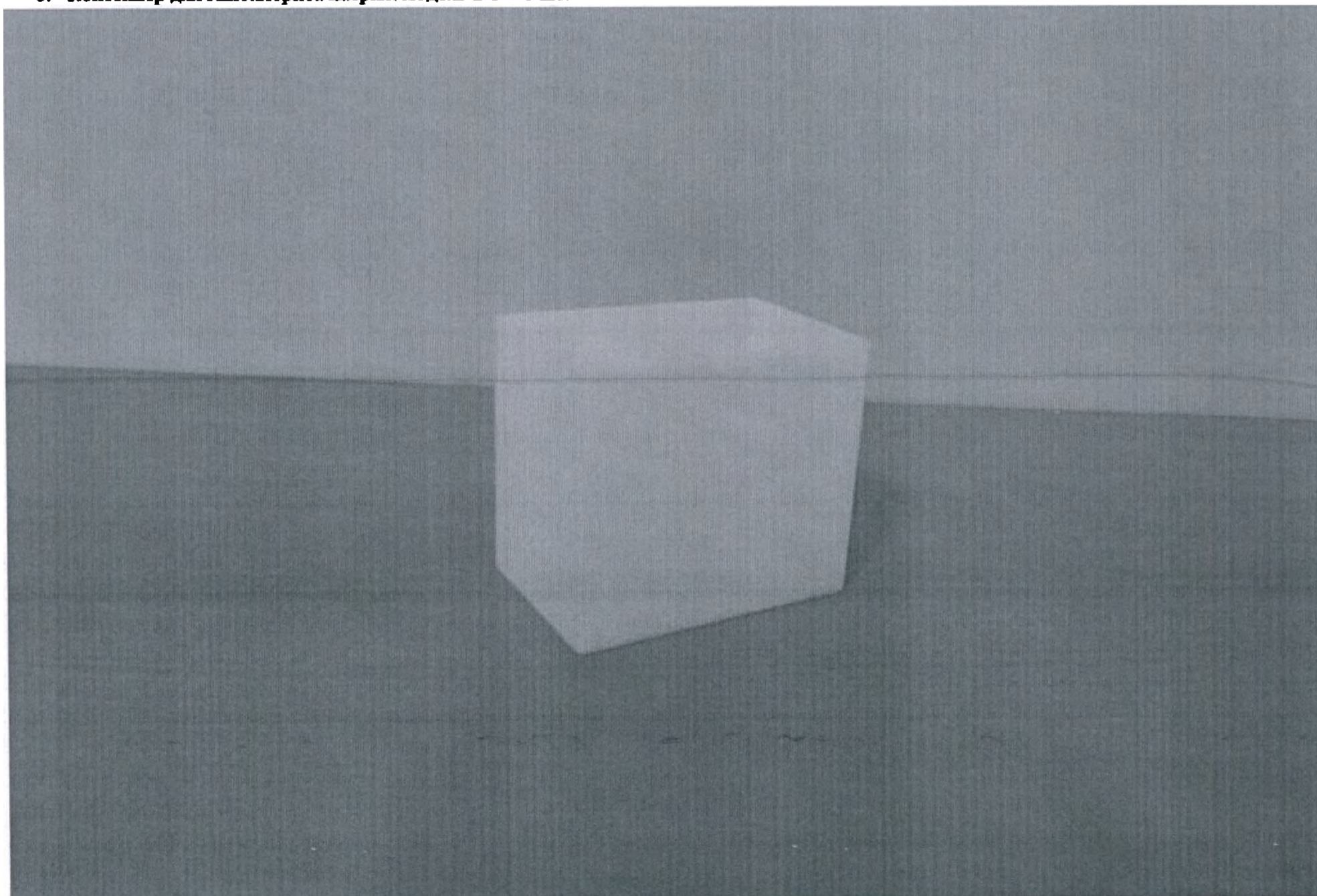


9. Контейнер с крышкой 50 мл, модель TW_{LL} 50 ml – 10 шт.

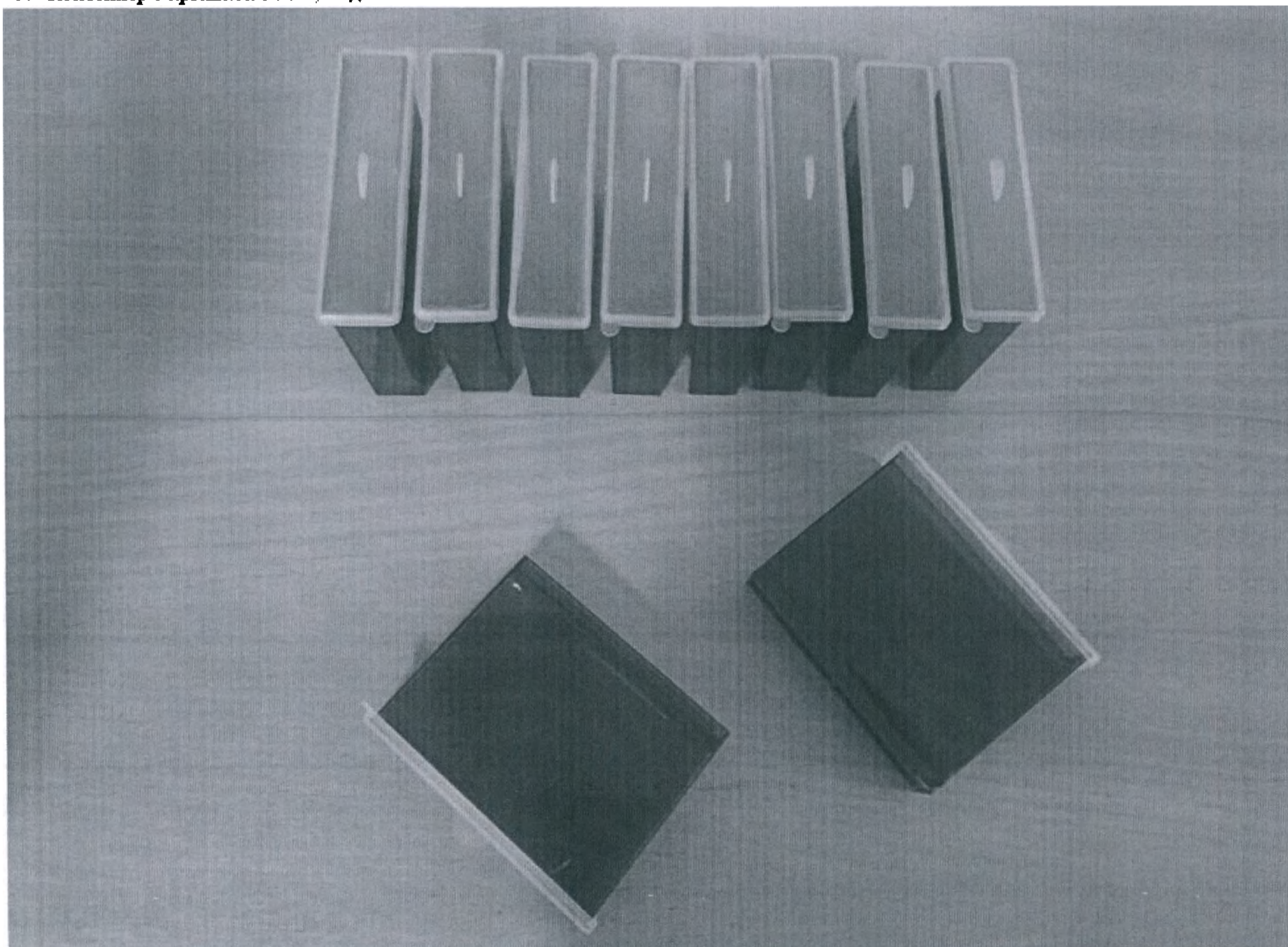

10. Автоматизированное рабочее место оператора. модель OWSM1 – 1 шт.

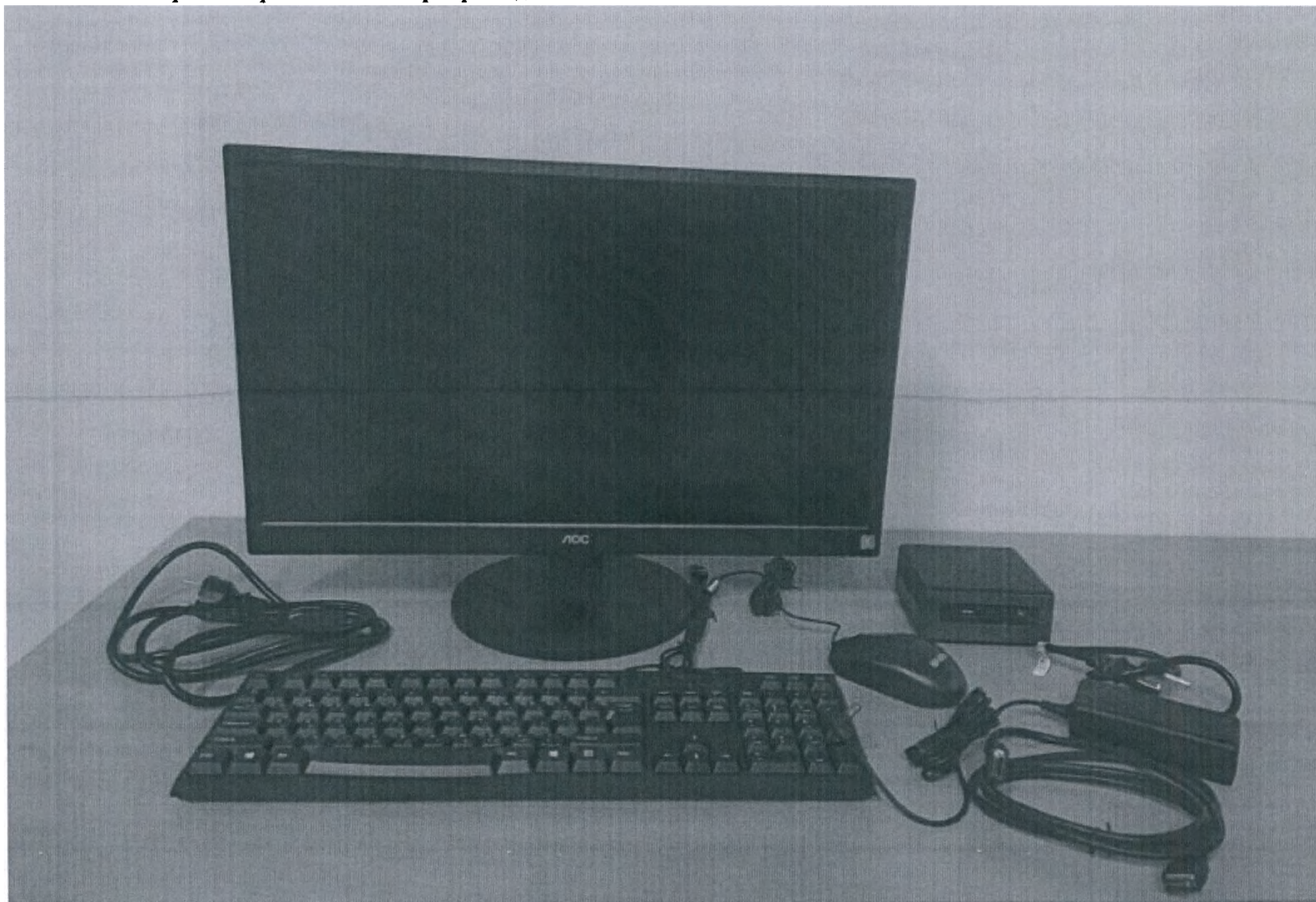

Персональный компьютер: четырёхъядерный процессор Intel Pentium J1900 «Baytrail» – ГГц (10 Вт) и выше, минимум 20 Гб свободного места

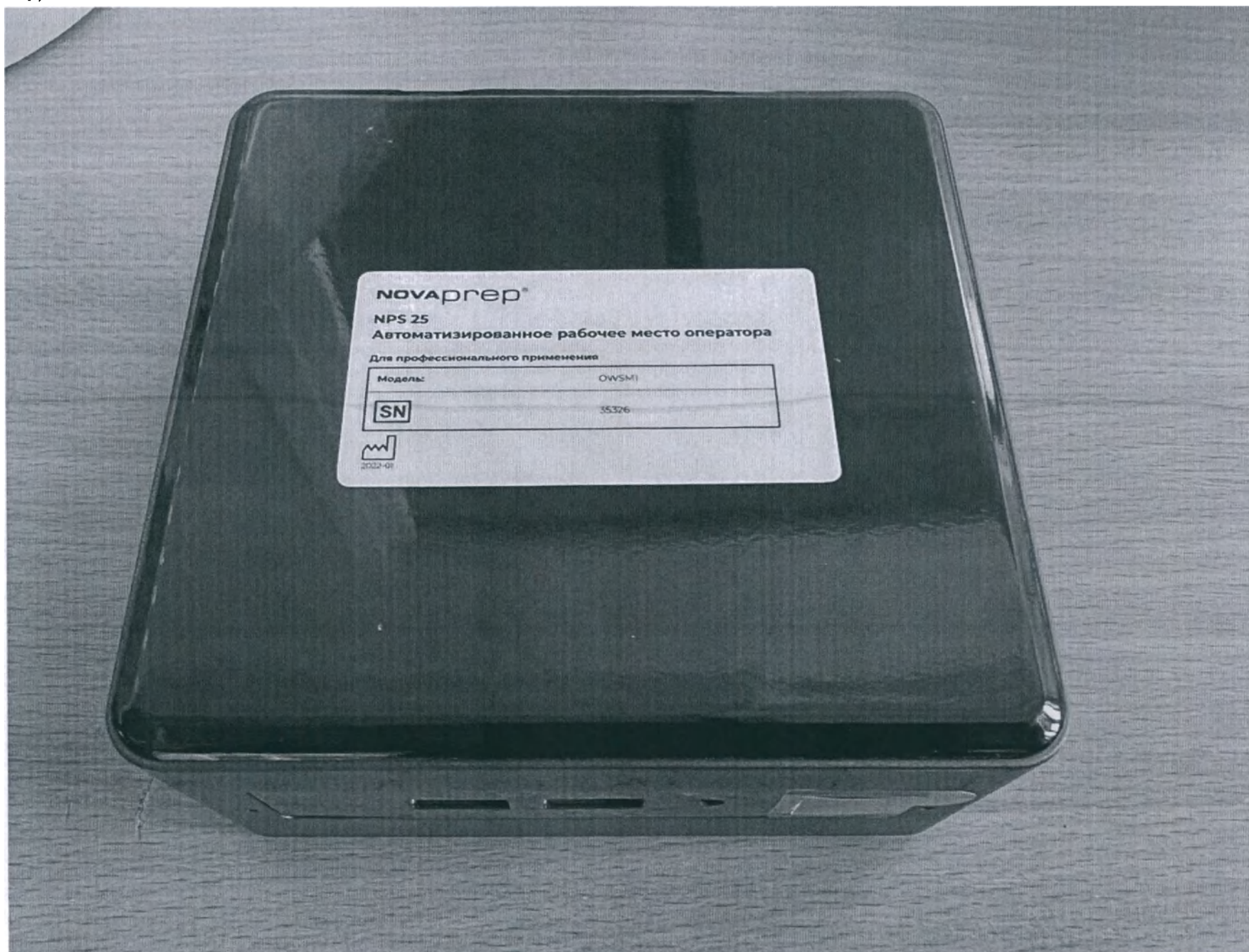

NOVAPREP®

NPS 25

Автоматизированное рабочее место оператора

Для профессионального применения

Модель:

OWSMI


SN

35326



2022-01

Монитор, не менее 22"

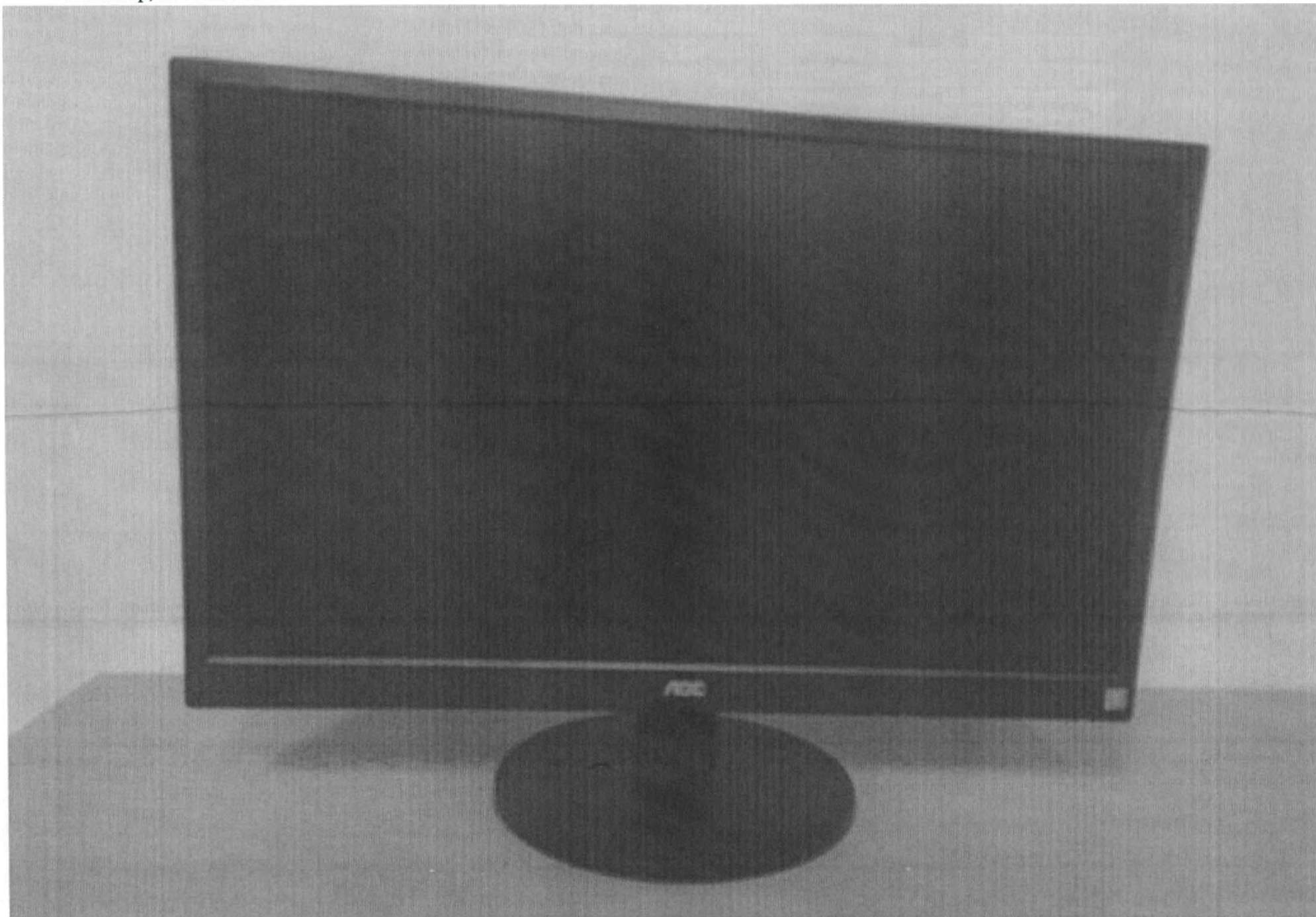

Administration: Configuration

Configuration item ▲	Value ▲
Localization	en
ManualScanOnly	False
NoNovamucScaleFactor	0.56
NovamucScaleFactor	0.56
RobotName	NPS 25
ScannerManufacturer	Honeywell International Inc.
ScannerModel	Xenon 1900 Area-Imaging Scanner
SequenceFinishedFile	SequenceFinished.wav
SlideFile	NPS Slide.Model.xml
▶ SoftwareVersion	5.2.18
TipNumber	4
TubeFile	NPS Tube.Model.xml
TubeRackFile	NPS Tube Rack.Model.xml
UseLevelDetection	False
UseReagentsBarCodes	False
UseSamplesBarCodes	False

Edit

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Лютый В.В.

2023 г.

Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 25.
Раздел А. Общие сведения

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь
г. Минск тр. Логойский д.22
корп.1, комн. 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Полоцкий В.В.

«24» августа 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 25 Раздел В. Только для инженеров и
дистрибьюторов

Отгрузка, установка

Транспортировка и хранение

Настройка

Вывод из эксплуатации



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, тр. Полоцкий, д.22,
кварт. 1, пом. 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Иванюк В.В.

апреля 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 25.
Раздел С. Эксплуатация

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь
г. Минск, пр. Логойский, д.22,
корпус, комн. 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Людский В.В.

24 апреля 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 25.

Раздел D. Применения для скрининга на рак шейки матки

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь
г. Минск, тр. Логовский, д.22,
корп.1, ком. 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»

Плотынский В.В.



2023 г.

Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 25.
Раздел F. Устранение неполадок.

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, т/в. Логойский, д.22,
корп.1, ком. 309


techno@algimed.com

+375 29 893 14 44


www.algimed-techno.com

У 64 193108315 020-2021


12. Многоразовый наконечник, модель TSS1 – 1 шт.

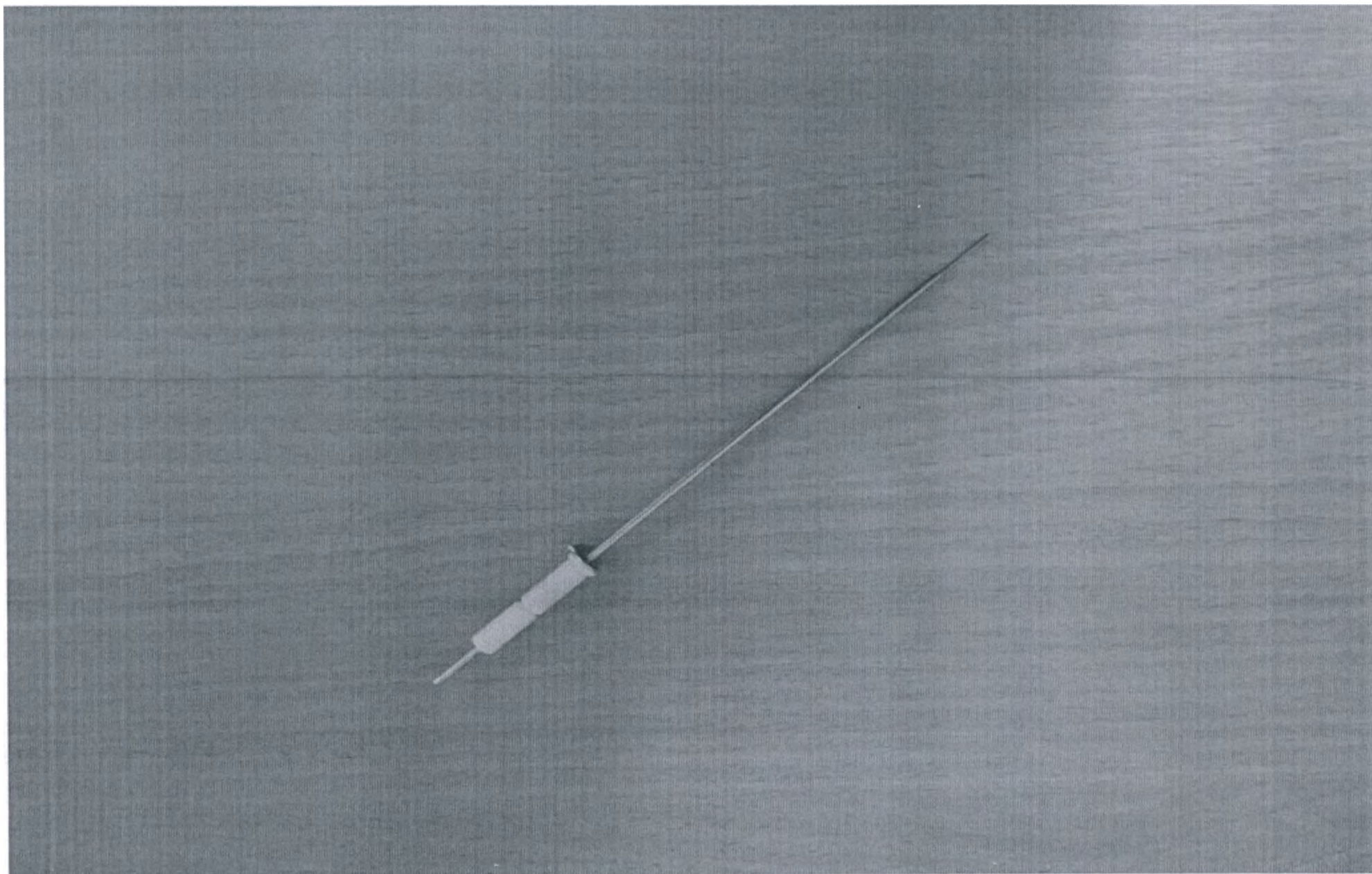

13. Держатель модель Держатель модель NOVAPREP HPV Aliquoting Decktray for aliquoting tubes (16 tubes) (при необходимости) – 1 шт.

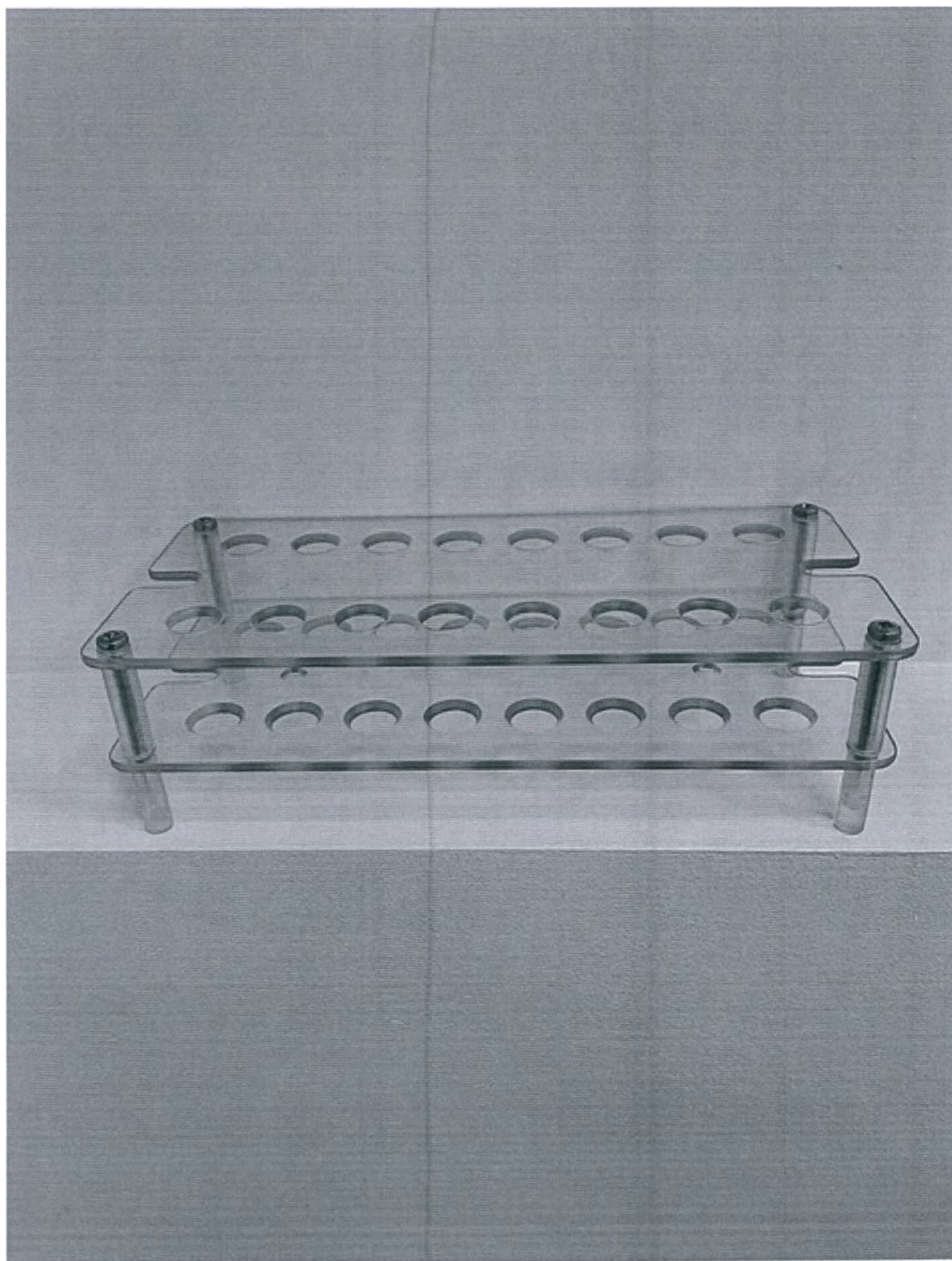

14. Держатель модель NOVAPREP HPV Aliquoting Decktray for DNA Pap Specimen Transport Medium (16 tubes) (при необходимости) – 1 шт.

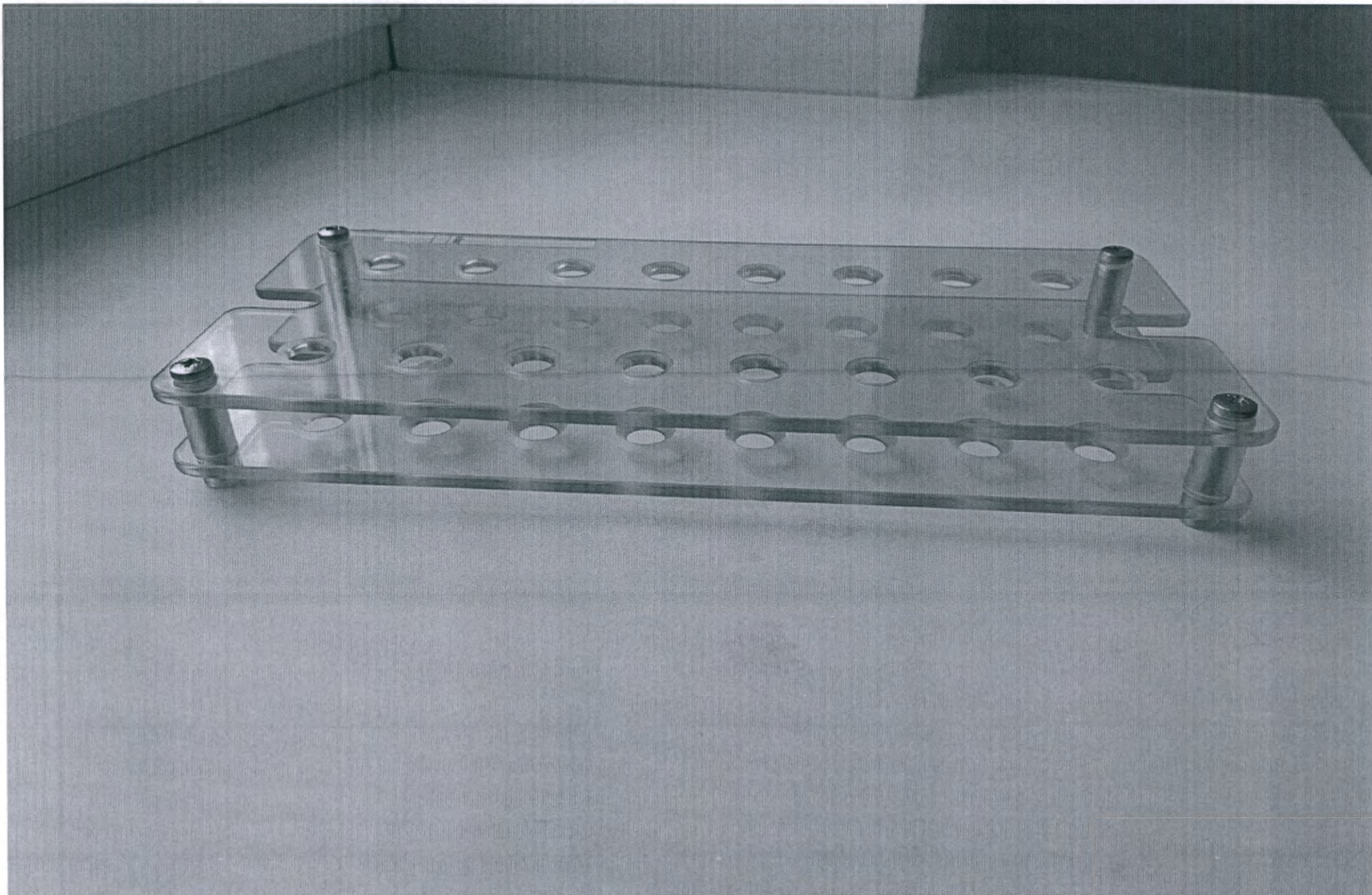

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


1. Ручной считыватель штрих-кодов модель Honeywell Xenon 1900 – 1 шт.




2. Сканер штрихкодов модель Zebra DS2278 2D – 1 шт.




Транспортная упаковка системы автоматизированной для жидкостной цитологической диагностики «NOVAPREP Processor System», с принадлежностями, вариант исполнения NPS 25

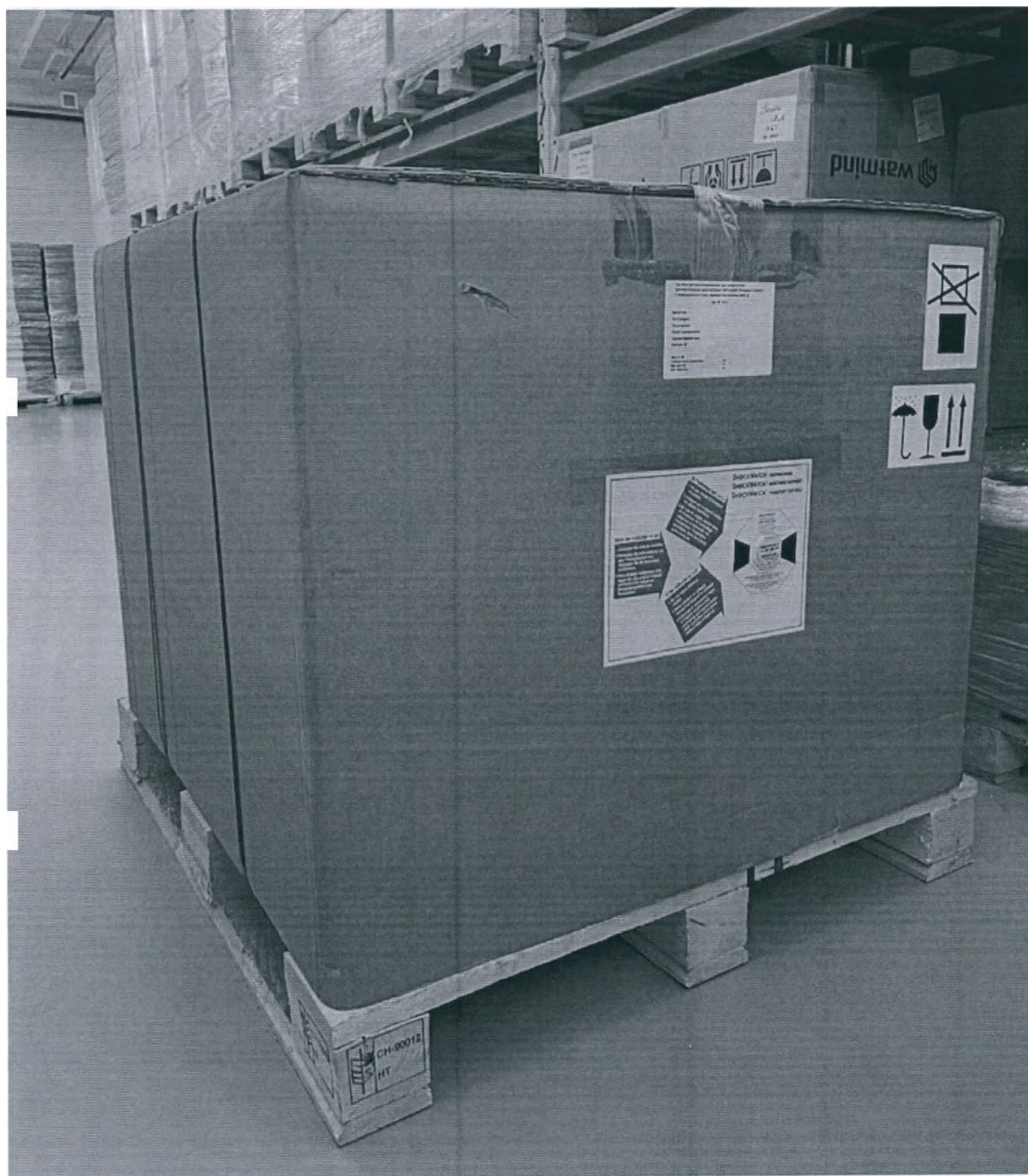

- II. Система автоматизированная для жидкостной цитологической диагностики «NOVAPREP Processor System» NPS 50, с принадлежностями:

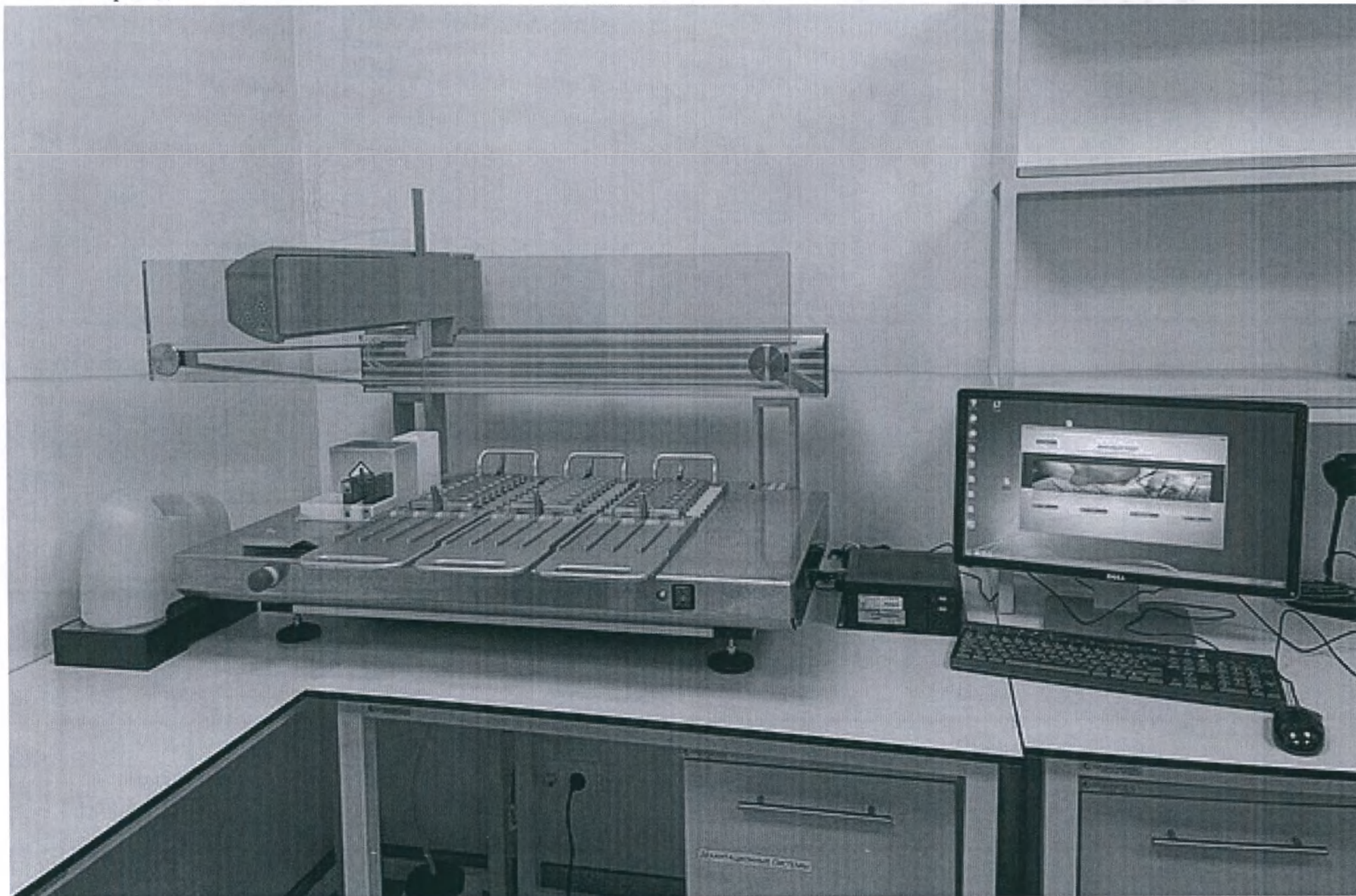

1. Робот-дозатор с четырьмя иглами модель RD4N – 1 шт.

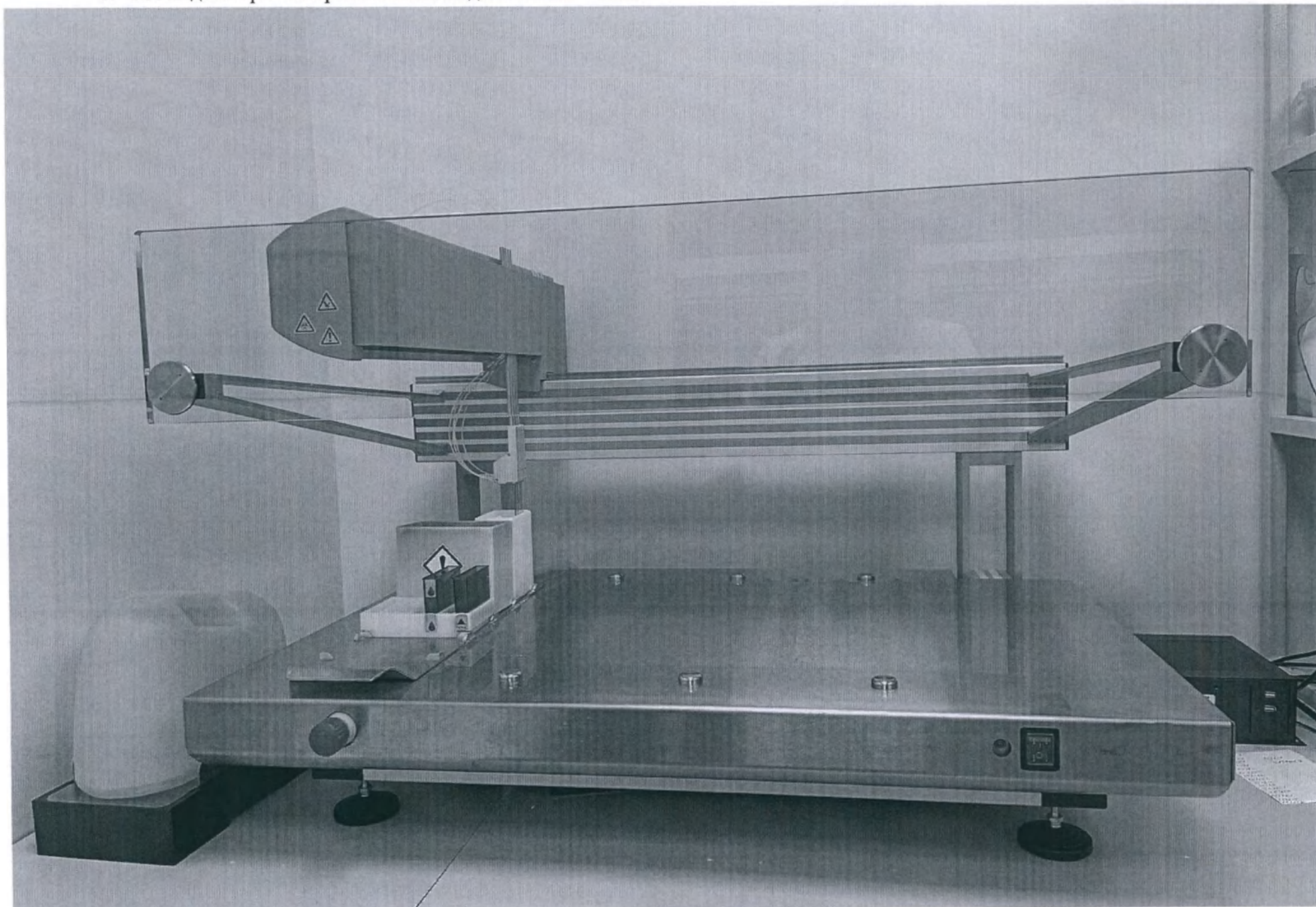

Маркировочная табличка системы автоматизированной для жидкостной цитологической диагностики «NOVAPREP Processor System» с принадлежностями, вариант исполнения NPS 50

NOVAPREP®


Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor System»,
с принадлежностями, в вариантах исполнения



ООО «Альгимед Техно»
220090, Республика Беларусь,
г. Минск, Логойский тракт
22/1, ком. 309

Исполнение:	NPS 50
REF	NOV011
Сеть:	110-240 В ~ 50/60 Гц
Максимальная номинальная мощность:	450 Вт
SN	1739

IVD

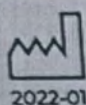


2022-01

Для профессионального применения


Регистрационное удостоверение № _____

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед» (ООО «Альгимед»)
121596, Российская Федерация, г. Москва, ул. Толбухина, дом 10, корп. 1, комн. 39,
Тел. +7 499 682 61 09


2. Ограничительное стекло модель LG962 – 1 шт.

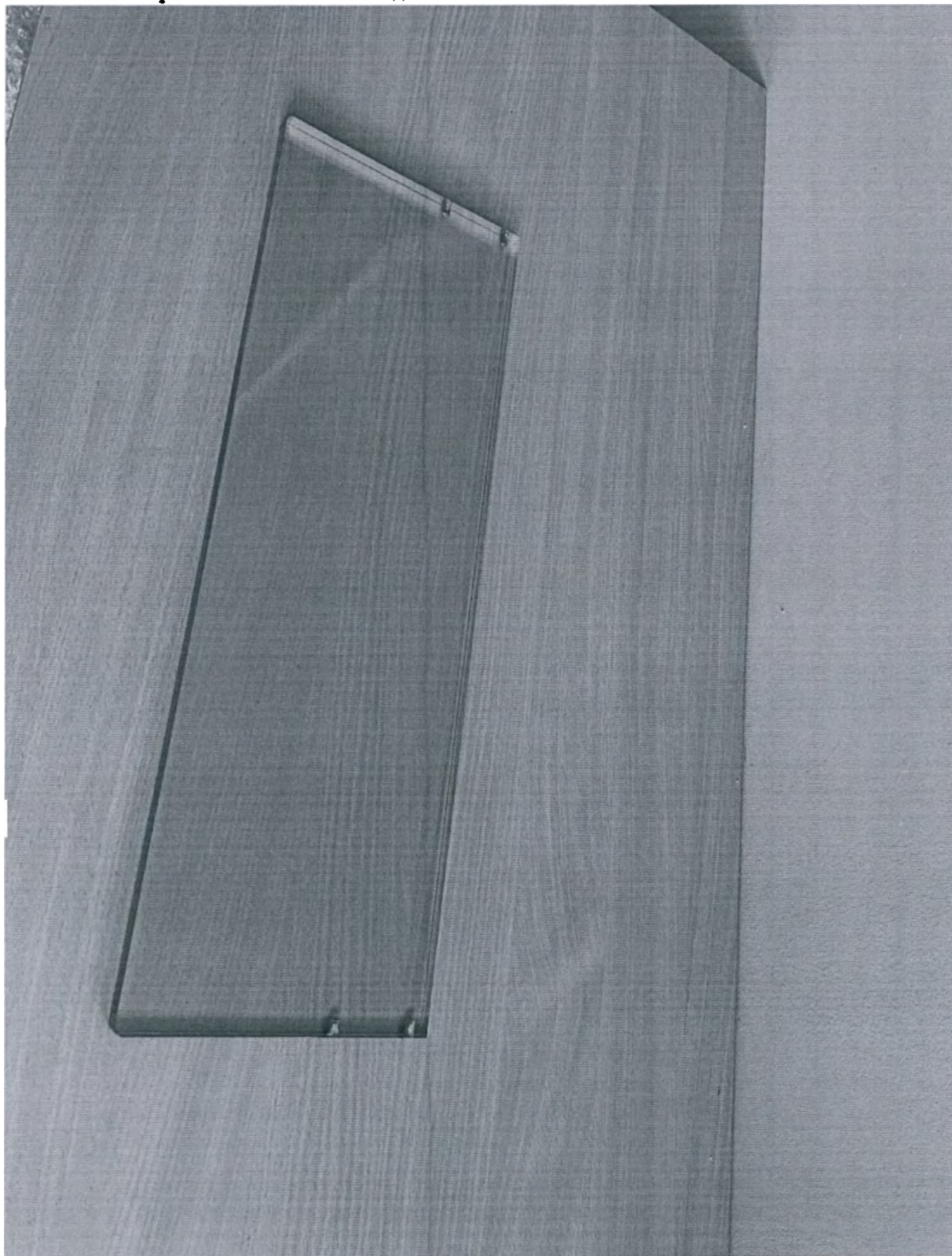


3. Загрузочная панель модель DECKTRAY NOV019 – 3 шт.

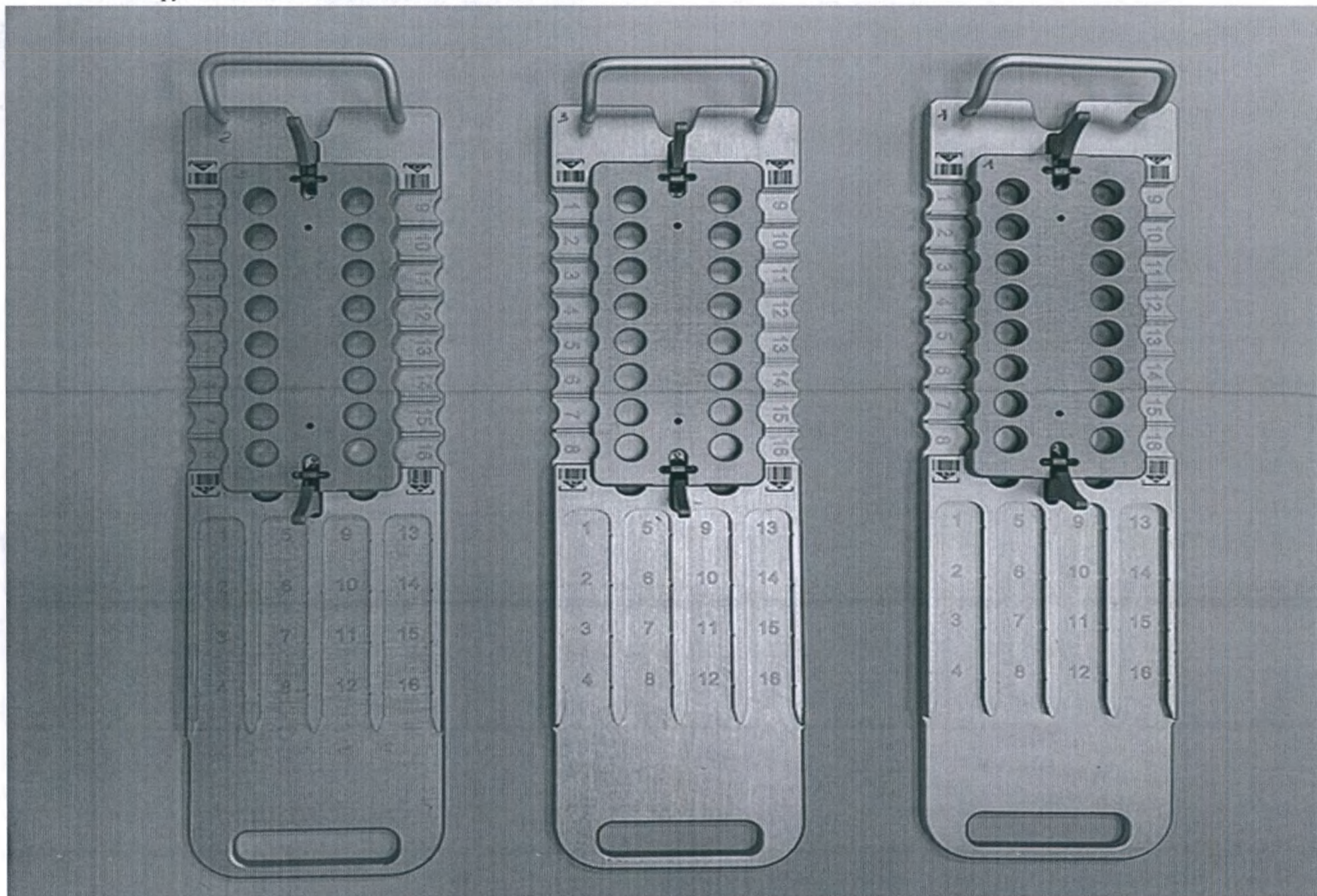


4. Штатив для реагентов (7 лунок) модель RR7 – 1 шт.

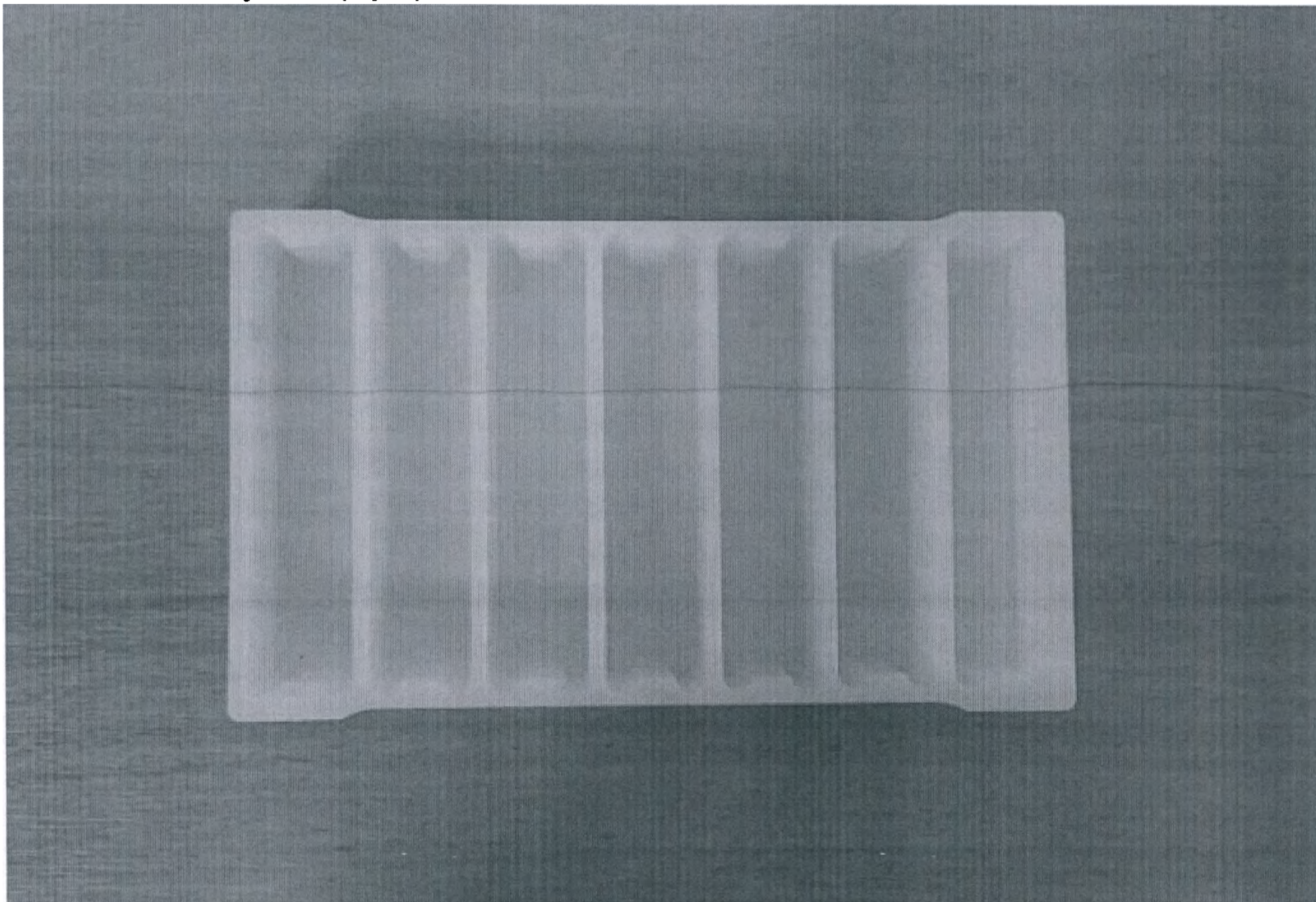


5. Промывочная станция модель WS50 – 1 шт.

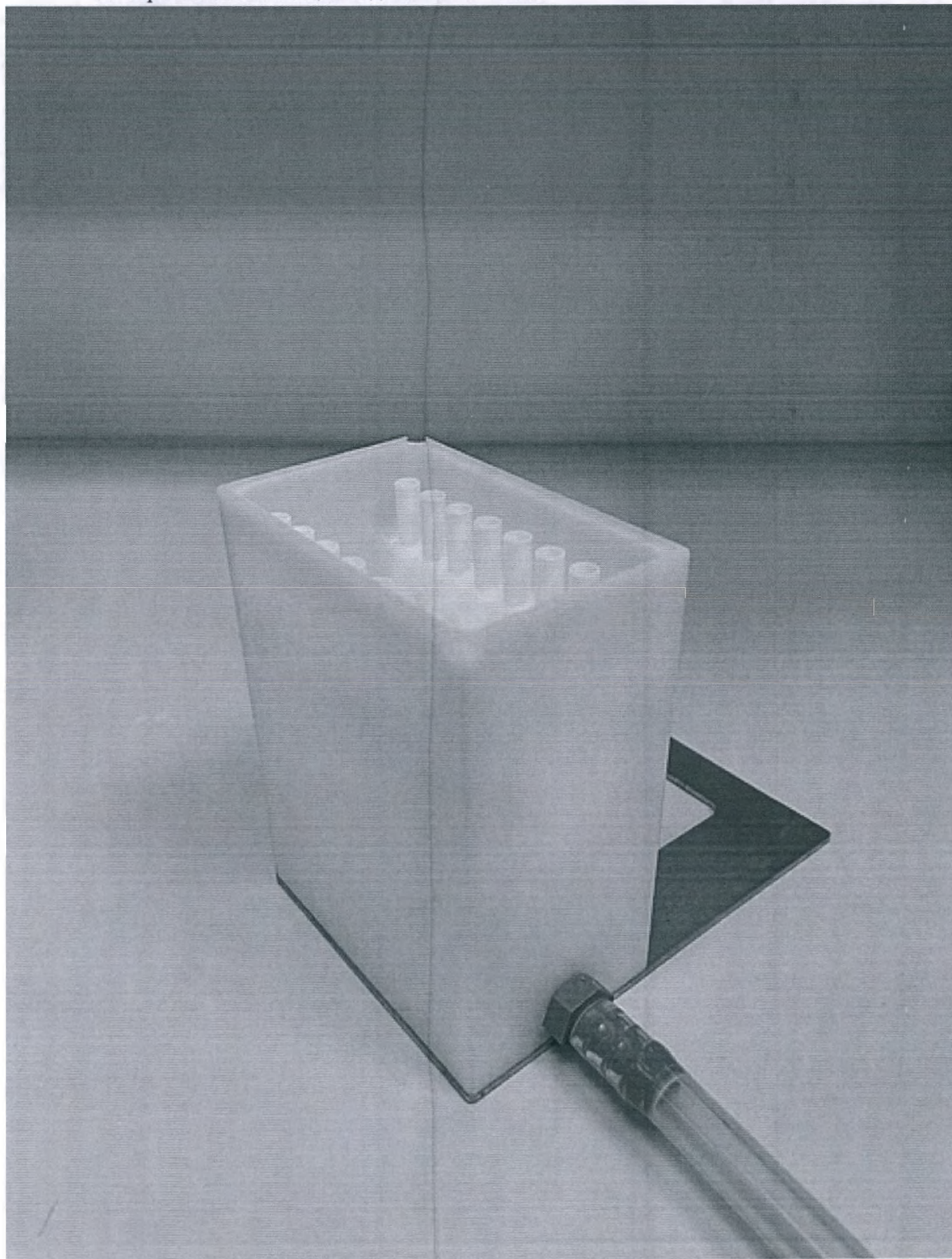


6. Сливная канистра модель WC5L – 1 шт.

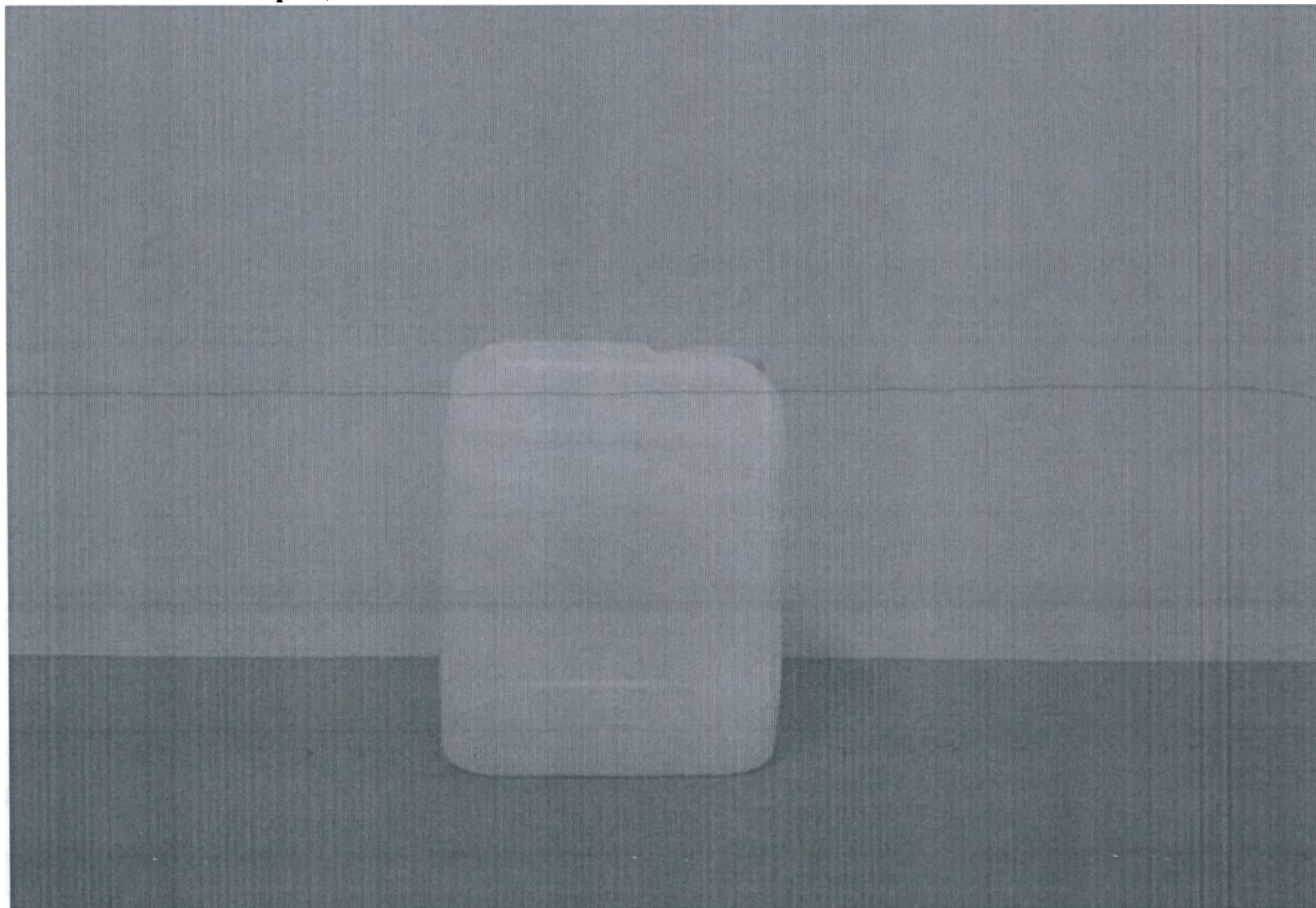


7. Контейнер системной жидкости модель DSC/B – 1 шт.

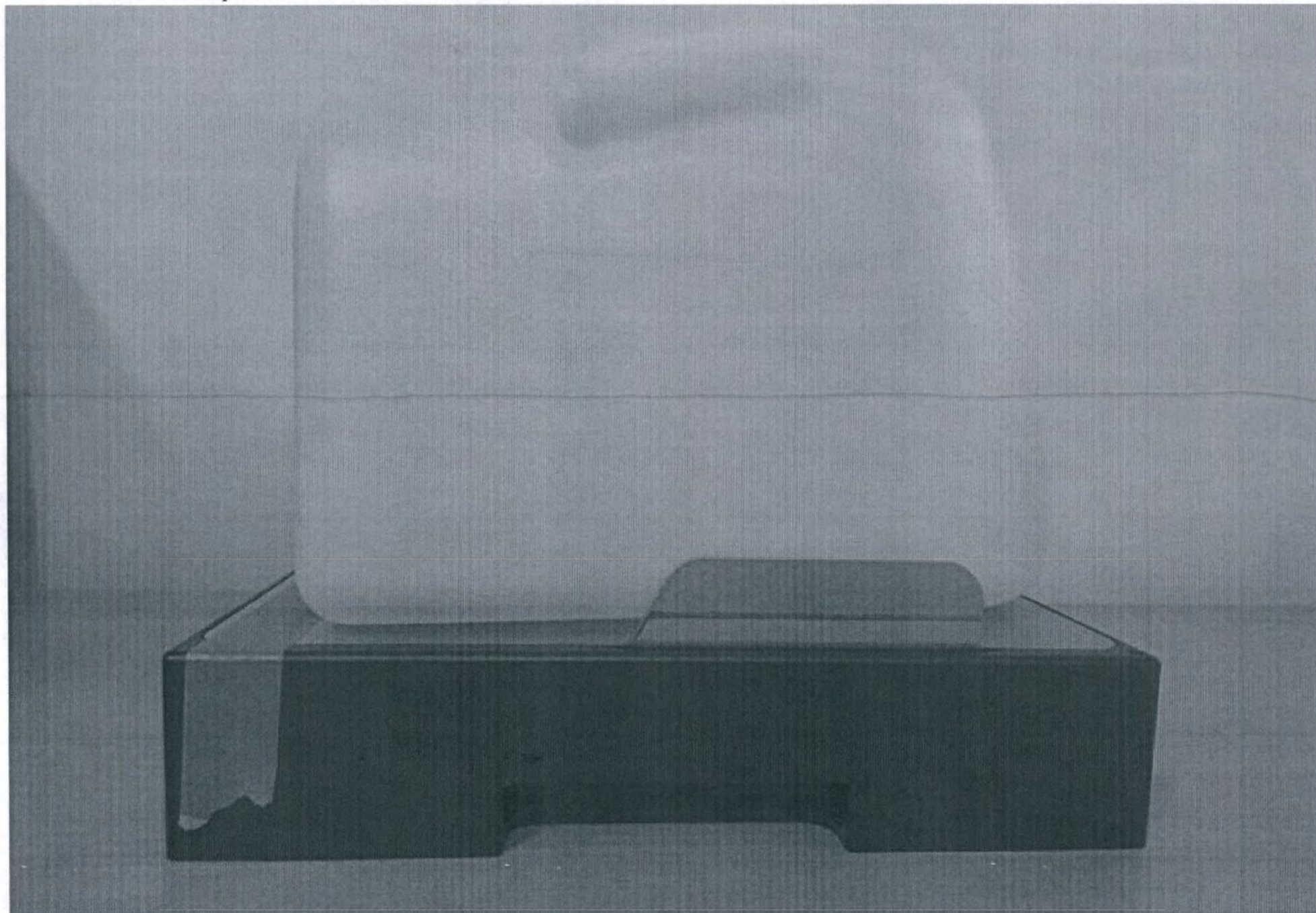


8. Контейнер для гипохлорита натрия модель ВС – 1 шт.

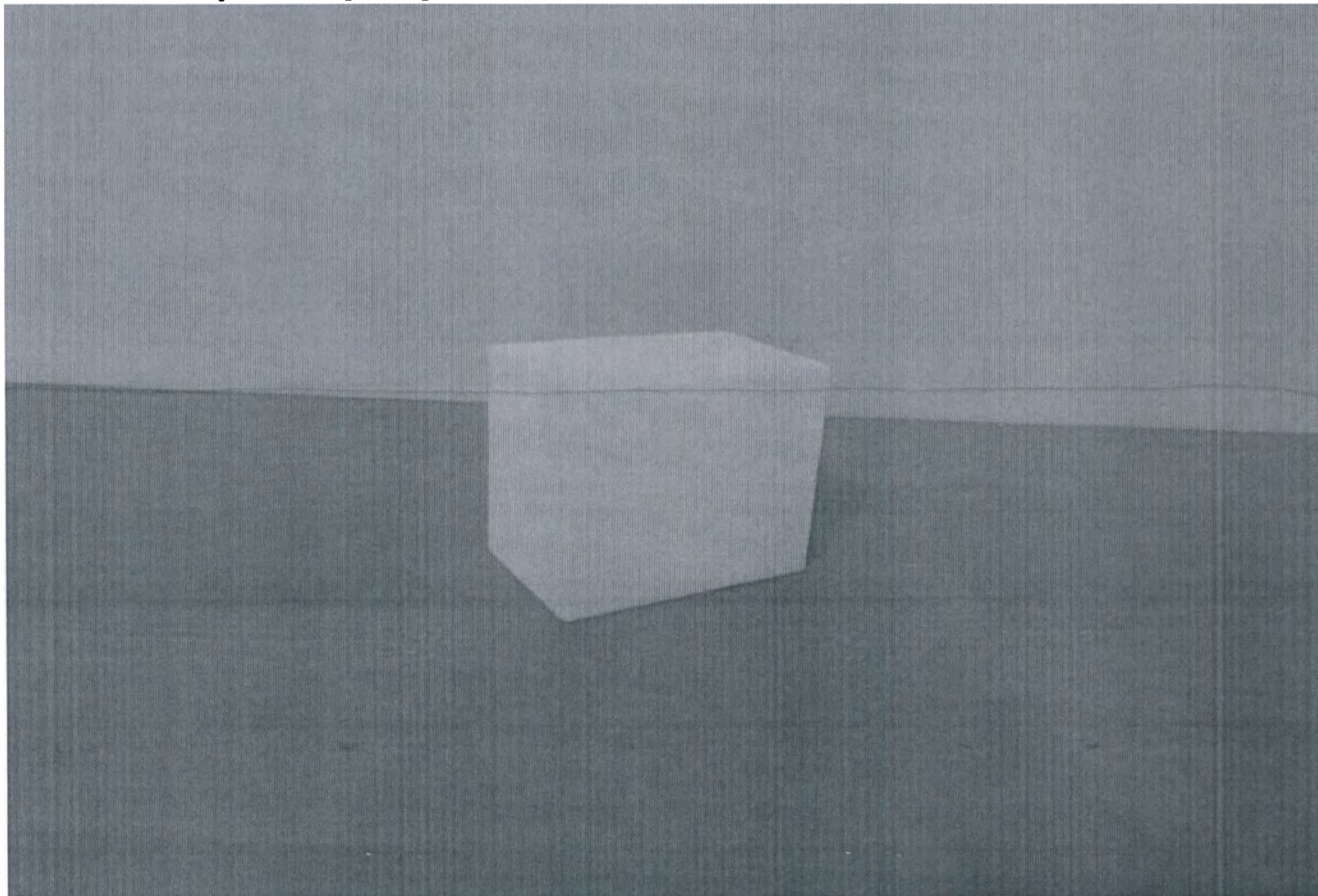


9. Контейнер с крышкой 50 мл. модель TWLS 50 ml. – 10 шт.

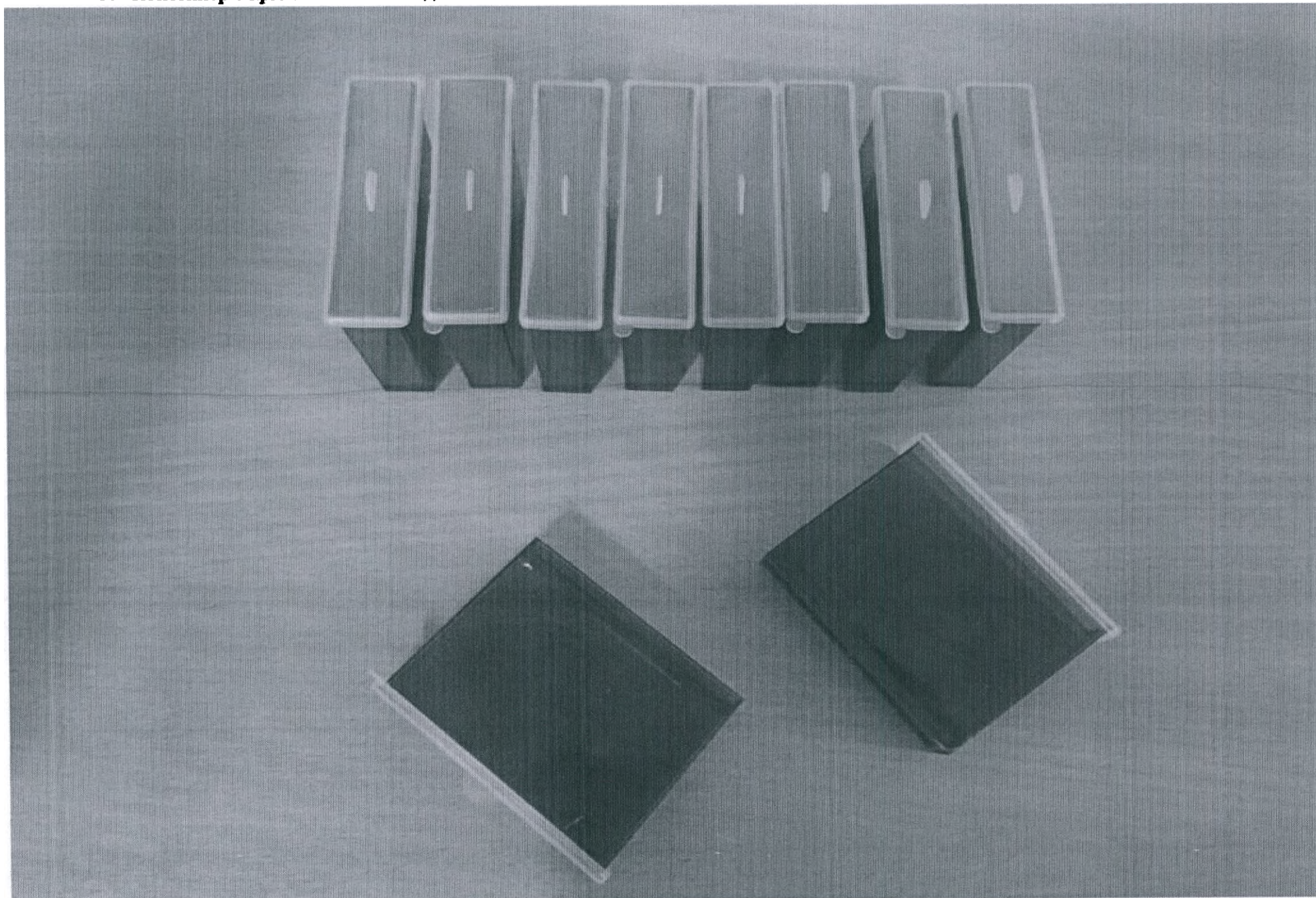

10. Автоматизированное рабочее место оператора модель OWSM1 – 1 шт.

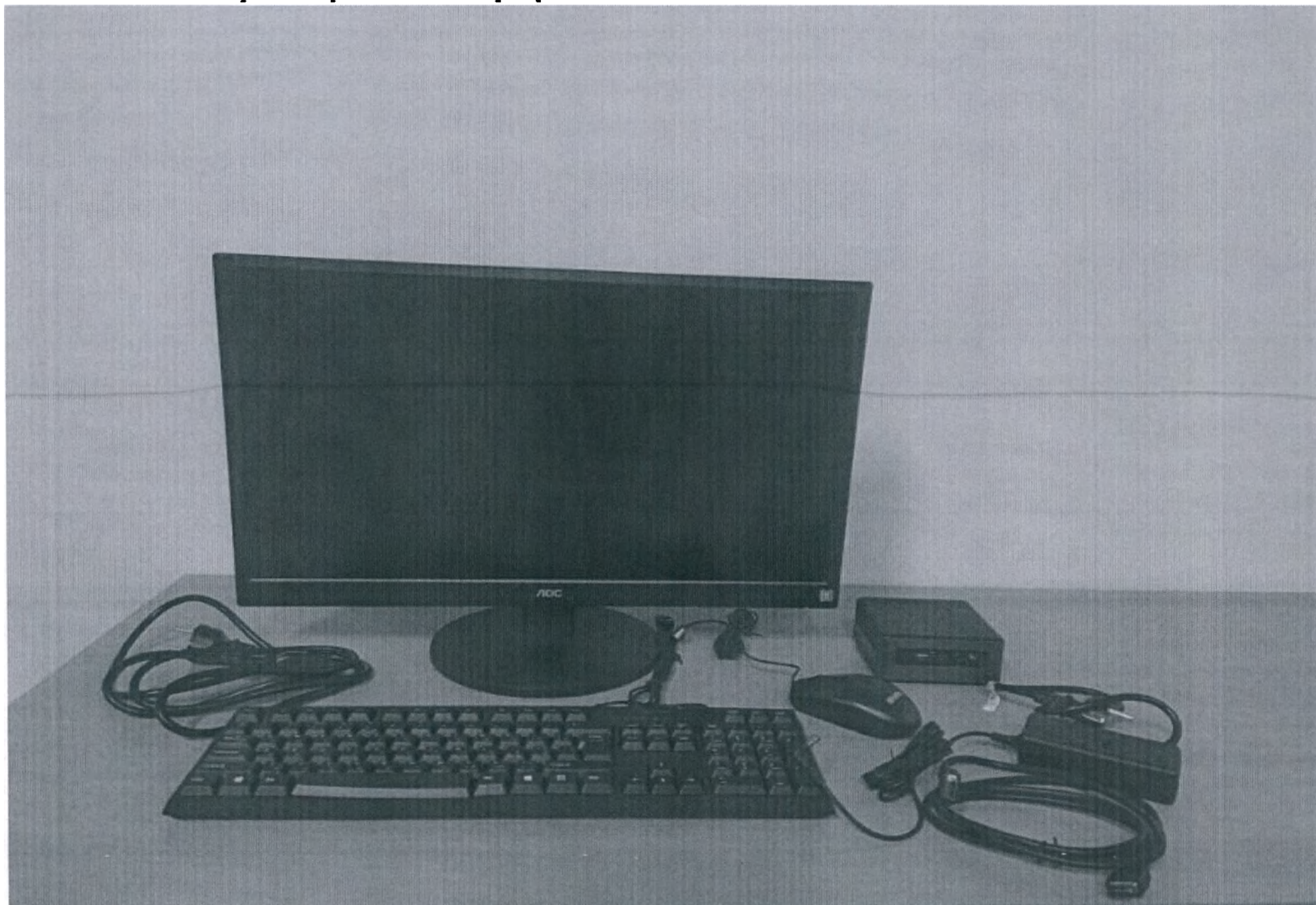

Персональный компьютер: четырёхъядерный процессор Intel Pentium J1900 «Baytrail» 2 ГГц (10 Вт) и выше, минимум 20Гб свободного места

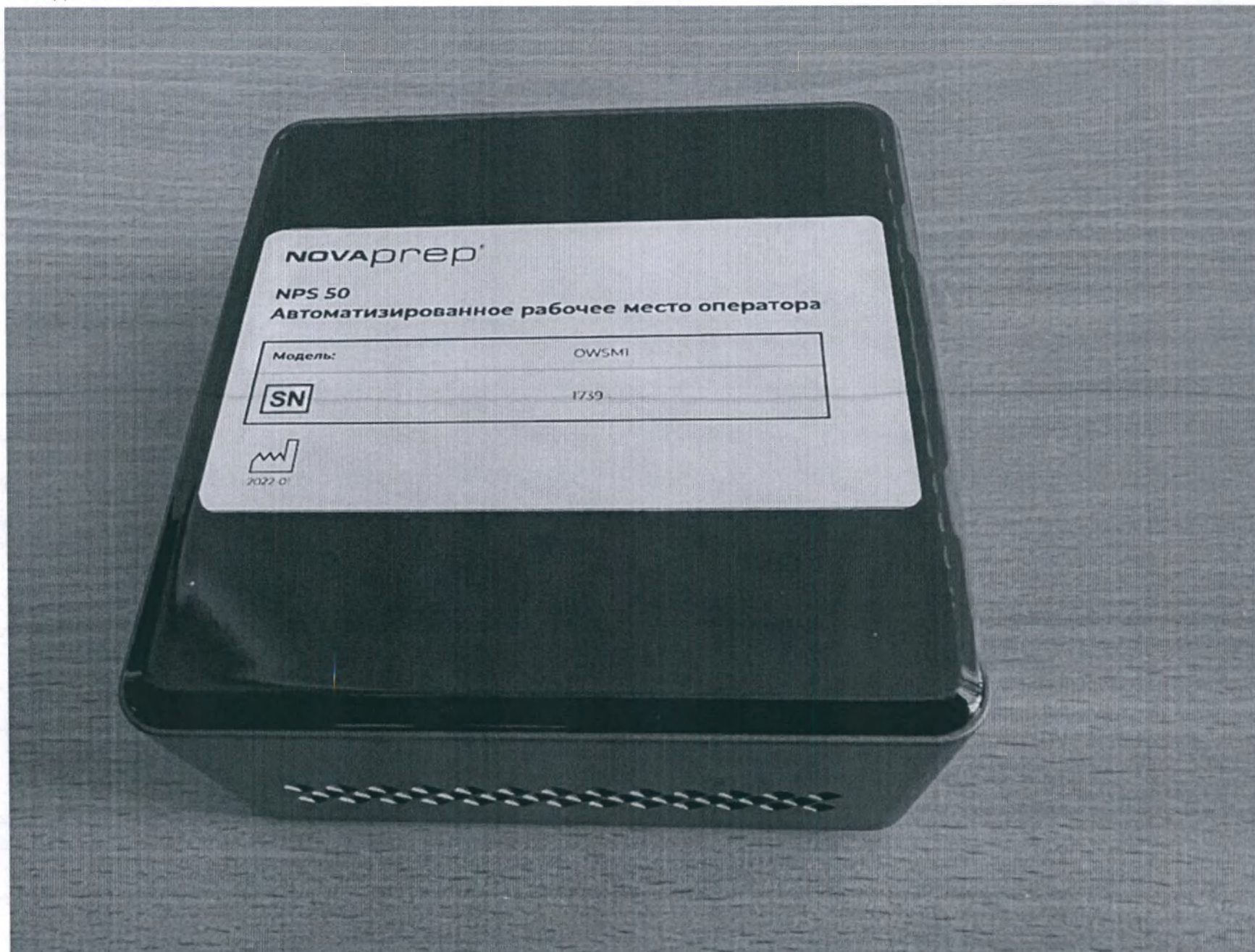

Маркировочная табличка автоматизированного рабочего места оператора ОWSM1

NOVAPREP®

NPS 50

Автоматизированное рабочее место оператора

Для профессионального применения

Модель:

OWSM1


SN

1739



2022-01

Монитор, не менее 22"

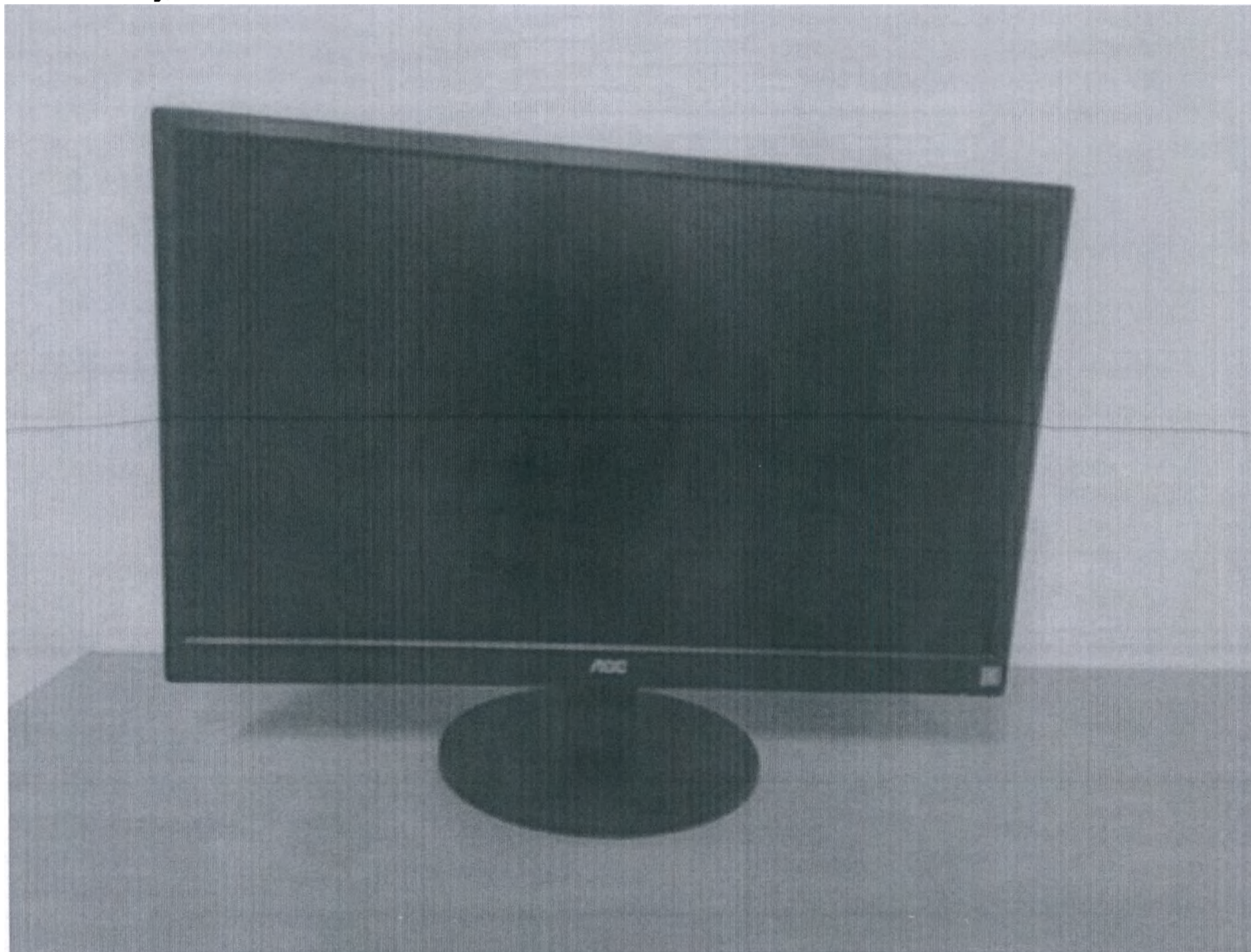

Administration: Configuration

Configuration item ▲	Value ▲
LevelDetectionAlarmFile	SequenceFinished.wav
LibraryFile	NPS Library.dll
Localization	en
ManualScanOnly	False
NoNovamucScaleFactor	0.56
NovamucScaleFactor	0.56
RobotName	NPS 50 4000
ScannerManufacturer	Honeywell International Inc.
ScannerModel	Xenon 1900 Area-Imaging Scanner
SequenceFinishedFile	SequenceFinished.wav
SlideFile	NPS Slide.Model.xml
▶ Software Version	5.2.18
TipNumber	4
TubeFile	NPS Tube.Model.xml
TubeRackFile	NPS Tube Rack.Model.xml
UseLevelDetection	False ▼

Edit

11. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Литвинский В.В.

24 сентября 2023г.

Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 50.
Раздел А. Общие сведения

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь
г. Минск, тр. Логойский, д.22,
корп.1, ком. 308

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 50 Раздел В. Только для инженеров и
дистрибьюторов

Отгрузка, установка

Транспортировка и хранение

Настройка

Вывод из эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Логейский д.22,
корп.1, ком. 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Лычакский В.В.

22 апреля 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 50.
Раздел С. Эксплуатация

ВНИМАНИЕ!
Изучите инструкцию перед
началом работы



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь
г. Минск, пр. Логовский, д.22
кварт. кон. 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Исходный В.В.

«24» апреля 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 50.

Раздел D. Применение для скрининга на рак шейки матки

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, тр. Логойский, д.22,
корп.1, ком. 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Руководство по эксплуатации

Система автоматизированная для жидкостной
цитологической диагностики «NOVAPREP Processor
System», с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения NPS 50,
Раздел F. Устранение неполадок.

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы




ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, тр. Логойский, д.22,
корп.1, пом. 309

techno@algimed.com


+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com


12. Многоразовый наконечник, модель TSS1 – 4 шт.

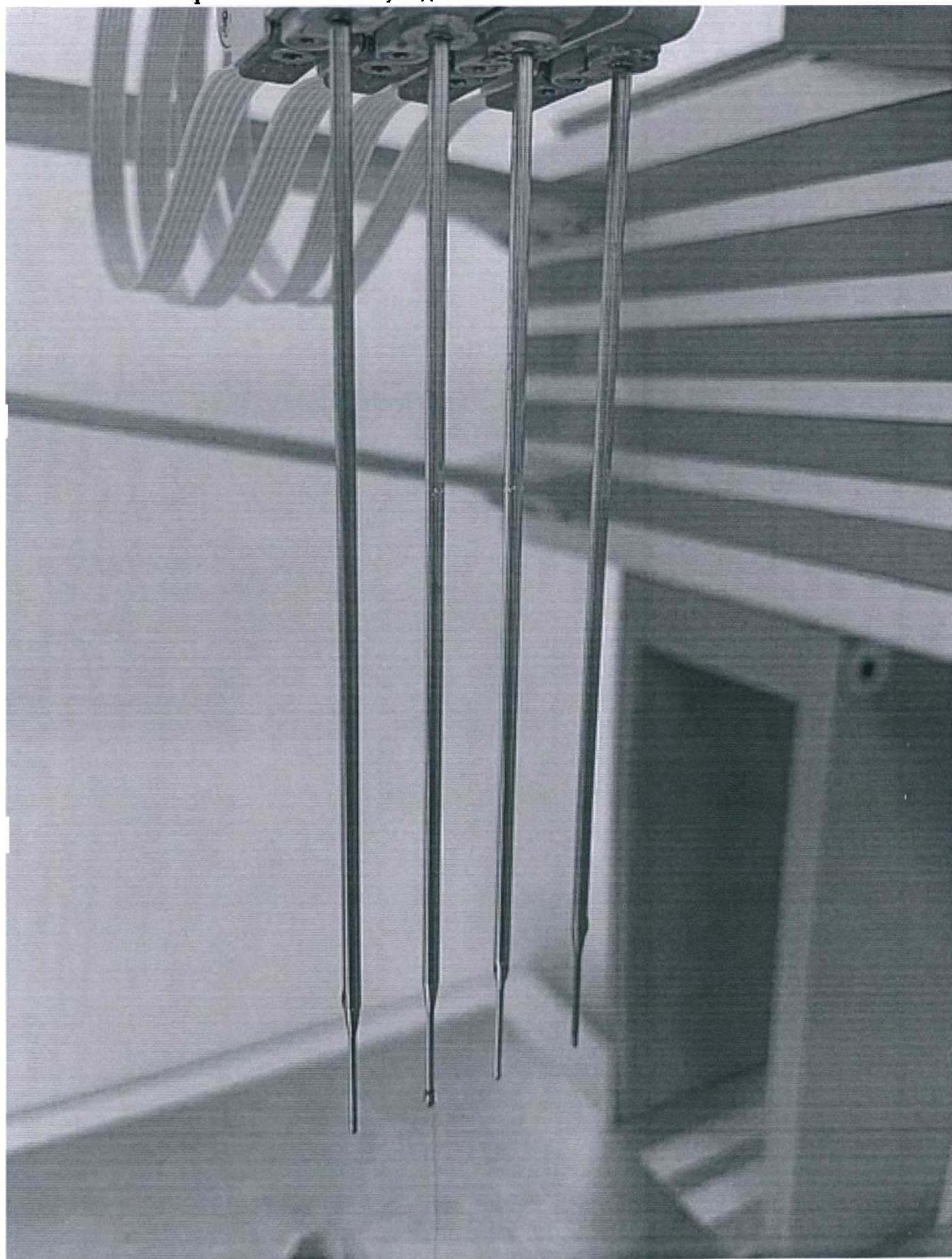

13. Держатель модель NOVAPREP HPV Aliquoting Decktray for aliquoting tubes (16 tubes) (при необходимости) – 1 шт.

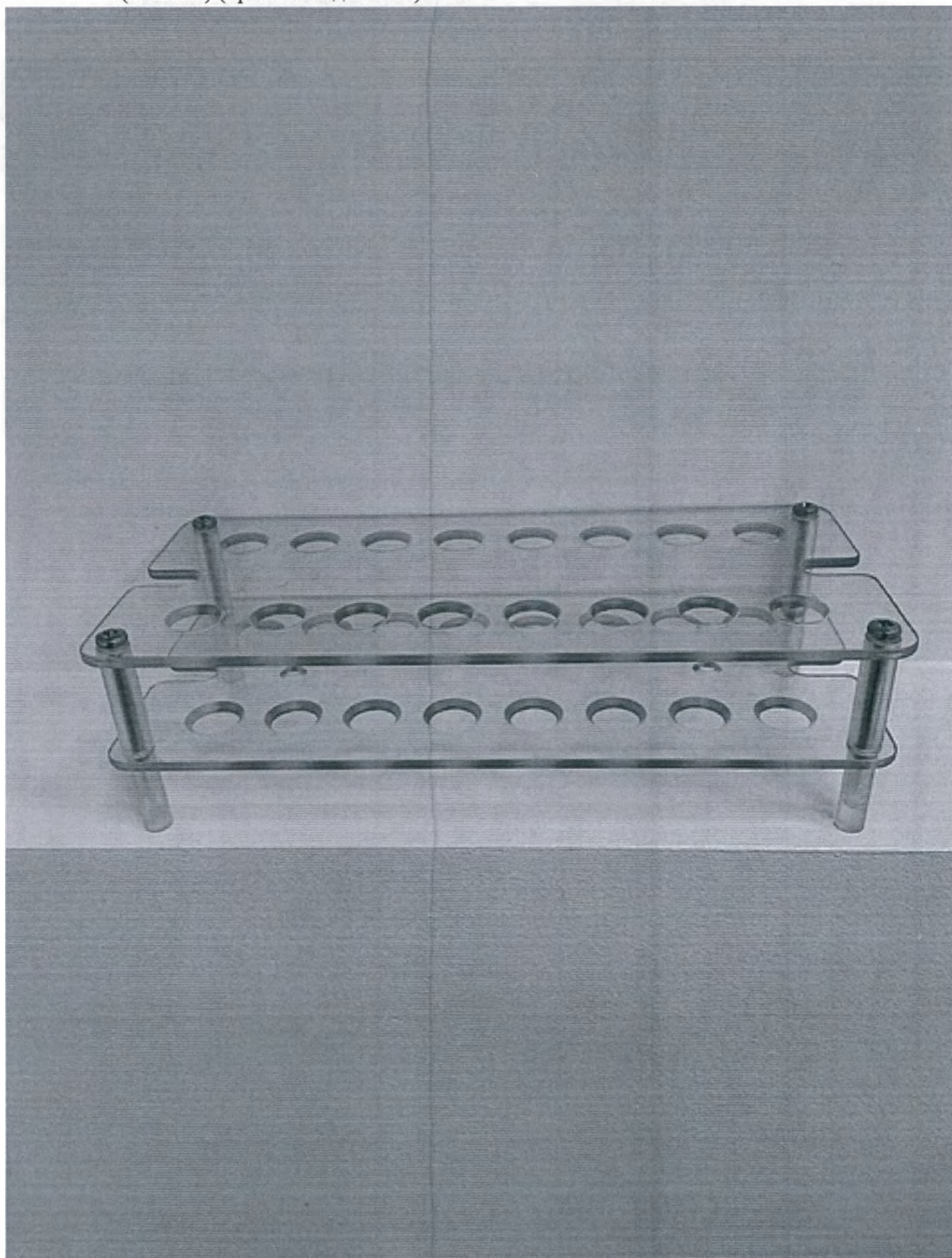

14. Держатель модель NOVAPREP HPV Aliquoting Decktray for DNA Pap Specimen Transport Medium (16 tubes) (при необходимости) – 1 шт.

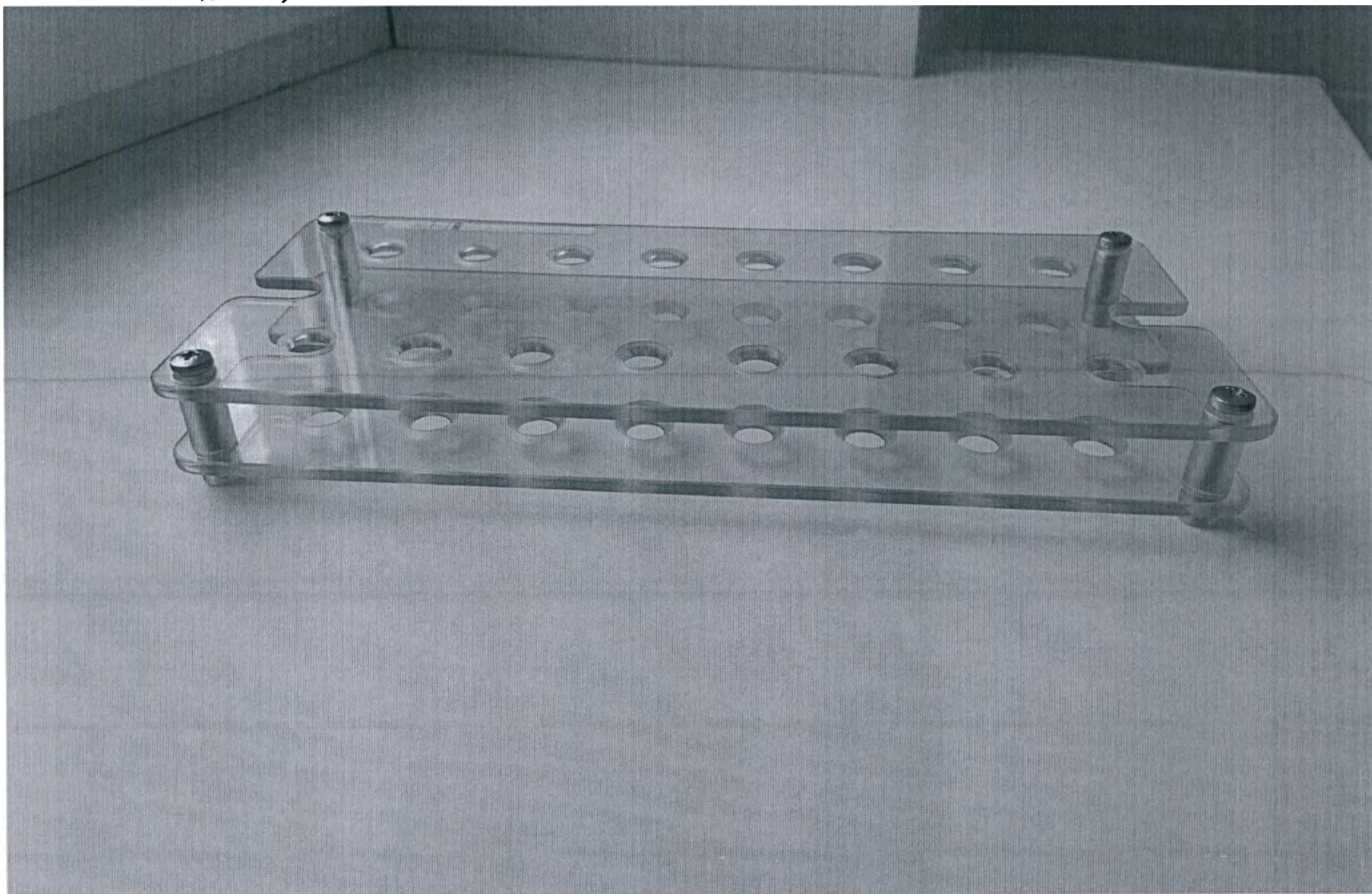

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


1. Ручной считыватель штрих-кодов модель Honeywell Xenon 1900 – 1 шт.



2. Сканер штрихкодов модель Zebra DS2278 2D – 1 шт.



**Транспортная упаковка системы автоматизированной для жидкостной цитологической диагностики
«NOVAPREP Processor System», с принадлежностями, вариант исполнения NPS 50**

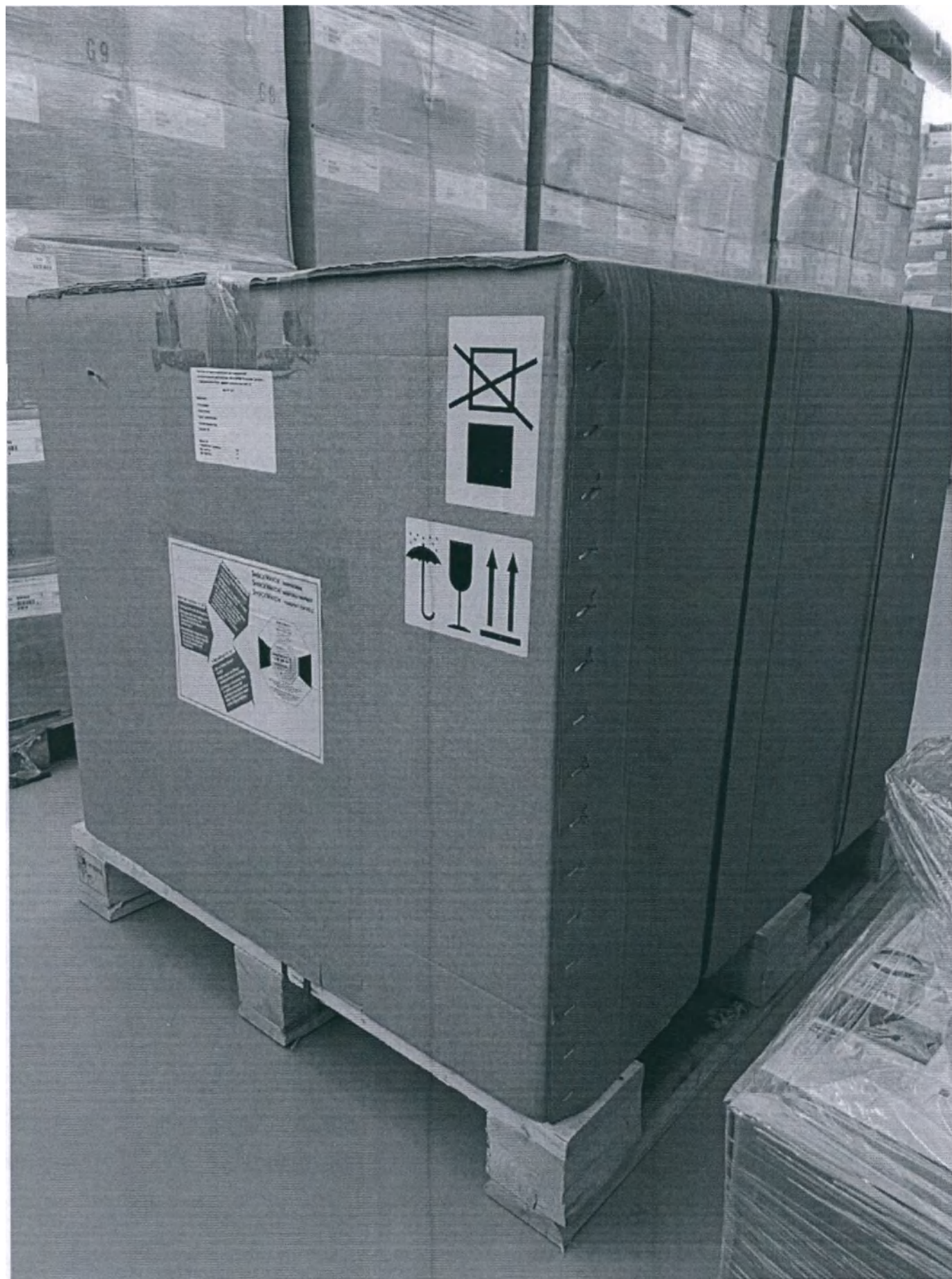

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

55 (пятьдесят пять)

листов

Генеральный директор

ООО «Альгимед»

Славашевич Д.Л.

«14» сентября 2018 года М.П.

